



TD Pilot

Kratke upute

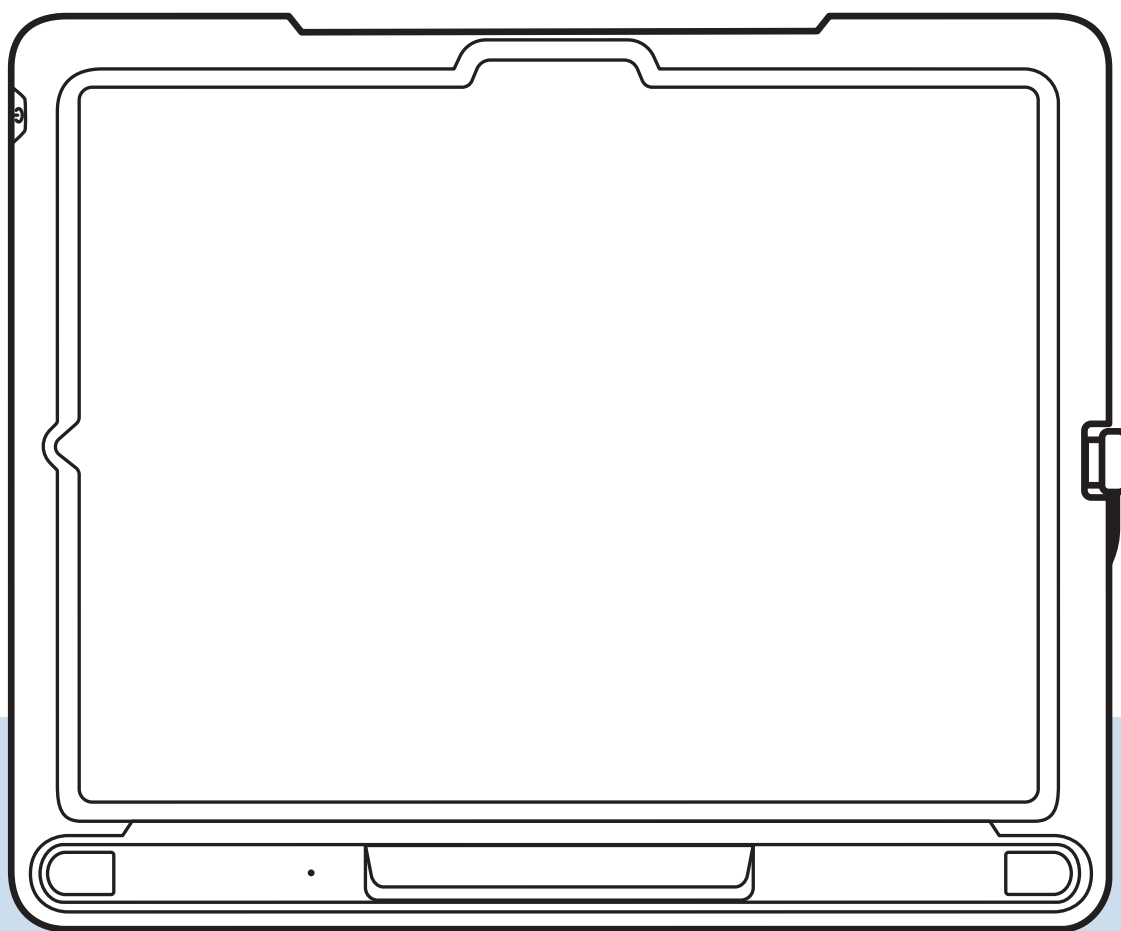

Skenirajte QR kod za pregled ovog dokumenta
na svim dostupnim jezicima na webu.
qrco.de/PilotDocs

Što je uključeno

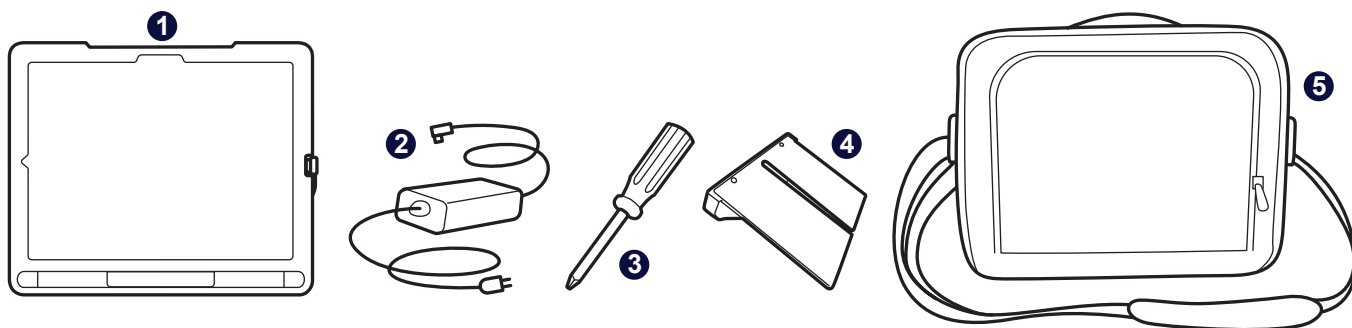

1 Uređaj TD pilot

2 Punjač s kabelom


Samo za korištenje s napajanjem NGE60-TD

3 Odvijač

4 Podesivi nosač

5 Torba za nošenje

Upoznajte svoj uređaj

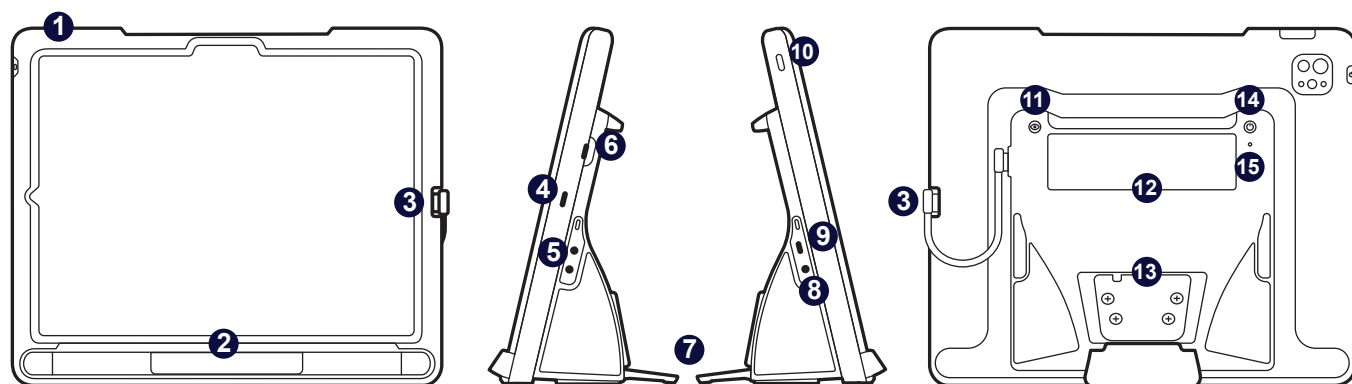

Prednja strana

Strane

Natrag

1 Gumbi za razinu glasnoće

2 Pratitelj oka

3 USB-C kabel

4 Priključak za punjenje iPada

5 Preklopni priključci

6 USB-C priključak (unutarjni)

7 Sklopiva noga

8 Ulaz za audio priključak

9 Priključak za napajanje

10 Gumb za uključivanje iPada

11 Gumb za praćenje statusa

12 Partnerski prozor


13 Pločica za montažu

14 Tipka za uključivanje TD Pilota


15 LED indikator statusa

Krenimo

Ove kratke upute su namijenjene dvjema osobama: osobi koja će koristiti uređaj za komunikaciju i pomoćniku koji može dodirivati zaslone i pomicati uređaj. Odjeljke s ikonom ruke mora ispuniti pomoćnik. Odjeljke s ikonom oka treba ispuniti korisnik AAC-a.

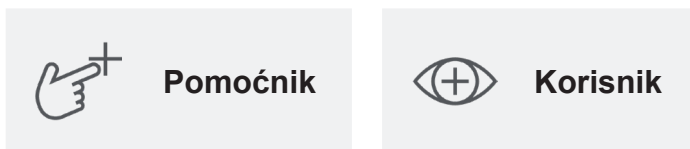

Uključivanje

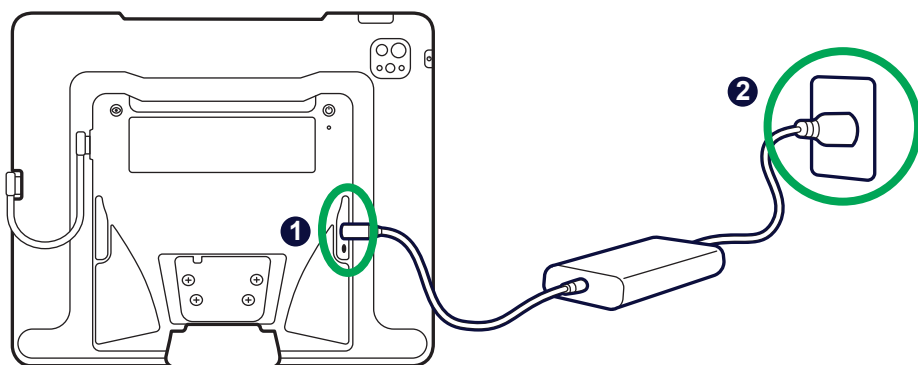

- 1 Otvorite zaštitni poklopac preko priključaka i spojite USB-C kabel punjača.
- 2 Uključite napajanje u utičnicu. TD Pilot će se automatski pokrenuti.



Upravljanje napajanjem TD Pilota

Kada je TD Pilot uključen, sustav za praćenje oka uvijek je aktivan, čak i kada je zaslon iPada zaključan. Zbog toga će se baterije prazniti kada je TD Pilot uključen, a nije priključen na vanjski izvor napajanja. Najbolje je ostaviti TD Pilot uključen u punjač kad god ga ne koristite.

Informacije o statusu baterije nalaze se u *TD CoPilot > Postavke > Baterija*.

Dodatne informacije o upravljanju napajanjem dostupne su u korisničkom priručniku za TD Pilot.



Postavljanje iPada

Slijedite upute na zaslonu za postavljanje iPada. Da biste uz kupnju dobili softver Tobii Dynavox, tijekom postavljanja morat ćete odabrati sljedeće:

- 1 Odaberite jezik i regiju.
- 2 Odaberite **veliku** veličinu slova.
Možda ćete biti upitani za prilagodbu postavki pisanog i govornog jezika. Odaberite na temelju osobnih preferencija.
- 3 Na zaslonu za brzi početak odaberite **Postavite bez drugog uređaja** ili **postavite ručno** .
- 4 Pridružite se Wi-Fi mreži, a zatim odaberite **Sljedeće** .
- 5 Na zaslonu Podaci i privatnost odaberite **Nastavi** . Ako se od vas zatraži prijenos aplikacija i podataka, odaberite **Ne prenosi ništa**.
- 6 Na zaslonu Udaljeno upravljanje odaberite **Registriraj ovaj iPad** .



Upozorenje

NEMOJTE odabrati Ukloni iPad iz organizacije. Ako odaberete ovu opciju, nećete primiti svoje komunikacijske aplikacije i uređaj će se morati vratiti tvrtki Tobii Dynavox radi rješavanja problema.



Napomena

Daljinsko upravljanje, poznato i kao MDM, omogućuje Tobii Dynavoxu slanje softvera i ažuriranja softvera na vaš iPad putem Wi-Fi mreže. Putem daljinskog upravljanja, Tobii Dynavox će imati pristup samo informacijama o hardverskim specifikacijama vašeg iPada, verziji operativnog sustava, instaliranim aplikacijama i sigurnosnim postavkama. Tobii Dynavox neće moći pristupiti vašim osobnim datotekama, fotografijama, kamerama, mikrofonima ili podacima o lokaciji.

- 7 Ako se od vas zatraži postavljanje Face ID-a, slobodno ga postavite ili ga za sada preskočite i postavite kasnije u Postavkama.
- 8 Postavljanje lozinke nije obavezno. Ako to sada preskočite, možete to postaviti kasnije u Postavkama.
- 9 Ako se od vas zatraži Apple ID, unesite Apple ID za korisnika, a ne za skrbnika. Ako za sada želite preskočiti unos Apple ID-a, odaberite **Zaboravili ste lozinku ili nemate Apple ID?**, a potom **Postavite kasnije u Postavkama** .
- 10 Prihvatite Uvjete i odredbe tvrtke Apple.
- 11 Odgovorite na preostale upite za postavljanje na temelju svojih osobnih preferencija.

Nakon što dovršite upute za postavljanje iPadOS-a, vidjet ćete početni zaslon s ikonama aplikacija.



Napomena

U nekom trenutku će se pojaviti skočni prozor s pitanjem spajate li slušalice. Odaberite **Drugi uređaj**.

Postavite pristup pogledom



Konfigurirajte zaslon za točnost pogleda

- 1 Dodirnite **Postavke** .



- 2 Na lijevoj strani dodirnite **Zaslon i svjetlina** kategorija.
- 3 S desne strane dodirnite **Tamno** .
- 4 Na desnoj strani pomaknite se prema dolje i dodirnite **Uvećanje zaslona** .
- 5 Odaberite **Veći tekst** .
- 6 Odaberite **Koristite uvećano**, a zatim odaberite **Gotovo**.



Postavljanje AssistiveTouch-a

- 1 Na lijevoj strani dodirnite **Pristupačnost**.
- 2 Na desnoj strani dodirnite **Dodirni**.
- 3 Dodirnite **Pomoćni dodir**, a zatim ga uključite.

Pogled u oči je sada omogućen. Vidjet ćete pokazivač koji pokazuje položaj vašeg oka. Na zaslonu se također pojavljuje gumb izbornika AssistiveTouch.



- 4 Povucite gumb izbornika AssistiveTouch u gornju trećinu zaslona s desne strane.



Kakve veze AssistiveTouch ima s pogledom?

AssistiveTouch je namijenjen osobama koje imaju poteškoća s dodirivanjem zaslona. Izbornik AssistiveTouch omogućuje vam izvođenje "dodirnih" funkcija, poput dodirivanja i pomicanja, pomoću pogleda. Također pruža prečace dostupne pogledom za stvari poput početnog zaslona i App Switcher-a, kojima se obično pristupa putem pokreta.



Prilagodite izbornik AssistiveTouch

- 1 Na desnoj strani odaberite **Prilagodi izbornik najviše razine**.
- 2 Dodirnite **+** za promjenu broja ikona na 8.
- 3 Dodirnite **Centar za obavijesti**.
- 4 Prijeđite prstom do dna popisa i dodirnite **Prebaci pauzu/nastavi zadržavanje**. Dodirnite izvan popisa da biste ga zatvorili.
- 5 Dodirnite gumb **Pokreti**.
- 6 Prijeđite prstom do, a zatim dodirnite **Premjesti izbornik**. Dodirnite bilo gdje izvan izbornika da biste ga zatvorili.
- 7 Nastavite uređivati ikone izbornika dok vaš izbornik ne bude odgovarao onome prikazanom desno.



Konfiguriraj kontrolu zadržavanja

- 1 S lijeve strane odaberite **Pristupačnost**.
- 2 S desne strane odaberite **Dodir**.
- 3 S desne strane odaberite **AssistiveTouch**.
- 4 Na desnoj strani prijeđite prstom do dna izbornika AssistiveTouch. Uključite **Kontrola zadržavanja**. Ako se od vas zatraži da prilagodite AssistiveTouch izbornik najviše razine, dodirnite **Ne**.



Savjet

Zadano vrijeme zadržavanja je 1,5 sekundi. Postavku vremena zadržavanja možete kasnije promijeniti prema svojim potrebama.



Omogući pogled kada je TD Pilot zaključan

- 1 S lijeve strane odaberite **Face ID i šifru**.
- 2 Unesite svoju lozinku.
- 3 Prijeđite prstom do dna i uključite **Pribor**.




Buđenje i otključavanje vašeg TD Pilota

TD Pilot se automatski budi kada praćenje pogleda detektira korisnikove oči. Otključajte TD Pilot odabirom gumba AssistiveTouch, a zatim Home.

Isprobajte sada:

- 1 Pritisnite gornji gumb za zaključavanje TD Pilota.

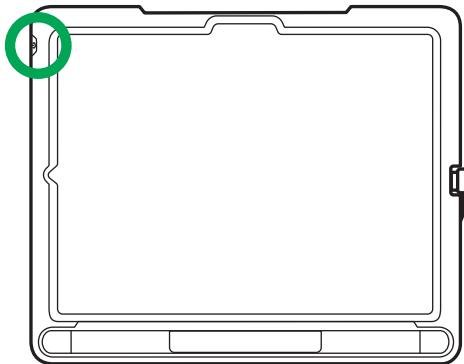

- 2 Pogledajte ekran nekoliko trenutaka. TD Pilot se budi i prikazuje zaključani zaslon.
- 3 Dodirnite ili upotrijebite oči za odabir gumb izbornika **AssistiveTouch**, a zatim odaberite **Početna**.



TD Pilot je sada otključan.



Savjet

Ako vas zanima dodatna sigurnost na vašem uređaju, preporučujemo korištenje Face ID-a. Face ID vam omogućuje otključavanje uređaja bez unosa lozinke svaki put. Postavite Face ID u *Postavke iPadOS-a* > *Face ID i lozinka*.





Odaberite i postavite svoju komunikacijsku aplikaciju



Napomena

Ako je aplikacija Postavke otvorena, prijedite prstom prema gore s dna zaslona da biste zatvorili aplikaciju.

- 1 Pomoću donje tablice odaberite komunikacijsku aplikaciju koja najbolje odgovara korisniku.
- 2 Pokrenite odabranu aplikaciju i slijedite upute za stvaranje novog korisnika ili vraćanje postojećeg korisnika.


	 TD Snap®	 TD Talk
Opis	TD Snap je aplikacija za generiranje govora za one kojima je potrebna podrška za simbole.	TD Talk je aplikacija za generiranje govora za ljude koji su pismeni i ne trebaju im pomoćni simboli.
Pisanje poruka	Poruke se sastavljaju pomoću gumba za riječi i fraze s pratećim simbolima. Dostupna je i zaslonska tipkovnica s predviđanjem riječi.	Poruke se sastavljaju pomoću zaslonske tipkovnice s predviđanjem riječi i fraza, slično kao kod SMS poruka.
Razina pismenosti	Od novonastalog do naprednog	Napredan
Dob	Svi uzrasti	Od tinejdžera do odraslih osoba
Podrška samoregulaciji	Da	Ne

Montaža i položaj


Pripremite korisnika za početak korištenja praćenja pogleda tako što ćete ga udobno smjestiti. Ako koristite naočale, provjerite da ih nose i da su im leće čiste.



Postavite TD Pilot na sustav za montažu ili stabilnu površinu ispred korisnika u razini očiju ili malo ispod nje. Ako im je glava nagnuta lijevo ili desno, nagnite uređaj u skladu s tim. Važno je da kut površine zaslona odgovara kutu lica korisnika. Većina korisnika, kada sjede za stolom ili radnim stolom, morat će imati uređaj postavljen više od površine stola.

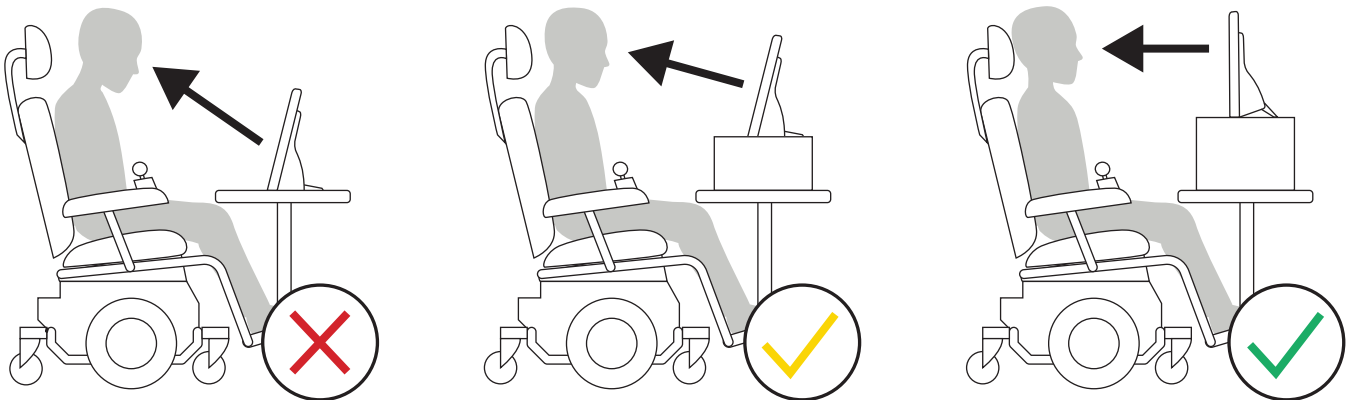

Možda ćete trebati precizirati položaj uređaja tijekom koraka kalibracije na sljedećoj stranici. Uvijek prilagodite položaj uređaja korisniku, a ne obrnuto.

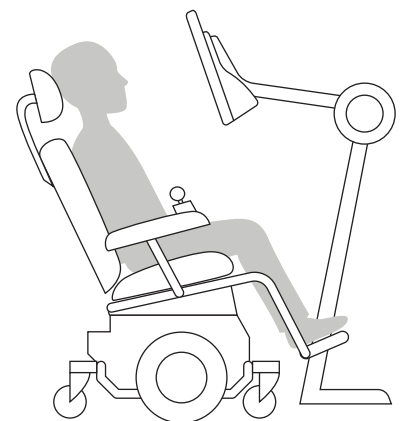

Napomena

Sustav za montažu najbolja je opcija za precizno pozicioniranje uređaja koji se lako podešava tijekom dana. Dostupne su brojne mogućnosti montaže, uključujući podnu, stolnu i montažu za invalidska kolica. Posjetite [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com) ili se obratite lokalnom Tobii Dynavox partneru.



Napomena

Ako je TD Snap® ili TD Talk otvoren, prijedite prstom prema gore s dna zaslona da biste zatvorili aplikaciju.

- 1 Dodirnite **TD CoPilot** aplikaciju.



- 2 Slijedite upute na zaslonu u CoPilotu za kalibraciju praćenja pogleda prema očima korisnika.
- 3 Kada korisnik završi s kalibracijom, povucite prstom prema gore s dna zaslona za povratak na početni zaslon.



Savjet

Upotrijebite App Switcher u izborniku AssistiveTouch za prebacivanje između otvorenih aplikacija.



Učite, vježbajte i rješavajte probleme

Vaš TD Pilot je sada spreman za upotrebu! Slobodno počnite istraživati svoj uređaj i aplikacije. Kada budete spremni saznati više, skenirajte QR kodove u nastavku kako biste dobili TD Snap® Osnovne kartice za obuku i TD Talk za iPadOS i AssistiveTouch kartice za obuku. Pokazuju vam kako koristiti glavne značajke komunikacijskih aplikacija, razviti vještine korištenja AAC-a i rješavati probleme.




Kartice za osnovnu obuku o aplikaciji TD Snap

qrco.de/bdPliQ



TD Talk za iPadOS i AssistiveTouch kartice za obuku

qrco.de/bdzoal

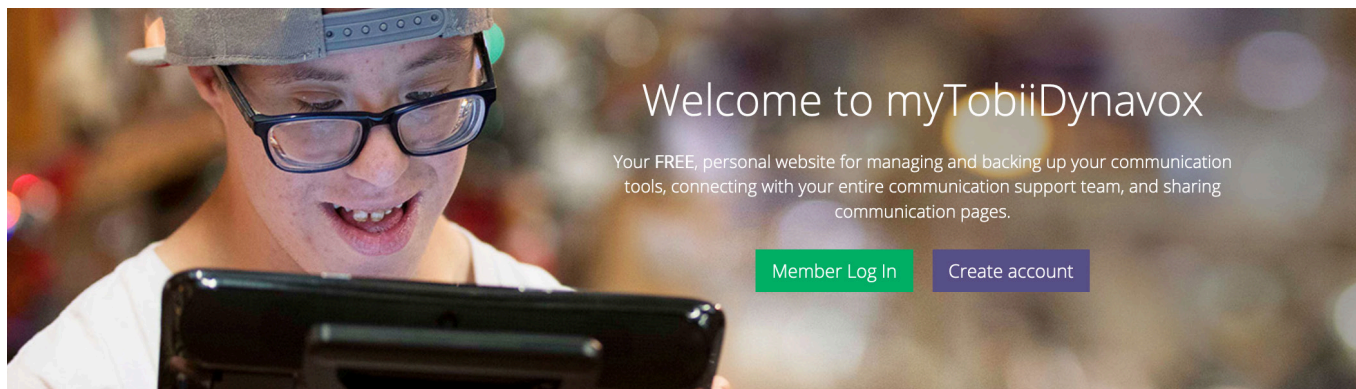

Vaš besplatni myTobiiDynavox.com račun omogućuje vam pristup brojnim pogodnostima, uključujući pohranu u oblaku za sigurnosne kopije, sinkronizaciju i dijeljenje skupa stranica, planove lekcija i još mnogo toga.

Pridruživanje će vam omogućiti:

- Sigurno napravite sigurnosnu kopiju svog sustava
- Preuzmite besplatne alate i resurse
- Zahtjev za popratne licence i upravljanje njima
- Saznajte više o dostupnim ažuriranjima
- Pristup tehničkoj podršci i često postavljanim pitanjima
- Dijelite setove stranica i pakete stranica



myTobiiDynavox
myTobiiDynavox.com

Prateće licence



Vaš TD Pilot dolazi s dvije prateće licence za TD Snap®. Popratne licence omogućuju vam korištenje TD Snapa na dodatnim Windows ili iPadOS uređajima. Popratne licence se preuzimaju i njima se upravlja putem vašeg myTobiiDynavox računa.

Zatražite svoje TD Snap prateće licence

- 1 Na svom TD Pilot uređaju prijavite se na svoj myTobiiDynavox račun u TD Snapu.
(Uredi > Korisnik > myTobiiDynavox račun)
- 2 Na svom popratnom uređaju instalirajte TD Snap. Instalacija TD Snapa je dostupna na mytobiidynavox.com/Support/TDSnap i Apple App Store.
- 3 Na svom uređaju za povezivanje otvorite TD Snap i prijavite se na isti myTobiiDynavox račun.
(Uredi > Korisnik > myTobiiDynavox račun)



Savjet

Pomoću popratnog uređaja modelirajte korištenje AAC-a i uredite skupove stranica kako ne biste prekidali korisnika AAC-a na njegovom vlastitom uređaju.

Dodatni resursi



Korisnički priručnik za TD Pilot

qrco.de/PilotDocs



TD Facebook zajednica

qrco.de/TDFB



Kartice za softversku obuku

qrco.de/be9m4o



Jamstva za proizvode

qrco.de/wrtgIbl



Dokumentacija

TD CoPilot > Postavke > Pomoć



Tehnička podrška

Za tehničku podršku obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Tobii Dynavox.