



TD Pilot

Bevezető útmutató

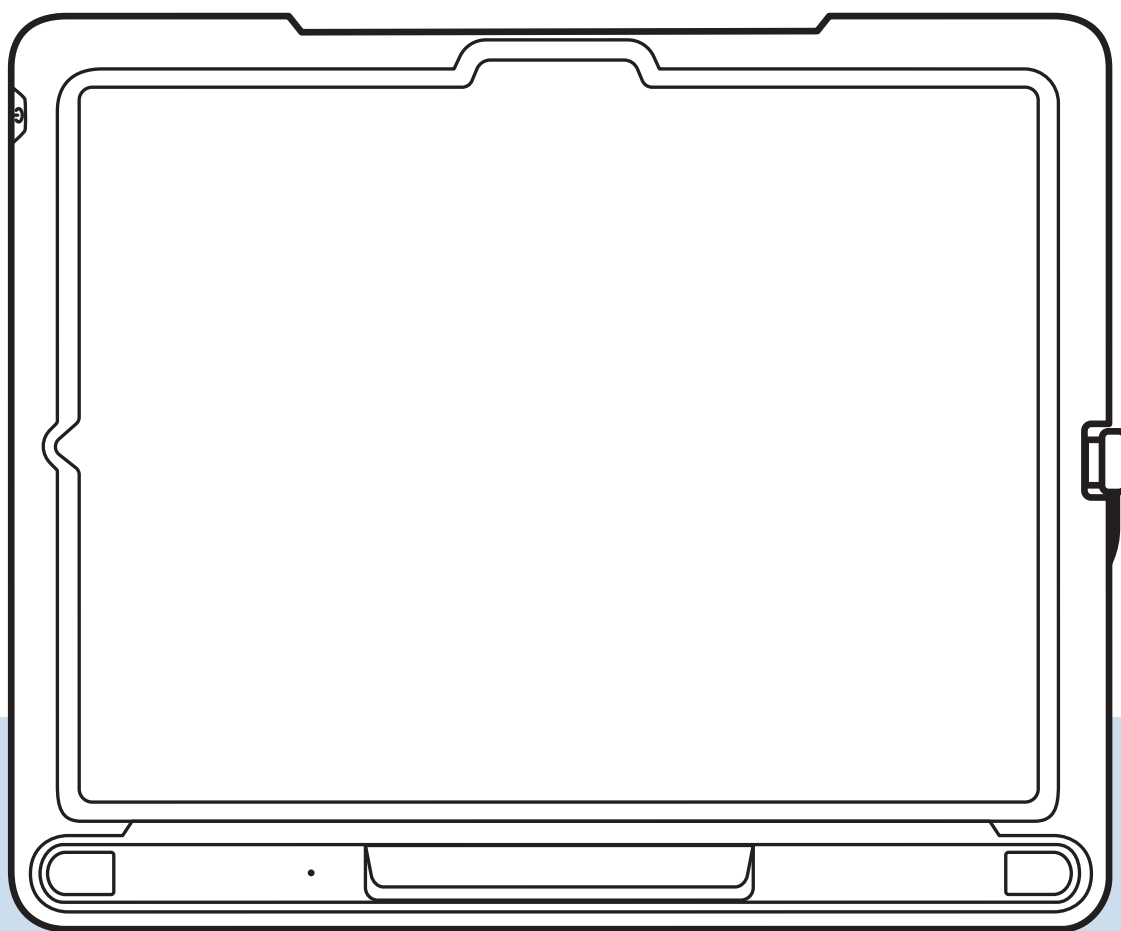

Olvassa be a QR-kódot, hogy megtekintse ezt a dokumentumot az összes elérhető nyelven online a qrco.de/PilotDocs oldalon.

Mit tartalmaz?

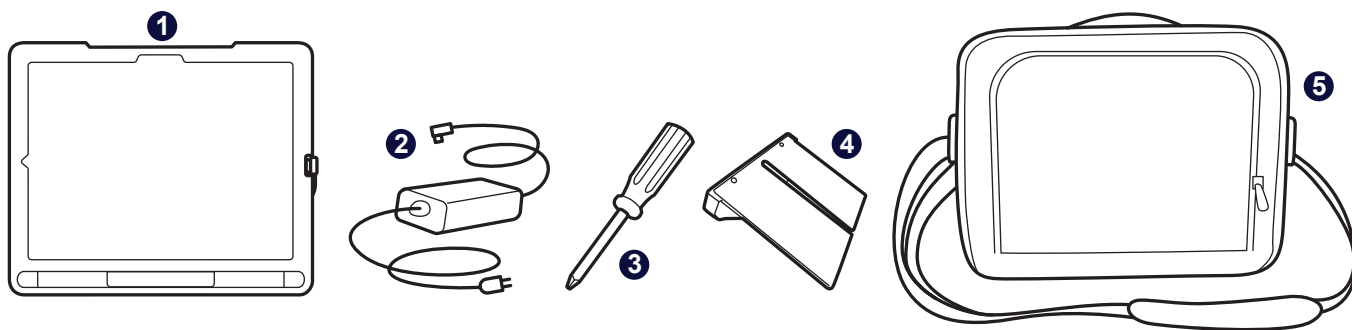

1 TD Pilot eszköz

2 Töltő kábel


Kizárólag az NGE60-TD tápegységgel használható

3 Csavarhúzó

4 Állítható konzol

5 Szállítótáska

Ismerd meg a készüléked

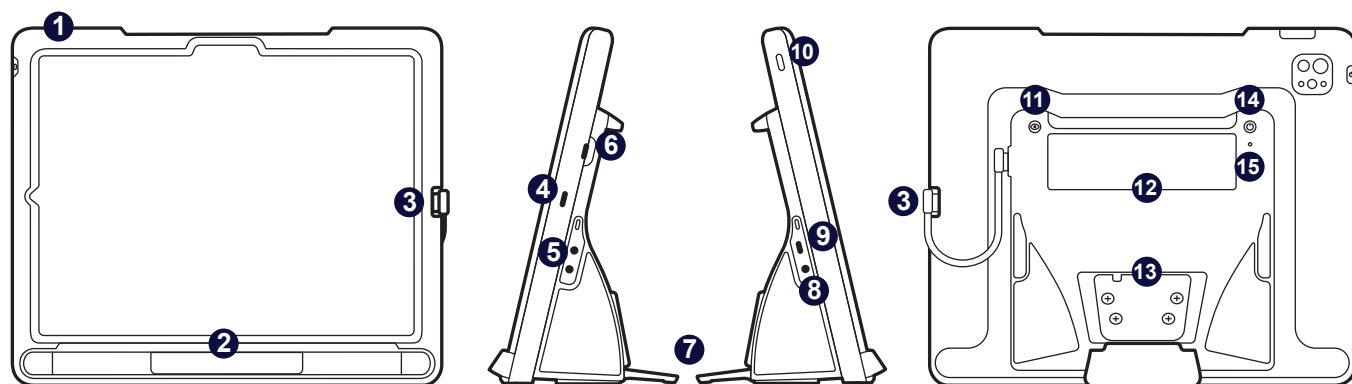

Elülső oldal

Oldalak

Vissza

1 Hangerőgombok

2 Szemkövető

3 USB-C kábel

4 iPad töltőcsatlakozó

5 Kapcsolóportok

6 USB-C csatlakozó (belső)

7 Összecsukható láb

8 Audio jack csatlakozó

9 Tápcsatlakozó

10 iPad bekapcsológomb

11 Állapot nyomon követése gomb

12 Partner ablak

13 Szerelőlemez

14 TD Pilot bekapcsológomb

15 Állapot LED

Kezdjük el!

Ez az Útmutató két személy számára készült: annak, aki a készüléket kommunikációra fogja használni, és annak, aki megérinti a képernyőt és mozgatja a készüléket. A kéz ikonnal jelölt részeket a segítőnek kell kitöltenie. A szem ikonnal jelölt részeket az AAC-felhasználónak kell kitöltenie.




Segítő



Felhasználó



Bekapcsolás

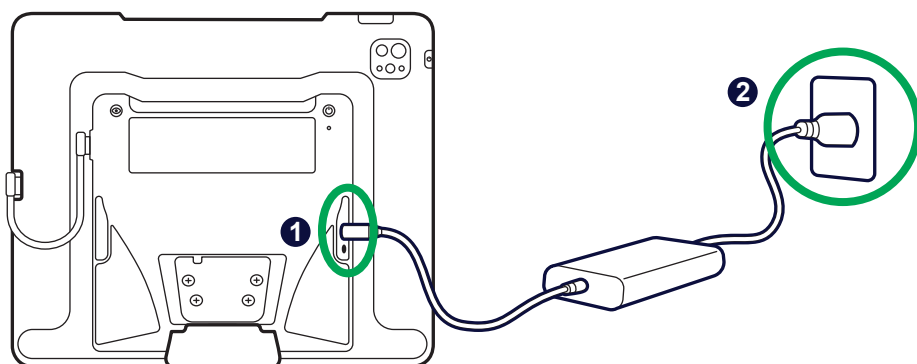

- 1 Nyissa ki a portok védőburkolatát, és csatlakoztassa a töltő USB-C kábelt.
- 2 Csatlakoztassa a tápegységet egy konnektorhoz. A TD Pilot automatikusan elindul.



TD Pilot energiagazdálkodás

A TD Pilot bekapcsolásakor a szemkövető mindig aktív, még akkor is, ha az iPad képernyője zárolva van. Emiatt az akkumulátorok lemerülnek, ha a TD Pilot be van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva külső áramforráshoz. A TD Pilot készüléket a töltőhöz csatlakoztatva kell tartani, amikor nem használja.

Az akkumulátor állapotára vonatkozó információk a *TD CoPilot* > *Beállítások* > *Akkumulátor* menüpontban található.

Az energiagazdálkodással kapcsolatos további információk a TD Pilot felhasználói kézikönyvben található.



iPad beállítás

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az iPad beállításához. Ahhoz, hogy megkapja a vásárlásához tartozó Tobii Dynavox szoftvert, a beállítás során a következőket kell kiválasztania:

- 1 Válassza ki a nyelvet és a régiót.
- 2 Válassza a **nagy** betűméretet.
Lehet, hogy a rendszer arra kéri, hogy testreszabja az írott és beszélt nyelvi beállításokat. Válasszon a személyes preferenciái alapján.
- 3 A Gyorsindítás képernyőn válassza a **Beállítás másik eszköz nélkül** vagy a **Beállítás manuálisan** lehetőséget.
- 4 Csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz, majd válassza a **Tovább gombot**.
- 5 Az Adatok és adatvédelem képernyőn válassza a **Folytatás lehetőséget**. Ha az alkalmazások és adatok átvitelére vonatkozó kérdés jelenik meg, válassza a **Semmit sem továbbít** lehetőséget.
- 6 A Távoli felügyelet képernyőn válassza az iPad **regisztrálása** lehetőséget.



Figyelem!

NE válassza az iPad eltávolítása a szervezetből lehetőséget. Ha ezt az opciót választja, akkor nem fogja megkapni a kommunikációs alkalmazásokat, és a készüléket vissza kell küldenie a Tobii Dynavox számára a probléma megoldása érdekében.



Megjegyzés:

A távoli felügyelet, más néven MDM, lehetővé teszi a Tobii Dynavox számára, hogy Wi-Fi-n keresztül szoftvereket és szoftverfrissítéseket küldjön az iPad készülékére. A távoli felügyelet révén a Tobii Dynavox csak az iPad hardveres specifikációival, az operációs rendszer verziójával, a telepített alkalmazásokkal és a biztonsági beállításokkal kapcsolatos információkhoz fér hozzá. A Tobii Dynavox nem férhet hozzá az Ön személyes fájljaihoz, fényképeikhez, kameráihoz, mikrofonjaihoz vagy helyadataikhoz.

- 7 Ha a rendszer kéri a Arc azonosító beállítását, nyugodtan állítsa be, vagy hagyja ki egyelőre, és állítsa be később a Beállítások menüben.
- 8 A jelszó beállítása opcionális. Ha most kihagyja, később beállíthatja a Beállítások menüben.
- 9 Ha a rendszer az Apple azonosító megadására kéri, írja be a felhasználó Apple azonosítóját, nem a gondozóét. Ha egyelőre nem szeretné megadni az Apple azonosítóját, válassza az **Elfelejtett jelszó vagy a Nem rendelkezem Apple azonosítóval** lehetőséget, majd a Beállítások menüben a Később beállít lehetőséget.
- 10 Fogadja el az Apple Általános Szerződési Feltételeit.
- 11 Válaszoljon a fennmaradó beállítási kérdésekre személyes preferenciái alapján.

Miután elvégezte az iPadOS beállítási utasításait, megjelenik a kezdőképernyő, amelyen az alkalmazásokonok találhatóak.



Megjegyzés:

Egy bizonyos ponton megjelenik egy felugró üzenet, amely megkérdezi, hogy fejhallgatót csatlakoztat-e. Válassza az **Más eszköz** lehetőséget.

A szemmozgásos hozzáférés beállítása



A tekintet pontosságának beállítása a kijelzőn

- 1 Érintse meg a **Beállítások** elemet.



- 2 A bal oldalon érintse meg a **Kijelző és fényerő** kategóriát.
- 3 A jobb oldalon érintse meg a **Sötét lehetőséget**.
- 4 A jobb oldalon görgessen lefelé, és koppintson a **Kijelző nagyítása** lehetőségre.
- 5 Válassza a **Nagyobb szöveg** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Nagyítva használ** lehetőséget, majd válassza a **Kész** lehetőséget.



AssistiveTouch beállítása

- 1 A bal oldalon érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet.
- 2 A jobb oldalon érintse meg az **Érintés** gombot.
- 3 Érintse meg az **AssistiveTouch** elemet, majd kapcsolja be.

A szemmozgás mostantól engedélyezve van. Megjelenik a mutatókurzor, amely a tekintete pontját jelzi. Az AssistiveTouch menügomb is megjelenik a képernyőn.



- 4 Húzza az AssistiveTouch menügombot a képernyő jobb oldalának felső harmadába.



Mi köze van az AssistiveTouch funkciónak a szemmozgáshoz?

Az AssistiveTouch azoknak készült, akiknek nehézséget okoz a képernyő megérintése. Az AssistiveTouch menü lehetővé teszi, hogy a tekintetével „érintéses” funkciókat hajtson végre, például koppintást és görgetést. Emellett olyan funkciókhoz is nyújt tekintettel elérhető gyorsbillentyűket, mint a kezdőképernyő és az App Switcher alkalmazásváltó, amelyekhez általában kézmozdulatokkal lehet hozzáférni.



Az AssistiveTouch menü testreszabása

- 1 A jobb oldalon válassza a **Felső szintű menü testreszabása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **+** gombot, hogy az ikonok számát 8-ra állítsa.
- 3 Érintse meg az **Értesítési központot**.
- 4 Csúsztassa ujját a lista aljára, és koppintson a **Szünet/Folytatás bekapcsolása/kikapcsolása elemre**. Érintse meg a lista külső részét a bezáráshoz.
- 5 Érintse meg a **Mozdulatok** gombot.
- 6 Csúsztassa ujját, majd érintse meg a **Mozgatás menüt**. A menü bezárásához érintse meg a menü bármelyik pontját.
- 7 Folytassa a menüikonok szerkesztését, amíg a menü meg nem egyezik a jobb oldalon láthatóval.



A várakozási idő vezérlésének konfigurálása

- 1 A bal oldalon válassza az **Akadálymentesség lehetőséget**.
- 2 A jobb oldalon válassza az **Érintés lehetőséget**.
- 3 A jobb oldalon válassza az **AssistiveTouch lehetőséget**.
- 4 A jobb oldalon csúsztassa ujját az AssistiveTouch menü aljára. Kapcsolja be a **Várakozási idő vezérlése** funkciót. Ha a rendszer kéri, hogy testreszabja az AssistiveTouch felső szintű menüt, érintse meg a **Nem** gombot.



Tipp

Az alapértelmezett várakozási idő 1,5 másodperc. A várakozási idő beállítását később az igényeinek megfelelően módosíthatja.



Engedélyezze a szemmozgás követését, amikor a TD Pilot zárva van

- 1 A bal oldalon válassza az **Arc azonosítás és a Jelszó** lehetőséget.
- 2 Írja be a jelszavát.
- 3 Csúsztasson az aljára, és kapcsolja be a **Tartozékokat**.




A TD Pilot ébresztése és feloldása

A TD Pilot automatikusan felébred, amikor a szemkövető érzékeli a felhasználó szemét. A TD Pilot feloldásához válassza az AssistiveTouch gombot, majd a Kezdőoldal gombot.

Próbálja ki most:

- 1 A TD Pilot rögzítéséhez nyomja meg a felső gombot.

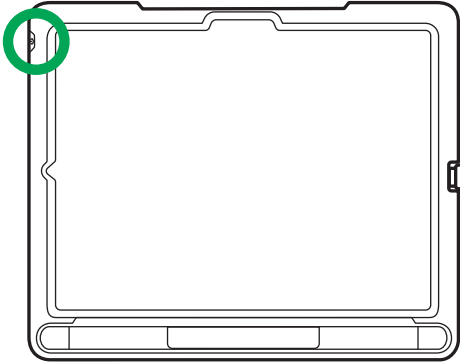

- 2 Nézzon a képernyőre néhány pillanatig. A TD Pilot felébred és megjeleníti a zárolási képernyőt.
- 3 Érintse meg vagy szemével válassza ki az **AssistiveTouch** menügombot, majd válassza a **Kezdőlap** lehetőséget.



A TD Pilot mostantól fel van oldva.



Tipp

Ha további biztonságot szeretne eszközén, javasoljuk az Arc azonosító használatát. Az Arc azonosító segítségével a készüléket jelszó megadása nélkül is feloldhatja. Állítsa be az Arc azonosítót az *iPadOS Beállítások > Arc azonosító és Jelszó* menüpontban.





Válassza ki és állítsa be a kommunikációs alkalmazást



Megjegyzés


Ha a Beállítások alkalmazás meg van nyitva, csúsztasson felfelé a képernyő aljáról az alkalmazás bezárásához.

- 1 Az alábbi táblázat segítségével azonosítsa a felhasználó számára legmegfelelőbb kommunikációs alkalmazást.
- 2 Indítsa el a kiválasztott alkalmazást, és kövesse az utasításokat egy új felhasználó létrehozásához vagy egy meglévő felhasználó visszaállításához.


	 TD Snap®	 TD Talk
Leírás	A TD Snap egy beszédgeneráló alkalmazás azok számára, akik szimbólumtámogatásra szorulnak.	A TD Talk egy beszédgeneráló alkalmazás azok számára, akik írástudók és nem szorulnak kiegészítő szimbólumokra.
Üzenetek írása	Az üzenetek szó- és kifejezésgombok, valamint kiegészítő szimbólumok segítségével állíthatók össze. Szóelőrejelzéssel ellátott képernyőn megjelenő billentyűzet is rendelkezésre áll.	Az üzenetek szövegszerkesztő billentyűzettel íródnak, szavak és kifejezések előrejelzésével, hasonlóan az SMS-üzenetekhez.
Írás-olvasási szint	Kezdő szinttől haladó szintig	Speciális
Korosztályok	Minden korosztály	Tinédzser-felnőtt
Az önszabályozás támogatása	Igen	Nem

Beszerelés és elhelyezés


Készítse elő a felhasználót a szemkövető használatának megkezdésére úgy, hogy kényelmes pozícióba helyezi el. Ha szemüveget használ, győződjön meg arról, hogy viseli, és hogy a lencsék tiszták.

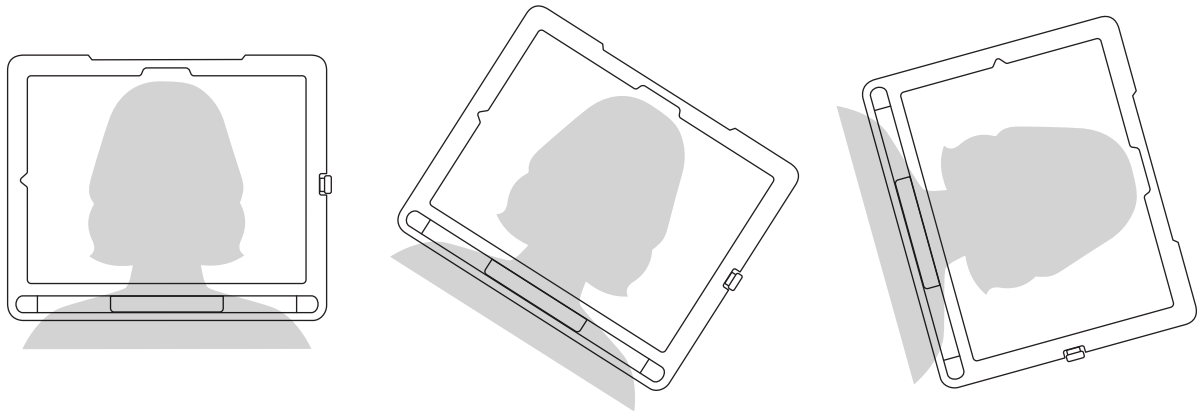

Helyezze a TD Pilot eszközt a tartórendszerre vagy egy stabil felületre a felhasználó előtt, a szemszintjével egy magasságban vagy kissé alatta. Ha a feje balra vagy jobbra van döntve, akkor az eszközt is döntse meg ugyanúgy. Fontos, hogy a képernyő felületének szöge megegyezzen a felhasználó arcának szögével. A legtöbb felhasználónak, amikor asztalnál vagy íróasztalnál ülnek, az eszközt az asztal felületénél magasabbra kell helyezniük.

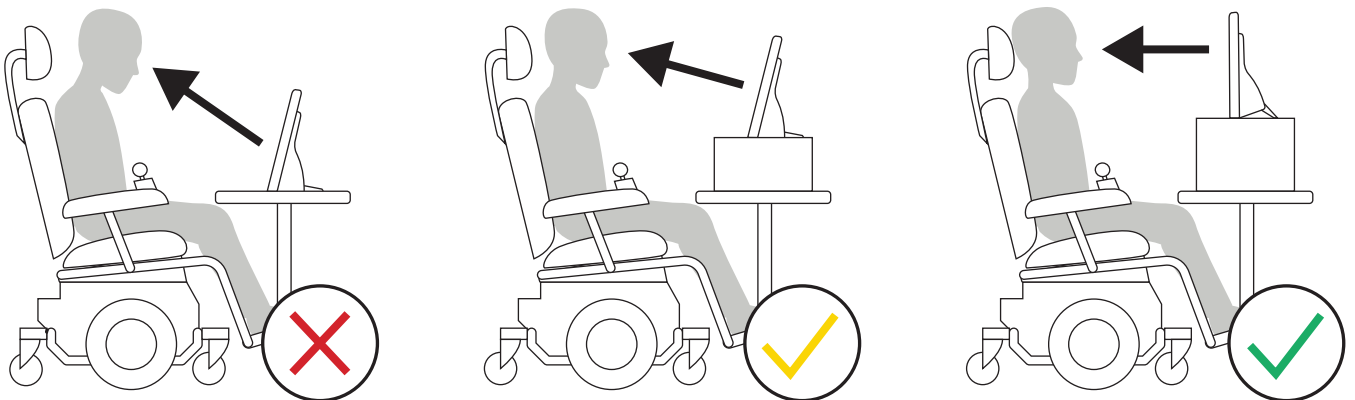

Lehet, hogy a következő oldalon található kalibrálási lépések során igazítania kell a készülék helyzetén. Mindig a felhasználóhoz igazítsa a készülék helyzetét, ne fordítva.

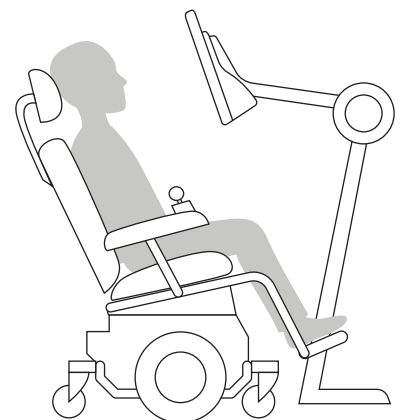

Megjegyzés

A tartórendszer a legjobb megoldás a készülék pontos pozicionálásához, amely a nap folyamán könnyen beállítható. Többféle rögzítési lehetőség áll rendelkezésre, beleértve a padlóra, asztalra és kerekesszékre szerelhető rögzítéseket. Látogasson el a [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com) weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Tobii Dynavox partnerével.



Kalibrálhatok



Megjegyzés

Ha a TD Snap® vagy a TD Talk alkalmazás meg van nyitva, csúsztasson felfelé a képernyő aljáról az alkalmazás bezárásához.

- 1 Érintse meg a **TD CoPilot** alkalmazást.



- 2 Kövesse a CoPilot képernyőjén megjelenő utasításokat a szemkövetőnek a felhasználó szeméhez kalibrálásához.
- 3 Amikor a felhasználó befejezte a kalibrálást, csúsztasson felfelé a képernyő aljáról, hogy visszatérjen a kezdőképernyőre.



Tipp

Az AssistiveTouch menüben található Switcher alkalmazásváltó segítségével válthat a megnyitott alkalmazások között.



Tanuljon, gyakoroljon és oldjon meg problémákat

A TD Pilot mostantól használatra kész! Kezdje el bátran felfedezni készülékét és alkalmazásait. Ha többet szeretne megtudni, olvassa be az alábbi QR-kódokat, hogy megkapja a TD Snap® alapképzési kártyákat, a TD Talk for iPadOS alkalmazást és az AssistiveTouch képzési kártyákat. Megmutatják, hogyan használhatja a kommunikációs alkalmazások főbb funkcióit, hogyan fejlesztheti az AAC-készségeket és hogyan oldhatja meg a problémákat.




TD Snap alapjai
Képzési kártyák

qrco.de/bdPliQ



TD Talk iPadOS és
AssistiveTouch
képzési kártyákhoz


qrco.de/bdzoal

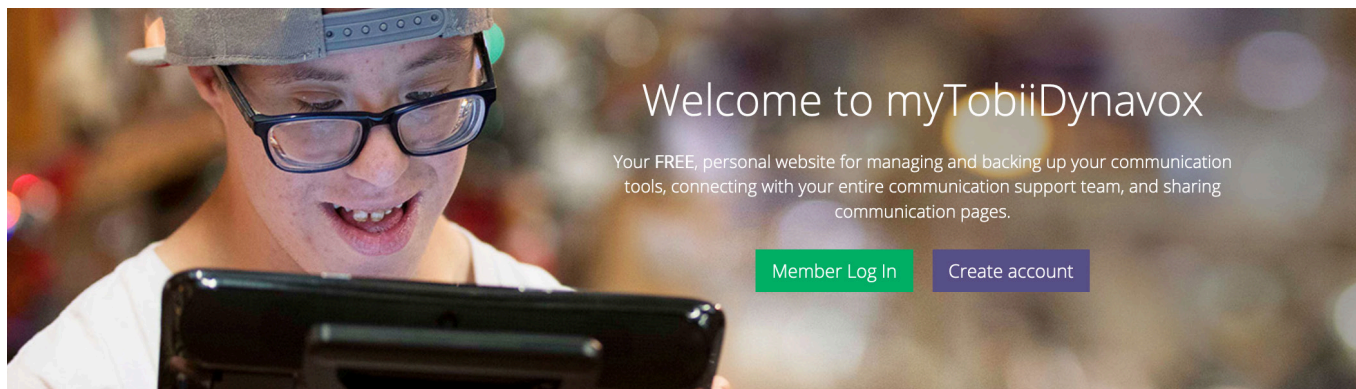

Az ingyenes myTobiiDynavox.com fiókja számos előnyt kínál, többek között felhőalapú tárolót biztonsági mentésekhez, oldalkészletek szinkronizálását és megosztását, óravázlatokat és még sok más.

A csatlakozás lehetővé teszi Önnek, hogy:

- Biztonságosan készítsen biztonsági másolatot a rendszeréről
- Ingyenesen töltsen le az eszközöket és forrásokat
- Kísérő licencet igényeljen és kezeljen
- Megismerje a rendelkezésre álló frissítéseket
- Technikai támogatás és GYIK
- Megosszon oldalkészleteket és az oldalcsomagokat

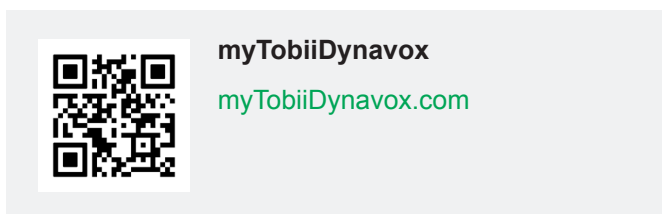

Kísérő licenc



A TD Pilot két kiegészítő licenccel rendelkezik a TD Snap® szoftverhez. A kísérő licenc lehetővé teszi a TD Snap használatát további Windows vagy iPadOS eszközökön. A kísérő licencet a myTobiiDynavox fiókján keresztül igényelheti és kezelheti.

Igényelje TD Snap kísérő licencét

- 1 A TD Pilot eszközön jelentkezzen be a myTobiiDynavox fiókjába a TD Snap alkalmazásban.
(Szerkesztés > Felhasználó > myTobiiDynavox fiók)
- 2 Telepítse a TD Snap alkalmazást a társult eszközére. A TD Snap telepítőprogramok a mytobiidynavox.com/Support/TDSnap oldalon és az Apple App Store-ban érhetők el.
- 3 Nyissa meg a TD Snap alkalmazást a kísérő eszközön, és jelentkezzen be ugyanarra a myTobiiDynavox fiókra.
(Szerkesztés > Felhasználó > myTobiiDynavox fiók)



Tipp: Használja kiegészítő eszközét az AAC használatának modellezéséhez és az oldalkészletek szerkesztéséhez, hogy ne zavarja meg az AAC-felhasználót a saját eszközén.

További források



TD Pilot felhasználói kézikönyv

qrco.de/PilotDocs



TD Facebook közösség

qrco.de/TDFB



Szoftveres képzési kártyák

qrco.de/be9m4o



Termékgaranciák

qrco.de/wrtgIbl



Dokumentáció

TD CoPilot > Beállítások > Súgó



Műszaki támogatás

Műszaki támogatásért forduljon a helyi Tobii Dynavox képviselőjéhez.