


TD Pilot med TD Snap

Vejledning

start her

Kassens indhold

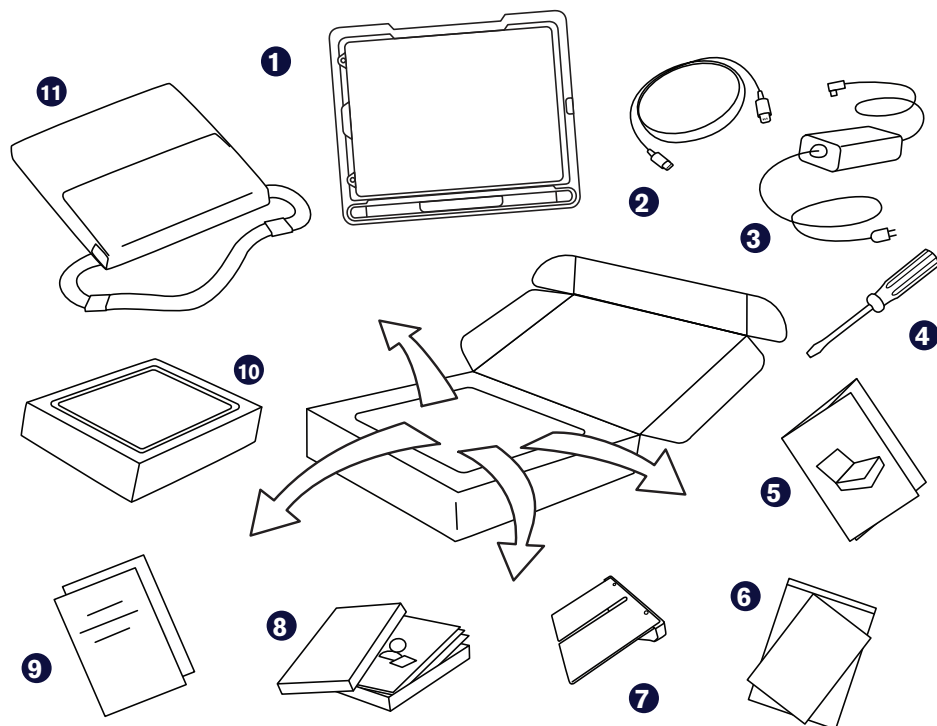

1 Samlet enhed

(iPad Pro 12,9", TD Pilot, beskyttelsesetui, monteringsbeslag til ConnectIT/Rehadapt, USB-C-kabel-til-USB-C, forudinstalleret batteri)

2 Kabel Lightning til USB-C

3 Oplader med kabel

4 Skruetrækker

5 Vejledning

6 Dokument om sikkerhed og standarder

7 Justerbart beslag

8 Undervisningskort til TD Snap Core First

9 Garantidokumenter

10 iPad-kasse (med oplader til iPad)

11 Bæretaske

Lad os komme i gang

Vejledningen er målrettet to personer: Personen, som skal bruge enheden til at kommunikere, og hjælperen, som kan trykke på skærmen og flytte enheden. Afsnittene med håndikonet skal læses af hjælperen. Afsnittene med øjenikonet skal læses af personen, som skal bruge enheden ved hjælp af øjenstyring. Personen vil være i stand til at bruge øjenstyring til at kommunikere i appen TD Snap, når vedkommende har gennemgået trinnene i vejledningen.

Hjælper




Bruger



Tænd/sluk

- 1 Slut opladningskablet til opladningsporten på siden af TD Pilot, og sæt ledningen i en stikkontakt.
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af TD Pilot for at tænde enheden.
- 3 Tryk på tænd/sluk-knappen på iPad'en for at tænde enheden.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere iPad'en.

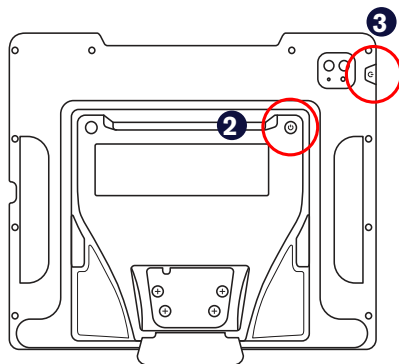

Skærmen Hjem vises med dine appikoner, når du har afsluttet konfigurationen af din iPad.

Konfigurer TD Snap


- 1 Vælg appen **TD Snap**.




- 2 Følg anvisningerne for at konfigurere din bruger til TD Snap. Husk at vælge øjenstyring som adgangsmetode.

Montering og placering


Gør brugeren klar til at bruge øjenstyring ved at placere vedkommende i en komfortabel stilling. Sørg for, at brugeren eventuelt bruger sine briller, og at brillerne er pudsede.

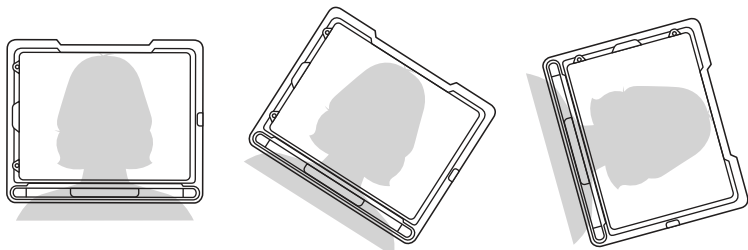

Placer TD Pilot på monteringsystemet eller en stabil overflade foran brugeren i eller lidt under øjenhøjden på vedkommende. Hvis brugeren læner sit hoved til venstre eller højre, skal du vippe TD Pilot tilsvarende. Det er vigtigt, at vinklen på skærmens overflade svarer til vinklen på brugerens ansigt. TD Pilot skal placeres højere end bordfladen for de fleste brugere, når de sidder ved et bord eller et skrivebord.

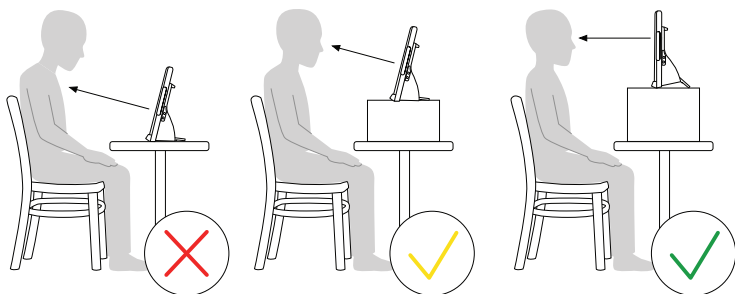

Du skal muligvis finindstille placeringen af enheden under kalibreringstrinnene på næste side. Juster altid enheden, så den passer til brugeren og ikke omvendt.

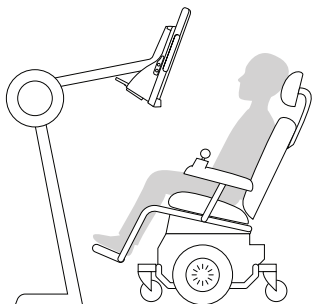

Bemærk: Et monteringsystem er den bedste løsning til nøjagtig placering af enheden og til justering i løbet af dagen. Der findes flere monteringsløsninger, herunder gulvbeslag, bordbeslag og kørestolsbeslag. Besøg [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com), eller kontakt din lokale Tobii Dynavox-partner.

Kalibrering

- 1 Tryk på appen **CoPilot**.



- 2 Følg anvisningerne på skærmen i CoPilot for at kalibrere øjenstyringsenheden til brugerens øjne.
- 3 Stryg op fra bunden af skærmen for at vende tilbage til skærmen Start, når kalibreringen er udført.

Klar!



Din TD Pilot er nu klar til brug. Start TD Snap, og begynd at kommunikere.



Bemærk: Se afsnittet om AssistiveTouch i brugervejledningen til TD Pilot, hvis du vil bruge andre apps end TD Snap. Du kan finde brugervejledningen til *TD Pilot* under *TD CoPilot > Indstillinger > Hjælp > Brugervejledning*.

Fortsæt med undervisningskortene til TD Snap

Fortsæt din konfigurationsrejse med undervisningskortene til TD Snap Core First, der fulgte med i kassen med din TD Pilot.

Undervisningskortene indeholder en trinvis gennemgang af funktionerne i TD Snap, grundlæggende redigering, sikkerhedskopiering af dine data og visse andre aktiviteter, der gør integrationen af TD Snap i din dagligdag nemmere.



Tip: Tilpas indstillingerne for øjenstyring i TD Snap under *TD Snap > Indstillinger > Bruger > Adgangsmetode*.

Øvrige ressourcer

Scan QR-koderne, eller brug linkene.



Tobii Dynavox

tobiidynavox.com



Apple

apple.com/dk/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Tobii Dynavoxs
undervisningscenter
(kun på engelsk)

learn.tobiidynavox.com



TD Community

qrco.de/TDFB



Supportside til TD Pilot

qrco.de/PilotHelp



Brugervejledning til
TD Pilot

qrco.de/PilotDocs



Dokumentation

*TD CoPilot > Indstillinger
> Hjælp*



For teknisk support, bedes
du kontakte din lokale Tobii
Dynavox-repræsentant.