


TD Pilot con TD Snap

Guida rapida

Inizia qui

Cosa include

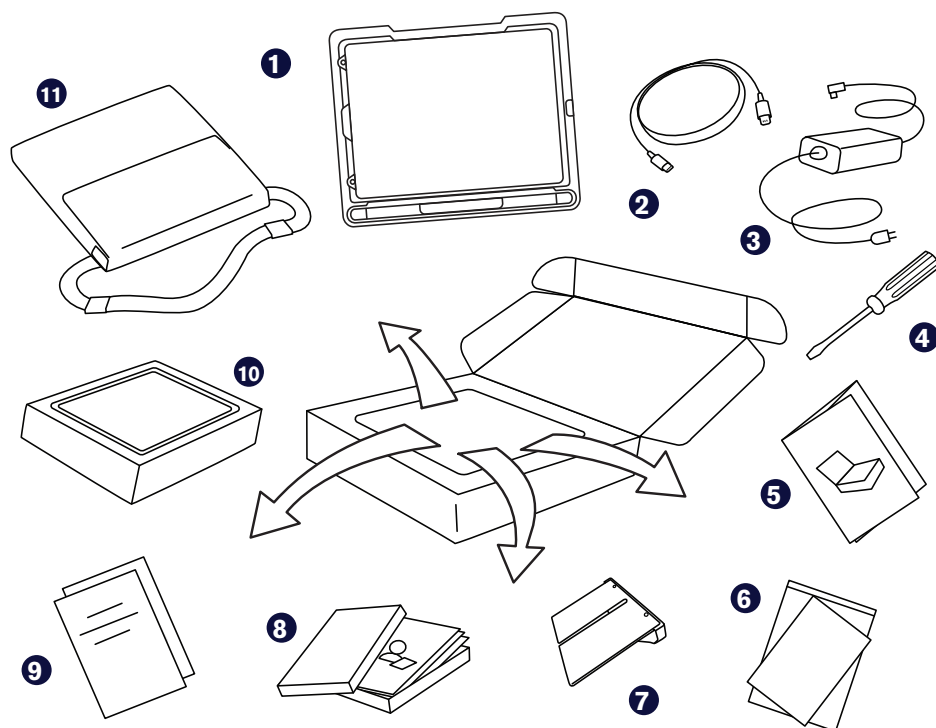

1 Dispositivo pre-assemblato
(iPad Pro 12.9, base di TD Pilot, custodia protettiva, piastra di supporto ConnectIT/Rehadapt, cavo di collegamento da USB-C a USB-C, batteria pre-installata)

2 Cavo di collegamento Lightning – USB C

3 Caricabatterie con cavo

4 Cacciavite

5 Guida rapida

6 Documento relativo alla sicurezza e alla conformità

7 Staffa regolabile

8 Schede di formazione TD Snap Core First

9 Garanzia

10 Scatola iPad (contenente caricabatterie iPad)

11 Borsa

Introduzione

La Guida rapida è rivolta a due persone: quella che utilizza il dispositivo per comunicare e l'assistente che può toccare lo schermo e spostare il dispositivo. Le sezioni con l'icona della mano devono essere completate dall'assistente. Le sezioni con l'icona dell'occhio devono essere completate dalla persona che accederà al dispositivo tramite interazione oculare. Dopo aver completato la procedura indicata nella presente guida, la persona potrà utilizzare l'interazione oculare per comunicare nell'app TD Snap.

Assistente




Utente



Accensione

- 1 Collegare il cavo del caricabatterie alla porta di ricarica sul lato della base di TD Pilot, quindi collegare il cavo di alimentazione a una presa.
- 2 Premere il pulsante di alimentazione sul retro di TD Pilot per accenderlo.
- 3 Premere il pulsante di alimentazione sull'iPad per accenderlo.
- 4 Seguire le indicazioni sullo schermo per configurare l'iPad.

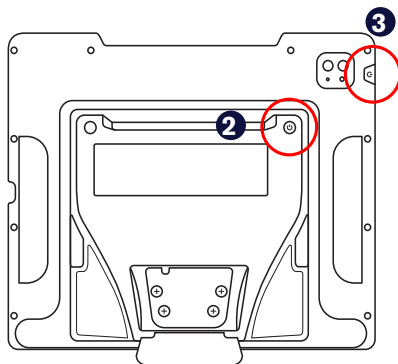

Una volta completate le indicazioni di configurazione dell'iPad, viene visualizzata la schermata iniziale contenenti le icone dell'app.

Configurazione di TD Snap


- 1 Selezionare l'app **TD Snap**.




- 2 Seguire le indicazioni per configurare l'utente TD Snap. Ricordarsi di scegliere la modalità di accesso Controllo Oculare.

Montaggio e posizionamento


Preparare l'utente per iniziare a usare il tracciamento oculare posizionandolo in modo comodo. Se porta gli occhiali, assicurarsi che li indossi e che le lenti siano pulite.

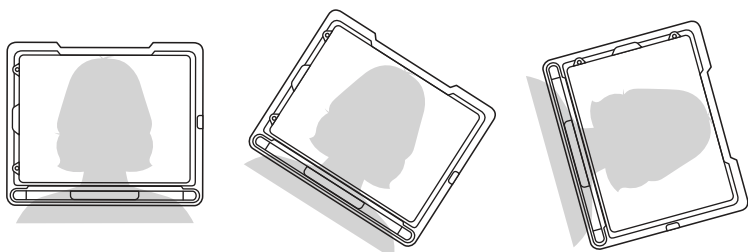

Posizionare TD Pilot sul sistema di montaggio o su una superficie stabile di fronte all'utente, alla stessa altezza degli occhi o leggermente sotto. Se la testa è inclinata verso sinistra o destra, inclinare TD Pilot nella posizione corrispondente. È importante che l'inclinazione della superficie dello schermo corrisponda all'angolazione del viso dell'utente. La maggior parte degli utenti, seduti a un tavolo o una scrivania, ha bisogno che TD Pilot sia posizionato più in alto rispetto alla superficie del tavolo.

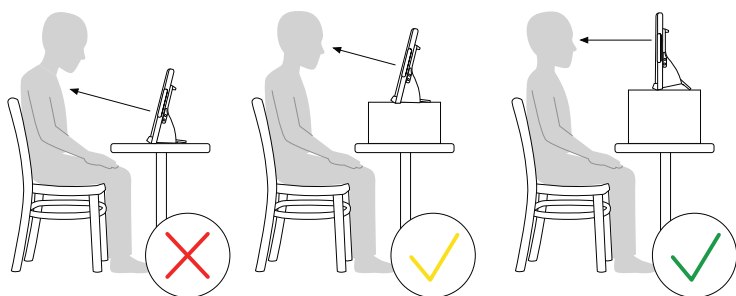

Potrebbe essere necessario regolare la posizione del dispositivo durante la procedura di calibrazione descritta nella pagina successiva. Regolare sempre la posizione del dispositivo in modo che sia adatta all'utente.

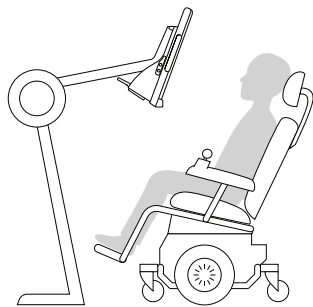

Nota: Un sistema di montaggio è l'opzione migliore per garantire il posizionamento preciso del dispositivo e agevolare la regolazione durante la giornata. Sono disponibili diverse opzioni di montaggio che includono supporti da pavimento, supporti da scrivania e supporti per sedie a rotelle. Visitare [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com) o contattare il proprio partner Tobii Dynavox locale.

Calibrazione

- 1 Toccare l'app **CoPilot**.



- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo in CoPilot per calibrare l'eye tracker in base agli occhi dell'utente.
- 3 Terminata la calibrazione, strisciare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata iniziale.

Pronto!



TD Pilot è ora pronto all'uso. Avviare TD Snap per iniziare a comunicare.



Nota: Se si desidera utilizzare app diverse da TD Snap, consultare la sezione relativa ad AssistiveTouch nel Manuale utente TD Pilot. Individuare il Manuale utente TD Pilot in *TD CoPilot > Impostazioni > Guida > Manuale utente*.

Proseguire con le Schede di formazione TD Snap

Continuare la configurazione con le Schede di formazione TD Snap Core First presenti nella scatola di TD Pilot.

Le schede di formazione includono una descrizione delle funzioni di TD Snap, modifica di base, backup dei dati e alcune attività volte ad agevolare l'integrazione di TD Snap nella vita quotidiana dell'utente.



Suggerimento: Personalizzare le impostazioni dell'interazione oculare di TD Snap in *TD Snap > Modifica > Utente > Metodo di accesso*.

Ulteriori risorse

Scansionare i codici QR o utilizzare i collegamenti.



Tobii Dynavox

tobiidynavox.com



Apple

apple.com/it/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



**Hub di apprendimento
Tobii Dynavox
(solo lingua inglese)**

learn.tobiidynavox.com



Community TD

qrco.de/TDFB



**Pagina di supporto
TD Pilot**

qrco.de/PilotHelp



**Manuale utente
TD Pilot**

qrco.de/PilotDocs



Documentazione

*TD CoPilot >
Impostazioni > Guida*



Contattare il
rappresentante Tobii
Dynavox locale per
supporto tecnico.