


TD Pilot met TD Snap

Introductiehandleiding

Begin hier

Wat zit er in de doos?

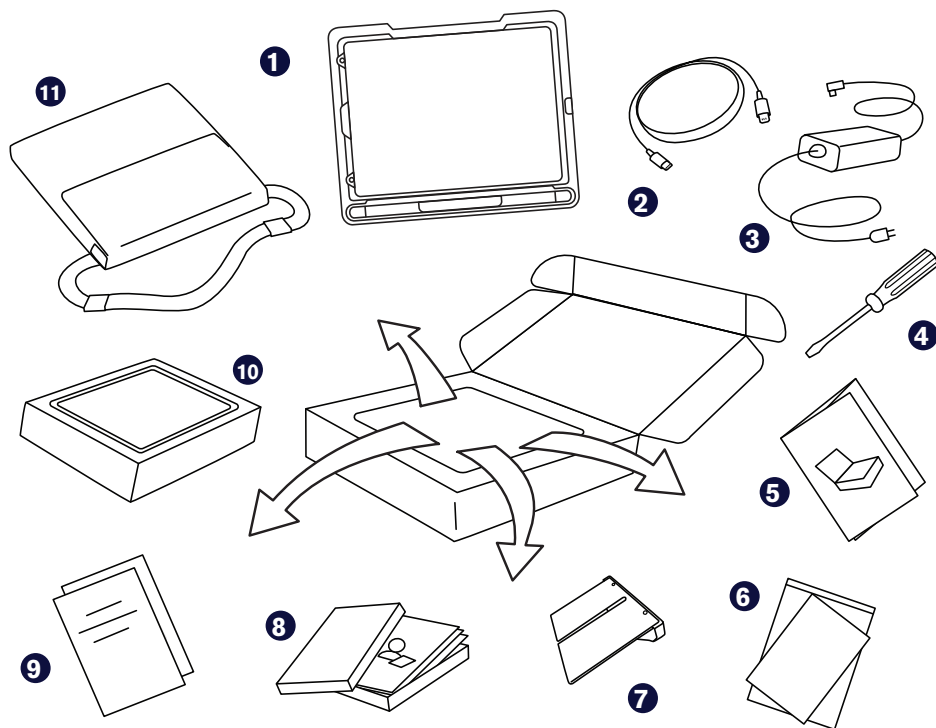

1 Voorgemonteerd apparaat
(iPad Pro 12.9, TD Pilot-basis,
beschermhoes, ConnectIT/
Rehadapt-montageplaat,
verbindingskabel USB-C naar
USB-C, vooraf geïnstalleerde accu)

2 Aansluitkabel
Lightning - USB-C

3 Oplader met kabel

4 Schroevendraaier

5 Introductiehandleiding

**6 Document over veiligheid en
conformiteit**

7 Verstelbare beugel

**8 TD Snap Core First
Trainingskaarten**

9 Garantiedocumenten

10 iPad Box (met iPad-oplader)

11 Draagtas

Laten we beginnen

Deze introductiehandleiding is ontworpen voor twee mensen: de persoon die het apparaat zal gebruiken om mee te communiceren en een helper die het scherm kan aanraken en het apparaat kan verplaatsen. De onderdelen met het hand-icoon moeten samen met een helper worden uitgevoerd. De secties met het oog-icoon moeten worden gevolgd door de persoon die het apparaat bedient met behulp van oogbesturing. Wanneer de stappen in deze handleiding uitgevoerd zijn zal de gebruiker in staat zijn om oogbesturing te gebruiken om in de TD Snap app te communiceren.

Helper




Gebruiker



Aan

- 1 Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort aan de zijkant van de TD Pilot basis en steek vervolgens het netsnoer in een stopcontact.
- 2 Druk op de aan/uit-knop op de achterkant van de TD Pilot om hem aan te zetten.
- 3 Druk op de aan/uit-knop op de iPad om hem aan te zetten.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de iPad in te stellen.

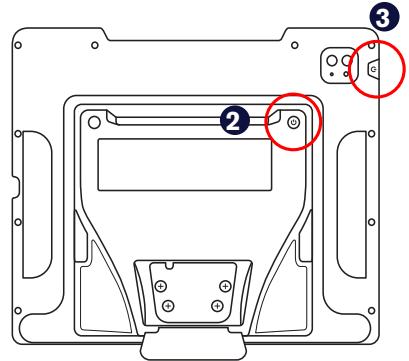

Als je klaar bent met de instellingen van de iPad, wordt het startscherm met de app-pictogrammen zichtbaar.

Instellen TD Snap


- 1 Selecteer de **TD Snap** app.




- 2 Volg de aanwijzingen om als TD Snap gebruiker te starten. Denk eraan om oogbesturing te kiezen als selectiemethode.

Montage en plaatsing


Bereid de gebruiker voor op het gebruik van oogbesturing door hem of haar comfortabel te laten zitten. Als er een bril wordt gedragen, zorg er dan voor dat de glazen schoon zijn.

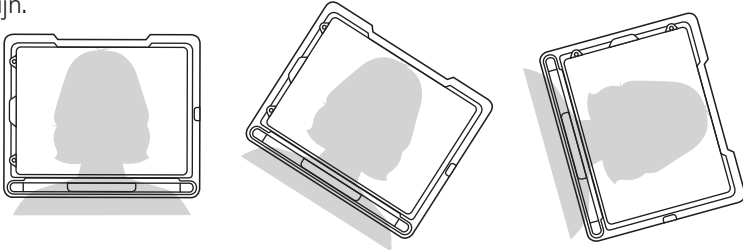

Plaats de TD Pilot op het montagesysteem of op een stabiel oppervlak voor de gebruiker, op of iets onder op of iets onder ooghoogte. Als het hoofd iets scheef wordt gehouden naar links of rechts, bevestig dan de TD Pilot overeenkomstig. Het is belangrijk dat de hoek van het schermoppervlak overeenkomt met de hoek van het gezicht van de gebruiker. De meeste gebruikers zullen, wanneer ze aan een tafel of bureau zitten, de TD Pilot hoger moeten hebben dan de oppervlakte van de tafel.

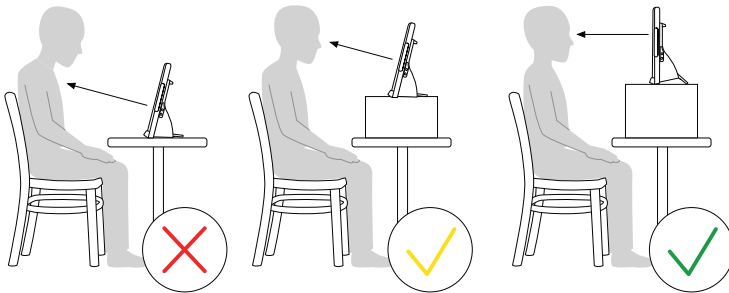

Het kan nodig zijn de positie van het apparaat te verfijnen tijdens de kalibratiestappen op de volgende pagina. Pas altijd de positie van het apparaat zodanig aan dat het aan de behoeften van de gebruiker voldoet, en niet andersom.

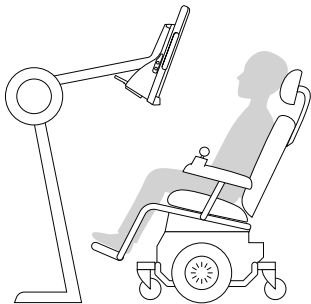

Opmerking: Een montagesysteem is de beste optie voor een precieze plaatsing van de TD Pilot dat in de loop van de dag gemakkelijk kan worden aangepast. Er zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden beschikbaar, waaronder vloer-, tafel, en rolstoelbevestigingen. Bezoek [TobiiDynavox.com](https://www.tobii-dynavox.com) of neem contact op met de lokale Tobii Dynavox partner.

Kalibreren

1 Tik op de **CoPilot** app.



2 Volg de instructies op het scherm in CoPilot om de oogbesturing te kalibreren voor de ogen van de gebruiker.

3 Wanneer de gebruiker klaar is met kalibreren, veeg dan omhoog van de onderkant van het scherm om terug te keren naar het startscherm.

Klaar!



De TD Pilot is nu klaar om te kunnen gebruiken! Open TD Snap om te beginnen met communiceren.



Opmerking: Als je andere apps wilt gebruiken dan TD Snap, zie dan de TD Pilot Gebruikershandleiding over AssistiveTouch. Vind de TD Pilot Gebruikershandleiding in *TD CoPilot* > *Instellingen* > *Hulp* > *Gebruikershandleiding*.

Doorgaan naar de TD Snap Trainingskaarten

Ga verder met het instellen met de TD Snap Core First Trainingskaarten die in de doos met je TD Pilot zitten.

De trainingskaarten leiden je door de functies van TD Snap, basisbewerkingen, back-ups van je gegevens en enkele activiteiten om je te helpen TD Snap in je dagelijks leven te integreren.



Tip: Pas uw TD Snap oogbesturingsinstellingen aan in *TD Snap* > *Bewerken* > *Gebruiker* > *Selectiemethode*.

Aanvullende bronnen

Scan de Qr-codes of gebruik de links.



Tobii Dynavox

tobiidynavox.com



Apple

apple.com/nl/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Tobii Dynavox-
leercentrum
(alleen in het Engels)

learn.tobiidynavox.com



TD Gemeenschap

qrco.de/TDFB



TD Pilot
Ondersteuningscentrum

qrco.de/PilotHelp



TD Pilot
Gebruikershandleiding

qrco.de/PilotDocs



Documentatie

*TD CoPilot > Instellingen
> Hulp*



Neem contact op met
uw lokale Tobii Dynavox-
vertegenwoordiger voor
technische ondersteuning.