


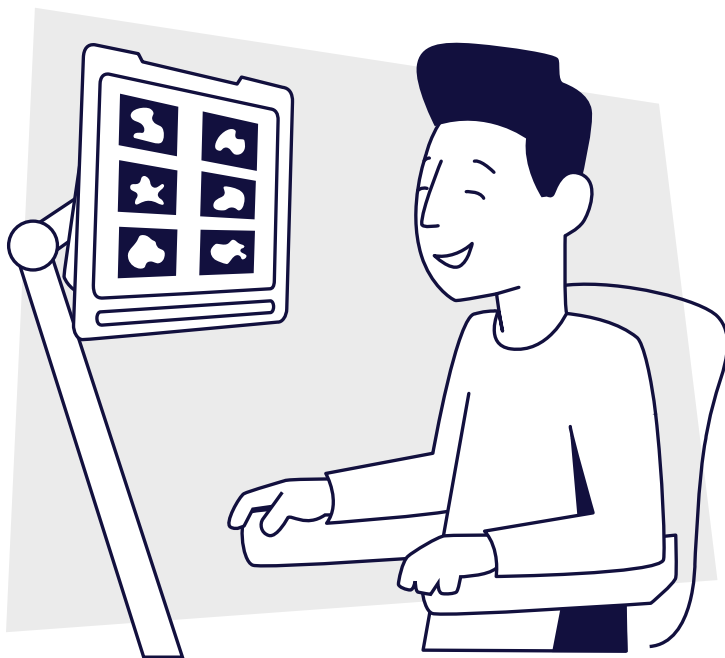


TD Pilot med TD Snap

Start her

Kom i gang – veiledning

Hva er i esken?

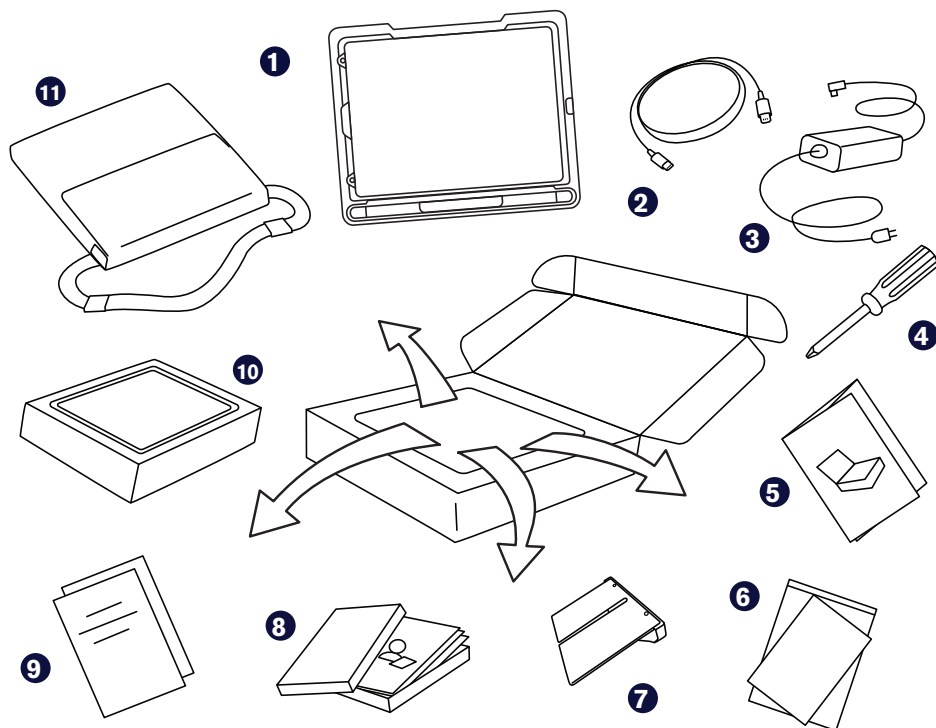

1 Forhåndsmontert enhet
(iPad Pro 12.9, TD Pilot-sokkel, beskyttelsesdeksel, ConnectIT/Rehadapt monteringsplate, tilkoblingskabel USB-C til USB-C, forhåndsinstallert batteri)

2 Tilkoblingskabel
Lightning – USB C

3 Lader med kabel

4 Skrutrekker

5 Kom i gang – veiledning

6 Dokument om sikkerhet og samsvar

7 Justerbar brakett

8 Opplæringskort for TD Snap Core First

9 Garantidokumenter

10 iPad-eske (med iPad-lader)

11 Bæreveske

La oss komme i gang

Denne veiledningen er designet for to personer: personen som skal bruke enheten til å kommunisere med og en assistent som kan berøre skjermen og flytte på enheten. Delene med håndikonet må fullføres av assistenten. Delene med øyeikonet bør fullføres av personen som kommer til å bruke enheten med øyestyring. Når dere har fullført trinnene i denne veiledningen vil brukeren kunne bruke øyestyring til kommunisere i TD Snap-appen.

Assistent




Bruker



Strøm på

- 1 Koble ladekabelen til ladeporten på siden av TD Pilot-sokkelen, og koble deretter strømkabelen til en stikkontakt.
- 2 Trykk på strømknappen på baksiden av TD Pilot for å slå den på.
- 3 Trykk på strømknappen på iPad-en for å slå den på.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp iPad-en.

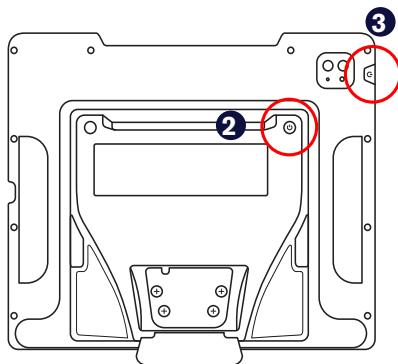

Når du har fullført oppsettet av iPad-en, vil du se hjemskjermen med app-ikoner.

Oppsett av TD Snap

- 1 Velg **TD Snap**-appen.




- 2 Følg instruksjonene for å sette opp din TD Snap-bruker. Husk å velge øyestyring som tilgangsmåte.


Stativ og plasserin




Forbered brukeren på å begynne å bruke øyestyling ved å plassere dem komfortabelt. Sørg for at de har på seg brillene sine, hvis de bruker briller, og sjekk at glassene er rene.

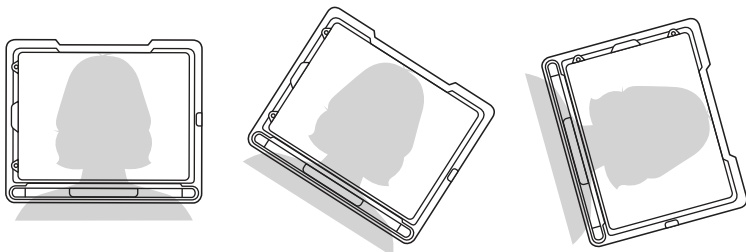

Plasser TD Pilot på monteringssystemet eller en stabil flate foran brukeren i, eller rett nedenfor brukerens øyehøyde. Hvis hodet deres er lent mot venstre eller høyre, vipp TD Pilot for å matche. Det er viktig at vinkelen på skjermoverflaten stemmer med vinkelen på brukerens ansikt. De fleste brukere må ha TD Pilot plassert høyere enn bordplaten når de sitter ved et bord eller en pult.

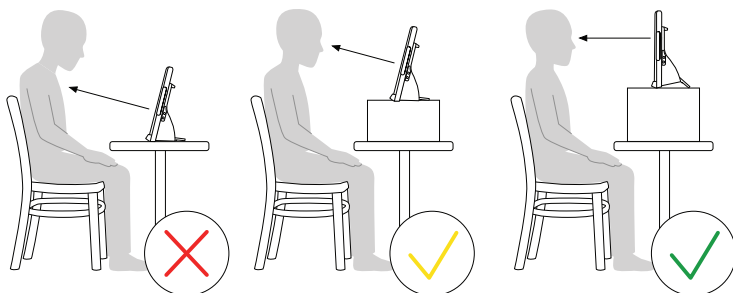

Det er mulig du må justere enhetens posisjon i løpet av kalibreringstrinnene på neste side. Juster alltid enhetens posisjon for å passe til brukeren, ikke motsatt.

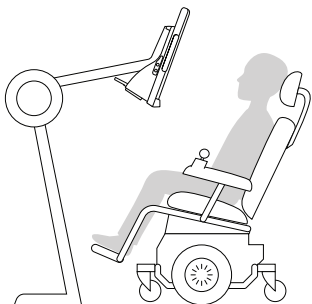

Merk: Et monteringsystem er den beste løsningen for presis posisjonering av enheten, som også er lett å justere i løpet av dagen. Det finnes flere tilgjengelige monteringsalternativer, inkludert gulv-, bord- og rullestolstativer. Gå til [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com) eller kontakt din lokale Tobii Dynavox-partner.

Kalibrer

- 1 Trykk på **CoPilot**-appen.



- 2 Følg instruksjonene på skjermen i CoPilot for å kalibrere øyestyringsenheten til brukerens øyne.
- 3 Når brukeren er ferdig med å kalibrere, sveip opp fra bunnen av skjermen for å komme tilbake til hjemskjermen.

Klar!



TD Pilot er nå klar til bruk. Start TD Snap for å begynne å kommunisere.



Merk: Hvis du vil bruke andre apper enn TD Snap, se avsnittet om AssistiveTouch i brukerveiledningen for TD Pilot. Du finner brukerveiledningen for *TD Pilot i TD CoPilot > Innstillinger > Hjelp > Brukerveiledning*.

Fortsett til opplæringskortene for TD Snap

Fortsett oppsettsreisen med opplæringskortene for TD Snap Core First, som kom i esken sammen med TD Pilot.

Opplæringskortene guider deg gjennom funksjonene i TD Snap, grunnleggende redigering, sikkerhetskopiering av data og noen aktiviteter som hjelper deg med å integrere TD Snap i hverdagen din.



Tips: Tilpass øyestyringsinnstillingene for TD Snap i *TD Snap > Rediger > Bruker > Tilgangsmåte*.

Flere ressurser

Skann Qr-kodene eller bruk lenkene.



Tobii Dynavox

no.tobiidynavox.com



Apple

apple.com/no/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



**Tobii Dynavox-
opplæringsvideoer
(kun på engelsk)**

learn.tobiidynavox.com



TD Community

qrco.de/fbnnbno



Støttesiden for TD Pilot

qrco.de/PilotHelpNO



**Brukerveiledning for
TD Pilot**

qrco.de/PilotDocs



Dokumentasjon

*TD CoPilot > Innstillinger
> Hjelp*



Teknisk støtte for Norge

55 55 10 60