


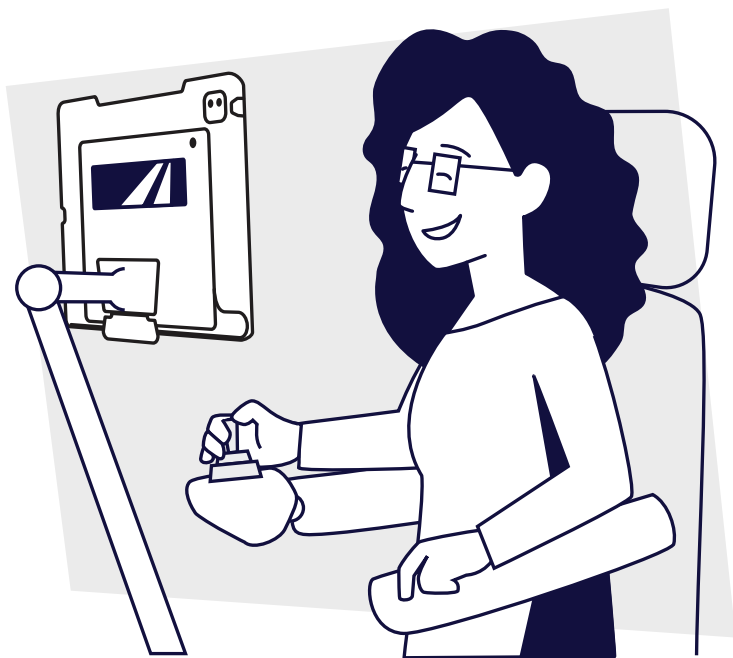


TD Pilot con TD Talk

Guida rapida

Inizia qui

Cosa include

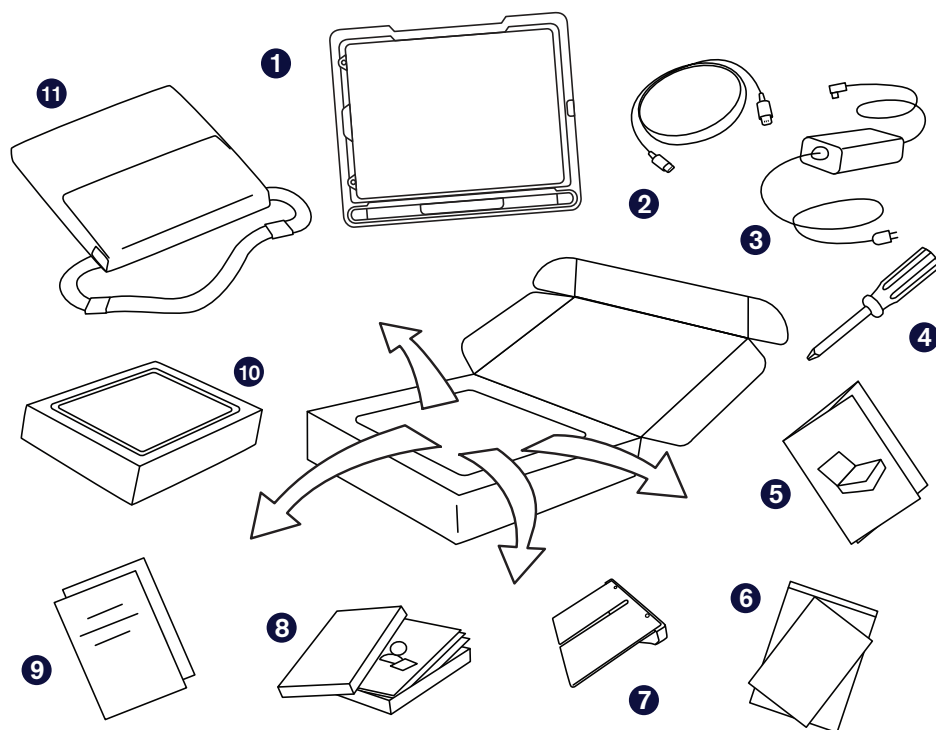

1 Dispositivo pre-assemblato
(iPad Pro 12.9, base di TD Pilot, custodia protettiva, piastra di supporto ConnectIT/Rehadapt, cavo di collegamento da USB-C a USB-C, batteria pre-installata)

2 Cavo di collegamento
Lightning – USB C

3 Caricabatterie con cavo

4 Cacciavite

5 Guida rapida

6 Documento relativo alla
sicurezza e alla conformità

7 Staffa regolabile

8 Schede di formazione TD Talk e
AssistiveTouch

9 Garanzia

10 Scatola iPad
(contenente caricabatterie iPad)

11 Borsa

Introduzione

La Guida rapida è rivolta a due persone: quella che utilizza il dispositivo per comunicare e l'assistente che può toccare lo schermo e spostare il dispositivo. Le sezioni con l'icona della mano devono essere completate dall'assistente. Le sezioni con l'icona dell'occhio devono essere completate dalla persona che accederà al dispositivo tramite interazione oculare. Dopo aver completato la procedura indicata nella presente guida, la persona potrà utilizzare l'interazione oculare per comunicare nell'app TD Talk.

Assistente




Utente



Accensione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica sul lato della base di TD Pilot, quindi collegare il cavo di alimentazione a una presa.
- 2 Premere il pulsante di alimentazione sul retro di TD Pilot per accenderlo.
- 3 Premere il pulsante di alimentazione sull'iPad per accenderlo.
- 4 Seguire le indicazioni sullo schermo per configurare l'iPad.

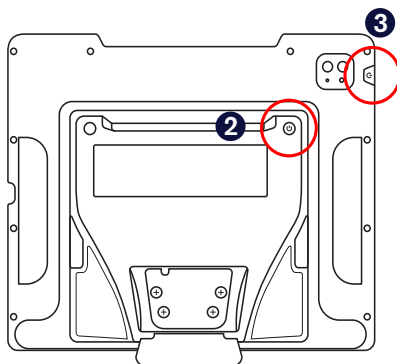

Una volta completate le indicazioni di configurazione dell'iPad, viene visualizzata la schermata iniziale contenenti le icone dell'app.

Configurazione del metodo di accesso

Controllo Oculare

Configurazione del display per garantire la precisione dell'interazione oculare 

- 1 Toccare **Impostazioni**.



- 2 Sul lato sinistro, toccare la categoria **Schermata iniziale e Dock**.
- 3 Sul lato destro, selezionare **Più grande** per ingrandire le icone.
- 4 Sul lato sinistro, toccare la categoria **Display e luminosità**.
- 5 Sul lato destro, toccare **Scu**ro.
- 6 Sul lato destro, scorrere in basso e toccare **Dimensione testo**.
- 7 Spostare il cursore Dimensione testo completamente a destra.



Nota: Questa operazione aumenta la dimensione del testo in tutte le applicazioni.

- 8 Toccare **Display e luminosità** sul lato sinistro per tornare alle impostazioni di Display e luminosità.
- 9 Sul lato destro, scorrere in basso e toccare **Visualizza**.



Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar op iPads die kleiner zijn dan 11 inch.

- 10 Selezionare **Zoomato**, quindi toccare **Imposta**.
- 11 Nella finestra a comparsa, toccare **Usa zoomato**. Lo schermo viene ripristinato rapidamente.
- 12 Selezionare **Annulla** per chiudere la finestra a comparsa Usa zoomato.
- 13 A questo punto, per applicare le impostazioni dello Zoom, è necessario riavviare completamente l'iPad. Toccare **Generali** a sinistra, quindi, sul lato destro, strisciare il dito verso il basso e toccare **Spegni**. Una volta spento l'iPad, premere il pulsante di alimentazione per riaccenderlo.



Qual è la relazione fra AssistiveTouch e l'interazione oculare?

AssistiveTouch è studiato per le persone con difficoltà a toccare lo schermo. Il menu di AssistiveTouch consente di eseguire le funzioni "tattili", ad esempio toccare e scorrere utilizzando l'interazione oculare. Fornisce inoltre scorciatoie accessibili tramite interazione oculare agli elementi quali la schermata iniziale e App Switcher, solitamente accessibili tramite gesti.

Configura AssistiveTouch

- 1 Toccare **Impostazioni**.



- 2 Sul lato sinistro, toccare **Accessibilità**.

- 3 Sul lato destro, toccare **Tocco**.

- 4 Toccare **AssistiveTouch**, quindi attivarlo.

- L'interazione oculare è ora abilitata. Viene visualizzato il Puntatore che mostra la posizione dell'interazione oculare dell'utente. Sullo schermo viene visualizzato anche il pulsante del menu AssistiveTouch.



Nota: Se viene chiesto di personalizzare il Menu di livello superiore, toccare **Annulla**.

- 5 Trascinare il pulsante del menu di AssistiveTouch nel terzo superiore della schermata, sul lato destro.

Personalizzazione del menu di AssistiveTouch

- 1 Sul lato destro, selezionare **Personalizza menu di livello superiore**.

- 2 Toccare **+** per impostare il numero delle icone su 8.

- 3 Toccare **Centro notifiche**.

- 4 Strisciare il dito verso la parte inferiore dell'elenco e toccare **Attiva/disattiva Pausa/Ripristino selezione**. Toccare all'esterno dell'elenco per chiuderlo.

- 5 Toccare il pulsante **Gesti**.

- 6 Strisciare il dito fino alla voce **Sposta menu** e toccarla. Toccare un punto qualsiasi all'esterno dell'elenco per chiuderlo.

- 7 Continuare a modificare le icone del menu fino a quando non corrisponde a quello mostrato a destra.

- 8 Sul lato sinistro, selezionare **Accessibilità**.

- 9 Sul lato destro, selezionare **Tocco**.

- 10 Sul lato destro, selezionare **AssistiveTouch**.



Configurazione del controllo selezione

- 1 Sul lato destro, strisciare il dito fino alla parte inferiore del menu di AssistiveTouch. Attivare **Controllo selezione**.



Nota: Se viene chiesto di personalizzare il Menu di livello superiore di AssistiveTouch, toccare **No**.

- 2 Toccare il segno meno (–) accanto a **Secondi** per impostare il tempo di permanenza per l'attivazione su 1,5 secondi.



Suggerimento: Questa impostazione del tempo di selezione è per iniziare. È possibile modificare il tempo di selezione per adattarlo alle proprie esigenze.

Attivazione e sbloccaggio dell'iPad


L'iPad si attiva automaticamente quando l'eye tracker rileva gli occhi dell'utente. Sbloccare l'iPad selezionando il pulsante AssistiveTouch Button, quindi Home.

Provarlo ora:

- 1 Premere il pulsante in alto per bloccare l'iPad.
- 2 Guardare lo schermo per qualche istante. L'iPad si attiva e visualizza la schermata di blocco.
- 3 Toccare o utilizzare gli occhi per selezionare il pulsante del **Menu AssistiveTouch**, quindi selezionare **Home**.



L'iPad è ora sbloccato.

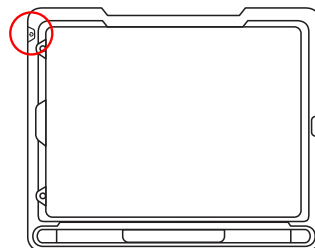

Suggerimento: Se si desidera una protezione supplementare sul dispositivo, consigliamo di utilizzare Face ID. Face ID consente di sbloccare il dispositivo senza dover inserire ogni volta il codice di accesso. Configurare Face ID in *Impostazioni SO iPad > Face ID e codice di accesso*.

Configurazione di TD Talk

- 1 Toccare l'app **TD Talk**.



- 2 Strisciare il dito dalla lettera T sulla tastiera di TD Talk per aprire il menu fuori schermo.

- 3 Toccare il pulsante **Altro**.



- 4 Toccare **Impostazioni**.



- 5 Impostare la lingua dell'interfaccia di TD Talk:

- Toccare la **freccia destra** per andare su **Impostazioni Generali**.
- In Impostazioni generali, toccare **Apri**.
- Selezionare la lingua desiderata.
- Selezionare **Indietro** per tornare a Impostazioni.



- 6 Scegliere le voci:

- In Pannello voci, toccare **Apri**.
- Nella parte superiore dello schermo, selezionare la lingua per la quale sarà assegnata una voce.
- Selezionare una voce.
- Selezionare **X** per uscire dalle impostazioni di TD Talk.



Nota: Le voci nella parte superiore dell'elenco sono scaricate e pronte all'uso. Le voci nella parte inferiore dell'elenco sono disponibili per il download

Facoltativo: Aggiungere lingue extra della tastiera.


- 1 Andare su **Menu fuori schermo > Altro > Impostazioni > Tastiera > Aggiungi/Modifica**.
- 2 Seleziona una lingua dalla scheda Installate o andare sulla scheda Scarica per trovare altre lingue.
- 3 Selezionare **Indietro** per tornare alle impostazioni di TD Talk.
- 4 Aprire le **Impostazioni** voce, selezionare la nuova lingua, quindi scegliere una voce per la lingua.




Suggerimento: Durante l'uso di TD Talk, è possibile cambiare rapidamente lingua selezionando l'icona del globo nell'angolo superiore sinistro della tastiera.

Montaggio e posizionamento


Preparare l'utente per iniziare a usare il tracciamento oculare posizionandolo in modo comodo. Se porta gli occhiali, assicurarsi che li indossi e che le lenti siano pulite.

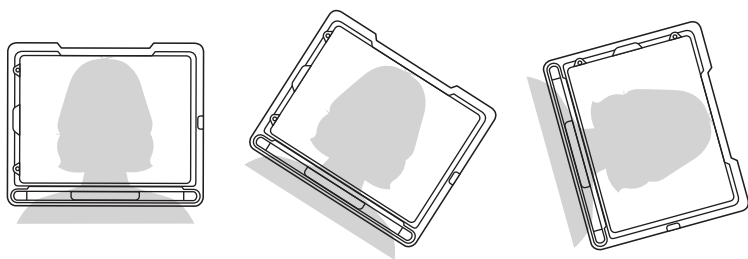

Posizionare TD Pilot sul sistema di montaggio o su una superficie stabile di fronte all'utente, alla stessa altezza degli occhi o leggermente sotto. Se la testa è inclinata verso sinistra o destra, inclinare TD Pilot nella posizione corrispondente. È importante che l'inclinazione della superficie dello schermo corrisponda all'angolazione del viso dell'utente. La maggior parte degli utenti, seduti a un tavolo o una scrivania, ha bisogno che TD Pilot sia posizionato più in alto rispetto alla superficie del tavolo.

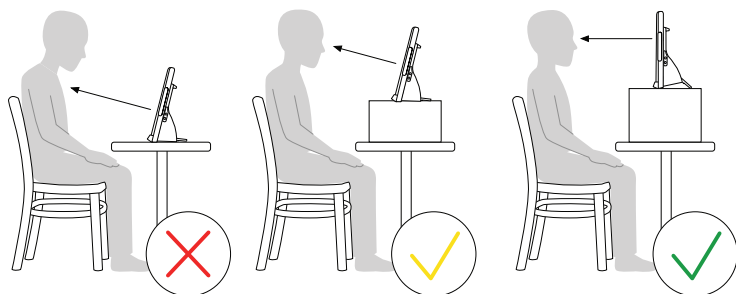

Potrebbe essere necessario regolare la posizione del dispositivo durante la procedura di calibrazione descritta nella pagina successiva. Regolare sempre la posizione del dispositivo in modo che sia adatta all'utente.

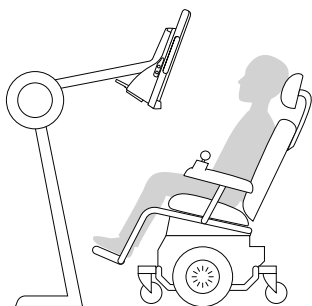

Nota: Un sistema di montaggio è l'opzione migliore per garantire il posizionamento preciso del dispositivo e agevolare la regolazione durante la giornata. Sono disponibili diverse opzioni di montaggio che includono supporti da pavimento, supporti da scrivania e supporti per sedie a rotelle. Visitare [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com) o contattare il proprio partner Tobii Dynavox locale.



- 1 Toccare l'app **CoPilot**.



- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo in CoPilot per calibrare l'eye tracker in base agli occhi dell'utente.



- 3 Terminata la calibrazione, strisciare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata iniziale.



I passaggi restanti della procedura devono essere eseguiti dall'utente del dispositivo TD Pilot tramite interazione oculare. L'assistente dovrà invece leggere le istruzioni ad alta voce. Leggere a una velocità che dia all'utente del dispositivo tempo sufficiente per effettuare le selezioni con gli occhi.



TD Pilot è ora pronto all'uso! Usare gli occhi per completare il tutorial seguente.

Apertura di TD Talk

Usare gli occhi per selezionare l'app **TD Talk**.



Nota: Se, a questo punto, si riscontrano problemi di selezione con gli occhi, l'assistente può toccare lo schermo per consentire all'utente di entrare in TD Talk. L'interazione oculare è un'abilità, pertanto fare pratica in TD Talk per prendere dimestichezza.

Comporre e parlare

Usare l'interazione oculare per pronunciare alcune parole e frasi in TD Talk.

- Presentarsi.
- Fare un commento sul meteo.
- Usare la tastiera numerica per comunicare la propria età o il proprio numero di telefono.

Proseguire con le Schede di formazione TD Talk

Continuare la configurazione con le Schede di formazione TD Talk presenti nella scatola in dotazione con TD Pilot.

I tutorial e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi nelle Schede di formazione TD Talk possono contribuire a migliorare l'esperienza di interazione oculare e l'uso di TD Talk per comunicare in modo più rapido ed efficiente. È inoltre possibile reperire ulteriori informazioni sull'uso di AssistiveTouch per accedere alle app sul proprio iPad tramite interazione oculare.

Ulteriori risorse

Scansionare i codici QR o utilizzare i collegamenti.



Tobii Dynavox

tobiidynavox.com



Apple

apple.com/it/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



**Hub di apprendimento
Tobii Dynavox (solo
lingua inglese)**

learn.tobiidynavox.com



Community TD

qrco.de/TDFB



**Pagina di supporto
TD Pilot**

qrco.de/PilotHelp



Manuale utente TD Pilot

qrco.de/PilotDocs



Documentazione

*TD CoPilot >
Impostazioni > Guida*



**Contattare il rappresentante
Tobii Dynavox locale per
supporto tecnico.**