



TD Talk y AssistiveTouch

Tarjetas de entrenamiento



La aplicación TD Talk le permite participar en conversaciones en persona.




AssistiveTouch le da acceso a otras aplicaciones.

Contenido

- 1** TD Talk: Recorrido
- 2** TD Talk: Consejos de comunicación
- 3** TD Talk: Consejos de comunicación (cont.)
- 4** TD Talk: Ideas para practicar
- 5** AssistiveTouch: Uso de las aplicaciones
- 6** AssistiveTouch: Ideas para practicar
- 7** Montaje y posicionamiento y Afinación del seguimiento ocular
- 8** Afinación del seguimiento ocular (cont.)
- 9** Preguntas frecuentes y recursos adicionales

TD Talk: Recorrido

TD Talk está diseñado para la comunicación rápida y cara a cara. Use esta aplicación cuando interactúe con los demás.

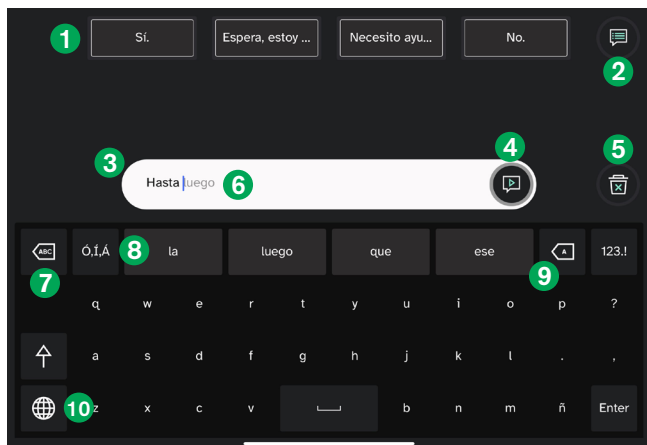

1 Mensajes rápidos

Mensajes previamente escritos que se reproducen de inmediato cuando se seleccionan.

2 Más mensajes rápidos

Abra la página de Mensajes rápidos para seleccionar o editar otros Mensajes rápidos.

3 Ventana de mensajes

Vea y edite el texto que le gustaría decir aquí.

4 Hablar

Diga el texto de la Ventana de mensajes. También puede pausar el habla y reanudarla.

5 Borrar

Borre todo el texto de la Ventana de mensajes.

6 Predicción de frases

TD Talk aprende de lo que usted escribe y utiliza esa información para predecir frases. La predicción se basa en la frecuencia y hace que la comunicación sea más rápida y más personal.

7 Borrar palabra

Borre la palabra a la izquierda del cursor.

8 Predicción de palabras

Predice automáticamente palabras basadas en lo que ha escrito hasta el momento.

9 Retroceso


Borre el carácter a la izquierda del cursor.

10 Cambiar idioma

Cambie de idioma cuando habla.



TD Talk: Recorrido (cont.)

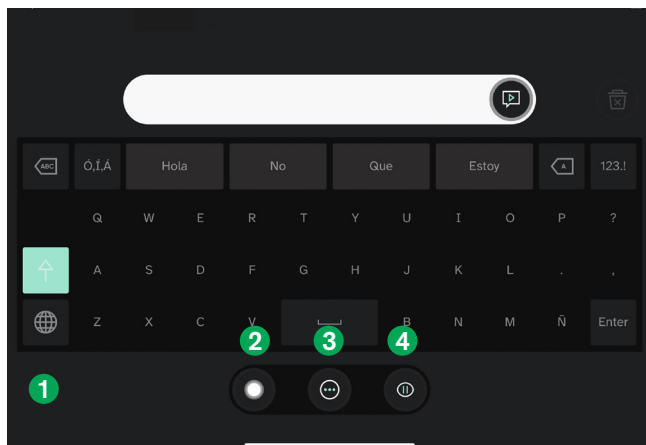

1 Menú oculto

Mire debajo del seguidor ocular para revelar este menú, que contiene Pausar/Reanudar, Más y AssistiveTouch.

2 Conmutador de AssistiveTouch

Active AssistiveTouch. Use AssistiveTouch para acceder a la pantalla de Inicio y a todas sus demás aplicaciones.

3 Más

Acceda al Cuadro de mandos y a la Configuración.


4 Pausar/Reanudar seguimiento ocular

Botón de conmutación para pausar y reanudar temporalmente el seguimiento ocular.




TD Talk: Consejos de comunicación

Estos consejos pueden ayudarlo a usar TD Talk correctamente.

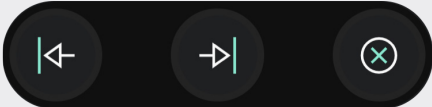Consejo	Inténtelo
<p>Haga pausas regulares del seguimiento ocular.</p> <p>Pause el seguidor ocular cuando no esté hablando y reanúdelo cuando esté listo para hablar.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Mire abajo del seguidor ocular para abrir el Menú oculto.2 Seleccione Pausar. El seguimiento ocular está en pausa.3 Repita los pasos anteriores para reanudar el seguimiento ocular.
<p>Edite mensajes directamente en la Ventana de mensajes.</p> <p>Corrija, elimine o agregue palabras en cualquier lugar de la Ventana de mensajes usando el Menú de edición.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Mire el lugar en donde desea editar en la oración. Aparece un subrayado debajo de la palabra y, luego, aparece el Menú de edición.2 Cuando una palabra está resaltada, puede hacer lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">Reemplazar la palabra. Seleccione una de las palabras predichas o escriba letras.Borrar la palabra. Seleccione Retroceso.Mover el cursor. Use las flechas derecha e izquierda en el Menú de edición para mover el cursor y, luego, escriba para insertar texto.3 Seleccione X para cerrar el Menú de edición.




TD Talk: Consejos de comunicación (cont.)

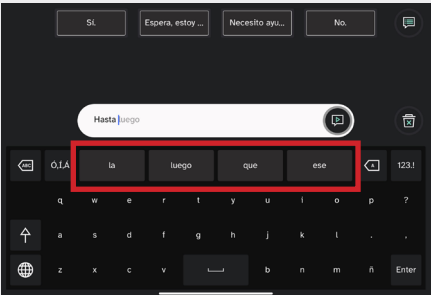Consejo	Inténtelo
<p>Use puntuación y mayúsculas sólo cuando mejoren su mensaje.</p> <p>Los puntos y las mayúsculas requieren tiempo y esfuerzo para escribirse. No hacen gran diferencia en la manera en que se dice su mensaje, a menos que los puntos sean para separar oraciones en un párrafo.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Use ? o ! para hacer que su mensaje suene como pregunta o exclamación.■ Las comas insertan pausas en una oración. Use las comas para dar énfasis y ritmo.■ Las mayúsculas agregan impacto visual, pero no cambian la manera de decir una palabra. TD Talk pone mayúscula inicial automáticamente en una oración por usted. De otro modo, no se moleste en poner mayúsculas, a menos que alguien esté leyendo su mensaje.
<p>Aproveche la predicción de palabras.</p> <p>La predicción de palabras aprende de lo que usted escribe y puede acelerar su comunicación.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Cuando empiece a escribir una palabra, eche un vistazo a los botones de predicción de palabras para ver si la palabra que desea está allí.2 Repítalo cada 2 o 3 letras.3 Si le parece que selecciona involuntariamente mientras lee las palabras predichas, aumente el Tiempo de permanencia para la predicción de palabras en <i>TD Talk > Configuración > Teclado</i>.



TD Talk: Consejos de comunicación (cont.)

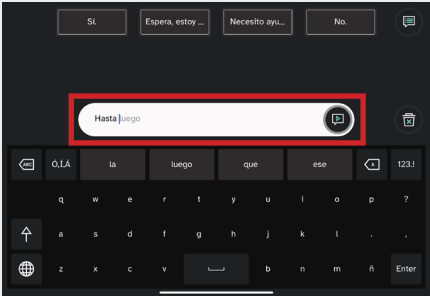
Consejo	Inténtelo
<p>Escriba de la forma en que habla. El lenguaje hablado difiere de la gramática más formal del lenguaje escrito. Use oraciones parciales y gramática informal que refleje su forma de hablar.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ “¿Quieres ir?”.▪ “Podría, pero no, gracias”.▪ “Para la próxima”.
<p>Use la predicción de frases. La predicción de frases aprende su manera de juntar las palabras y predice lo que quiere decir con base en la frecuencia de uso. Cuanto más habla con TD Talk, mejor se vuelve la predicción de frases, de manera que pueda decir lo que quiere más rápido y con menos esfuerzo.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Eche un vistazo a la Ventana de mensajes después de cada palabra o dos para ver si TD Talk ha predicho una frase.2 Si la frase predicha es la que desea, fije la mirada en la última palabra de la predicción para aceptarla.3 Si la frase predicha no es la que quiere, siga escribiendo.

TD Talk: Consejos de comunicación (cont.)

Consejo

Los Mensajes rápidos suelen ser la opción de comunicación más rápida.

Use estos mensajes editables para expresar necesidades inmediatas, seguir la conversación y preparar lo que quiere decir con anticipación para eventos tales como citas médicas, presentaciones y reuniones familiares.

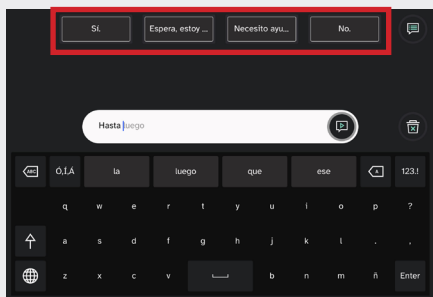

Inténtelo

- 1 Seleccione Más mensajes rápidos y, luego, Editar mensajes rápidos.
- 2 Seleccione el Mensaje rápido que desea editar y escriba su mensaje con el teclado.
- 3 Seleccione Guardar y regrese a su teclado principal.

Dese tiempo para aprender.

El seguimiento ocular es una habilidad. Comunicarse con TD Talk se volverá cada vez más automático con el tiempo y el uso.

- 1 Para afinar su seguimiento ocular, manipule la configuración a medida que se desarrolla su habilidad con el tiempo.
- 2 Use las ideas para practicar de la siguiente sección para centrarse en habilidades individuales.

TD Talk: Ideas para práctica

1 Practique la pausa y la reanudación de la mirada.

Mire debajo del seguidor ocular para abrir el Menú oculto y, luego, seleccione el botón de conmutación Pausar seguimiento ocular. Repita los mismos pasos para reanudar el seguimiento ocular. Inténtelo unas veces.

2 Practique escribiendo de la forma en que habla.

Las oraciones que se muestran a continuación pueden usarse en la comunicación escrita formal. ¿Cómo las diría en una conversación hablada informal?

- Tomemos un momento hoy para hablar acerca de finanzas.
- Les deseo a todos lo mejor.
- Espero que hayan estado bien en los últimos meses.

Piense en frases que suele usar en conversaciones. Los ejemplos que se muestran a continuación pueden ayudarlo a identificar algunas. Escríbalas en TD Talk.

Exclamación

¡De ninguna manera! Eso es interesante.
¡A poco!

Muletillas o frases de relleno

...este..., mmm..., o sea, ya sabes, ...si me entiendes, ...y etcétera.

Palabras y frases regionales

¡Qué calorón! ¿Vienen todos? Levanta la mesa.

3 Experimente con la puntuación y las mayúsculas.

Escriba las siguientes oraciones y escuche la diferencia con puntuación y mayúsculas y sin ellas. Esta actividad lo ayudará a darse cuenta de cuándo vale la pena agregar puntuación y mayúsculas y cuándo puede omitirlas para ahorrar tiempo.

	Opción 1	Opción 2
1	Me pondré una camisa, unos jeans y una chamarra.	Me pondré una camisa unos jeans y una chamarra
2	¿Me das?	Me das
3	Allí está Jane.	Allí está, jane.
4	¡Guau! ¡Es increíble!	Guau, ¡eso es increíble!
5	Me gusta pero a él no.	Me gusta, pero a él no.



TD Talk: Ideas para practicar (cont.)

4 Intente editar palabras en la Ventana de mensajes.

Escriba una oración que contenga un error deliberado (falta de ortografía, agregar o quitar una palabra). Para editar el error, mire fijamente la palabra en la Ventana de mensajes.

5 Ahorre tiempo con la predicción de palabras.

Escriba "Necesito ir a la cafetería mañana en la mañana" sin usar la predicción de palabras. Luego, escriba la oración otra vez usando la predicción de palabras. Compare el tiempo y el esfuerzo requeridos.

6 Intente usar la predicción de frases.

Escriba una de las oraciones que se muestran a continuación y, luego, dígala en voz alta cinco veces con TD Talk. Esto agregará la oración a su Conjunto de frases. Borre la Ventana de mensajes y, luego, empiece a escribir otra vez la misma oración. Verá que la frase se predice para usted. Mire la última palabra en la frase predicha para seleccionarla y, luego, dígala.

- Me llamo [su nombre].
- Mi dirección es [su dirección].
- [Nombre de la persona] es mi [relación].
- Trabajo (o trabajé) en [empresa] como [puesto].
- Utilizo este dispositivo para comunicarme y entiendo todo lo que estás diciendo.

7 Usar y Editar mensajes rápidos.

Busque Mensajes rápidos que pudiera usar en las siguientes situaciones.

- Cuando alguien cuenta un chiste.
- Si alguien le pregunta si le gustó una película o un programa de TV.
- Cuando necesita algo de inmediato.
- Si alguien empieza a hablar mientras usted está escribiendo un mensaje.
- Cuando quiere más información durante una interacción.

Edite un mensaje rápido basado en lo que diría en las siguientes situaciones:

- Expresar inquietudes o enumerar preguntas al doctor o terapeuta.
- Decirle a un amigo o pariente lo que ha estado ocurriendo últimamente.
- Darle instrucciones al cuidador.



AssistiveTouch: Uso de las aplicaciones

Cuando esté listo para aventurarse fuera de TD Talk, usará AssistiveTouch para acceder a otras aplicaciones en su iPad. La configuración y los comportamientos de seguimiento ocular de AssistiveTouch son distintos a los de TD Talk, así que es posible que tenga que hacer ajustes en la Configuración de iPad OS.

Recorrido



Botón AssistiveTouch

Abre el Menú AssistiveTouch. El menú del botón AssistiveTouch flota sobre los demás contenidos de la pantalla y se puede reubicar según se necesite.

Menú AssistiveTouch

Herramientas de navegación accesibles mediante el seguimiento ocular que le permiten tocar, deslizar el dedo, ajustar el volumen, cambiar de aplicación y más usando los ojos.



Nota: Asegúrese de que mira las tarjetas de Afinación del seguimiento ocular si está teniendo dificultades con AssistiveTouch.

1 Cambie a AssistiveTouch desde TD Talk.

Usará AssistiveTouch para navegar fuera de TD Talk. Se desactivará automáticamente cuando abra TD Talk otra vez.

- Desde el teclado de TD Talk, mire abajo del seguidor ocular para abrir el Menú oculto y, luego, seleccione el Conmutador de AssistiveTouch. El Puntero (círculo gris) aparecerá en la pantalla y seguirá su mirada.
- Mire el botón del Menú AssistiveTouch hasta que se abra el Menú AssistiveTouch.
- Mire el Inicio en el Menú AssistiveTouch hasta que aparezca la pantalla de Inicio.



Conmutador de AssistiveTouch



Menú AssistiveTouch




AssistiveTouch: Uso de las aplicaciones (cont.)

2 Haga una pausa cuando lo necesite.

Pause el seguidor ocular para leer o descansar y, luego, reanude el seguimiento ocular cuando lo desee.

- Mire el **botón del Menú AssistiveTouch** para abrir el Menú AssistiveTouch.
- Mire en **Pausar la permanencia** para pausar.
- Repita los pasos anteriores para reanudar el seguimiento ocular.

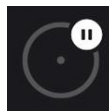

Pause Dwell/
Pausar
permanencia

3 Uso del iPad con los ojos.

- Tocar y Desplazar están disponibles en el Menú AssistiveTouch en el nivel superior. Otros gestos táctiles, tales como Mantener presionado y arrastrar, Presión larga, Tocar dos veces, se encuentran en Personalizado en el Menú AssistiveTouch.
- Para desplazarse, seleccione el **botón del Menú AssistiveTouch**, luego **Desplazar** y la **dirección de desplazamiento**. Luego, ubique su Puntero en el área de la pantalla en donde desea desplazarse.
- AssistiveTouch regresa a Toque después de que realiza una acción diferente, como pausar o desplazarse. Puede cambiar la acción a la que regresa o quitarla en *Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > AssistiveTouch > Acción de autorrevertir*.

4 Mueva el botón de AssistiveTouch.

Puede ser que tenga que mover el botón de AssistiveTouch por la pantalla para que no le estorbe. Seleccione el **Menú Mover** en el Menú AssistiveTouch y, luego, mantenga la mirada en la pantalla donde le gustaría que estuviera el botón del Menú AssistiveTouch.


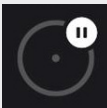


5 Elija las aplicaciones adecuadas.

Hágase estas preguntas cuando piense en qué aplicaciones usar con seguimiento ocular.

- ¿Tiene las habilidades (p. ej., Tocar, Desplazar, Presión larga) necesarias para usar la aplicación?
- Si no tiene las habilidades requeridas, ¿la aplicación es una buena manera de practicar y desarrollar habilidades?
- ¿La aplicación es de gran interés? Cuando está motivado, es más probable que trabaje más duro y persevere al tratar de acceder a aplicaciones difíciles.
- ¿Hay alguna configuración en el iPad OS o TD CoPilot que puede ayudar a hacer que la aplicación sea más accesible con el seguimiento ocular? Vea las tarjetas de Afinación del seguimiento ocular para obtener más información.
- ¿Puede configurar ajustes dentro de la aplicación para adaptarla a sus habilidades actuales? Esto podría incluir cambiar de vista vertical a horizontal, modificar la configuración del tiempo de respuesta o el tiempo de espera en juegos, reemplazar tareas complejas (seleccionar y arrastrar) por otras más simples (seleccionar) o mostrar menos opciones en la pantalla.





AssistiveTouch: Ideas para practicar

Idea para practicar	Inténtelo
<p>Active AssistiveTouch desde TD Talk.</p>  <p>Practique la navegación entre TD Talk y la pantalla de Inicio con AssistiveTouch.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 En TD Talk, mire abajo del seguidor ocular para abrir el Menú oculto.2 Seleccione AssistiveTouch.3 Seleccione el botón del Menú AssistiveTouch y, luego, seleccione Inicio.
<p>Haga una pausa con Pausar/Reanudar la permanencia.</p>  <p>Desactive por un tiempo la selección mediante permanencia y seguimiento ocular para que pueda leer, ver un video o simplemente relajarse.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Seleccione el botón del Menú AssistiveTouch y, luego, seleccione Pausar la permanencia.2 Mire por la pantalla y note que la selección de permanencia está deshabilitada.3 Seleccione el botón del Menú AssistiveTouch y, luego, seleccione Reanudar la permanencia.
<p>Desplácese con los ojos.</p>  <p>Puede usar los ojos para desplazarse por páginas web, menús, listas, aplicaciones y más. Siga los pasos que se muestran a la derecha para intentar desplazarse en la aplicación Configuración de iPad OS.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Seleccione la Configuración de iPad OS.2 Seleccione el botón del Menú AssistiveTouch, luego Desplazar y, por último, Desplazarse hacia abajo.3 Seleccione la ventana de Configuración de iPad OS para desplazarse hacia abajo por las configuraciones. <p> Nota: AssistiveTouch regresa a Toque después de que usted usa otra acción, como Desplazar. Si desea desplazarse de nuevo, repita los pasos 2 y 3 anteriores.</p>



AssistiveTouch: Ideas para practicar

Idea para practicar	Inténtelo
<p>Mueva el botón del Menú AssistiveTouch.</p>  <p>A veces, el botón del Menú AssistiveTouch estorba. ¡Puede reubicar el botón del Menú AssistiveTouch en cualquier momento!</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Seleccione el botón del Menú AssistiveTouch y, luego, seleccione Mover menú.2 Mire en la pantalla el lugar donde desea colocar el botón del Menú AssistiveTouch.3 Mantenga la mirada durante el tiempo de permanencia establecido para soltar el botón del Menú AssistiveTouch en ese lugar.
<p>Pruebe App Switcher.</p>  <p>La manera más rápida de navegar entre aplicaciones abiertas en TD Pilot es usar App Switcher.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Seleccione el botón del Menú AssistiveTouch y, luego, seleccione App Switcher.2 Verá todas las aplicaciones abiertas actualmente en TD Pilot. Seleccione una aplicación para ir a ella. <p>i Nota: Si no ve la aplicación que está buscando en App Switcher, entonces la aplicación no está abierta actualmente. Vaya a la pantalla de Inicio y seleccione el ícono de la aplicación para abrirla.</p>



Montaje y posicionamiento


Confirme siempre que haya una buena base.

Antes de seguir resolviendo el problema, empiece por reubicar y recalibrar en cada ocasión. La mayoría de los problemas de seguimiento ocular se resuelven o mejoran durante estos dos pasos cruciales.

- Si los necesita, debe tener puestos los anteojos y deben estar limpios.
- Ubique el dispositivo para adaptarse a la persona en la posición que le resulta cómoda. Use el Estado de seguimiento para comprobar la ubicación correcta.



Nota: Para abrir el Estado de seguimiento, abra TD CoPilot desde la pantalla de Inicio o pida a un compañero(a) que presione el botón de Estado de seguimiento a la izquierda de la Ventana del interlocutor en la parte de atrás del dispositivo TD Pilot.

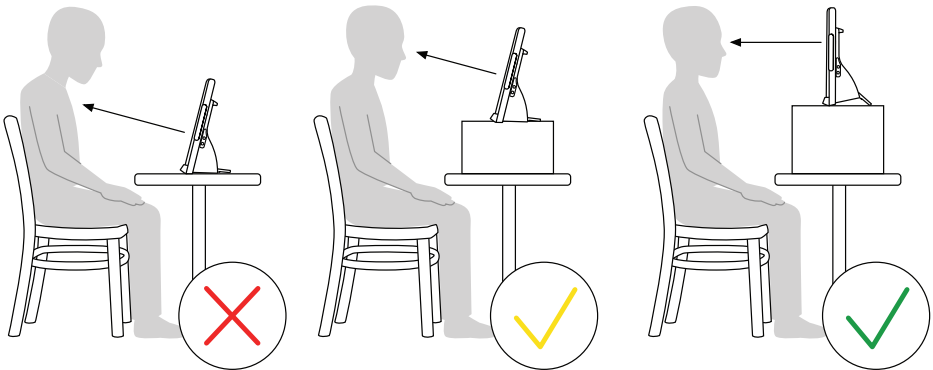

- El TD Pilot debe colocarse al nivel de los ojos. La mayoría de los usuarios, cuando están sentados en una mesa o escritorio, necesitarán acomodar el TD Pilot a un nivel más alto que la superficie de la mesa.
- Recalibre para adaptarse a los cambios que ocurren durante el día en la iluminación ambiental, la postura del cuerpo, la fatiga y la respuesta ocular (posiblemente debida a medicamentos o sequedad).



Afinación del seguimiento ocular

Vea los siguientes problemas. Pruebe una o más de las soluciones. A veces, será útil una combinación de ellas.

Problema	Soluciones
El seguidor ocular no detecta los ojos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asegúrese de que el TD Pilot esté cargado y encendido.▪ Asegúrese de que AssistiveTouch esté activado (siga el procedimiento de configuración de la Guía de inicio de TD Pilot).▪ Verifique que el cable que conecta el dispositivo TD Pilot al iPad esté bien conectado.▪ Compruebe la posición del dispositivo y la persona.▪ Revise la información sobre el reflejo de los anteojos.
La precisión no es buena.	<ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe la posición del dispositivo y la persona y, luego, recalibre.▪ Revise las soluciones para los problemas indicados a continuación. Se puede aplicar más de una.
La precisión empeora con el tiempo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Recalibre. Recuerde comprobar la posición antes de hacerlo.▪ Aparte la mirada o cierre los ojos por un momento para reenfocar.▪ Disminuya el brillo de la pantalla: <i>Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo</i>▪ Aumente el tamaño del texto para agrandar los objetivos de texto: <i>Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo > Tamaño del texto</i>▪ Vea “Está experimentando tensión y sequedad en los ojos” a continuación.
El reflejo de los anteojos parece estar interfiriendo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Limpie los anteojos.▪ Limite o elimine la luz que procede de atrás de la persona que usa el dispositivo.▪ Si el usuario usa lentes multifocales, intente reubicar el dispositivo para aprovechar la porción de los lentes destinada al uso con la computadora.



Afinación del seguimiento ocular (cont.)

Problema	Soluciones
La respuesta del Puntero se retrasa.	<ul style="list-style-type: none">▪ Configuración de aumento de la sensibilidad: <i>TD CoPilot > Configuración > AssistiveTouch</i>
Dificultad para mantener la permanencia durante el tiempo suficiente.	<ul style="list-style-type: none">▪ Acorte el tiempo de permanencia: <i>TD Talk > Configuración > Teclado</i> <i>TD Talk > Configuración > Activación</i> <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > AssistiveTouch > Segundos de control de permanencia</i>▪ Aumente la tolerancia al movimiento: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > AssistiveTouch</i>▪ Configuración de disminución de la sensibilidad: <i>TD CoPilot > Configuración > AssistiveTouch</i>
Selecciones que ocurren demasiado rápido o por accidente.	<ul style="list-style-type: none">▪ Alargue el tiempo de permanencia en TD Talk o AssistiveTouch: <i>TD Talk > Configuración > Teclado</i> <i>TD Talk > Configuración > Activación</i> <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > AssistiveTouch > Segundos de control de permanencia</i>▪ Disminuya la tolerancia al movimiento: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > AssistiveTouch</i>
El Puntero salta o se desvía.	<ul style="list-style-type: none">▪ Configuración de disminución de la sensibilidad: <i>TD CoPilot > Configuración > AssistiveTouch</i>▪ Quite el color del Puntero: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Control del puntero > Color</i>▪ Ajuste el tamaño del Puntero: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Control del puntero</i>
No puede ver el Puntero.	<ul style="list-style-type: none">▪ Modifique el tamaño y el color del Puntero para hacer que destaque: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Control del puntero</i>



Afinación del seguimiento ocular (cont.)

Problema	Soluciones
El botón del Menú AssistiveTouch interfiere o distrae.	<ul style="list-style-type: none">▪ Mueva el botón del Menú AssistiveTouch en la pantalla.▪ Disminuya la Opacidad de inactividad del botón del Menú AssistiveTouch: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > AssistiveTouch</i>
Sensación de mareo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Reduzca el brillo de la pantalla: <i>Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo</i>▪ Quite el color del Puntero: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Control del puntero</i>▪ Active la configuración de Reducir movimiento: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Movimiento</i>▪ Active la configuración Preferir transición gradual: <i>Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Movimiento</i>
Está experimentando tensión y sequedad en los ojos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Haga pausas.▪ Reduzca el brillo: <i>Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo</i>▪ Aumente el tamaño del texto: <i>Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo > Tamaño del texto</i>▪ Consulte al médico.
Los ojos no se mueven juntos (estrabismo).	<ul style="list-style-type: none">▪ Identifique cuál es el ojo más fuerte y calibre solo con ese ojo.▪ Consulte al médico.
Movimientos oculares involuntarios (nistagmo).	<ul style="list-style-type: none">▪ Reubique el dispositivo para ver si hay un área en el campo visual en el que disminuya el movimiento nistagmoide.



Preguntas frecuentes

¿Puedo usar AssistiveTouch en TD Talk?

La respuesta corta es que sí puede, pero no lo necesita. Los botones en TD Talk son como imanes. Cuando su mirada se mueve cerca de un botón en TD Talk, arrastra el puntero hacia el botón. Esto lo ayuda a ser más preciso y reduce su esfuerzo. Encienda AssistiveTouch cuando desee salir de TD Talk para usar otras aplicaciones.

Tengo problemas con el seguimiento ocular. ¿Qué puedo hacer?

Hay varias opciones para ayudarlo a mejorar el seguimiento ocular.

- Revise la información sobre las tarjetas de Afinación del seguimiento ocular. Intente reubicar o recalibrar primero antes de empezar a cambiar la configuración.
- Vea los recursos al reverso de esta tarjeta.
- Contacte al terapeuta o la organización que lo ayudó a obtener su dispositivo.

¿Cómo funciona la Predicción de frases de TD Talk?

La Predicción de frases de TD Talk se basa en la frecuencia. Las frases que ha pronunciado varias veces anteriormente se predicen cuando empieza a escribir el comienzo de una frase. Tiende a predecir oraciones parciales (p. ej., iré a, qué te gusta) en lugar de oraciones completas (p. ej., iré a la tienda, ¿qué te gusta en tu café?), ya que se usan en una variedad más amplia de situaciones y le ahorran tener que editarlas con frecuencia.



Recursos adicionales

Escanee los códigos QR para usar los vínculos.



Tobii Dynavox

es.tobiidynavox.com



Apple

apple.com/es/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



**Centro de aprendizaje
de Tobii Dynavox
(solo en inglés)**

learn.tobiidynavox.com



Comunidad de TD

qrco.de/TDFB



**Página de Soporte de
TD Talk**

qrco.de/TDTalkHelpES



**Manual del usuario
de TD Pilot**

qrco.de/PilotDocs



Documentación

*TD CoPilot >
Configuración > Ayuda*



Soporte técnico

Norteamérica:
1-800-344-1778 ext. 1

Resto del mundo:
+46 8 522 950 20 ext. 1

