



TD Talk e AssistiveTouch

Schede di formazione



L'app TD Talk consente di unirsi alle conversazioni fra persone.




AssistiveTouch consente di accedere ad altre app.

Indice

- 1** TD Talk - Tour
- 2** TD Talk - Suggerimenti di comunicazione
- 3** TD Talk - Suggerimenti di comunicazione (cont.)
- 4** TD Talk - Idee per la pratica
- 5** AssistiveTouch - Uso delle app
- 6** AssistiveTouch - Idee per la pratica
- 7** Montaggio e posizionamento e Regolazione dell'interazione oculare
- 8** Regolazione dell'interazione oculare (cont.)
- 9** Domande frequenti e Ulteriori risorse

TD Talk - Tour

TD Talk è studiato per una comunicazione rapida faccia a faccia. Utilizzare questa app durante l'interazione con altre persone.

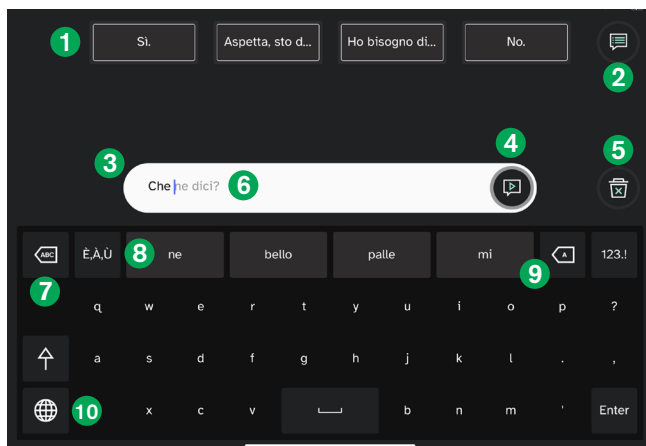

1 Messaggi rapidi

Messaggi pre-scritti che vengono pronunciati immediatamente quando selezionati.

2 Altri messaggi rapidi

Aprire la pagina Messaggi rapidi per la pronuncia o la modifica dei propri Messaggi rapidi.

3 Finestra Messaggio

Visualizzare e modificare qui il testo che si desidera pronunciare.

4 Parla

Consente di pronunciare il testo nella Finestra Messaggio. È anche possibile mettere in pausa e ripristinare la pronuncia.

5 Cancella

Consente di cancellare tutto il testo nella Finestra Messaggio.

6 Predizione di frasi

TD Talk impara da quello che si digita e usa tali informazioni per la predizione delle frasi. La predizione è basata sulla frequenza e rende la comunicazione più veloce e personale.

7 Elimina parola

Consente di eliminare la parola a sinistra del cursore.

8 Predizione di parole

Predice automaticamente le parole in base a quanto digitato fino ad allora.

9 Backspace


Consente di eliminare il carattere a sinistra del cursore.

10 Cambio lingua

Consente di cambiare lingua.



TD Talk - Tour (cont.)

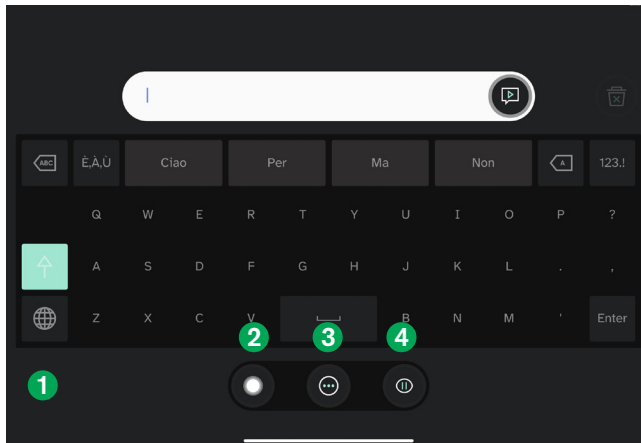

1 Menu fuori schermo

Guardare sotto l'eye tracker per aprire questo menu che include le opzioni Sospendi/Riprendi, Altro e AssistiveTouch.

2 Attiva/disattiva AssistiveTouch

Consente di attivare AssistiveTouch. Usare AssistiveTouch per accedere alla schermata iniziale e a tutte le altre app.

3 Altro

Consente di accedere al Dashboard e alle Impostazioni.

4

Sospendi/Riprendi interazione oculare

Azionare il pulsante per sospendere e ripristinare l'interazione oculare.




TD Talk - Suggerimenti di comunicazione

Questi suggerimenti possono contribuire a utilizzare al meglio TD Talk.

Suggerimento	Provalo
<p>Prendersi delle pause regolari dal tracciamento oculare.</p> <p>Sospendere l'eye tracker quando non si sta parlando e riattivarlo quando si è pronti a parlare.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Guardare sotto l'eye tracker per aprire il Menu fuori schermo.2 Selezionare Pausa. Il tracciamento oculare viene messo in pausa.3 Ripetere l'operazione suddetta per ripristinare il tracciamento oculare.
<p>Modificare i messaggi direttamente nella Finestra Messaggio.</p> <p>Correggere, rimuovere o aggiungere parole in qualsiasi punto della Finestra Messaggio quando si utilizza Modifica Menu.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Guardare il punto della frase che si desidera modificare. Viene visualizzata una sottolineatura sotto la parola e, successivamente, compare Modifica Menu.2 Quando la parola è sottolineata, è possibile eseguire una delle operazioni seguenti:<ul style="list-style-type: none">Sostituire la parola. Selezionare una delle parole della predizione o digitare lettere.Eliminare la parola. Selezionare backspace.Spostare il cursore. Usare le frecce sinistra e destra in Modifica Menu per spostare il cursore, quindi digitare per inserire il testo.3 Selezionare X per chiudere Modifica menu.




TD Talk - Suggerimenti di comunicazione (cont.)

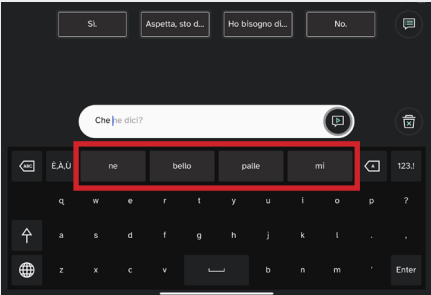
Suggerimento	Provalo
<p>Usare la punteggiatura e le lettere maiuscole solo quando migliorano il messaggio.</p> <p>I punti e le lettere maiuscole richiedono tempo e sforzo per l'inserimento. Non fanno differenza nel modo in cui il messaggio viene pronunciato a meno che i punti non separino frasi all'interno di un paragrafo.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Usa ? e ! per rendere il messaggio una domanda o un'esclamazione.▪ Le virgole inseriscono pause in una frase. Usare le virgole per enfatizzare o dare una cadenza specifica.▪ Le lettere maiuscole aggiungono un impatto visivo ma non modificano la pronuncia di una parola. TD Talk trasforma automaticamente in maiuscolo la prima lettera di una frase. In caso contrario, non preoccuparsi delle maiuscole, a meno che non ci sia qualcun altro a leggere il messaggio.
<p>Sfruttare al meglio la predizione delle parole.</p> <p>La predizione delle parole impara da cosa si digita e può velocizzare la comunicazione.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Quando si inizia a digitare una parola, guardare i pulsanti di predizione della parola per vedere se includono la parola che si desidera inserire.2 Ripetere ogni 2-3 lettere.3 Se ci si rende conto di aver selezionato involontariamente, durante la lettura, le parole della predizione, aumentare il tempo di selezione per la predizione delle parole in <i>TD Talk > Impostazioni > Tastiera</i>.



TD Talk - Suggerimenti di comunicazione (cont.)

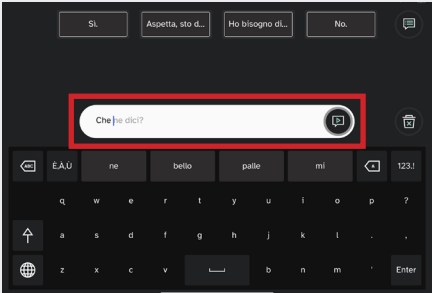Suggerimento	Provalo
<p>Digitare come se si stesse parlando. La lingua parlata è diversa dalla grammatica più formale della lingua scritta. Usare frasi parziali e la grammatica casuale che riflettono il tipo di conversazione in corso.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ “Andiamo”?▪ “Potrei lo sai ma no grazie.”▪ “Prossima volta.”
<p>Usare la predizione delle frasi. La predizione delle frasi impara come le parole vengono messe insieme e predice ciò che l'utente desidera comunicare in base alla frequenza di utilizzo. Più si parla utilizzando TD Talk, più migliora la predizione delle frasi in modo da poter pronunciare ciò che si desidera in modo più rapido e con meno sforzo.</p>  <p>The screenshot shows a mobile interface with a text input field. Above the field are four buttons: 'Sì', 'Aspetta, sto d...', 'Ho bisogno di...', and 'No'. The input field contains the text 'Che ne dici?' and is highlighted with a red rectangular box. Below the input field is a keyboard with various keys, including a globe icon, a back arrow, and an 'Enter' key.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Guardare la Finestra Messaggio dopo una o due parole per vedere se TD Talk ha fornito la predizione della frase.2 Se la predizione della frase è quella desiderata, fissare lo sguardo sull'ultima parola della predizione per accettarla.3 Se la predizione non è quella desiderata, continuare a digitare.

TD Talk - Suggerimenti di comunicazione (cont.)

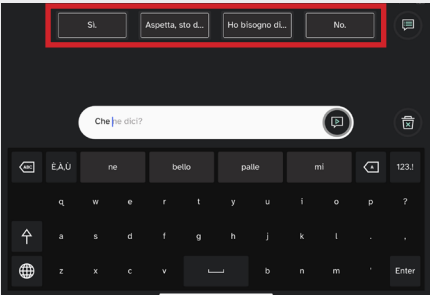Suggerimento	Provalo
<p>I Messaggi rapidi sono spesso l'opzione di comunicazione più veloce.</p> <p>Usare questi messaggi modificabili per esprimere esigenze immediate, tenere una conversazione e preparare preventivamente cosa di desidera comunicare per eventi quali appuntamenti dal medico, presentazioni e incontri di famiglia.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Selezionare Altri messaggi rapidi, quindi Modifica Messaggi rapidi.2 Selezionare il Messaggio rapido che si desidera modificare e digitare il messaggio con la tastiera.3 Selezionare Salva e tornare alla tastiera principale.
<p>Prendersi del tempo per imparare.</p> <p>Il tracciamento oculare è questione di pratica. La comunicazione con TD Talk diventerà sempre più automatica con il tempo e l'utilizzo.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Regolare il tracciamento oculare affinando le impostazioni man mano che la dimestichezza aumenta con il passare del tempo.2 Utilizzare le idee per la pratica riportate nella sezione successiva per concentrarsi sulle abilità individuali.



TD Talk - Idee per la pratica

1 Prendere dimestichezza con la sospensione e il riavvio dell'interazione oculare.

Guardare sotto l'eye tracker per aprire il Menu fuori schermo, quindi selezionare il pulsante di attivazione/disattivazione Sospendi interazione oculare. Ripetere la stessa procedura per ripristinare l'interazione oculare. Provare questa operazione diverse volte.

2 Fare pratica per acquisire dimestichezza nel digitare come se si stesse parlando.

Le frasi seguenti possono essere utilizzate in una comunicazione scritta formale. Come sarebbe in una conversazione meno formale?

- Oggi, parleremo un po' di finanza.
- Ti auguro tutto il meglio.
- Spero sia stato bene nei mesi passati.

Pensare a frasi utilizzate frequentemente in una conversazione. Gli esempi seguenti potrebbero essere di aiuto. Digitali in TD Talk

Esclamazione

Nemmeno per sogno! È interessante. No?

Parole o frasi di riempimento

...come..., um..., Intendo dire, lo sai, ...se ha senso, ...e così via.

Parole e frasi regionali

Fa un caldo terribile. State venendo tutti?
Apparecchiare la tavola.

3 Sperimentare l'uso della punteggiatura e delle maiuscole.

Digitare le frasi seguenti e ascoltare la differenza con e senza punteggiatura e maiuscole. Questa attività consentirà di capire quando è importante aggiungere la punteggiatura e le maiuscole e quando invece è possibile ignorarle per risparmiare tempo.

	Opzione 1	Opzione 2
1	Metterò una camicia, i jeans e una giacca.	Metterò una camicia jeans e una giacca
2	Posso averla?	Posso averla
3	C'è Jane lì giù	C'è Jane, lì giù.
4	Wow! È fantastico	Wow, è fantastico
5	Mi piace ma a lui no.	Mi piace, ma, a lui no.



TD Talk - Idee per la pratica (cont.)

4 Provare a modificare le parole nella Finestra Messaggio.

Digitare una frase contenente un errore intenzionale (errore di ortografia, aggiunta o rimozione di una parola). Modificare l'errore guardando la parola nella Finestra Messaggio.

5 Risparmiare tempo con la predizione delle parole.

Digitare "Devo andare al bar domani mattina" senza utilizzare la predizione delle parole. Quindi, digitare nuovamente la frase utilizzando la predizione delle parole. Confrontare il tempo e lo sforzo richiesti.

6 Provare a usare la predizione delle frasi.

Digitare una delle frasi seguenti, quindi pronunciarla cinque volte con TD Talk. Questa procedura aggiungerà la frase al proprio Gruppo di frasi. Cancellare la Finestra Messaggio, quindi iniziare a digitare nuovamente la stessa frase. Sarà visualizzata la frase predetta. Guardare l'ultima parola nella frase predetta per selezionarla, quindi pronunciarla.

- Mi chiamo [nome].
- Il mio indirizzo è [indirizzo].
- [Nome di persona] è mio [relazione].
- Lavoro (o ho lavorato) presso [datore di lavoro] come [titolo professionale].
- Uso questo dispositivo per comunicare e comprendo tutto ciò che dici.

7 Utilizzare e modificare i Messaggi rapidi.

Individuare i Messaggi rapidi che potrebbero essere utilizzati negli scenari seguenti.

- Quando qualcuno racconta una barzelletta.
- Se qualcuno chiede se ti è piaciuto un film o una trasmissione TV.
- Quando hai bisogno di qualcosa subito.
- Se qualcuno inizia a parlare mentre stai digitando un messaggio.
- Quando desideri avere più informazioni durante un'interazione.

Modificare un Messaggio rapido in base a ciò che si desidera dire nelle situazioni seguenti.

- Condividere dubbi o un elenco di domande per il medico o il terapista.
- Comunicare a un amico o a un membro della famiglia cosa farai più tardi.
- Fornire istruzioni all'assistente.



AssistiveTouch - Uso delle app

Una volta acquisita la giusta dimestichezza con TD Talk, è possibile utilizzare AssistiveTouch per accedere alle altre app sull'iPad. Le impostazioni e i comportamenti dell'interazione oculare di AssistiveTouch differiscono da quelli in TD Talk, pertanto è necessario regolare le impostazioni del sistema operativo dell'iPad.

Tour



Pulsante AssistiveTouch

Consente di aprire il menu di AssistiveTouch. Il menu del pulsante AssistiveTouch fluttua nella parte superiore del contenuto delle altre schermate e può essere riposizionato secondo necessità.

Menu di AssistiveTouch

Strumenti di navigazione accessibili tramite interazione oculare che consentono di toccare, scorrere, regolare il volume, passare da un'app all'altra, ecc. utilizzando gli occhi.




Nota: Assicurarsi di guardare le schede Regolazione dell'interazione oculare in caso di difficoltà nell'utilizzo di AssistiveTouch.

1 Passare a AssistiveTouch da TD Talk.

AssistiveTouch sarà utilizzato per navigare al di fuori di TD Talk. Viene disattivato alla riapertura di TD Talk.

- Dalla tastiera di TD Talk, guardare sotto l'eye tracker per aprire il Menu fuori schermo, quindi selezionare Attiva/disattiva AssistiveTouch. Sullo schermo, compare il puntatore (cerchietto grigio) che seguirà lo sguardo dell'utente.
- Guardare il pulsante del menu di AssistiveTouch fino all'apertura del menu di AssistiveTouch.
- Guardare la Home nel menu di AssistiveTouch fino alla visualizzazione della schermata iniziale.

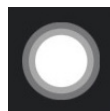

Attiva/disattiva AssistiveTouch



Menu di AssistiveTouch




AssistiveTouch - Uso delle app (cont.)

2 Fare una pausa quando necessario.

Sospendere l'eye tracker per leggere e riposarsi, per poi ripristinare l'interazione oculare quando desiderato.

- Guardare il **pulsante del menu di AssistiveTouch** per aprire il menu di AssistiveTouch.
- Guardare **Sospendi selezione** per sospendere.
- Ripetere l'operazione suddetta per ripristinare l'interazione oculare.

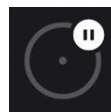

Pause Dwell/
Arresta clic
automatico

3 Uso dell'iPad tramite gli occhi.

- Il tocco e lo scorrimento sono disponibili nel livello superiore del menu di AssistiveTouch. Altri gesti come Mantieni e trascina, Pressione lunga e Doppio tocco si trovano in Personalizza nel menu di AssistiveTouch.
- Per scorrere, selezionare il **pulsante del menu di AssistiveTouch**, quindi **Scorri** e la **direzione di scorrimento**. Successivamente, posizionare il puntatore nell'area della schermata che si desidera scorrere.
- AssistiveTouch esegue come opzione alternativa l'azione Tocco dopo aver eseguito un'azione differente come la sospensione o lo scorrimento. È possibile modificare l'azione alternativa o rimuoverla in *Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Tocco > AssistiveTouch > Azione alternativa*.

4 Spostare il pulsante di AssistiveTouch.

Potrebbe essere necessario spostare il pulsante di AssistiveTouch per ricollocarlo in una posizione più comoda. Selezionare **Sposta menu** nel menu di AssistiveTouch, quindi tenere lo sguardo sullo schermo nel punto in cui si desidera ricollocare il pulsante del menu di AssistiveTouch.


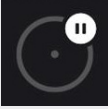

5 Scegliere le app appropriate.

Porsi queste domande in relazione all'uso delle app tramite interazione oculare.

- Hai le skill (ad es., Tocco, Scorrimento, Pressione lunga) necessarie per utilizzare l'app?
- Se non hai le skill richieste, l'app è un modo adeguato per fare pratica e creare nuove abilità?
- Consideri l'app molto interessante? Quando sei motivato, sei più predisposto a lavorare duramente e perseverare nel tentativo di accedere alle app più complicate.
- Ci sono impostazioni nel sistema operativo dell'iPad o in TD CoPilot che possono contribuire a rendere l'app più accessibile tramite l'interazione oculare? Per ulteriori informazioni, vedere le schede Regolazione dell'interazione oculare.
- Puoi configurare le impostazioni all'interno dell'app per adattarle alle tue abilità correnti? Ciò potrebbe includere il passaggio dall'orientamento verticale a quello orizzontale, la modifica delle impostazioni del tempo di risposta o di timeout nei giochi, la sostituzione di attività complesse (selezione e trascinarsi) con altre più semplici (selezione) o la visualizzazione di meno opzioni sullo schermo.





AssistiveTouch - Idee per la pratica

Idea per la pratica	Provalo
<p>Attivare AssistiveTouch da TD Talk.</p>  <p>Fare pratica con la navigazione fra TD Talk e la schermata iniziale utilizzando AssistiveTouch.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 In TD, guardare sotto l'eye tracker per aprire il Menu fuori schermo.2 Selezionare AssistiveTouch.3 Selezionare il pulsante del menu di AssistiveTouch, quindi selezionare Home.
<p>Fare una pausa utilizzando Sospendi/Riprendi selezione.</p>  <p>Disattivare temporaneamente la selezione dell'interazione oculare in modo da poter leggere, guardare un video o semplicemente rilassarsi.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Selezionare il pulsante del menu di AssistiveTouch, quindi selezionare Sospendi selezione.2 Guardare in diversi punti dello schermo e verificare che la selezione sia disabilitata.3 Selezionare il pulsante del menu di AssistiveTouch, quindi selezionare Ripristina selezione.
<p>Scorrere con gli occhi.</p>  <p>È possibile utilizzare gli occhi per scorrere pagine Web, menu, elenchi, app e altro. Seguire la procedura mostrata a destra per provare lo scorrimento nell'app Impostazioni SO (Sistema operativo) iPad.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Selezionare Impostazioni SO iPad.2 Selezionare il pulsante del menu di AssistiveTouch, quindi selezionare Scorri e, successivamente, Scorri in basso.3 Eseguire una selezione nella finestra Impostazioni SO iPad per scorrere in basso le impostazioni. <p>i Nota: AssistiveTouch esegue l'azione alternativa a Tocco dopo aver utilizzato un'altra azione, ad esempio lo scorrimento. Se si desidera attivare nuovamente lo scorrimento, ripetere i punti 2 e 3 suddetti.</p>



AssistiveTouch - Idee per la pratica (cont.)

Idea per la pratica	Provalo
<p>Spostare il pulsante del menu di AssistiveTouch.</p>  <p>Talvolta, il pulsante del menu di AssistiveTouch potrebbe essere d'intralcio. È possibile riposizionare il pulsante del menu di AssistiveTouch in qualsiasi momento!</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Selezionare il pulsante del menu di AssistiveTouch, quindi selezionare Sposta menu.2 Guardare il punto sullo schermo in cui si desidera posizionare il pulsante del menu di AssistiveTouch.3 Mantenere lo sguardo per un tempo di selezione definito per trascinare il pulsante del menu di AssistiveTouch in tale posizione.
<p>Provare App Switcher.</p>  <p>Il modo più veloce per passare da un'app in esecuzione all'altra su TD Pilot è tramite App Switcher.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Selezionare il pulsante del menu di AssistiveTouch, quindi selezionare App Switcher.2 Verranno visualizzate tutte le app al momento in esecuzione su TD Pilot. Selezionare un'app da usare. <p>i Nota: Se non è visualizzata l'app che si sta cercando in App Switcher, vuol dire che tale app non è al momento in esecuzione. Andare alla schermata iniziale e selezionare l'icona dell'app per avviarla.</p>



Montaggio e posizionamento


Verificare sempre che la base sia solida.

Prima di cercare di risolvere il problema diversamente, eseguire un riposizionamento e una ricalibrazione. La maggior parte dei problemi relativi all'interazione oculare viene risolta o migliorata durante queste due operazioni cruciali.

- Indossare gli occhiali e pulirli, se necessario.
- Posizionare il dispositivo in modo che l'utente sia comodo. Usare Stato del tracciamento per verificare che la posizione sia corretta.



Nota: Per aprire Stato del tracciamento, avviare TD CoPilot dalla schermata iniziale o chiedere al partner di premere il pulsante Stato del tracciamento a sinistra della Finestra Partner sul retro del dispositivo TD Pilot.

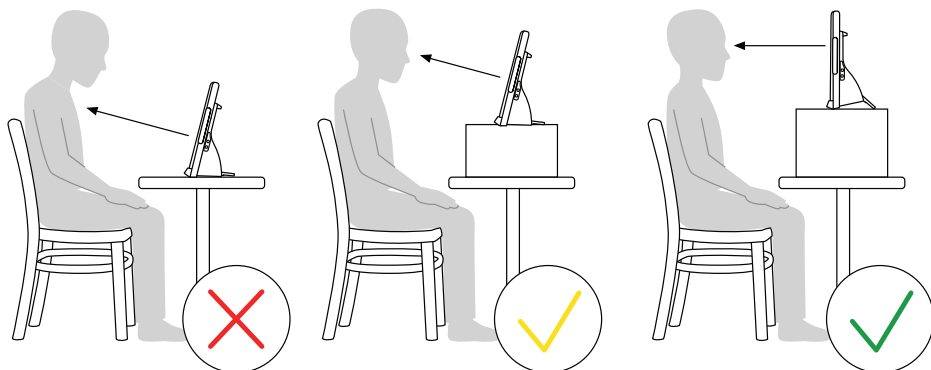

- TD Pilot deve essere posizionato a livello degli occhi. La maggior parte degli utenti, seduti a un tavolo o una scrivania, ha bisogno che TD Pilot sia posizionato più in alto rispetto alla superficie del tavolo.
- Ricalibrare in base alle modifiche che si verificano durante la giornata, come la variazione dell'illuminazione ambientale, della posizione del corpo, della fatica e della risposta degli occhi (probabilmente a causa di farmaci o stanchezza).



Regolazione dell'interazione oculare

Dare un'occhiata ai seguenti problemi. Provare una o più delle soluzioni fornite. Talvolta, se combinate, potrebbero essere di maggior aiuto.

Problema	Soluzioni
L'eye tracker non rileva gli occhi.	<ul style="list-style-type: none">▪ Assicurarsi che TD Pilot sia carico e acceso.▪ Assicurarsi che AssistiveTouch sia abilitato (seguire la procedura di configurazione indicata nella Guida rapida di TD Pilot).▪ Verificare che il cavo di collegamento del dispositivo TD Pilot all'iPad sia inserito correttamente.▪ Controllare il posizionamento del dispositivo e dell'utente.▪ Rivedere le informazioni relative ai riflessi degli occhiali.
La precisione non è appropriata.	<ul style="list-style-type: none">▪ Controllare il posizionamento del dispositivo e dell'utente, quindi ricalibrare.▪ Rivedere le soluzioni ai problemi indicati di seguito. Potrebbero essere valide più soluzioni.
La precisione peggiora nel tempo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ricalibrare. Prima di procedere, ricordarsi di controllare il posizionamento.▪ Allontanare lo sguardo o chiudere gli occhi qualche istante per mettere nuovamente a fuoco.▪ Ridurre la luminosità del display: <i>Impostazioni SO iPad > Display e luminosità</i>▪ Aumentare la dimensione del testo per ingrandire i target basati su testo: <i>Impostazioni SO iPad > Display e luminosità > Dimensione testo</i>▪ Vedere "Stanchezza o secchezza degli occhi" di seguito.
È possibile che il riflesso degli occhiali causi qualche fastidio.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pulire gli occhiali.▪ Limitare o eliminare la luce proveniente dalle spalle della persona che sta utilizzando il dispositivo.▪ Se l'utente indossa lenti multifocali, provare a riposizionare il dispositivo per sfruttare al meglio la parte della lente prevista per l'uso del computer.



Regolazione dell'interazione oculare (cont.)

Problema	Soluzioni
La risposta del puntatore è lenta.	<ul style="list-style-type: none">▪ Aumentare l'impostazione Reattività: <i>TD CoPilot > Impostazioni > AssistiveTouch</i>
Difficoltà di mantenimento della selezione per il tempo sufficiente.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ridurre il tempo di selezione: <i>TD Talk > Impostazioni > Tastiera</i> <i>TD Talk > Impostazioni > Attivazione</i> <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Tocco > AssistiveTouch > Secondi del controllo selezione</i>▪ Aumentare la tolleranza di movimento: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Tocco > AssistiveTouch</i>▪ Ridurre l'impostazione Reattività: <i>TD CoPilot > Impostazioni > AssistiveTouch</i>
Le selezioni vengono effettuate in modo troppo rapido o accidentale.	<ul style="list-style-type: none">▪ Allungare il tempo di selezione in TD Talk e/o AssistiveTouch: <i>TD Talk > Impostazioni > Tastiera</i> <i>TD Talk > Impostazioni > Attivazione</i> <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Tocco > AssistiveTouch > Secondi del controllo selezione</i>▪ Ridurre la tolleranza di movimento: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Tocco > AssistiveTouch</i>
Il puntatore è instabile:	<ul style="list-style-type: none">▪ Ridurre l'impostazione Reattività: <i>TD CoPilot > Impostazioni > AssistiveTouch</i>▪ Rimuovere il colore dal puntatore: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Controllo puntatore > Colore</i>▪ Regolare la dimensione del puntatore: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Controllo puntatore</i>
Impossibile vedere il puntatore	<ul style="list-style-type: none">▪ Modificare la dimensione e il colore del puntatore per renderlo più visibile: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Controllo puntatore</i>



Regolazione dell'interazione oculare (cont.)

Problema	Soluzioni
Il pulsante del menu di AssistiveTouch interferisce o dà fastidio.	<ul style="list-style-type: none">▪ Spostare il pulsante del menu di AssistiveTouch sullo schermo.▪ Ridurre l'Opacità di inattività del pulsante del menu di AssistiveTouch: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Tocco > AssistiveTouch</i>
Sensazione di chinetosi.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ridurre la luminosità dello schermo: <i>Impostazioni SO iPad > Display e luminosità</i>▪ Rimuovere il colore dal puntatore: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Controllo puntatore</i>▪ Abilitare l'impostazione Riduci movimento: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Movimento</i>▪ Abilitare l'impostazione Preferisci transizioni in dissolvenza: <i>Impostazioni SO iPad > Accessibilità > Movimento</i>
Stanchezza o secchezza degli occhi.	<ul style="list-style-type: none">▪ Fare delle pause.▪ Ridurre la luminosità. <i>Impostazioni SO iPad > Display e luminosità</i>▪ Aumentare la dimensione del testo: <i>Impostazioni SO iPad > Display e luminosità > Dimensione testo</i>▪ Rivolgersi a un medico.
Gli occhi non si muovono insieme (strabismo).	<ul style="list-style-type: none">▪ Identificare l'occhio più forte ed eseguire la calibrazione solo con quello.▪ Rivolgersi a un medico.
Movimenti involontari degli occhi (nistagmo)	<ul style="list-style-type: none">▪ Riposizionare il dispositivo per vedere se vi è un'area nel campo visivo in cui il movimento nistagmoide si riduce.



Domande frequenti

Posso utilizzare AssistiveTouch in TD Talk?

La risposta breve è che è possibile ma non necessario. I pulsanti in TD Talk sono come magneti. In TD Talk, quando lo sguardo si avvicina a un pulsante, il puntatore viene attirato verso il pulsante. Ciò consente di essere più precisi e riduce lo sforzo. Attivare AssistiveTouch quando si desidera uscire da TD Talk per utilizzare altre app.

Ho difficoltà con il tracciamento oculare. Cosa posso fare?

Ci sono diverse opzioni per migliorare il tracciamento oculare.

- Rivedere le informazioni sulle schede Regolazione dell'interazione oculare. Prima di modificare le impostazioni, provare a eseguire il riposizionamento e la ricalibrazione.
- Vedere le risorse sul retro della scheda.
- Rivolgersi al terapeuta o all'organizzazione che hanno fornito assistenza per ottenere il dispositivo.

Come funziona la predizione delle frasi di TD Talk?

La predizione delle frasi di TD Talk è basata sulla frequenza. Le frasi pronunciate diverse volte in precedenza vengono predette quando si inizia a digitare l'inizio della frase. Questa funzione tende a predire frasi parziali (ad es., Sto andando, Cosa ti) invece delle frasi complete (ad es., Sto andando al negozio, Cosa di piace nel caffè?) poiché vengono utilizzate in una gamma di situazioni più ampia e consentono di evitarle spesso.



Ulteriori risorse

Scansionare i codici QR o utilizzare i collegamenti.



Tobii Dynavox

tobiidynavox.com



Apple

apple.com/it/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Hub di apprendimento
Tobii Dynavox
(solo lingua inglese)

learn.tobiidynavox.com



Community TD

qrco.de/TDFB



Pagina di supporto
TD Talk

qrco.de/TDTalkHelp



Manuale utente
TD Pilot

qrco.de/PilotDocs



Documentazione

*TD CoPilot >
Impostazioni > Guida*



Contattare il
rappresentante Tobii
Dynavox locale per
supporto tecnico.

