


Guía de inicio

TD I-110




¿Qué hay en la caja?

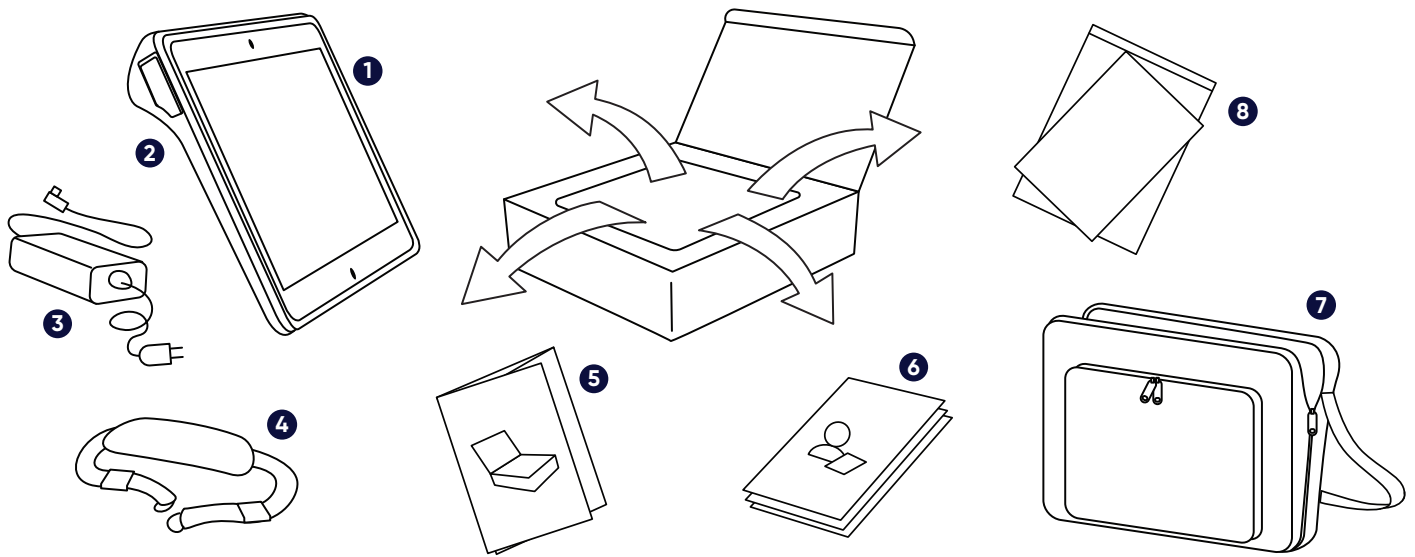

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 1 Dispositivo | 4 Correa de transporte para hombro | 7 Estuche de transporte |
| 2 Estuche resistente | 5 Guía de inicio | 8 Documentos de seguridad y cumplimiento, licencia y configuración |
| 3 Cable de alimentación | 6 Tarjetas de entrenamiento TD Snap | |

Conozca su dispositivo

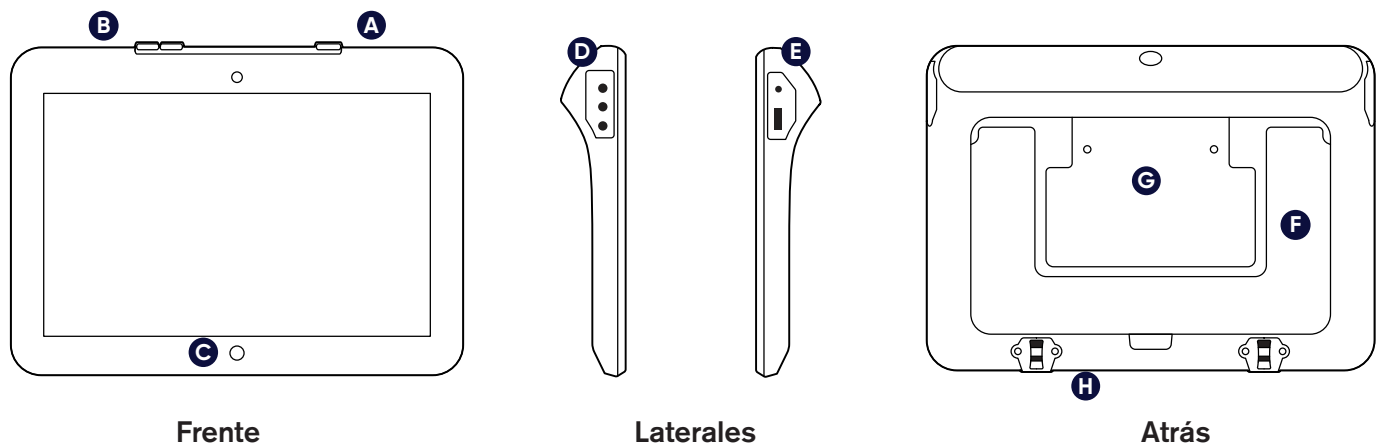



- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| A Botón de encendido | D Puertos para pulsador y audio | F Soporte de pie incorporado |
| B Botones de volumen | E Conector de alimentación y puertos USB | G Espacio para instalar el montaje |
| C Botón de inicio | | H Conectores para correa |

Siga los pasos en esta guía para configurar y comenzar a usar el dispositivo.

Paso 1: Configuración inicial

Iniciar el dispositivo


- 1 Conecte el cable de alimentación al dispositivo y enchúfelo a una toma de corriente.
- 2 Presione el botón de encendido.

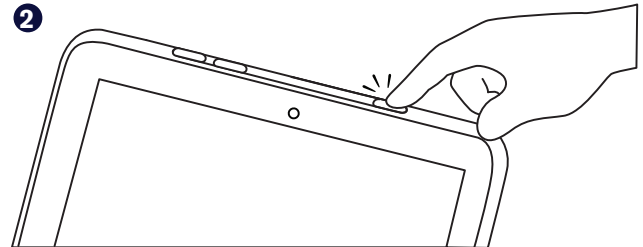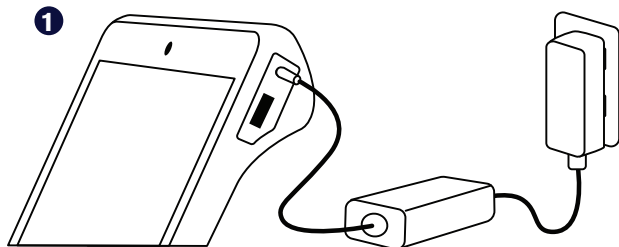

Configuración de Windows

Si su dispositivo no ha sido preconfigurado, se le pedirá que complete primero el proceso de configuración de Windows.

Si bien este proceso no requiere una cuenta de Microsoft, le recomendamos que se conecte a la cuenta Microsoft perteneciente al usuario (no al cuidador) o que la cree.

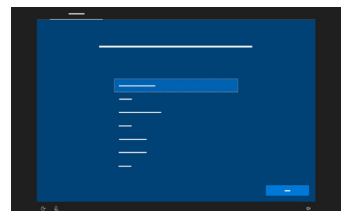

Paso 2: Configuración de TD Snap



Toque dos veces el ícono para iniciar la aplicación TD Snap. Siga las instrucciones para crear un nuevo usuario o restaurar un archivo de usuario guardado.

Paso 3: Montaje y posición

El dispositivo puede acomodarse mediante un sistema de montaje, colocarse sobre una superficie o apoyarse en el soporte integrado. Comience por situar al usuario de manera cómoda, luego, encuentre la posición del dispositivo que le brinde una visibilidad clara de la pantalla y un acceso fácil a su método de selección elegido. Acomode siempre el dispositivo de manera que se adapte al usuario, no al revés. Es de esperar que pueda ser necesario reacomodar el dispositivo durante el día. Coloque la correa de transporte para hombro para trasladarlo con seguridad.

Paso 4: Tarjetas de entrenamiento Snap de TD

Continúe el proceso de configuración con las tarjetas de entrenamiento de TD Snap que vinieron en la caja con su dispositivo. Las tarjetas de entrenamiento lo llevan a un recorrido por las funciones de TD Snap, la edición básica, la creación de copias de seguridad de sus datos y algunas actividades para ayudarle a integrar TD Snap en su vida diaria.

Recursos adicionales

Escanee los códigos QR con su teléfono para usar los vínculos.



Tobii Dynavox

es.tobiidynavox.com



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Comunidad de TD
en Facebook

qrco.de/FB-Espanol



Centro de aprendizaje
de Tobii Dynavox
(solo en inglés)

learn.tobiidynavox.com



Documentación del
dispositivo TD I -110

qrco.de/I-110manual



Documentación del
TD Snap

qrco.de/bcorRt



Aprender acerca de los
métodos de acceso

qrco.de/bbG7DI



Soporte técnico

+46 8 522 950 20 ext. 1