tobii dynavox

Métodos de acceso táctil de TD Talk para iPadOS

Tarjetas de entrenamiento



Contenido

- 1 Configuración de TD Talk
- 2 Recorrido por TD Talk
- 3 Uso de TD Talk
- 6 Practique con TD Talk
- 7 Resolución de problemas en el acceso táctil
- 8 Preguntas frecuentes
- 8 myTobiiDynavox.com
- 9 Recursos adicionales

Configuración de TD Talk

1 Seleccione la aplicación de TD Talk.



- 2 Apoye el dedo en la letra T en el teclado de TD Talk y deslice hacia arriba para abrir el menú oculto.
- 3 Seleccione el botón del cuadro de mandos.



4 Seleccione Configuración.



- **5** Establezca el idioma de la interfaz de TD Talk:
 - Seleccione la flecha derecha hasta ver el panel General.
 - Desplácese a la derecha para encontrar la configuración General y seleccione Abrir.
 - En Idioma de la aplicación, seleccione **Cambiar**. Seleccione el idioma de su preferencia.
 - Seleccione Atrás dos veces para regresar a Configuración.



6 Elija sus voces.

Voces estándar:

- En el Panel de voz, seleccione Abrir.
- Seleccione Voces.
- En la parte superior de la pantalla, seleccione el idioma al que le asignará una voz.
- Seleccione una voz.
- Seleccione X para salir de la Configuración de TD Talk.

Banco de voces y voces personalizadas:

- En el Panel de voz, seleccione Abrir.
- En las cuentas de banco de voces, seleccione **Administrar**.
- Al lado de los servicios del banco de voces para los cuales tiene voces, seleccione Iniciar sesión para ingresar sus credenciales para ese servicio.
- Seleccione la voz o las voces que se van a utilizar en TD Talk.



Nota

Hay voces adicionales disponibles en la pestaña Descargar de la configuración de Voces. Seleccione el ícono Descargar que se encuentra junto a las voces que desea usar. Cuando se hayan descargado, vaya a la pestaña Instalados y seleccione las voces que desea usar.

Opcional: Agregue idiomas de teclado adicionales.

- Vaya a Menú oculto > Más > Configuración > Teclado > Agregar/cambiar.
- 2 Seleccione un idioma de la pestaña Instalado o vaya a la pestaña Descargar para buscar otros idiomas.
- 3 Cuando se haya instalado su idioma, se le pedirá que elija una voz para el nuevo idioma. Seleccione **Voces** y luego elija una voz.



Consejo

Cuando esté usando TD Talk, podrá cambiar de idioma rápidamente si selecciona la imagen del mundo en la esquina inferior izquierda del teclado.

Recorrido por TD Talk

TD Talk está diseñado para una comunicación rápida y cara a cara. Use esta aplicación cuando interactúe con los demás.



1 Temas

Organice sus Mensajes rápidos por Temas. Cambia a un tema para acceder a esos mensajes.

2 Mensajes rápidos

Mensajes previamente escritos que se reproducen de inmediato cuando se seleccionan.

Más mensajes rápidos

Abra la página de Mensajes rápidos para seleccionar o editar otros Mensajes rápidos.

4 Chat

Cambie a una segunda Ventana de mensajes para escribir un mensaje nuevo sin perder el texto en la primera Ventana de mensajes.

6 Borrar palabra

Borre la palabra a la izquierda del cursor.

A Deshacer

Deshace las acciones en la ventana de mensajes.

7 Ventana de mensajes

Vea y edite el texto que le gustaría decir aquí.

8 Predicción de palabras y Expansiones de abreviaciones

Predice automáticamente palabras sobre la base de lo que ha escrito hasta el momento. Cuando escribe una abreviación preprogramada, la opción de expansión aparecerá aquí.

Predicción de frases

TD Talk aprende de lo que usted escribe y utiliza esa información para predecir frases. La predicción se basa en la frecuencia y hace que la comunicación sea más rápida y personalizada.

10 Hablar

Diga el texto de la Ventana de mensajes. También puede pausar el habla y reanudarla.

Retroceso

Borre el carácter a la izquierda del cursor.

12 Borrar

Borre todo el texto de la Ventana de mensajes.

13 Cambiar idioma

Cambie el idioma en que habla.

Menú oculto

Apoye el dedo en la letra T y deslice hacia arriba para abrir el menú oculto.



15 Cuadro de mandos

Acceda al Cuadro de mandos y a la Configuración.

16 Modo transparencia

Haga que la interfaz de TD Talk sea translúcida y active la cámara trasera. Este modo se puede usar para ver lo que está en frente del dispositivo, como su compañero(a) de comunicación, mientras usted usa TD Talk.

Uso de TD Talk

Estos consejos pueden ayudarlo a usar TD Talk correctamente.

El teclado

Consejo

Escriba y borre.

Use los teclados y los botones de borrar para escribir y editar mensajes.



Inténtelo

- 1 Familiarícese con el teclado.
- 2 Localice estos botones: Borrar, Borrar palabra y Retroceso.
- 3 Abra el teclado 123! y luego vuelva al teclado ABC.

Aproveche la predicción de palabras.

La predicción de palabras aprende de lo que usted escribe y puede acelerar su comunicación.



- 1 Cuando empiece a escribir una palabra, eche un vistazo a los botones de predicción de palabras para ver si la palabra que desea está allí.
- 2 Repítalo cada 2 a 3 letras.
- 3 Si la palabra que intenta escribir aparece en uno de los botones de predicción de palabras, toque el botón para agregar la palabra a la ventana de mensajes.

Use la predicción de frases.

La predicción de frases registra su manera de utilizar las palabras y predice lo que usted quiere decir en base a la frecuencia de uso. Cuanto más habla con TD Talk, mejor se vuelve la predicción de frases, de manera que pueda decir lo que quiere más rápido y con menos esfuerzo.




- 1 Eche un vistazo a la Ventana de mensajes después de escribir una palabra o dos para ver si TD Talk ha predicho una frase. El texto predicho aparece en gris a continuación del texto que ha escrito.
- 2 Si la frase predicha es la que desea, toque la última palabra de la predicción para seleccionarla.
- 3 Si la frase predicha no es la que desea, siga escribiendo.

Mensajes rápidos

Consejo


Los Temas y Mensajes rápidos suelen ser la opción de comunicación más rápida.

Use estos mensajes editables, organizados por tema, para expresar necesidades inmediatas, seguir la conversación y preparar lo que quiere decir con anticipación para eventos tales como citas médicas, presentaciones o reuniones familiares.

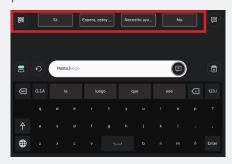

Edite los mensajes rápidos para adaptarlos a su gusto.

Personalice los Mensajes rápidos en función de sus necesidades. Algunos mensajes pueden ser permanentes y otros temporales.

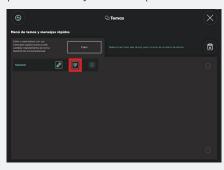

Inténtelo

- 1 Seleccione Temas.
- 2 Seleccione Editar.
- 3 Seleccione Crear.
- 4 Añada un nombre de tema, como "Doctor", y luego seleccione **Guardar**.
- **5** Seleccione **Editar mensajes rápidos**.
- 6 Seleccione **Añadir nueva**. Los cuatro Mensajes rápidos principales son los que se mostrarán arriba del teclado.
- 7 Ingrese su mensaje, como "Necesito un reabastecimiento de prescripción", y luego seleccione **Guardar**.
- 8 Seleccione Cerrar para volver al teclado.

Para usar su nuevo Mensaje rápido, seleccione **Temas**, seleccione su nuevo tema, luego encuentre su Mensaje rápido en la parte superior de la pantalla.

- 1 Seleccione Temas y luego Editar.
- 2 Seleccione Editar mensajes rápidos en el tema deseado.
- 3 Seleccione el Mensaje rápido que desea editar y escriba su mensaje con el teclado.
- 4 Seleccione **Guardar** y regrese a su teclado principal.

Expansiones de abreviaciones		
Consejo	Inténtelo	
Use abreviaciones para escribir frases más rápido. Expansiones de abreviaciones le permite acceder a frases más largas con tan solo escribir unas cuentas letras en la ventana de mensajes. Por ejemplo, puede programar "td" para obtener la expansión "Tobii Dynavox".	Apoye el dedo en la letra T y deslice hacia arriba para abrir el menú oculto.	
	2 Seleccione Cuadro de mandos.	
	3 En la tarjeta de Conversaciones, seleccione Abrir.	
	4 En Expansiones de abreviaciones, seleccione Editar.	
	5 Seleccione Agregar .	
	6 En el campo Abreviaciones, agregue la abreviación que utilizará para activar la expansión. Por ejemplo: td.	
	En el campo Palabra o Mensaje, agregue la expansión. Por ejemplo: Tobii Dynavox	
	8 Seleccione Guardar.	
	Que Cierre Configuración y vuelva al teclado de TD Talk. Pruebe la expansión escribiendo la abreviación en la ventana de mensajes. La expansión aparecerá en el primer botón de predicción de palabras de la parte superior del teclado. Seleccione el botón de predicción de palabras que muestra la expansión para sustituir la abreviación en la ventana de mensajes.	

Otros consejos de comunicación		
Consejo	Inténtelo	
Escriba de la forma en que habla. El lenguaje hablado difiere de la gramática más formal del lenguaje escrito. Use oraciones parciales y gramática informal que refleje su forma de hablar.	"¿Quieres ir?"."Podría, pero no, gracias"."Para la próxima".	
Use puntuación y mayúsculas solo cuando mejoren su mensaje. Los puntos y las mayúsculas requieren tiempo y esfuerzo para escribirse. No hacen gran diferencia en la manera en que se dice su mensaje, a menos que los puntos sean para separar oraciones en un párrafo.	 Use ? o ! para hacer que su mensaje suene como pregunta o exclamación. Las comas insertan pausas en una oración. Use las comas para dar énfasis y ritmo. Las mayúsculas agregan impacto visual, pero no cambian la manera de decir una palabra. TD Talk pone mayúscula inicial automáticamente en una oración por usted. Por lo demás, utilice las mayúsculas solo si lo desea. 	

Practique con TD Talk

Familiaricese con el uso de TD Talk.

Escriba algunos datos sobre usted mismo (p. ej., su nombre, su dirección, etc.) y luego dígalos. Practique utilizar los botones Borrar, Borrar palabra y Retroceso.

Ahorre tiempo con la predicción de palabras.

Escriba "Necesito ir a la cafetería mañana en la mañana" sin usar la predicción de palabras. Luego, escriba la oración otra vez usando la predicción de palabras. Compare el tiempo y el esfuerzo requeridos.

Intente usar la predicción de frases.

Escriba una de las oraciones que se muestran a continuación y, luego, use el botón Hablar de TD Talk para decir la frase cinco veces. Esto agregará la oración a su Conjunto de frases. Borre la Ventana de mensajes y, luego, empiece a escribir otra vez la misma oración. Verá que la frase se predice para usted. Seleccione la última palabra en la frase predicha para seleccionarla y, luego, dígala.

- Me llamo [su nombre].
- Mi dirección es [su dirección].
- [Nombre de la persona] es mi [relación].
- Trabajo (o trabajé) en [empresa] como [puesto].
- Utilizo este dispositivo para comunicarme y entiendo todo lo que estás diciendo.

Practique escribiendo de la forma en que habla.

Las oraciones que se muestran a continuación pueden usarse en la comunicación escrita formal. ¿Cómo las diría en una conversación hablada informal?

- Tomemos un momento hoy para hablar acerca de finanzas.
- Les deseo a todos lo mejor.
- Espero que hayan estado bien en los últimos meses.

Piense en frases que suele usar en conversaciones. Los ejemplos que se muestran a continuación pueden ayudarlo a identificar algunas. Escríbalas en TD Talk.

Exclamación

iDe ninguna manera! Eso es interesante. iA poco!

Muletillas o frases de relleno

...este..., mmm..., o sea, ya sabes, ...si me entiendes, ...y etcétera.

■ Palabras y frases regionales

¿Qué onda? iÁndale! Levanta la mesa.

Experimente con la puntuación y las mayúsculas.

Escriba las siguientes oraciones y escuche la diferencia con puntuación y mayúsculas y sin ellas. Esta actividad lo ayudará a darse cuenta de cuándo vale la pena agregar puntuación y mayúsculas y cuándo puede omitirlas para ahorrar tiempo.

	Opción 1	Opción 2
1	Me pondré una camisa, unos jeans y una chamarra.	Me pondré una camisa unos jeans y una chamarra
2	¿Me das?	Me das
3	Allí está Jane.	Allí está, jane.
4	iGuau! iEs increíble!	Guau, ieso es increíble!
5	Me gusta pero a él no.	Me gusta, pero a él no.

Resolución de problemas en el acceso táctil

Problema	Soluciones
Selección de botones por accidente.	■ Confirme que la persona puede ver la pantalla del dispositivo con claridad.
	■ Reubique el dispositivo para ver si otra posición puede facilitar el acceso.
	 Aumente el tiempo que debe tocar la pantalla para que su toque sea reconocido. Esto requiere activar tres opciones.
	1 Active los Ajustes táctiles. Configuración del iPadOS > Accesibilidad > Táctil > Ajustes táctiles
	2 En el mismo menú, active la Duración de la selección y ajuste el tiempo.
	Nota La configuración de la Duración de la selección se activa de inmediato, por lo que ahora tendrá que mantener sus selecciones táctiles durante el tiempo establecido.
	3 En el mismo menú, active los Gestos de deslizamiento y luego elija un Ajuste de movimiento requerido. "Estándar" es la configuración más utilizada.
La precisión empeora	■ Confirme que la persona puede ver bien la pantalla del dispositivo.
con el tiempo.	 Aumente el tamaño del texto: TD Talk > Configuración > General > Tamaño del texto
	 Trate de encontrar una mejor posición para el dispositivo para minimizar el movimiento o el esfuerzo del usuario cuando realiza las selecciones.
	■ Pruebe algunas de las soluciones de la sección "Selección de botones por accidente".
	 Vea si los Ajustes táctiles mejoran la precisión durante ciertos períodos del día (consulte las instrucciones de arriba).
	 Consulte con su evaluador o consultor de soluciones para conocer opciones adicionales.
No puede tocar	■ Confirme que la persona puede ver bien la pantalla del dispositivo.
todas las partes de la pantalla.	■ Reubique el dispositivo para ver si otra posición puede facilitar el acceso.
	 Consulte con su evaluador o consultor de soluciones para conocer opciones adicionales.
Introducir el código de acceso es difícil o tedioso.	 Si su iPad es compatible con el Face ID, active el Face ID. Configuración del iPadOS > Face ID y código de acceso > Configuración del Face ID
	Si su iPad no es compatible con el Face ID, desactive el código de acceso. Configuración del iPadOS > Face ID y código de acceso o Touch ID y código de acceso > Código de acceso > Desactivar código de acceso

Si tiene problemas que no se abordan en la tabla anterior o sus problemas persisten, intente los siguientes pasos.

- 1 Confirme siempre que haya una buena base.
 - Verifique que la persona puede ver bien la pantalla del dispositivo. Verifique el resplandor de la pantalla y, si la persona necesita anteojos, asegúrese de que los lleve puestos.
 - Coloque el dispositivo de forma que la persona pueda tocar la pantalla con facilidad y precisión sin mucho esfuerzo. Es posible que sea necesario reacomodar el dispositivo durante el día.
- 2 Consulte a su evaluador o consultor de soluciones para identificar otras posibles soluciones.

Preguntas frecuentes

¿La Duración de la selección se aplica en todas partes?

Sí. La Duración de la selección se aplica en todo el dispositivo. Se puede activar y desactivar a voluntad en la Configuración del iPadOS cuando lo desee.

¿Qué sucede si el acceso táctil se vuelve difícil de usar?

Póngase en contacto con su evaluador o consultor de soluciones para que le ayude a identificar posibles soluciones.

¿Cómo funciona la Predicción de frases de TD Talk?

La Predicción de frases de TD Talk se basa en la frecuencia. Las frases que ha pronunciado varias veces anteriormente se predicen cuando empieza a escribir el comienzo de una frase. Esta función tiende a predecir oraciones parciales (p. ej., iré a, qué te gusta) en lugar de oraciones completas (p. ej., iré a la tienda, ¿qué te gusta en tu café?), ya que se usan en una variedad más amplia de situaciones y le ahorran tener que editarlas con frecuencia.

myTobiiDynavox.com



Su cuenta gratuita myTobiiDynavox.com le brinda acceso a numerosos beneficios que incluyen almacenamiento en la nube para copias de seguridad, sincronización y uso compartido de páginas, planes de lecciones y más.

Al unirse, usted podrá:

- Hacer una copia de seguridad de su sistema de forma segura
- Descargar herramientas y recursos gratuitos
- Reclamar y administrar licencias complementarias
- Conocer las actualizaciones disponibles
- Acceder a soporte técnico y preguntas frecuentes
- Compartir Conjuntos de páginas y Paquetes de páginas



myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

Recursos adicionales



Centro de aprendizaje de Tobii Dynavox (solo en inglés)

learn.tobiidynavox.com



Apple

apple.com/es/accessibility



Comunidad de TD en Facebook

qrco.de/TDFB



Página de Soporte de TD Talk

qrco.de/TDTalkHelpES



Soporte técnico en Norteamérica

1-800-344-1778 int. 1 support.na@tobiidynavox.com



Soporte técnico en el resto del mundo

+46 8 522 950 20 ext. 1