

TD Talk

Brugervejledning



Brugervejledning TD Talk

Version 1.8

2025-07-08

Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsret © Dynavox Group AB (publ)

Intet i denne vejledning må gengives, gemmes i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, ved fotokopiering, ved optagelse eller på anden måde) uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Den angivne ophavsret inkluderer alle former og dele af det ophavsretligt beskyttede materiale og informationer, som måtte være tilladt under nuværende gældende lov eller vedtaget herefter, inklusiv, men ikke begrænset til, materialer, der dannes af softwareprogrammerne, som vises på skærmen, så som skærbilleder, menuer, osv.

Oplysningerne i dette dokument tilhører Dynavox Group AB. Gengivelse af hele eller dele af indholdet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse Dynavox Group AB.

Produkter, der henvises til i dette dokument, kan enten være varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Forlaget og forfatteren gør ikke krav på disse varemærker.

Selvom alle foranstaltninger er truffet ved udarbejdelsen af dette dokument, påtager forlaget og forfatteren sig intet ansvar for fejl eller mangler, og ej heller for skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af oplysningerne i dette dokument eller brugen af eventuelt medfølgende programmer og kildekode. Forlaget og forfatteren kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for tab af fortjeneste eller anden erhvervsmæssig skade, der direkte eller indirekte er opstået som følge af, eller som påstås at være opstået som følge af indholdet i dette dokument.

Ret til ændring af indholdet uden forudgående varsel forbeholdes.

Gå til Tobii Dynavoxs websted.

www.TobiiDynavox.com for at finde en opdateret version af dokumentet.

Kontaktoplysninger:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Sverige
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Storbritannien
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Handler under navnet Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australien
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No. 5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
Kina 215021

Tlf. +86 512 6936 2880



Indholdsfortegnelse

1	Velkommen	6
1.1	Systemkrav	6
1.2	Understøttede sprog	6
1.3	Hent TD Suite	6
2	Ressourcer og support	7
2.1	Webressourcer og support	7
2.2	Undervisningscenter	7
3	Kom godt i gang	8
3.1	Oversigt over TD Talk	8
3.2	Den øjenstyrede systemmenu	9
3.2.1	Hvordan får jeg adgang til den øjenstyrede systemmenu i TD Talk?	9
3.3	Kontrolpanelet	10
3.3.1	Hvordan får jeg adgang jeg til kontrolpanelet i TD Talk?	10
3.3.2	Hvordan afslutter og lukker jeg TD Talk ned?	10
3.4	Opsætning af TD Talk	11
4	Sådan bruges TD Talk	12
4.1	Brug af tastatur	12
4.2	Brug af prædiktion	12
4.2.1	Ordprædiktion	12
4.2.2	Fraseprædiktion	13
4.3	Redigering af besked	13
4.3.1	Hvordan redigerer jeg en besked i TD Talk?	13
4.4	Kopier og sæt ind	14
4.4.1	Hvordan bruger jeg Kopier i TD Talk?	14
4.4.2	Hvordan bruger jeg Sæt ind i TD Talk?	14
4.5	Brug hurtigbeskeder	14
4.5.1	Hvordan bruger jeg hurtigbeskeder i TD Talk?	14
4.5.2	Hvordan skifter jeg emne for hurtigbeskeder?	15
4.6	Ændring af sprog	16
4.6.1	Hvordan skifter jeg sprog til oplæsning i TD Talk?	16
4.7	Chat	16
4.8	Gennemsigtig tilstand	17
4.8.1	Hvordan starter jeg den gennemsigtige tilstand?	17
4.8.2	Hvordan afslutter jeg den gennemsigtige tilstand?	17
4.9	Hvordan bruger jeg en udvidelse af forkortelser i TD Talk?	17
4.10	Hvordan fortryder jeg en handling i TD Phone?	18
5	Indstillinger for TD Talk	19
5.1	Min konto	20
5.1.1	Hvad er en myTobiiDynavox-konto?	20
5.1.2	Hvordan opretter jeg en myTobiiDynavox-konto?	20
5.1.3	Hvordan sikkerhedskopierer jeg mine personligt tilpassede data?	20
5.1.4	Hvordan gendanner jeg mine personligt tilpassede data?	21

5.2	Aktivering	21
5.2.1	Aktiveringsmetode.....	22
5.2.1.1	Hvordan vælger jeg aktiveringsmetode i TD Talk?	22
5.2.2	Knapper.....	23
5.2.2.1	Hvordan ændrer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?.....	23
5.2.2.2	Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?.....	23
5.2.3	Kontaktinput	24
5.2.3.1	Hvordan indstiller jeg kontaktinput for min kontakt i TD Talk?	24
5.3	Tastatur.....	25
5.3.1	Aktiveringsmetode.....	25
5.3.1.1	Hvordan vælger jeg aktiveringsmetode for tastaturet i TD Talk?	25
5.3.2	Knapper.....	26
5.3.2.1	Hvordan ændrer jeg dvæletiden for tastaturknapperne i TD Talk? ..	26
5.3.2.2	Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?	26
5.3.3	Prædiktion	27
5.3.3.1	Hvordan ændrer jeg dvæletiden for prædiktionsknapperne i TD Talk?.....	27
5.3.3.2	Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for prædiktionsknapperne i TD Talk?.....	28
5.3.4	Generelt	28
5.3.4.1	Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?.....	28
5.3.4.2	Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog og bruger/gør dem tilgængelige i TD Talk?.....	29
5.3.4.3	Hvordan slår jeg lydfeedback ved skrivning til/fra i TD Talk?.....	29
5.4	Samtaler.....	30
5.4.1	Emner.....	31
5.4.1.1	Hvordan opretter jeg et nyt emne i TD Talk?	31
5.4.1.2	Hvordan ændrer jeg navnet på et emne i TD Talk?	31
5.4.1.3	Hvordan gør jeg emnet privat i TD Talk?	32
5.4.1.4	Hvordan vælger jeg de aktive emner i TD Talk?	32
5.4.1.5	Hvordan sletter jeg et emne i TD Talk?.....	33
5.4.1.6	Hvordan redigerer jeg hurtigbeskeder i TD Talk?	33
5.4.1.7	Hvordan tilføjer jeg en hurtigbesked i TD Talk?	34
5.4.1.8	Hvordan sletter jeg en hurtigbesked i TD Talk?	35
5.4.2	Udvidelse af forkortelser	36
5.4.2.1	Hvordan tilføjer jeg en udvidelse af forkortelser i TD Talk?.....	36
5.4.2.2	Hvordan redigerer jeg en udvidelse af forkortelser i TD Talk?	37
5.4.2.3	Hvordan sletter jeg en udvidelse af forkortelser i TD Talk?.....	37
5.5	Stemme	38
5.5.1	Stemmer.....	39
5.5.1.1	Installerede og valgfrie stemmer	39
5.5.1.1.1	Hvordan downloader jeg en ny stemme i TD Talk? ...	39
5.5.1.1.2	Hvordan vælger jeg min stemme i TD Talk?.....	40
5.5.1.1.3	Hvordan kan jeg filtrere tilgængelige stemmer i TD Talk?.....	40
5.5.1.2	Konfiguration af stemme	41
5.5.1.2.1	Hvordan ændrer jeg min stemme i TD Talk?	41
5.5.1.3	Udtaler.....	42
5.5.1.3.1	Hvordan opretter jeg udtaleundtagelser i TD Talk?....	42
5.5.2	Konti til Voice Banking	43
5.5.2.1	Konti i Voice Banking	43

	5.5.2.1.1	Hvordan kan jeg bruge min stemme fra min Voice Banking-tjeneste?.....	43
5.6	Enhed		45
	5.6.1	Partnervindue.....	45
	5.6.1.1	Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg partnervinduet i TD Talk?.....	45
	5.6.1.2	Hvordan indstiller jeg visningsmulighederne for partnervinduet i TD Talk?.....	46
5.7	Generelt		46
	5.7.1	Programsprog	46
	5.7.1.1	Hvordan indstiller jeg programsproget i TD Talk?.....	46
	5.7.2	Tekststørrelse	47
	5.7.2.1	Hvordan ændrer jeg tekststørrelse i TD Talk?	47
	5.7.3	Feedback	47
	5.7.3.1	Hvordan sender jeg feedback til Tobii Dynavox i TD Talk?.....	47
	5.7.4	Vilkår for tjeneste og meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger	48
	5.7.4.1	Hvordan åbner jeg vilkårene for tjeneste?.....	48
	5.7.4.2	Hvordan åbner jeg meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger?	49
	5.7.5	Hent logfiler	49
	5.7.5.1	Hvordan indsamler jeg logfiler for TD Talk?	49

1 Velkommen

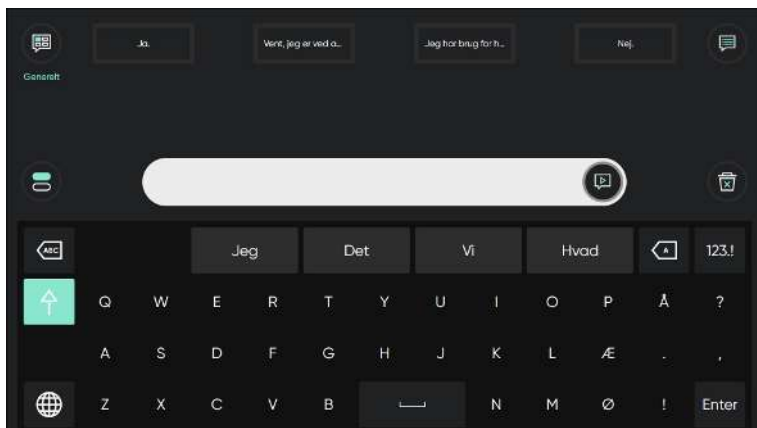


Illustration 1: TD Talk

TD Talk sætter personer i stand til at kommunikere hvem de er, og hvad de gerne vil sige så flydende som muligt. Appen anvendes til at sætte sætninger sammen så hurtigt som muligt. TD Talk gør det muligt for personer, der bruger appen, at deltage aktivt i samtaler. TD Talk virker ikke fremmedartet, og brugeren kan hurtigt komme i gang med at bruge den. TD Talk tilpasser sig løbende ved at lære en persons unikke sætningsmønstre og ordbrug og gør kommunikationen hurtigere og mere personlig.

1.1 Systemkrav

Tabel 1: iOS

	Styresystem	Enhed	Hukommelse	Touch	Kamera
Mindst	iOS 15.1	iPad 7. generation	4 GB	Indbygget berøring	Indbygget kamera
Anbefalet	iOS 15.1	iPad, 8. generation	4 GB	Indbygget berøring	Indbygget kamera

1.2 Understøttede sprog

- Dansk (DK)
- Hollandsk (NL)
- Engelsk (US)
- Fransk (FR)
- Tysk (DE)
- Italiensk (IT)
- Norsk (NO)
- Spansk (Latinamerika)
- Svensk (SE)
- Flere sprog kommer snart!

1.3 Hent TD Suite

TD Talk til Windows-enheder fås via TobiiDynavox.com og til iPadOS i App Store.

2 Ressourcer og support

Tobii Dynavox tilbyder flere gratis ressourcer, der understøtter og supplerer din oplevelse med TD Talk. Gå ikke glip af disse værktøjer, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din Tobii Dynavox-software!

2.1 Webressourcer og support

Hvis du har brug for support, skal du først besøge afsnittet Undervisning og support på Tobii Dynavoxs websted.

2.2 Undervisningscenter



Undervisningscentret, Learning Hub, findes i øjeblikket kun på engelsk.

Besøg learn.tobiidynavox.com for dokumentation, undervisning og andre ressourcer, herunder:

- svar på generelle spørgsmål
- undervisningsvideoer
- optagelser af webinarer
- onlinekurser

3 Kom godt i gang

Hvis TD Talk skal bruges sammen med en øjenstyringsenhed, skal du sikre dig, at øjenstyringsenheden er kalibreret til brugeren.

- iOS – Konfigurer øjenstyringsenheden ved hjælp af appen TD CoPilot.

Se brugervejledningen til TD Pilot med flere oplysninger.

3.1 Oversigt over TD Talk

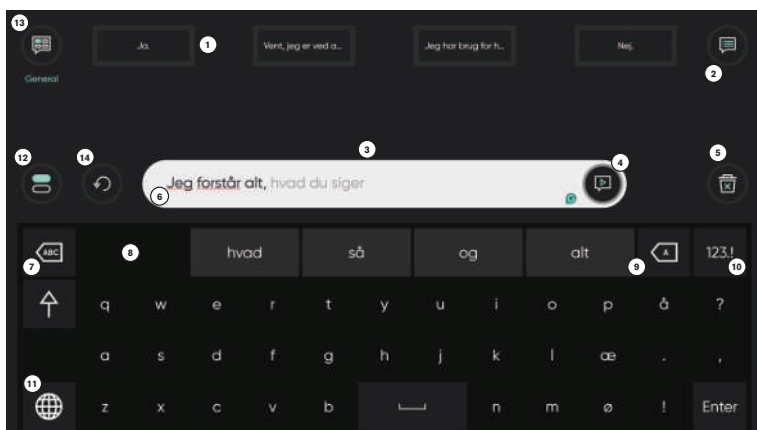


Illustration 2: TD Talk

Position	Beskrivelse	Position	Beskrivelse
1	Hurtigbeskeder Færdige beskeder der straks læses op, når de vælges	8	Ordprædiktion/udvidelse af forkortelser Gætter automatisk ord på grundlag af det, du har skrevet indtil nu. Når du bruger udvidelser af forkortelser, udskiftes det første ord med udvidelsen.
2	Flere hurtigbeskeder Få adgang til alle hurtigbeskeder til det aktuelle emne.	9	Tilbage Slet tegnet til venstre for markøren.
3	Beskedvindue Se og rediger teksten, der skal læses op.	10	Nummerside Adgang til tal og specialtegn.
4	Oplæs Oplæs teksten i beskedvinduet. Du kan også pause og fortsætte oplæsningen.	11	Skift sprog Skift mellem sprog til oplæsning.
5	Ryd Ryd hele teksten i beskedvinduet.	12	Chat Skift til et andet beskedvindue for at skrive en ny besked uden at miste teksten i det første beskedvindue.
6	Fraseprædiktion TD Talk lærer, mens du skriver, og bruger oplysningerne til at gætte sætninger. Prædiktion er baseret på hyppighed og kan gøre kommunikationen hurtigere og mere personlig.	13	Emner Organiser dine hurtigbeskeder efter emne. Skift til et emne for at få adgang til beskederne.
7	Slet ord Slet ordet til venstre for markøren.	14	Fortryd Fortryd handlingerne i beskedvinduet.

3.2 Den øjenstyrede systemmenu

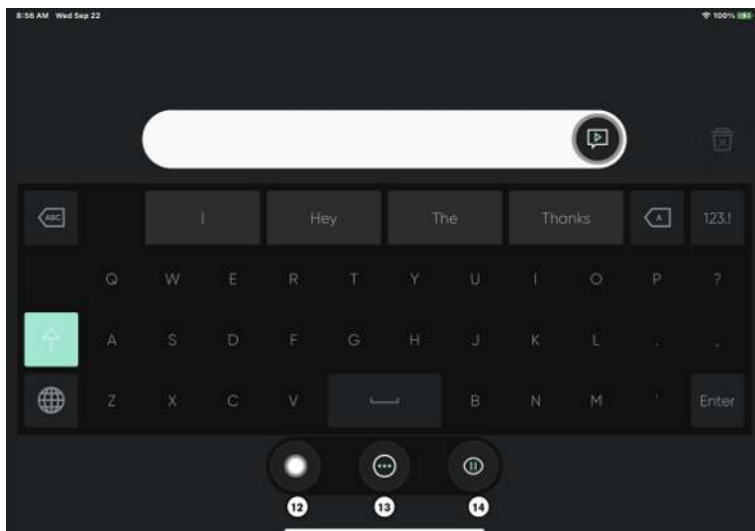


Illustration 3: Øjenstyret menu til TD Talk

Position	Beskrivelse	Position	Beskrivelse
14	AssistiveTouch Tænd AssistiveTouch. Brug AssistiveTouch til at åbne skærmen Hjem og alle dine andre apps.	16	Pause/fortsæt øjenstyring Til/fra-knap til at pause og fortsætte øjenstyringen.
15	Flere Adgang til kontrolpanelet og indstillinger.	17	Gennemsigtig tilstand Gør skærmene i TD Talk gennemsigtige og tænder det bagudvendte kamera. Tilstanden viser, hvad der er foran din enhed såsom din samtalepartner, mens du bruger TD Talk.

3.2.1 Hvordan får jeg adgang til den øjenstyrede systemmenu i TD Talk?

Du kan få adgang til den øjenstyrede systemmenu i TD Talk på to måder:

- **Som bruger:** Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
- **Som hjælper:** Stryg op fra bogstavet **T** på tastaturet til TD Talk.

3.3 Kontrolpanelet

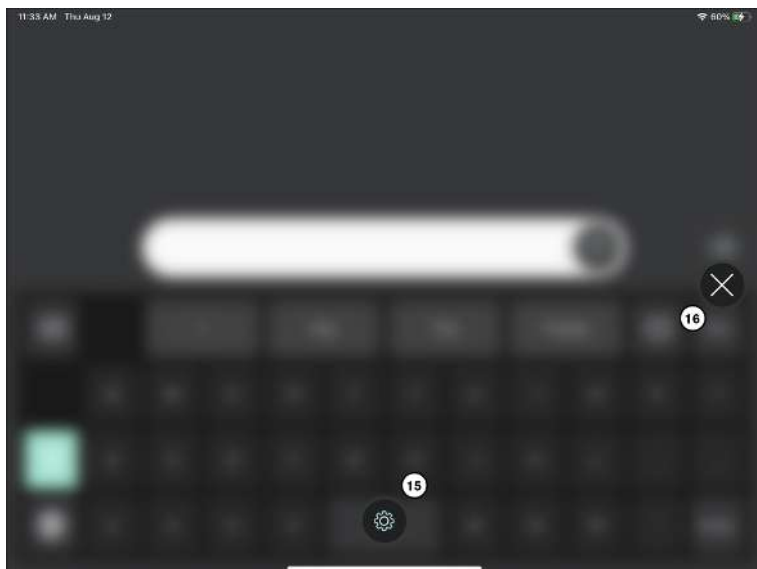



Illustration 4: Kontrolpanel i TD Talk

Position	Beskrivelse	Position	Beskrivelse
15	Indstillinger for TD Talk Se 5 Indstillinger for TD Talk, side 19 med flere oplysninger	16	Afslut kontrolpanel Vælg knappen for at afslutte kontrolpanelet.

3.3.1 Hvordan får jeg adgang jeg til kontrolpanelet i TD Talk?


1. Åbn indstillingerne på en af følgende måder:
 - **Som bruger:** Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
 - **Som hjælper:** Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.



Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.


3.3.2 Hvordan afslutter og lukker jeg TD Talk ned?


1. Åbn indstillingerne på en af følgende måder:
 - **Som bruger:** Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
 - **Som hjælper:** Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.



Knappen  (AssistiveTouch) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (AssistiveTouch) for at åbne menuen til AssistiveTouch.
3. Vælg knappen  (Start) i menuen til AssistiveTouch.


3.4 Opsætning af TD Talk


1. Vælg appen  TD Talk på startskærmen på enheden med iPadOS.
2. Åbn indstillingerne på en af følgende måder:
 - **Som bruger:** Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
 - **Som hjælper:** Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.


3. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
4. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
5. Indstil programsprog for TD Talk:

– Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.



- Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det rigtige indstillingskort.
- Vælg knappen **Åbn**.
- Se afsnittet **Programsprog**.
- Vælg alternativknappen ud for det ønskede programsprog.


- Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
6. Vælg stemmer:

- Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det rigtige indstillingskort.
- Vælg knappen **Åbn**.
- Se i afsnittet om **dine stemmer**.
- Vælg alternativknappen under det ønskede sprog til oplæsning.


 Hvis du ikke kan finde det ønskede sprog, skal du se [5.3.4.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?](#), side 28 og [5.3.4.2 Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog og bruger/gør dem tilgængelige i TD Talk?](#), side 29.

- Vælg alternativknappen ud for den ønskede stemme i listen med tilgængelige stemmer til sprog til oplæsning.
- Brug knapperne “Scrol op” og “Scrol ned” til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.


 Vælg  ud for stemmen for at teste en stemme. Hvis den findes.

 Hvis ikonet  (Download) vises i stedet for en alternativknep, skal du vælge det for at downloade stemmen.

- Gentag de sidste to trin ovenfor, hvis du ønsker oplæsning på flere sprog.

7. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.



Du kan hurtigt skifte mellem de valgte sprog i TD Talk ved at vælge knappen  i nederste, venstre hjørne af tastaturet.

4 Sådan bruges TD Talk

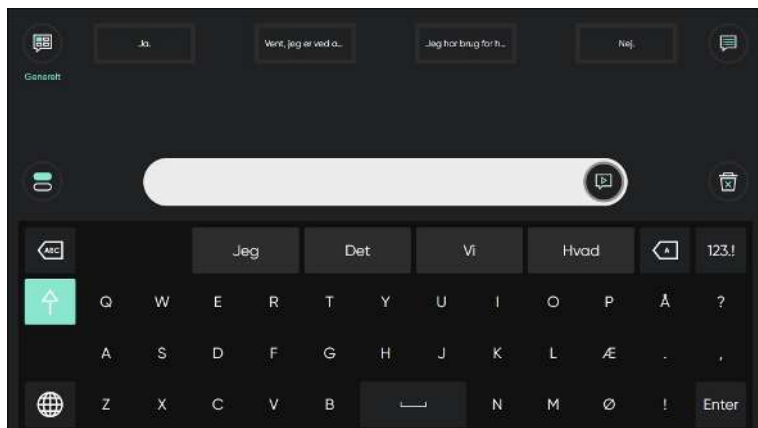


Illustration 5: TD Talk

4.1 Brug af tastatur

Du kan danne (eller opbygge) ord og sætninger i beskedvinduet ved at vælge bogstaver på tastaturet. Vælg knappen




(Læs op), når du er klar til at tale.

4.2 Brug af prædiktion

TD Talk har både ordprædiktion og fraseprædiktion, som kan reducere arbejdet med og/eller gøre det hurtigere at sammensætte beskeder.

4.2.1 Ordprædiktion

Ordprædiktionsmodulet i TD Talk er fra SwiftKey™ og anvendes bredt i tablet-pc'er og smartphones. SwiftKey™ anvender en blanding af teknologier til kunstig intelligens, der gør det muligt at gætte det næste ord, som brugeren har til hensigt at skrive. SwiftKey™ lærer fra tidligere tekster, som brugeren har skrevet, og giver forslag til eller viser prædiktionsord ud fra, hvad der skrives og hvad programmet har lært. Det anvendte ordprædiktionsprog skifter afhængigt af indstillingen Sprog til tastatur.

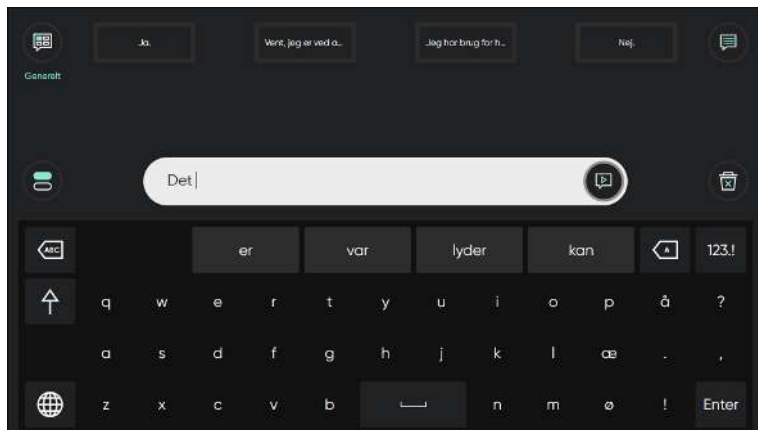


Når der bruges ordprædiktion, vises fire (4) kasser over tastaturet. Kassen længst til venstre indeholder det mest sandsynlige gæt, og de tre (3) øvrige kasser indeholder hver ét gættet ord. Vælg kassen med det rigtige ord, når du skal vælge et gættet ord. Hvis du ikke kan finde det rigtige ord, skal du bare skrive videre. Så vises det rigtige ord forhåbentligt, når du skriver de næste tegn.

Hvis du anvender ordprædiktion og vil skrive et ord med et accenttegn, fx café, sparer du tid og kræfter ved at lade ordprædiktionen placere accenttegnet. Du skal ganske enkelt bare skrive "cafe" for at få forslaget "café".

4.2.2 Fraseprædiktion

TD Talk analyserer og lærer med tiden din talemåde. Ordprædiktion lærer ordene, du siger. Fraseprædiktion lærer, hvordan du sætter ordene sammen til et personligt frasesæt. Når du begynder at skrive, vises gættede fraser fra dit frasesæt med grå tekst i beskedvinduet.

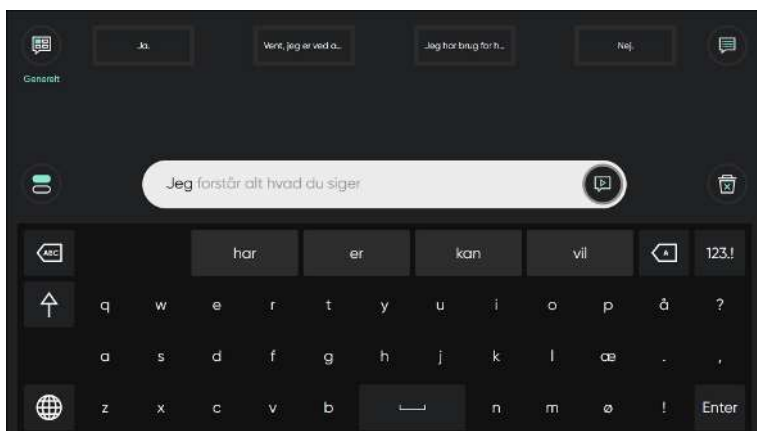

Se på det sidste ord i den gættede frase for at vælge frasen. Frasen skifter farve fra grå til sort som tegn på, at den er valgt. Den kan nu læses op eller redigeres.

4.3 Redigering af besked

4.3.1 Hvordan redigerer jeg en besked i TD Talk?

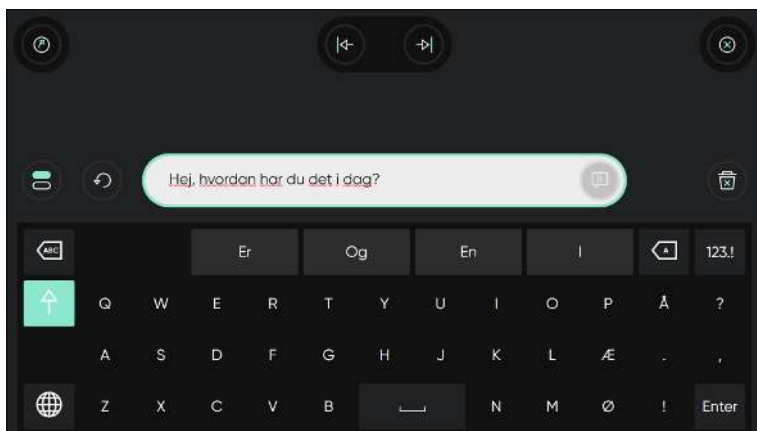



Illustration 6: Redigeringsmenuen


1. Se på teksten i beskedvinduet for at redigere i beskedvinduet. Redigeringsmenuen åbnes.
2. Når du har valgt et ord, kan du skrive for at erstatte ordet, vælge et ord fra ordprædiktion eller slette ordet.

Anvend pilene  (Flyt til venstre) og  (Flyt til højre), hvis markøren er placeret forkert.

3. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte redigeringstilstanden.

4.4 Kopiér og sæt ind

4.4.1 Hvordan bruger jeg Kopiér i TD Talk?

 Kopifunktionen i TD Talk kopierer hele beskedvinduet.


1. Se på teksten i beskedvinduet for at redigere i beskedvinduet. Redigeringsmenuen åbnes.


Vælg knappen  (Kopiér).

4.4.2 Hvordan bruger jeg Sæt ind i TD Talk?

1. Se på det tomme beskedvindue. Menuen Kopiér åbnes.

Vælg knappen  (Sæt ind).
Beskeden vises i beskedvinduet.


 Du kan sætte tekst ind, der kopieres fra en tekst i anden software på din enhed.

 I iOS fra Apple vises en pop op-boks, når du sætter tekst ind mellem programmer. Du kan tillade dette hver gang med AssistiveTouch, eller du kan ændre Apples indstillinger til altid at tillade dette. TD Talk spørger dig, om du vil gå til indstillingen.

4.5 Brug hurtigbeskeder

4.5.1 Hvordan bruger jeg hurtigbeskeder i TD Talk?

Der er to (2) typer hurtigbeskeder. Den ene type er altid synlig på startskærmen. Den anden type findes under knappen


 (Flere hurtigbeskeder).

Hurtigbeskeder på startskærmen


1. Vælg **hurtigbeskeden**, der skal læses op.
Den valgte besked læses straks op men føjes ikke til beskedvinduet, så den forstyrrer ikke beskeder, som du er ved at skrive.

Flere hurtigbeskeder

1. Vælg knappen  (Flere hurtigbeskeder).

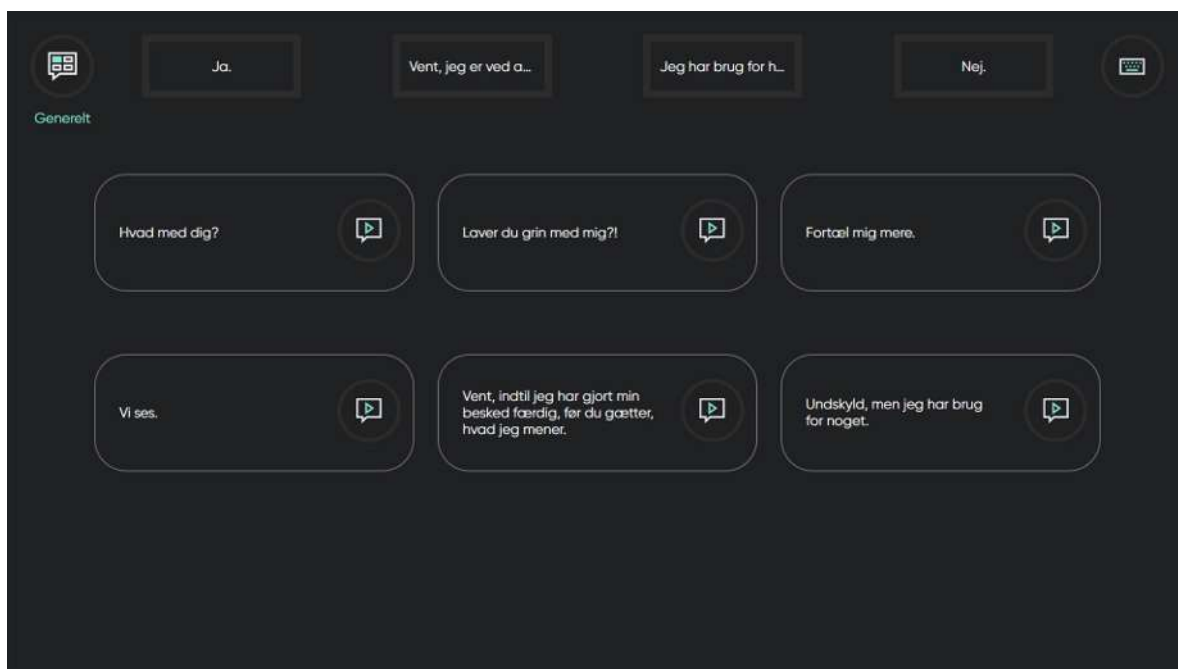




2. Vælg knappen  (Oplæs) ud for beskeden.

3. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.5.2 Hvordan skifter jeg emne for hurtigbeskeder?

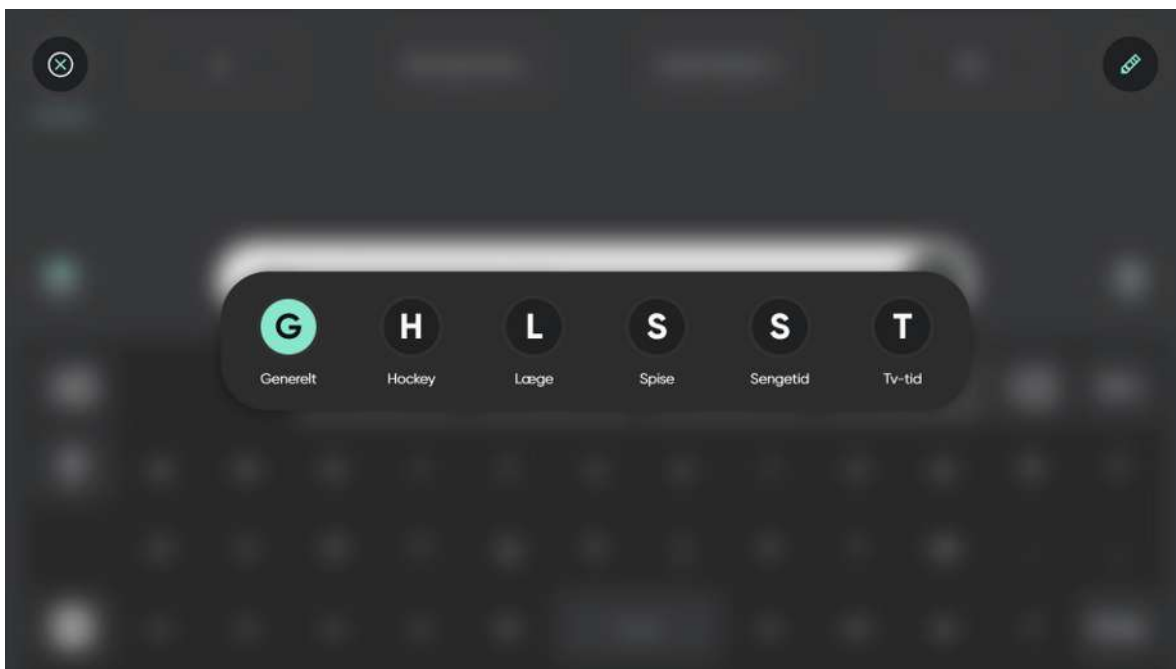

1. Vælg knappen  (Menu for emner).
2. Vælg det nye emne.




 Vælg knappen  (Rediger) for at ændre emnerne, der vises/er tilgængelige i menuen for emner. Se 5.4.1 *Emner*, side 31 med flere oplysninger.


4.6 Ændring af sprog

4.6.1 Hvordan skifter jeg sprog til oplæsning i TD Talk?

1. Vælg knappen  (Sprog) på tastaturet.
2. Vælg sprog til oplæsning
Hvis du ikke kan finde det ønskede sprog, skal du se 5.3.4.1 *Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?*, side 28
3. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage

4.7 Chat

Vælg ikonet  (Chat) for at skifte til et andet beskedvindue for at skrive en ny besked uden at miste teksten i det første beskedvindue.

Vælg ikonet  (Tilbage til chat) for at skifte tilbage til det første beskedvindue.

4.8 Gennemsigtig tilstand



Gør skærmene i TD Talk gennemsigtige og tænder det bagudvendte kamera. Tilstanden viser, hvad der er foran din enhed såsom din samtalepartner, mens du bruger TD Talk.

4.8.1 Hvordan starter jeg den gennemsigtige tilstand?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området med øjenstyringsenheden. Off-Screen Menu vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Gennemsigtig tilstand).


4.8.2 Hvordan afslutter jeg den gennemsigtige tilstand?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området med øjenstyringsenheden. Off-Screen Menu vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Afslut gennemsigtig tilstand).


4.9 Hvordan bruger jeg en udvidelse af forkortelser i TD Talk?

Når du skriver en eksisterende forkortelse, ændres den første position i ordprædiktionerne til udvidelsen af forkortelsen.

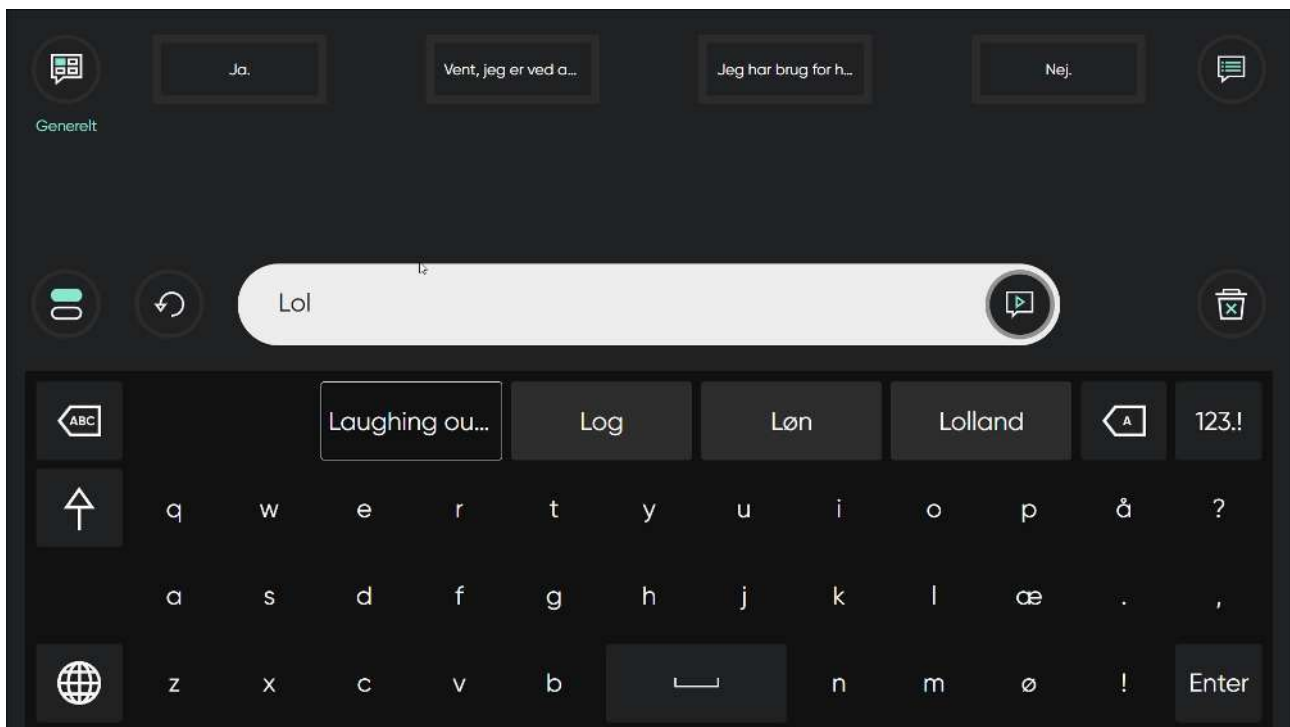







Vælg udvidelsen af forkortelsen i området med ordprædiktion for at udvide forkortelsen ind i beskedvinduet.
Se Udvidelse af forkortelser med flere oplysninger om tilføjelse, redigering og sletning af udvidelser af forkortelser.

4.10 Hvordan fortryder jeg en handling i TD Phone?

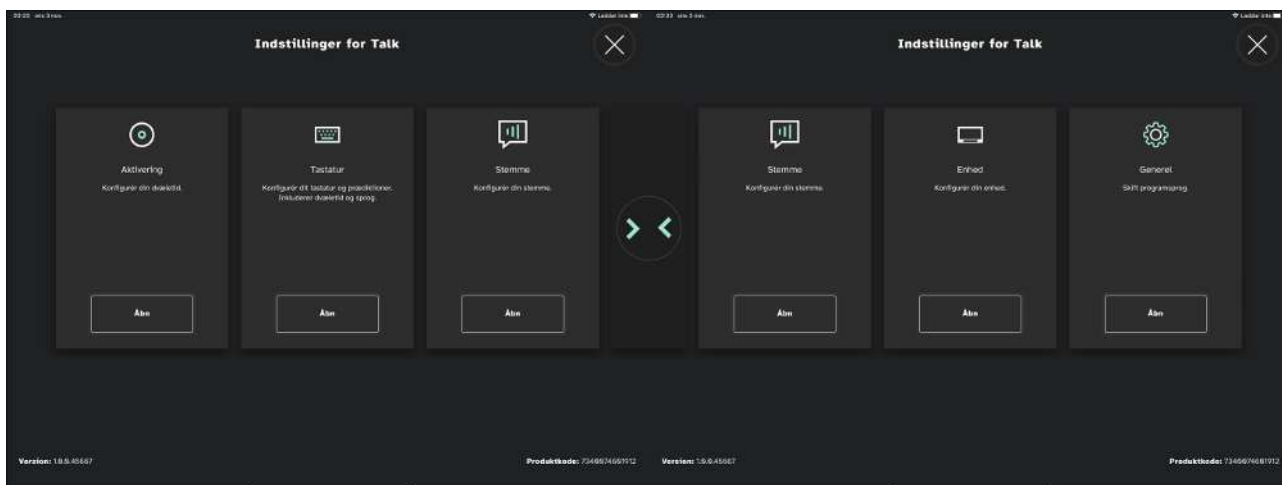Vælg knappen  (Fortryd) ved siden af beskedvinduet for at fortryde handlinger en efter en i beskedvinduet, siden du begyndte at skrive i det aktive beskedvindue.


5 Indstillinger for TD Talk



Ikoner	Handling	Beskrivelse
	Aktivering	Vises kun, hvis der er installeret en øjenstyringsenhed, der er aktiveret. Åbner indstillinger for Aktivering . Se 5.2 <i>Aktivering</i> , side 21 med flere oplysninger.
	Tastatur	Åbner indstillinger for Tastatur . Se 5.3 <i>Tastatur</i> , side 25 med flere oplysninger.
	Stemme	Åbner indstillinger for Stemme . Se 5.5 <i>Stemme</i> , side 38 med flere oplysninger.
	Enhed	Åbner indstillinger for Enhed . Se 5.6 <i>Enhed</i> , side 45 med flere oplysninger.
	Generelt	Åbner indstillinger for Generelt . Se 5.7 <i>Generelt</i> , side 46 med flere oplysninger.

5.1

Min konto

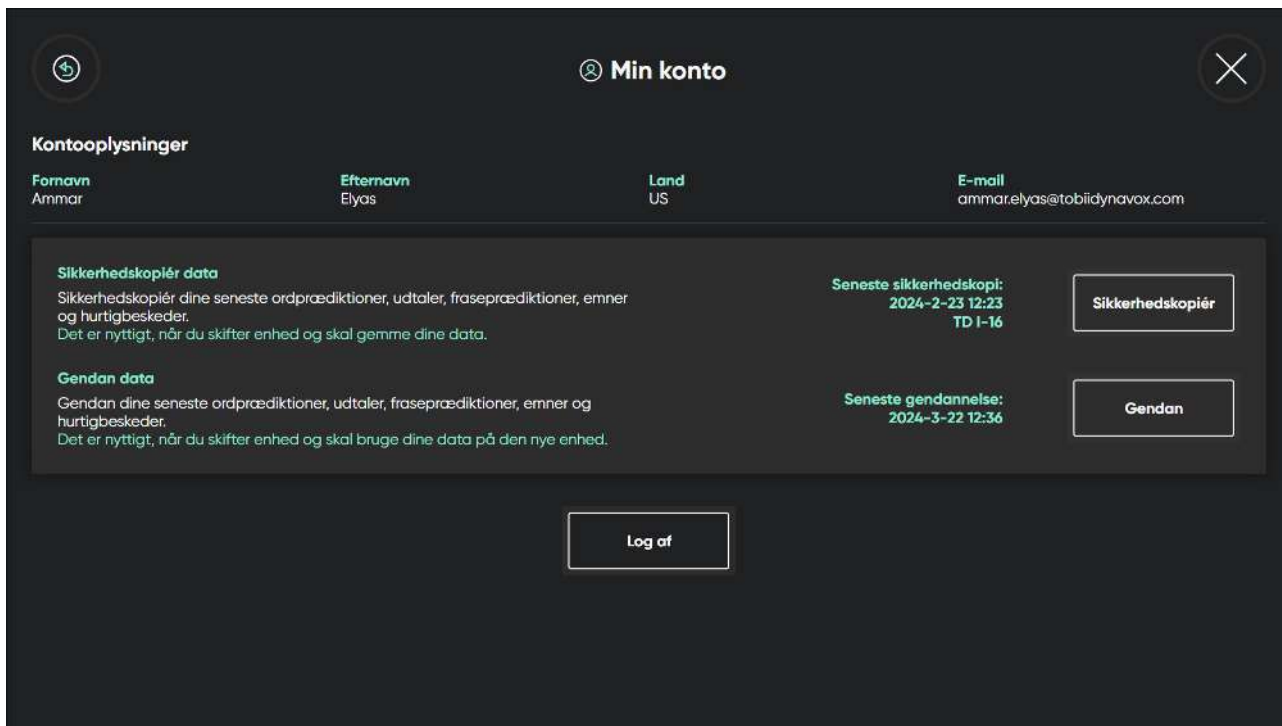

Log ind på din myTobiiDynavox Account for at sikkerhedskopiere og gendanne dine personlige ordprædiktioner, udtaler, emner og hurtigbeskeder mellem dine enheder.

5.1.1 Hvad er en myTobiiDynavox-konto?


En myTobiiDynavox Account er en onlineplatform, der stilles til rådighed af Tobii Dynavox, der er en virksomhed med speciale i assisterende teknologi til personer med kommunikations- og mobilitetsudfordringer. myTobiiDynavox Account giver brugerne adgang til forskellige ressourcer, herunder sikkerhedskopiering og gendannelse af personligt tilpassede data, opdatering af software, støttematerialer, brugerfora og online undervisningskurser. Den er også et centralt midtpunkt for administration af enhedsindstillinger, oprettelse og deling af kommunikationstavler og giver adgang til yderligere funktioner, der er tilpasset behovene hos personer, der bruger Tobii Dynavox-enheder. Der er generelt tale om en central platform for brugere, hvor de kan administrere deres assisterende teknologiløsninger og finde støtte i Tobii Dynavox-fællesskabet.

5.1.2 Hvordan opretter jeg en myTobiiDynavox-konto?


Gå til [Opret en myTobiiDynavox-konto](#) for at oprette en myTobiiDynavox-konto.



5.1.3 Hvordan sikkerhedskopierer jeg mine personligt tilpassede data?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.


2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.



3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Log ind) i øverste venstre hjørne af skærmen.
5. Brug tastaturet til at skrive dit brugernavn i feltet **Brugernavn**.
6. Brug tastaturet til at skrive din adgangskode i feltet **Adgangskode**.
7. Vælg knappen **Log ind**.
8. Vælg knappen **Sikkerhedskopier**.
Datoen for sikkerhedskopien og navnet på den sikkerhedskopierede enhed vises til venstre for knappen Sikkerhedskopier, når der oprettes en sikkerhedskopi.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte.

5.1.4 Hvordan gendanner jeg mine personligt tilpassede data?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Log ind) i øverste venstre hjørne af skærmen.
5. Brug tastaturet til at skrive dit brugernavn i feltet **Brugernavn**.
6. Brug tastaturet til at skrive din adgangskode i feltet **Adgangskode**.
7. Vælg knappen **Log ind**.
8. Vælg knappen **Gendan**.
Datoen for gendannelsen vises til venstre for knappen Gendan, når der udføres en gendannelse.

9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte.

5.2 Aktivering




Vises kun, hvis der er installeret en øjenstyringsenhed, der er aktiveret.

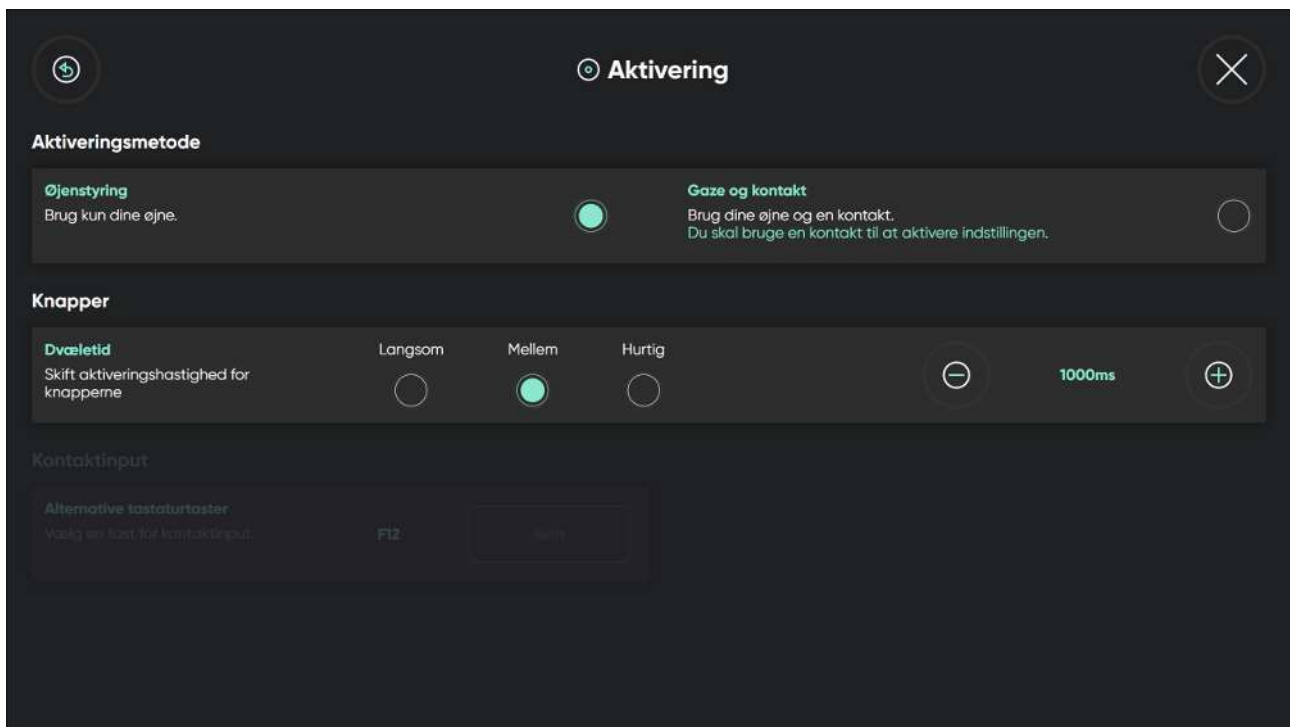


5.2.1 Aktiveringsmetode


5.2.1.1 Hvordan vælger jeg aktiveringsmetode i TD Talk?


 Valget af aktiveringsmetode for aktivering henviser ikke til aktivering af tasterne på tastaturet men til alle andre aktiveringer i TD Talk.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.


3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.


5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet **Aktiveringsmetode**.

7. Vælg radioknappen for **aktiveringsmetoden**, der skal bruges, fra følgende værdier:
 - **Gaze** - Brug kun dine øjne (standard)
 - Øjenstyring og kontakt - Brug dine øjne og en kontakt.


 Du skal bruge en kontakt til at aktivere indstillingen.

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.2.2 Knapper


5.2.2.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?


 Knapper henviser ikke til knapperne på tasturet men til dem, der er placeret alle andre steder i TD Talk.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det rigtige indstillingskort.


5. Vælg knappen **Abn.**

6. Se afsnittet om **knapper**.

7. Vælg alternativknappen for **dvæletid** med en af følgende værdier:


- Langsom
- **Mellem** (standard)
- Hurtig


8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.2.2.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.


3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det rigtige indstillingskort.

5. Vælg knappen **Abn.**


6. Se afsnittet om **knapper**.


7. Vælg en af følgende knapper for at finjustere **dvæletiden**:

-  – reducerer dvæletiden

-  – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.3 Kontaktinput


Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.




Hvis et kontaktinput er indstillet, fungerer den tast på tastaturet som en kontakt, hvis den vælges på et eksternt tilsluttet tastatur.


5.2.3.1 Hvordan indstiller jeg kontaktinput for min kontakt i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.


5. Vælg knappen **Åbn**.


6. Se afsnittet om **kontaktinput**.

7. Vælg knappen **Skift**.



8. Vælg radioknappen for tasten på tastaturet, der skal bruges som **kontaktinput**.

9. Vælg knappen **OK** for at aktivere eller knappen **Annuller** for at annullere.

10. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


11. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.3 Tastatur

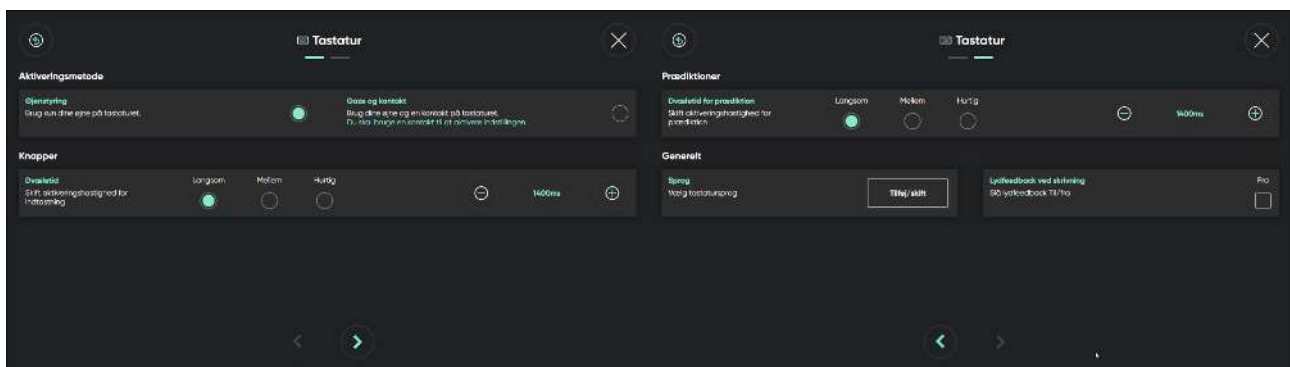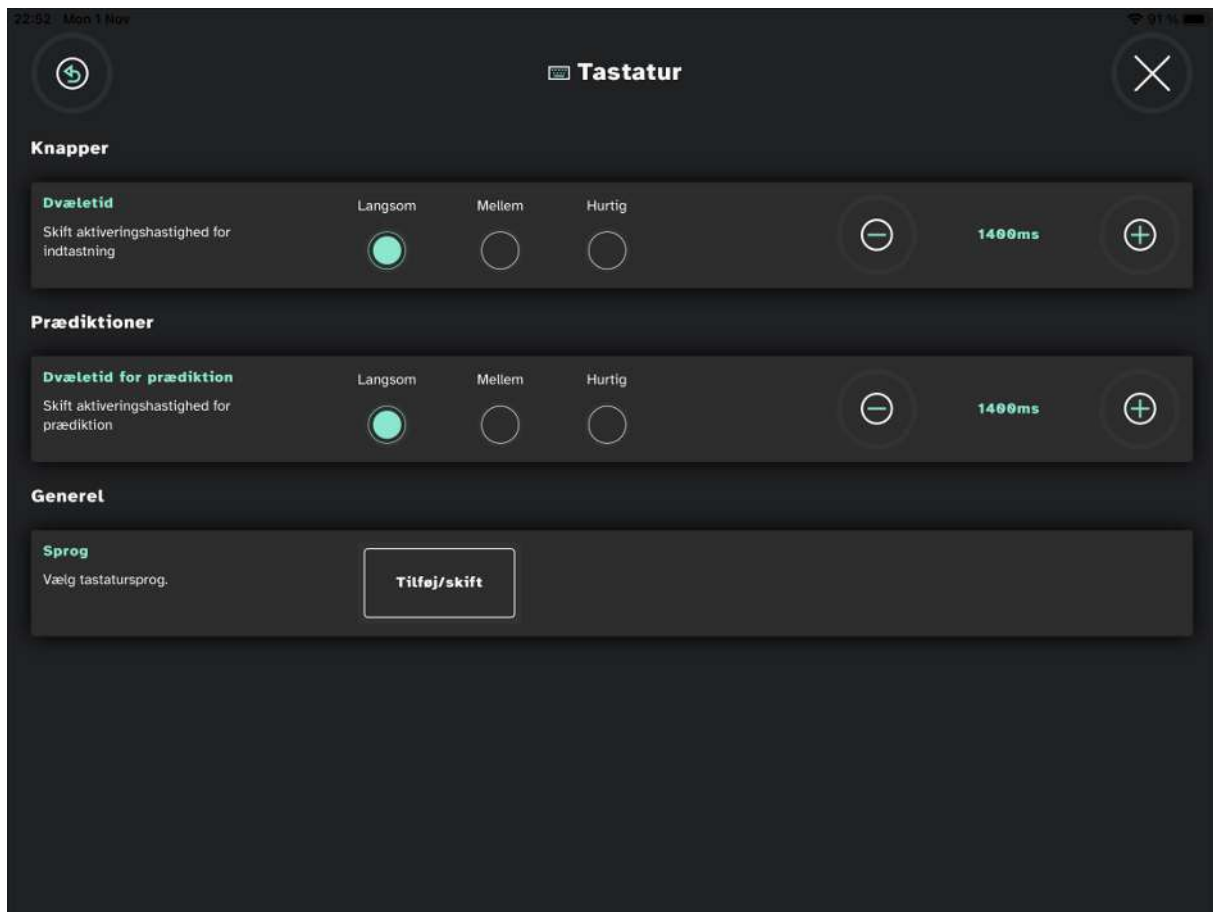


5.3.1 Aktiveringsmetode


5.3.1.1 Hvordan vælger jeg aktiveringsmetode for tastaturet i TD Talk?


 Valget af aktiveringsmetode for tastaturet henviser kun til aktivering af knapperne på tastaturet i TD Talk.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.


5. Vælg knappen **Åbn**.


6. Se afsnittet **Aktiveringsmetode**.

7. Vælg radioknappen for **aktiveringsmetoden**, der skal bruges, fra følgende værdier:

- **Gaze** - Brug kun dine øjne (standard)
- Øjenstyring og kontakt - Brug dine øjne og en kontakt.

 Du skal bruge en kontakt til at aktivere indstillingen.


8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.3.2 Knapper


5.3.2.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for tastaturknapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det rigtige indstillingskort.


5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet om **knapper**.

7. Vælg alternativknappen for **dvæletid** med en af følgende værdier:


- Langsom
- **Mellem** (standard)
- Hurtig

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.3.2.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.


3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det rigtige indstillingskort.

5. Vælg knappen **Abn.**


6. Se afsnittet om **knapper**.


7. Vælg en af følgende alternativknapper for at finjustere **dvæletiden**:

–  – reducerer dvæletiden

–  – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt


8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.3.3 Prædiktion


5.3.3.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for prædiktionsknapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.


5. Vælg knappen **Abn.**


6. Vælg knappen  (Næste side) i bunden af skærmen.

7. Se afsnittet om **prædiktioner**.

8. Vælg alternativknappen for **dvæletid** med en af følgende værdier:


- Langsom
- **Medium** (standard)
- Hurtig


9. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


10. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.3.3.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for prædiktionsknapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.


5. Vælg knappen **Abn.**

6. Vælg knappen  (Næste side) i bunden af skærmen.


7. Se afsnittet om **prædiktationer**.


8. Vælg en af følgende alternativknapper for at finjustere **dvæletiden**:

–  – reducerer dvæletiden

–  – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt


9. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


10. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.3.4 Generelt


5.3.4.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.


5. Vælg knappen **Abn.**

6. Vælg knappen  (Næste side) i bunden af skærmen.


7. Se afsnittet **Generelt**.


8. Vælg knappen "Vælg tastatursprog" **Tilføj/skift**.

9. Vælg fanen **Download**.

10. Vælg knappen  (Download) ud for sproget for at starte download af det nye tastatur.


11. Vælg knappen **Download** for at starte download eller knappen **Annuller** for at annullere download.
12. Vælg fanen **Installeret**.
13. Aktiver sproget ved at vælge alternativknappen ud for sproget.


14. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


15. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.3.4.2 Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog og bruger/gør dem tilgængelige i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.


5. Vælg knappen **Åbn**.


6. Vælg knappen  (Næste side) i bunden af skærmen.


7. Vælg knappen "Vælg tastatursprog" **Tilføj/skift**.

8. Vælg fanen **Installeret**.

9. Vælg alternativknappen ud for sproget for at aktivere tastatursproget for det sprog.


 Sørg for at vælge alternativknappen for alle sprog, som stemmen skal bruges til.


10. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


11. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.3.4.3 Hvordan slår jeg lydfeedback ved skrivning til/fra i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.


5. Vælg knappen **Åbn**.


6. Vælg knappen  (Næste side) i bunden af skærmen.

7. Se afsnittet **Generelt**.


8. Sæt knappen **Til/fra** for "**Lydfeedback ved skrivning**" i stillingen:

- Til
- Fra


9. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

10. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.4 Samtaler

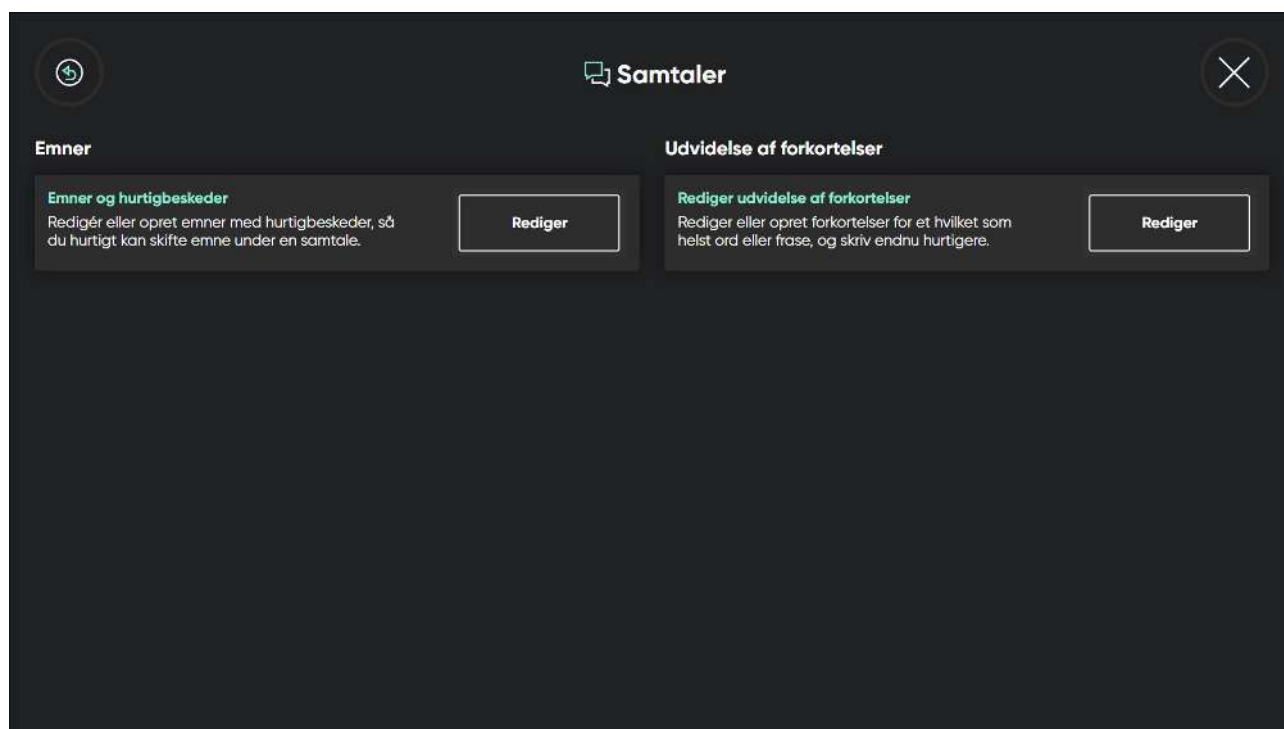

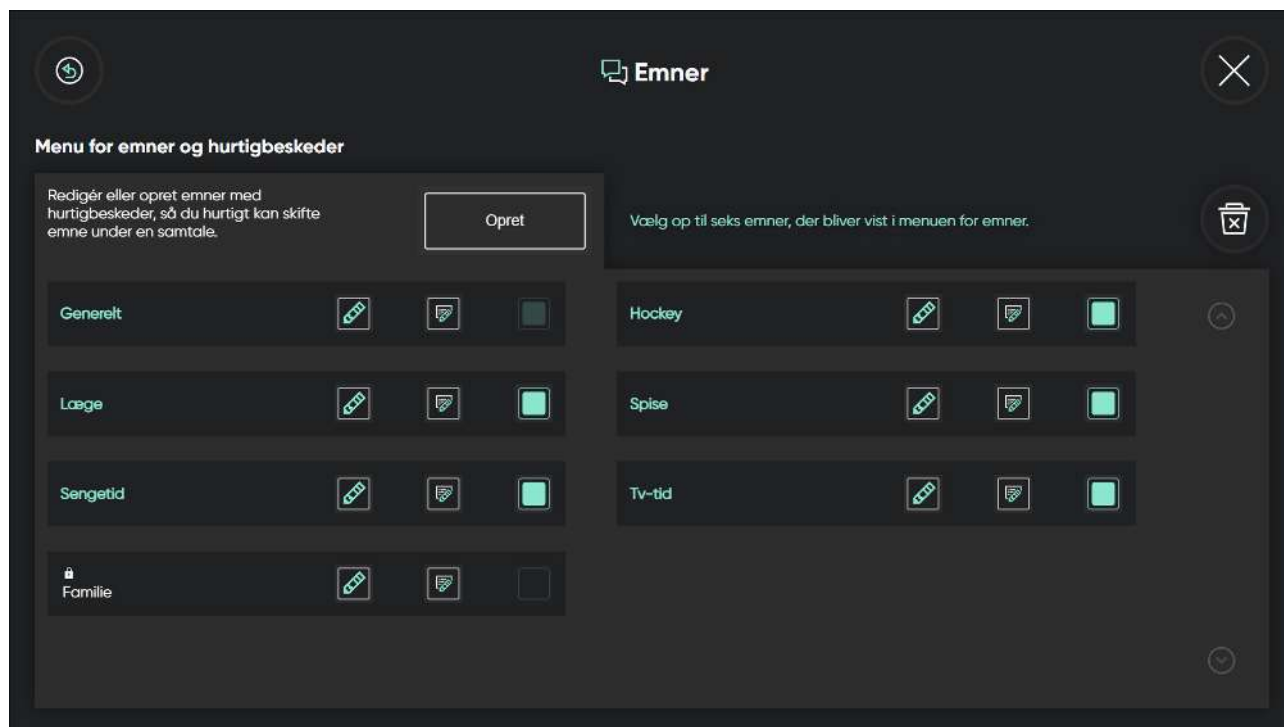

5.4.1 Emner





5.4.1.1 Hvordan opretter jeg et nyt emne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Abn.**

6. Vælg knappen **Opret**.

7. Indtast navnet på det nye emne på tastaturet.


 Vælg afkrydsningsfeltet **Privat tilstand** for at slå fraseprædiktion og læring fra.




8. Vælg ikonet  (Gem) for at gemme.

9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte.

5.4.1.2 Hvordan ændrer jeg navnet på et emne i TD Talk?



1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen **Abn.**


6. Vælg knappen  (Rediger) ud for navnet på emnet.
7. Brug tastaturet til at ændre emnets navn.





 Vælg afkrydsningsfeltet **Privat tilstand** for at slå fraseprædiktion og læring fra.



8. Vælg ikonet  (Gem) for at gemme.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte.

5.4.1.3 Hvordan gør jeg emnet privat i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.



2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen **Abn.**
6. Vælg knappen  (Rediger) ud for navnet på emnet.
7. Vælg afkrydsningsfeltet **Privat tilstand** for at slå fraseprædiktion og læring fra.


8. Vælg ikonet  (Gem) for at gemme.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte.


5.4.1.4 Hvordan vælger jeg de aktive emner i TD Talk?



1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Samtaler) for at finde det rigtige indstillingskort.
5. Vælg knappen **Abn.**
6. Vælg knappen **Rediger** for Emner og hurtigbeskeder i afsnittet for emner.
7. Vælg **afkrydsningsfeltet** for emnet, der skal være aktivt.



 Du kan vælge op til seks (6) emner, der er tilgængelige i menuen for emner.


8. Vælg knappen  (Luk) for at forlade redigeringskærmen.
9. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.



5.4.1.5 Hvordan sletter jeg et emne i TD Talk?




1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Samtaler) for at finde det rigtige indstillingskort.
5. Vælg knappen **Abn.**
6. Vælg knappen **Rediger** for Emner og hurtigbeskeder i afsnittet for emner.



7. Vælg knappen  (Slet).
8. Vælg knappen  (Slet) ud for navnet på emnet, der skal slettes.
9. Vælg knappen **Slet** for at slette emnet eller knappen **Annuller** for at annullere.


10. Vælg knappen  (Udført), når du er færdig med at slette.
11. Vælg knappen  (Luk) for at forlade redigeringskærmen.
12. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

5.4.1.6 Hvordan redigerer jeg hurtigbeskeder i TD Talk?


1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.


2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Samtaler) for at finde det rigtige indstillingskort.
5. Vælg knappen **Abn.**
6. Vælg knappen **Rediger** for Emner og hurtigbeskeder i afsnittet for emner.

7. Vælg knappen  (Rediger hurtigbeskeder).

8. Vælg knappen  (Rediger) ud for beskeden, der skal redigeres.
9. Lav ændringerne i beskeden med tastaturet.


10. Vælg knappen  (Gem) for at gemme ændringerne i hurtigbeskeden.


11. Vælg knappen  (Luk) for at forlade redigeringskærmen.


12. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.


5.4.1.7 Hvordan tilføjer jeg en hurtigbesked i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.


3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Samtaler) for at finde det rigtige indstillingskort.
5. Vælg knappen **Abn.**
6. Vælg knappen **Rediger** for Emner og hurtigbeskeder i afsnittet for emner.


7. Vælg knappen  (Rediger hurtigbeskeder).

8. Vælg knappen  (Tilføj) ud for placeringen Tilføj ny.
Du kan have tre (3) sider med hurtigbeskeder for hvert emne.

9. Brug knappen  og  for at navigere mellem siderne.
Skriv den nye besked med tastaturet.


10. Vælg knappen  (Gem) for at gemme den nye hurtigbesked.

11. Vælg knappen  (Luk) for at forlade redigeringskærmen.


12. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.


5.4.1.8 Hvordan sletter jeg en hurtigbesked i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.


3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Samtaler) for at finde det rigtige indstillingskort.


5. Vælg knappen **Abn.**


6. Vælg knappen **Rediger** for Emner og hurtigbeskeder i afsnittet for emner.


7. Vælg knappen  (Rediger hurtigbeskeder).

8. Vælg knappen  (Rediger) ud for beskeden, der skal slettes.


9. Vælg knappen  Slet besked.

10. Vælg knappen  (Gem) for at gemme ændringerne i hurtigbeskeden.

11. Vælg knappen  (Luk) for at forlade redigeringskærmen.


12. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.


5.4.2 Udvidelse af forkortelser

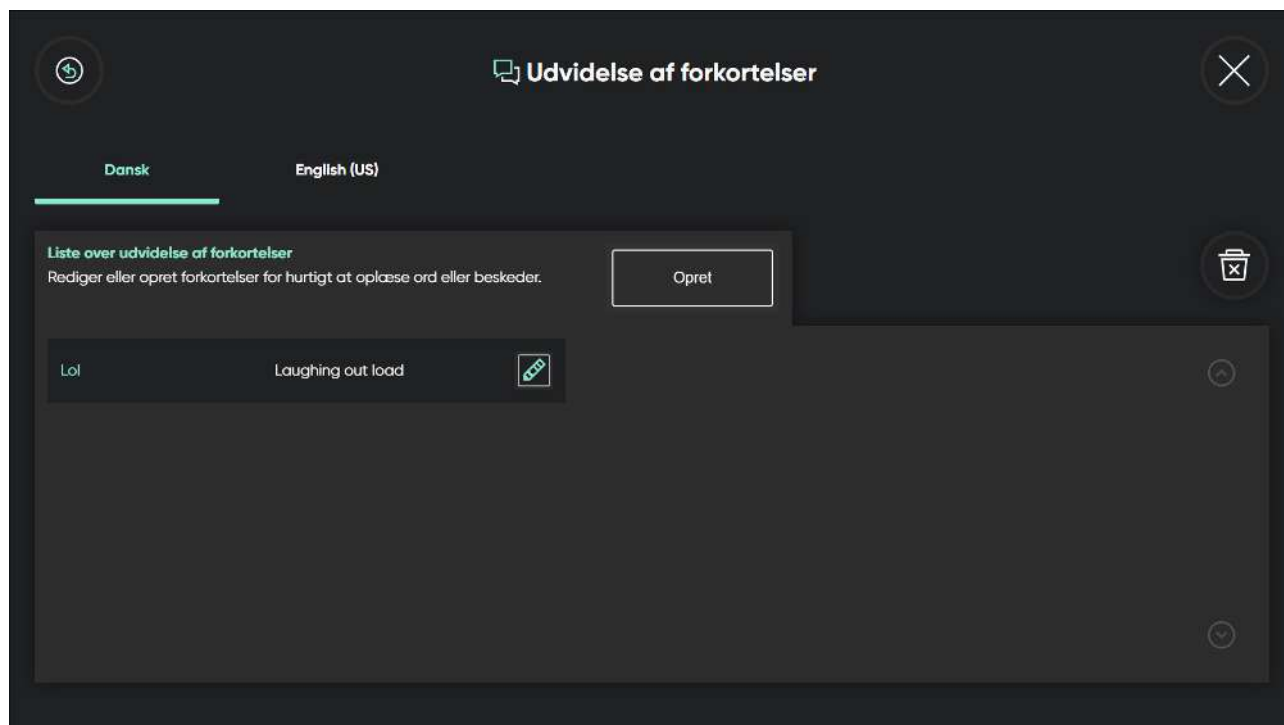



5.4.2.1 Hvordan tilføjer jeg en udvidelse af forkortelser i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Samtaler) for at finde det rigtige indstillingskort.


5. Vælg knappen **Abn.**

6. Vælg knappen **Rediger** i området Rediger udvidelse af forkortelser under Udvidelse af forkortelser.


7. Vælg fanen **Sprog** for det installerede sprog, som du vil tilføje en udvidelse af en forkortelse.


8. Vælg knappen **Opret**.


9. Skriv forkortelsen, som du vil oprette, i tekstboksen **Forkortelse**.


10. Vælg ikonet  ud for tekstboksen **Ord eller besked**.

11. Skriv ordet eller beskeden, som du har oprettet forkortelsen for, i tekstboksen **Ord eller besked**.

12. Vælg knappen  (Gem) for at gemme ændringerne af udvidelsen af forkortelsen.


13. Vælg knappen  (Tilbage) for at vende tilbage til indstillingerne for Samtaler.

14. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


15. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.4.2.2 Hvordan redigerer jeg en udvidelse af forkortelser i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.


3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Samtaler) for at finde det rigtige indstillingskort.


5. Vælg knappen **Abn.**

6. Vælg knappen **Rediger** i området Rediger udvidelse af forkortelser under Udvidelse af forkortelser.


7. Vælg fanen **Sprog** for det installerede sprog, hvor du vil redigere en udvidelse af en forkortelse.


8. Vælg ikonet  ud for forkortelsen, som du vil redigere.


9. Rediger den nye forkortelse, som du vil oprette, i tekstboksen **Forkortelse**.


10. Vælg ikonet  ud for tekstboksen **Ord eller besked**.

11. Rediger det nye ord eller den nye besked, som du har oprettet forkortelsen for, i tekstboksen **Ord eller besked**.

12. Vælg knappen  (Gem) for at gemme ændringerne af udvidelsen af forkortelsen.


13. Vælg knappen  (Tilbage) for at vende tilbage til indstillingerne for Samtaler.

14. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


15. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.4.2.3 Hvordan sletter jeg en udvidelse af forkortelser i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.







3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Samtaler) for at finde det rigtige indstillingskort.

5. Vælg knappen **Abn.**


6. Vælg knappen **Rediger** i området Rediger udvidelse af forkortelser under Udvidelse af forkortelser.

7. Vælg fanen **Sprog** for det installerede sprog, hvor du vil slette en udvidelse af en forkortelse.


8. Vælg knappen  (Slet).
9. Vælg knappen  (Slet) ud for forkortelsen, der skal slettes.
10. Vælg knappen **Slet** for at bekræfte eller knappen **Annuller** for at annullere sletningen af forkortelsen.
11. Vælg knappen  (Udført), når du er færdig med at slette.
12. Vælg knappen  (Tilbage) for at vende tilbage til indstillingerne for Samtaler.
13. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
14. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.5 Stemme

Indstil oplæsningsstemmen på dit tastatursprog her

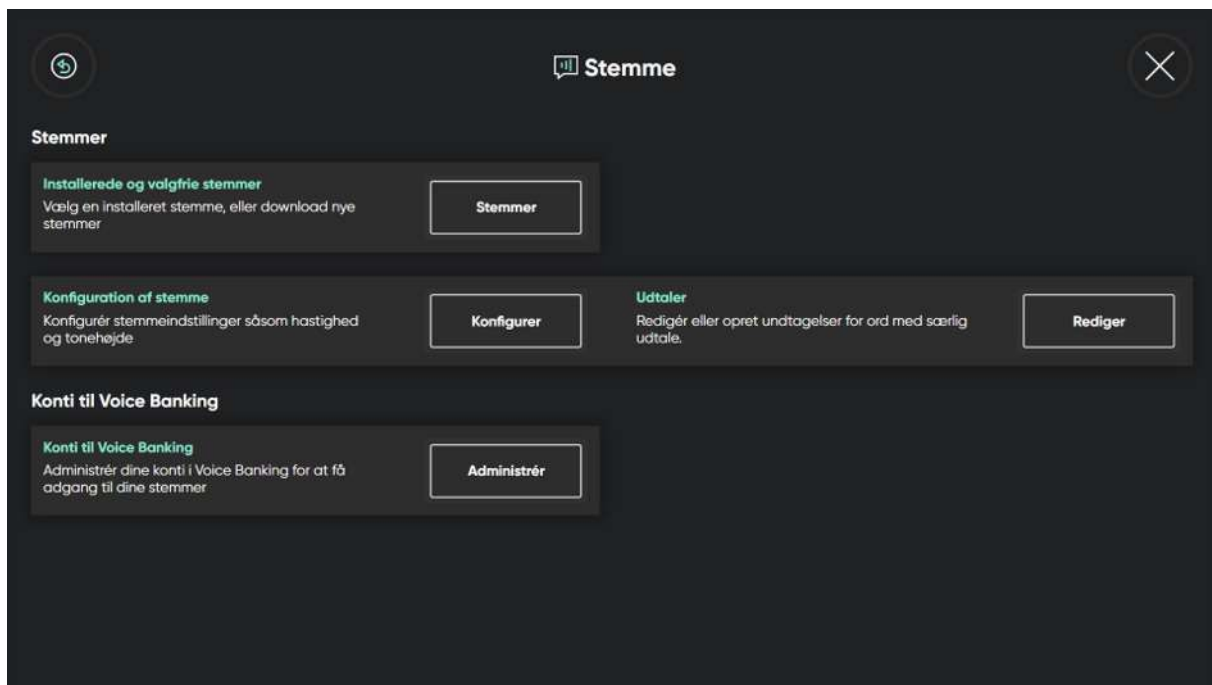

Alle installerede sprog vises i den øverste del af skærmen. Efter valg af sprog vises de tilgængelige stemmer for sproget

i listen under sprogene. Vælg  ud for stemmen for at teste stemmen. Hvis den findes.

5.5.1 Stemmer


5.5.1.1 Installerede og valgfrie stemmer


There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.


Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see [5.5.1.1.3 Hvordan kan jeg filtrere tilgængelige stemmer i TD Talk?](#), side 40


5.5.1.1.1 Hvordan downloader jeg en ny stemme i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det rigtige indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se i afsnittet om **Stemmer**


7. Vælg knappen **Voices** for installerede stemmer og valgfrie stemmer.

8. Vælg fanen **Download**.


9. Vælg fanen **Sprog** for det installerede sprog, som du vil bruge.




Hvis du ikke kan finde det ønskede sprog, skal du se [5.3.4.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?](#), side 28 og [5.3.4.2 Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog og bruger/gør dem tilgængelige i TD Talk?](#), side 29.


10. Vælg knappen  (Download) ud for stemmen for at starte download af den nye stemme.
Brug knapperne "Scrol op" og "Scrol ned" til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.




Vælg  ud for stemmen for at teste en stemme.

11. Vælg knappen **Download** for at starte download eller knappen **Annuller** for at annullere download.




12. Vælg knappen  (Tilbage) for at vende tilbage til indstillingerne for stemme.

13. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


14. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.5.1.1.2 Hvordan vælger jeg min stemme i TD Talk?


 Stemmerne fra Voice Banking-systemet har logoet for Voice Banking-tjenesten placeret efter navnet på stemmen.


- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det rigtige indstillingskort.

5. Vælg knappen **Abn.**

6. Se i afsnittet om **Stemmer**


7. Vælg knappen **Voices** for installerede stemmer og valgfrie stemmer.


8. Vælg fanen **Sprog** for det installerede sprog, som du vil bruge.


 Hvis du ikke kan finde det ønskede sprog, skal du se [5.3.4.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?, side 28](#) og [5.3.4.2 Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog og bruger/gør dem tilgængelige i TD Talk?, side 29](#).

9. Vælg den ønskede stemme i listen med tilgængelige stemmer til sprog til oplæsning.
Brug knapperne "Scrol op" og "Scrol ned" til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.

 Vælg  ud for stemmen for at teste en stemme.


10. Vælg knappen  (Tilbage) for at vende tilbage til indstillingerne for stemme.

11. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

12. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.5.1.1.3 Hvordan kan jeg filtrere tilgængelige stemmer i TD Talk?


On the **Installed** or **Download** tab, do the following:

1. Vælg knappen  (Filter).
2. Vælg afmærkningsfelterne ud for de valgmuligheder, som du vil se.

Du kan vælge:


- Køn - Kvinde, mand
- Alder - Barn, teenager og voksen

5.5.1.2 Konfiguration af stemme

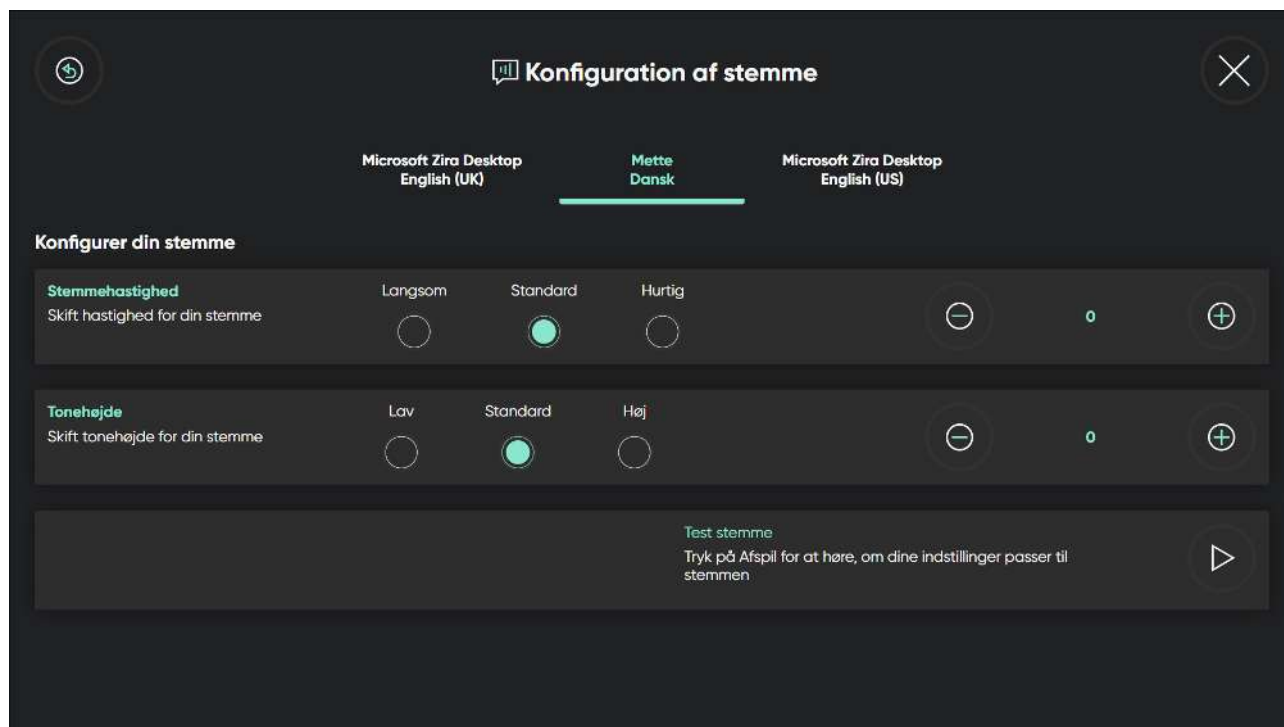



5.5.1.2.1 Hvordan ændrer jeg min stemme i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det rigtige indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se i afsnittet om **Stemmer**

7. Vælg knappen **Konfigurer** for konfiguration af stemme.


8. Vælg stemmen, der skal ændres, fra de tilgængelige stemmer.


9. Vælg alternativknappen for **Stemme-hastighed** med en af følgende værdier:

- Langsom
- **Standard**
- Hurtig

for at skifte hastighed for din stemme.

10. Vælg en af følgende alternativknapper for at finjustere **stemme-hastigheden**:

-  – for at reducere stemme-hastigheden



-  – for at forøge stemme-hastigheden

Værdien kan indstilles mellem -10 og +10.


11. Vælg alternativknappen for **Tonehøjde** med en af følgende værdier:


- Lav
- **Standard**
- Høj

for at skifte tonehøjde for din stemme.



 Vælg  i afsnittet for test af stemme for at lytte til den nye stemme.


12. Vælg en af følgende alternativknapper for at finjustere **tonehøjden**:


-  - for at sænke tonehøjden


-  - for at hæve tonehøjden

Værdien kan indstilles mellem -10 og +10.


 Vælg  i afsnittet for test af stemme for at lytte til den nye stemme.

13. Vælg knappen  (Tilbage) for at vende tilbage til indstillingerne for stemme.

14. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


15. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.5.1.3 Udtaler

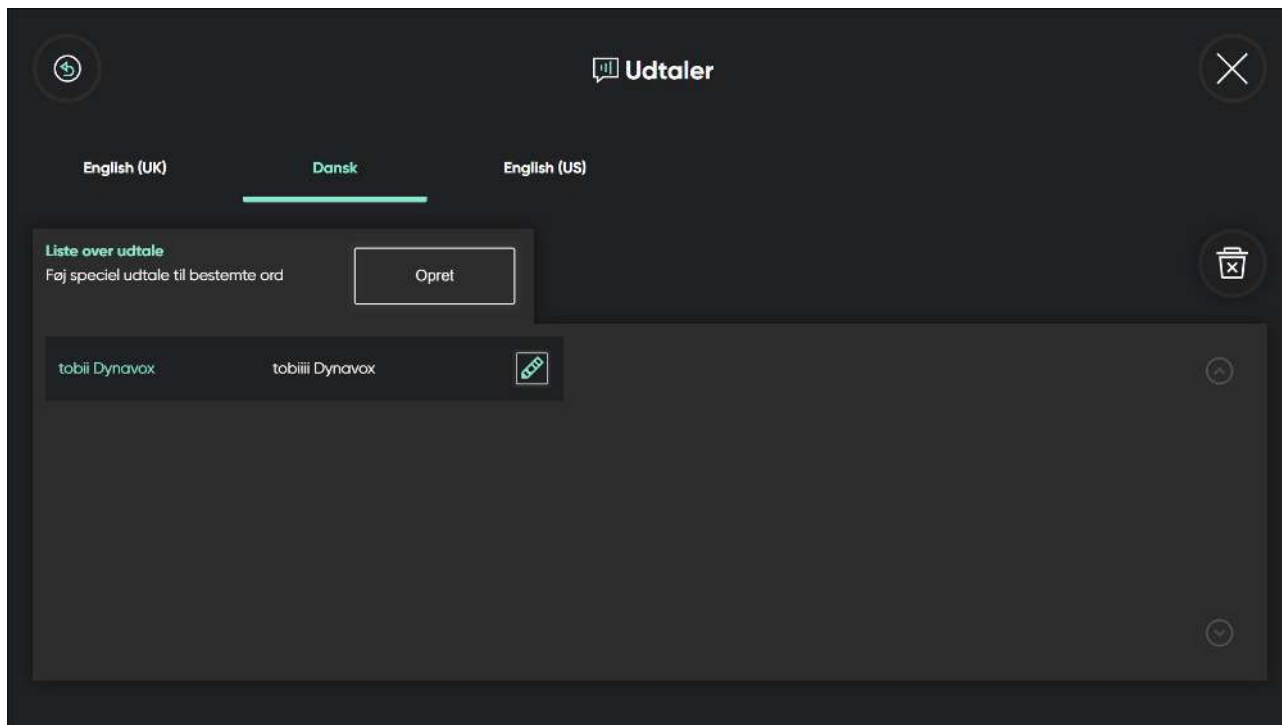



5.5.1.3.1 Hvordan opretter jeg udtaleundtagelser i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det rigtige indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se i afsnittet om **Stemmer**

7. Vælg knappen **Opret** for udtaler.

8. Vælg fanen **Sprog** for det installerede sprog, som du vil tilføje en udtaleundtagelse.

9. Vælg knappen **Opret**.


10. Skriv ordet, som du vil oprette en udtaleundtagelse for, i tekstboksen **Ord**.


11. Vælg ikonet  ud for tekstboksen **Udtale**.


12. Skriv, hvordan du ønsker ordet udtalt, i tekstboksen **Udtale**.

 Vælg  ud for tekstboksen Udtale for at lytte til udtaleundtagelsen.

13. Vælg knappen **Opret** for at gemme udtaleundtagelsen.




14. Vælg knappen  (Tilbage) for at vende tilbage til indstillingerne for stemme.

15. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

16. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.5.2 Konti til Voice Banking


TD Talk kan bruges sammen med tre forskellige Voice Banking-tjenester:

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 


Brugeren skal have en konto hos og logoplysninger til en af de tre leverandører af Voice Banking-tjenester for at kunne tilslutte og bruge den personlige syntetiske stemme.

5.5.2.1 Konti i Voice Banking


5.5.2.1.1 Hvordan kan jeg bruge min stemme fra min Voice Banking-tjeneste?


 Du skal have adgang til internettet for at logge in på Voice Banking-tjenesten.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det rigtige indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se i afsnittet **Konti i Voice Banking**.


Vælg knappen **Administrér** for konti i Voice Banking.

7. Vælg knappen **Log ind** i afsnittet for din Voice banking-tjeneste.


8. Indtast **Brugernavn** og **Adgangskode**.


9. Vælg knappen **Log ind**.


Den personlige stemme hentes og vælges automatisk som standardstemme for brugeren.

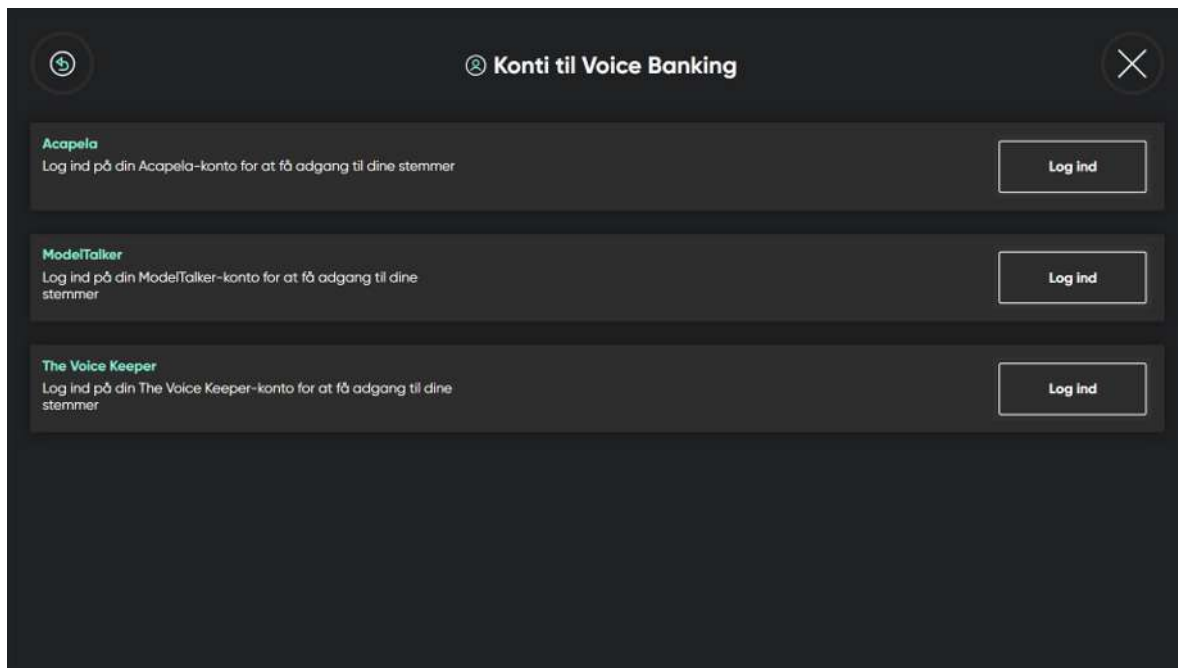

 Dette er tilfældet, når der findes personlige syntetiske stemmer på flere sprog

10. Vælg knappen  (Tilbage) for at vende tilbage til indstillingerne for stemme.

11. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


12. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.6

Enhed




Findes kun på TD Pilot.

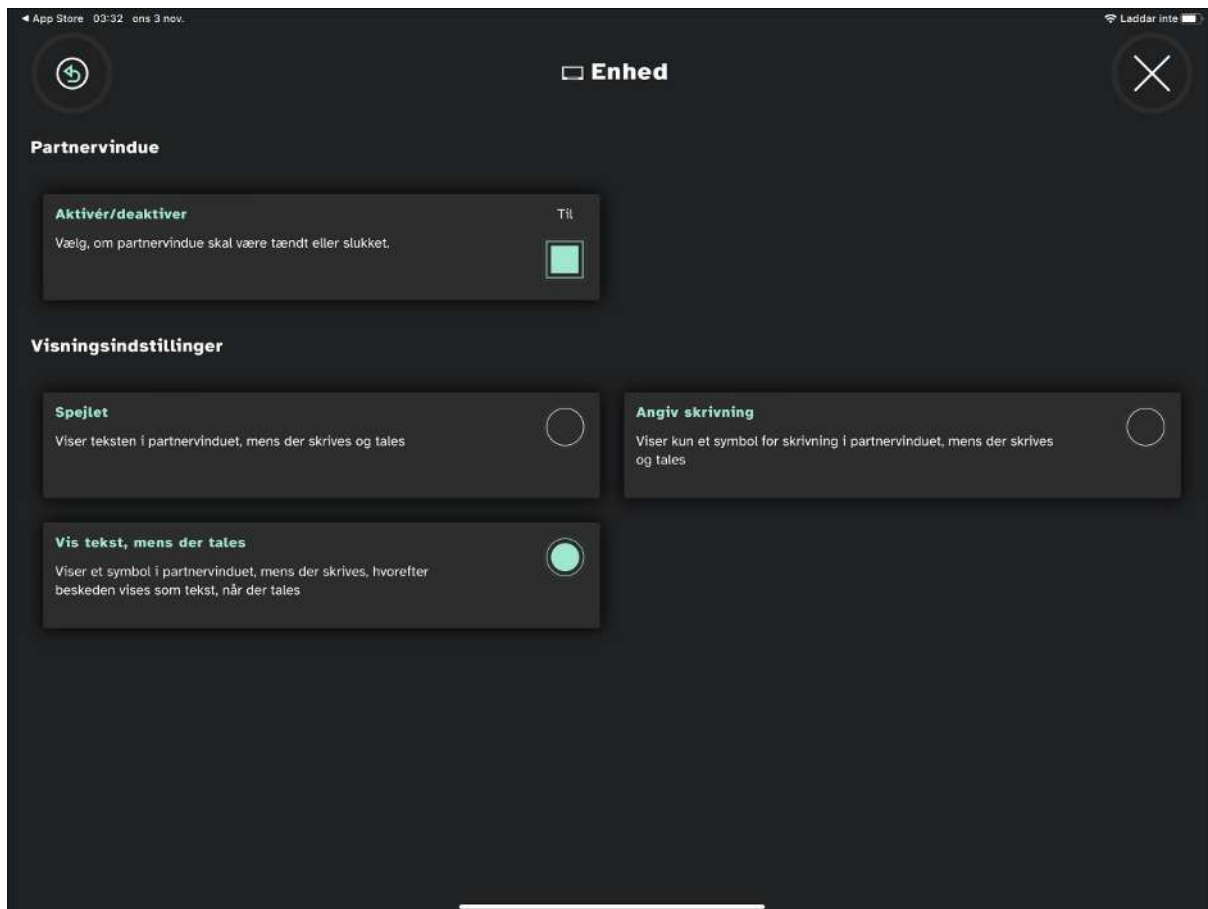


5.6.1 Partnervindue


5.6.1.1 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg partnervinduet i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Enhed) for at finde det rigtige indstillingskort.


5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet om **partnervindue**.

7. Sæt knappen **Aktiver/deaktiver** til "**Vælg partnervindue til/fra**" til:


- Til
- Fra


8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.6.1.2 Hvordan indstiller jeg visningsmulighederne for partnervinduet i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Se efter ikonet  (Enhed) for at finde det rigtige indstillingskort.


5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se i afsnittet om **visningsindstillinger**.

7. Vælg en af følgende alternativknapper for at vælge visningsindstilling for partnervinduet:

- Spejlet – Viser teksten i partnervinduet, mens der skrives og oplæses.
- Vis tekst, mens der tales – Viser et symbol i partnervinduet, mens der skrives, hvorefter beskeden vises som tekst, når den læses op.
- Angiv skrivning – Viser kun et symbol for skrivning i partnervinduet, mens der skrives og læses op.

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.7 Generelt


5.7.1 Programsprog

5.7.1.1 Hvordan indstiller jeg programsproget i TD Talk?





1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.


4. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.

5. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.
6. Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det rigtige indstillingskort.
7. Vælg knappen **Abn.**
8. Se afsnittet **Programsprog**.
9. Vælg knappen **Skift**.
10. Vælg alternativknappen ud for det ønskede programsprog.
11. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
12. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.7.2 Tekststørrelse

5.7.2.1 Hvordan ændrer jeg tekststørrelse i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.











2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
4. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.
5. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.
6. Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det rigtige indstillingskort.
7. Vælg knappen **Abn.**
8. Se i afsnittet **Tekststørrelse**.
9. Vælg alternativknappen for **Tekststørrelse** med en af følgende værdier:
 - **Standard** (standard)
 - **Stor**
10. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
11. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.7.3 Feedback

5.7.3.1 Hvordan sender jeg feedback til Tobii Dynavox i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.






2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
4. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.
5. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.
6. Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det rigtige indstillingskort.
7. Vælg knappen **Abn.**
8. Se i afsnittet **Feedback.**
9. Vælg knappen **Feedback.**
10. Skriv din e-mailadresse på **tastaturet.**
11. Vælg knappen  for emnetekstfeltet.
12. Skriv emnet for e-mailen på **tastaturet.**
13. Vælg knappen  for beskedtekstfeltet.
14. Skriv beskeden på **tastaturet.**
15. Vælg knappen  for at lukke beskedtekstfeltet.
16. Vælg knappen **Send feedback** for at sende din feedback til Tobii Dynavox.
17. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
18. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.7.4 Vilkår for tjeneste og meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

5.7.4.1 Hvordan åbner jeg vilkårene for tjeneste?


1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
4. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.
5. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.
6. Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det rigtige indstillingskort.
7. Vælg knappen **Abn.**

8. Se i afsnittet **Vilkår for tjeneste og meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger**.


9. Vælg knappen **Åbn**.


10. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


11. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.7.4.2 Hvordan åbner jeg meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.

5. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.


6. Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det rigtige indstillingskort.


7. Vælg knappen **Åbn**.

8. Se i afsnittet **Vilkår for tjeneste og meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger**.

9. Vælg knappen **Åbn**.

10. Vælg knappen  (Fremad).


11. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.


12. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.


5.7.5 Hent logfiler

5.7.5.1 Hvordan indsamler jeg logfiler for TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.


Knappen  (Kontrolpanel) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Kontrolpanel) for at åbne Kontrolpanel.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.

5. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.

6. Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det rigtige indstillingskort.

7. Vælg knappen **Abn.**

Indstillingssiden for Generelt åbnes.


8. Se afsnittet **Indsaml logge.**


9. Vælg knappen **Log.**

10. Vælg knappen **Ja**



Loggene oprettes på skrivebordet.

11. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

12. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

Copyright © Dynavox Group AB (Publ). Ikke alle produkter og tjenester kan fås i alle lande. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Support til din Tobii Dynavox-enhed

Få hjælp online

Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox-enhed. Den indeholder opdaterede oplysninger om problemer samt tips og tricks til produktet. Find vores supportsider på: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakt din AAC-konsulent eller forhandler

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du bede din AAC-konsulent hos Tobii Dynavox eller en godkendt forhandler om hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Besøg <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us> med kontaktoplysninger.