

TD Talk

Benutzerhandbuch



Benutzerhandbuch TD Talk

Version 1.8

2025-07-08

Alle Rechte vorbehalten.

Urheberrechte © Dynavox Group AB (publ)

Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieses Dokuments vervielfältigt, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise weitergegeben werden, sei es elektronisch, per Fotokopie, Aufnahme oder auf andere Art.

Der beanspruchte Urheberrechtsschutz umfasst alle Formen und Arten von urheberrechtlich schützbarem Material und von Informationen, die durch geschriebenes oder richterlich festgelegtes Recht erlaubt oder im Folgenden gewährt sind, einschließlich ohne Beschränkung auf aus den Softwareprogrammen generiertes Material, das auf dem Bildschirm dargestellt wird, wie z. B. Bildschirmanzeigen, Menüs usw.

Dieses Dokument enthält Informationen, an denen die Dynavox Group AB die Urheberrechte besitzt. Jegliche Vervielfältigung, ob vollständig oder auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Dynavox Group AB.

Bei in diesem Dokument erwähnten Produkten kann es sich um Warenzeichen und bzw. oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln. Herausgeber oder Verfasser erheben keinerlei Ansprüche auf diese Warenzeichen.

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Herausgeber und Verfasser haften nicht für Fehler bzw. Auslassungen oder für Schäden, die aus einer Nutzung der im Dokument enthaltenen Informationen oder einer Verwendung der zugehörigen Programme sowie des Quellcodes resultieren. Herausgeber und Verfasser haften in keinsten Weise für Gewinnaufälle oder andere wirtschaftliche Schäden, die tatsächlich oder angeblich, direkt oder indirekt durch dieses Dokument verursacht wurden.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Bitte besuchen Sie die Tobii Dynavox Website.

www.TobiiDynavox.com für aktualisierte Versionen dieses Dokuments.

Kontaktinformationen:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Schweden
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh PA 15203
USA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Vereinigtes Königreich
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Handelt unter dem Namen Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australien
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880



Inhalt

1	Willkommen	6
1.1	Systemanforderungen.....	6
1.2	Unterstützte Sprachen	6
1.3	TD Suite beziehen	6
2	Hilfe und Support	7
2.1	Internet-Hilfe und Support.....	7
2.2	Learning Hub	7
3	Erste Schritte	8
3.1	Überblick über TD Talk	8
3.2	Das Off-Screen-Menü	9
3.2.1	Wie greife ich auf das Off-Screen-Menü in TD Talk zu?	9
3.3	Die Übersicht	10
3.3.1	Wie greife ich in TD Talk auf die Übersicht zu?	10
3.3.2	Wie verlasse und beende ich TD Talk?	10
3.4	TD Talk einrichten.....	11
4	TD Talk nutzen	13
4.1	Verwendung der Tastatur	13
4.2	Verwendung von Vorhersagen	13
4.2.1	Wortvorhersagen.....	13
4.2.2	Satzvorhersage	14
4.3	Mitteilung bearbeiten.....	14
4.3.1	Wie bearbeite ich in TD Talk eine Mitteilung?	14
4.4	Kopieren und Einfügen	15
4.4.1	Wie verwende ich „Kopieren“ in TD Talk?	15
4.4.2	Wie verwende ich „Einfügen“ in TD Talk?	15
4.5	Die Verwendung von Schnellen Aussagen.....	15
4.5.1	Wie kann ich in TD Talk „Schnelle Aussagen“ einsetzen?.....	15
4.5.2	Wie ändere ich das Thema für Schnelle Aussagen?	16
4.6	Ändern der Sprache	17
4.6.1	Wie kann ich in TD Talk die Sprache wechseln?	17
4.7	Chat	17
4.8	Transparenz-Modus	18
4.8.1	So aktivieren Sie den Transparenz-Modus	18
4.8.2	So beenden Sie den Transparenz-Modus	18
4.9	Wie kann ich Abkürzungserweiterungen in TD Talk verwenden?	18
4.10	Wie kann ich eine Aktion in TD Talk rückgängig machen?	19
5	TD Talk-Einstellungen.....	20
5.1	Mein Konto.....	21
5.1.1	Was ist ein myTobiiDynavox-Konto?	21
5.1.2	Wie erstelle ich ein myTobiiDynavox-Konto?	21
5.1.3	Wie kann ich meine personalisierten Daten sichern?	21
5.1.4	Wie kann ich meine personalisierten Daten wiederherstellen?.....	22

5.2	Aktivierung	22
5.2.1	Aktivierungsmethode.....	23
5.2.1.1	Wie wähle ich die Aktivierungsmethode in TD Talk aus?.....	23
5.2.2	Felder	24
5.2.2.1	Wie kann ich in TD Talk die Verweilzeit für die Tastaturfelder ändern?	24
5.2.2.2	Wie kann ich die Verweilzeit für die Aktivierungsfelder in TD Talk genauer einstellen?	24
5.2.3	Taster Eingabe.....	25
5.2.3.1	Wie stelle ich eine Tastereingabe für meinen Taster in TD Talk ein?.....	25
5.3	Tastatur.....	26
5.3.1	Aktivierungsmethode.....	26
5.3.1.1	Wie wähle ich die Aktivierungsmethode für die Tastatur in TD Talk aus?.....	26
5.3.2	Felder	27
5.3.2.1	Wie kann ich in TD Talk die Verweilzeit für die Tastaturfelder ändern?	27
5.3.2.2	Wie kann ich die Verweilzeit für die Aktivierungsfelder in TD Talk genauer einstellen?	28
5.3.3	Vorhersage.....	28
5.3.3.1	Wie kann ich in TD Talk die Verweilzeit für die Vorhersagefelder ändern?	28
5.3.3.2	Wie kann ich die Verweilzeit für die Vorhersagefelder in TD Talk genauer einstellen?	29
5.3.4	Allgemein	29
5.3.4.1	Wie kann ich in TD Talk eine neue Sprache oder eine neue Tastatursprache hinzufügen/herunterladen?.....	29
5.3.4.2	Wie wähle und aktiviere ich die Tastatursprachen, die in TD Talk verwendet werden/verfügbar sein sollen?.....	30
5.3.4.3	Wie schalte ich das akustische Tipp-Feedback in TD Talk ein/aus?.....	30
5.4	Gespräche	31
5.4.1	Themen	32
5.4.1.1	Wie kann ich ein neues Thema in TD Talk erstellen?	32
5.4.1.2	Wie kann ich den Namen eines Themas in TD Talk ändern?	32
5.4.1.3	Wie kann ich ein Thema in TD Talk auf privat setzen?	33
5.4.1.4	Wie kann ich die aktiven Themen in TD Talk auswählen?.....	33
5.4.1.5	Wie kann ich ein Thema in TD Talk löschen?	34
5.4.1.6	Wie kann ich in TD Talk die Schnellen Aussagen bearbeiten?	35
5.4.1.7	Wie kann ich in TD Talk Schnelle Aussagen hinzufügen?	35
5.4.1.8	Wie kann ich in TD Talk eine Schnelle Aussage löschen?	36
5.4.2	Abkürzungserweiterung	37
5.4.2.1	Wie kann ich eine Abkürzungserweiterung in TD Talk hinzufügen?	37
5.4.2.2	Wie kann ich eine Abkürzungserweiterung in TD Talk bearbeiten?	38
5.4.2.3	Wie kann ich eine Abkürzungserweiterung in TD Talk löschen?	38
5.5	Stimme	39
5.5.1	Stimmen.....	40
5.5.1.1	Installierte und herunterladbare Stimmen	40
5.5.1.1.1	Wie kann ich eine neue Stimme in TD Talk herunterladen?	40
5.5.1.1.2	Wie wähle ich meine Stimme in TD Talk aus?	41
5.5.1.1.3	Wie kann ich einen Filter auf die verfügbaren Stimmen in TD Talk anwenden?	42
5.5.1.2	Stimmen-Konfiguration.....	42

	5.5.1.2.1	Wie ändere ich meine Stimme in TD Talk?	42
	5.5.1.3	Aussprachen	44
	5.5.1.3.1	Wie kann ich Ausspracheausnahmen in TD Talk erstellen?	44
5.5.2		Voice Banking Konten.....	45
	5.5.2.1	Voice-Banking-Konten.....	45
	5.5.2.1.1	Wie kann ich meine Stimme über meinen Voice-Banking-Anbieter nutzen?	45
5.6		Gerät	46
	5.6.1	Partnerfenster	47
	5.6.1.1	Wie aktiviere/deaktiviere ich das Partnerfenster in TD Talk?	47
	5.6.1.2	Wie stelle ich die Anzeigoptionen für das Partnerfenster in TD Talk um?.....	48
5.7		Allgemein	48
	5.7.1	Sprache der Anwendung.....	48
	5.7.1.1	Wie stelle ich meine Anwendungssprache in TD Talk ein?.....	48
	5.7.2	Schriftgröße.....	49
	5.7.2.1	Wie ändere ich die Textgröße in TD Talk?	49
	5.7.3	Feedback	49
	5.7.3.1	Wie übermittele ich in TD Talk Feedback an Tobii Dynavox?.....	49
	5.7.4	Dienstleistungsbedingungen und Datenschutzerklärung	50
	5.7.4.1	So öffnen Sie die Dienstleistungsbedingungen.....	50
	5.7.4.2	So öffnen Sie die Datenschutzerklärung	51
	5.7.5	Protokoll erstellen.....	51
	5.7.5.1	Wie kann ich Protokolle für TD Talk sammeln?	51

1 Willkommen

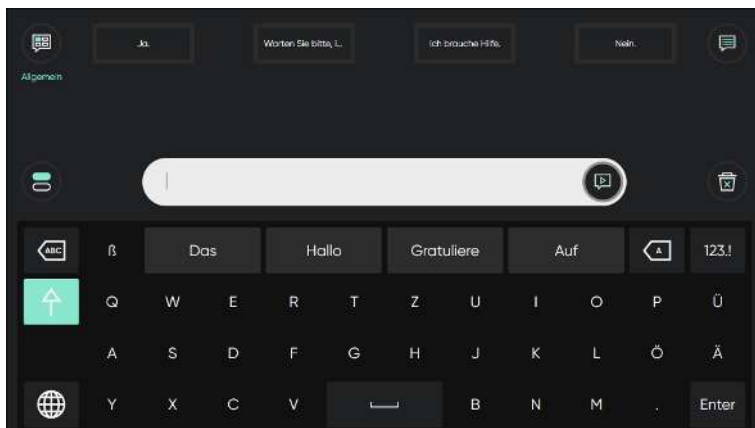


Abbildung 1: TD Talk

TD Talk befähigt die Menschen, auf möglichst fließende Art und Weise mitzuteilen, wer sie sind und was sie sagen wollen. Es soll den Satzbau so unkompliziert wie möglich gestalten. Mit TD Talk bleibt man aktiv am Gespräch beteiligt. TD Talk wirkt vertraut, so dass die Benutzer in kürzester Zeit mit dem Programm arbeiten können. Durch das Erlernen der einzigartigen Satzmuster und des Sprachgebrauchs einer Person passt sich TD Talk immer weiter an und bietet auf den Einzelnen zugeschnittene Gesprächsmöglichkeiten an.

1.1 Systemanforderungen

Tabelle 1: iOS

	Betriebssystem	Gerät	Speicher	Touch	Kamera
Minimum	iPadOS 15,1	iPad der 7. Generation	4 GB	Integrierte Touchfunktion	Integrierte Kamera
Empfohlen	iPadOS 15,1	iPad der 8. Generation	4 GB	Integrierte Touchfunktion	Integrierte Kamera

1.2 Unterstützte Sprachen

- Dänisch (DK)
- Niederländisch (NL)
- Englisch (USA)
- Französisch (FR)
- Deutsch (DE)
- Italienisch (IT)
- Norwegisch (NO)
- Spanisch (Lateinamerika)
- Schwedisch (SE)
- In Kürze folgen weitere Sprachen!

1.3 TD Suite beziehen

TD Talk ist für Windows-Geräte auf TobiiDynavox.com und für iPadOS im Apple App Store erhältlich.

2 Hilfe und Support

Tobii Dynavox stellt Ihnen zahlreiche kostenlose Hilfe zur Verfügung, die Ihre Nutzung von TD Talk unterstützen und ergänzen. Lassen Sie sich diese Tools nicht entgehen – nutzen Sie Ihre Software von Tobii Dynavox optimal!

2.1 Internet-Hilfe und Support

Falls Sie Hilfe brauchen, sollten Sie sich zuerst den Abschnitt "Lernen & Support" auf der Website von Tobii Dynavox ansehen.

2.2 Learning Hub



Das Learning Hub ist zurzeit leider nur in englischer Sprache verfügbar.

Auf tobiidynavox.com erhalten Sie Dokumentation, Schulung und andere Unterstützung, z. B.:

- Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Schulungsvideos (in Englisch)
- Aufzeichnungen von Webinaren (in Englisch)
- Online-Kurse

3 Erste Schritte

Bei Verwendung von TD Talk mit einer Augensteuerung ist zunächst eine Kalibrierung der Augensteuerung erforderlich.

- iPadOS — verwenden Sie die TD CoPilot-App zur Einstellung der Augensteuerung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch von TD Pilot.

3.1 Überblick über TD Talk

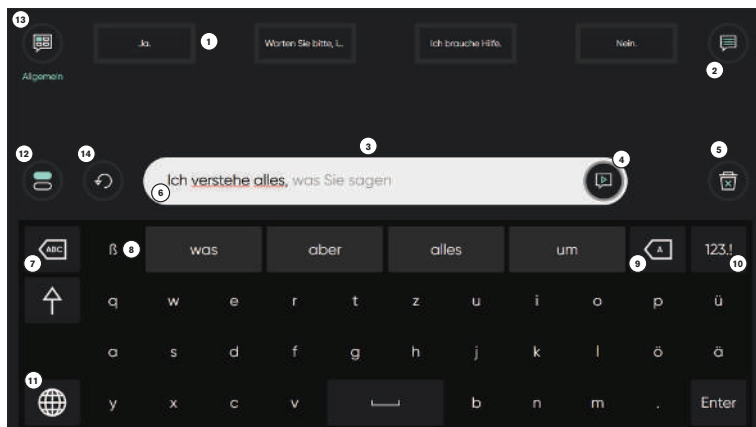


Abbildung 2: TD Talk

Position	Bezeichnung	Position	Bezeichnung
1	Schnelle Aussagen Vorformulierte Aussagen, die bei Auswahl sofort ausgesprochen werden	8	Wortvorhersage/Abkürzungserweiterung Automatische Vorhersage von Wörtern auf Grundlage Ihrer bisherigen Eingaben. Bei der Verwendung von Abkürzungserweiterungen wird das erste Wort durch die Erweiterung ersetzt.
2	Weitere schnelle Aussagen Rufen Sie alle Schnellen Aussagen zum aktuellen Thema auf.	9	Rücksetzen Das Zeichen links neben dem Textcursor löschen.
3	Mitteilungsfenster Den Text, den Sie sprechen möchten, können Sie hier anzeigen lassen und bearbeiten.	10	Zahlenseite Zugriff auf Zahlen und Sonderzeichen.
4	Sprechen Spricht den Text im Mitteilungsfenster aus. Es kann außerdem eine Sprechpause einlegt und anschließend weitergesprochen werden.	11	Sprache ändern Wechselt zwischen den Sprachen, die Sie sprechen.
5	Löschen Löscht den gesamten Text im Mitteilungsfenster.	12	Chat Wechseln Sie zu einem zweiten Mitteilungsfenster, um eine neue Aussage zu schreiben, ohne dass dabei der Text im ersten Mitteilungsfenster verloren geht.
6	Satzvorhersage TD Talk lernt aus Ihren Eingaben und verwendet diese Informationen, um Sätze vorherzusagen. Die Vorhersage beruht auf der Häufigkeit und ermöglicht u. U. eine schnellere und persönlichere Kommunikation.	13	Themen Organisieren Sie Ihre Schnellen Aussagen nach Thema. Wechseln Sie zu einem Thema, um diese Aussagen aufzurufen.

Position	Bezeichnung	Position	Bezeichnung
7	Wort löschen Das Wort links neben dem Textcursor löschen.	14	Rückgängig Die Aktionen im Mitteilungsfenster rückgängig machen.

3.2 Das Off-Screen-Menü

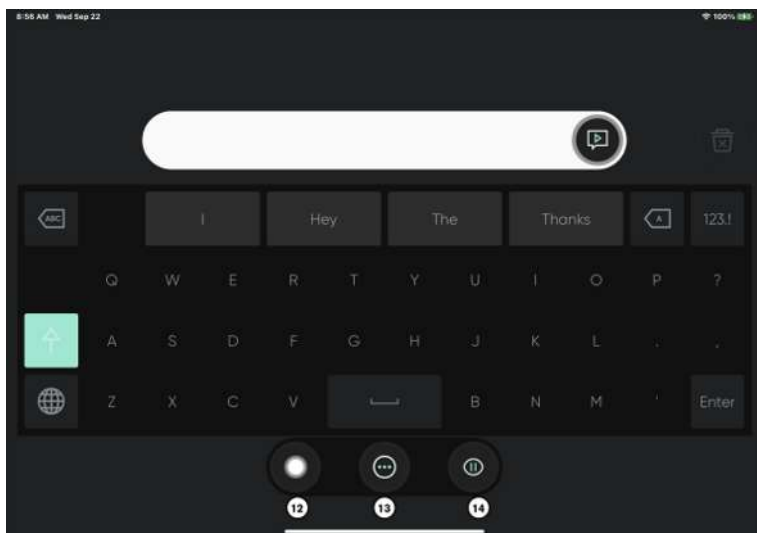


Abbildung 3: Off-Screen-Menü von TD Talk

Position	Bezeichnung	Position	Bezeichnung
14	AssistiveTouch AssistiveTouch einschalten. Nutzen Sie AssistiveTouch, um auf den Home-Bildschirm und alle anderen Anwendungen zuzugreifen.	16	Pausieren/Fortsetzen der Augensteuerung Umschalttaste zum vorübergehenden Pausieren und Fortsetzen der Augensteuerung.
15	Mehr Zugriff auf die Übersicht und die Einstellungen.	17	Transparenz-Modus Machen Sie die TD Talk-Oberfläche transparent und schalten Sie die rückseitige Kamera ein. In diesem Modus können Sie bei laufendem Betrieb von TD Talk sehen, was sich vor Ihrem Gerät befindet, z. B. Ihren Kommunikationspartner.

3.2.1 Wie greife ich auf das Off-Screen-Menü in TD Talk zu?

Es gibt zwei Wege, auf das Off-Screen-Menü von TD Talk zuzugreifen:

- **Als Benutzer:** Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.
- **Als Betreuer:** Vom Buchstaben **T** auf der TD Talk-Tastatur nach oben wischen.

3.3 Die Übersicht

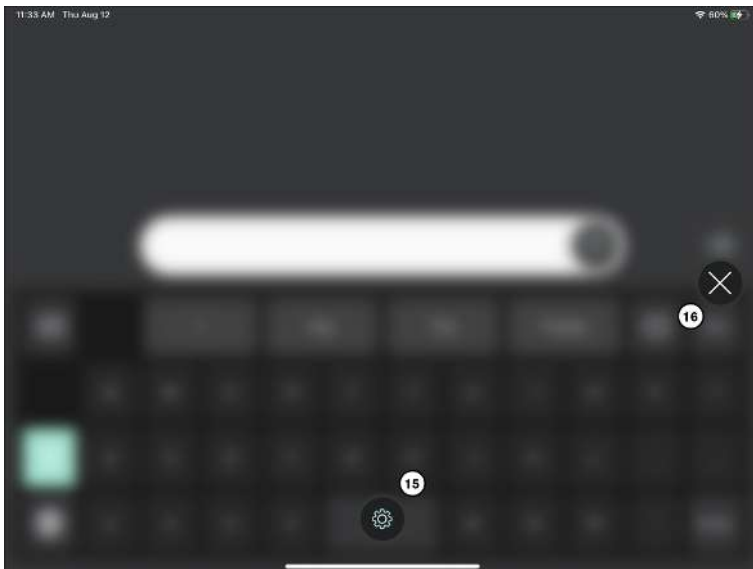


Abbildung 4: Übersicht von TD Talk

Position	Bezeichnung	Position	Bezeichnung
15	TD Talk-Einstellungen Weitere Informationen finden Sie unter 5 TD Talk-Einstellungen, Seite 20	16	Die Übersicht verlassen Wählen Sie das Feld aus, um die Übersicht zu verlassen.

3.3.1 Wie greife ich in TD Talk auf die Übersicht zu?

- Sie können auf die Einstellungen auf unterschiedliche Weise zugreifen:
 - **Als Benutzer:** Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.
 - **Als Betreuer:** Vom Buchstaben T auf der TD Talk-Tastatur nach oben wischen.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

- Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3.3.2 Wie verlasse und beende ich TD Talk?

- Sie können auf die Einstellungen auf unterschiedliche Weise zugreifen:
 - **Als Benutzer:** Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.
 - **Als Betreuer:** Vom Buchstaben T auf der TD Talk-Tastatur nach oben wischen.

Das Feld  (AssistiveTouch) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

- Wählen Sie das Feld  (AssistiveTouch) aus, um die AssistiveTouch-Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Feld  (Home) vom AssistiveTouch-Menü aus.

3.4 TD Talk einrichten



1. Wählen Sie die TD Talk-App auf dem Home-Bildschirm des iPadOS-Geräts aus.
2. Sie können auf die Einstellungen auf unterschiedliche Weise zugreifen:
 - **Als Benutzer:** Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.
 - **Als Betreuer:** Vom Buchstaben T auf der TD Talk-Tastatur nach oben wischen.



Das Feld (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.



3. Wählen Sie das Feld (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.



4. Wählen Sie die Aktion (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
5. Stellen Sie die Anwendungssprache von TD Talk ein:



- Wählen Sie rechts das Feld (Nächster Bildschirm) aus.



- Achten Sie auf das Symbol (Allgemein), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
- Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
- Richten Sie den Blick in den Bereich **Sprache der Anwendung**.
- Wählen Sie das Optionsfeld neben der Sprache aus, in der die Anwendung angezeigt werden soll.



- Betätigen Sie das Feld (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.

6. Wählen Sie die zu verwendende/n Stimme(n) aus:



- Achten Sie auf das Symbol (Stimme), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
- Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
- Richten Sie den Blick in den Bereich **Stimme/n**.
- Wählen Sie das Optionsfeld unter der installierten Sprache aus, die Sie sprechen möchten.



Falls die gewünschte Sprache fehlen sollte, finden Sie weitere Informationen unter *5.3.4.1 Wie kann ich in TD Talk eine neue Sprache oder eine neue Tastatursprache hinzufügen/herunterladen?*, Seite 29 und *5.3.4.2 Wie wähle und aktiviere ich die Tastatursprachen, die in TD Talk verwendet werden/verfügbar sein sollen?*, Seite 30.

- Wählen Sie das Optionsfeld neben der zu verwendenden Stimme in der Liste der für die zu sprechende Sprache verfügbaren Stimmen aus.

Benutzen Sie die Tasten „Nach oben scrollen“ und „Nach unten scrollen“ auf der rechten Seite, um durch die Liste der für die Sprache verfügbaren Stimmen zu scrollen.



Wählen Sie das neben der Stimme, um eine Stimme auszuprobieren. Falls vorhanden.



Sollte anstelle eines Optionsfeldes ein (Download) vorhanden sein, wählen Sie das Feld aus, um die Stimme herunterzuladen.

- Wiederholen Sie die letzten beiden oben genannten Schritte, falls Sie in mehr als einer Sprache sprechen möchten.



7. Betätigen Sie das Feld (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.



Mit dem -Feld in der unteren linken Ecke der Tastatur können Sie in TD Talk schnell zwischen den ausgewählten Sprachen wechseln.

4 TD Talk nutzen

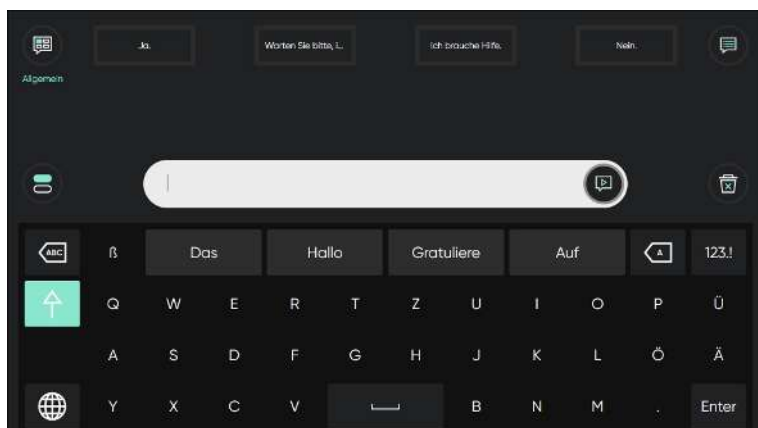


Abbildung 5: TD Talk

4.1 Verwendung der Tastatur

Durch Auswahl von Buchstaben auf der Tastatur entstehen ganze Wörter und Sätze im Nachrichtenfenster. Wählen Sie


das Feld  (Sprechen) aus, sobald Sie bereit sind zu sprechen.

4.2 Verwendung von Vorhersagen

TD Talk ermöglicht sowohl eine Wort- als auch eine Satzvorhersage. Das kann den Aufwand verringern und/oder die Geschwindigkeit der Aussagenerstellung erhöhen.

4.2.1 Wortvorhersagen

TD Talk verwendet die Wortvorhersage von SwiftKey™, die häufig in Tablets und Smartphones zur Anwendung kommt. SwiftKey™ nutzt eine Mischung verschiedener Technologien künstlicher Intelligenz und kann so das folgende Wort vorhersagen, welches der Benutzer eingeben möchte. SwiftKey™ lernt aus früheren Texten, die ein Benutzer verfasst hat und bietet oder präsentiert Vorhersagen anhand von der aktuellen Eingabe und dem bereits Gelernten. Die Sprache der Wortvorhersage ändert sich je nach eingestellter Tastatursprache.

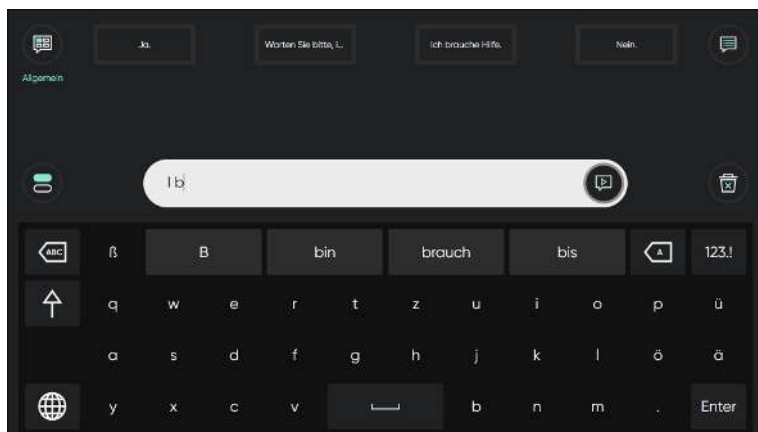


Wenn Sie die Wortvorhersage verwenden, erscheinen über der Tastatur vier (4) Kästen. Im Kasten ganz links wird das vorhergesagte Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit angezeigt, die anderen drei (3) Kästen enthalten jeweils ein anderes vorhergesagtes Wort. Wählen Sie den Kasten mit dem richtigen Wort aus, um einen Wortvorschlag auszuwählen. Falls Sie das gesuchte Wort nicht finden, tippen Sie einfach weiter, es könnte dann nach dem/n folgenden getippten Buchstaben angezeigt werden.

Falls Sie mit Wortvorhersage arbeiten und ein Wort mit einem Akzentzeichen eingeben wollen (z. B. Café), dann können Sie oft Zeit und Mühe sparen, indem Sie die Wortvorhersage das Akzentzeichen setzen lassen. Sie geben einfach nur „Cafe“ , ein, dann erhalten Sie einen Vorschlag für „Café“.

4.2.2 Satzvorschage

TD Talk lernt und analysiert im Laufe der Zeit die Art und Weise, wie Sie sprechen. Die Wortvorhersage lernt die Wörter, die Sie sprechen. Die Satzvorschage lernt, wie Sie diese Wörter zu einem persönlichen Satz zusammensetzen. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, werden die vorhergesagten Sätze im Nachrichtenfenster in grauer Schrift angezeigt.

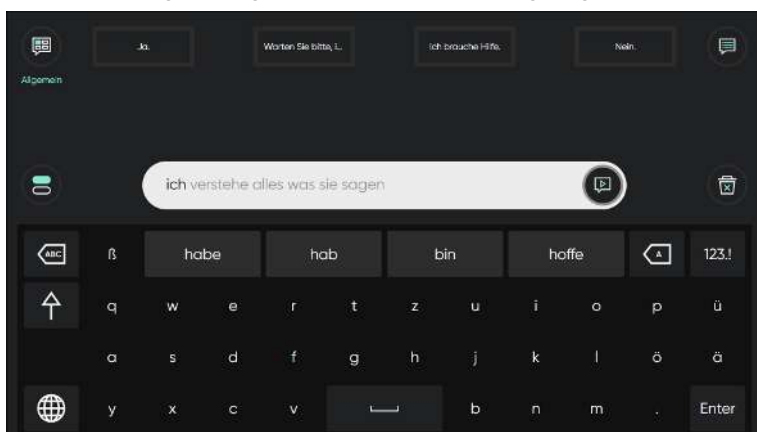

Schauen Sie hin und fixieren Sie den Blick auf das letzte Wort des vorhergesagten Satzes, damit dieser ausgewählt wird. Die Farbe des Satzes ändert sich von grau zu schwarz und weist darauf hin, dass er ausgewählt wurde. Er kann nun gesprochen oder bearbeitet werden.

4.3 Mitteilung bearbeiten

4.3.1 Wie bearbeite ich in TD Talk eine Mitteilung?

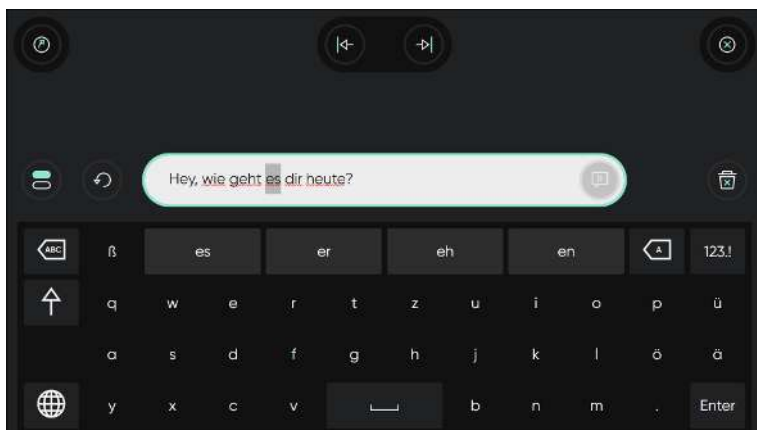


Abbildung 6: Das Bearbeitungs Menü

1. Blicken Sie auf den Text im Mitteilungsfenster, damit Sie ihn dort bearbeiten können.
Das Menü „Bearbeiten“ wird geöffnet.
2. Wenn ein Wort ausgewählt ist, tippen Sie es zum Ersetzen an, wählen Sie ein Wort aus der Wortvorhersage oder „Löschen“.

Benutzen Sie die Pfeile  (Nach links) und  (Nach rechts), wenn sich der Cursor an der falschen Stelle befindet.

3. Wählen Sie das Feld  (Schließen) aus, um den Modus „Bearbeiten“ zu verlassen.

4.4 Kopieren und Einfügen

4.4.1 Wie verwende ich „Kopieren“ in TD Talk?

 Die Funktion „Kopieren“ in TD Talk kopiert das gesamte Mitteilungsfenster.

1. Blicken Sie auf den Text im Mitteilungsfenster, damit Sie ihn dort bearbeiten können.
Das Menü „Bearbeiten“ wird geöffnet.

Wählen Sie das Feld  (Kopieren) aus.

4.4.2 Wie verwende ich „Einfügen“ in TD Talk?

1. Blicken Sie auf das leere Mitteilungsfenster.
Das Menü „Kopieren“ wird geöffnet.

Wählen Sie das Feld  (Einfügen) aus.
Die Mitteilung erscheint im Mitteilungsfenster.

 Sie können Text aus einer beliebigen Software auf Ihrem Gerät kopieren und einfügen.

 Unter iOS wird beim Einfügen zwischen verschiedenen Anwendungen ein Pop-up-Fenster von Apple geöffnet. Das können Sie entweder einzeln mit Assistive Touch bestätigen ODER die Apple-Einstellungen ändern und diese Funktion immer zulassen. TD Talk fragt Sie, ob Sie diese Einstellung aufrufen möchten.

4.5 Die Verwendung von Schnellen Aussagen

4.5.1 Wie kann ich in TD Talk „Schnelle Aussagen“ einsetzen?

Es gibt zwei (2) Arten von Schnellen Aussagen, die ersten sind immer auf dem Home-Bildschirm sichtbar. Die zweiten


sind unter dem Feld  (Weitere Schnelle Aussagen) vorzufinden.

Schnelle Aussagen auf dem Home-Bildschirm

1. Wählen Sie **Schnelle Aussagen** aus, um zu sprechen.
Die ausgewählte Mitteilung wird direkt gesprochen, ohne dass sie dem Mitteilungsfenster hinzugefügt wird und eine bereits in Bearbeitung befindliche Mitteilung dazwischenkommt.

Weitere schnelle Aussagen


1. Wählen Sie das Feld  (Weitere Schnelle Aussagen) aus.

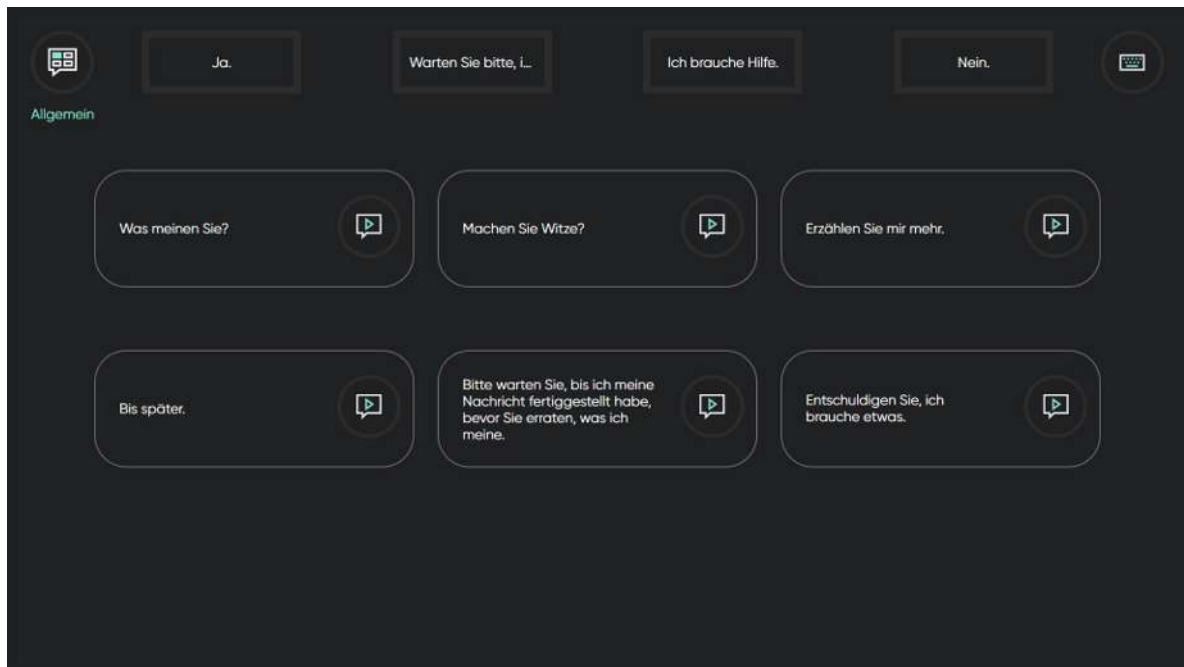

2. Wählen Sie das Feld  (Sprechen) neben der Mitteilung aus.
3. Wählen Sie das Feld  (Tastatur) aus, um zurück zum Home-Bildschirm zu gelangen.

4.5.2 Wie ändere ich das Thema für Schnelle Aussagen?

1. Wählen Sie das Feld  (Themenmenü) aus.
2. Wählen Sie das neue Thema aus.

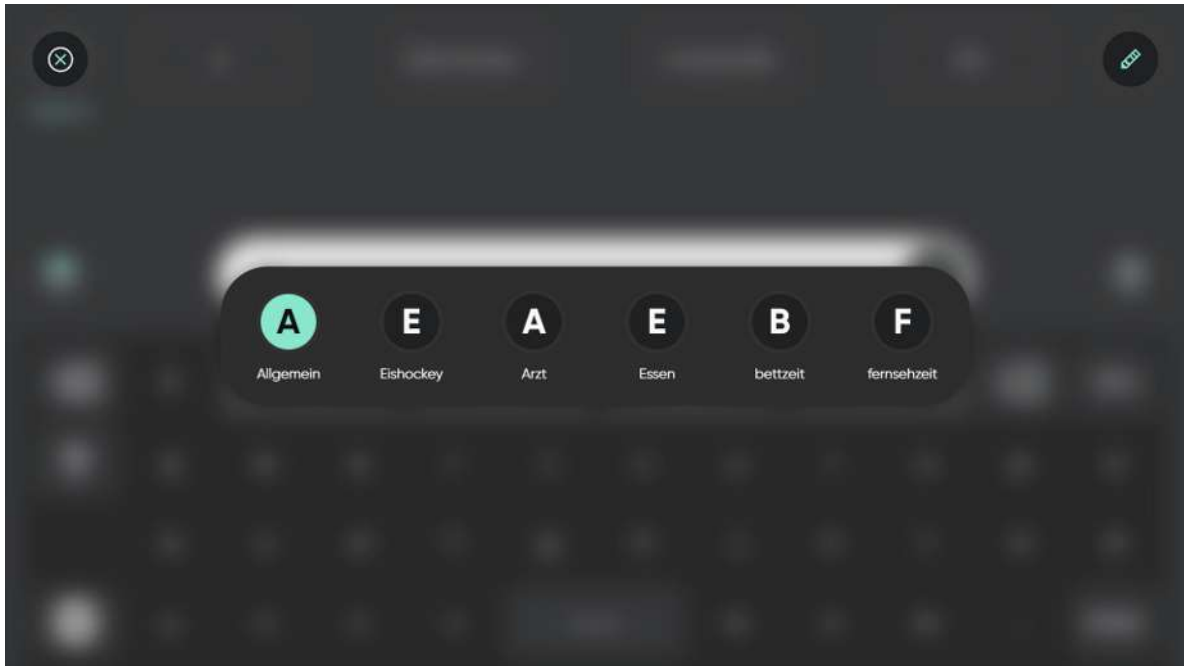

Wählen Sie das Feld  (Bearbeiten) aus, um die angezeigten/verfügbaren Themen zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter *5.4.1 Themen, Seite 32*.

4.6 Ändern der Sprache

4.6.1 Wie kann ich in TD Talk die Sprache wechseln?


1. Wählen Sie das Feld  (Sprache) auf der Tastatur aus.
2. Wählen Sie die Sprache aus, die gesprochen werden soll
Falls die gewünschte Sprache fehlt, finden Sie weitere Informationen unter *5.3.4.1 Wie kann ich in TD Talk eine neue Sprache oder eine neue Tastatursprache hinzufügen/herunterladen?, Seite 29*
3. Wählen Sie das Feld  (Zurück) aus, um zurückzukehren.

4.7 Chat

Wählen Sie das Symbol  (Chat) aus, um zu einem zweiten Mitteilungsfenster zu wechseln und eine neue Aussage zu schreiben, ohne dass dabei der Text im ersten Mitteilungsfenster verloren geht.

Wählen Sie das Symbol  (Zurück zum Chat) aus, um zum ersten Mitteilungsfenster zurückzukehren.

4.8 Transparenz-Modus

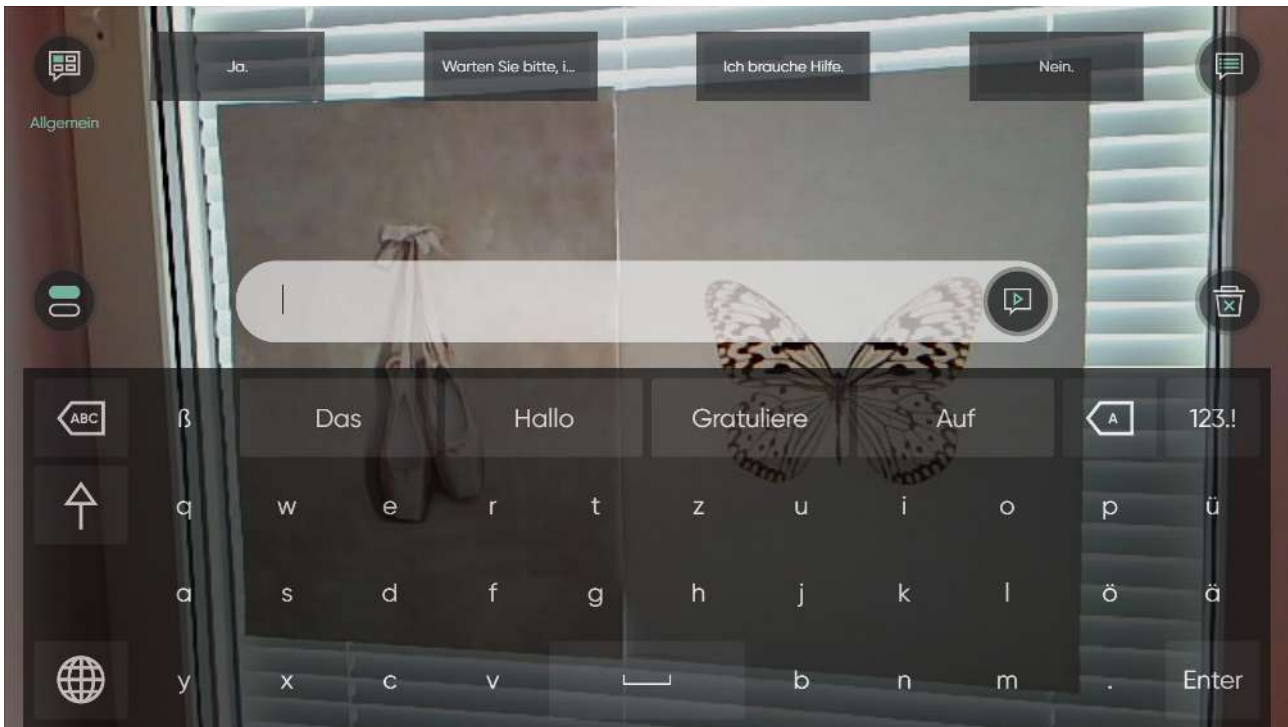

Machen Sie die TD Talk-Oberfläche transparent und schalten Sie die rückseitige Kamera ein. In diesem Modus können Sie bei laufendem Betrieb von TD Talk sehen, was sich vor Ihrem Gerät befindet, z. B. Ihren Kommunikationspartner.

4.8.1 So aktivieren Sie den Transparenz-Modus

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.
Das Off-Screen Menu erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.



2. Wählen Sie das Feld (Transparenz-Modus) aus.

4.8.2 So beenden Sie den Transparenz-Modus


1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.
Das Off-Screen Menu erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.



2. Wählen Sie das Feld (Transparenz-Modus beenden) aus.

4.9 Wie kann ich Abkürzungserweiterungen in TD Talk verwenden?

Bei der Eingabe einer bereits vorhandenen Abkürzung wird die erste Position der Wortvorhersagen in die Abkürzungserweiterung geändert.

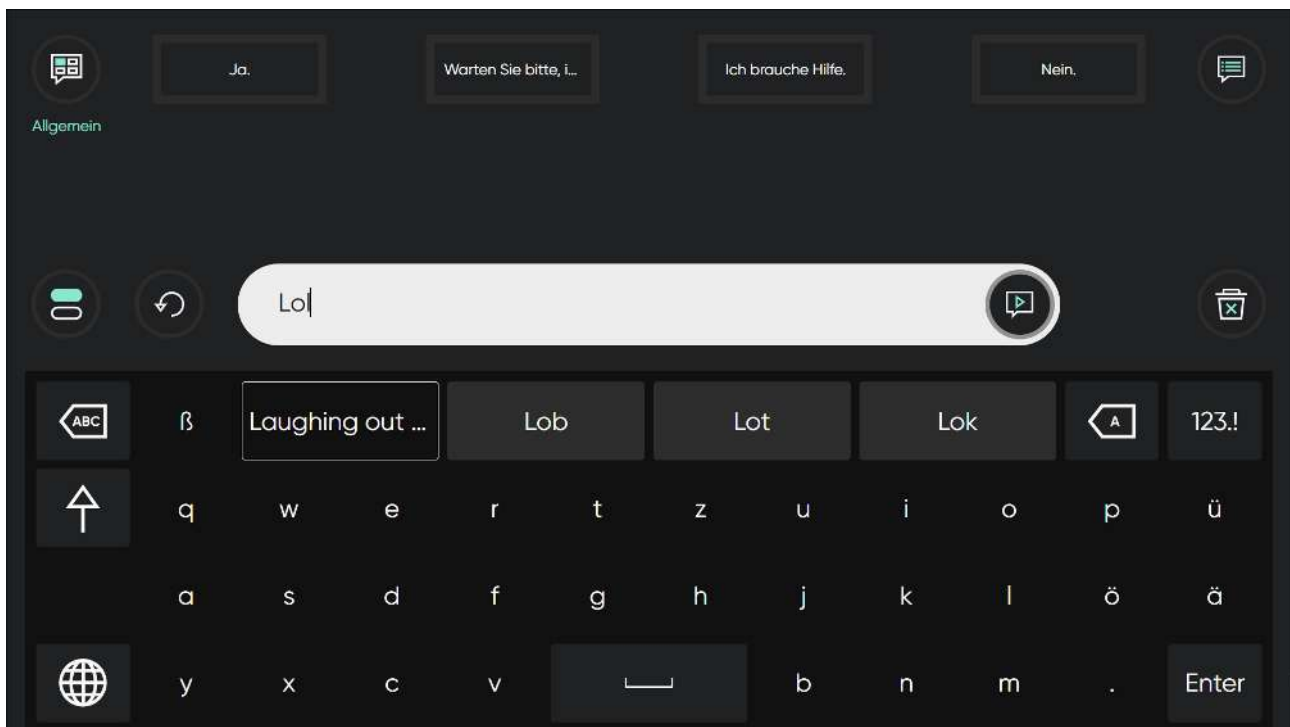


Wählen Sie die Abkürzungserweiterung im Bereich „Wortvorhersage“, um die Abkürzung in das Mitteilungsfenster zu übertragen.

Weitere Informationen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Abkürzungserweiterungen finden Sie unter [Abkürzungserweiterung](#).

4.10 Wie kann ich eine Aktion in TD Talk rückgängig machen?

Wählen Sie das Feld  (Rückgängig) neben dem Mitteilungsfenster. Darüber können Sie die Aktionen, die Sie seit Beginn der Eingabe im aktiven Mitteilungsfenster durchgeführt haben, nacheinander rückgängig zu machen.

5 TD Talk-Einstellungen

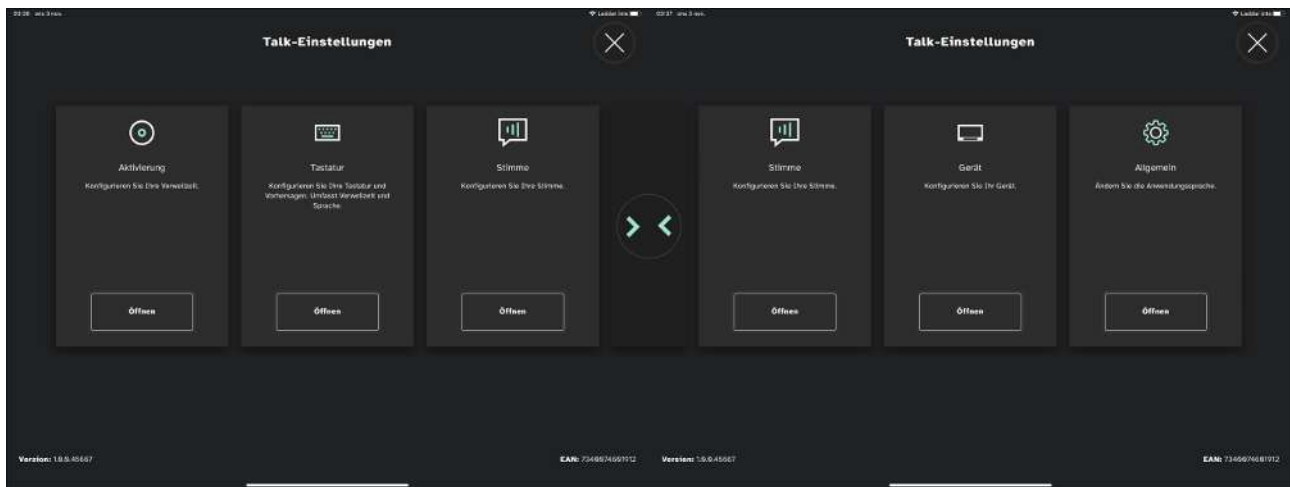

Symbole	Aktion	Bezeichnung
	Aktivierung	Nur möglich, wenn eine Augensteuerung installiert und aktiviert ist. Öffnet die Einstellungen für die Aktivierung . Weitere Informationen finden Sie unter <i>5.2 Aktivierung, Seite 22</i> .
	Tastatur	Öffnet die Einstellungen für die Tastatur . Weitere Informationen finden Sie unter <i>5.3 Tastatur, Seite 26</i> .
	Stimme	Öffnet die Einstellungen für die Stimme . Weitere Informationen finden Sie unter <i>5.5 Stimme, Seite 39</i> .
	Gerät	Öffnet die Geräteeinstellungen . Weitere Informationen finden Sie unter <i>5.6 Gerät, Seite 46</i> .
	Allgemein	Öffnet Allgemeine Einstellungen, Weitere Informationen finden Sie unter <i>5.7 Allgemein, Seite 48</i> .

5.1

Mein Konto



Mein Konto

Kontodaten

Vorname	Nachname	Land	E-Mail
Ammar	Elyas	US	ammam.elyas@tobiidynavox.com

Backup von Daten erstellen

Erstellen Sie ein Backup Ihrer letzten Wortvorhersagen, Aussprachen, Satzvorschläge, Themen und schnellen Aussagen.
Eine Datensicherung ist bei einem Gerätewechsel ausgesprochen hilfreich.

Letztes Backup:
2024-2-23 12:23
TD I-16

Sicherung

Daten wiederherstellen

Stellen Sie Ihre letzten Wortvorhersagen, Aussprachen, Satzvorschläge, Themen und schnellen Aussagen wieder her.
Das ist hilfreich, wenn Sie das Gerät gewechselt haben und Ihre Daten auf dem neuen Gerät benötigen.

Letzte Wiederherstellung:
2024-3-22 12:36

Wiederherstellen

Ausloggen

Melden Sie sich bei Ihrem myTobiiDynavox Account an, um Ihre persönlichen Wortvorhersagen, Aussprachen, Satzvorschläge, Themen und Schnellen Aussagen zwischen Ihren Geräten über Sichern und Wiederherstellen auszutauschen.

5.1.1 Was ist ein myTobiiDynavox-Konto?

myTobiiDynavox Account ist eine Online-Plattform von Tobii Dynavox, einem auf technische Hilfsmittel für Menschen mit Kommunikations- und Mobilitätsschwierigkeiten spezialisierten Unternehmen. myTobiiDynavox Account gewährt Zugriff auf verschiedene Ressourcen wie personalisierte Datensicherungen und -wiederherstellungen, Software-Updates, Hilfsdokumente, Benutzerforen und Online-Schulungen. Sie dient auch als zentraler Knotenpunkt für die Verwaltung von Geräteeinstellungen, die Erstellung und Freigabe von Kommunikationstafeln sowie den Zugang zu zusätzlichen Funktionen, die auf die Bedürfnisse von Personen zugeschnitten sind, die Geräte von Tobii Dynavox verwenden. Im Großen und Ganzen ist es eine zentrale Plattform für Benutzer, die dort ihre technischen Hilfsmittel verwalten und Unterstützung in der Tobii Dynavox Community finden können.

5.1.2 Wie erstelle ich ein myTobiiDynavox-Konto?

Gehen Sie zu [Ein myTobiiDynavox-Konto erstellen](#), um ein myTobiiDynavox-Konto zu erstellen.

5.1.3 Wie kann ich meine personalisierten Daten sichern?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.



2. Wählen Sie das Feld (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie das auf Symbol  (Einloggen) in der oberen linken Ecke des Bildschirms.
5. Geben Sie Ihren Benutzernamen über die Tastatur in das Feld **Benutzername** ein.
6. Geben Sie Ihr Passwort über die Tastatur in das Feld **Passwort** ein.
7. Betätigen Sie das Feld **Einloggen**.
8. Wählen Sie das Feld **Sicherung** aus.
Nach dem Sichern werden das Sicherungsdatum und das gesicherte Gerät links neben dem Feld "Sicherung" angezeigt.
9. Betätigen Sie zum Beenden das Feld  (Schließen).


5.1.4 Wie kann ich meine personalisierten Daten wiederherstellen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.
Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.
2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie das auf das Symbol  (Einloggen) in der oberen linken Ecke des Bildschirms.
5. Geben Sie Ihren Benutzernamen über die Tastatur in das Feld **Benutzername** ein.
6. Geben Sie Ihr Passwort über die Tastatur in das Feld **Passwort** ein.
7. Betätigen Sie das Feld **Einloggen**.
8. Wählen Sie das Feld **Wiederherstellen** aus.
Nach der Wiederherstellung wird das Wiederherstellungsdatum links neben dem Feld "Wiederherstellen" angezeigt.
9. Betätigen Sie zum Beenden das Feld  (Schließen).

5.2 Aktivierung



Nur möglich, wenn eine Augensteuerung installiert und aktiviert ist.

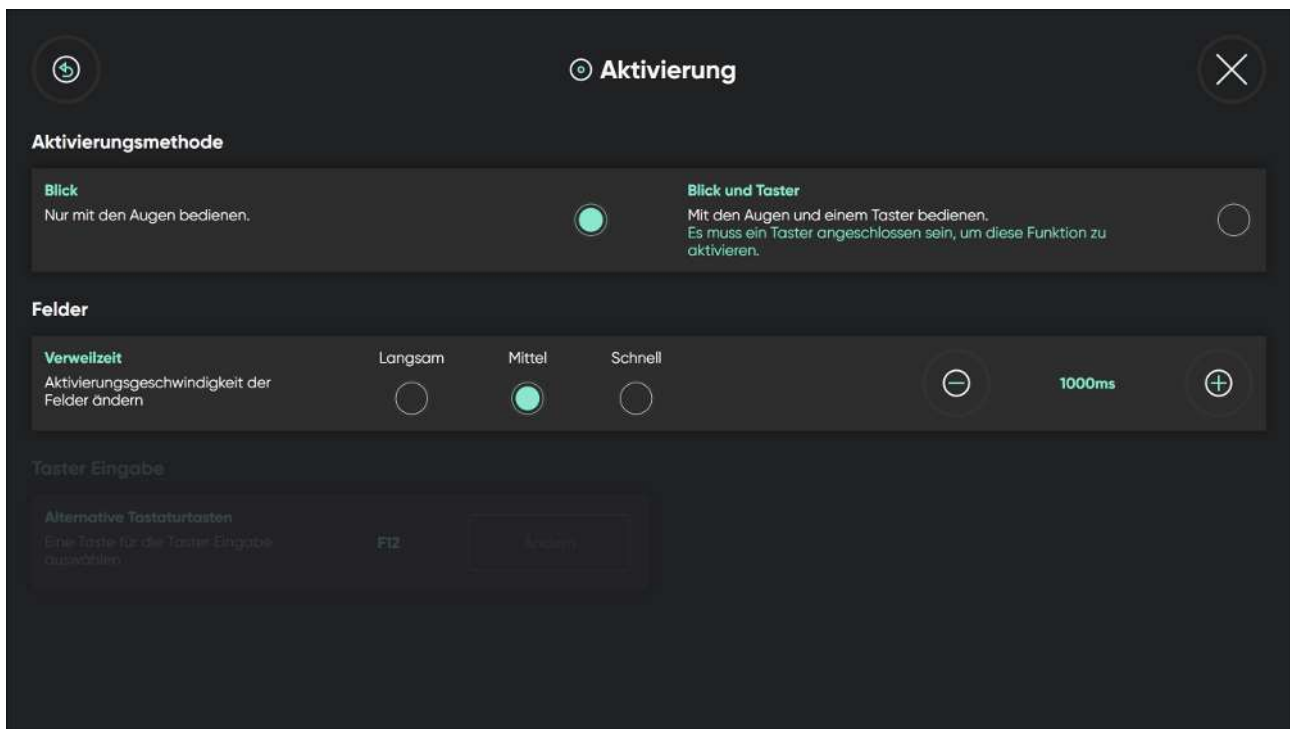

5.2.1 Aktivierungsmethode

5.2.1.1 Wie wähle ich die Aktivierungsmethode in TD Talk aus?



Die Auswahl der Aktivierungsmethode für die Aktivierung betrifft nicht die Aktivierung der Tastaturtasten, sondern alle anderen Aktivierungen in TD Talk.

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.



3. Wählen Sie die Aktion (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.



4. Achten Sie auf das Symbol (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.



5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Aktivierungsmethode**.
7. Wählen Sie das Optionsfeld für die zu verwendende **Aktivierungsmethode** aus den folgenden Werten aus:
 - **Gaze** – Nur mit den Augen bedienen (Standard)
 - Blick und Taster – Mit den Augen und einem Taster bedienen.



Um diese Einstellung einzuschalten, ist ein Taster erforderlich.

8. Betätigen Sie das Feld (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.



9. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.2.2 Felder

5.2.2.1 Wie kann ich in TD Talk die Verweilzeit für die Tastaturfelder ändern?



Mit „Felder“ sind nicht die Tasten auf der Tastatur gemeint, sondern die, die sich an allen anderen Stellen in TD Talk befinden.

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Achten Sie auf das Symbol  (Aktivierung), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Felder**.
7. Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder für die **Verweilzeit** aus:
– Langsam
– **Mittel** (Standardeinstellung)
– Schnell



8. Wählen Sie das Feld (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.

9. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.2.2.2 Wie kann ich die Verweilzeit für die Aktivierungsfelder in TD Talk genauer einstellen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Achten Sie auf das Symbol  (Aktivierung), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Felder**.
7. Wählen Sie eine der folgenden Felder zur Feineinstellung der **Verweilzeit** aus:



- — zur Reduzierung der Verweilzeit



— zur Erhöhung der Verweilzeit
Dieser Wert kann zwischen 200 ms - unendlich geändert werden.



8. Wählen Sie das Feld (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.



9. Betätigen Sie das Feld (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.2.3 Taster Eingabe

Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.



Wenn eine Taster Eingabe eingestellt ist, fungiert diese Tastaturtaste auch als Taster, wenn sie auf einer beliebigen angeschlossenen externen Tastatur ausgewählt wird.

5.2.3.1 Wie stelle ich eine Tastereingabe für meinen Taster in TD Talk ein?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.



2. Wählen Sie das Feld (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.



3. Wählen Sie die Aktion (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.



4. Achten Sie auf das Symbol (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.

5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Tasteeingabe**.

7. Betätigen Sie das Feld **Ändern**.

8. Wählen Sie das Optionsfeld für die Taste, die als **Tastereingabe** verwendet werden soll.

9. Wählen Sie das Feld **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder das Feld **Abbrechen**, um sie abzubrechen.





10. Betätigen Sie das Feld (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.



11. Betätigen Sie das Feld (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.3 Tastatur

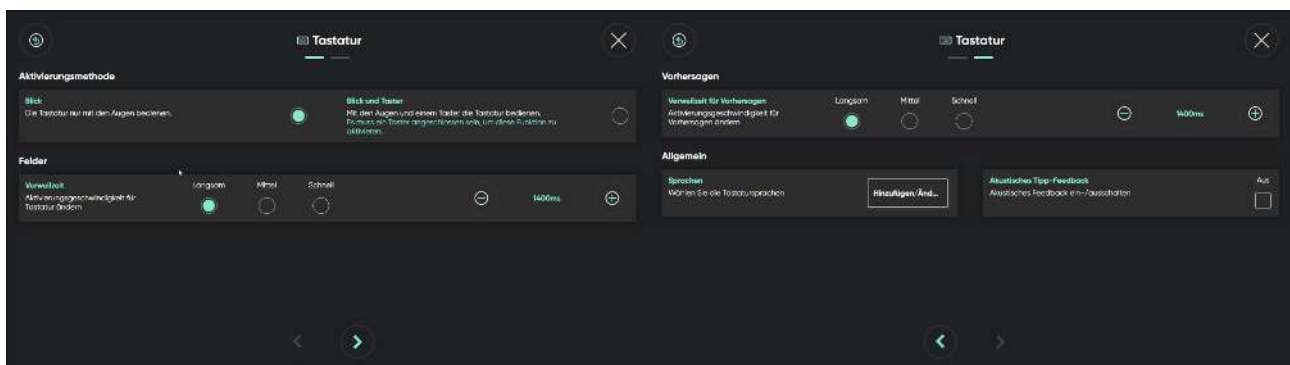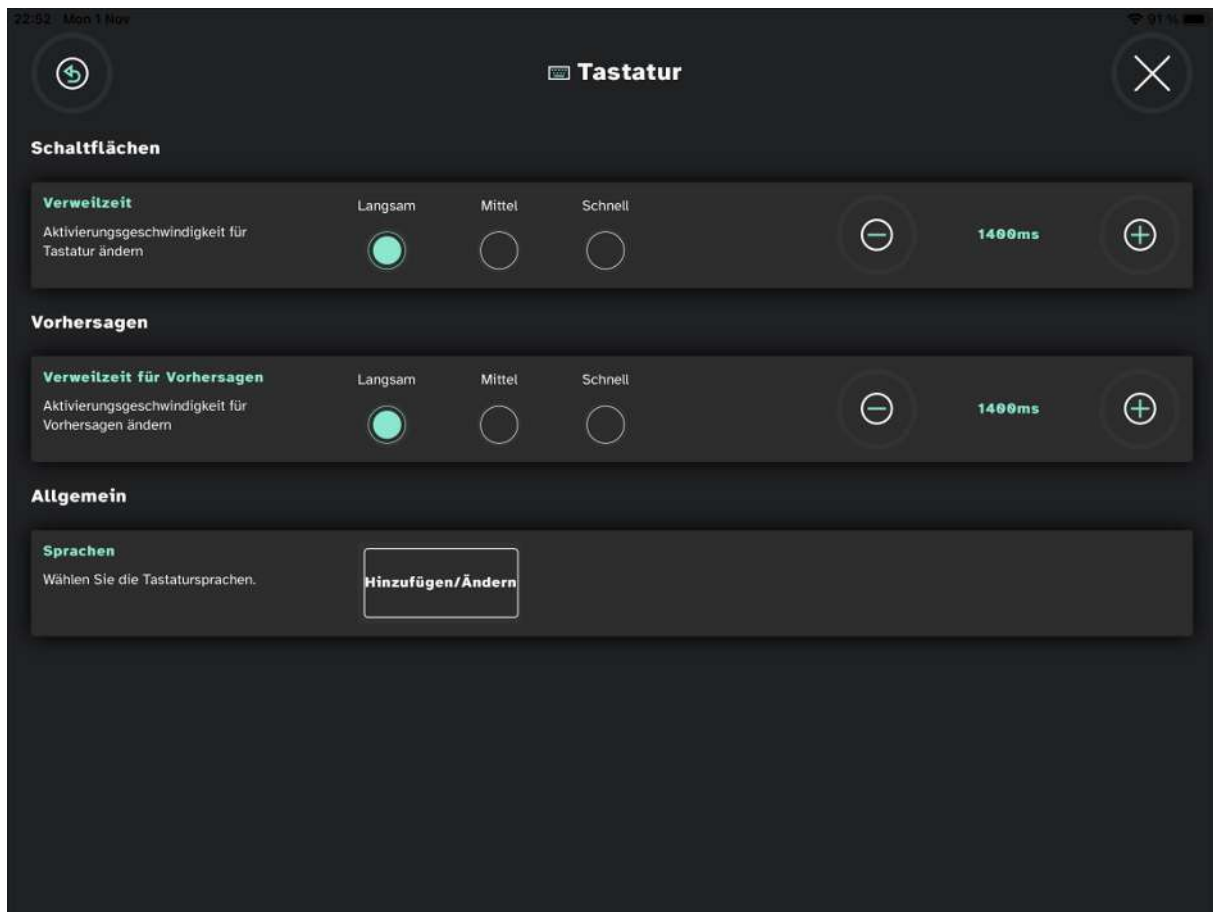

5.3.1 Aktivierungsmethode

5.3.1.1 Wie wähle ich die Aktivierungsmethode für die Tastatur in TD Talk aus?



Die Auswahl der Aktivierungsmethode für die Tastatur bezieht sich nur auf die Aktivierung von Tastaturfeldern in TD Talk.

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Tastatur), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Aktivierungsmethode**.
7. Wählen Sie das Optionsfeld für die zu verwendende **Aktivierungsmethode** aus den folgenden Werten aus:
 - **Gaze** – Nur mit den Augen bedienen (Standard)
 - Blick und Taster – Mit den Augen und einem Taster bedienen.

 Um diese Einstellung einzuschalten, ist ein Taster erforderlich.

8. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
9. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.3.2 Felder

5.3.2.1 Wie kann ich in TD Talk die Verweilzeit für die Tastaturfelder ändern?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Tastatur), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Felder**.
7. Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder für die **Verweilzeit** aus:
 - Langsam
 - **Mittel** (Standardeinstellung)
 - Schnell

8. Wählen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
9. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.3.2.2 Wie kann ich die Verweilzeit für die Aktivierungsfelder in TD Talk genauer einstellen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Tastatur), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Felder**.
7. Wählen Sie eine der folgenden Optionsfelder zur Feineinstellung der **Verweilzeit** aus:

–  — zur Reduzierung der Verweilzeit

–  — zur Erhöhung der Verweilzeit

Dieser Wert kann zwischen 200 ms - unendlich geändert werden.

8. Wählen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
9. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.3.3 Vorhersage

5.3.3.1 Wie kann ich in TD Talk die Verweilzeit für die Vorhersagefelder ändern?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Tastatur), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand das Feld  (Nächste Seite) aus.
7. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Vorhersagen**.
8. Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder für die **Verweilzeit** aus:
 - Langsam
 - **Medium** (Standard)
 - Schnell

9. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
10. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.3.3.2 Wie kann ich die Verweilzeit für die Vorhersagefelder in TD Talk genauer einstellen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Tastatur), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand das Feld  (Nächste Seite) aus.
7. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Vorhersagen**.
8. Wählen Sie eine der folgenden Optionsfelder zur Feineinstellung der **Verweilzeit** aus:

–  — zur Reduzierung der Verweilzeit

–  — zur Verlängerung der Verweilzeit

Dieser Wert kann zwischen 200 ms - unendlich geändert werden.

9. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
10. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.3.4 Allgemein

5.3.4.1 Wie kann ich in TD Talk eine neue Sprache oder eine neue Tastatursprache hinzufügen/herunterladen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Tastatur), um die richtige Einstellungskarte zu finden.

5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand das Feld  (Nächste Seite) aus.

7. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Allgemein**.

8. Wählen Sie das Feld „Hinzufügen/Ändern“ unter **Sprachen** aus.

9. Wählen Sie das Feld **Herunterladen** aus.

10. Wählen Sie das Feld  (Download) neben der Sprache aus, um den Download der neuen Tastatur anzustoßen.

11. Wählen Sie das Feld **Herunterladen** aus, um die Herunterladen zu starten, oder das Feld **Abbrechen**, um das Herunterladen abzubrechen.

12. Wählen Sie die Registerkarte **Installiert** aus.

13. Wählen Sie das Optionsfeld neben den zu aktivierenden Sprachen aus, um die Sprache zu aktivieren.

14. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.

15. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.3.4.2 Wie wähle und aktiviere ich die Tastatursprachen, die in TD Talk verwendet werden/verfügbar sein sollen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Achten Sie auf das Symbol  (Tastatur), um die richtige Einstellungskarte zu finden.

5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand das Feld  (Nächste Seite) aus.

7. Wählen Sie das Feld „Hinzufügen/Ändern“ unter **Sprachen** aus.

8. Wählen Sie die Registerkarte **Installiert** aus.

9. Wählen Sie das Optionsfeld neben den zu aktivierenden Sprachen aus, um die Tastatursprache für diese Sprachen zu aktivieren.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Optionsfelder für alle Sprachen auswählen, für die eine Stimme verfügbar sein soll.

10. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.

11. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.


5.3.4.3 Wie schalte ich das akustische Tipp-Feedback in TD Talk ein/aus?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.


Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Tastatur), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand das Feld  (Nächste Seite) aus.
7. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Allgemein**.
8. Schalten Sie das Feld **Ein/Aus** für „**Akustisches Tipp-Feedback**“ auf:
 - Ein
 - Aus
9. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
10. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.4 Gespräche

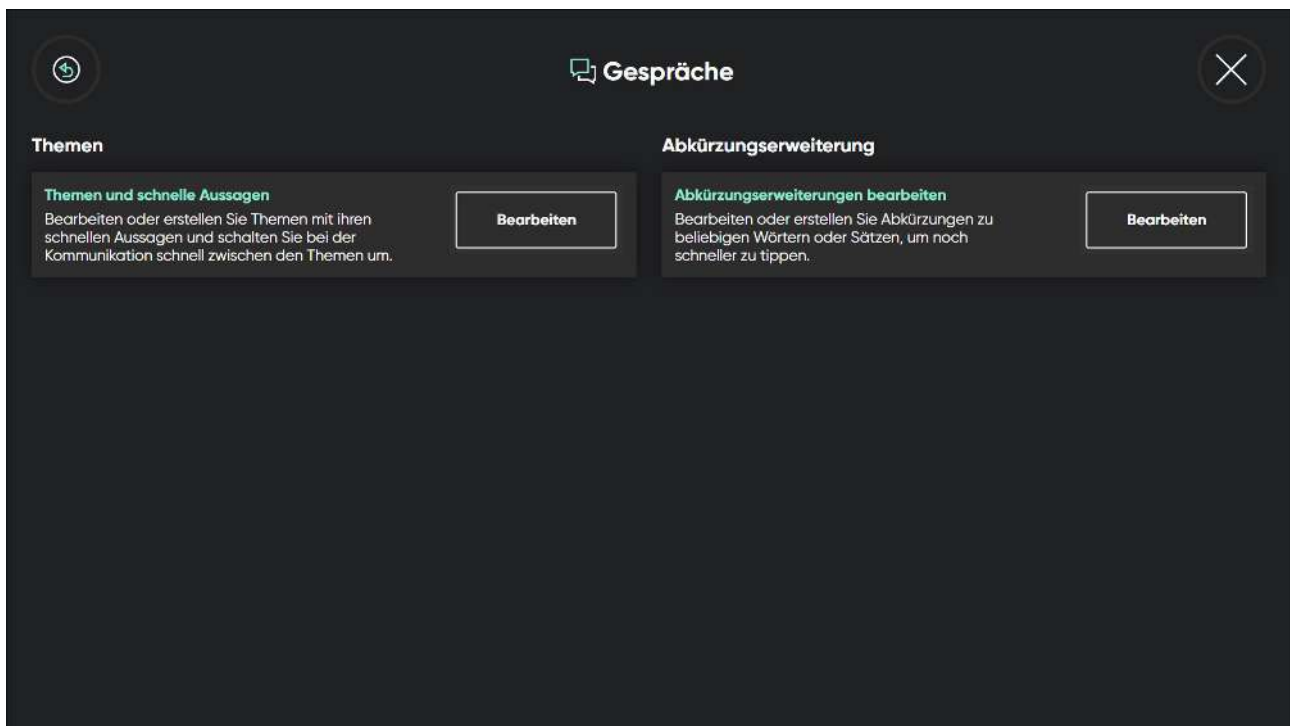

5.4.1 Themen

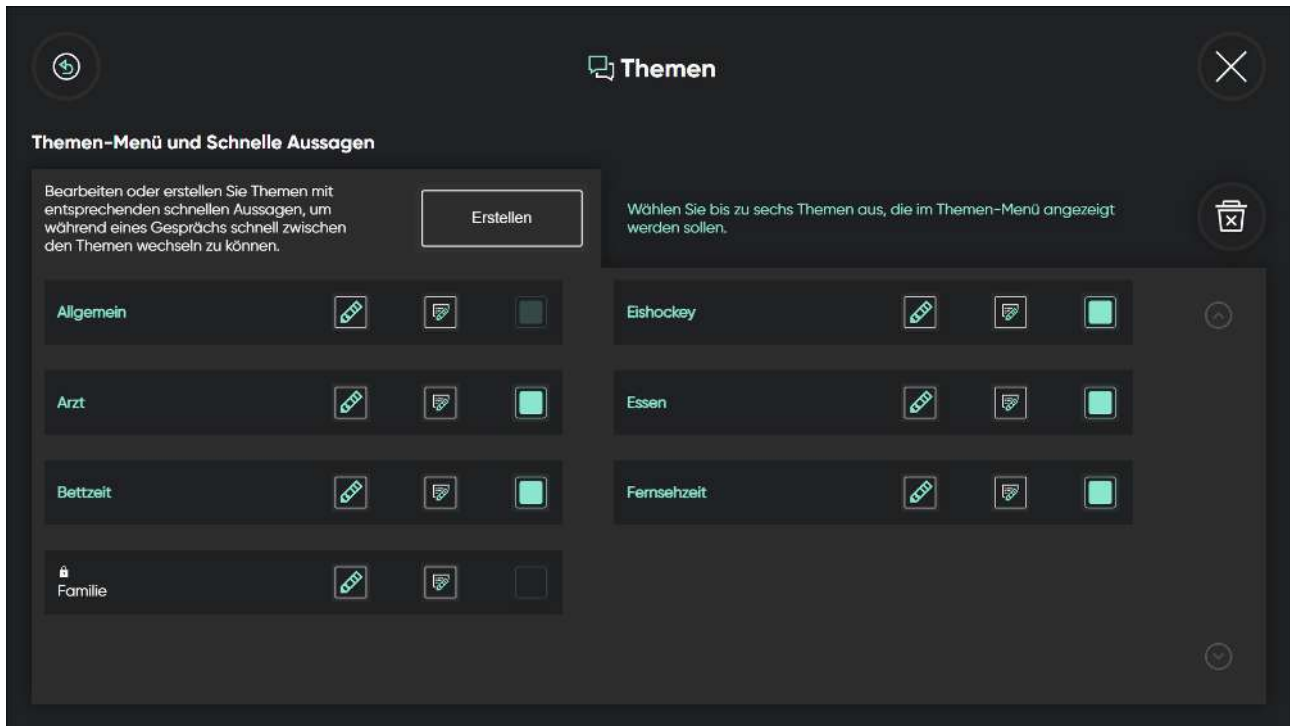

5.4.1.1 Wie kann ich ein neues Thema in TD Talk erstellen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.



3. Wählen Sie die Aktion (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.



4. Achten Sie auf das Symbol (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.



5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Betätigen Sie das Feld **Erstellen**.

7. Geben Sie einen Namen für das neue Thema über die Tastatur ein.



Wählen Sie das Kontrollkästchen des **Datenschutzmodus** aus, um die Satzvorhersage und das Lernen der Sätze zu deaktivieren.



8. Wählen Sie das Symbol (Speichern) zum Speichern aus.

9. Betätigen Sie zum Beenden das Feld (Schließen).



5.4.1.2 Wie kann ich den Namen eines Themas in TD Talk ändern?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie das Feld  (Bearbeiten) neben dem Namen des Themas aus.
7. Geben Sie einen veränderten Namen für das Thema über die Tastatur ein.



Wählen Sie das Kontrollkästchen des **Datenschutzmodus** aus, um die Satzvorhersage und das Lernen der Sätze zu deaktivieren.

8. Wählen Sie das Symbol  (Speichern) zum Speichern aus.
9. Betätigen Sie zum Beenden das Feld  (Schließen).

5.4.1.3 Wie kann ich ein Thema in TD Talk auf privat setzen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie das Feld  (Bearbeiten) neben dem Namen des Themas aus.
7. Wählen Sie das Kontrollkästchen des **Modus „Privatsphäre“** aus, um die Satzvorhersage und das Lernen der Sätze zu deaktivieren.
8. Wählen Sie das Symbol  (Speichern) zum Speichern aus.
9. Betätigen Sie zum Beenden das Feld  (Schließen).

5.4.1.4 Wie kann ich die aktiven Themen in TD Talk auswählen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Suchen Sie das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie unter "Themen" das Feld **Bearbeiten** für Themen und Schnelle Aussagen aus.
7. Wählen Sie das **Kontrollkästchen** für das Thema, das aktiv sein soll.



Es können bis zu sechs (6) Themen aus dem Themenmenü ausgewählt werden.

8. Wählen Sie das Feld  (Schließen) aus, um die Bearbeitungsansicht zu verlassen.
9. Wählen Sie das Feld  (Tastatur) aus, um zurück zum Home-Bildschirm zu gelangen.

5.4.1.5 Wie kann ich ein Thema in TD Talk löschen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Suchen Sie das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie unter "Themen" das Feld **Bearbeiten** für Themen und Schnelle Aussagen aus.
7. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche mit dem Symbol  (Löschen) aus.
8. Wählen Sie das Feld  (Löschen) neben dem Namen des Themas, das Sie löschen möchten.
9. Wählen Sie das Feld **Löschen**, um das Thema zu löschen oder das Feld **Abbrechen** zum Abbrechen.
10. Wählen Sie das Feld  (Fertig), wenn Sie den Löschvorgang abgeschlossen haben.
11. Wählen Sie das Feld  (Schließen) aus, um die Bearbeitungsansicht zu verlassen.
12. Wählen Sie das Feld  (Tastatur) aus, um zurück zum Home-Bildschirm zu gelangen.

5.4.1.6 Wie kann ich in TD Talk die Schnellen Aussagen bearbeiten?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Suchen Sie das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie unter "Themen" das Feld **Bearbeiten** für Themen und Schnelle Aussagen aus.
7. Wählen Sie das Feld  (Schnelle Aussagen bearbeiten) aus.
8. Wählen Sie zum Bearbeiten das Feld  (Bearbeiten) neben der Mitteilung aus.
9. Nehmen Sie mit der Tastatur die Änderungen an der Mitteilung vor.
10. Wählen Sie das Feld  (Speichern), um die Schnelle Aussage zu speichern.
11. Wählen Sie das Feld  (Schließen) aus, um die Bearbeitungsansicht zu verlassen.
12. Wählen Sie das Feld  (Tastatur) aus, um zurück zum Home-Bildschirm zu gelangen.

5.4.1.7 Wie kann ich in TD Talk Schnelle Aussagen hinzufügen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Suchen Sie das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie unter "Themen" das Feld **Bearbeiten** für Themen und Schnelle Aussagen aus.
7. Wählen Sie das Feld  (Schnelle Aussagen bearbeiten) aus.
8. Wählen Sie das Feld  (Hinzufügen) neben „Neu hinzufügen“ aus.
Sie können zu jedem Thema bis zu drei (3) Seiten mit Schnellen Aussagen anlegen.

Wechseln Sie mit den Feldern  und  zwischen den Seiten.

9. Geben Sie die neue Mitteilung über die Tastatur ein.

10. Wählen Sie das Feld  (Speichern), um die neue Schnelle Aussage zu speichern.

11. Wählen Sie das Feld  (Schließen) aus, um die Bearbeitungsansicht zu verlassen.

12. Wählen Sie das Feld  (Tastatur) aus, um zurück zum Home-Bildschirm zu gelangen.

5.4.1.8 Wie kann ich in TD Talk eine Schnelle Aussage löschen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Suchen Sie das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.

5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Wählen Sie unter "Themen" das Feld **Bearbeiten** für Themen und Schnelle Aussagen aus.

7. Wählen Sie das Feld  (Schnelle Aussagen bearbeiten) aus.

8. Wählen Sie zum Löschen das Feld  (Bearbeiten) neben der Mitteilung aus.


9. Wählen Sie das Feld  „Mitteilung löschen“ aus.

10. Wählen Sie das Feld  (Speichern), um die Schnelle Aussage zu speichern.

11. Wählen Sie das Feld  (Schließen) aus, um die Bearbeitungsansicht zu verlassen.

12. Wählen Sie das Feld  (Tastatur) aus, um zurück zum Home-Bildschirm zu gelangen.

5.4.2 Abkürzungserweiterung

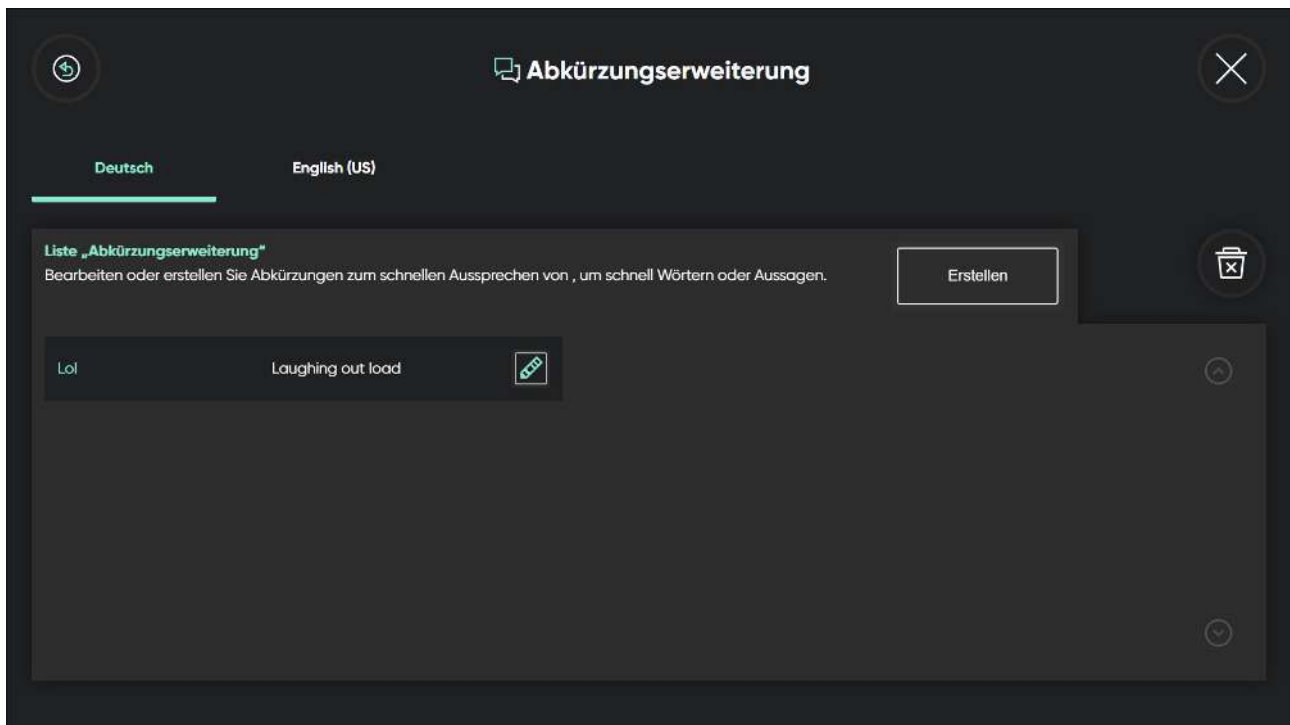

5.4.2.1 Wie kann ich eine Abkürzungserweiterung in TD Talk hinzufügen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Suchen Sie das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.

5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Wählen Sie im Bereich „Abkürzungserweiterungen bearbeiten“ das Feld **Bearbeiten** unter „Abkürzungserweiterungen“ aus.

7. Wählen Sie unter der installierten Sprache die **Sprache** aus, zu der Sie eine Abkürzungserweiterung hinzufügen möchten.

8. Betätigen Sie das Feld **Erstellen**.

9. Schreiben Sie die Abkürzung, die Sie erstellen möchten, in die **Abkürzung**-Textbox.

10. Wählen Sie das Symbol  neben der **Wort- oder Aussage**-Textbox aus.

11. Schreiben Sie das Wort oder die Aussage, für das/die Sie die Abkürzung erstellt haben, in die **Wort oder Aussage**-Textbox.

12. Wählen Sie das Feld  (Speichern), um die Änderungen an der Abkürzungserweiterung zu speichern.

13. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Gesprächseinstellungen zurückzukehren.
14. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
15. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.4.2.2 Wie kann ich eine Abkürzungserweiterung in TD Talk bearbeiten?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Suchen Sie das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie im Bereich „Abkürzungserweiterungen bearbeiten“ das Feld **Bearbeiten** unter „Abkürzungserweiterungen“ aus.
7. Wählen Sie unter der installierten Sprache die **Sprache** aus, bei der Sie eine Abkürzungserweiterung bearbeiten möchten.
8. Wählen Sie neben der Abkürzung, die Sie bearbeiten möchten das Symbol  aus.
9. Bearbeiten Sie die Abkürzung, die Sie bearbeiten möchten, in der **Abkürzung**-Textbox.
10. Wählen Sie das Symbol  neben der **Wort- oder Aussage**-Textbox aus.
11. Bearbeiten Sie das neue Wort oder die neue Aussage, für das/die Sie die Abkürzung erstellt haben, in der **Wort oder Aussage**-Textbox.

12. Wählen Sie das Feld  (Speichern), um die Änderungen an der Abkürzungserweiterung zu speichern.
13. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Gesprächseinstellungen zurückzukehren.
14. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
15. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.4.2.3 Wie kann ich eine Abkürzungserweiterung in TD Talk löschen?


1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Suchen Sie das Symbol  (Gespräche), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Wählen Sie im Bereich „Abkürzungserweiterungen bearbeiten“ das Feld **Bearbeiten** unter „Abkürzungserweiterungen“ aus.
7. Wählen Sie unter der installierten Sprache die **Sprache** aus, bei der Sie eine Abkürzungserweiterung löschen möchten.
8. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche mit dem Symbol  (Löschen) aus.
9. Wählen Sie das Feld  (Löschen) neben der Abkürzung aus, die Sie löschen möchten.
10. Betätigen Sie das Feld **Löschen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen, oder das Feld **Abbrechen**, um das Löschen der Abkürzung abzubrechen.
11. Wählen Sie das Feld  (Fertig), wenn Sie den Löschvorgang abgeschlossen haben.
12. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Gesprächseinstellungen zurückzukehren.
13. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
14. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.5 Stimme

Stellen Sie hier die Sprecherstimme Ihrer Tastatursprachen ein

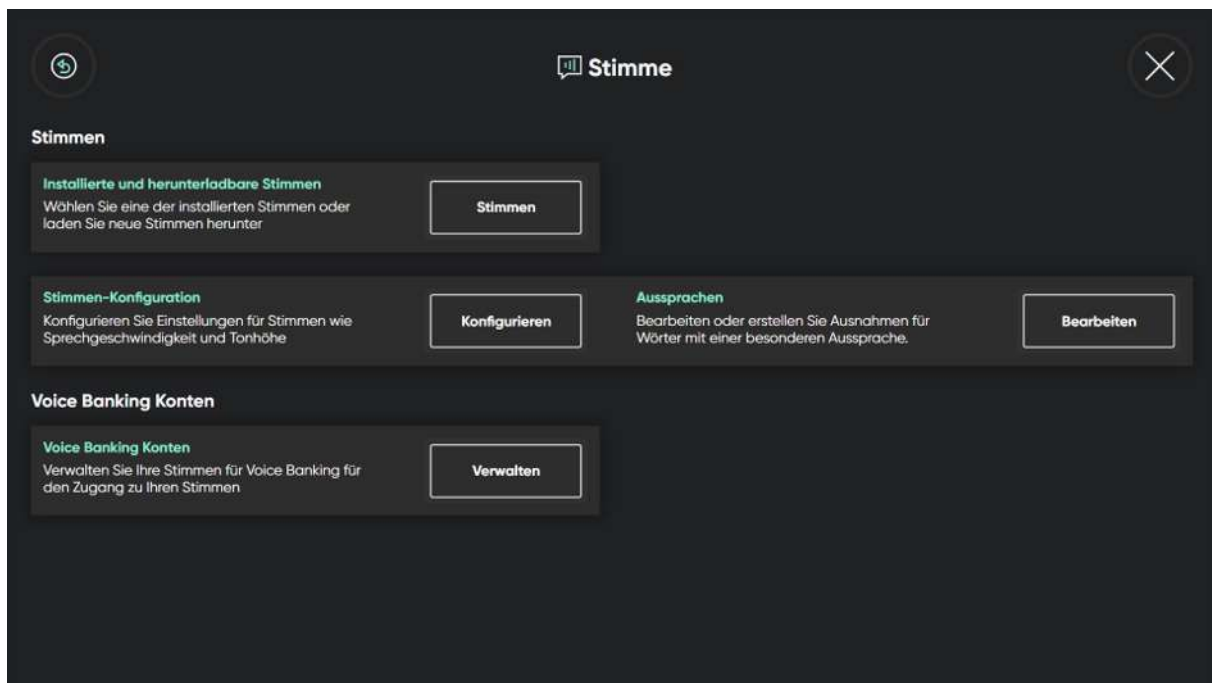

Im oberen Teil des Bildschirms werden alle installierten Sprachen angezeigt. Sobald die Sprache ausgewählt wurde, werden die verfügbaren Stimmen für diese Sprache in der Liste unter den Sprachen angezeigt. Um eine Stimme

auszuprobieren, wählen Sie das  neben der Stimme aus. Falls vorhanden.

5.5.1 Stimmen

5.5.1.1 Installierte und herunterladbare Stimmen

There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.

Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see [5.5.1.1.3 Wie kann ich einen Filter auf die verfügbaren Stimmen in TD Talk anwenden?](#), Seite 42

5.5.1.1.1 Wie kann ich eine neue Stimme in TD Talk herunterladen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Achten Sie auf das Symbol  (Stimme), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Stimmen**

7. Wählen Sie das Feld **Stimmen** unter „Installierte und herunterladbare Stimmen“ aus.

8. Wählen Sie das Feld **Herunterladen** aus.

9. Wählen Sie das Feld der **Sprache** unter den installierten Sprachen aus, die Sie sprechen möchten.



Falls die gewünschte Sprache fehlen sollte, finden Sie weitere Informationen unter 5.3.4.1 *Wie kann ich in TD Talk eine neue Sprache oder eine neue Tastatursprache hinzufügen/herunterladen?*, Seite 29 und 5.3.4.2 *Wie wähle und aktiviere ich die Tastatursprachen, die in TD Talk verwendet werden/verfügbar sein sollen?*, Seite 30.



10. Wählen Sie das Feld  (Download) neben der Stimme aus, um den Download der neuen Stimme anzustoßen. Benutzen Sie die Tasten „Nach oben scrollen“ und „Nach unten scrollen“ auf der rechten Seite, um durch die Liste der für die Sprache verfügbaren Stimmen zu scrollen.



Wählen Sie das  neben der Stimme, um eine Stimme auszuprobieren.

11. Wählen Sie das Feld **Herunterladen** aus, um die Herunterladen zu starten, oder das Feld **Abbrechen** , um das Herunterladen abzubrechen.



12. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Stimmeneinstellungen zurückzukehren.



13. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.



14. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.5.1.1.2 Wie wähle ich meine Stimme in TD Talk aus?



Die Stimmen der Voice-Banking-Anbieter sind jeweils mit Namen und Logo aufgeführt.

- Acapela MyOwnVoice 

- ModelTalker 

- The Voice Keeper 

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.



2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.



3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.



4. Achten Sie auf das Symbol  (Stimme), um die richtige Einstellungskarte zu finden.

5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Stimmen**

7. Wählen Sie das Feld **Stimmen** unter „Installierte und herunterladbare Stimmen“ aus.

8. Wählen Sie das Feld **Sprache** unter der installierten Sprache aus, die Sie sprechen möchten.



Falls die gewünschte Sprache fehlen sollte, finden Sie weitere Informationen unter 5.3.4.1 *Wie kann ich in TD Talk eine neue Sprache oder eine neue Tastatursprache hinzufügen/herunterladen?*, Seite 29 und 5.3.4.2 *Wie wähle und aktiviere ich die Tastatursprachen, die in TD Talk verwendet werden/verfügbar sein sollen?*, Seite 30.

9. Wählen Sie die zu verwendende Stimme in der Liste der für die zu sprechende Sprache verfügbaren Stimmen aus.

Benutzen Sie die Tasten „Nach oben scrollen“ und „Nach unten scrollen“ auf der rechten Seite, um durch die Liste der für die Sprache verfügbaren Stimmen zu scrollen.



Wählen Sie das  neben der Stimme, um eine Stimme auszuprobieren.

10. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Stimmeinstellungen zurückzukehren.

11. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.


12. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.5.1.1.3 Wie kann ich einen Filter auf die verfügbaren Stimmen in TD Talk anwenden?

On the **Installed** or **Download** tab, do the following:

1. Wählen Sie das Feld  (Filter).
2. Aktivieren Sie das/die Kontrollkästchen neben der/den Option(en), die Sie verwenden möchten.
Sie können wählen:
 - Geschlecht – Weiblich, Männlich
 - Alter – Kind, Jugendlicher und Erwachsener

5.5.1.2 Stimmen-Konfiguration

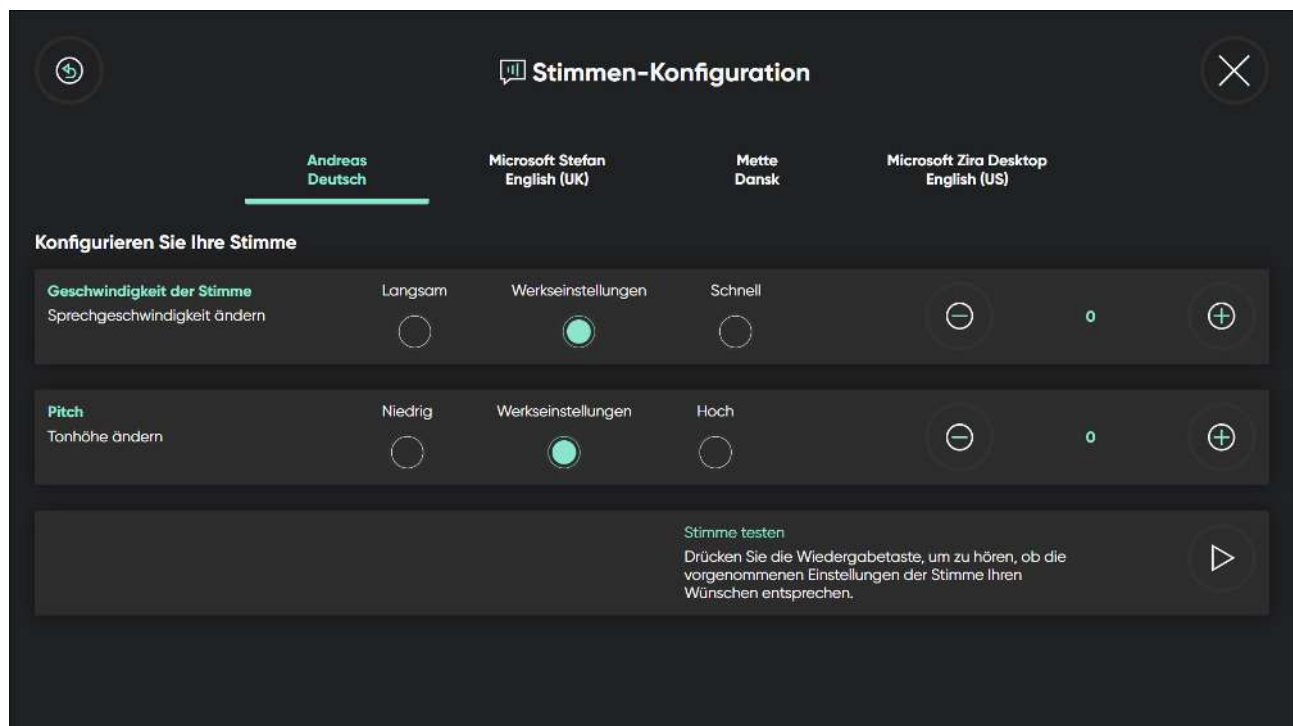

5.5.1.2.1 Wie ändere ich meine Stimme in TD Talk?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Achten Sie auf das Symbol  (Stimme), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Stimmen**.
7. Wählen Sie für die Stimmenkonfiguration das Feld **Konfigurieren** aus.
8. Wählen Sie aus den verfügbaren Stimmen die zu ändernde Stimme aus.
9. Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder unter **Sprechgeschwindigkeit** aus:
 - Langsam
 - **Werkseinstellungen**
 - Schnellum die Sprechgeschwindigkeit zu ändern
10. Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder zur Feineinstellung der **Sprechgeschwindigkeit** aus:

–  – zum Verringern der Sprechgeschwindigkeit

–  – zum Erhöhen der Sprechgeschwindigkeit

Dieser Wert kann zwischen -10 und +10 geändert werden.

11. Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder für die **Tonhöhe** aus:
 - Niedrig
 - **Werkseinstellungen**
 - Hochum die Tonhöhe Ihrer Stimme zu ändern.



Wählen Sie zum Anhören der neuen Stimme im Abschnitt „Stimme testen“ das  aus.

12. Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder zur Feineinstellung der **Tonhöhe** aus:

–  – zum Verringern der Tonhöhe

–  – zum Erhöhen der Tonhöhe


Dieser Wert kann zwischen -10 und +10 geändert werden.



Wählen Sie zum Anhören der neuen Stimme im Abschnitt „Stimme testen“ das  aus.

13. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Stimmeneinstellungen zurückzukehren.
14. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
15. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.5.1.3 Aussprachen

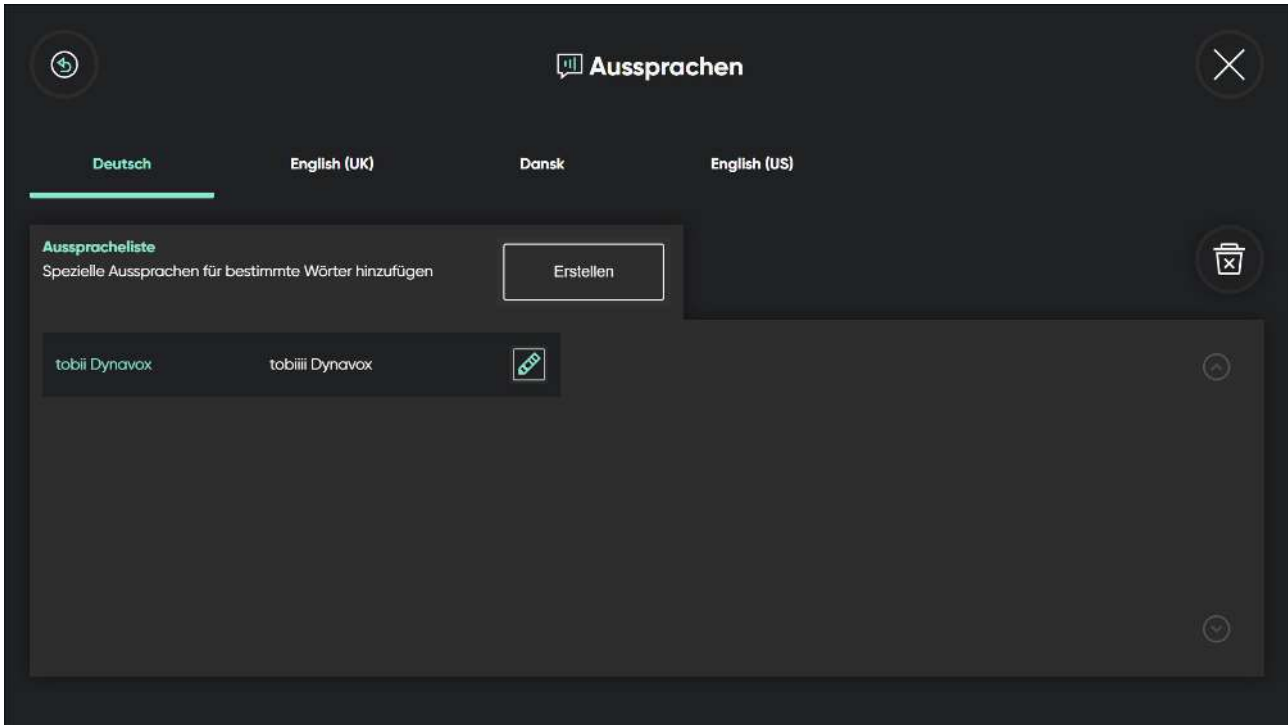

5.5.1.3.1 Wie kann ich Ausspracheausnahmen in TD Talk erstellen?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.



3. Wählen Sie die Aktion (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.



4. Achten Sie auf das Symbol (Stimme), um die richtige Einstellungskarte zu finden.



5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Stimmen**
7. Betätigen Sie unter „Aussprachen“ das Feld **Bearbeiten**.
8. Wählen Sie unter der installierten Sprache das Feld **Sprache** aus, bei der Sie eine Ausspracheausnahme hinzufügen möchten.
9. Betätigen Sie das Feld **Erstellen**.
10. Schreiben Sie das Wort in die **Wort**-Textbox, für das Sie eine Ausspracheausnahme erstellen möchten.

11. Wählen Sie das Symbol neben der **Aussprache**-Textbox aus.



12. Schreiben Sie das Wort in der gewünschten Aussprache in die **Aussprache**-Textbox.



Wählen Sie zum Anhören der Sprachausnahme das Feld neben der Aussprache-Textbox.



13. Betätigen Sie das Feld **Erstellen**, um Ihre Sprachausnahmen zu speichern.

14. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Stimmeeinstellungen zurückzukehren.
15. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
16. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.5.2 Voice Banking Konten

TD Talk kann eine Verbindung zu drei verschiedenen Voice-Banking-Anbietern aufbauen:

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 

Abruf und Nutzung der persönlichen synthetischen Stimme erfordern Konto und Anmeldedaten für einen dieser Anbieter von Voice Banking.

5.5.2.1 Voice-Banking-Konten

5.5.2.1.1 Wie kann ich meine Stimme über meinen Voice-Banking-Anbieter nutzen?


 Die Anmeldung beim Voice-Banking-Anbieter erfordert einen Internetzugang.

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Achten Sie auf das Symbol  (Stimme), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
 5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
 6. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Voice-Banking-Konten**.
Wählen Sie unter "Voice-Banking-Konten" das Feld **Verwalten** aus.
 7. Wählen Sie im Bereich für Ihren Voice-Banking-Anbieter die Schaltfläche **Einloggen**.
 8. Geben Sie einen **Benutzernamen** und ein **Passwort** ein.
 9. Betätigen Sie das Feld **Einloggen**.
- Die persönliche Stimme wird heruntergeladen und automatisch als Standardstimme des Benutzers ausgewählt.

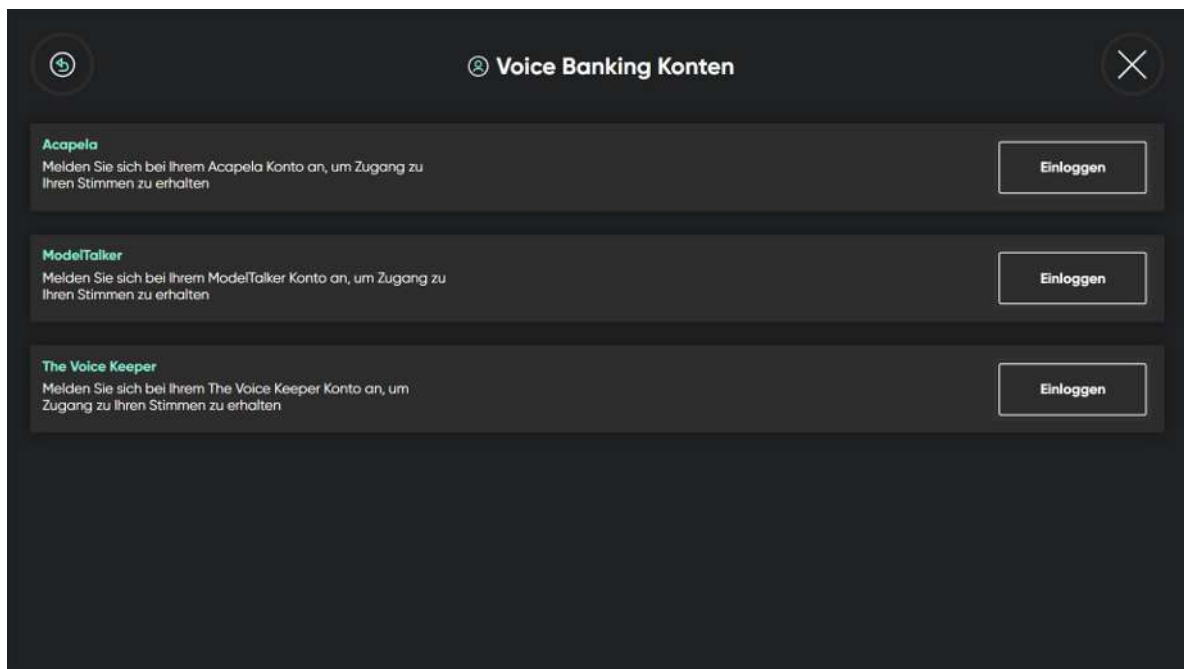


 Dies ist der Fall, wenn persönliche synthetische Stimmen in mehreren Sprachen verfügbar sind.

10. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Stimmeinstellungen zurückzukehren.
11. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
12. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.6 Gerät

 Nur bei TD Pilot und der TD-I-Serie verfügbar.

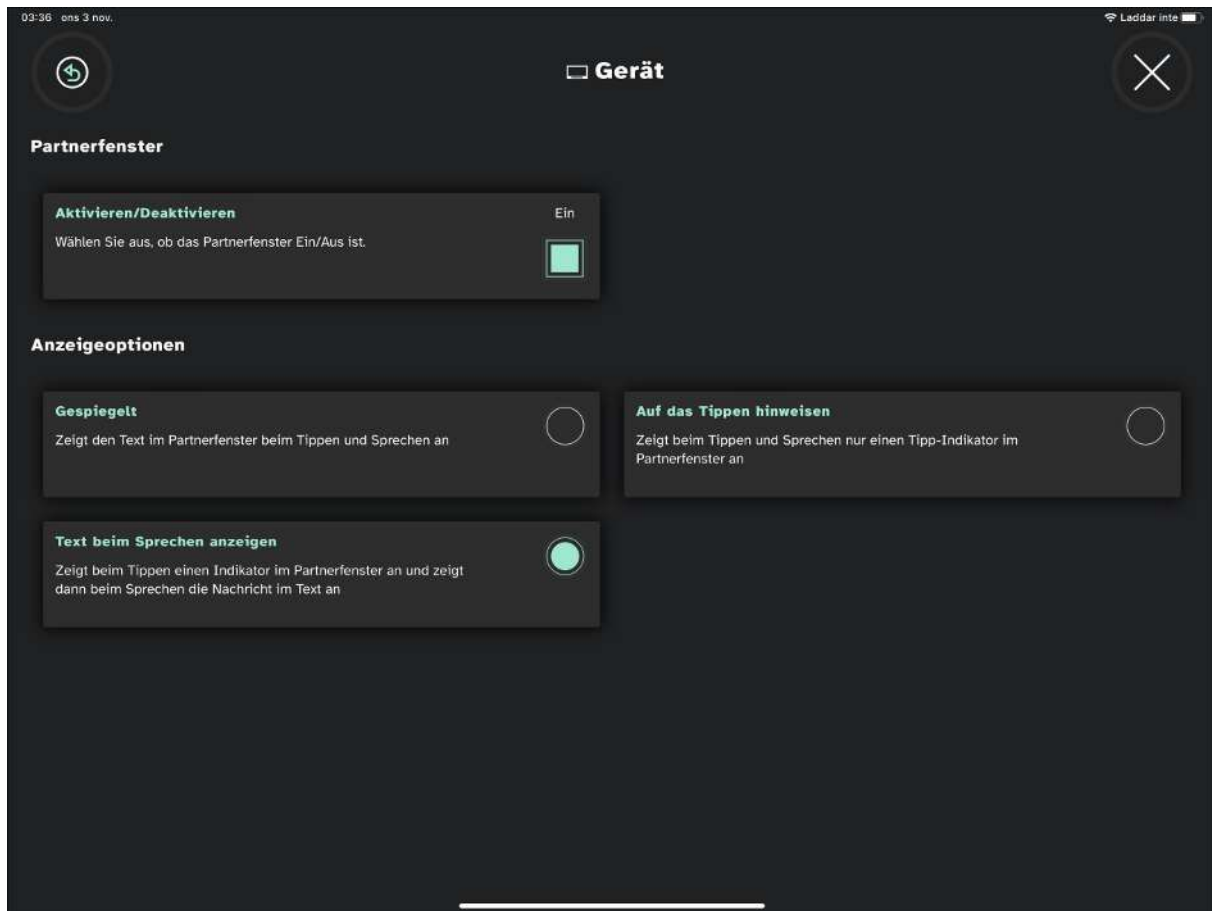

5.6.1 Partnerfenster

5.6.1.1 Wie aktiviere/deaktiviere ich das Partnerfenster in TD Talk?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.



Das Feld (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.



3. Wählen Sie die Aktion (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.



4. Achten Sie auf das Symbol (Gerät), um die richtige Einstellungskarte zu finden.



5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Richten Sie den Blick in den Bereich **Partnerfenster**.

7. Schalten Sie das Feld **Aktivieren/Deaktivieren** bei **Wählen Sie aus, ob das Partnerfenster Ein/Aus ist** auf folgendes um:

- Ein
- Aus



8. Wählen Sie das Feld (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.

9. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.6.1.2 Wie stelle ich die Anzeigeeoptionen für das Partnerfenster in TD Talk um?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Übersicht) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Übersicht) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Achten Sie auf das Symbol  (Gerät), um die richtige Einstellungskarte zu finden.

5. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

6. Richten Sie den Blick in den Bereich **Anzeigeeoptionen**.

7. Wählen Sie eine der folgenden Optionsfelder aus, um die Anzeigeeoption für das Partnerfenster auszuwählen:
- Gespiegelt — Zeigt den Text im Partnerfenster beim Tippen und Sprechen an.
 - Text beim Sprechen anzeigen — Zeigt beim Tippen einen Indikator im Partnerfenster an und zeigt dann beim Sprechen die Nachricht im Text an.
 - Auf das Tippen hinweisen - Zeigt beim Tippen und Sprechen nur einen Tipp-Indikator im Partnerfenster an.

8. Wählen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.

9. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.7 Allgemein

5.7.1 Sprache der Anwendung

5.7.1.1 Wie stelle ich meine Anwendungssprache in TD Talk ein?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.

5. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.

6. Achten Sie auf das Symbol  (Allgemein), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
7. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
8. Richten Sie den Blick in den Bereich **Sprache der Anwendung**.
9. Betätigen Sie das Feld **Ändern**.
10. Wählen Sie das Optionsfeld neben der Sprache aus, in der die Anwendung angezeigt werden soll.

11. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
12. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.7.2 Schriftgröße

5.7.2.1 Wie ändere ich die Textgröße in TD Talk?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
5. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
6. Achten Sie auf das Symbol  (Allgemein), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
7. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
8. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Textgröße**.
9. Wählen Sie eines der folgenden Optionsfelder unter **Textgröße** aus:
 - **Werkseinstellungen**
 - Groß

10. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
11. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.7.3 Feedback

5.7.3.1 Wie übermittele ich in TD Talk Feedback an Tobii Dynavox?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
5. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
6. Achten Sie auf das Symbol  (Allgemein), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
7. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
8. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Feedback**.
9. Wählen Sie das Feld **Feedback** aus.
10. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse über die **Tastatur** ein.
11. Wählen Sie das Feld  für das Textfeld „Betreff“ aus.
12. Geben Sie den Betreff der E-Mail über die **Tastatur** ein.
13. Wählen Sie das Feld  für das Textfeld „Mitteilung“ aus.
14. Geben Sie die Mitteilung über die **Tastatur** ein.
15. Betätigen Sie das Feld  , um das Textfeld „Mitteilung“ zu schließen.
16. Wählen Sie das Feld **Feedback übermitteln** aus, um das Feedback an Tobii Dynavox zu übermitteln.
17. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
18. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.7.4 Dienstleistungsbedingungen und Datenschutzerklärung

5.7.4.1 So öffnen Sie die Dienstleistungsbedingungen

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
5. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
6. Achten Sie auf das Symbol  (Allgemein), um die richtige Einstellungskarte zu finden.

7. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
8. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Dienstleistungsbedingungen und Datenschutzerklärung**.
9. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

10. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
11. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.7.4.2 So öffnen Sie die Datenschutzerklärung

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.
4. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
5. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
6. Achten Sie auf das Symbol  (Allgemein), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
7. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
8. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Dienstleistungsbedingungen und Datenschutzerklärung**.
9. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.

10. Wählen Sie rechts das Feld  (Vorwärts) aus.
11. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
12. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

5.7.5 Protokoll erstellen

5.7.5.1 Wie kann ich Protokolle für TD Talk sammeln?

1. Fixieren Sie den Blick unter dem Bildschirm bzw. in der Mitte der Augensteuerung oder des Augensteuerungsbereichs.

Das Feld  (Mehr) erscheint unten im mittleren Bereich des Bildschirms.

2. Wählen Sie das Feld  (Mehr) aus, um die Übersicht zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion  (Einstellungen) aus, um die Einstellungen für TD Talk zu öffnen.

4. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
5. Wählen Sie rechts das Feld  (Nächster Bildschirm) aus.
6. Achten Sie auf das Symbol  (Allgemein), um die richtige Einstellungskarte zu finden.
7. Betätigen Sie das Feld **Öffnen**.
Die Einstellungsseite für Allgemein wird geöffnet.
8. Richten Sie den Blick auf den Abschnitt **Protokolle erstellen**.
9. Betätigen Sie das Feld **Protokolle**.
10. Betätigen Sie das Feld **Ja**
-  Protokolle werden auf dem Desktop erzeugt.
11. Betätigen Sie das Feld  (Zurück), um zu den Einstellungen für TD Talk zurückzukehren.
12. Betätigen Sie das Feld  (Schließen), um die Einstellungen für TD Talk zu verlassen.

Copyright © Dynavox Group AB (Publ). Nicht alle Produkte und Services werden auf jedem örtlichen Markt angeboten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen gehören dem jeweiligen Besitzer.

Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe

Besuchen Sie online die entsprechende Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakt zu Tobii Dynavox Produktberater oder Fachhändler

Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Produktberater oder Fachhändler von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie unter: <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.