

TD Talk

Manuel de l'utilisateur



tobiidynavox

Manuel de l'utilisateur TD Talk

Version 1.8

2025-07-08

Tous droits réservés.

Droits d'auteur © Dynavox Group AB (publ)

Il est interdit de reproduire toute partie de ce document, de stocker des données qui en sont issues, ou de les transmettre sous quelque forme que ce soit (électronique, photocopie, enregistrement, ou autre) sans permission préalable écrite de l'éditeur.

La protection du copyright concerne toutes les formes, sujets, contenus et matériaux soumis au copyright, ainsi que les informations autorisées par l'autorité statuaire ou judiciaire, et les cas cités ci-après, y compris sans limitation, les matériaux générés par les programmes du logiciel qui sont affichés à l'écran tels que les fenêtres, les menus, etc.

Les informations du présent document sont la propriété de Dynavox Group AB. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite préalable de Dynavox Group AB est interdite.

Les produits répertoriés dans ce document peuvent correspondre à des marques et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. L'éditeur et l'auteur ne revendiquent aucune de ces marques.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document, l'éditeur et l'auteur ne pourront être tenus responsables pour toute erreur ou omission, ou pour les dommages entraînés par l'utilisation des informations contenues dans ce document, ou par l'utilisation des programmes et du code source qui peuvent l'accompagner. En aucun cas l'éditeur et l'auteur ne pourront être tenus responsables en cas de perte de profits ou tout autre dommage commercial résultant, directement ou indirectement, de ce document.

Le contenu est susceptible d'être modifié sans avertissement préalable.

Connectez-vous au site de Tobii Dynavox.

www.TobiiDynavox.com obtenir les mises à jour de ce manuel.

Coordonnées :

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Suède
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
ÉTATS-UNIS
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Royaume-Uni
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Trading en tant que lien d'assistance
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australie
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880



Table des matières

1	Bienvenue !	6
1.1	Système nécessaire.....	6
1.2	Langues compatibles	6
1.3	Obtenir TD Suite	6
2	Ressources et assistance.....	7
2.1	Ressources et assistance en ligne	7
2.2	Centre d'apprentissage.....	7
3	Démarrer.....	8
3.1	Présentation générale de TD Talk	8
3.2	Le menu hors écran	9
3.2.1	Comment puis-je accéder au menu hors écran dans TD Talk ?.....	9
3.3	Le tableau de bord	10
3.3.1	Comment puis-je accéder au Tableau de bord dans TD Talk ?.....	10
3.3.2	Comment puis-je quitter et fermer TD Talk ?	10
3.4	Configurer TD Talk.....	11
4	Utiliser TD Talk	13
4.1	Utilisation du clavier	13
4.2	Utilisation des prédictions	13
4.2.1	Prédiction de mots	13
4.2.2	Prédiction de phrase	14
4.3	Éditer un message	14
4.3.1	Comment puis-je éditer un message dans TD Talk ?	14
4.4	Copier et coller.....	15
4.4.1	Comment puis-je utiliser la fonction Copier dans TD Talk?	15
4.4.2	Comment puis-je utiliser la fonction Collier dans TD Talk?.....	15
4.5	Utilisation des messages rapides	15
4.5.1	Comment puis-je utiliser la fonction Messages rapides dans TD Talk ?.....	15
4.5.2	Comment puis-je modifier le sujet des messages rapides ?.....	16
4.6	Modifier la langue.....	17
4.6.1	Comment puis-je changer la langue dans TD Talk ?	17
4.7	Conversation instantanée	17
4.8	Mode transparent.....	18
4.8.1	Comment puis-je démarrer le mode transparent ?	18
4.8.2	Comment puis-je désactiver le mode transparent ?.....	18
4.9	Comment puis-je utiliser les expressions intégrales associées aux abréviations dans TD Talk ?	18
4.10	Comment puis-je annuler une action dans TD Phone ?	19
5	Paramètres de TD Talk.....	20
5.1	Mon compte	21
5.1.1	Qu'est-ce qu'un compte myTobiiDynavox ?.....	21
5.1.2	Comment puis-je créer un compte myTobiiDynavox ?	21
5.1.3	Comment sauvegarder mes données personnalisées ?.....	21

5.1.4	Comment puis-je restaurer mes données personnalisées ?	22
5.2	Activation	22
5.2.1	Moyen d'activation	23
5.2.1.1	Comment puis-je sélectionner mon moyen d'activation dans TD Talk ?	23
5.2.2	Boutons	24
5.2.2.1	Comment puis-je modifier la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?	24
5.2.2.2	Comment puis-je affiner la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?	24
5.2.3	Saisie contacteur	25
5.2.3.1	Comment puis-je paramétrer une saisie contacteur sur mon contacteur dans TD Talk ?	25
5.3	Clavier	26
5.3.1	Moyen d'activation	26
5.3.1.1	Comment puis-je sélectionner mon moyen d'activation du clavier dans TD Talk ?	26
5.3.2	Boutons	27
5.3.2.1	Comment puis-je modifier la durée de fixation pour les boutons du clavier dans TD Talk ?	27
5.3.2.2	Comment puis-je affiner la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?	27
5.3.3	Prédiction	28
5.3.3.1	Comment puis-je modifier la durée de fixation des boutons de prédiction dans TD Talk ?	28
5.3.3.2	Comment puis-je affiner la durée de fixation des boutons de prédiction dans TD Talk ?	29
5.3.4	Général	29
5.3.4.1	Comment puis-je ajouter une nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?	29
5.3.4.2	Comment puis-je sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition dans TD Talk ?	30
5.3.4.3	Comment puis-je activer/désactiver le retour sonore de saisie dans TD Talk ?	30
5.4	Conversations	31
5.4.1	Sujets	32
5.4.1.1	Comment puis-je créer un nouveau sujet dans TD Talk ?	32
5.4.1.2	Comment puis-je modifier le nom d'un sujet TD Talk ?	32
5.4.1.3	Comment puis-je rendre le sujet TD Talk confidentiel ?	33
5.4.1.4	Comment puis-je sélectionner les sujets que je souhaite activer dans TD Talk ?	33
5.4.1.5	Comment puis-je supprimer un sujet dans TD Talk ?	34
5.4.1.6	Comment puis-je éditer les messages rapides dans TD Talk ?	34
5.4.1.7	Comment puis-je ajouter des messages rapides dans TD Talk ?	35
5.4.1.8	Comment puis-je supprimer un message rapide dans TD Talk ?	36
5.4.2	Expressions intégrales associées aux abréviations	37
5.4.2.1	Comment puis-je ajouter des expressions intégrales associées aux abréviations dans TD Talk ?	37
5.4.2.2	Comment puis-je éditer des expressions intégrales associées aux abréviations dans TD Talk ?	38
5.4.2.3	Comment puis-je supprimer une expression intégrale associée à une abréviation dans TD Talk ?	38
5.5	Voix	39
5.5.1	Voix	40
5.5.1.1	Voix installées et téléchargeables	40

	5.5.1.1.1	Comment puis-je télécharger une nouvelle voix dans TD Talk ?	40
	5.5.1.1.2	Comment puis-je sélectionner ma voix dans TD Talk ?	41
	5.5.1.1.3	Comment puis-je appliquer un filtre aux voix disponibles dans TD Talk ?	41
	5.5.1.2	Configuration des voix	42
	5.5.1.2.1	Comment puis-je modifier ma Voix dans TD Talk ? ...	42
	5.5.1.3	Prononciations	43
	5.5.1.3.1	Comment puis-je créer des exceptions de prononciation dans TD Talk ?	43
5.5.2		Comptes de Voice Banking	44
	5.5.2.1	Comptes de voix en banque	44
	5.5.2.1.1	Comment puis-je utiliser ma voix à partir de mon service Voice Banking ?	44
5.6		Dispositif	46
	5.6.1	Fenêtre du partenaire	46
	5.6.1.1	Comment puis-je activer ou désactiver la fenêtre du partenaire dans TD Talk ?	46
	5.6.1.2	Comment puis-je paramétrer les options d'affichage de la fenêtre du partenaire dans TD Talk ?	47
5.7		Général	47
	5.7.1	Langue de l'application	47
	5.7.1.1	Comment puis-je définir la langue de l'application dans TD Talk ?.	47
	5.7.2	Taille du texte	48
	5.7.2.1	Comment puis-je changer la taille du texte dans TD Talk ?	48
	5.7.3	Avis	48
	5.7.3.1	Comment puis-je envoyer un avis à Tobii Dynavox dans TD Talk ?	48
	5.7.4	Conditions d'utilisation et déclaration de confidentialité	49
	5.7.4.1	Comment puis-je ouvrir les conditions d'utilisation ?	49
	5.7.4.2	Comment puis-je ouvrir la déclaration de confidentialité ?	50
	5.7.5	Recueillir les journaux	50
	5.7.5.1	Comment puis-je recueillir des journaux de TD Talk ?	50

1 Bienvenue !

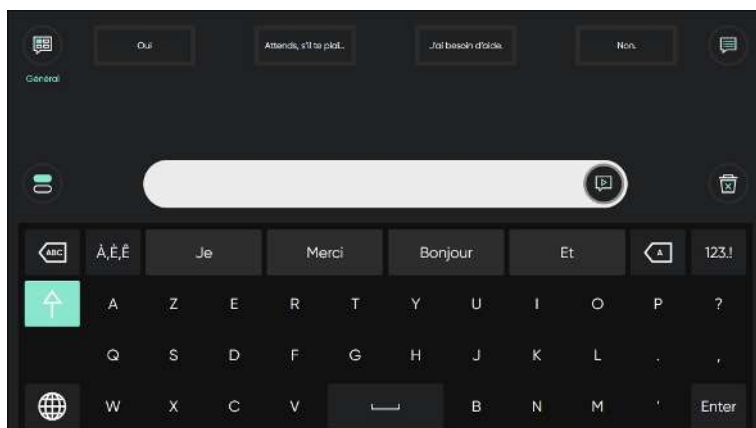


Illustration 1: TD Talk

TD Talk permet aux personnes de communiquer leur identité et ce qu'elles souhaitent dire, de la manière la plus fluide possible. Cette application est conçue pour accélérer le plus possible la construction des phrases. TD Talk permet aux personnes qui l'utilisent de participer activement aux conversations. TD Talk est conçu pour paraître familier, de sorte que les personnes qui l'utilisent puissent démarrer dans les plus brefs délais. En retenant les structures de phrases et l'utilisation des mots uniques d'une personne, TD Talk s'adapte en permanence pour offrir des options de communication personnelles pertinentes.

1.1 Système nécessaire

Table 1: iOS

	Système d'exploitation	Dispositif	Mémoire	Tactile	Caméra
Minimum	iOS 15,1	iPad 7ème génération	4 GB	Écran tactile intégré	Caméra intégrée
Recommandé	iOS 15,1	iPad 8ème génération	4 GB	Écran tactile intégré	Caméra intégrée

1.2 Langues compatibles

- Danois (DK)
- Néerlandais (NL)
- Anglais (États-Unis)
- Français (FR)
- Allemand (DE)
- Italien (IT)
- Norvégien (NO)
- Espagnol (Amérique latine)
- Suédois (SE)
- D'autres langues seront bientôt disponibles !

1.3 Obtenir TD Suite

TD Talk est disponible sur TobiiDynavox.com pour les appareils Windows et dans la boutique Apple App pour les appareils iPadOS.

2 Ressources et assistance

Tobii Dynavox propose plusieurs ressources gratuites afin d'assister et compléter votre utilisation de TD Talk. Ne passez pas à côté de ces outils qui vous permettront d'obtenir le meilleur de votre logiciel Tobii Dynavox !

2.1 Ressources et assistance en ligne

Si vous avez besoin d'assistance, consultez d'abord la section Formation et assistance du site Web de Tobii Dynavox.

2.2 Centre d'apprentissage



Le centre d'apprentissage n'est disponible qu'en anglais pour le moment.

Allez sur learn.tobiidynavox.com pour obtenir des informations, des formations et autres ressources, notamment :

- des réponses aux questions fréquentes
- des vidéos de formation
- des webinaires enregistrés
- des cours en ligne

3 Démarrer

Si vous souhaitez utiliser TD Talk avec une commande oculaire, veuillez vous assurer que celle-ci dispose d'un calibrage actif.

- iOS — utilisez l'application TD CoPilot pour configurer la commande oculaire.

Consulter le manuel de l'utilisateur du dispositif TD Pilot pour obtenir des informations plus détaillées.

3.1 Présentation générale de TD Talk

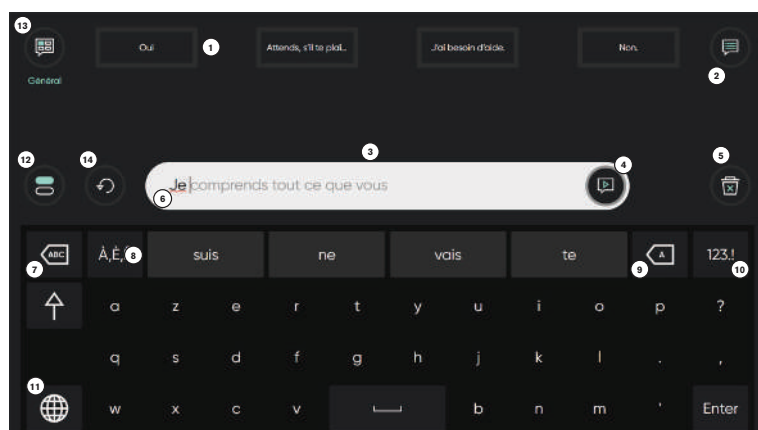


Illustration 2: TD Talk

Position	Description	Position	Description
1	Messages rapides Messages pré-écrits qui sont énoncés immédiatement lorsqu'ils sont sélectionnés	8	Prédiction de mots/expressions intégrales associées aux abréviations Prédit automatiquement des mots en fonction de ce que vous avez saisi jusqu'à présent. Lors de l'utilisation d'expressions intégrales associées à des abréviations, le premier mot sera remplacé par l'expression intégrale.
2	Autres messages rapides Accédez à tous les messages rapides pour le sujet en cours.	9	Retour arrière Supprimer le caractère qui se trouve à gauche du curseur.
3	Fenêtre de message Affichez et modifiez le texte que vous souhaitez énoncer ici.	10	Page numérique Accès aux nombres et aux caractères spéciaux.
4	Énoncer Énoncer le texte de la fenêtre de message. Vous pouvez également mettre en pause et reprendre l'énonciation.	11	Modifier la langue Basculer entre les langues que vous parlez.
5	Effacer Effacer tout le texte de la fenêtre de message.	12	Conversation instantanée Basculez vers une deuxième fenêtre de message pour rédiger un nouveau message sans perdre le texte de la première fenêtre de message.

Position	Description	Position	Description
6	Prédiction de phrase TD Talk retient ce que vous saisissez et utilise ces informations afin de prédire des phrases. La prédiction est basée sur la fréquence et peut accélérer la communication, tout en la rendant plus personnelle.	13	Sujets Organisez vos messages rapides par sujet. Basculez vers un sujet pour accéder à ces messages.
7	Supprimer mot Supprimer le mot qui se trouve à gauche du curseur.	14	Annuler Annuler les actions de la fenêtre de message.

3.2 Le menu hors écran

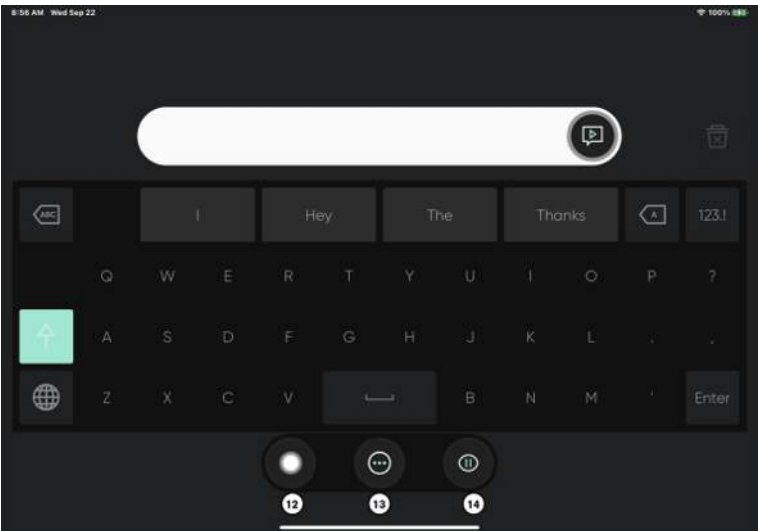


Illustration 3: Menu hors écran de TD Talk

Position	Description	Position	Description
14	Assistive Touch Activer AssistiveTouch. Utilisez AssistiveTouch pour accéder à l'écran d'accueil et à toutes vos autres applications.	16	Mettre en pause/Reprendre la commande oculaire Appuyez sur le bouton de basculement pour mettre temporairement en pause, puis reprendre l'utilisation de la commande oculaire.
15	Autres Accéder au tableau de bord et aux paramètres.	17	Mode transparent Rendez l'interface de TD Talk transparente et activez l'appareil photo situé à l'arrière de l'appareil. Ce mode peut être utilisé pour voir ce qui se trouve devant votre dispositif, comme votre partenaire de communication, pendant que vous utilisez TD Talk.

3.2.1 Comment puis-je accéder au menu hors écran dans TD Talk ?

Vous pouvez accéder au menu Hors-écran de deux manières différentes dans TD Talk :

- **En tant qu'utilisateur** : Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
- **En tant qu'aidant** : Faites défiler l'écran vers le haut à partir de la lettre **T** sur le clavier TD Talk.

3.3 Le tableau de bord

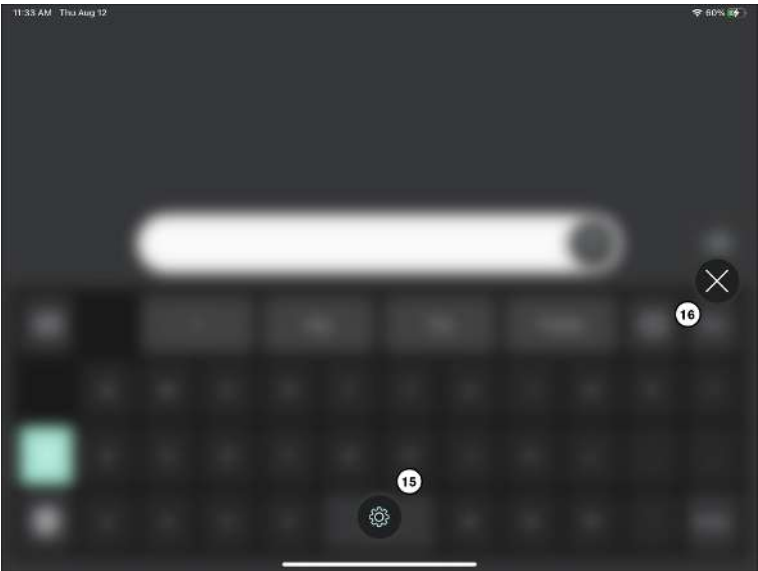


Illustration 4: Tableau de bord TD Talk

Position	Description	Position	Description
15	Paramètres de TD Talk Pour en savoir plus, consultez <i>5 Paramètres de TD Talk</i> , page 20	16	Quitter le tableau de bord Sélectionnez le bouton pour quitter le tableau de bord.

3.3.1 Comment puis-je accéder au Tableau de bord dans TD Talk ?

- Accédez aux paramètres de l'une des manières suivantes :
 - En tant qu'utilisateur** : Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
 - En tant qu'aidant** : Faites défiler l'écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier du TD Talk.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

- Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3.3.2 Comment puis-je quitter et fermer TD Talk ?

- Accédez aux paramètres de l'une des manières suivantes :
 - En tant qu'utilisateur** : Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
 - En tant qu'aidant** : Faites défiler l'écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier TD Talk.

Le bouton  (AssistiveTouch) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

- Sélectionnez le bouton  (AssistiveTouch) afin d'ouvrir le menu AssistiveTouch.
- Sélectionnez le bouton  (Accueil) dans le menu AssistiveTouch.

3.4 Configurer TD Talk

1. Sélectionnez l'application  TD Talk sur l'écran d'accueil de l'appareil iPadOS.
2. Accédez aux paramètres de l'une des manières suivantes :
 - **En tant qu'utilisateur** : Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
 - **En tant qu'aidant** : Faites défiler l'écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier du TD Talk.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

3. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

4. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
5. Modifier la langue de l'application TD Talk :

- Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
- Recherchez l'icône  (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
- Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
- Posez votre regard sur la section **Langue de l'application**.
- Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la langue que vous souhaitez utiliser dans l'application.

- Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
6. Sélectionnez la (les) voix à utiliser :

- Recherchez l'icône  (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
- Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
- Posez votre regard sur la section **Votre (vos) voix**.
- Sélectionnez le bouton radio sous la langue installée dans laquelle vous souhaitez parler.

 Si la langue souhaitée est manquante, consultez *5.3.4.1 Comment puis-je ajouter une nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?*, page 29 et *5.3.4.2 Comment puis-je sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition dans TD Talk ?*, page 30.

- Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la voix que vous souhaitez utiliser dans la liste des voix disponibles pour la langue utilisée pour l'énonciation.

Utilisez les boutons « Faire défiler vers le haut » et « Faire défiler vers le bas » situés à droite pour faire défiler la liste des voix disponibles pour la langue sélectionnée.

 Pour essayer une voix, sélectionnez  à côté de la voix concernée. Si disponible.

 Si un bouton  (télécharger) se trouve à la place d'un bouton radio, sélectionnez ce bouton pour télécharger la voix.

- Répétez les deux dernières étapes indiquées ci-dessus si vous souhaitez utiliser plusieurs langues pour l'énonciation.

7. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.



Dans TD Talk, vous pouvez rapidement basculer entre les langues sélectionnées en sélectionnant le bouton



situé dans le coin inférieur gauche du clavier.

4 Utiliser TD Talk

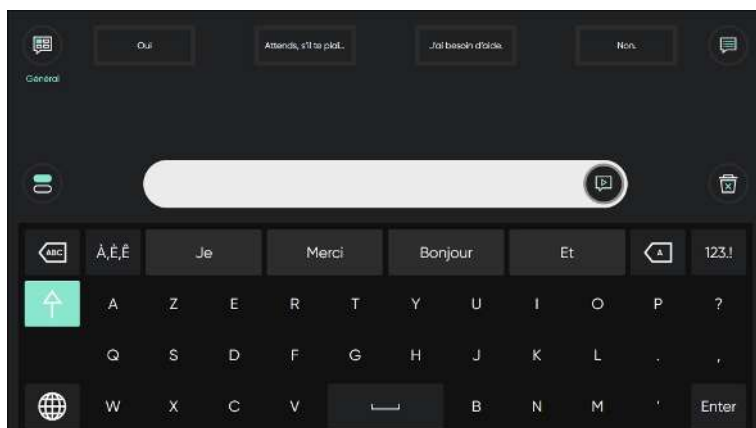


Illustration 5: TD Talk

4.1 Utilisation du clavier

Lorsque vous sélectionnez des lettres sur le clavier, les mots et les phrases sont formulés (ou construits) dans la fenêtre


de message. Sélectionnez le bouton  (Parler) lorsque vous êtes prêt à parler.

4.2 Utilisation des prédictions

TD Talk propose à la fois une fonctionnalité de prédiction de mots et une fonctionnalité de prédiction de phrases qui peuvent diminuer l'effort et/ou augmenter la vitesse de production des messages.

4.2.1 Prédiction de mots

Le moteur de prédiction de mots utilisé par TD Talk provient de SwiftKey™. Il est communément utilisé sur les tablettes et smartphones. SwiftKey™ utilise différentes technologies d'intelligence artificielle permettant de prédire le prochain mot que l'utilisateur a l'intention de taper. SwiftKey™ retient le texte déjà écrit par l'utilisateur et fournit ou présente des prédictions basées sur ses connaissances et le texte en cours de saisie. La langue de la prédiction de mots est sélectionnée en fonction de la langue paramétrée pour le clavier.

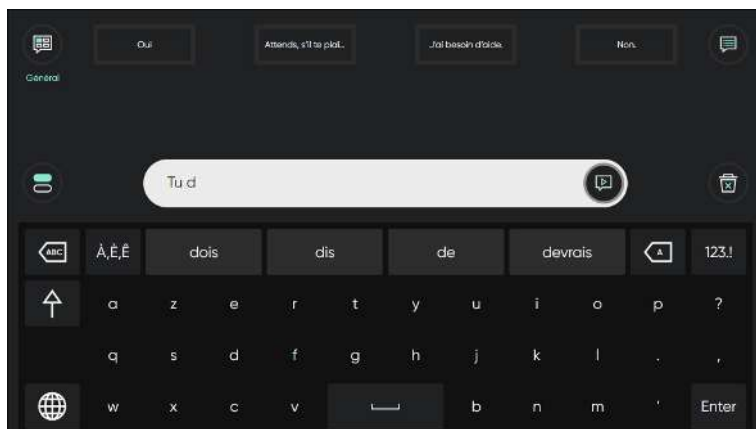


Lorsque la fonction de prédiction des mots est en cours d'utilisation, quatre (4) zones apparaissent dans la partie supérieure du clavier. La zone la plus à gauche affichera le mot prédit le plus probable, et les trois (3) autres contiennent chacune un mot prédit. Pour sélectionner un mot prédit, sélectionnez la zone contenant le bon mot. Si vous ne trouvez pas le mot que vous recherchez, continuez à taper. Le mot que vous recherchez apparaîtra peut-être parmi les propositions après la saisie du (des) caractère(s) suivant(s).

Si vous utilisez la Prédiction de mots et souhaitez taper un mot contenant un accent, comme « café », vous gagnerez du temps et économiserez des efforts en laissant la prédiction de mots se charger de l'accent. Tapez simplement « cafe », et vous obtiendrez la suggestion « café ».

4.2.2 Prédiction de phrase

TD Talk analyse et retient la façon dont vous parlez au fur et à mesure. La prédiction de mots retient les mots que vous prononcez. La prédiction de phrases retient la façon dont vous mettez ces mots ensemble pour former un ensemble de phrases personnelles. Lorsque vous commencez à taper, les phrases prédites de votre ensemble de phrases seront proposées dans la fenêtre de message en texte grisé.

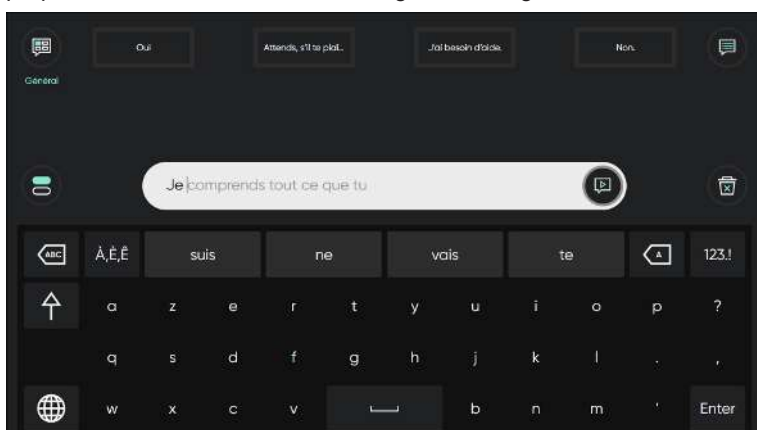

Regardez et posez votre regard sur le dernier mot de la phrase prédite pour sélectionner la phrase. La couleur de la phrase passe du gris au noir, ce qui indique qu'elle a été sélectionnée. Elle peut maintenant être prononcée ou modifiée.

4.3 Éditer un message

4.3.1 Comment puis-je éditer un message dans TD Talk ?

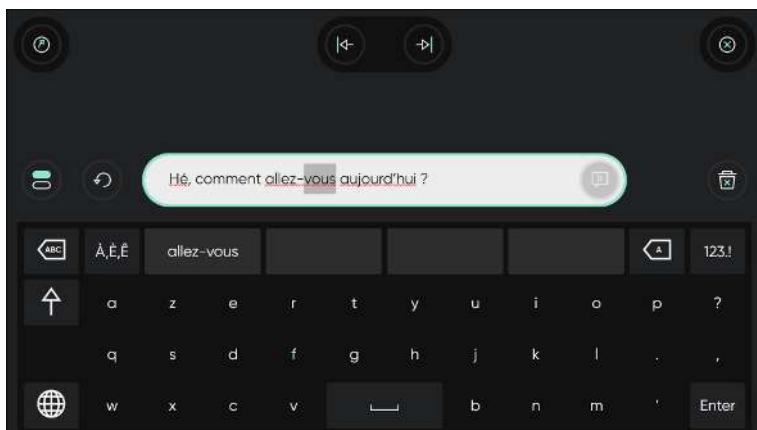


Illustration 6: Menu Édition

1. Posez votre regard sur la fenêtre de message pour éditer le message qui s'y trouve..
Le menu Éditer s'ouvre.
2. Lorsqu'un mot est sélectionné, commencez la saisie du mot par lequel vous souhaitez le remplacer, sélectionnez un mot dans la liste de prédiction de mots ou sélectionnez supprimer.

Utilisez les flèches  (Déplacer vers la gauche) et  (déplacer vers la droite) si vous souhaitez repositionner le curseur.

3. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter le mode Édition.

4.4 Copier et coller

4.4.1 Comment puis-je utiliser la fonction Copier dans TD Talk?

 La fonction Copier dans TD Talk permet de copier l'ensemble du contenu de la fenêtre de message.

1. Posez votre regard sur la fenêtre de message pour éditer le message qui s'y trouve..
Le menu Éditer s'ouvre.

Sélectionnez le bouton  (Copier).

4.4.2 Comment puis-je utiliser la fonction Collier dans TD Talk?

1. Posez votre regard sur la fenêtre de message vide.
Le menu Copier s'ouvre.

Sélectionnez le bouton  (Coller).
Le message s'affiche dans la fenêtre de message.

 Vous pouvez coller du texte copié à partir d'une source sous forme de texte dans n'importe quel autre logiciel sur votre appareil.

 Sous iOS, une fenêtre contextuelle Apple s'affiche lors du collage entre les différentes applications. Vous pouvez confirmer votre autorisation de manière définitive à l'aide d'Assistive Touch OU modifier les paramètres Apple pour toujours autoriser cette fonction. TD Talk vous demandera si vous souhaitez accéder à ce paramètre.

4.5 Utilisation des messages rapides

4.5.1 Comment puis-je utiliser la fonction Messages rapides dans TD Talk ?

Il existe deux (2) types de messages rapides. Les premiers sont toujours visibles sur l'écran d'accueil. Les seconds se


trouvent sous le bouton  (Autres messages rapides).

Messages rapides sur l'écran d'accueil

1. Sélectionnez le **message rapide** pour l'énoncer.
Le message sélectionné sera énoncé immédiatement, sans être ajouté à la fenêtre de message et sans interférer avec tout autre message en cours de rédaction.

Autres messages rapides


1. Sélectionnez le bouton  (Autres messages rapides).

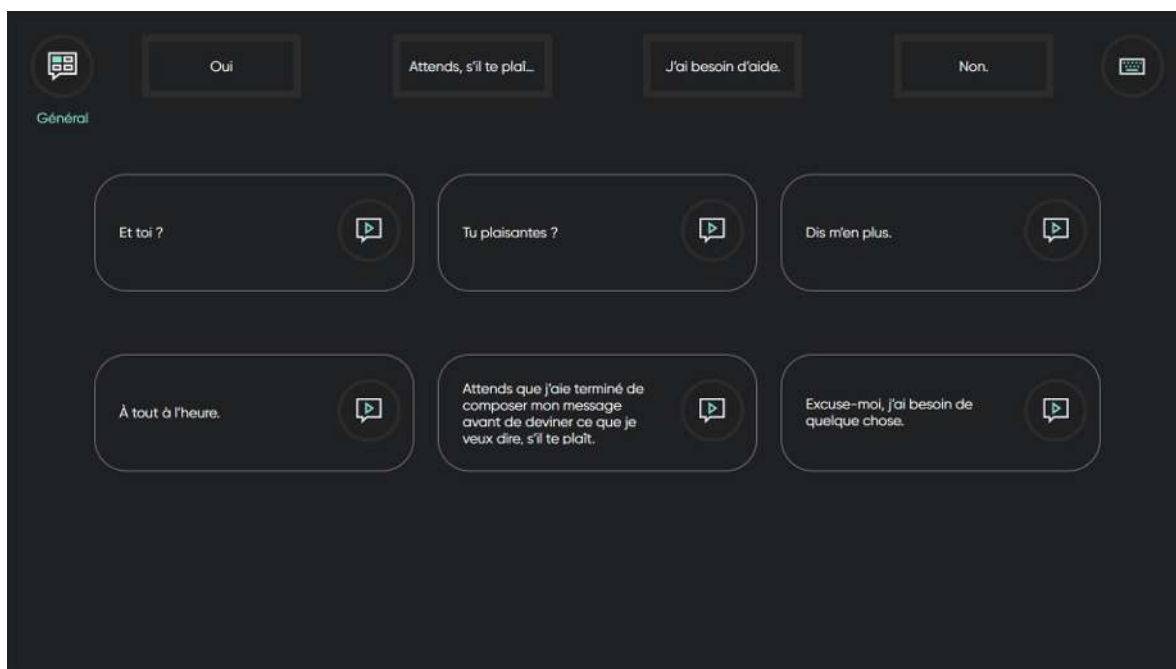

2. Sélectionnez le bouton  (Énoncer) situé à côté du message.
3. Sélectionnez le bouton  (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

4.5.2 Comment puis-je modifier le sujet des messages rapides ?

1. Sélectionnez le bouton  (Menu des thèmes).
2. Sélectionnez le nouveau sujet.

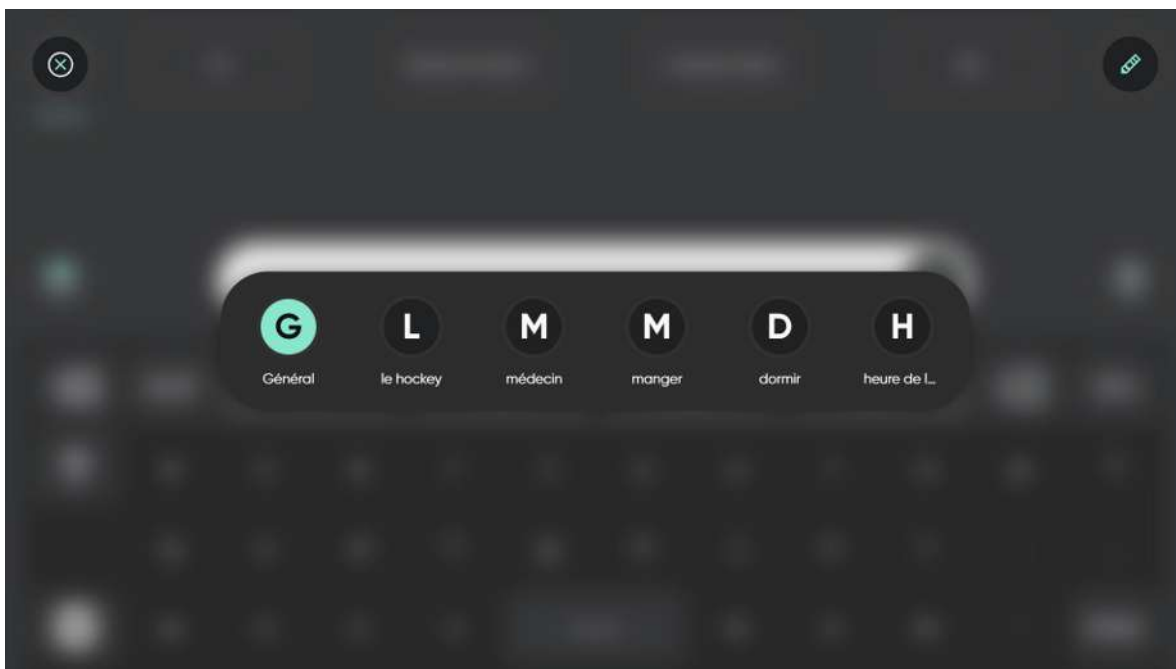

Sélectionnez le bouton (Édition) pour modifier les sujets affichés ou rendu disponibles dans le menu des thèmes. Pour en savoir plus, consultez 5.4.1 *Sujets*, page 32.

4.6 Modifier la langue

4.6.1 Comment puis-je changer la langue dans TD Talk ?

1. Sélectionnez le bouton  (langue) sur le clavier.
2. Sélectionner la langue d'énonciation
Si la langue souhaitée n'est pas disponible, consultez 5.3.4.1 *Comment puis-je ajouter une nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?*, page 29

3. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour revenir en arrière

4.7 Conversation instantanée




Sélectionnez l'icône  (Discussion) pour basculer vers une deuxième fenêtre de message afin de rédiger un nouveau message sans perdre le texte de la première fenêtre de message.



Sélectionnez l'icône  (Retour du chat) pour revenir à la première fenêtre de message.

4.8 Mode transparent

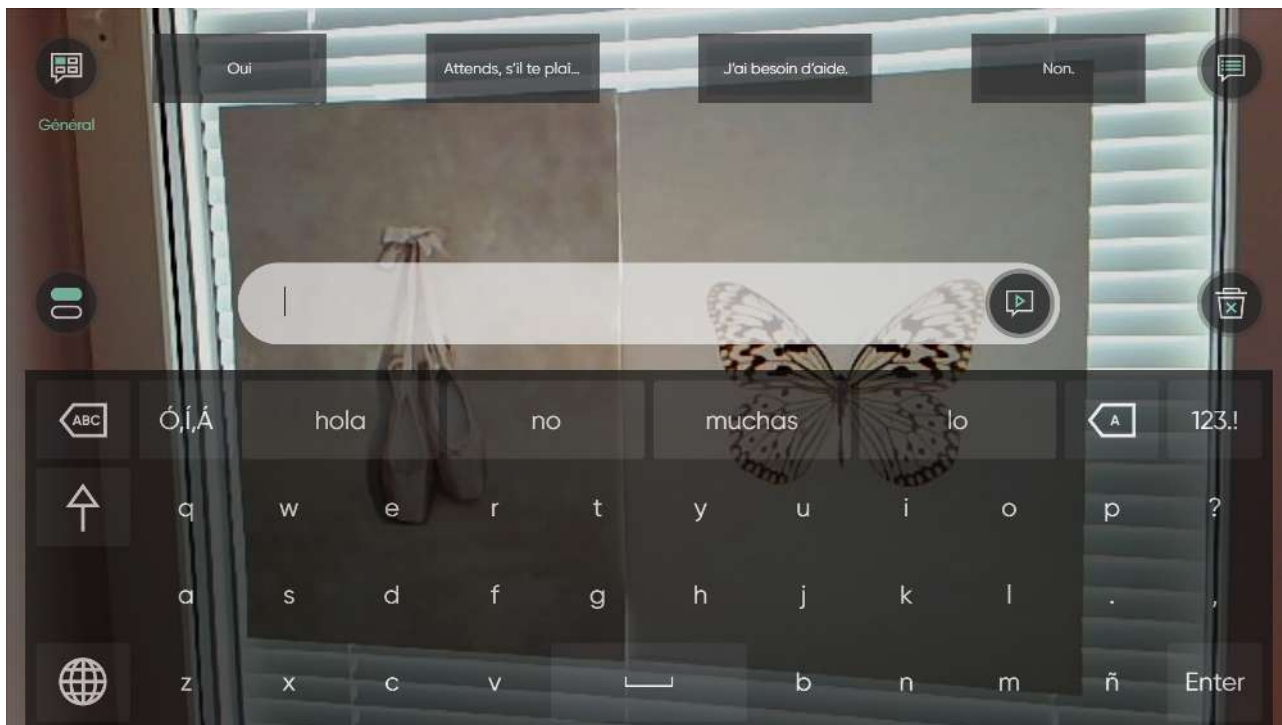

Rendez l'interface de TD Talk transparente et activez l'appareil photo situé à l'arrière de l'appareil. Ce mode peut être utilisé pour voir ce qui se trouve devant votre dispositif, comme votre partenaire de communication, pendant que vous utilisez TD Talk.

4.8.1 Comment puis-je démarrer le mode transparent ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
Le Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.



2. Sélectionnez le bouton (Mode transparent).

4.8.2 Comment puis-je désactiver le mode transparent ?


1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
Le Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.



2. Sélectionnez le bouton (Désactiver le mode transparent).

4.9 Comment puis-je utiliser les expressions intégrales associées aux abréviations dans TD Talk ?

Lorsque vous tapez une abréviation existante, la première position dans les prédictions de mots sera remplacée par l'expression intégrale associée à cette même abréviation.

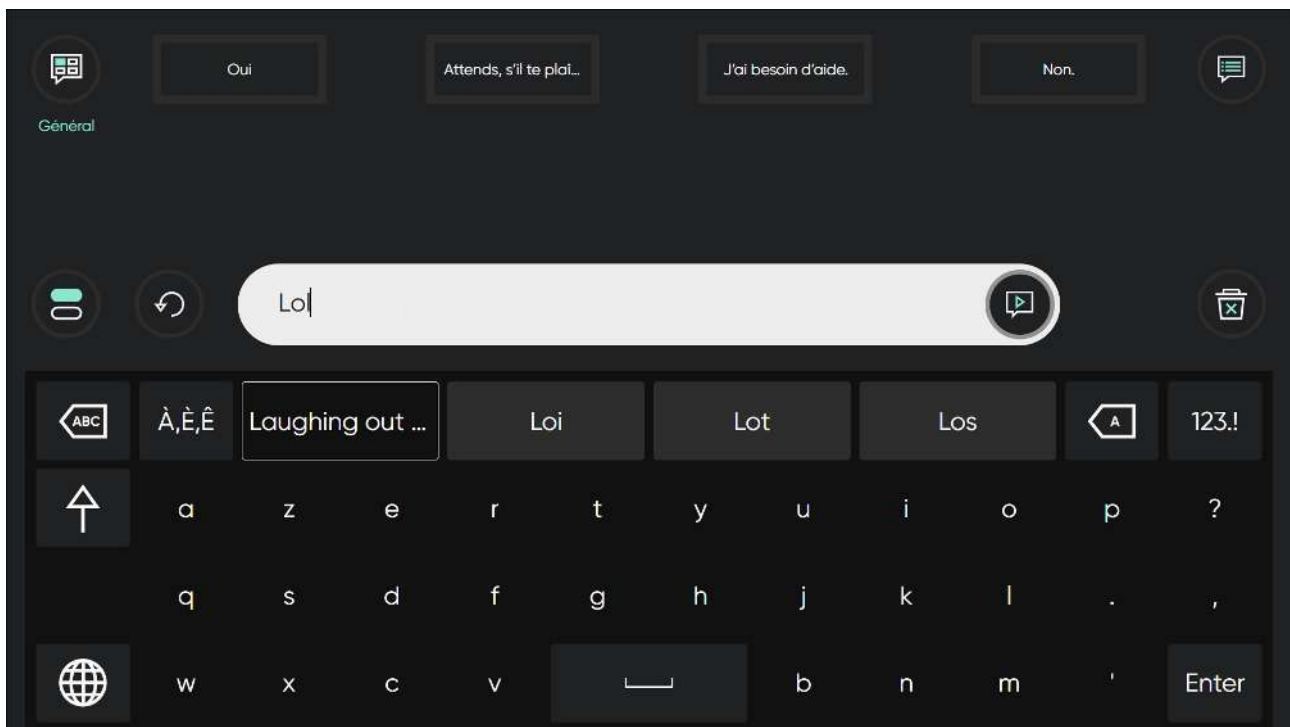


Sélectionnez Expressions intégrales associées aux abréviations dans la zone de prédiction de mots pour afficher l'expression intégrale associée à l'abréviation dans la fenêtre de message.

Pour en savoir plus sur l'ajout, la modification et la suppression d'expressions intégrales associées aux abréviations, consultez la section Expressions intégrales associées aux abréviations.

4.10 Comment puis-je annuler une action dans TD Phone ?

Sélectionnez le bouton  (annuler) situé à côté de la fenêtre de message pour annuler une par une les actions effectuées à partir du moment où vous avez commencé à taper dans la fenêtre de message active.

5 Paramètres de TD Talk

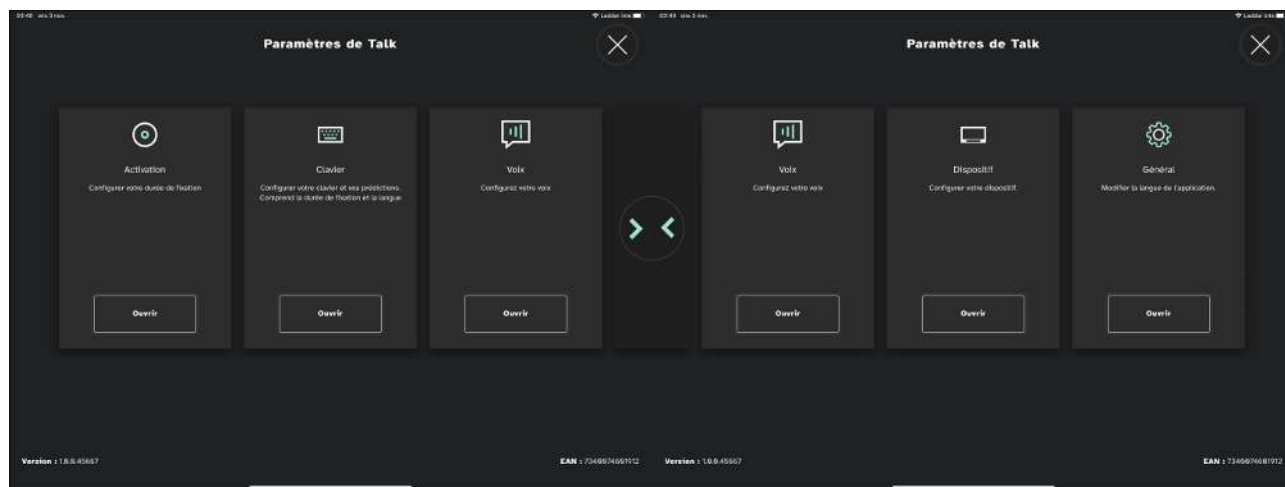

Icônes	Action	Description
	Activation	Disponible uniquement si une commande oculaire est installée et activée. Ouvre les paramètres d' Activation . Pour en savoir plus, consultez 5.2 Activation, page 22.
	Clavier	Ouvre les paramètres du clavier . Pour en savoir plus, consultez 5.3 Clavier, page 26.
	Voix	Ouvre les paramètres de la Voix . Pour en savoir plus, consultez 5.5 Voix, page 39.
	Dispositif	Ouvre les paramètres du dispositif . Pour en savoir plus, consultez 5.6 Dispositif, page 46.
	Général	Ouvre les paramètres Généralités . Pour en savoir plus, consultez 5.7 Général, page 47.

5.1

Mon compte



Mon compte

Informations sur le compte

Prénom Ammar	Nom de famille Elyas	Pays US	E-mail ammar.elyas@tobiidynavox.com
------------------------	--------------------------------	-------------------	---

Sauvegarde des données

Sauvegardez vos dernières prédictions de mots, prononciations, prédictions de phrases, sujets et messages rapides.
Ceci est utile pour sauvegarder vos données lors du changement des dispositifs.

Dernière sauvegarde :
2024-2-23 12:23
TD I-16

Sauvegarde

Restaurer les données

Restaurer vos dernières prédictions de mots, prononciations, prédictions de phrases, sujets et messages rapides.
Ceci est utile lorsque vous avez changé de dispositif et que vous avez besoin de vos données sur le nouvel appareil.

Dernière restauration :
2024-3-22 12:36

Restaurer

Déconnexion

Connectez-vous à votre compte myTobiiDynavox Account pour sauvegarder et restaurer vos prédictions de mots personnelles, vos prononciations, vos prédictions de phrases, vos sujets et vos messages rapides sur tous vos appareils.

5.1.1 Qu'est-ce qu'un compte myTobiiDynavox ?

Un compte myTobiiDynavox Account est une plateforme en ligne fournie par Tobii Dynavox, une entreprise spécialisée dans les aides techniques aux personnes souffrant de problèmes de communication et de mobilité. Le compte myTobiiDynavox Account permet aux utilisateurs d'accéder à diverses ressources, notamment la sauvegarde et la restauration de données personnalisées, les mises à jour logicielles, la documentation, les forums d'utilisateurs et les cours de formation en ligne. Il sert également de plate-forme centrale pour gérer les paramètres du dispositif, créer et partager des tableaux de communication et accéder à des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux besoins des utilisateurs utilisant les dispositifs de Tobii Dynavox. En résumé, il s'agit d'une plate-forme centrale permettant aux utilisateurs de gérer leurs solutions d'aides techniques et de trouver de l'aide au sein de la communauté Tobii Dynavox.

5.1.2 Comment puis-je créer un compte myTobiiDynavox ?

Aller à [Créer un compte myTobiiDynavox](#) pour créer un compte myTobiiDynavox.

5.1.3 Comment sauvegarder mes données personnalisées ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.



Le bouton (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.



3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.





4. Cherchez l'icône (Connexion) dans le coin supérieur gauche de l'écran.
5. Utilisez le clavier pour saisir votre nom d'utilisateur dans le champ **Nom d'utilisateur**.
6. Utilisez le clavier pour saisir votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
7. Sélectionnez le bouton **Se connecter**.
8. Sélectionnez le bouton **Sauvegarde**.

La date de la sauvegarde et le nom du dispositif à partir duquel elle est effectuée sont affichés à gauche du bouton Sauvegarde lorsqu'une sauvegarde est effectuée.



9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter .

5.1.4 Comment puis-je restaurer mes données personnalisées ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.



Le bouton (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.



2. Sélectionnez le bouton (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.



3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.



4. Cherchez l'icône (Connexion) dans le coin supérieur gauche de l'écran.
5. Utilisez le clavier pour saisir votre nom d'utilisateur dans le champ **Nom d'utilisateur**.
6. Utilisez le clavier pour saisir votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
7. Sélectionnez le bouton **Se connecter**.
8. Sélectionnez le bouton **Restaurer**.

La date de la restauration est affichée à gauche du bouton Restaurer lorsqu'une restauration est effectuée.




9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter .

5.2 Activation



Disponible uniquement si une commande oculaire est installée et activée.

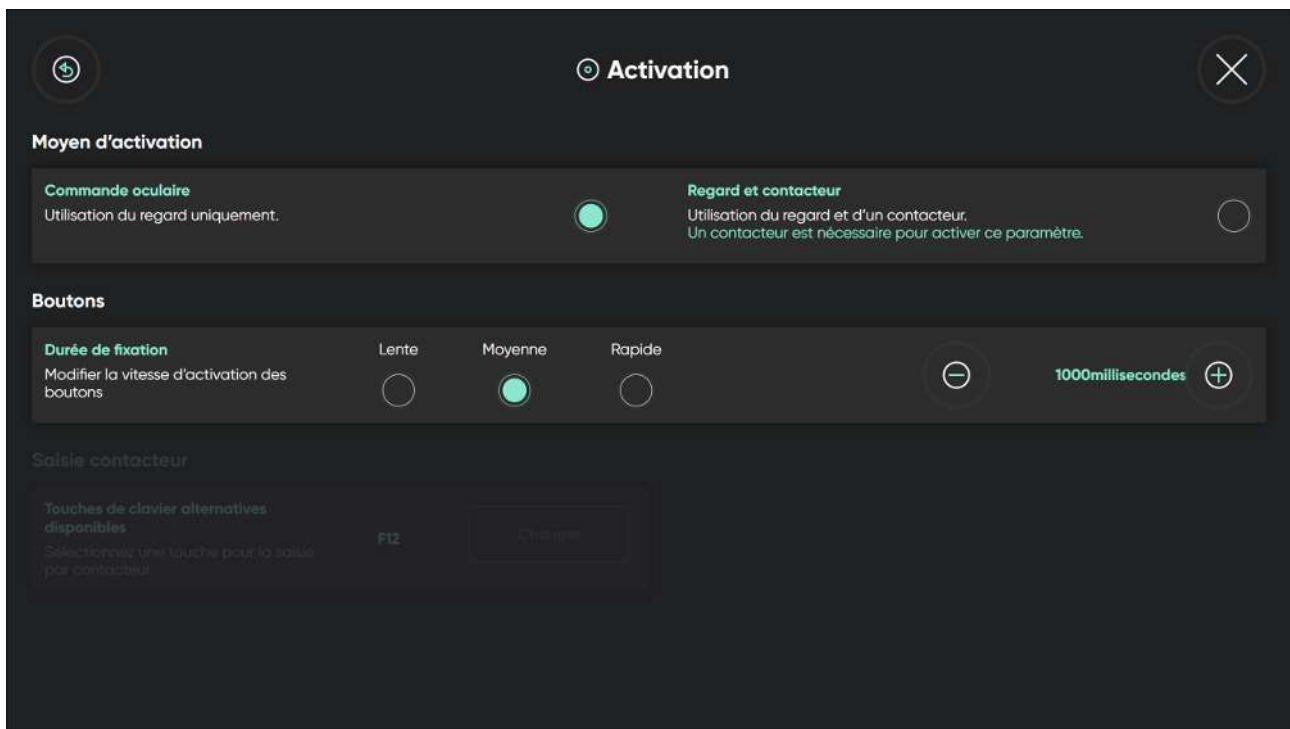

5.2.1 Moyen d'activation

5.2.1.1 Comment puis-je sélectionner mon moyen d'activation dans TD Talk ?



La sélection du moyen d'activation aux fins d'activation ne fait pas référence à l'activation des touches du clavier, mais à tous les autres types d'activation dans TD Talk.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.



Le bouton (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.



3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.



4. Recherchez l'icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Posez votre regard sur la section **Moyen d'activation**.

7. Sélectionnez le bouton radio du **Moyen d'activation** que vous souhaitez utiliser parmi les choix suivants :
 - **Gaze** - Utilisation de la commande oculaire uniquement (par défaut).
 - Commande oculaire et contacteur - Utilisation de la commande oculaire et d'un contacteur.



Un contacteur est nécessaire pour activer ce paramètre.



8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.



9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.2.2 Boutons

5.2.2.1 Comment puis-je modifier la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?



Le terme « boutons » ne désigne pas les boutons du clavier, mais ceux situés partout ailleurs dans TD Talk.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.



Le bouton (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.



3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.



4. Recherchez l'icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.



5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Posez votre regard sur la section **Boutons**.

7. Sélectionnez l'un des boutons radio de la **durée de fixation** pour choisir l'une des valeurs suivantes :

- Lente
- **Moyen** (par défaut)
- Rapide



8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.



9. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.2.2.2 Comment puis-je affiner la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.



Le bouton (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.



3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.



4. Recherchez l'icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.



5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Posez votre regard sur la section **Boutons**.

7. Sélectionner l'un des boutons suivants pour affiner la **durée de fixation** :



- — pour diminuer le temps de fixation



- — pour augmenter le temps de fixation

La valeur peut être modifiée entre 200 ms et à l'infini



8. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.2.3 Saisie contacteur

Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.



Si une saisie contacteur est définie, cette touche du clavier agira également en tant que contacteur lorsqu'elle sera sélectionnée sur un clavier externe connecté.

5.2.3.1 Comment puis-je paramétrer une saisie contacteur sur mon contacteur dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l'icône  (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Consultez la section **Saisie contacteur**.

7. Sélectionnez le bouton **Modifier**.



8. Sélectionnez le bouton radio de la touche du clavier à utiliser pour la **Saisie contacteur**.

9. Sélectionnez le bouton **Ok** pour appliquer votre choix, et le bouton **Annuler** pour annuler.

10. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

11. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3 Clavier

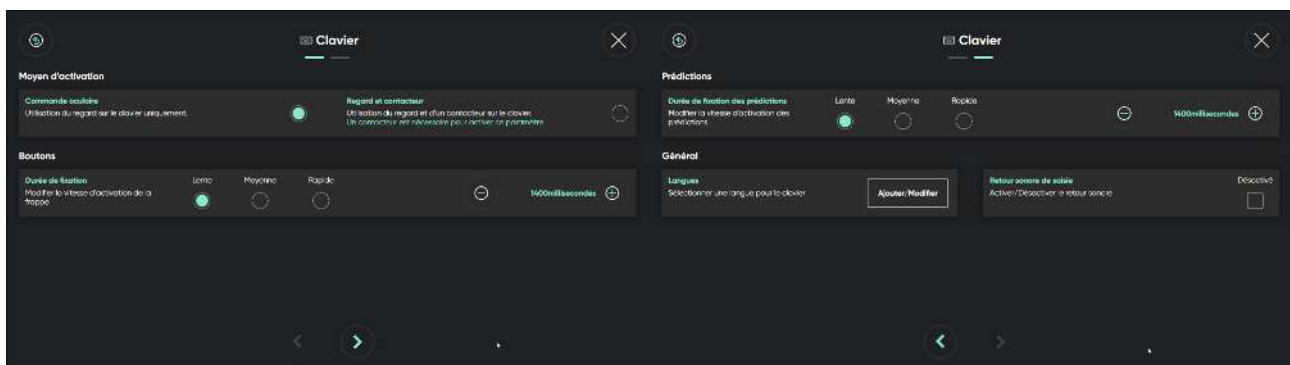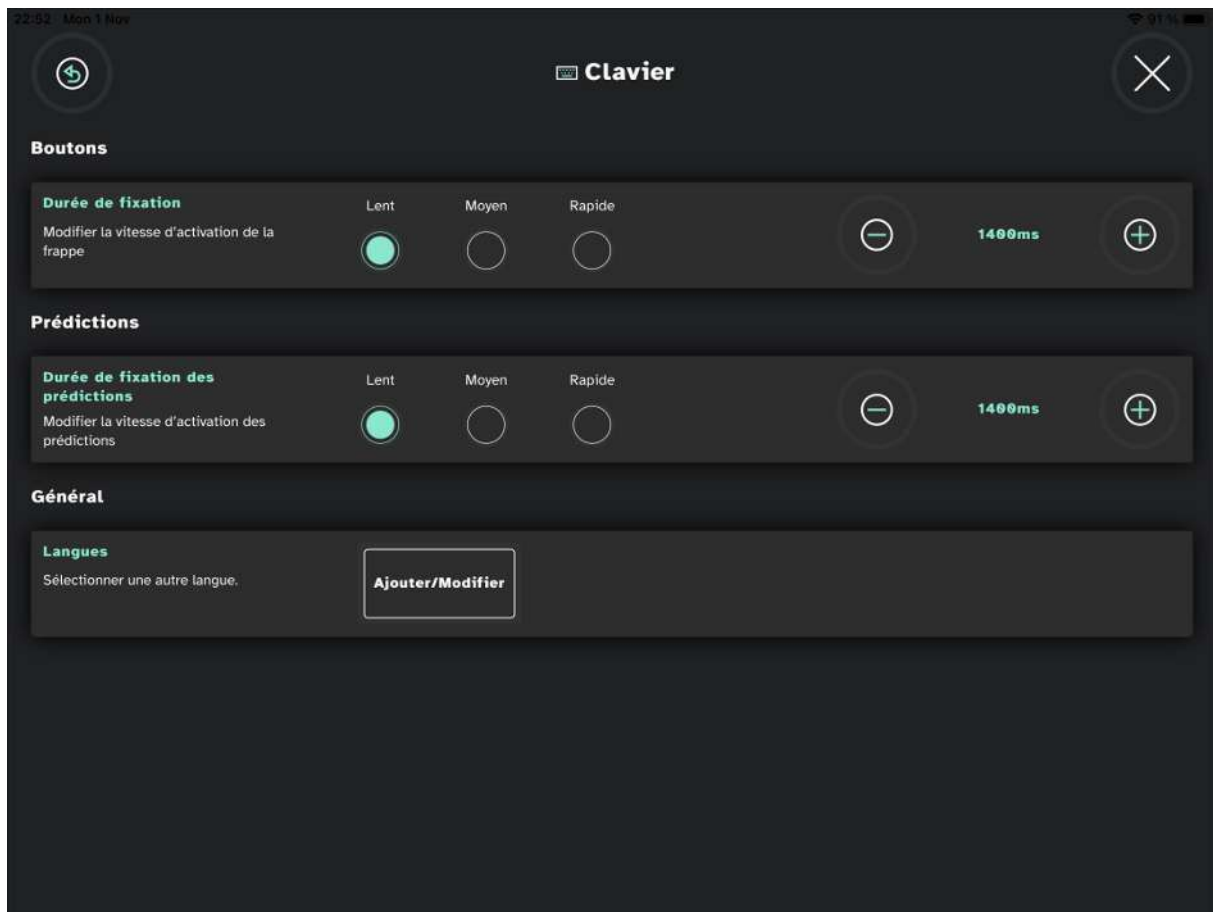

5.3.1 Moyen d'activation

5.3.1.1 Comment puis-je sélectionner mon moyen d'activation du clavier dans TD Talk ?



La sélection du moyen d'activation du clavier fait uniquement référence à l'activation des boutons du clavier dans TD Talk.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Recherchez l'icône  (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Posez votre regard sur la section **Moyen d'activation**.
7. Sélectionnez le bouton radio du **Moyen d'activation** que vous souhaitez utiliser parmi les choix suivants :
 - **Gaze** - Utilisation de la commande oculaire uniquement (par défaut).
 - Commande oculaire et contacteur - Utilisation de la commande oculaire et d'un contacteur.

 Un contacteur est nécessaire pour activer ce paramètre.

8. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3.2 Boutons

5.3.2.1 Comment puis-je modifier la durée de fixation pour les boutons du clavier dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Recherchez l'icône  (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Posez votre regard sur la section **Boutons**.
7. Sélectionnez l'un des boutons radio de la **durée de fixation** pour choisir l'une des valeurs suivantes :
 - Lente
 - **Moyen** (par défaut)
 - Rapide

8. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3.2.2 Comment puis-je affiner la durée de fixation pour activer les boutons dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Recherchez l'icône  (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Posez votre regard sur la section **Boutons**.
7. Sélectionner l'un des boutons radio suivants pour affiner la **durée de fixation** :

—  — pour diminuer le temps de fixation

—  — pour augmenter le temps de fixation

La valeur peut être modifiée entre 200 ms et à l'infini

8. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3.3 Prédiction

5.3.3.1 Comment puis-je modifier la durée de fixation des boutons de prédiction dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Recherchez l'icône  (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton  (page suivante) situé en bas de l'écran.
7. Posez votre regard sur la section **Prédiction**.
8. Sélectionnez l'un des boutons radio de la **durée de fixation** pour choisir l'une des valeurs suivantes :
 - Lente
 - **Medium** (par défaut)
 - Rapide
9. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
10. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3.3.2 Comment puis-je affiner la durée de fixation des boutons de prédiction dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Recherchez l'icône  (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Sélectionnez le bouton  (page suivante) situé en bas de l'écran.
7. Posez votre regard sur la section **Prédiction**.
8. Sélectionner l'un des boutons radio suivants pour affiner la **durée de fixation** :

—  — pour diminuer le temps de fixation

—  — pour augmenter le temps de fixation

La valeur peut être modifiée entre 200 ms et à l'infini

9. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
10. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3.4 Général

5.3.4.1 Comment puis-je ajouter une nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Recherchez l'icône  (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton  (page suivante) situé en bas de l'écran.
7. Posez votre regard sur la section **Généralités**.
8. Sélectionnez le bouton « Choisir la langue du clavier » **Ajouter/Modifier**.
9. Sélectionnez l'onglet **Télécharger**.

10. Sélectionnez le bouton  (Télécharger) situé à côté de la langue pour démarrer le téléchargement du nouveau clavier.
11. Sélectionnez le bouton **Télécharger** pour démarrer le téléchargement, ou le bouton **Annuler** pour annuler le téléchargement.
12. Sélectionnez l'onglet **Installé**.
13. Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la langue que vous souhaitez utiliser pour l'activer.

14. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

15. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3.4.2 Comment puis-je sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l'icône  (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Sélectionnez le bouton  (page suivante) situé en bas de l'écran.
7. Sélectionnez le bouton « Choisir la langue du clavier » **Ajouter/Modifier**.
8. Sélectionnez l'onglet **Installé**.
9. Sélectionnez le bouton radio situé à côté des langues souhaitées pour activer la langue du clavier dans ces langues.



Assurez-vous de sélectionner le bouton radio de toutes les langues pour lesquelles vous souhaitez qu'une voix soit disponible.

10. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

11. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.3.4.3 Comment puis-je activer/désactiver le retour sonore de saisie dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.



4. Recherchez l'icône  (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.



6. Sélectionnez le bouton  (page suivante) situé en bas de l'écran.
7. Posez votre regard sur la section **Généralités**.
8. Faites basculer le bouton **Activer/Désactiver** du « retour sonore de saisie » pour :
 - Activé
 - Désactivé




9. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.




10. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.4 Conversations

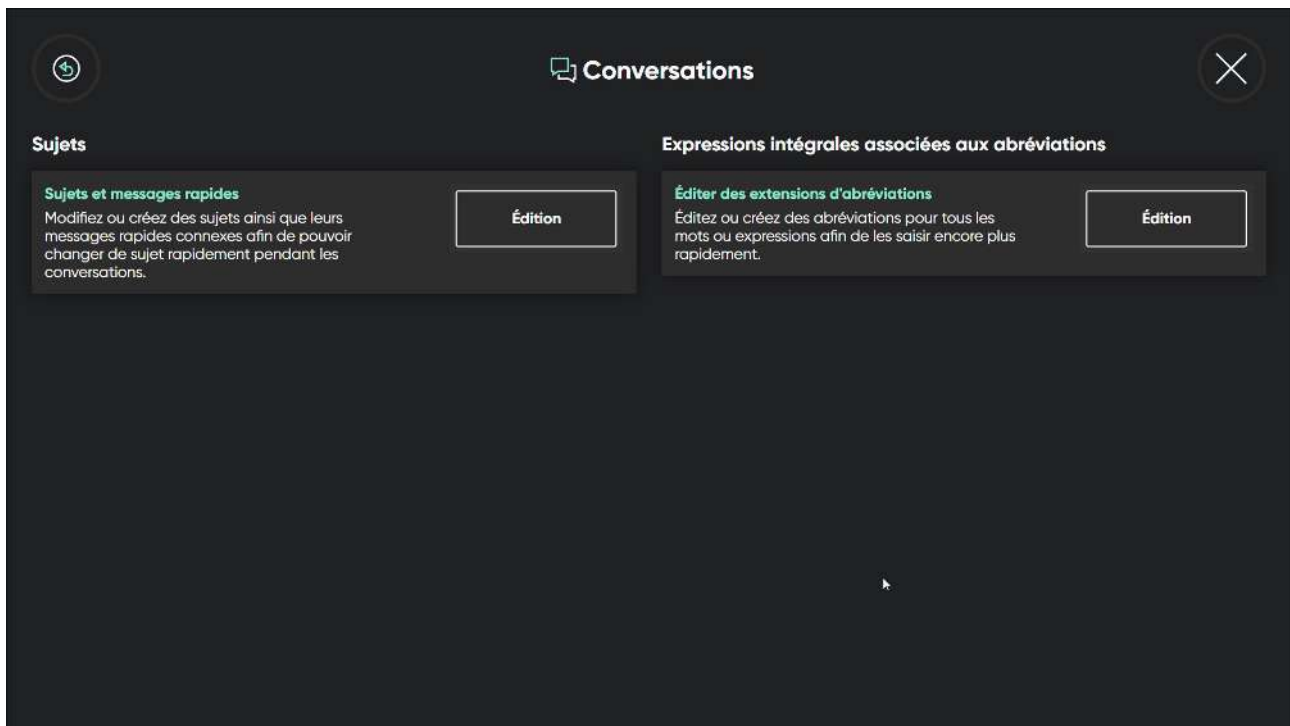

5.4.1 Sujets

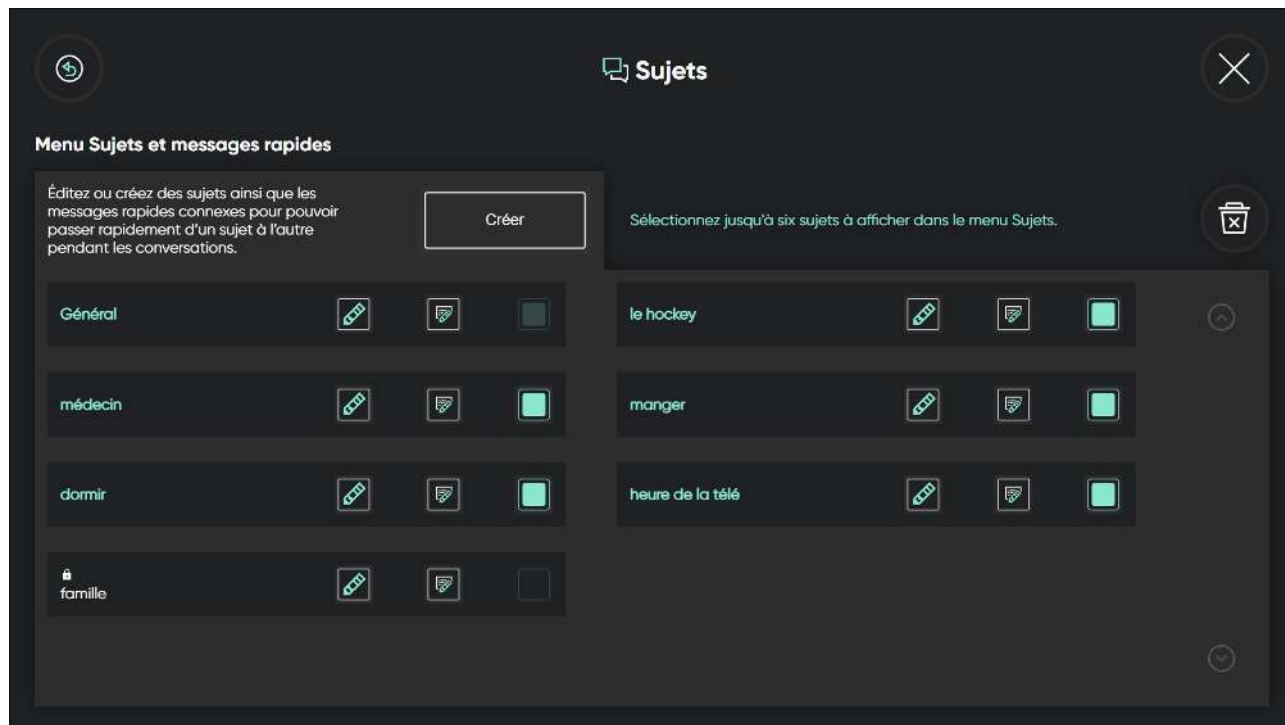

5.4.1.1 Comment puis-je créer un nouveau sujet dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Recherchez l'icône  (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton **Créer**.
7. Utilisez le clavier pour nommer le nouveau sujet.

 Sélectionnez la case à cocher **Mode Confidentialité** pour désactiver la prédiction et l'apprentissage de phrases.

8. Sélectionnez l'icône  (Enregistrer) pour enregistrer.
9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter .

5.4.1.2 Comment puis-je modifier le nom d'un sujet TD Talk?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l'icône  (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Sélectionnez le bouton  (Édition) situé à côté du nom du sujet.

7. Utilisez le clavier pour modifier le nom du sujet.

 Sélectionnez la case à cocher **Mode Confidentialité** pour désactiver la prédiction et l'apprentissage de phrases.

8. Sélectionnez l'icône  (Enregistrer) pour enregistrer.

9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter .

5.4.1.3 Comment puis-je rendre le sujet TD Talk confidentiel ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l'icône  (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Sélectionnez le bouton  (Édition) situé à côté du nom du sujet.

7. Sélectionnez la case à cocher **Mode Confidentialité** pour désactiver la prédiction et l'apprentissage de phrases.

8. Sélectionnez l'icône  (Enregistrer) pour enregistrer.

9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter .

5.4.1.4 Comment puis-je sélectionner les sujets que je souhaite activer dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Accédez à l'icône  (Conversations) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton **Éditer** pour éditer les sujets et les messages rapides dans la section Sujets.
7. Sélectionnez les **cases à cocher** des sujets que vous souhaitez activer.



Jusqu'à six (6) sujets disponibles dans le menu des thèmes peuvent être sélectionnés.

8. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter la page d'édition.
9. Sélectionnez le bouton  (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

5.4.1.5 Comment puis-je supprimer un sujet dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Accédez à l'icône  (Conversations) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton **Éditer** pour éditer les sujets et les messages rapides dans la section Sujets.
7. Sélectionnez le bouton  (Supprimer).
8. Sélectionnez le bouton  (Supprimer) situé à côté du nom du sujet que vous souhaitez supprimer.
9. Sélectionnez le bouton **Supprimer** pour supprimer le sujet, ou le bouton **Annuler** pour annuler.
10. Sélectionnez le bouton  (Terminé) une fois la suppression effectuée.
11. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter la page d'édition.
12. Sélectionnez le bouton  (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

5.4.1.6 Comment puis-je éditer les messages rapides dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Accédez à l'icône  (Conversations) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton **Éditer** pour éditer les sujets et les messages rapides dans la section Sujets.
7. Sélectionnez le bouton  (Éditer les messages rapides).
8. Sélectionnez le bouton  (Édition) situé à côté du message à éditer.
9. Éditez le message avec le clavier.
10. Sélectionnez le bouton  (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées au message rapide.
11. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter la page d'édition.
12. Sélectionnez le bouton  (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

5.4.1.7 Comment puis-je ajouter des messages rapides dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Accédez à l'icône  (Conversations) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton **Éditer** pour éditer les sujets et les messages rapides dans la section Sujets.
7. Sélectionnez le bouton  (Éditer les messages rapides).
8. Sélectionnez le bouton  (Ajouter) situé à côté d'Ajouter un nouvel emplacement.
Jusqu'à trois (3) pages de messages rapides liés à chaque sujet sont à votre disposition.

Utilisez les boutons  et  pour parcourir les pages.

9. Tapez le nouveau message en utilisant le clavier.
10. Sélectionnez le bouton  (Enregistrer) pour enregistrer le nouveau message rapide.
11. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter la page d'édition.

12. Sélectionnez le bouton  (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

5.4.1.8 Comment puis-je supprimer un message rapide dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Accédez à l'icône  (Conversations) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Sélectionnez le bouton **Éditer** pour éditer les sujets et les messages rapides dans la section Sujets.

7. Sélectionnez le bouton  (Éditer les messages rapides).

8. Sélectionnez le bouton  (Édition) situé à côté du message à supprimer.


9. Sélectionnez le bouton Supprimer le message .

10. Sélectionnez le bouton  (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées au message rapide.

11. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter la page d'édition.

12. Sélectionnez le bouton  (Clavier) pour revenir à l'écran d'accueil.

5.4.2 Expressions intégrales associées aux abréviations

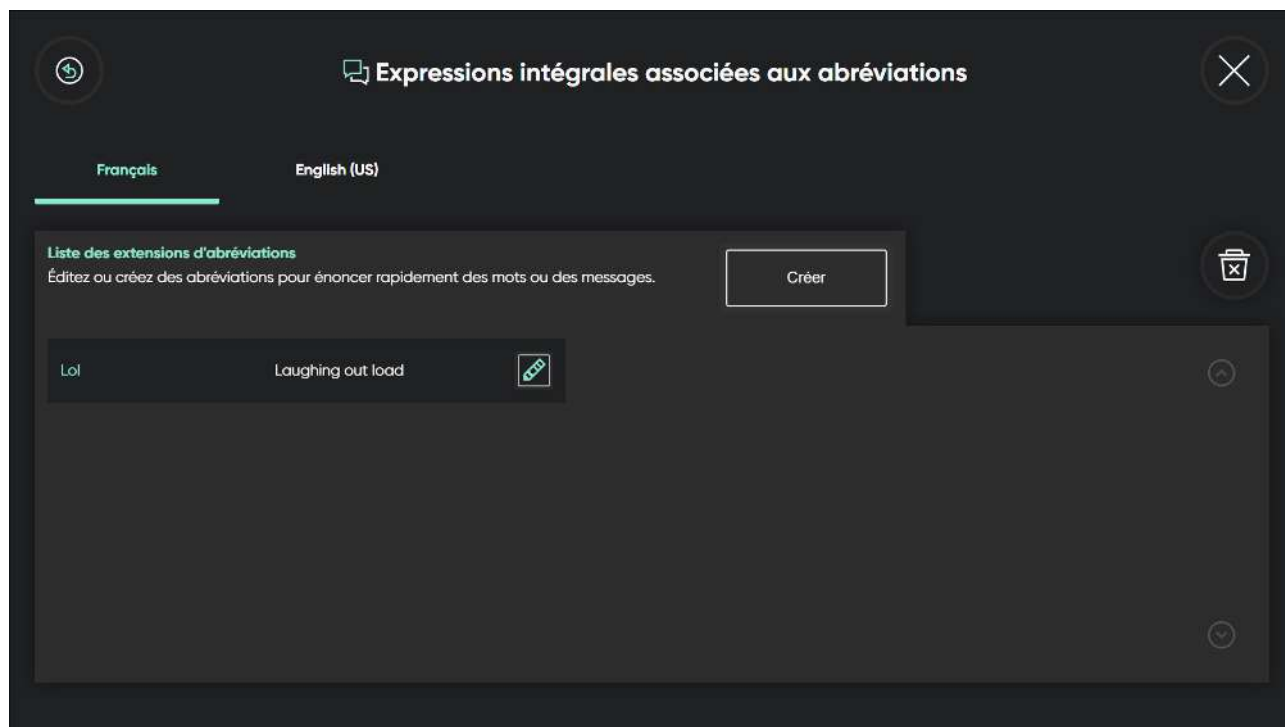

5.4.2.1 Comment puis-je ajouter des expressions intégrales associées aux abréviations dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Accédez à l'icône  (Conversations) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Sélectionnez le bouton **Modifier** situé dans la zone Modifier les expressions intégrales associées aux abréviations dans la section Expressions intégrales associées aux abréviations.

7. Sélectionnez l'onglet **langue** pour accéder à la langue installée dans laquelle vous souhaitez ajouter une expression intégrale associée à une abréviation.

8. Sélectionnez le bouton **Créer**.

9. Saisissez l'abréviation que vous souhaitez créer dans la zone de texte **Abréviation**.

10. Sélectionnez l'icône  située à côté de la zone de texte **Mot ou message**.

11. Saisissez le mot ou le message pour lequel vous avez créé l'abréviation dans la zone de texte **Mot ou message**.

12. Sélectionnez le bouton  (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées à l'expression intégrale associée à l'abréviation.

13. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de Conversations.

14. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
15. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.4.2.2 Comment puis-je éditer des expressions intégrales associées aux abréviations dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Accédez à l'icône  (Conversations) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton **Modifier** situé dans la zone Modifier les expressions intégrales associées aux abréviations dans la section Expressions intégrales associées aux abréviations.
7. Sélectionnez l'onglet **langue** pour accéder à la langue installée dans laquelle vous souhaitez ajouter une expression intégrale associée à une abréviation.
8. Sélectionnez l'icône  située à côté de l'abréviation que vous souhaitez modifier.
9. Éditez la nouvelle abréviation que vous souhaitez créer dans la zone de texte **Abréviation**.
10. Sélectionnez l'icône  située à côté de la zone de texte **Mot ou message**.
11. Éditez le mot ou le message pour lequel vous avez créé l'abréviation dans la zone de texte **Mot ou message**.

12. Sélectionnez le bouton  (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées à l'expression intégrale associée à l'abréviation.
13. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de Conversations.
14. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
15. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.4.2.3 Comment puis-je supprimer une expression intégrale associée à une abréviation dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.



4. Accédez à l'icône (Conversations) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton **Modifier** situé dans la zone Modifier les expressions intégrales associées aux abréviations dans la section Expressions intégrales associées aux abréviations.
7. Sélectionnez l'onglet **langue** pour accéder à la langue installée dans laquelle vous souhaitez éditer une expression intégrale associée à une abréviation.



8. Sélectionnez le bouton (Supprimer).



9. Sélectionnez le bouton (Supprimer) situé à côté de l'abréviation que vous souhaitez supprimer.
10. Sélectionnez le bouton **Supprimer** pour confirmer, ou le bouton **Annuler** pour annuler la suppression de l'abréviation.



11. Sélectionnez le bouton (Terminé) une fois la suppression effectuée.



12. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de Conversations.



13. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.




14. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.5

Voix



Vous pouvez définir la voix de vos langues de clavier ici

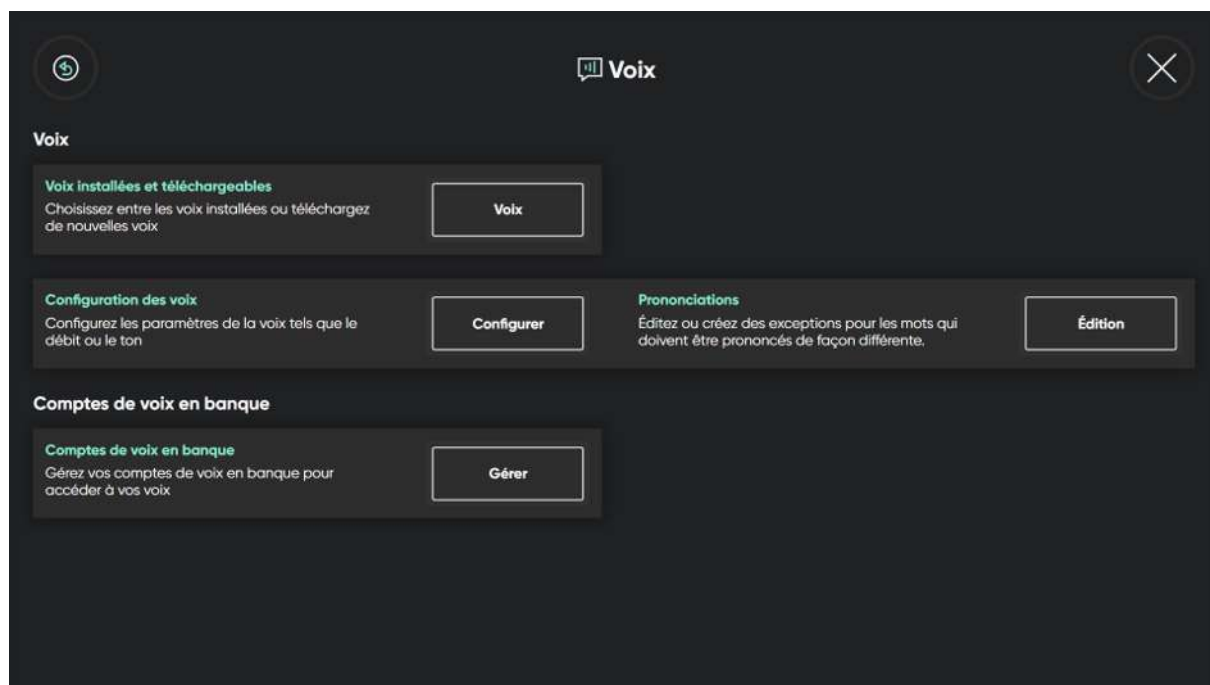

Toutes les langues installées sont affichées dans la partie supérieure de l'écran. Lorsque la langue a été sélectionnée, les voix disponibles pour cette langue s'affichent dans la liste située sous les langues. Pour essayer une voix,

sélectionnez le  situé à côté de cette même voix pour l'essayer. Si disponible.

5.5.1 Voix

5.5.1.1 Voix installées et téléchargeables

There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.

Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see *5.5.1.1.3 Comment puis-je appliquer un filtre aux voix disponibles dans TD Talk ?, page 41*

5.5.1.1.1 Comment puis-je télécharger une nouvelle voix dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l'icône  (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Posez votre regard sur la section **Voix**

7. Sélectionnez le bouton **Voix** pour accéder aux voix installées et téléchargeables.

8. Sélectionnez l'onglet **Télécharger**.

9. Sélectionnez l'onglet **langue** pour accéder à la langue installée dans laquelle vous souhaitez parler.



Si la langue souhaitée est manquante, consultez *5.3.4.1 Comment puis-je ajouter une nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?, page 29* et *5.3.4.2 Comment puis-je sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition dans TD Talk ?, page 30*.

10. Sélectionnez le bouton  (Télécharger) situé à côté de la voix pour démarrer le téléchargement de la nouvelle voix.

Utilisez les boutons « Faire défiler vers le haut » et « Faire défiler vers le bas » situés à droite pour faire défiler la liste des voix disponibles pour la langue sélectionnée.



Pour essayer une voix, sélectionnez  à côté de la voix concernée.

11. Sélectionnez le bouton **Télécharger** pour démarrer le téléchargement, ou le bouton **Annuler** pour annuler le téléchargement.

12. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de la voix.

13. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

14. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.5.1.1.2 Comment puis-je sélectionner ma voix dans TD Talk ?



Le logo de Voice Banking Service apparaît derrière le nom de chaque voix provenant du système Voice Banking.

- Acapela MyOwnVoice



- ModelTalker



- The Voice Keeper



1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.



Le bouton (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.



3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.



4. Recherchez l'icône (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.



5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Posez votre regard sur la section **Voix**

7. Sélectionnez le bouton **Voix** pour accéder aux voix installées et téléchargeables.

8. Sélectionnez l'onglet **langue** pour accéder à la langue installée dans laquelle vous souhaitez parler.



Si la langue souhaitée est manquante, consultez 5.3.4.1 *Comment puis-je ajouter une nouvelle langue ou une langue pour le clavier dans TD Talk ?*, page 29 et 5.3.4.2 *Comment puis-je sélectionner et activer les langues du clavier à utiliser ou à mettre à disposition dans TD Talk ?*, page 30.

9. Sélectionnez la voix que vous souhaitez utiliser dans la liste des voix disponibles pour la langue utilisée pour l'énonciation.

Utilisez les boutons « Faire défiler vers le haut » et « Faire défiler vers le bas » situés à droite pour faire défiler la liste des voix disponibles pour la langue sélectionnée.



Pour essayer une voix, sélectionnez à côté de la voix concernée.



10. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de la voix.



11. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.



12. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.



5.5.1.1.3 Comment puis-je appliquer un filtre aux voix disponibles dans TD Talk ?

On the **Installed** or **Download** tab, do the following:




1. Sélectionnez le bouton (filtre).

2. Cochez la (les) case(s) situé(e)s à côté de l'(des) option(s) que vous souhaitez utiliser.

Choix disponibles :

- Sexe - Homme, femme
- Âge - Enfant, adolescent, adulte

5.5.1.2 Configuration des voix

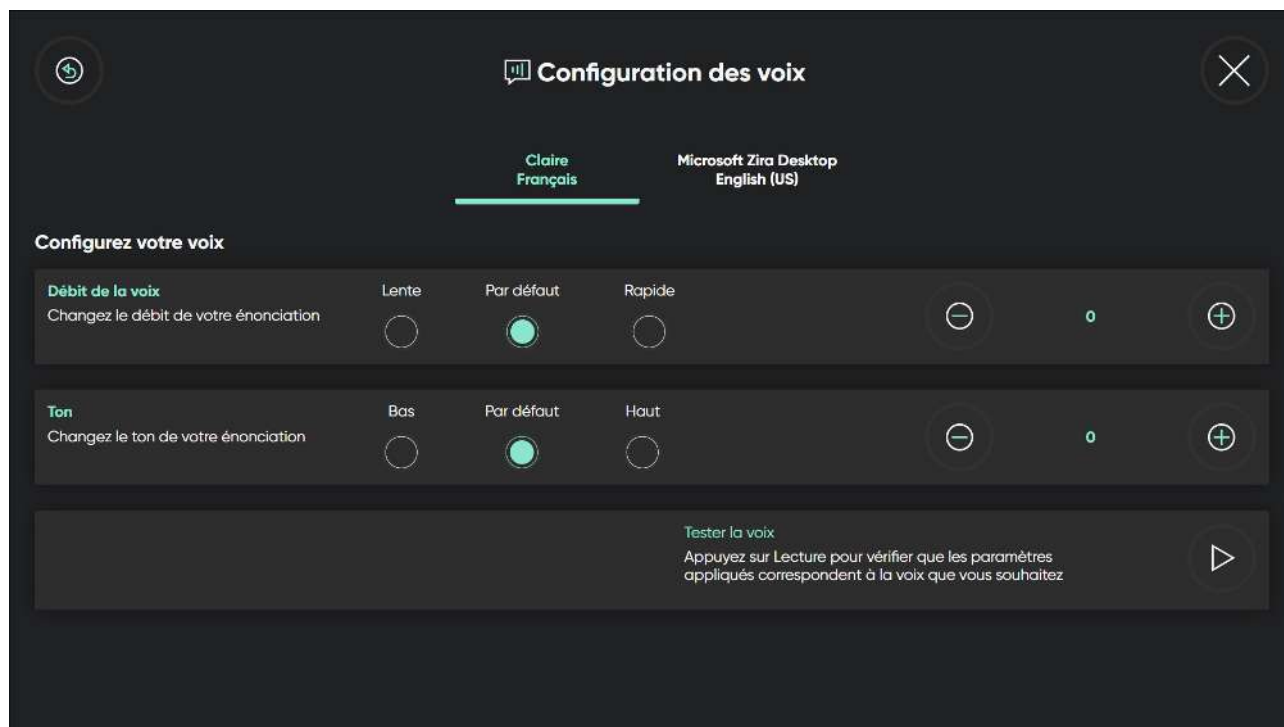

5.5.1.2.1 Comment puis-je modifier ma Voix dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l'icône  (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Posez votre regard sur la section **Voix**

7. Sélectionnez le bouton **Configurer** pour effectuer la configuration de la voix.

8. Sélectionnez la voix à modifier parmi les voix disponibles.

9. Sélectionnez l'un des boutons radio du **Débit de la voix** pour choisir l'une des valeurs suivantes :

- Lente
- **Par défaut**
- Rapide

pour changer le débit de votre énonciation.

10. Sélectionnez l'un des boutons radio suivants pour affiner le **Débit de la voix** :

-  — Pour ralentir le débit de la voix

-  — Pour accélérer le débit de la voix

La valeur peut être modifiée entre -10 et +10.

11. Sélectionnez l'un des boutons radio du **Ton** pour choisir l'une des valeurs suivantes :

- Bas
- **Par défaut**
- Haut

pour changer le débit de votre énonciation.



Pour écouter la nouvelle voix, sélectionnez  dans la section Tester la voix.

12. Sélectionner l'un des boutons radio suivants pour affiner le **ton** :

-  — Pour baisser le ton

-  — Pour élever le ton

La valeur peut être modifiée entre -10 et +10.




Pour écouter la nouvelle voix, sélectionnez  dans la section Tester la voix.

13. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de la voix.

14. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

15. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.5.1.3 Prononciations

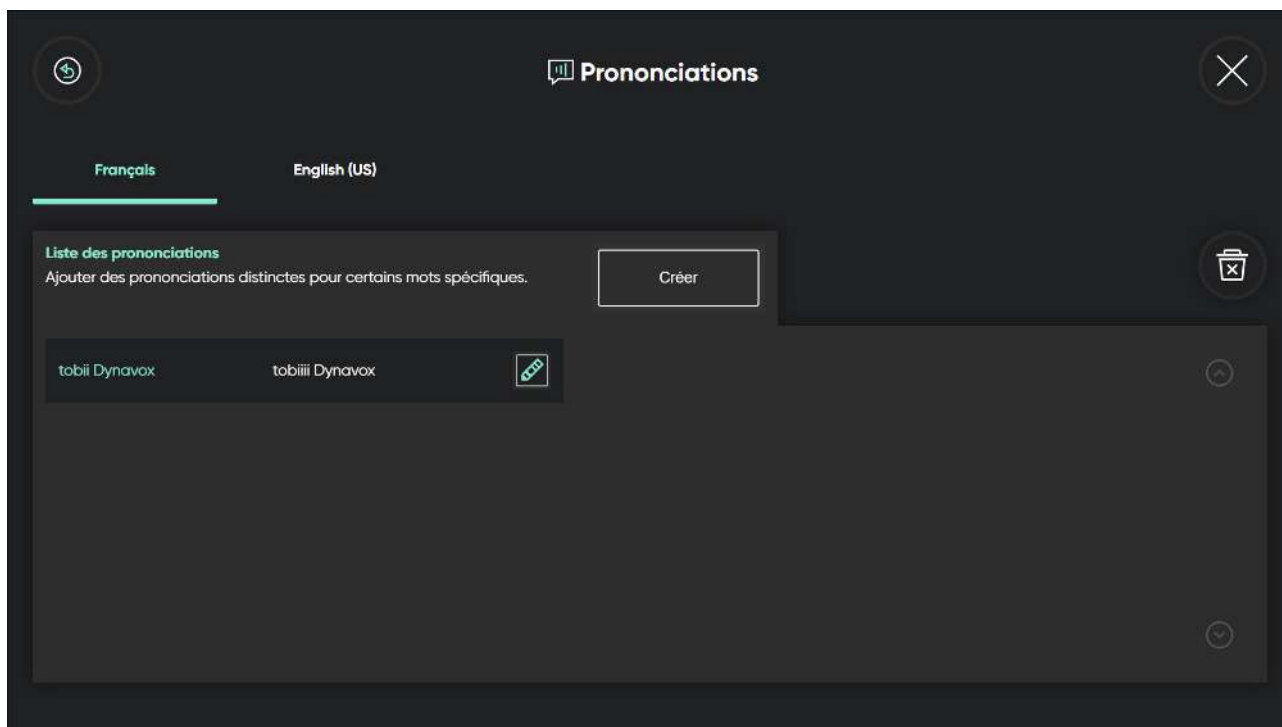

5.5.1.3.1 Comment puis-je créer des exceptions de prononciation dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Recherchez l'icône  (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Posez votre regard sur la section **Voix**
7. Sélectionnez le bouton **Créer** de Prononciations.
8. Sélectionnez l'onglet **langue** pour accéder à la langue installée dans laquelle vous souhaitez ajouter une exception de prononciation.
9. Sélectionnez le bouton **Créer**.
10. Saisissez le mot pour lequel vous souhaitez créer une exception de prononciation dans la zone de texte **Mot**.
11. Sélectionnez l'icône  située à côté de la zone de texte **Prononciation**.
12. Dans la zone de texte **Prononciation**, saisissez la façon dont vous souhaitez que le mot soit prononcé.
13. Pour écouter l'exception de prononciation, sélectionnez  à côté de la zone de texte Prononciation.
14. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de la voix.
15. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
16. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.5.2 Comptes de Voice Banking

TD Talk peut se connecter à trois services Voice Banking différents :

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 

L'utilisateur doit disposer d'un compte et des identifiants de connexion à l'un de ces fournisseurs de services de banque vocale pour être en mesure de se connecter et d'utiliser sa voix de synthèse personnelle.

5.5.2.1 Comptes de voix en banque

5.5.2.1.1 Comment puis-je utiliser ma voix à partir de mon service Voice Banking ?

 Un accès à Internet est requis pour se connecter au service.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l'icône  (Voix) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Consultez la **section Comptes Voice Banking**.


Sélectionnez le bouton **Gérer** des comptes Voice Banking.

7. Sélectionnez le bouton **Se connecter** dans la section de votre Voice Banking Service.

8. Saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.

9. Sélectionnez le bouton **Se connecter**.

La voix personnelle sera téléchargée et automatiquement sélectionnée comme voix par défaut pour l'utilisateur.

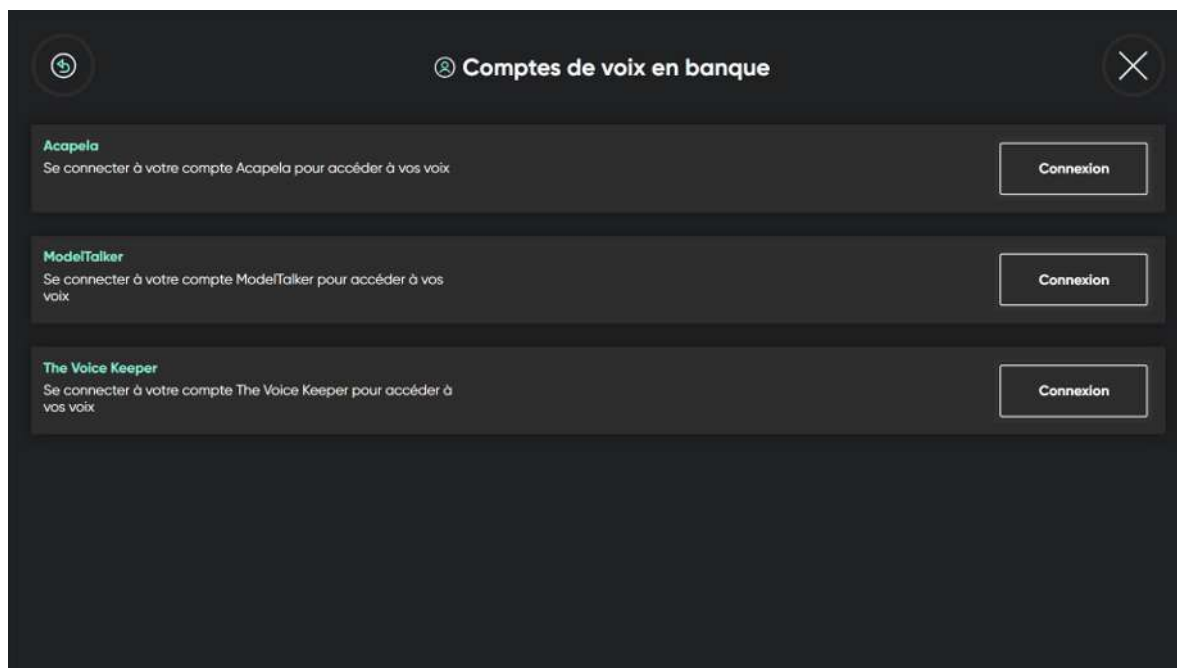

Cela se produira lorsque des voix de synthèse personnelles en plusieurs langues seront disponibles

10. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de la voix.


11. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

12. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.6 Dispositif



Disponible uniquement sur le TD Pilot.

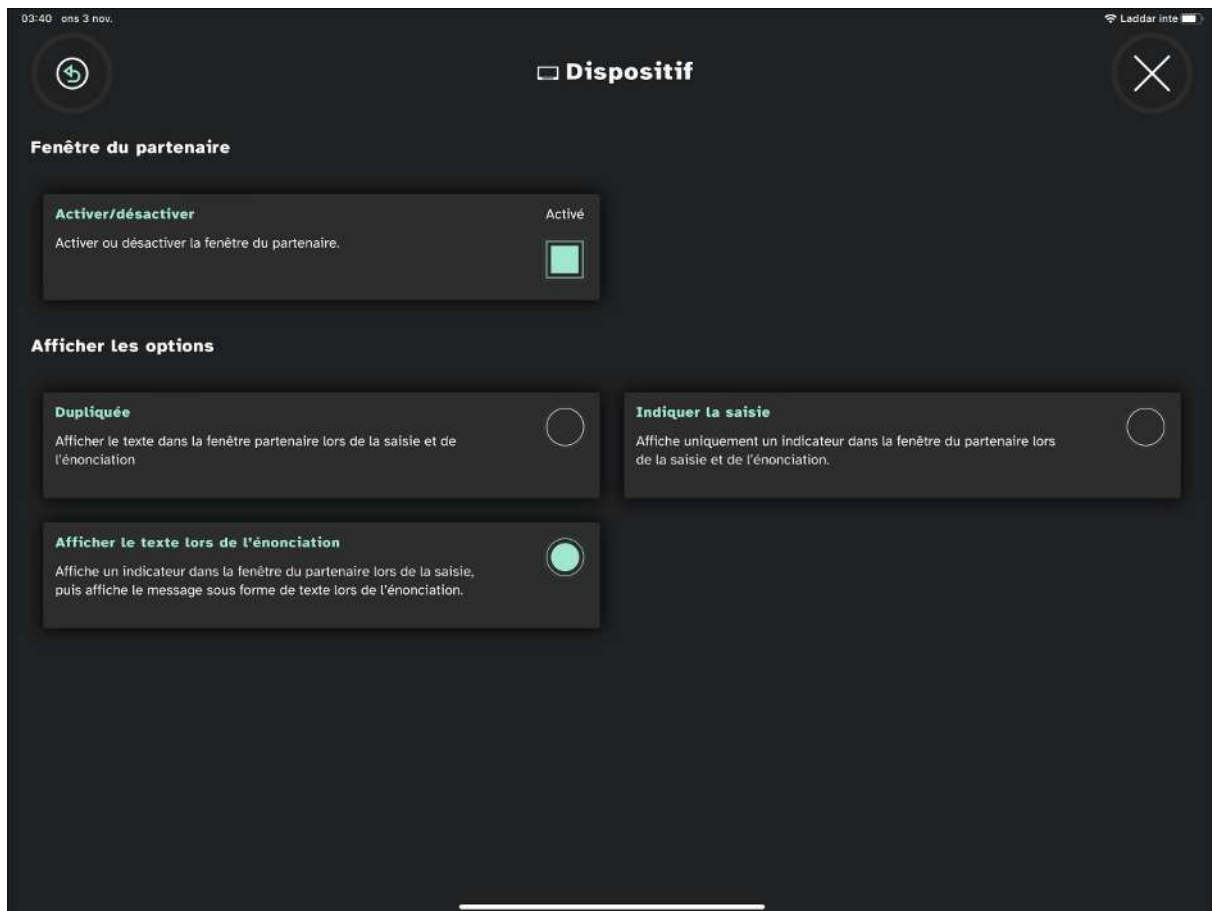

5.6.1 Fenêtre du partenaire

5.6.1.1 Comment puis-je activer ou désactiver la fenêtre du partenaire dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.



Le bouton (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.



3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.



4. Recherchez l'icône (Dispositif) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.



5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Posez votre regard sur la section **Fenêtre du partenaire**.
7. Faites basculer le bouton **Activer ou désactiver** sur Activer ou Désactiver pour « **Choisir si la fenêtre du partenaire doit être activée ou désactivée** » :

- Activé
- Désactivé

8. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.6.1.2 Comment puis-je paramétrer les options d'affichage de la fenêtre du partenaire dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Recherchez l'icône  (Dispositif) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

6. Posez votre regard sur la section **Options d'affichage**.

7. Sélectionnez l'un des boutons suivants pour sélectionner l'option d'affichage de la fenêtre du Partenaire :
 - Dupliquée — Affiche le texte dans la fenêtre partenaire lors de la saisie et de l'énonciation.
 - Afficher le texte lors de l'énonciation — Affiche un indicateur dans la fenêtre du partenaire lors de la saisie, puis affiche le message sous forme de texte lors de l'énonciation.
 - Indiquer la saisie — Affiche uniquement un indicateur dans la fenêtre du partenaire lors de la saisie et de l'énonciation.

8. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

9. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.7 Général

5.7.1 Langue de l'application

5.7.1.1 Comment puis-je définir la langue de l'application dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.

5. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
6. Recherchez l'icône  (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
7. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
8. Posez votre regard sur la section **Langue de l'application**.
9. Sélectionnez le bouton **Modifier**.
10. Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la langue que vous souhaitez utiliser dans l'application.
11. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
12. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.7.2 Taille du texte

5.7.2.1 Comment puis-je changer la taille du texte dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
5. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
6. Recherchez l'icône  (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
7. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
8. Posez votre regard sur la section **Taille du texte**.
9. Sélectionnez l'un des boutons radio de la **Taille du texte** pour choisir l'une des valeurs suivantes :
 - **Défaut** (valeur par défaut)
 - Grande taille
10. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
11. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.7.3 Avis

5.7.3.1 Comment puis-je envoyer un avis à Tobii Dynavox dans TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
5. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
6. Recherchez l'icône  (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
7. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
8. Posez votre regard dans la section **Avis**.
9. Sélectionnez le bouton **Avis**.
10. Utilisez le **clavier** pour taper votre adresse email.
11. Sélectionnez le bouton  de la ligne d'objet.
12. Utilisez le **clavier** pour remplir la ligne d'objet de l'e-mail.
13. Sélectionnez le bouton  du champ du texte du message.
14. Utilisez le **clavier** pour rédiger le message.
15. Sélectionnez le bouton  pour fermer le champ du texte du message.
16. Sélectionnez le bouton **Envoyer un avis** pour envoyer l'avis à Tobii Dynavox.
17. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
18. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.7.4 Conditions d'utilisation et déclaration de confidentialité

5.7.4.1 Comment puis-je ouvrir les conditions d'utilisation ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.
3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.
4. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
5. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
6. Recherchez l'icône  (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
7. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

8. Veuillez prendre connaissance de la section **Conditions d'utilisation et déclaration de confidentialité**.
9. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

10. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

11. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.7.4.2 Comment puis-je ouvrir la déclaration de confidentialité ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.

5. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.

6. Recherchez l'icône  (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.

7. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

8. Veuillez prendre connaissance de la section **Conditions d'utilisation et déclaration de confidentialité**.

9. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.

10. Sélectionnez le bouton  (Avancer).

11. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.

12. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

5.7.5 Recueillir les journaux

5.7.5.1 Comment puis-je recueillir des journaux de TD Talk ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

Le bouton  (Tableau de bord) apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.

2. Sélectionnez le bouton  (Tableau de bord) pour ouvrir le Tableau de bord.

3. Sélectionnez l'icône  (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Talk.

4. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.

5. Sélectionnez le bouton  (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
6. Recherchez l'icône  (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
7. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
La page des paramètres Général s'ouvre.
8. Posez votre regard sur la section **Recueillir les journaux**.
9. Sélectionnez le bouton **Journal**.
10. Sélectionnez le bouton **Oui**.



Les journaux seront créés sur le bureau.

11. Sélectionnez le bouton  (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Talk.
12. Sélectionnez le bouton  (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Talk.

Tous droits réservés © Dynavox Group AB (Publ). Certains produits et services ne sont pas proposés sur certains marchés locaux. Les spécifications peuvent être soumises à des modifications sans avertissement préalable. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Assistance pour votre dispositif Tobii Dynavox

Obtenez de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des astuces sur l'utilisation du produit.

Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Contactez votre conseiller en solutions ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez votre conseiller en solutions Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir les coordonnées, visitez <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.