

TD Talk

ユーザーマニュアル



tobiidynavox

ユーザーマニュアル TD Talk

バージョン 1.8

2025-07-08

無断複写・転載を禁じます。

著作権 © Dynavox Group AB (publ)

本文書のいずれの部分も、発行者の事前の書面による許可がない場合、形式、手段（電子、コピー、記録など）を問わず、複製、取得システムでの保存、または送信が禁止されています。

請求される著作権保護には、画面ディスプレイ、メニューなどの画面に表示されるソフトウェアプログラムから生成された素材を含む（ただしこれらに限定されない）、法律または地域法で許可されるか本書で付与された著作権保護可能な素材および情報のすべての形式および内容が含まれます。

本書に含まれる情報は、Dynavox Group ABの所有物です。Dynavox Group ABによる書面による事前の許可なく、全体または一部を問わず複製することを禁じます。

本書内で記載されている製品名は、それぞれの所有者の商標や登録商標である可能性があります。発行者および著者は、これらの商標に対する権利を主張するものではありません。

本書の準備に際しては万全を期しておりますが、発行者と著者は、誤り、省略、あるいは本書に含まれる情報の使用や、プログラムとそれに付随するソースコードの使用により生じた損害賠償の責任を負いません。発行者と著者は、いかなる場合においても、本書より直接的または間接的に発生する、あるいは発生したと主張される利益の損失またはその他の商業上の損失の損害賠償に対し、一切の責任を負いません。

内容は予告なしに変更されることがあります。

Tobii Dynavox のウェブサイトを確認してください。

本文書の更新版については、www.TobiiDynavox.com を参照してください。

連絡先：

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
スウェーデン
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
米国
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
イギリス
電話：+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty.Ltd.
リンクアシストとしての取引
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
オーストラリア
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880



目次

1	ようこそ	6
1.1	システム要件	6
1.2	対応言語	6
1.3	TD Suiteの入手	6
2	リソースとサポート	7
2.1	Webリソースとサポート	7
2.2	学習ハブセンター	7
3	使用開始	8
3.1	TD Talkの概要	8
3.2	オフスクリーンメニュー	9
3.2.1	TD Talkのオフスクリーンメニューにアクセスする方法	9
3.3	ダッシュボード	10
3.3.1	TD Talkのダッシュボードにアクセスする方法	10
3.3.2	TD Talkを終了して閉じる方法	10
3.4	TD Talkを設定	11
4	TD Talkを使用	13
4.1	キーボードの使い方	13
4.2	予測を使用	13
4.2.1	単語予測	13
4.2.2	フレーズ予測	14
4.3	メッセージの編集	14
4.3.1	TD Talkでメッセージを編集する方法	14
4.4	コピー/ペースト	15
4.4.1	TD Talkでどのようにコピーを使いますか?	15
4.4.2	TD Talkでどのようにペーストを使いますか?	15
4.5	クイックメッセージの使用	15
4.5.1	TD Talkでクイックメッセージを使用する方法	15
4.5.2	クイックメッセージのトピックを変更する方法	16
4.6	言語を変更	17
4.6.1	TD Talkで話す言語を切り替える方法	17
4.7	チャット	17
4.8	半透明モード	18
4.8.1	半透明モードを開始する方法	18
4.8.2	半透明モードを終了する方法	18

4.9	TD Talkで略語展開を使用する方法	18
4.10	TD Phoneでアクションを元に戻す方法	19
5	TD Talkの設定	20
5.1	マイアカウント	21
5.1.1	myTobiiDynavox アカウントとは何ですか?	21
5.1.2	myTobiiDynavoxアカウントを作成するにはどうすればよいですか?	21
5.1.3	個人データをバックアップするにはどうすればよいですか?	21
5.1.4	個人データを復元するにはどうすればよいですか?	22
5.2	有効化	22
5.2.1	有効化の方法	23
5.2.1.1	TD Talkで有効化の方法を選択する方法は?	23
5.2.2	ボタン	24
5.2.2.1	TD Talkでのアクティベーションボタンの滞留時間を変更する方 法	24
5.2.2.2	TD Talkでのアクティベーションボタンの滞留時間を微調整する 方法	24
5.2.3	スイッチ入力	25
5.2.3.1	TD Talkの自分のスイッチにスイッチ入力を設定する方法は?	25
5.3	キーボード	26
5.3.1	有効化の方法	26
5.3.1.1	TD Talkでキーボード用の有効化の方法を選択する方法は?	26
5.3.2	ボタン	27
5.3.2.1	TD Talkでのキーボードボタンの滞留時間を変更する方法	27
5.3.2.2	TD Talkでのアクティベーションボタンの滞留時間を微調整する 方法	27
5.3.3	予測	28
5.3.3.1	TD Talkでの予測ボタンの滞留時間を変更する方法	28
5.3.3.2	TD Talkでの予測ボタンの滞留時間を微調整する方法	29
5.3.4	全般	29
5.3.4.1	必要な場合は、「TD Talkで新しい言語/キーボード言語を追加/ダ ウンロードする方法」を参照してください。	29
5.3.4.2	TD Talkで使用する/使用できるキーボード言語を選択してアクテ ィブにする方法	30
5.3.4.3	どのようにTD Talkで入力サウンドフィードバックをオン/オフに 切り替えますか?	30
5.4	会話	31
5.4.1	トピックス	32
5.4.1.1	TD Talkで新しいトピックを作成する方法	32
5.4.1.2	トピックTD Talkの名前を変更する方法	32
5.4.1.3	トピックをプライベートTD Talkにする方法	33
5.4.1.4	有効なトピックTD Talkを選択する方法	33
5.4.1.5	TD Talkでトピックを削除する方法	34

	5.4.1.6	TD Talkでクイックメッセージを編集する方法.....	34
	5.4.1.7	TD Talkでクイックメッセージを追加する方法.....	35
	5.4.1.8	TD Talkでクイックメッセージを削除する方法.....	36
5.4.2		略語展開.....	37
	5.4.2.1	TD Talkで略語展開を追加する方法.....	37
	5.4.2.2	TD Talkで略語展開を編集する方法.....	38
	5.4.2.3	TD Talkで略語展開を削除する方法.....	38
5.5		音声.....	39
5.5.1		音声.....	40
	5.5.1.1	インストール済みおよびダウンロード可能な音声.....	40
	5.5.1.1.1	TD Talkで新しい音声をダウンロードする方法.....	40
	5.5.1.1.2	TD Talkで音声を選択する方法.....	41
	5.5.1.1.3	TD Talkで利用可能な音声にフィルターを適用できる 方法は？.....	41
	5.5.1.2	音声の設定.....	42
	5.5.1.2.1	TD Talkで自分の音声を変更する方法.....	42
	5.5.1.3	発音.....	44
	5.5.1.3.1	TD Talkで発音例外を作成する方法.....	44
5.5.2		音声バンキングアカウント.....	45
	5.5.2.1	音声バンキングアカウント.....	45
	5.5.2.1.1	音声バンキング サービスから音声を使用する方法....	45
5.6		デバイス.....	46
5.6.1		パートナーウィンドウ.....	47
	5.6.1.1	TD Talkでパートナーウィンドウを有効/無効にする方法.....	47
	5.6.1.2	TD Talkのパートナーウィンドウの表示オプションを設定する方 法.....	47
5.7		全般.....	48
5.7.1		アプリケーション言語.....	48
	5.7.1.1	TD Talkでアプリケーションの言語を設定する方法.....	48
5.7.2		テキストサイズ.....	49
	5.7.2.1	TD Talkでテキストサイズを変更する方法.....	49
5.7.3		フィードバック.....	49
	5.7.3.1	どのようにTD TalkでTobii Dynavoxにフィードバックを送信しま すか？.....	49
5.7.4		利用規約とプライバシー通知.....	50
	5.7.4.1	利用規約を開くには？.....	50
	5.7.4.2	プライバシー通知を開くには？.....	51
5.7.5		ログ収集.....	51
	5.7.5.1	TD Talkのログを収集するには？.....	51

1 ようこそ

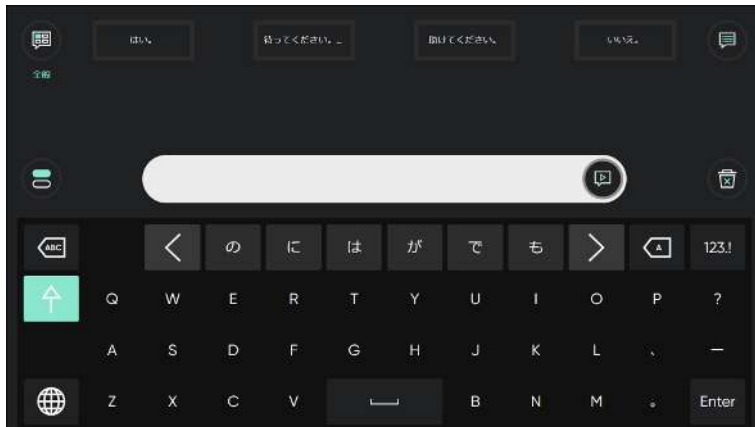


図 1: TD Talk

TD Talkは、人々が自分は何者で、何を言いたいのかを、可能な限り最も流動的な方法でコミュニケーションできるようにします。できるだけ速く文の構成ができるように設計されています。TD Talkを使用すると、会話に積極的に参加できるようになります。TD Talkは、見た目も使い勝手もよく、利用者ができるだけ短時間で使い始められるよう配慮されている。TD Talkは、その人独自の文型や言葉の使い方を学習することで、常に適応し、その人に合ったコミュニケーションの選択肢を提供します。

1.1 システム要件

テーブル 1: iOS

	オペレーティング システム	デバイス	メモリ	タッチ	カメラ
最低	iOS 15.1	iPad第7世代	4 GB	タッチ搭載	カメラ搭載
推奨	iOS 15.1	iPad第8世代	4 GB	タッチ搭載	カメラ搭載

1.2 対応言語

- デンマーク語 (DK)
- オランダ語 (NL)
- 英語 (アメリカ)
- フランス語 (FR)
- ドイツ語 (DE)
- イタリア語 (IT)
- ノルウェー語 (NO)
- スペイン語 (中南米)
- スウェーデン語 (SE)
- さらに多くの言語を準備中です。

1.3 TD Suiteの入手

TD Talkは、Windowsデバイスの場合はTobiiDynavox.com、iPadOSの場合はApple App Storeから入手できます。

2 リソースとサポート

Tobii Dynavoxは、TD Talkのお客様の体験をサポートおよび補完するために無料のリソースをいくつか提供しています。Tobii Dynavoxソフトウェアを最大限に活用するのに役立つこれらのツールを見逃さないでください！

2.1 Webリソースとサポート

サポートが必要な場合は、Tobii Dynavox のWebサイトの[トレーニング & サポート]セクションを最初にご覧ください。

2.2 学習ハブセンター

 ラーニングハブは、現在英語のみです。

資料、トレーニング、その他のリソースについては、learn.tobiidynavox.comを参照してください：

- 一般的な質問への回答
- トレーニング動画
- 録音済みのウェビナー
- オンラインコース

3 使用開始

TD Talkをアイトラッカーと併用する場合は、アイトラッカーキャリブレーションが有効になっていることを確認します。

- iOS — アイトラッカーをセットアップするには、TD CoPilotアプリを使用します。

詳細情報については、TD Pilot ユーザーズマニュアルを参照してください。

3.1 TD Talkの概要

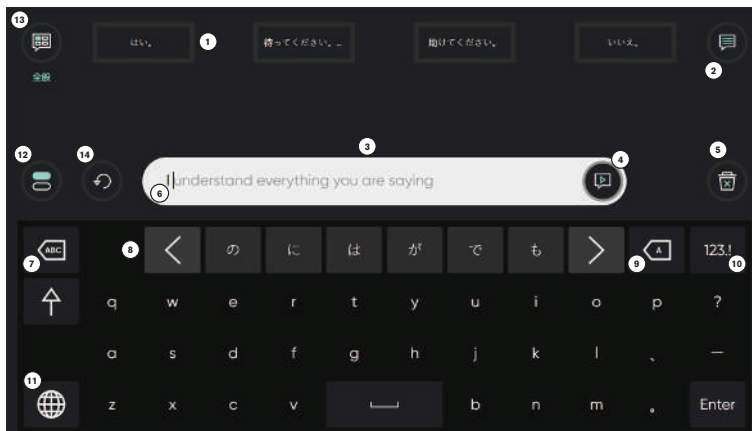


図 2: TD Talk

位置	説明	位置	説明
1	クイックメッセージ 選択するとすぐに読み上げられる、あらかじめ作成されたメッセージです。	8	単語予測/略語の展開 これまでに入力した内容から、自動的に単語を予測します。 略語展開を使用すると、最初の単語が展開語に置き換えられます。
2	その他のクイックメッセージ 現在のトピックのすべてのクイックメッセージにアクセスします。	9	Backspace カーソルの左側にある文字を削除します。
3	メッセージウィンドウ ここで話すテキストを表示および編集します。	10	数字ページ 数字と特殊文字にアクセスします。
4	読み上げ メッセージウィンドウに表示されているテキストを読み上げますまた、音声を一時停止して、音声を再開することもできます。	11	言語の変更 話す言語を切り替えます。
5	クリア メッセージウィンドウのすべてのテキストをクリアします。	12	チャット 2番目のメッセージウィンドウに切り替えて、最初のメッセージウィンドウのテキストを失うことなく新しいメッセージを作成します。

位置	説明	位置	説明
6	フレーズ予測 TD Talkは入力内容から学習し、その情報を使用してフレーズを予測します。予測は頻度に基づいており、コミュニケーションをより速く、より個人的にすることができます。	13	トピックス クイックメッセージをトピックごとに整理します。トピックに切り替えると、そのメッセージにアクセスできます。
7	単語の削除 カーソルの左側にある単語を削除します。	14	元に戻す メッセージウィンドウのアクションを元に戻します。

3.2 オフスクリーンメニュー

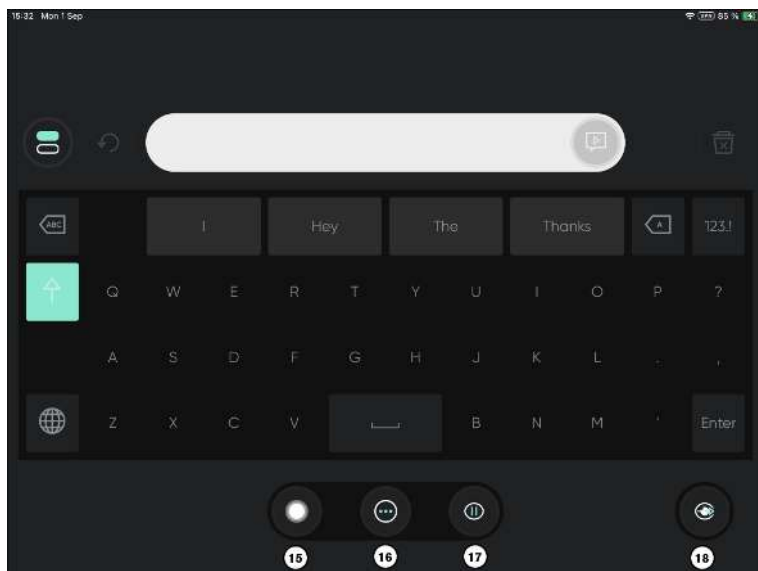


図 3: TD Talkオフスクリーンメニュー

位置	説明	位置	説明
14	AssistiveTouch AssistiveTouchをオンAssistiveTouchを使用して、ホーム画面や他のすべてのアプリにアクセスします。	16	視線を一時停止/再開 切り替えボタンで視線を一時停止したり再開したりできます。
15	詳細 ダッシュボードと設定にアクセスします。	17	半透明モード TD Talkインターフェースを半透明にし、背面カメラをオンにします。このモードを使用すると、TD Talkを使用している間に、コミュニケーションパートナーなどの装置の前にあるものを確認できます。

3.2.1 TD Talkのオフスクリーンメニューにアクセスする方法

TD Talkのオフスクリーンメニューにアクセスするには、次の2つの方法があります：

- **ユーザーとして**：画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。

- 介護者として：TD Talkキーボードの文字Tから上にスワイプします。

3.3 ダッシュボード

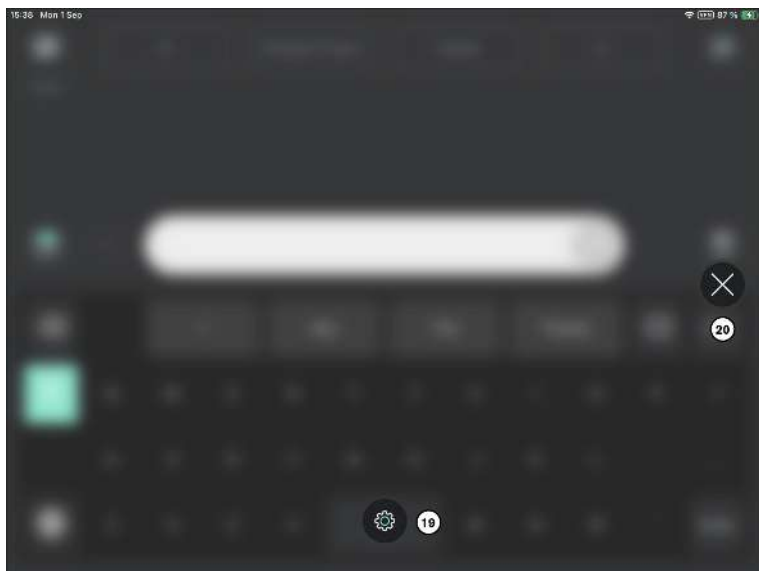


図 4: TD Talkダッシュボード

位置	説明	位置	説明
15	TD Talkの設定 詳細情報については、5 TD Talkの設定, ページ 20を参照してください	16	ダッシュボードを終了 ボタンを選択しダッシュボードを終了します。

3.3.1 TD Talkのダッシュボードにアクセスする方法

- 次のいずれかの方法で設定にアクセスします：
 - ユーザーとして：画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。
 - 介護者として：TD Talkキーボードの文字Tから上にスワイプします。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

- 
 (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.3.2 TD Talkを終了して閉じる方法

- 次のいずれかの方法で設定にアクセスします：
 - ユーザーとして：画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。
 - 介護者として：TD Talkキーボードの文字Tから上にスワイプします。



(AssistiveTouch) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

- 
 (AssistiveTouch) ボタンを選択して、AssistiveTouchメニューを開きます。

3.  (ホーム) ボタンをAssistiveTouchメニューから選択します。

3.4 TD Talkを設定

1. iPadOSデバイスのホーム画面で  TD Talkアプリを選択します。
2. 次のいずれかの方法で設定にアクセスします：
- ユーザーとして：画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。
 - 介護者として：TD Talkキーボードの文字Tから上にスワイプします。

-  (Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

3.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

4.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。
5. TD Talkのアプリケーション言語を設定します：

- 右側の  (次の画面) ボタンを選択します。

-  (全般) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
- [開く]ボタンを選択します。
- [適用言語]セクション参照してください。
- アプリケーションで使用する言語の横にあるラジオ ボタンを選択します。

-  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
6. 使用音声を選択します：

-  (音声) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
- [開く]ボタンを選択します。
- [あなたの音声] セクションを見ます。
- 話したいインストール済み言語の下にあるラジオ ボタンを選択します。

 必要な言語がない場合は、5.3.4.1 必要な場合は、「TD Talkで新しい言語/キーボード言語を追加/ダウンロードする方法」を参照してください。、ページ 29 および 5.3.4.2 TD Talkで使用する/使用できるキーボード言語を選択してアクティブにする方法、ページ 30を参照してください。

- 話す言語で使用できる音声のリストで、使用する音声の横にあるラジオボタンを選択します。

右側の[上にスクロール]ボタンと[下にスクロール]ボタンを使って、その言語で使用できる音声のリストをスクロールします。

 音声を試すには、音声の横にある  を選択します。使用可能。



ラジオボタンの代わりに  (ダウンロード) がある場合は、ボタンを選択して音声をダウンロードします。

- 複数の言語で話すことができるようにする場合は、上記の最後の2つの手順を繰り返します。



7. (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。



TD Talkでは、キーボードの左下隅にある  ボタンを選択することで、選択した言語をすばやく切り替えることができます。

4 TD Talkを使用

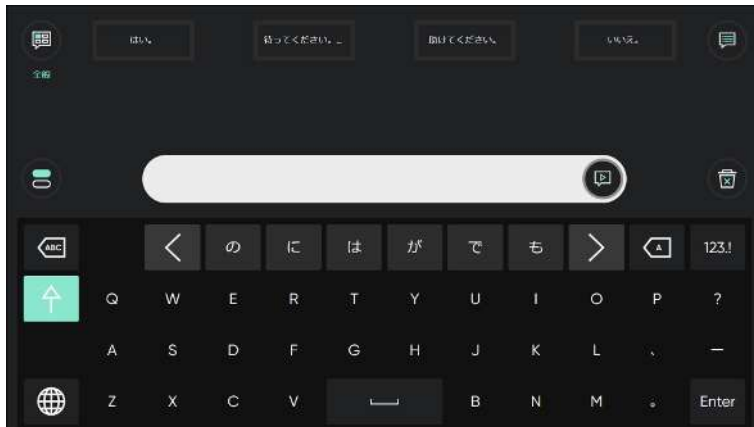


図 5: TD Talk

4.1 キーボードの使い方


キーボードで文字を選択すると、メッセージウィンドウに単語と文が作成（または構築）されます。（話す）ボタンを押します（話す準備ができた後）。

4.2 予測を使用

TD Talkは、単語予測とフレーズ予測の両方を提供しており、メッセージ作成の手間を減らしたり、メッセージ作成速度を向上させることができます。

4.2.1 単語予測

TD Talk で使用される単語予測エンジンはSwiftKey™からのもので、一般的にタブレットとスマートフォンで使用されています。SwiftKey™では、ユーザーが次に入力しようとする単語を予測できる複数の人工知能技術を組み合わせたものを使用しています。SwiftKey™は、ユーザーが過去に書いた文章から学習し、現在の入力テキストと学習した内容に基づいて予測を提供したり、予測を提示したりします。単語予測言語は、キーボード言語設定によって異なります。

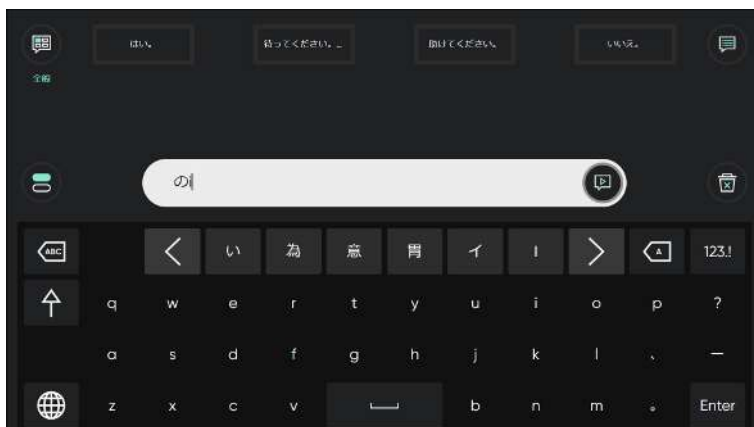

単語予測の使用中はキーボードの上に4つのボックスが表示されます。一番左側のボックスには、最も確率が高い予測単語が表示されます。残りの3つのボックスには、それぞれ予測された単語が1個表示されます。予測された単語を選択するには、正しい単語が入ったボックスを選択します。探している単語がない場合は、入力続けると、次の文字の後に探している単語が表示されることがあります。

単語予測を使用し、caféのようなアクセントを含む単語を入力したい場合は、単語予測にアクセントを処理させることで、時間と労力を節約できます。「cafe」と入力すると、「café」の候補が表示されます。

4.2.2 フレーズ予測

TD Talkは、時間の経過とともに話し方を学習し、分析します。単語予測は、あなたが言った単語を学習します。フレーズ予測は、それらの単語を組み合わせるパーソナルフレーズセットを形成する方法を学習します。入力を開始すると、フレーズセットから予測されたフレーズがメッセージウィンドウに灰色のテキストで表示されます。



予測されたフレーズの最後の単語を見て注視し、フレーズを選択します。フレーズの色がグレーから黒に変わり、選択されたことを示します。それを話したり編集したりできるようになりました。

4.3 メッセージの編集

4.3.1 TD Talkでメッセージを編集する方法



図 6: 編集メニュー

1. メッセージウィンドウ内のテキストを視線で編集します。
編集メニューが開きます。
2. 単語を選択したら、単語を入力して置換するか、単語予測から単語を選択するか、削除を選択します。

カーソルが間違った場所にある場合は、（左に移動）および （右に移動）の矢印を使用します。

3. （閉じる）ボタンを選択して、編集モードを終了します。

4.4 コピー/ペースト

4.4.1 TD Talkでどのようにコピーを使いますか？

 TD Talkコピー機能はメッセージウィンドウ全体をコピーします。

1. メッセージウィンドウ内のテキストを視線で編集します。
編集メニューが開きます。

 (コピー)ボタンを選択します。

4.4.2 TD Talkでどのようにペーストを使いますか？

1. 空のメッセージウィンドウを見つめます
コピーメニューが開きます。

 (ペースト)ボタンを選択します。
メッセージはメッセージウィンドウに表示されます。

 テキストソースからコピーしたテキストを、お使いのデバイス上の他のソフトウェアに貼り付けることができます。

 iOSでは、Appleからのポップアップがアプリケーション間でペーストするときに表示されます。いつでもAssistive Touchで許可することができます、あるいは変更できます 常にこれを許可するAppleの設定。TD Talkはその設定に移動するかどうかを尋ねます。

4.5 クイックメッセージの使用

4.5.1 TD Talkでクイックメッセージを使用する方法

クイックメッセージには2種類あり、最初のメッセージは常にホーム画面に表示されます。2 番目のメッセージは（その他のクイック メッセージ） ボタンの下にあります。



ホーム画面のクイックメッセージ

1. 話すクイックメッセージを選択します。
選択したメッセージは、メッセージウィンドウに追加されたり、処理中のメッセージに干渉したりすることなく、すぐに読み上げられます。

その他のクイックメッセージ

1.  (その他のクイックメッセージ) ボタンを選択します。



2. 話す準備ができたなら、 (話す) ボタンを押します。

3.  (キーボード) ボタンを選択すると、ホーム画面に戻ります。

4.5.2 クイックメッセージのトピックを変更する方法

1.  (トピックスメニュー) ボタンを選択します。
2. 新しいトピックを選択します。



(編集) ボタンを選択して、トピックスメニューに表示/使用可能にするトピックを変更します。詳細については、5.4.1 トピックス, ページ32を参照します。

4.6 言語を変更

4.6.1 TD Talkで話す言語を切り替える方法

1.  キーボードの（言語）ボタンを選択します
2. 話す言語を選択
必要な言語が見つからない場合は、5.3.4.1 必要な場合は、「TD Talkで新しい言語/キーボード言語を追加/ダウンロードする方法」を参照してください。、ページ29を参照してください。
3.  （戻る）ボタンを選択して戻ります。

4.7 チャット



 (チャット) アイコンを選択して2番目のメッセージウィンドウに切り替え、最初のメッセージウィンドウのテキストを失わずに新しいメッセージを書き込みます。



 (チャットに戻る) アイコンを選択すると、最初のメッセージウィンドウに戻ります。

4.8 半透明モード



TD Talkインターフェースを半透明にし、背面カメラをオンにします。このモードを使用すると、TD Talkを使用している間に、コミュニケーションパートナーなどの装置の前にあるものを確認できます。

4.8.1 半透明モードを開始する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。
Off-Screen Menuは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (半透明モード) ボタンを選択します。

4.8.2 半透明モードを終了する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。
Off-Screen Menuは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (半透明モードを終了) ボタンを選択します。

4.9 TD Talkで略語展開を使用する方法

既存の略語を入力すると、単語予測の最初の位置が略語展開に変わります。




単語予測エリアで略語展開を選択すると、略語がメッセージウィンドウに展開されます。

略語展開の追加、編集、削除の詳細については、[こちら](#)を参照してください。

4.10 TD Phoneでアクションを元に戻す方法

メッセージウィンドウの横にある  (元に戻す) ボタンを選択すると、有効なメッセージウィンドウで入力を始めてから、メッセージウィンドウで行ったアクションを1つずつ元に戻すことができます。

5 TD Talkの設定

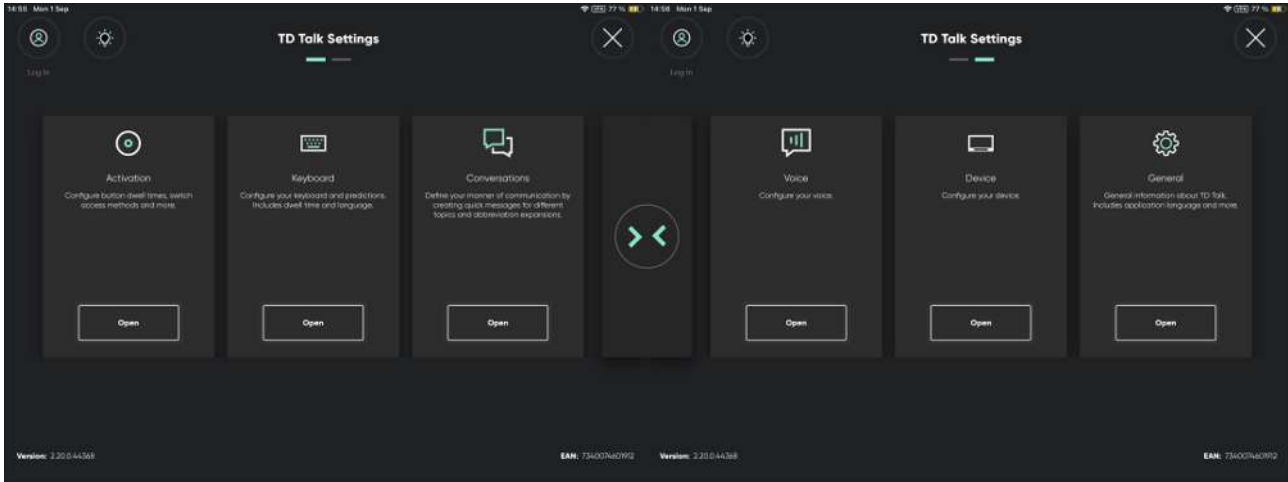

アイコン	アクション	説明
	有効化	アイトラッカーがインストールされ、アクティブにされている場合にのみ使用できます。 有効化設定を開きます。 詳細情報については、5.2 有効化, ページ 22を参照してください。
	キーボード	キーボード設定を開きます。 詳細情報については、5.3 キーボード, ページ 26を参照してください。
	音声	音声設定を開きます。 詳細情報については、5.5 音声, ページ 39を参照してください。
	デバイス	デバイス設定を開きます。 詳細情報については、5.6 デバイス, ページ 46を参照してください。
	全般	全般設定を開きます。 詳細情報については、5.7 全般, ページ 48を参照してください。

5.1 マイアカウント



myTobiiDynavox Account にログインして、個人の単語の予測、発音、フレーズの予測、トピック、デバイス間のクイックメッセージをバックアップおよび復元します。

5.1.1 myTobiiDynavox アカウントとは何ですか？

myTobiiDynavox Account は、コミュニケーションや移動に障害のある方に支援技術を専門とする Tobii Dynavox が提供するオンラインプラットフォームです。myTobiiDynavox Account を使用すると、ユーザーはパーソナライズされたデータのバックアップと復元、ソフトウェア更新、サポート資料、ユーザーフォーラム、オンライントレーニングコースなど、さまざまなリソースにアクセスできます。また、デバイス設定の管理、コミュニケーションボードの作成と共有、および Tobii Dynavox のデバイスを使用する個人のニーズに合わせた追加機能へのアクセスのための中心的なハブとしても機能します。全体として、これはユーザーが支援技術ソリューションを管理し、Tobii Dynavox コミュニティ内でサポートを見つけるための中心的なプラットフォームです。

5.1.2 myTobiiDynavox アカウントを作成するにはどうすればよいですか？

[myTobiiDynavox アカウントの作成](#) に移動して、myTobiiDynavox アカウントを作成します。

5.1.3 個人データをバックアップするにはどうすればよいですか？

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboard を開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。
4. 画面の左上隅にある  (ログイン) アイコンを探します。
5. キーボードを使用して、[ユーザー名]フィールドにユーザー名を入力します。
6. キーボードを使用して、[パスワード]フィールドにパスワードを入力します。
7. [ログイン]ボタンを選択します。
8. [バックアップ]ボタンを選択します。
バックアップが完了すると、バックアップが作成された日付と、どのデバイスからバックアップが作成されたかが [バックアップ] ボタンの左に表示されます。
9.  (閉じる) ボタンを選択して、終了します。

5.1.4 個人データを復元するにはどうすればよいですか？

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。

4. 画面の左上隅にある  (ログイン) アイコンを探します。
5. キーボードを使用して、[ユーザー名]フィールドにユーザー名を入力します。
6. キーボードを使用して、[パスワード]フィールドにパスワードを入力します。
7. [ログイン]ボタンを選択します。
8. [復元]ボタンを選択します。
復元が実行されると、復元が実行された日付がボタンの左側に表示されます。

9.  (閉じる) ボタンを選択して、終了します。

5.2 有効化



アイトラッカーがインストールされ、アクティブにされている場合にのみ使用できます。



5.2.1 有効化の方法

5.2.1.1 TD Talkで有効化の方法を選択する方法は？

 有効化用の有効化の方法を選択するとは、キーボードのキーの有効化を指すのではなく、TD Talkの他のすべての有効化を指します。

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (有効化) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [有効化の方法]セクションを見ます。

7. [有効化の方法]のラジオボタンを選択して、次の値から使用します：

- Gaze—目だけを使う(デフォルト)
- 視線とスイッチ—目とスイッチを使う。



この設定をオンにするにはスイッチが必要です。



8. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

9.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.2.2 ボタン

5.2.2.1 TD Talkでのアクティベーションボタンの滞留時間を変更する方法

 ボタンはキーボードのボタンではなく、TD Talkの他のすべての場所にあるボタンを指します。

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (有効化) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [ボタン]セクションを見ます。

7. 次のいずれかの値の**滞留時間**に関するラジオボタンを選択します：

- 低速
- **中速** (デフォルト)
- 高速



8. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

9.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.2.2.2 TD Talkでのアクティベーションボタンの滞留時間を微調整する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (有効化) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [ボタン]セクションを見ます。

7. 次のいずれかのボタンを選択して、**滞留時間**を微調整します：

—  — 滞留時間を短くする

—  — 滞留時間を長くする

値は 200 ms～無限までの間で変更できます。

8.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

9.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.2.3 スイッチ入力

Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.

 スイッチ入力が設定されている場合、接続済みの外部キーボードで選択されていればそのキーボードのキーはスイッチとしても機能します。

5.2.3.1 TD Talkの自分のスイッチにスイッチ入力を設定する方法は？

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。

 (Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。

4.  (有効化) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [スイッチ入力]セクションを見ます。

7. [変更]ボタンを選択します。


8. ラジオボタンを選択して、キーボードのキーを[スイッチ入力]として使用します。

9. [Ok]ボタンを選択して適用するか、[キャンセル]ボタンを選択してキャンセルします。

10.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

11.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.3 キーボード

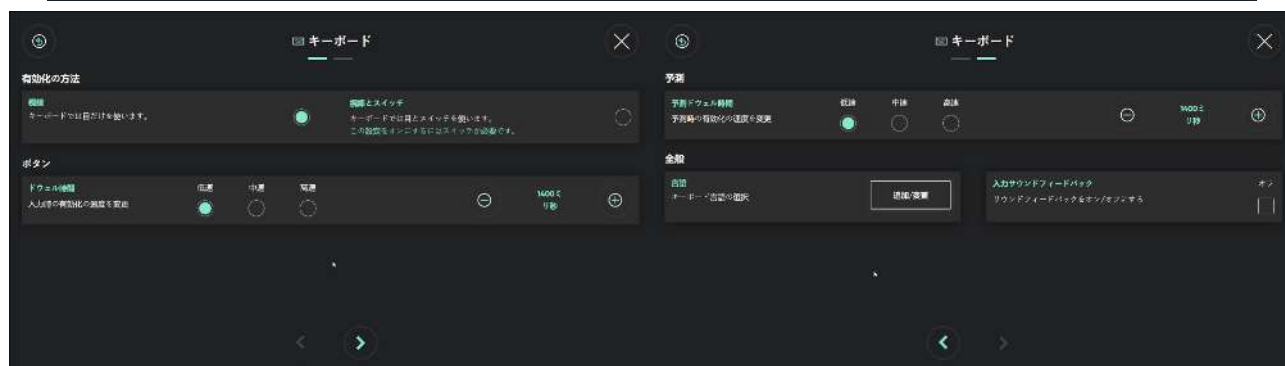

5.3.1 有効化の方法

5.3.1.1 TD Talkでキーボード用の有効化の方法を選択する方法は？



キーボード用の有効化の方法を選択するとは、TD Talkのキーボードのボタンだけを有効化することを指します。

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2. (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (キーボード) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
5. [開く]ボタンを選択します。
6. [有効化の方法]セクションを見ます。
7. [有効化の方法]のラジオボタンを選択して、次の値から使用します：
 - Gaze—目だけを使う(デフォルト)
 - 視線とスイッチ—目とスイッチを使う。



この設定をオンにするにはスイッチが必要です。



8. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。



9. (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.3.2 ボタン

5.3.2.1 TD Talkでのキーボードボタンの滞留時間を変更する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。



2. (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (キーボード) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
5. [開く]ボタンを選択します。
6. [ボタン]セクションを見ます。
7. 次のいずれかの値の**滞留時間**に関するラジオボタンを選択します：
 - 低速
 - **中速** (デフォルト)
 - 高速



8. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。



9. (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.3.2.2 TD Talkでのアクティベーションボタンの滞留時間を微調整する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。



2. (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。
4.  (キーボード) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
5. [開く]ボタンを選択します。
6. [ボタン]セクションを見ます。
7. 次のいずれかのラジオボタンを選択して、**滞留時間**を微調整します：
 -  — 滞留時間を短くする
 -  — 滞留時間を長くする値は 200 ms～無限までの間で変更できます。
8.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
9.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.3.3 予測

5.3.3.1 TD Talkでの予測ボタンの滞留時間を変更する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。
2.  (Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。
3.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。
4.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。
5.  (キーボード) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
6. [開く]ボタンを選択します。
7. 画面底部にある  (次のページ) ボタンを選択します。
8. [予測] セクションを見ます。
9. 次のいずれかの値の**滞留時間**に関するラジオボタンを選択します：
 - 低速
 - **Medium** (デフォルト)
 - 高速
10.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
11.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.3.3.2 TD Talkでの予測ボタンの滞留時間を微調整する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2. (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (キーボード) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. 画面底部にある  (次のページ)ボタンを選択します。

7. [予測] セクションを見ます。

8. 次のいずれかのラジオボタンを選択して、[滞留時間]を微調整します：



— 滞留時間を短くする



— 滞留時間を長くする

値は 200 ms～無限までの間で変更できます。

9.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

10.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.3.4 全般

- 5.3.4.1 必要な場合は、「TD Talkで新しい言語/キーボード言語を追加/ダウンロードする方法」を参照してください。

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2. (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (キーボード) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. 画面底部にある  (次のページ)ボタンを選択します。

7. [全般] セクションを見ます。

8. 「キーボード言語の選択」**追加/変更**ボタンを選択します。

9. **ダウンロード**タブを選択します。

10. 言語の横にある  (ダウンロード) ボタンを選択して、新しいキーボードのダウンロードを開始します。

11. **[ダウンロード]**ボタンを選択してダウンロードを開始するか、**[キャンセル]**ボタンを選択してダウンロードをキャンセルします。

12. **[インストール済み]** タブを選択します。

13. 言語の横にあるラジオボタンを選択して、言語をアクティブにします。

14.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

15.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.3.4.2 TD Talkで使用する/使用できるキーボード言語を選択してアクティブにする方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。

 (Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。

4.  (キーボード) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. **[開く]**ボタンを選択します。

6. 画面底部にある  (次のページ) ボタンを選択します。

7. 「キーボード言語の選択」**追加/変更**ボタンを選択します。

8. **[インストール済み]** タブを選択します。

9. 言語の隣にあるラジオボタンを選択して、その言語用のキーボードの言語を有効にします。

 音声を利用できるすべての言語のラジオボタンを必ず選択してください。

10.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

11.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.3.4.3 どのようにTD Talkで入力サウンドフィードバックをオン/オフに切り替えますか？

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。

 (Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。
4.  (キーボード) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
5. [開く]ボタンを選択します。
6. 画面底部にある  (次のページ)ボタンを選択します。
7. [全般] セクションを見ます。
8. 「入力サウンドフィードバック」のオン/オフボタンを切り替えます:
 - オン
 - オフ
9.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
10.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.4 会話



5.4.1 トピックス



5.4.1.1 TD Talkで新しいトピックを作成する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (有効化) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [作成]ボタンを選択します。

7. キーボードを使用して新しいトピックに名前を付けます。



[プライバシー モード] チェックボックスを選択して、フレーズ予測と学習をオフにします。



8. (保存) アイコンを選択して、保存します。



9. (閉じる) ボタンを選択して、終了します。

5.4.1.2 トピックTD Talkの名前を変更する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (有効化) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. トピック名の横にある  (編集) ボタンを選択します。

7. キーボードを使用して、トピックの名前を変更します。



[プライバシー モード] チェックボックスを選択して、フレーズ予測と学習をオフにします。



8. (保存) アイコンを選択して、保存します。



9. (閉じる) ボタンを選択して、終了します。

5.4.1.3 トピックをプライベートTD Talkにする方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (有効化) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. トピック名の横にある  (編集) ボタンを選択します。

7. [プライバシー モード] チェックボックスを選択して、フレーズ予測と学習をオフにします。



8. (保存) アイコンを選択して、保存します。



9. (閉じる) ボタンを選択して、終了します。

5.4.1.4 有効なトピックTD Talkを選択する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。
3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。
4.  (会話) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
5. [開く]ボタンを選択します。
6. [トピック]セクションの「トピックとクイックメッセージ」の[編集]ボタンを選択します。
7. 有効にするトピックの[チェックボックス]を選択します。
-  トピックメニューでは、最大6つのトピックを選択して使用できます。
8.  (閉じる) ボタンを選択して、編集ビューを終了します。
9.  (キーボード) ボタンを選択すると、ホーム画面に戻ります。

5.4.1.5 TD Talkでトピックを削除する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。
2.  (Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。
3.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。
4.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。
5.  (会話) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
6. [開く]ボタンを選択します。
7.  [トピック]セクションの「トピックとクイックメッセージ」の[編集]ボタンを選択します。
8. 削除したいトピック名の横にある  [削除]ボタンを選択します。
9. [削除]ボタンを選択してトピックを削除するか、[キャンセル]ボタンを選択してキャンセルします。
10. 削除が完了したら、 (完了)ボタンを選択します。
11.  (閉じる) ボタンを選択して、編集ビューを終了します。
12.  (キーボード) ボタンを選択すると、ホーム画面に戻ります。

5.4.1.6 TD Talkでクイックメッセージを編集する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。



2. (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (会話) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [トピック]セクションの「トピックとクイックメッセージ」の[編集]ボタンを選択します。



7. (クイックメッセージの編集) ボタンを選択します。

8. メッセージの隣にある  (編集) ボタンを選択して、編集します。

9. キーボードを使用してメッセージを変更します。



10. (保存) ボタンを選択して、クイックメッセージへの変更を保存します。



11. (閉じる) ボタンを選択して、編集ビューを終了します。



12. (キーボード) ボタンを選択すると、ホーム画面に戻ります。

5.4.1.7 TD Talkでクイックメッセージを追加する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。



2. (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (会話) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [トピック]セクションの「トピックとクイックメッセージ」の[編集]ボタンを選択します。



7. (クイックメッセージの編集) ボタンを選択します。

8. 新しい場所の追加の隣にある  (追加) ボタンを選択します。
トピックごとに最大3ページのクイックメッセージを作成できます。



ボタンと



ボタンを使用してページ間を移動します。

9. キーボードを使用してメッセージを書きます。

10.  (保存) ボタンを選択して、新しいクイックメッセージを保存します。
11.  (閉じる) ボタンを選択して、編集ビューを終了します。
12.  (キーボード) ボタンを選択すると、ホーム画面に戻ります。

5.4.1.8 TD Talkでクイックメッセージを削除する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (会話) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [トピック]セクションの「トピックとクイックメッセージ」の[編集]ボタンを選択します。



7. (クイックメッセージの編集) ボタンを選択します。

8. メッセージの隣にある  (編集) ボタンを選択し削除します。



9. メッセージの削除ボタンを選択します。



10. (保存) ボタンを選択して、クイックメッセージへの変更を保存します。




11. (閉じる) ボタンを選択して、編集ビューを終了します。



12. (キーボード) ボタンを選択すると、ホーム画面に戻ります。

5.4.2 略語展開

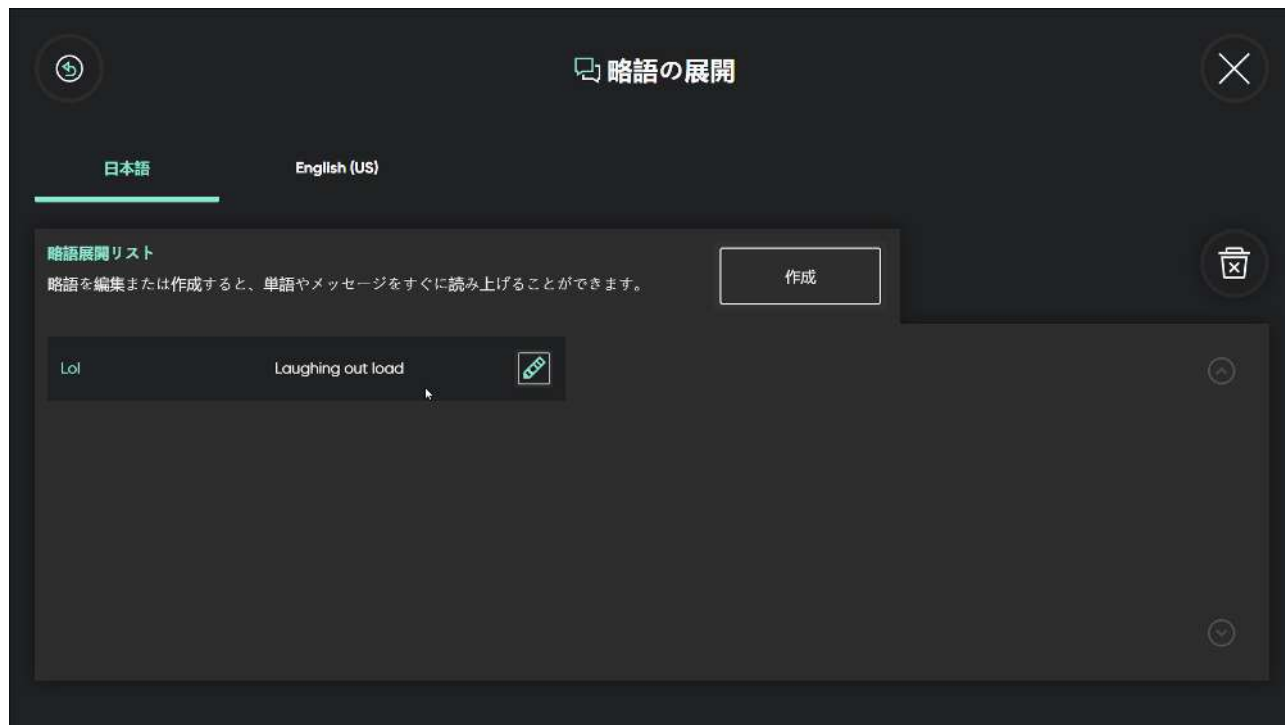

5.4.2.1 TD Talkで略語展開を追加する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (会話) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. 略語展開の下、略語展開の編集領域で[編集] ボタンを選択します。

7. 略語展開を追加したいインストール済み言語の[言語]タブを選択します。

8. [作成]ボタンを選択します。

9. [略語]テキストボックスに、作成したい略語を入力します。

10. [単語またはメッセージ]テキストボックスの横にある  アイコンを選択します。

11. [単語またはメッセージ]テキスト ボックスに、略語を作成した単語またはメッセージを入力します。



12. (保存) ボタンを選択して、略語の展開への変更を保存します。



13. (戻る) ボタンを選択して、会話設定に戻ります。

14.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
15.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.4.2.2 TD Talkで略語展開を編集する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (会話) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
5. [開く]ボタンを選択します。
6. 略語展開の下、略語展開の編集領域で[編集] ボタンを選択します。
7. 略語展開を編集したいインストール済み言語の[言語]タブを選択します。

8. 編集したい略語の横にある  アイコンを選択します。
9. 作成したい新しい略語を[略語]テキストボックスで編集します。

10. [単語またはメッセージ]テキストボックスの横にある  アイコンを選択します。
11. 略語を作成した新しい単語またはメッセージを[単語またはメッセージ]テキストボックスで編集します。



12. (保存) ボタンを選択して、略語の展開への変更を保存します。



13. (戻る) ボタンを選択して、会話設定に戻ります。



14. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。



15. (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.4.2.3 TD Talkで略語展開を削除する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。

4.  (会話) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
5. [開く]ボタンを選択します。
6. 略語展開の下の略語展開の編集領域で[編集] ボタンを選択します。
7. 略語展開を削除したいインストール済み言語の[言語]タブを選択します。
8.  (削除) ボタンを選択します。
9. 削除したい略語の横にある  (削除) ボタンを選択します。
10. [削除]ボタンを選択して確認するか、[キャンセル]ボタンを選択して略語の削除をキャンセルします。
11. 削除が完了したら、 (完了)ボタンを選択します。
12.  (戻る) ボタンを選択して、会話設定に戻ります。
13.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
14.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.5 音声

ここでキーボード言語の音声を設定します



インストールされているすべての言語が画面の上部に表示されます。言語を選択すると、その言語で利用可能な音声

言語の下の一覧に表示されます。音声を試してみるには、音声の横にある  を選択して音声を試します。使用可能。

5.5.1 音声

5.5.1.1 インストール済みおよびダウンロード可能な音声

There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.

Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see *5.5.1.1.3 TD Talkで利用可能な音声にフィルターを適用できる方法は？*, ページ 41

5.5.1.1.1 TD Talkで新しい音声をダウンロードする方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (音声) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [音声]セクション参照してください。

7. インストール済みでダウンロード可能な音声の[音声]ボタンを選択します。

8. ダウンロードタブを選択します。

9. 話したいインストール済み言語の[言語]タブを選択します。



必要な言語がない場合は、5.3.4.1 必要な場合は、「TD Talkで新しい言語/キーボード言語を追加/ダウンロードする方法」を参照してください。、ページ 29および 5.3.4.2 TD Talkで使用する/使用できるキーボード言語を選択してアクティブにする方法、ページ 30を参照してください。



10. 音声の横にある  (ダウンロード) ボタンを選択して、新しい音声のダウンロードを開始します。

右側の[上にスクロール]ボタンと[下にスクロール]ボタンを使って、その言語で利用できる音声の一覧をスクロールします。



音声を試すには、音声の横にある  を選択します。

11. [ダウンロード]ボタンを選択してダウンロードを開始するか、[キャンセル]ボタンを選択してダウンロードをキャンセルします。



12. (戻る) ボタンを選択して、音声設定に戻ります。



13. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

14.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.5.1.1.2 TD Talkで音声を選択する方法

 音声バンキングシステムからの音声には、音声の名前の後にボイスバンキングサービスのロゴが表示されます。

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- Voice Keeper 

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (音声) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [音声]セクション参照してください。

7. インストール済みでダウンロード可能な音声の[音声]ボタンを選択します。

8. 話したいインストール済み言語の[言語]タブを選択します。



必要な言語がない場合は、5.3.4.1 必要な場合は、「TD Talkで新しい言語/キーボード言語を追加/ダウンロードする方法」を参照してください。、ページ29および5.3.4.2 TD Talkで使用する/使用できるキーボード言語を選択してアクティブにする方法、ページ30を参照してください。

9. 話す言語で使用できる音声のリストで、使用する音声を選択します。

右側の[上にスクロール]ボタンと[下にスクロール]ボタンを使って、その言語で使用できる音声のリストをスクロールします。



音声を試すには、音声の横にある  を選択します。

10.  (戻る) ボタンを選択して、音声設定に戻ります。

11.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

12.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.5.1.1.3 TD Talkで利用可能な音声にフィルターを適用できる方法は？

On the **Installed** or **Download** tab, do the following:



1. (フィルター)ボタンを選択します。
2. 使用したいオプションの隣にあるチェックボックスを選択します。
次から選ぶことができます：
 - 性別—女性、男性
 - 年齢—子供、10代および大人

5.5.1.2 音声の設定



5.5.1.2.1 TD Talkで自分の音声を変更する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。



2. (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (音声) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
5. [開く]ボタンを選択します。
6. [音声]セクション参照してください。
7. 音声の設定の[設定]ボタンを選択します。
8. 利用可能な音声から変更する音声を選択します。
9. 次のいずれかの値の[音声(読み上げ)速度]に関するラジオボタンを選択します：
 - 低速

- デフォルト
- 高速

話す速度を変えます。

10. 次のいずれかのラジオボタンを選択して、**音声（読み上げ）速度**を微調整します：

-  — 音声（読み上げ）速度を下げる
-  — 音声（読み上げ）速度を上げる

値は -10 ～ +10 の間で変更できます。

11. 次のいずれかの値の**[ピッチ]**のラジオボタンを選択します。

- 低い
- デフォルト
- 高い

話すピッチを変えます。



新しい音声を聞くには、「テスト音声」セクションで  を選択します。

12. 次のいずれかのラジオボタンを選択して、**[ピッチ]**を微調整します：

-  — ピッチを下げる
-  — ピッチを上げる

値は -10 ～ +10 の間で変更できます。




新しい音声を聞くには、「テスト音声」セクションで  を選択します。

13.  （戻る）ボタンを選択して、音声設定に戻ります。

14.  （戻る）ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

15.  （閉じる）ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.5.1.3 発音

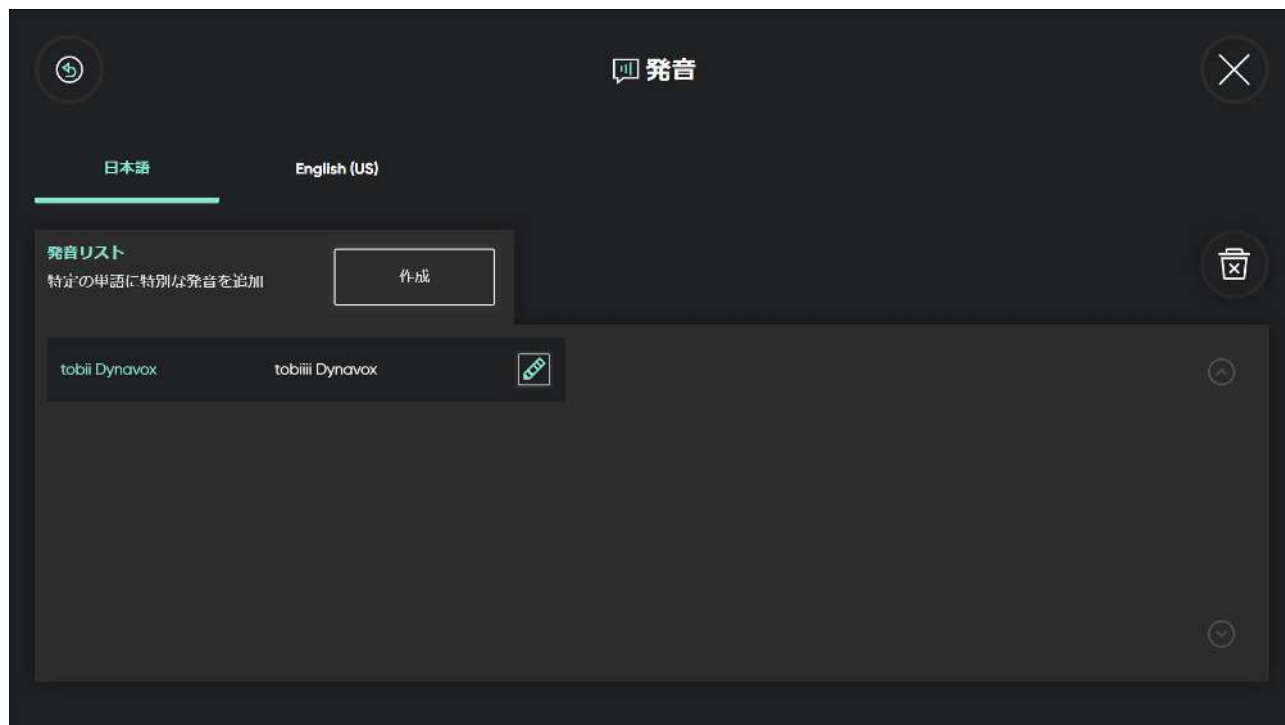

5.5.1.3.1 TD Talkで発音例外を作成する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2. (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (音声) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [音声]セクション参照してください。

7. 発音の[作成]ボタンを選択します。

8. 発音の例外を追加したいインストールされている[言語]タブを選択します。

9. [作成]ボタンを選択します。

10. [単語]テキストボックスに、発音の例外を作成したい単語を入力します。

11. [発音]テキストボックスの横にある  アイコンを選択します。

12. [発音]テキストボックスに、単語の発音方法を入力します。



発音の例外を聞くには、[発音]テキストボックスの横にある  を選択します。

13. [作成]ボタンを選択して、発音の例外を保存します。

14.  (戻る) ボタンを選択して、音声設定に戻ります。
15.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
16.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.5.2 音声バンキングアカウント

TD Talkは、次の3つの異なる音声バンキング サービスに接続できます：

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- Voice Keeper 

ユーザーが個人の合成音声に接続して使用できるようにするには、これらの音声バンキング サービスのプロバイダーのいずれかのアカウントとログイン認証情報が必要です。

5.5.2.1 音声バンキングアカウント

5.5.2.1.1 音声バンキング サービスから音声を使用する方法

 音声バンキングサービスへのログインにはインターネットアクセスが必要です。

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。

 (Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。

4.  (音声) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [音声バンキングアカウント]セクションを参照してください。

音声バンキングアカウントの[管理]ボタンを選択します。

7. 音声バンキング サービスのセクションで[ログイン] ボタンを選択します。

8. ユーザー名とパスワードを入力します。

9. [ログイン]ボタンを選択します。

個人の音声ダウンロードされ、ユーザーのデフォルトの音声として自動的に選択されます。



これは、複数の言語での個人的な合成音声を利用可能な場合に当てはまります。



10. (戻る) ボタンを選択して、音声設定に戻ります。



11. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。



12. (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.6

デバイス



TD Pilotでのみ使用できます。



5.6.1 パートナーウィンドウ

5.6.1.1 TD Talkでパートナーウィンドウを有効/無効にする方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (デバイス) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [パートナーウィンドウ] セクションを見ます。

7. [パートナー ウィンドウがオン/オフかどうかを選択] の [有効/無効] ボタンを次のように切り替えます：

- オン
- オフ



8. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。



9. (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.6.1.2 TD Talkのパートナーウィンドウの表示オプションを設定する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard)ボタンは、画面の中央下部に表示されます。



2. (Dashboard)ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. (デバイス) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

5. [開く]ボタンを選択します。

6. [オプションを表示] セクションを見ます。

7. 次のオプションボタンのいずれかを選択し、パートナーウィンドウの表示オプションを選択します：

- ミラー入力中および発話中にパートナーウィンドウのテキストを表示します。
- 発言中にテキストを表示 - 入力中にパートナー ウィンドウにインジケータを表示し、発言中にメッセージをテキストで表示します。
- 入力を表示 - 入力中および発話中にパートナー ウィンドウにタイプ インジケータのみを表示します。



8. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。



9. (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.7 全般

5.7.1 アプリケーション言語

5.7.1.1 TD Talkでアプリケーションの言語を設定する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。



2. (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. 右側の (次の画面) ボタンを選択します。



5. 右側の (次の画面) ボタンを選択します。



6. (全般) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

7. [開く]ボタンを選択します。

8. [適用言語]セクション参照してください。

9. [変更]ボタンを選択します。

10. アプリケーションで使用する言語の横にあるラジオ ボタンを選択します。

11.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

12.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.7.2 テキストサイズ

5.7.2.1 TD Talkでテキストサイズを変更する方法

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。

4. 右側の  (次の画面) ボタンを選択します。

5. 右側の  (次の画面) ボタンを選択します。

6.  (全般) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

7. [開く]ボタンを選択します。

8. [文字サイズ]セクションを見ます。

9. 次のいずれかの値の[テキストサイズ]のラジオボタンを選択します：

– [デフォルト] (デフォルト)

– 大

10.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。

11.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.7.3 フィードバック

5.7.3.1 どのようにTD TalkでTobii Dynavoxにフィードバックを送信しますか？

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。
4. 右側の  (次の画面) ボタンを選択します。
5. 右側の  (次の画面) ボタンを選択します。
6.  (全般) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
7. [開く]ボタンを選択します。
8. フィードバックのセクションを確認します。
9. フィードバックのボタンを選択します。
10. キーボードを使用してメールアドレスを入力します。
11. 件名のテキストフィールド用の  ボタンを選択します。
12. キーボードを使用してメールの件名を記入します。
13. メッセージテキストフィールド用の  ボタンを選択します。
14. キーボードを使用してメッセージします。
15. メッセージテキストフィールドを閉じる  ボタンを選択します。
16. フィードバックを送るボタンを選択してフィードバックをTobii Dynavoxに送ります。
17.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
18.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.7.4 利用規約とプライバシー通知

5.7.4.1 利用規約を開くには？

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。

3.  (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。

4. 右側の  (次の画面) ボタンを選択します。

5. 右側の  (次の画面) ボタンを選択します。

6.  (全般) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

7. [開く]ボタンを選択します。
8. **利用規約とプライバシー通知**のセクションを確認します。
9. [開く]ボタンを選択します。
10.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
11.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.7.4.2 プライバシー通知を開くには？

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。



4. 右側の (次の画面) ボタンを選択します。



5. 右側の (次の画面) ボタンを選択します。



6. (全般) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。

7. [開く]ボタンを選択します。
8. **利用規約とプライバシー通知**のセクションを確認します。
9. [開く]ボタンを選択します。



10. (進む)ボタンを選択します。



11. (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。



12. (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。

5.7.5 ログ収集

5.7.5.1 TD Talkのログを収集するには？

1. 画面の下、アイトラッカーの中央またはアイトラッカーの領域に視線を固定します。



(Dashboard) ボタンは、画面の中央下部に表示されます。

2.  (Dashboard) ボタンを選択して、Dashboardを開きます。



3. (設定) アクションを選択して、TD Talk設定を開きます。

4.  (次の画面) ボタンを選択します。
5.  (次の画面) ボタンを選択します。
6.  (全般) アイコンを探して、正しい設定カードを見つけます。
7. **[開く]**ボタンを選択します。
全般の設定ページが開きます。
8. **[ログを収集]**セクションを見ます。
9. **[ログ]**ボタンを選択します。
10. **[はい]**ボタンを選択します。
 ログはデスクトップに作成されます。
11.  (戻る) ボタンを選択して、TD Talk設定に戻ります。
12.  (閉じる) ボタンを選択して、TD Talk設定を終了します。



Copyright © Dynavox Group AB (Publ). すべての製品やサービスが各地域の市場で提供されているわけではありません。仕様は予告なしに変更されることがあります。すべての商標は各所有者に属します。

Tobii Dynavox デバイスのサポート

オンラインヘルプの利用

お使いの Tobii Dynavox デバイスの個別製品サポートページをご覧ください（英語のみ）。問題に関する最新情報や、その製品に関連するヒントやアイデアが記載されています。オンラインで次のサポートページを参照してください。<https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

ソリューションコンサルタントまたは販売代理店にお問い合わせください。

お使いの製品について質問がある場合や支障が生じた場合は、最寄りの Tobii Dynavox のソリューションコンサルタントまたは認定販売代理店までお問い合わせください。お客様個人の設定に詳しい担当者がおり、ヒントを提案したり製品に関するトレーニングを提供することができます。詳細情報については次を参照してください。<https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>