

TD Talk

Bruksanvisning



Bruksanvisning TD Talk

Version 1.8

2025-07-08

Alla rättigheter förbehålles.

Copyright © Dynavox Group AB (publ)

Ingen del av detta dokument får reproduceras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren.

Upphovsrättsskyddet omfattar alla former och typer av upphovsrättsligt material och information som tillåts av lagstadgad eller rättslig lag eller som herefter beviljas. Detta inkluderar även, utan begränsning, material som genererats av programvara som visas på skärmen så som skärmbilder, menyer, o.s.v.

Informationen i det här dokumentet tillhör Dynavox Group AB. All kopiering av hela eller delar av materialet utan föregående skriftlig tillåtelse från Dynavox Group AB är förbjuden.

Produkter som det här dokumentet hänvisar till kan vara varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. Utgivaren och upphovsmannen gör inga anspråk på dessa varumärken.

Största möda har lagts ned på arbetet med det här dokumentet. Utgivaren och upphovsmannen friskriver sig dock från allt ansvar för fel eller utelämnad information, eller för skador till följd av hur informationen i detta dokument eller de program och den källkod som kan medfölja dokumentet, används. Utgivaren och författaren ska på inget sätt kunna hållas skadeskyldiga för eventuell inkomstförlust eller kommersiell skada som direkt eller indirekt har orsakats av, eller har påståtts orsakats av, detta dokument.

Innehållet kan ändras utan föregående meddelande.

Gå till Tobii Dynavox hemsida

<https://se.tobiidynavox.com/> för uppdaterade versioner av detta dokument.

Kontaktinformation:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Sverige
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Storbritannien
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Handlar som Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australien
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880



Innehållsförteckning

1	Välkommen	6
1.1	Systemkrav	6
1.2	Språk som stöds	6
1.3	Skaffa TD Suite	6
2	Resurser och hjälpmedel	7
2.1	Webbresurser och hjälpmedel	7
2.2	Learning hub	7
3	Komma igång	8
3.1	Översikt över TD Talk	8
3.2	Menyn utanför skärmen	9
3.2.1	Hur får jag tillgång till Menyn utanför skärmen i TD Talk?	9
3.3	Instrumentpanelen	10
3.3.1	Hur får jag åtkomst till instrumentpanelen i TD Talk?	10
3.3.2	Hur avslutar jag och stänger ner TD Talk?	10
3.4	Konfigurera TD Talk	11
4	Använda TD Talk	13
4.1	Använda tangentbordet	13
4.2	Användning av prediktioner	13
4.2.1	Ordprediktion	13
4.2.2	Frasprediktion	14
4.3	Redigera ett meddelande	14
4.3.1	Hur redigerar jag ett meddelande i TD Talk?	14
4.4	Kopiera och klistra in	15
4.4.1	Hur kopierar jag i TD Talk?	15
4.4.2	Hur klistrar jag in i TD Talk?	15
4.5	Användning av Snabbmeddelanden	15
4.5.1	Hur använder jag Snabbmeddelanden i TD Talk?	15
4.5.2	Hur ändrar jag ämne för snabbmeddelanden?	16
4.6	Ändra språk	17
4.6.1	Hur kan jag byta språk i TD Talk?	17
4.7	Chatt	17
4.8	"Se igenom"-läge	18
4.8.1	Hur startar jag läget Se igenom	18
4.8.2	Hur avslutar jag "Se igenom"-läget	18
4.9	Hur använder jag förkortningsexpansioner i TD Talk?	18
4.10	Hur ångrar jag en åtgärd i TD Phone?	19
5	Inställningar för TD Talk	20
5.1	Mitt konto	21
5.1.1	Vad är ett myTobiiDynavox-konto?	21
5.1.2	Skapa ett myTobiiDynavox-konto?	21
5.1.3	Hur säkerhetskopierar jag mina personuppgifter?	21
5.1.4	Hur återställer jag mina personuppgifter?	22

5.2	Aktivering	22
5.2.1	Aktiveringsmetod.....	23
5.2.1.1	Hur väljer jag aktiveringsmetod i TD Talk?.....	23
5.2.2	Knappar.....	24
5.2.2.1	Hur ändrar jag fokuseringstiden för aktivering av knappar i TD Talk?.....	24
5.2.2.2	Hur finjusterar jag tiden för aktivering av knappar i TD Talk?	24
5.2.3	Kontaktnmatning	25
5.2.3.1	Hur ställer jag in kontaktnmatning för min kontakt i TD Talk?	25
5.3	Tangentbord.....	26
5.3.1	Aktiveringsmetod.....	26
5.3.1.1	Hur väljer jag aktiveringsmetod för tangentbordet i TD Talk?	26
5.3.2	Knappar.....	27
5.3.2.1	Hur ändrar jag fokuseringstiden för tangentbordsknappar i TD Talk?.....	27
5.3.2.2	Hur finjusterar jag tiden för aktivering av knappar i TD Talk?	27
5.3.3	Prediktion	28
5.3.3.1	Hur ändrar jag fokuseringstiden för prediktionsknappar i TD Talk?	28
5.3.3.2	Hur finjusterar jag tiden för prediktionsknappar i TD Talk?	29
5.3.4	Allmänt	29
5.3.4.1	Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?.....	29
5.3.4.2	Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda i TD Talk?	30
5.3.4.3	Hur aktiverar/inaktiverar jag knappljud vid skrift i TD Talk?	30
5.4	Konversationer	31
5.4.1	Ämnen	32
5.4.1.1	Hur skapar jag ett nytt ämne i TD Talk?.....	32
5.4.1.2	Hur kan jag byta namnet på ett TD Talk-ämne?	32
5.4.1.3	Hur kan jag göra ämnet privat i TD Talk?.....	33
5.4.1.4	Hur kan jag välja aktiviteten Ämne i TD Talk?.....	33
5.4.1.5	Hur tar jag bort ett ämne i TD Talk?	34
5.4.1.6	Hur kan jag redigera snabbmeddelanden i TD Talk?	34
5.4.1.7	Hur kan jag lägga till ett snabbmeddelande i TD Talk?.....	35
5.4.1.8	Hur kan jag ta bort ett snabbmeddelande i TD Talk?.....	36
5.4.2	Förkortningsexpansioner.....	37
5.4.2.1	Hur lägger jag till en förkortningsexpansion i TD Talk?.....	37
5.4.2.2	Hur redigerar jag en förkortningsexpansion i TD Talk?.....	38
5.4.2.3	Hur tar jag bort en förkortningsexpansion i TD Talk?.....	38
5.5	Röst	39
5.5.1	Röster.....	40
5.5.1.1	Installerade och nedladdningsbara röster	40
5.5.1.1.1	Hur laddar jag ner en ny röst i TD Talk?	40
5.5.1.1.2	Hur väljer jag min röst i TD Talk?	41
5.5.1.1.3	Hur kan jag filtrera Tillgängliga röster i TD Talk?	41
5.5.1.2	Röstkonfigurering	42
5.5.1.2.1	Hur gör jag ändringar för min röst i TD Talk?	42
5.5.1.3	Uttal	43
5.5.1.3.1	Hur skapar jag uttalsundantag i TD Talk?	43
5.5.2	Röstbankskonton	44
5.5.2.1	Röstbankskonton.....	44
5.5.2.1.1	Hur kan jag använda min röst från min Röstbankstjänst?	44
5.6	Enhet	46
5.6.1	Partnerfönster	46

	5.6.1.1	Hur aktiverar/avaktiverar jag partnerfönstret i TD Talk?.....	46
	5.6.1.2	Hur ställer jag in visningsalternativen för partnerfönstret i TD Talk?.....	47
5.7	Allmänt		47
	5.7.1	Programspråk.....	47
	5.7.1.1	Hur ställer jag in mitt programspråk i TD Talk?	47
	5.7.2	Teckenstorlek.....	48
	5.7.2.1	Hur ändrar jag textstorlek i TD Talk?.....	48
	5.7.3	Feedback	48
	5.7.3.1	Hur skickar jag feedback till Tobii Dynavox i TD Talk?	48
	5.7.4	Användarvillkor och sekretessmeddelande.....	49
	5.7.4.1	Hur öppnar jag Användarvillkor	49
	5.7.4.2	Hur öppnar jag sekretessmeddelande	50
	5.7.5	Hämta loggar.....	50
	5.7.5.1	Hur samlar jag in loggar för TD Talk?	50

1 Välkommen

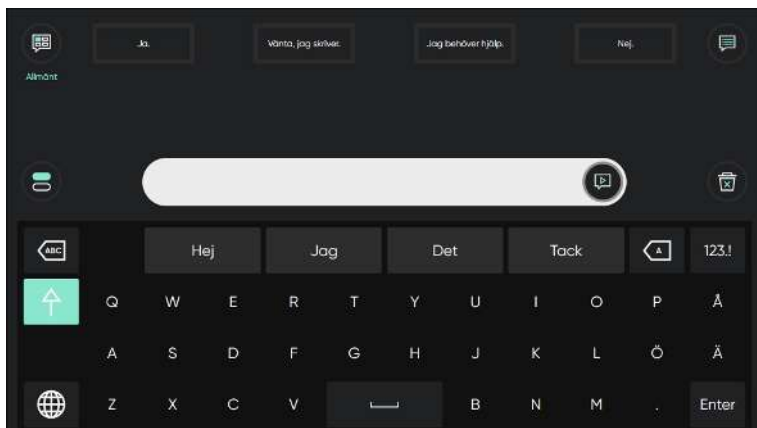


Illustration 1: TD Talk

TD Talk ger människor möjlighet att berätta vem de är och vad de vill säga på ett så smidigt sätt som möjligt. Programmet är utformat för att göra meningsbyggnaden så snabb som möjligt. TD Talk gör det möjligt för dem som använder det att fortsätta vara en aktiv del av samtalet. TD Talk har en användarvänlig layout så att de som använder den kan komma igång på kortast möjliga tid. Genom att lära sig en persons unika meningssammansättning och ordanvändning, anpassar TD Talk sig kontinuerligt för att erbjuda personligt relevanta kommunikationsalternativ.

1.1 Systemkrav

Tabell 1: iOS

	Operativsystem	Enhet	Minne	Pekstyrning	Kamera
Minimum	iOS 15,1	iPad 7:e generationen	4 GB	Inbyggd pekfunktion	Inbyggd kamera
Rekommenderat	iOS 15,1	iPad 8:e generationen	4 GB	Inbyggd pekfunktion	Inbyggd kamera

1.2 Språk som stöds

- Danska (DK)
- Holländska (NL)
- Engelska (US)
- Franska (FR)
- Tyska (DE)
- Italienska (IT)
- Norska (NO)
- Spanska (Latinamerika)
- Svenska (SE)
- Fler språk kommer inom kort!

1.3 Skaffa TD Suite

TD Talk är tillgänglig via TobiiDynavox.com för Windowsenheter och i Apple App Store för iPadOS.

2 Resurser och hjälpmedel

Tobii Dynavox erbjuder flera gratisresurser för att hjälpa till med och komplettera din upplevelse med TD Talk. Missa inte dessa redskap som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Tobii Dynavox programvara!

2.1 Webbresurser och hjälpmedel

Om du behöver hjälp, gå först till avsnittet Utbildning och support på Tobii Dynavox hemsida.

2.2 Learning hub



Inlärningsnavet finns för närvarande endast på engelska.

Besök learn.tobiidynavox.com för dokumentation, utbildning och andra resurser, inklusive:

- svar på vanliga frågor
- utbildningsvideor
- inspelade webbseminarier
- onlinekurser

3 Komma igång

Om TD Talk ska användas tillsammans med en ögonstyrningsenhet ska du se till att den har en aktiv kalibrering för ögonstyrningsenheten.

- iOS - använd TD CoPilot-appen för att ställa in ögonstyrningsenheten.

Mer information finns i användarhandboken för TD Pilot.

3.1 Översikt över TD Talk

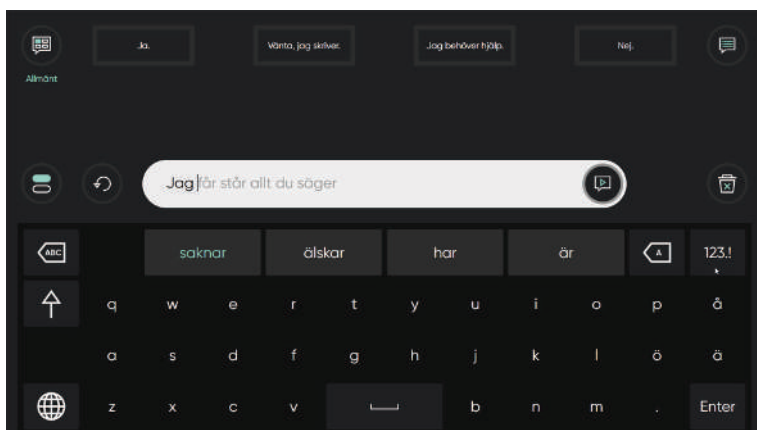


Illustration 2: TD Talk

Placering	Beskrivning	Placering	Beskrivning
1	Snabbmeddelanden Förskrivna meddelanden som läses upp omedelbart när de väljs	8	Ordprediktion/förkortningsexpansioner Förutsäger automatiskt ord baserat på vad du har skrivit hittills. När förkortningsexpansioner används ersätts det första ordet med expansionen.
2	Fler snabbmeddelanden Få tillgång till alla snabbmeddelanden för aktuellt ämne.	9	Backsteg Ta bort tecknet till vänster om markören.
3	Meddelandefönster Här kan du visa och redigera den text som du vill läsa upp.	10	Siffersida Tillgång till siffror och specialtecken.
4	Läs upp Läs upp texten i meddelandefönstret. Du kan också avbryta och återuppta uppläsningen.	11	Ändra språk Växla mellan de språk du talar.
5	Rensa Rensa all text i meddelandefönstret.	12	Chatt Byt till ett andra meddelandefönster för att skriva ett nytt meddelande utan att förlora texten i det första meddelandefönstret.
6	Frasprediktion TD Talk lär sig av vad du skriver och använder den informationen för att förutsäga fraser. Prediktionen baseras på frekvens och kan göra kommunikationen mer effektiv och personlig.	13	Ämnen Organisera dina snabbmeddelanden per ämne. Byt till ett ämne för att få åtkomst till dessa meddelanden.
7	Ta bort ord Ta bort ordet till vänster om markören.	14	Ängra Ängra åtgärderna i meddelandefönstret.

3.2 Menyn utanför skärmen

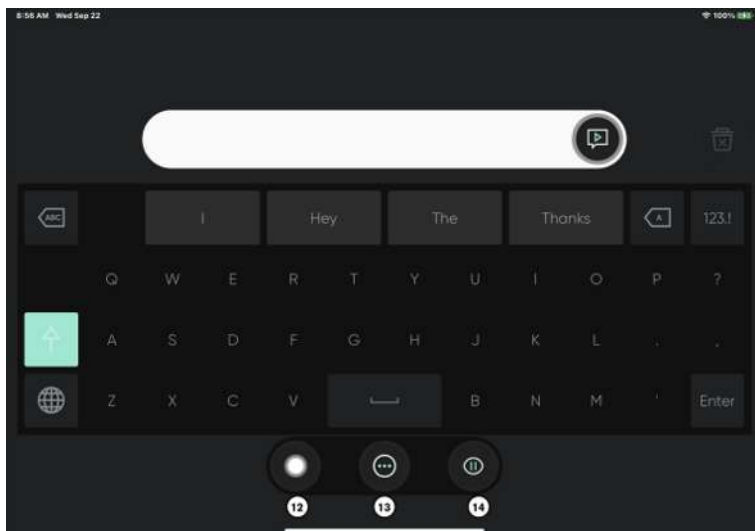


Illustration 3: TD Talk Meny utanför skärmen

Placering	Beskrivning	Placering	Beskrivning
14	AssistiveTouch Aktivera AssistiveTouch. Använd AssistiveTouch för att komma åt startsideskärmen och alla dina andra appar.	16	Pausa/återuppta ögonstyrning Växelknapp för att tillfälligt pausa och återuppta blickstyrning.
15	Mer Gå till Instrumentpanelen och Inställningar.	17	"Se igenom"-läge Gör gränssnittet för TD Talk genomskinligt och slå på den bakåtvända kameran. Det här läget kan användas för att se vad som finns framför din enhet, t.ex. din kommunikationspartner, medan du använder TD Talk.

3.2.1 Hur får jag tillgång till Meny utanför skärmen i TD Talk?

Det finns två sätt att komma åt Meny utanför skärmen i TD Talk:

- **Som användare:** Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.
- **Som vårdare:** svep uppåt från bokstaven **T** på TD Talk tangentbord.

3.3 Instrumentpanelen

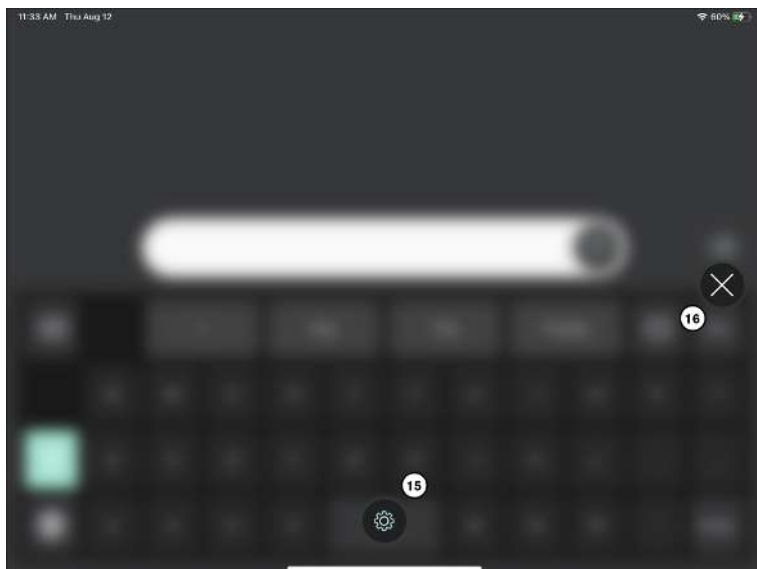


Illustration 4: TD Talk Instrumentpanel

Placering	Beskrivning	Placering	Beskrivning
15	TD Talk-inställningar Mer information finns i <i>5 Inställningar för TD Talk</i> , sida 20.	16	Lämna instrumentpanelen Välj knappen för att lämna instrumentpanelen..

3.3.1 Hur får jag åtkomst till instrumentpanelen i TD Talk?

- Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:
 - Som användare:** Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.
 - Som vårdare:** svep uppåt från bokstaven T på TD Talk tangentbord.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

- Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3.3.2 Hur avslutar jag och stänger ner TD Talk?

- Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:
 - Som användare:** Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.
 - Som vårdare:** svep uppåt från bokstaven **T** på TD Talk tangentbord.

Knappen  (AssistiveTouch) blir synlig nere i mitten av skärmen.

- Välj knappen  (AssistiveTouch) för att öppna AssistiveTouch-menyn.
- Välj knappen  (Startsida) i AssistiveTouch-menyn.

3.4 Konfigurera TD Talk



1. Välj TD Talk-appen på iPadOS-enhetens startskärmskärn.
2. Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:
 - **Som användare:** Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.
 - **Som vårdare:** svep uppåt från bokstaven T på TD Talk tangentbord.



Knappen (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.



3. Välj knappen (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.



4. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.
5. Ställ in programspråket för TD Talk:



- Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.



- Leta efter ikonen (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
- Välj knappen **Öppna**.
- Titta i avsnittet **Programspråk**.
- Välj knappen bredvid det språk du vill att programmet ska vara på.



- Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till inställningarna för TD Talk.

6. Välj den eller de röster som ska användas:



- Leta efter (röst) ikonen för att hitta rätt inställningskort.
- Välj knappen **Öppna**.
- Titta i avsnittet **Din röst/dina röster**.
- Välj knappen under det installerade språket som du vill läsa upp.



Om det önskade språket saknas, se 5.3.4.1 *Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?*, sida 29 och 5.3.4.2 *Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda i TD Talk?*, sida 30.

- Välj radioknappen bredvid den röst som ska användas i listan över tillgängliga röster för det språk som ska läsas upp.

Använd knapparna "Scroll up" och "Scroll down" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster för språket.



Om du vill prova en röst väljer du bredvid rösten. Om den finns tillgänglig.



Om det finns en (nedladdning) i stället för en radioknapp väljer du knappen för att ladda ner rösten.

- Upprepa de sista två stegen ovan om du vill kunna tala på fler än ett språk.



7. Välj knappen (Stäng) för att avsluta inställningarna för TD Talk.



I TD Talk kan du snabbt byta språk mellan de valda språken genom att välja knappen  i tangentbordets nedre vänstra hörn.

4 Använda TD Talk

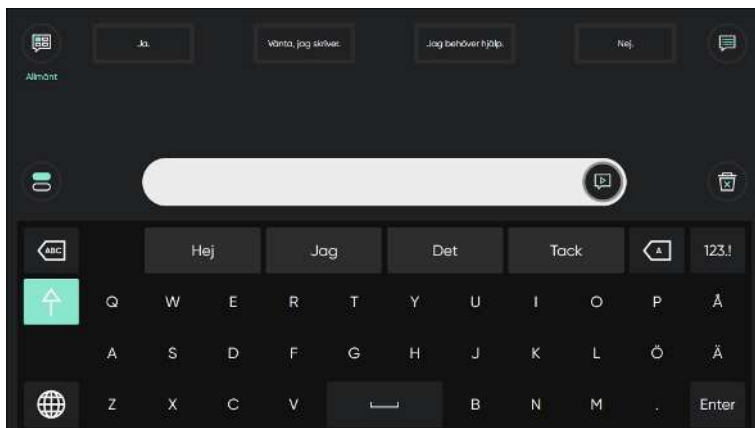


Illustration 5: TD Talk

4.1 Använda tangentbordet

Genom att välja bokstäver på tangentbordet formuleras (eller byggs) ord och meningar i meddelandefönstret. Välj


knappen  (Läs upp) när du är redo att läsa upp ditt meddelande.

4.2 Användning av prediktioner

TD Talk erbjuder både ordprediktioner och frasprediktioner, vilket kan minska ansträngningen och/eller öka hastigheten för att producera meddelanden.

4.2.1 Ordprediktion

Motorn för ordprediktion som används i TD Talk är från SwiftKey™ och används ofta i surfplattor och smarttelefoner. SwiftKey™ använder en blandning av artificiella intelligens-teknologier för att förutse nästa ord som användaren tänker skriva. SwiftKey™ lär sig av tidigare texter som användaren har skrivit och erbjuder prediktioner eller presenterar prediktioner baserat på den aktuella inmatade texten och vad den har lärt sig. Språket i ordprediktionen ändras beroende på språkställningen på tangentbordet.

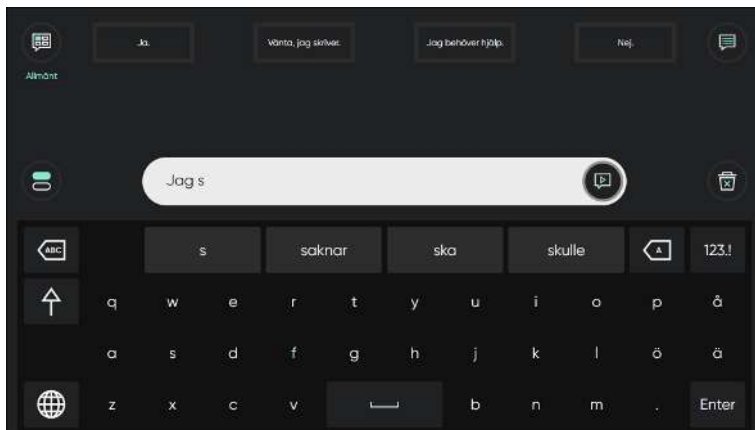


När ordprediktion används visas fyra (4) rutor ovanför tangentbordet. I rutan längst till vänster visas det mest sannolika ordförslaget och de återstående tre (3) rutorna innehåller ett ordförslag vardera. För att välja ett av de föreslagna orden väljer du ordets ruta. Om du inte hittar det ord du letar efter kan du fortsätta att skriva, så kanske ordet du letar efter dyker upp efter nästa bokstav.

Om du använder ordprediktion och vill skriva ett ord som innehåller en accent, till exempel café, sparar du tid och ansträngning genom att låta ordprediktion ta hand om accenten. Skriv bara in "cafe", så får du ett förslag på "café".

4.2.2 Frasprediktion

TD Talk lär sig och analyserar hur du talar över tid. Ordprediktionen lär sig de ord du säger. Frasprediktion lär sig hur du sätter ihop dessa ord för att skapa en personlig frasuppsättning. När du börjar skriva kommer de föreslagna fraserna från din frasuppsättning att erbjudas i meddelandefönstret i grå text.

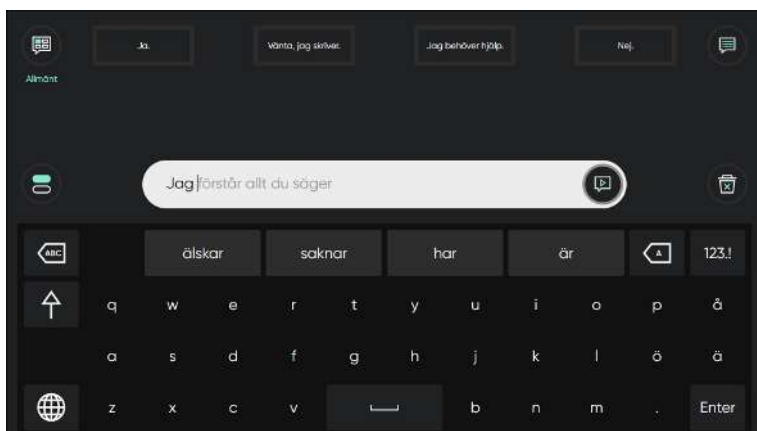

Titta och fäst blicken på det sista ordet i den föreslagna frasen för att välja frasen. Färgen på frasen ändras från grått till svart för att visa att den har valts. Den kan nu läsas upp eller redigeras.

4.3 Redigera ett meddelande

4.3.1 Hur redigerar jag ett meddelande i TD Talk?

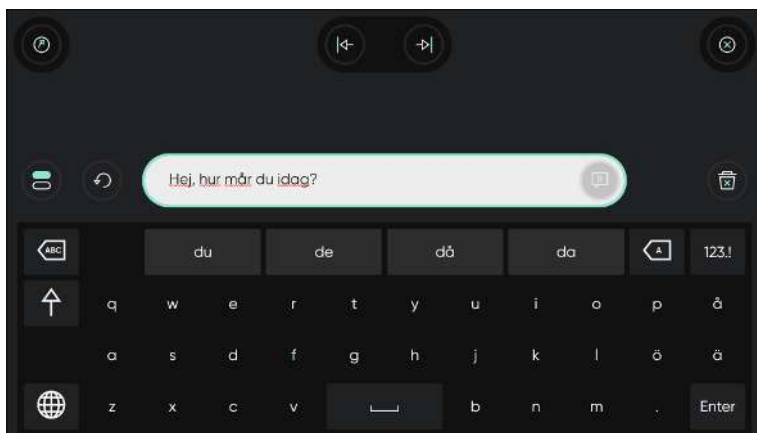


Illustration 6: Redigeringsmenyn

1. Fäst blicken på den text i meddelandefönstret som ska redigeras. Redigeringsmenyn öppnas.
2. När ett ord är markerat kan du skriva för att ersätta ordet, välja ett ord från ordprediktionen eller välja att radera det.

Använd pilarna  (Flytta åt vänster) och  (Flytta åt höger) om markören är på fel ställe.

3. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsläget.

4.4 Kopiera och klistra in

4.4.1 Hur kopierar jag i TD Talk?



Kopieringsfunktionen i TD Talk kopierar hela meddelandefönstret.

1. Fäst blicken på den text i meddelandefönstret som ska redigeras. Redigeringsmenyn öppnas.



Välj knappen (kopiera).

4.4.2 Hur klistrar jag in i TD Talk?

1. Fäst blicken på det tomma meddelandefönstret. Kopieringsmenyn öppnas.



Välj knappen (klistra in).

Meddelandet visas i meddelandefönstret.



Du kan klistra in text från en textkälla i andra program på din enhet.



I iOS visar en popup från Apple när du klistrar in mellan olika program. Du kan tillåta detta vid varje tillfälle med Assistive Touch ELLER ändra Apple-inställningarna så det alltid tillåts. TD Talk kommer fråga om du vill gå till den inställningen.

4.5 Användning av Snabbmeddelanden

4.5.1 Hur använder jag Snabbmeddelanden i TD Talk?

Det finns två (2) typer av snabbmeddelanden, de första är alltid synliga på startsideskärmen. De andra finns under



knappen (Fler snabbmeddelanden).


Snabbmeddelanden på startsideskärmen

1. Välj **snabbmeddelandet** för att läsa upp.
Det valda meddelandet kommer att läsas upp omedelbart utan att läggas till i meddelandefönstret och utan att störa meddelanden som du håller på att skriva.

Fler snabbmeddelanden




1. Välj knappen (Fler snabbmeddelanden).

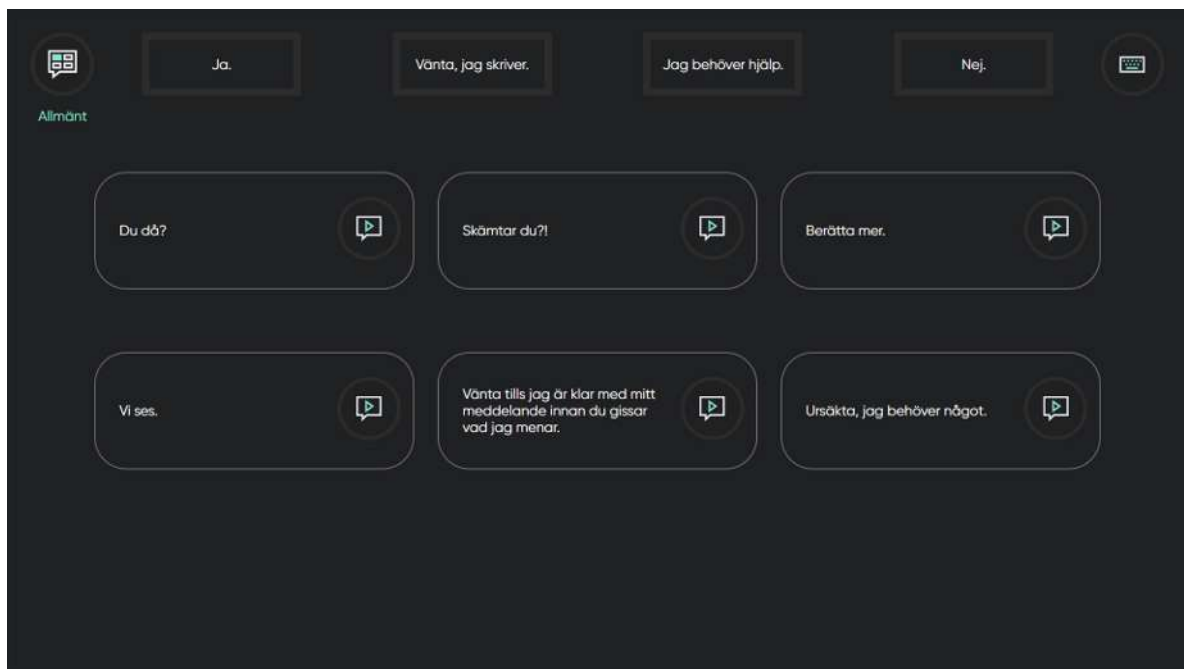

2. Välj knappen  (Läs upp) bredvid meddelandet.
3. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.5.2 Hur ändrar jag ämne för snabbmeddelanden?

1. Välj knappen  (Ämnesmeny).
2. Markera det nya ämnet.

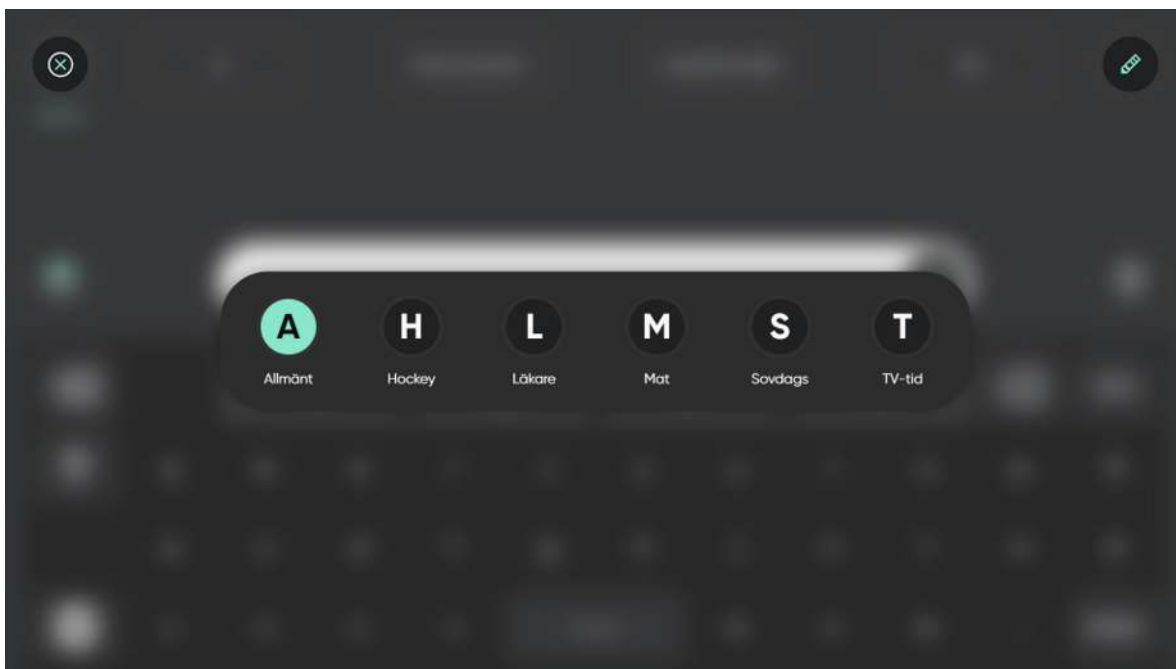

Välj knappen  (Redigera) för att ändra Ämnena som visas/görs tillgängliga i Ämnesmenyn. Mer information finns i 5.4.1 Ämnen, sida 32.

4.6 Ändra språk

4.6.1 Hur kan jag byta språk i TD Talk?

1. Välj knappen (Språk)  på tangentbordet.
2. Välj det språk som ska talas

Om det önskade språket saknas, se 5.3.4.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?, sida 29.

3. Välj knappen  (Tillbaka) för att gå tillbaka

4.7 Chatt

Välj knappen  (Chatt) för att växla till ett andra meddelandefönster för att skriva ett nytt meddelande utan att förlora texten i det första meddelandefönstret.

Välj knappen  (tillbaka till Chatt) för att växla tillbaka till det första meddelandefönstret.

4.8 ”Se igenom”-läge



Gör gränssnittet för TD Talk genomskinligt och slå på den bakåtvända kameran. Det här läget kan användas för att se vad som finns framför din enhet, t.ex. din kommunikationspartner, medan du använder TD Talk.

4.8.1 Hur startar jag läget Se igenom

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningen eller i området runt ögonstyrningen. Knappen (Menyn utanför skärmen) blir synlig nere i mitten av skärmen.



2. Välj knappen ("Se igenom"-läge).

4.8.2 Hur avslutar jag ”Se igenom”-läget


1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningen eller i området runt ögonstyrningen. Knappen (Menyn utanför skärmen) blir synlig nere i mitten av skärmen.



2. Välj knappen (avsluta "Se igenom"-läge).

4.9 Hur använder jag förkortningsexpansioner i TD Talk?

När en befintlig förkortning skrivs ändras första positionen av ordprediktioner till förkortningsexpansionen.

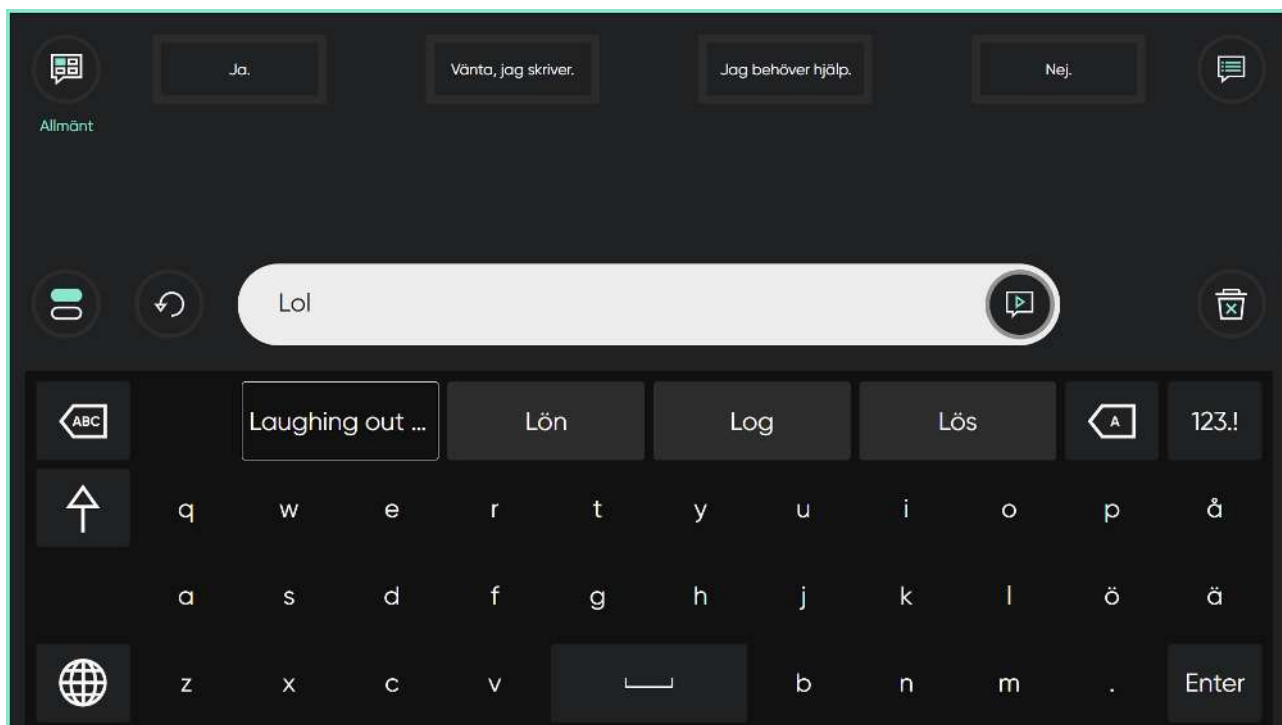


Välj Förkortningsexpansion i ordprediktionsområdet för att expandera förkortningen i meddelandefönstret.
Mer information om att lägga till, redigera och ta bort förkortningsexpansioner finns i Förkortningsexpansioner.

4.10 Hur ångrar jag en åtgärd i TD Phone?

Välj knappen  (ångra) intill meddelandefönstret för att ångra åtgärder som gjorts i meddelandefönstret, en efter en, sedan du aktivt började skriva i det.

5 Inställningar för TD Talk

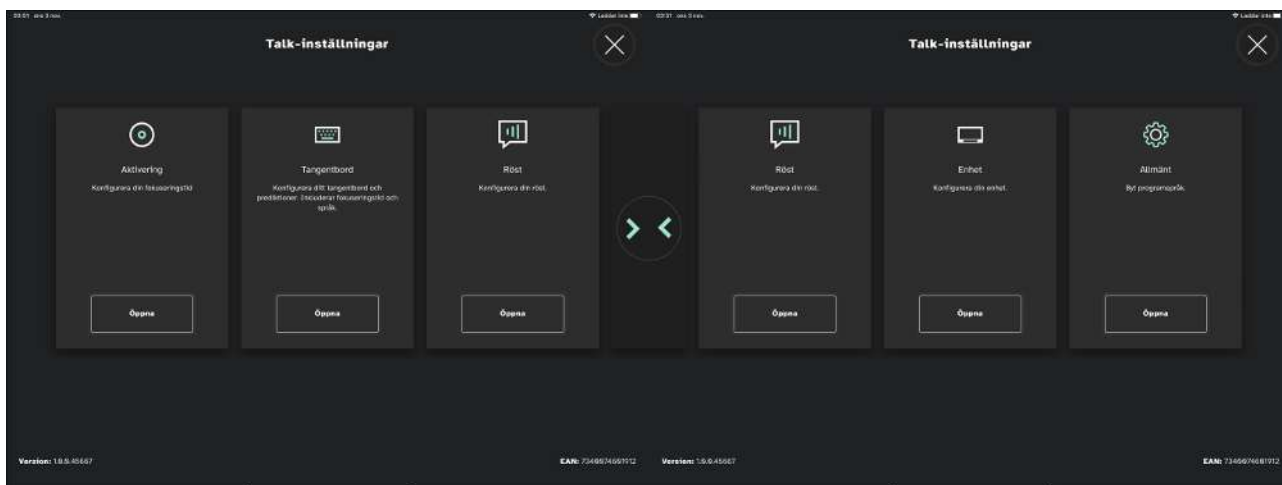

Ikoner	Åtgärd	Beskrivning
	Aktivering	Endast tillgänglig om en ögonstyrningsenhet är installerad och aktiverad. Öppnar inställningarna för Aktivering . Mer information finns i 5.2 <i>Aktivering</i> , sida 22.
	Tangentbord	Öppnar inställningarna för Tangentbord . Mer information finns i 5.3 <i>Tangentbord</i> , sida 26.
	Röst	Öppnar röstinställningarna . Mer information finns i 5.5 <i>Röst</i> , sida 39.
	Enhet	Öppnar inställningarna för Enheten . Mer information finns i 5.6 <i>Enhet</i> , sida 46.
	Allmänt	Öppnar de Allmänna inställningarna,. Mer information finns i 5.7 <i>Allmänt</i> , sida 47.

5.1

Mitt konto



Mitt konto

Kontouppgifter

Förnamn Ammar	Efternamn Elyas	Land US	E-post ammar.elyas@tobiidynavox.com
------------------	--------------------	------------	--

Säkerhetskopiera data
Säkerhetskopiera dina senaste ordprediktioner, uttal, frasprediktioner, ämnen och snabbmeddelanden.
Detta är användbart för att spara data vid byte av enheter.

Senaste säkerhetskopiering:
2024-2-23 12:23
TD I-16

Säkerhetskopiera

Återställ data
Återställ dina senaste ordprediktioner, uttal, frasprediktioner, ämnen och snabbmeddelanden.
Detta är användbart när du har bytt enhet och behöver dina data på den nya enheten.

Senaste återställning
2024-3-22 12:36

Återställ

Logga ut

Logga in på ditt myTobiiDynavox Account-konto för att säkerhetskopiera och återställa dina personliga ordprediktioner, uttal, frasprediktioner, ämnen och snabbmeddelanden mellan dina enheter.

5.1.1 Vad är ett myTobiiDynavox-konto?

Plattformen myTobiiDynavox Account är en onlineplattform som tillhandahålls av Tobii Dynavox, ett företag som specialiserat sig på tekniska hjälpmedel för personer med kommunikations- och rörlighetsutmaningar. Med ett myTobiiDynavox Account-konto får användarna tillgång till olika resurser, inklusive personlig säkerhetskopiering och återställning av data, programuppdateringar, supportmaterial, användarforum och onlinekurser. Den fungerar också som ett centralt nav för att hantera enhetsinställningar, skapa och dela kommunikationskortar samt för att få tillgång till ytterligare funktioner som är anpassade efter behoven hos personer som använder Tobii Dynavox-enheter. Överlag är det en central plattform för användare att hantera sina hjälpmedelslösningar och hitta stöd i Tobii Dynavox-community.

5.1.2 Skapa ett myTobiiDynavox-konto?

Gå till [Skapa myTobiiDynavox-konto](#) för att skapa ett myTobiiDynavox-konto.

5.1.3 Hur säkerhetskopierar jag mina personuppgifter?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.



4. Leta efter ikonen (Logga in) i det övre vänstra hörnet av skärmen.
5. Använd tangentbordet för att skriva in ditt användarnamn i fältet **Användarnamn**.
6. Använd tangentbordet för att skriva in ditt lösenord i fältet **Lösenord**.
7. Välj knappen **Logga in**.
8. Välj knappen **Säkerhetskopiera**.

Datomet för säkerhetskopieringen och från vilken enhet är gjord visas till vänster om Backup-knappen när en säkerhetskopiering har gjorts.



9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta.

5.1.4 Hur återställer jag mina personuppgifter?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.



Knappen (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.



2. Välj knappen (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.



3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.



4. Leta efter ikonen (Logga in) i det övre vänstra hörnet av skärmen.
5. Använd tangentbordet för att skriva in ditt användarnamn i fältet **Användarnamn**.
6. Använd tangentbordet för att skriva in ditt lösenord i fältet **Lösenord**.
7. Välj knappen **Logga in**.
8. Välj knappen **Återställning**.

Datomet för återställningen visas till vänster om knappen Återställ när en återställning har gjorts.




9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta.

5.2 Aktivering



Endast tillgänglig om en ögonstyrningsenhet är installerad och aktiverad.

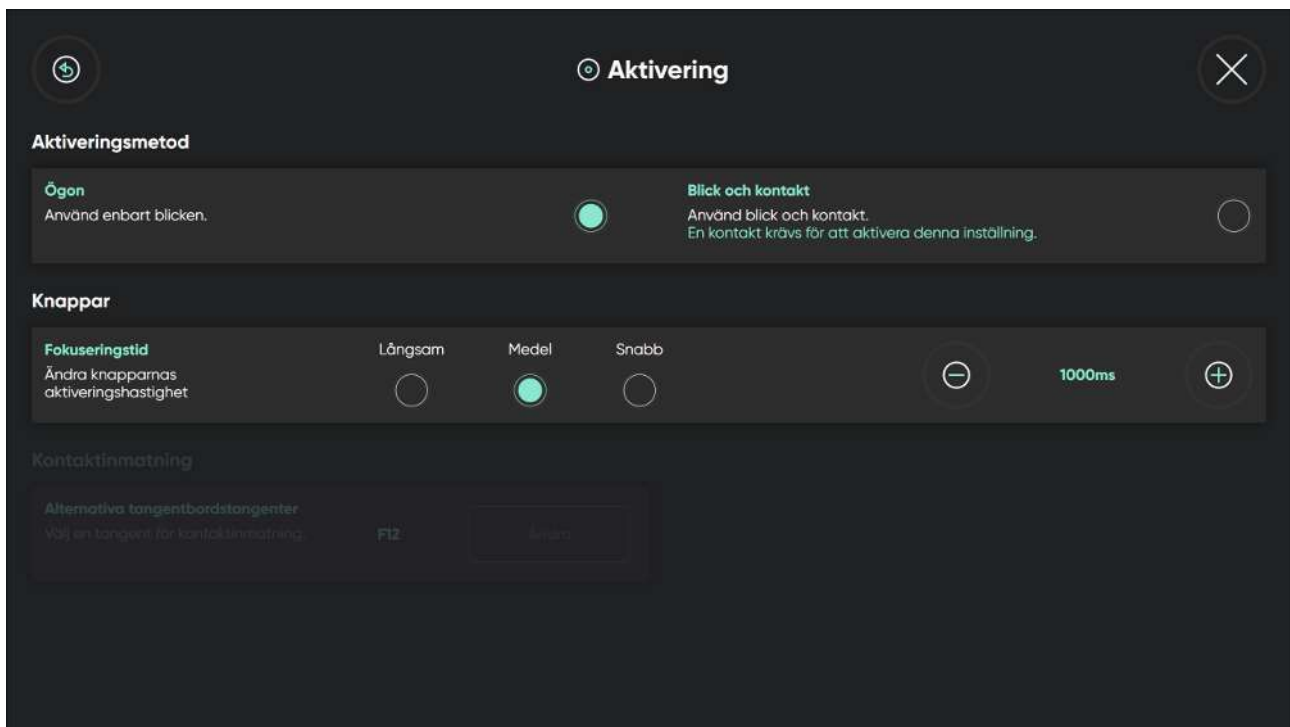

5.2.1 Aktiveringsmetod

5.2.1.1 Hur väljer jag aktiveringsmetod i TD Talk?

 Valet av aktiveringsmetod gäller inte aktivering av tangentbordstangenter, utan för all annan aktivering i TD Talk.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Aktiveringsmetod**.

7. Välj alternativknappen för önskad **Aktiveringsmetod** från följande värden:
 - **Gaze** – Använd enbart blicken (standard)
 - Ögon och kontakt – använd blick och en kontakt.

 En kontakt krävs för att aktivera denna inställning.

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.2.2 Knappar

5.2.2.1 Hur ändrar jag fokuseringstiden för aktivering av knappar i TD Talk?



Med knappar avses inte knapparna på tangentbordet utan de knappar som finns på alla andra ställen i TD Talk.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.



Knappen (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.



2. Välj knappen (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.



3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningarna.



4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Knappar**.

7. Välj knappen för **fokuseringstid** för ett av de aktuella värdena:

- Långsam
- **Medium** (standard)
- Snabb



8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.



9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.2.2.2 Hur finjusterar jag tiden för aktivering av knappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.



Knappen (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.



2. Välj knappen (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.



3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningarna.



4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Knappar**.

7. Välj en av följande knappar för att finjustera **fokuseringstiden**:



- sänk fokuseringstiden



- öka fokuseringstiden

Värdet kan ändras i steg om 200 ms - obegränsat



8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.

9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.2.3 Kontaktinmatning

Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.



Om en tangent är inställd för kontaktinmatning kommer den även att fungera som en kontakt om den väljs på ett externt anslutet tangentbord.

5.2.3.1 Hur ställer jag in kontaktinmatning för min kontakt i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Kontaktinmatning**.

7. Välj knappen **Ändra**.



8. Välj alternativknappen för den tangentbordstangent som ska användas för **kontaktinmatning**.

9. Välj knappen **OK** för att bekräfta eller knappen **Avbryt** för att avbryta.

10. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

11. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.3 Tangentbord

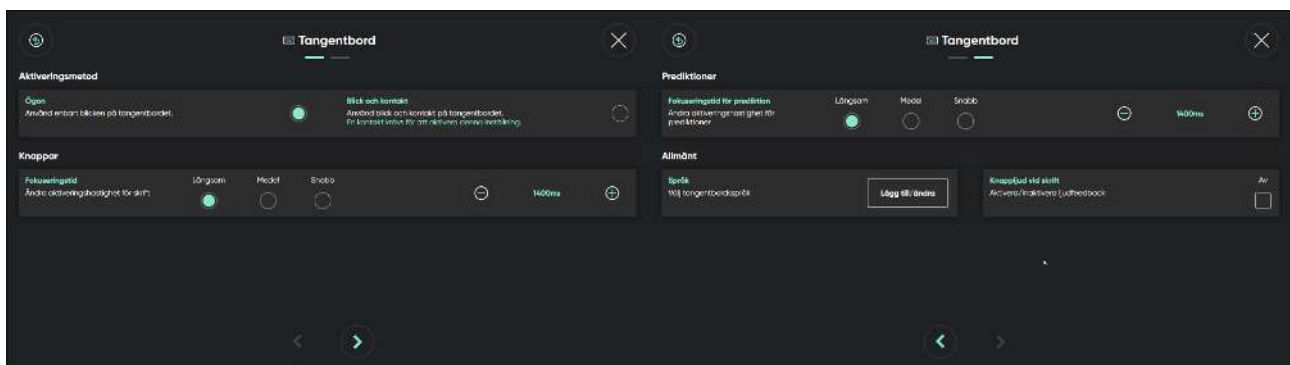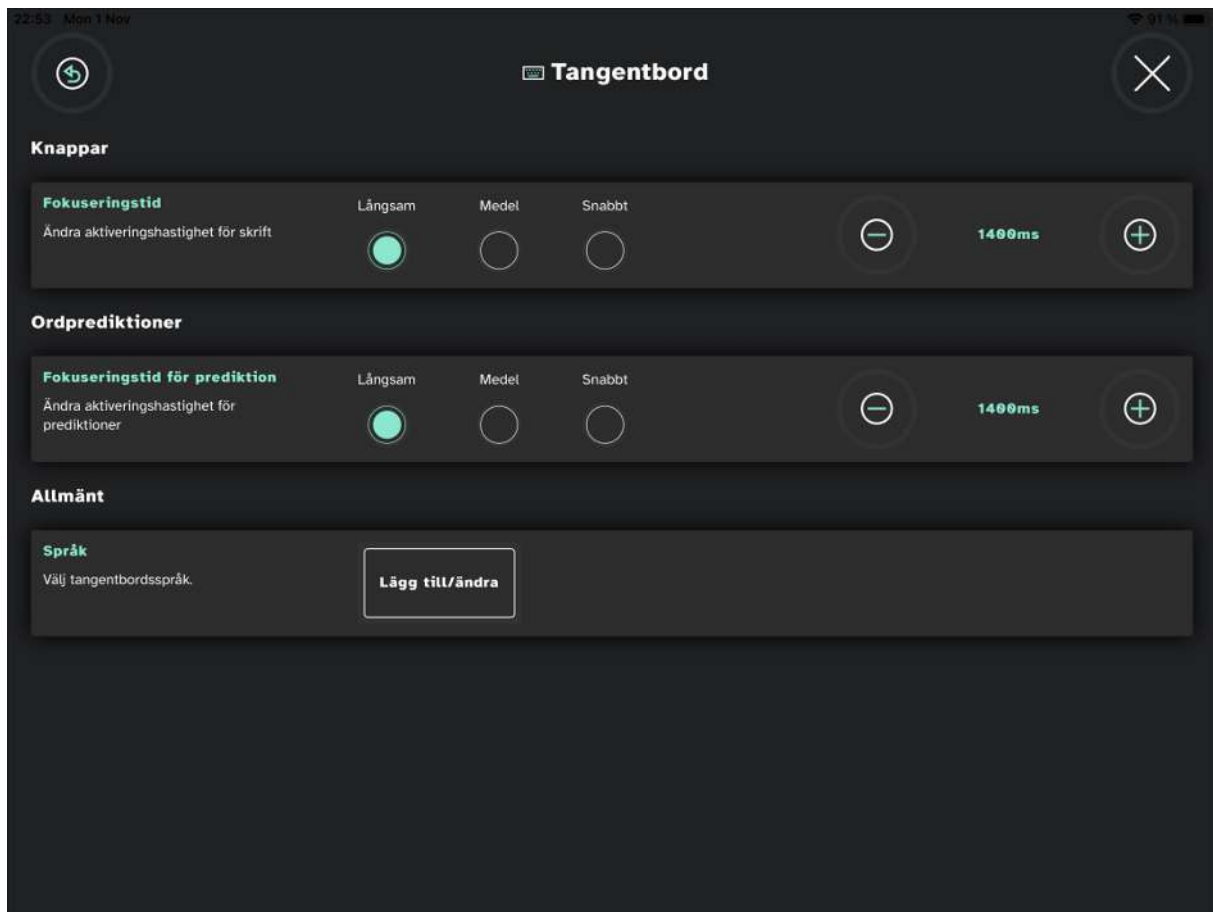

5.3.1 Aktiveringsmetod

5.3.1.1 Hur väljer jag aktiveringsmetod för tangentbordet i TD Talk?

 Valet av aktiveringsmetod för tangentbord gäller endast aktivering av tangentbordsknappar i TD Talk.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Aktiveringsmetod**.

7. Välj alternativknappen för önskad **Aktiveringsmetod** från följande värden:

- **Gaze** – Använd enbart blicken (standard)
- Ögon och kontakt – använd blick och en kontakt.

 En kontakt krävs för att aktivera denna inställning.

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.3.2 Knappar

5.3.2.1 Hur ändrar jag fokuseringstiden för tangentbordsknappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningarna.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Knappar**.

7. Välj knappen för **fokuseringstid** för ett av de aktuella värdena:

- Långsam
- **Medium** (standard)
- Snabbt

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.

9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.3.2.2 Hur finjusterar jag tiden för aktivering av knappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningarna.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Knappar**.

7. Välj en av följande knappar för att finjustera **fokuseringstiden**:

–  – sänk fokuseringstiden

–  – öka fokuseringstiden

Värdet kan ändras i steg om 200 ms – obegränsat

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.

9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.3.3 Prediktion

5.3.3.1 Hur ändrar jag fokuseringstiden för prediktionsknappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen  (Nästa sida) i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

7. Titta i avsnittet **Ordprediktion**.

8. Välj knappen för **fokuseringstid** för ett av de aktuella värdena:

- Långsam
- **Medium** (standard)
- Snabb

9. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

10. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.3.3.2 Hur finjusterar jag tiden för prediktionsknappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen  (Nästa sida) i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

7. Titta i avsnittet **Ordprediktion**.

8. Välj en av följande knappar för att finjustera **fokuseringstiden**:

–  – minska fokuseringstiden

–  – öka fokuseringstiden

Värdet kan ändras i steg om 200 ms – obegränsat

9. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

10. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.3.4 Allmänt

5.3.4.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen  (Nästa sida) i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

7. Titta i avsnittet **Allmänt**.

8. Välj knappen **Lägg till/ändra** "Välj tangentbordsspråk".

9. Välj fliken **Ladda ner**.

10. Välj knappen  (Ladda ner) bredvid språket för att starta nedladdningen av det nya tangentbordet.

11. Välj knappen **Ladda ner** för att påbörja nedladdningen eller knappen **Avbryt** för att avbryta nedladdningen.
12. Välj fliken **Installerad**.
13. Välj knappen bredvid språken för att aktivera språket.

14. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

15. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.3.4.2 Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen  (Nästa sida) i det nedre vänstra hörnet av skärmen.
7. Välj knappen **Lägg till/ändra** "Välj tangentbordsspråk".
8. Välj fliken **Installerad**.
9. Välj knappen bredvid språken för att aktivera tangentbordsspråket för dessa språk.

 Se till att du väljer knappen för alla de språk som du vill ha en röst tillgänglig för.

10. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

11. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.3.4.3 Hur aktiverar/inaktiverar jag knappljud vid skrift i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.


4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen  (Nästa sida) i det nedre vänstra hörnet av skärmen.
7. Titta i avsnittet **Allmänt**.
8. Ändra knappen **På/av** för "Knappljud vid skrift" till:


- På
- Av

9. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.
10. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.4 Konversationer

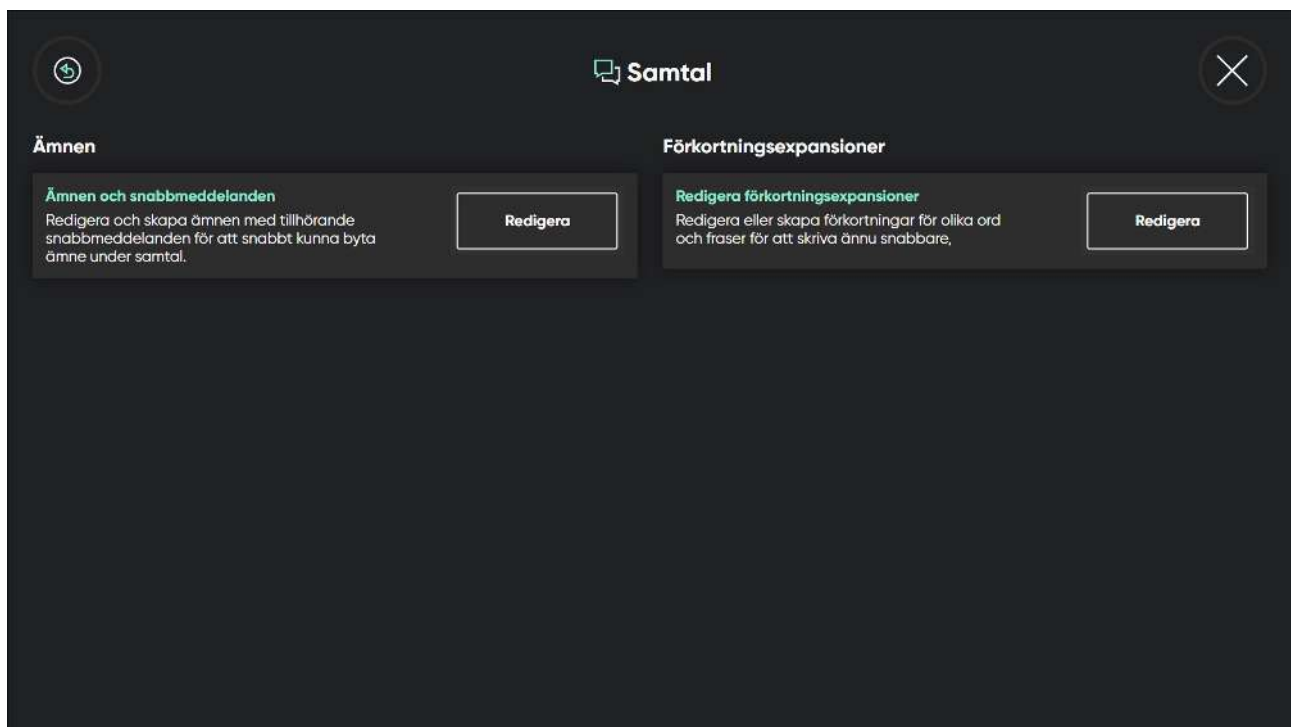

5.4.1 Ämnen

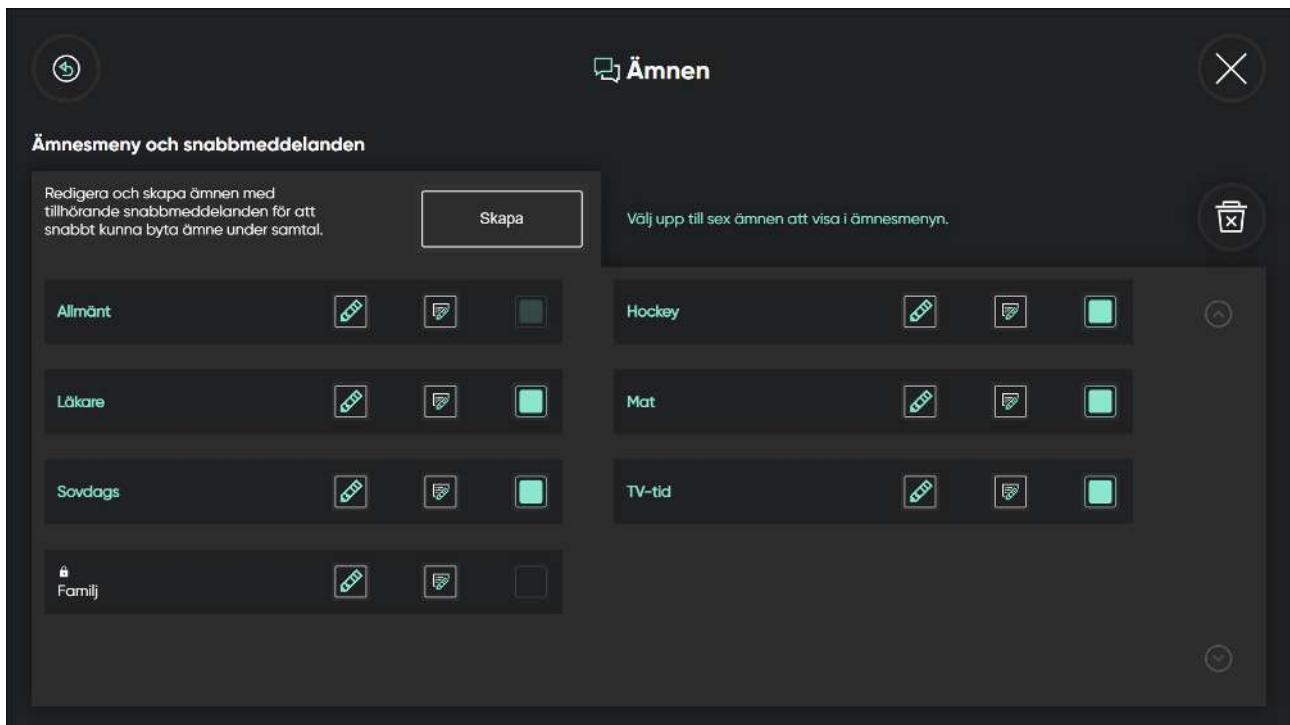

5.4.1.1 Hur skapar jag ett nytt ämne i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen **Skapa**.

7. Använd tangentbordet för att namnge det nya ämnet.



Välj kryssrutan **Sekretessläge** för att stänga av frasprediktion och inlärning.

8. Välj ikonen  (Spara) för att spara.

9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta.

5.4.1.2 Hur kan jag byta namnet på ett TD Talk-ämne?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.
4. Leta efter ikonen  (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.
6. Välj knappen  (Redigera) intill namnet på ämnet.
7. Använd tangentbordet för att byta namn på ämnet.
-  Välj kryssrutan **Sekretessläge** för att stänga av frasprediktion och inläring.
8. Välj ikonen  (Spara) för att spara.
9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta.

5.4.1.3 Hur kan jag göra ämnet privat i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.
4. Leta efter ikonen  (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.
6. Välj knappen  (Redigera) intill namnet på ämnet.
7. Välj kryssrutan **Sekretessläge** för att stänga av frasprediktion och inläring.
8. Välj ikonen  (Spara) för att spara.
9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta.

5.4.1.4 Hur kan jag välja aktiviteten Ämne i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Konversationer) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.
6. Välj knappen **Redigera** för Ämnen och Snabbmeddelanden i avsnittet Ämnen.
7. Välj **Kryssruta** för ämnet som skall vara aktivt.



Upp till sex (6) ämnen kan väljas och finns tillgängliga i ämnesmenyn.

8. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.
9. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

5.4.1.5 Hur tar jag bort ett ämne i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Konversationer) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.
6. Välj knappen **Redigera** för Ämnen och Snabbmeddelanden i avsnittet Ämnen.

7. Välj knappen  (Radera).
8. Välj knappen  (Ta bort) bredvid namnet på det ämne som du vill radera.
9. Välj knappen **Ta bort** för att slutföra valet eller knappen **Avbryt** för att avbryta.

10. Välj knappen  (Klar) när du är klar med raderingen.

11. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.

12. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

5.4.1.6 Hur kan jag redigera snabbmeddelanden i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Konversationer) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.
6. Välj knappen **Redigera** för Ämnen och Snabbmeddelanden i avsnittet Ämnen.
7. Välj knappen  (Redigera snabbmeddelanden).
8. Välj knappen  (Redigera) bredvid det meddelande som ska redigeras.
9. Gör ändringarna i meddelandet med hjälp av tangentbordet.
10. Välj knappen  (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.
11. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.
12. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

5.4.1.7 Hur kan jag lägga till ett snabbmeddelande i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.
4. Leta efter ikonen  (Konversationer) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.
6. Välj knappen **Redigera** för Ämnen och Snabbmeddelanden i avsnittet Ämnen.
7. Välj knappen  (Redigera snabbmeddelanden).
8. Välj knappen  (Lägg till) bredvid Lägg till ny plats.
Du kan ha upp till tre (3) sidor med snabbmeddelanden för varje ämne.
9. Använd knapparna  och  för att bläddra mellan de sidorna.
Skriv det nya meddelandet med hjälp av tangentbordet.
10. Välj knappen  (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.
11. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.
12. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

5.4.1.8 Hur kan jag ta bort ett snabbmeddelande i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Konversationer) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen **Redigera** för Ämnen och Snabbmeddelanden i avsnittet Ämnen.

7. Välj knappen  (Redigera snabbmeddelanden).

8. Välj knappen  (Redigera) bredvid det meddelande som ska tas bort.


9. Välj knappen  Ta bort meddelande.

10. Välj knappen  (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.

11. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.

12. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

5.4.2 Förkortningsexpansioner

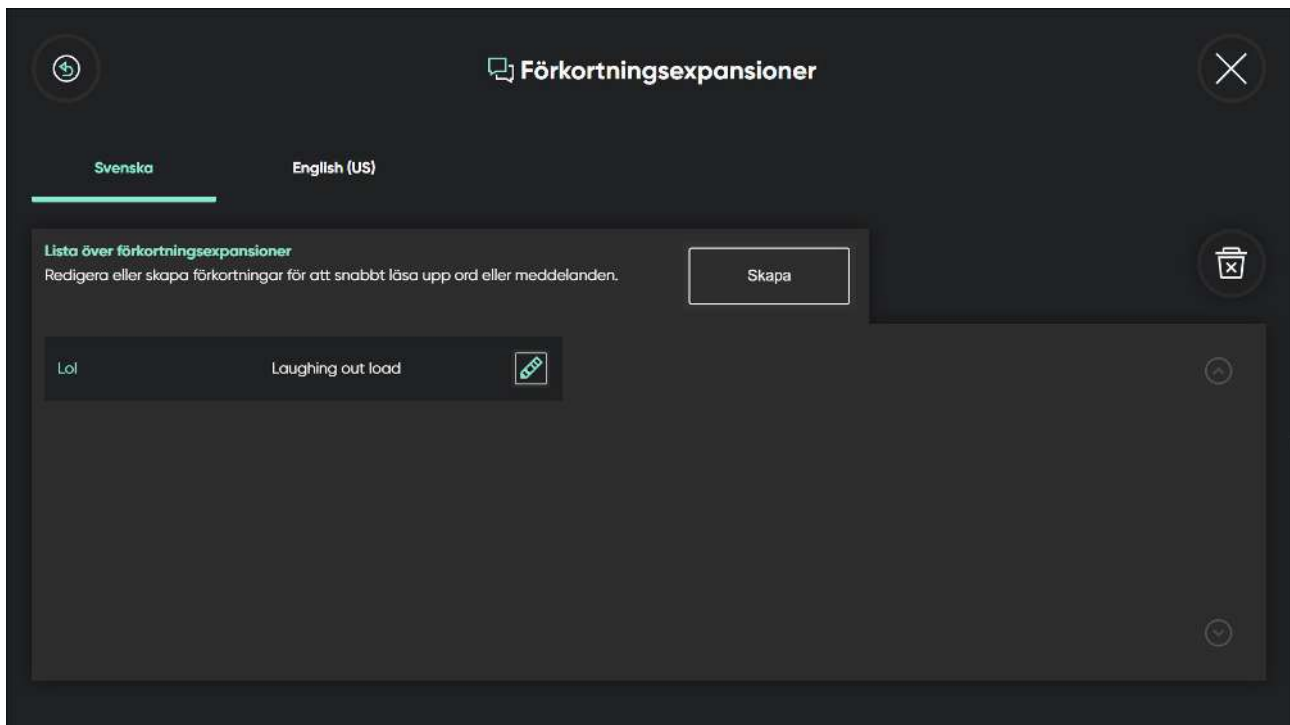

5.4.2.1 Hur lägger jag till en förkortningsexpansion i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Konversationer) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen **Redigera** i området Redigera förkortningsexpansioner under Förkortningsexpansioner.

7. Välj fliken **språk** för det installerade språket som du vill skapa en förkortningsexpansion för.

8. Välj knappen **Skapa**.

9. Skriv den förkortning du vill skapa ett uttalsundantag för i textrutan **Förkortning**.

10. Välj symbolen  intill textrutan **Ord eller meddelande**.

11. Skriv det ord eller meddelande du har skapat en förkortning för i textrutan **Ord eller meddelande**.

12. Välj knappen  (Spara) för att spara ändringarna i förkortningsexpansionen.

13. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningarna för konversation.

14. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningarna för TD Talk.

15. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.4.2.2 Hur redigerar jag en förkortningsexpansion i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Konversationer) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen **Redigera** i området Redigera förkortningsexpansioner under Förkortningsexpansioner.

7. Välj fliken **språk** för det installerade språket som du vill redigera en förkortningsexpansion för.

8. Markera symbolen  intill den förkortning du vill redigera.

9. Redigera den nya förkortning du vill skapa i textrutan **Förkortning**.

10. Välj symbolen  intill textrutan **Ord eller meddelande**.

11. Skriv det ord eller meddelande du har skapat en förkortning för i textrutan **Ord eller meddelande**.

12. Välj knappen  (Spara) för att spara ändringarna i förkortningsexpansionen.

13. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningarna för konversation.

14. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningarna för TD Talk.

15. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.4.2.3 Hur tar jag bort en förkortningsexpansion i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Konversationer) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.


6. Välj knappen **Redigera** i området Redigera förkortningsexpansioner under Förkortningsexpansioner.

7. Välj fliken **språk** för det installerade språket som du vill ta bort en förkortningsexpansion för.

8. Välj knappen  (Radera).
9. Välj knappen  (Ta bort) bredvid namnet på den förkortning som du vill radera.
10. Välj knappen **Ta bort** för att bekräfta eller knappen **Avbryt** för att avbryta.
11. Välj knappen  (Klar) när du är klar med raderingen.
12. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningarna för konversation.
13. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningarna för TD Talk.
14. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.5 Röst

Här kan du ställa in talrösten för dina tangentbordsspråk

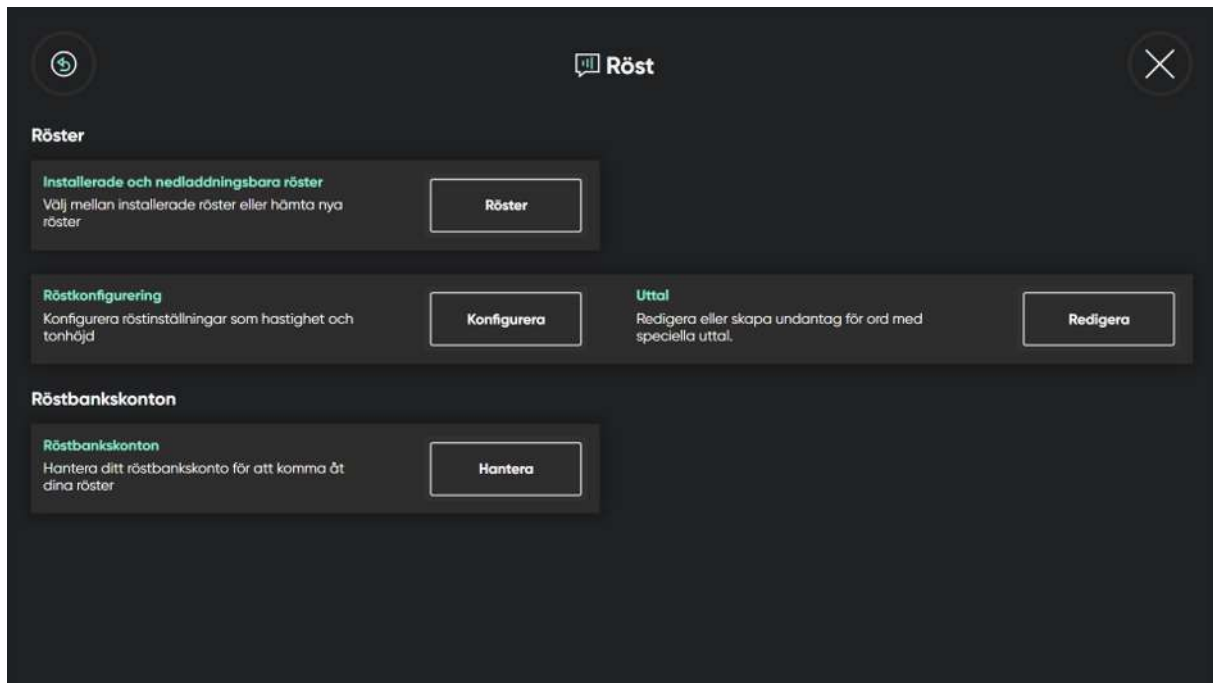

Alla installerade språk visas i den övre delen av skärmen. När språket har valts visas de tillgängliga rösterna för det

språket i listan under språken. Om du vill prova en röst väljer du  bredvid rösten för att prova den. (om den finns tillgänglig).

5.5.1 Röster

5.5.1.1 Installerade och nedladdningsbara röster

There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.

Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see [5.5.1.1.3 Hur kan jag filtrera Tillgängliga röster i TD Talk?](#), sida 41

5.5.1.1.1 Hur laddar jag ner en ny röst i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter (röst) ikonen  för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Röster**.

7. Tryck på knappen **Röster** för installerade och nedladdningsbara röster.

8. Välj fliken **Ladda ner**.

9. Välj fliken **språk** för det installerade språket som du vill läsa upp.



Om det önskade språket saknas, se [5.3.4.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?](#), sida 29 och [5.3.4.2 Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda i TD Talk?](#), sida 30.

10. Välj knappen  (Ladda ner) bredvid språket för att starta nedladdningen av den nya rösten.
Använd knapparna "Svep uppåt" och "Svep nedåt" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster för språket.



Om du vill prova en röst väljer du  bredvid rösten.

11. Välj knappen **Ladda ner** för att påbörja nedladdningen eller knappen **Avbryt** för att avbryta nedladdningen.

12. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till Röstinställningar.

13. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.

14. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.5.1.1.2 Hur väljer jag min röst i TD Talk?



Rösterna från Röstbankssystemet kommer att ha logotypen för Röstbankstjänsten synlig efter röstens namn.

- Acapela MyOwnVoice



- ModelTalker



- The Voice Keeper



1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.



Knappen (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.



3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.



4. Leta efter (röst) ikonen för att hitta rätt inställningskort.



5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Röster**.

7. Tryck på knappen **Röster** för installerade och nedladdningsbara röster.

8. Välj fliken **språk** för det installerade språket som du vill läsa upp.



Om det önskade språket saknas, se 5.3.4.1 *Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?*, sida 29 och 5.3.4.2 *Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda i TD Talk?*, sida 30.

9. Välj den röst som ska användas i listan över tillgängliga röster för det språk som ska läsas upp.

Använd knapparna "Svep uppåt" och "Svep nedåt" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster för språket.



Om du vill prova en röst väljer du bredvid rösten.



10. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Röstinställningar.



11. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.



12. Välj knappen (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.



5.5.1.1.3 Hur kan jag filtrera Tillgängliga röster i TD Talk?

On the **Installed** or **Download** tab, do the following:




1. Välj knappen (Filter).

2. Markera kryssrutan intill de alternativ du vill använda.

Du kan välja:

- Kön – kvinna, man
- Ålder – barn, tonåring, vuxen

5.5.1.2 Röstkonfigurering

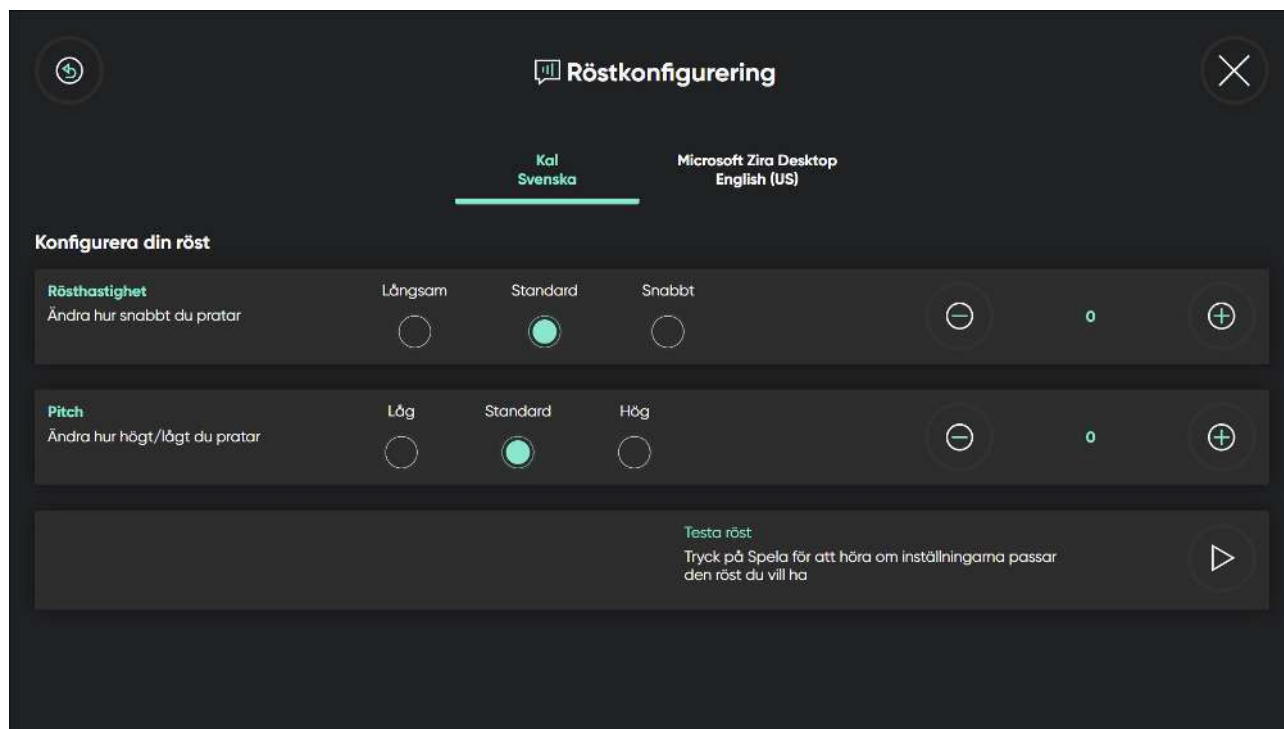

5.5.1.2.1 Hur gör jag ändringar för min röst i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter (röst) ikonen  för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Röster**.

7. Tryck på knappen **Konfigurera** för röstkonfigurering.

8. Välj vilken röst du vill konfigurera bland de tillgängliga rösterna.

9. Tryck på knappen för **rösthastighet** för ett av följande värden:

- Långsam
- **Standard**
- Snabbt

för att ändra hur snabbt du pratar

10. Välj en av följande knappar för att finjustera **rösthastigheten**:

-  — för att sänka rösthastigheten

-  — för att öka rösthastigheten

Värdet kan ändras mellan -10 — +10.

11. Tryck på knappen för **tonhöjd** för ett av följande värden:

- Låg
- **Standard**
- Hög

för att ändra röstens tonhöjd.

 Tryck på  i delen Röst för att lyssna på den nya rösten.

12. Välj en av följande knappar för att finjustera **tonhöjden**:

–  — för att sänka tonhöjden

–  — för att öka tonhöjden

Värdet kan ändras mellan -10 — +10.


 Tryck på  i delen Röst för att lyssna på den nya rösten.

13. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till Röstinställningar.

14. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.

15. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.5.1.3 Uttal

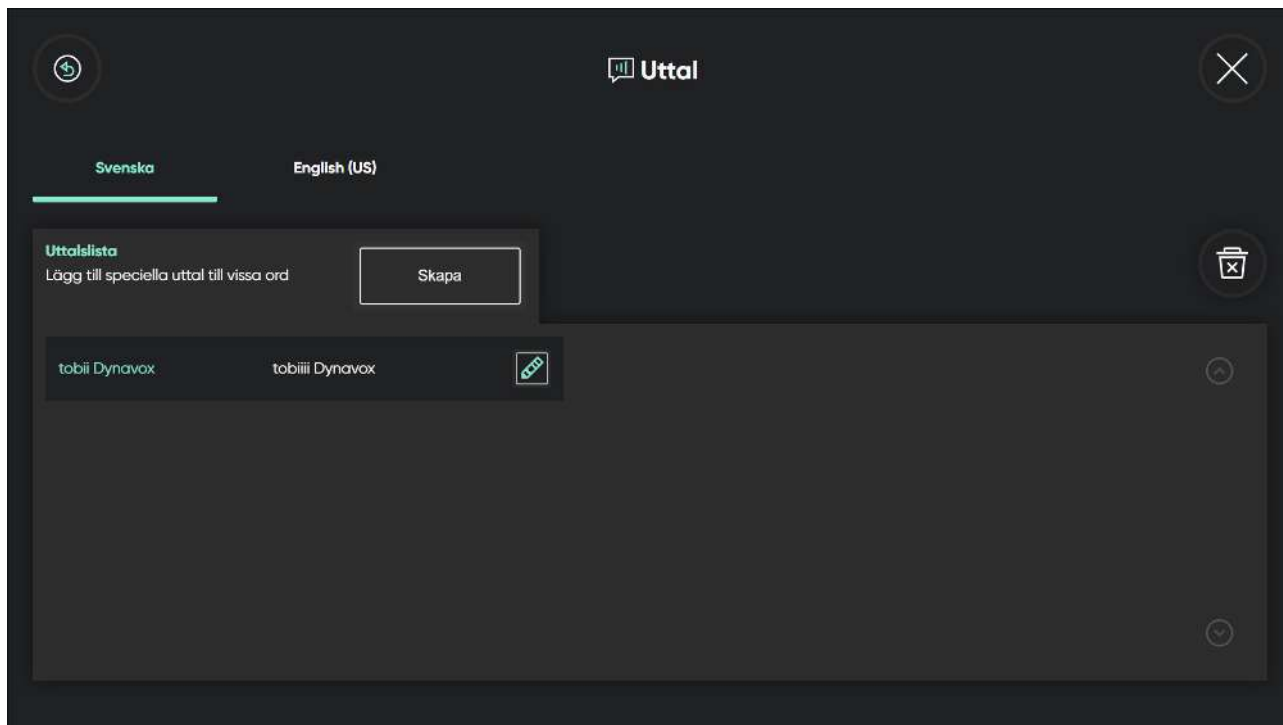

5.5.1.3.1 Hur skapar jag uttalsundantag i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter (röst) ikonen  för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Röster**.

7. Välj knappen **Skapa** för uttal.

8. Välj fliken **språk** för det installerade språket som du vill skapa ett uttalsundantag för.

9. Välj knappen **Skapa**.

10. Skriv det ord du vill skapa ett uttalsundantag för i textrutan **Ord**.

11. Välj symbolen  intill textrutan **Uttal**.

12. Skriv hur du vill att ordet ska uttalas i rutan **Uttal**.

 Lyssna på uttalsundantaget genom att välja  intill textrutan Uttal.

13. Tryck på knappen **Skapa** för att spara ditt uttalsundantag.

14. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till Röstinställningar.

15. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.

16. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.5.2 Röstbankskonton

TD Talk kan ansluta till tre olika Röstbankstjänster:

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 

Användaren behöver ett konto och inloggningsuppgifter hos en av dessa leverantörer av Röstbankstjänster för att kunna ansluta och använda den personliga syntetiska rösten.

5.5.2.1 Röstbankskonton

5.5.2.1.1 Hur kan jag använda min röst från min Röstbankstjänst?

 För att logga in på Röstbankstjänsten krävs internetuppkoppling.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Leta efter (röst) ikonen  för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Röstbankskonton**.


Tryck på knappen **Hantera** för röstbankskonton.

7. Välj knappen **Logga In** i avsnittet för din Röstbankstjänst.

8. Ange **användarnamnet** och **lösenordet**.

9. Välj knappen **Logga In**.

Den personliga rösten laddas ner och väljs automatiskt som standardröst för användaren.

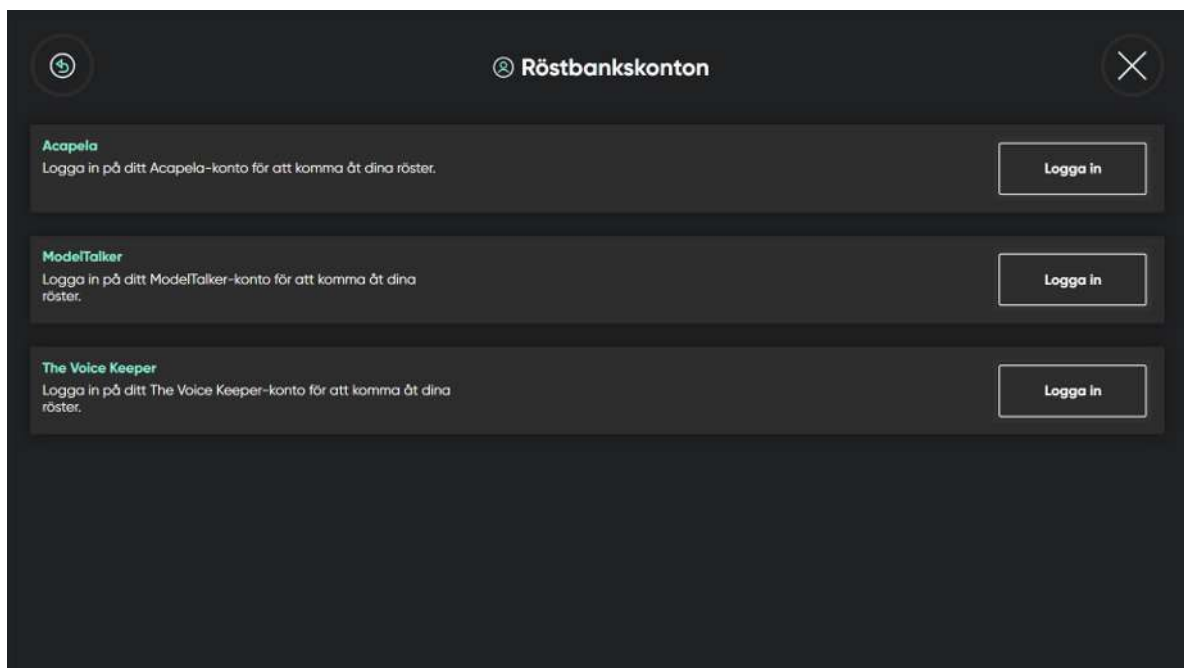

Så här ser det ut när personliga syntetiska röster på flera språk är tillgängliga.

10. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till Röstinställningar.


11. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.

12. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.6 Enhet



Finns endast på TD Pilot.

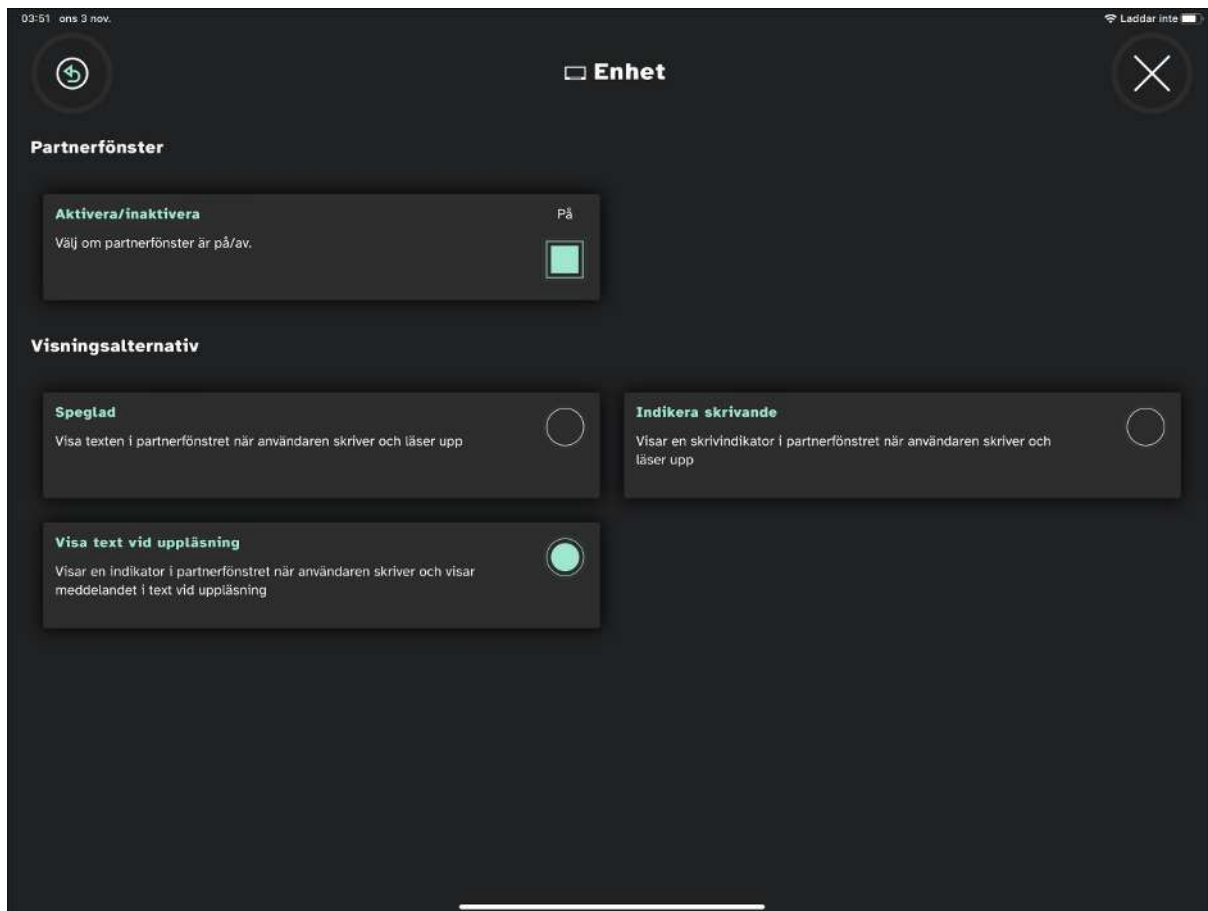

5.6.1 Partnerfönster

5.6.1.1 Hur aktiverar/avaktiverar jag partnerfönstret i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningarna.

4. Leta efter ikonen  (Enhet) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Partnerfönstret**.

7. Växla knappen **Aktivera/Inaktivera** för "Välj om partnerfönstret är på/av" till:

- På
- Av

- Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.
- Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.6.1.2 Hur ställer jag in visningsalternativen för partnerfönstret i TD Talk?

- Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

- Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

- Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningarna.

- Leta efter ikonen  (Enhet) för att hitta rätt inställningskort.

- Välj knappen **Öppna**.

- Titta i avsnittet **Visningsalternativ**.

- Klicka på en av de följande alternativknapparna för att välja visningsalternativet för partnerfönstret:
 - Speglad – visar texten i partnerfönstret medan du skriver och läser upp.
 - Visa text när du läser upp – visar en indikator i partnerfönstret när du skriver och visar meddelandet i text när du läser upp.
 - Indikera skrivande – visar en skrivindikator i partnerfönstret när användaren skriver och läser upp.

- Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till inställningar för TD Talk.

- Välj knappen  (Stäng) för att avsluta inställningar för TD Talk.

5.7 Allmänt

5.7.1 Programspråk

5.7.1.1 Hur ställer jag in mitt programspråk i TD Talk?

- Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

- Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

- Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

- Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.

5. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
6. Leta efter ikonen  (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
7. Välj knappen **Öppna**.
8. Titta i avsnittet **Programspråk**.
9. Välj knappen **Ändra**.
10. Välj knappen bredvid det språk du vill att programmet ska vara på.
11. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.
12. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.7.2 Teckenstorlek

5.7.2.1 Hur ändrar jag textstorlek i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

- Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.
2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.
4. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
5. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
6. Leta efter ikonen  (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
7. Välj knappen **Öppna**.
8. Titta i avsnittet **Teckenstorlek**.
9. Tryck på knappen för **Teckenstorlek** för ett av följande värden:
 - **Standard** (standard)
 - Stor
10. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.
11. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.7.3 Feedback

5.7.3.1 Hur skickar jag feedback till Tobii Dynavox i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.
4. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
5. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
6. Leta efter ikonen  (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
7. Välj knappen **Öppna**.
8. Titta i avsnittet **Feedback**.
9. Välj knappen **Feedback**.
10. Använd **tangentbordet** för att skriva in din e-postadress.
11. Välj knappen  för textfältet Ämne.
12. Använd **tangentbordet** för att fylla i e-postmeddelandets ämne.
13. Välj knappen  för textfältet Meddelande.
14. Använd **tangentbordet** för att skriva meddelandet.
15. Välj knappen  för att stänga textfältet Meddelande.
16. Välj knappen **Skicka feedback** för att skicka feedback till Tobii Dynavox.
17. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.
18. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.7.4 Användarvillkor och sekretessmeddelande

5.7.4.1 Hur öppnar jag Användarvillkor

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

- Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.
2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.
4. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
5. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
6. Leta efter ikonen  (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
7. Välj knappen **Öppna**.

8. Se avsnittet **användarvillkor och vårt sekretessmeddelande**.

9. Välj knappen **Öppna**.

10. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

11. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.7.4.2 Hur öppnar jag sekretessmeddelande

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.

5. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.

6. Leta efter ikonen  (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.

7. Välj knappen **Öppna**.

8. Se avsnittet **användarvillkor och vårt sekretessmeddelande**.

9. Välj knappen **Öppna**.

10. Välj knappen  (framåt).

11. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.

12. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

5.7.5 Hämta loggar

5.7.5.1 Hur samlar jag in loggar för TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Instrumentpanel) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Instrumentpanel) för att öppna Instrumentpanel.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk-inställningar.

4. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.

5. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
6. Leta efter ikonen  (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
7. Välj knappen **Öppna**.
Inställningssidan för Allmänt kommer öppnas.
8. Titta i avsnittet **Hämta loggar**.
9. Välj knappen **Logg**.
10. Välj knappen **Yes/Ja**.
-  Loggar skapas på ditt Skrivbord.
11. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk-inställningar.
12. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk-inställningar.

Copyright © Dynavox Group AB (Publ). Alla produkter och tjänster erbjuds inte på alla lokala marknader. Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii Dynavox-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakta din regionsansvarige eller återförsäljare

Kontakta regionsansvarig på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och utbildning. För kontaktuppgifter, besök <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.