

**TD Talk**  
**Manuale Utente**



## Manuale Utente TD Talk

Version 1.0

11/2021

Tutti i diritti riservati

Copyright © Tobii AB (publ)

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, tramite fotocopia, registrazione o altro tipo) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autore.

La protezione del copyright rivendicata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali schermate, menu e così via.

Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà di Tobii Dynavox. La riproduzione, parziale o totale, senza la preventiva autorizzazione scritta di Tobii Dynavox è vietata.

I prodotti a cui viene fatto riferimento in questo documento possono essere marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. L'editore e l'autore non riconoscono alcuna garanzia in merito a questi marchi.

Sebbene siano state prese tutte le possibili precauzioni nella preparazione di questo documento, l'editore e l'autore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni oppure per danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questo documento o dei programmi e del codice sorgente forniti a corredo. In nessun caso l'editore e l'autore saranno responsabili per eventuali perdite di profitto o qualsiasi altro danno commerciale causato o presumibilmente causato direttamente o indirettamente dalle informazioni incluse in questo documento.

Il contenuto è soggetto a modifica senza preavviso.

Visitare il sito Web Tobii Dynavox

[www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) per versioni aggiornate di questo documento.

### Recapiti:

Tobii Dynavox AB  
Karlsrovägen 2D  
182 53 Danderyd  
Svezia

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC  
2100 Wharton Street, Suite 400  
Pittsburgh, PA 15203  
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.  
Sheffield Technology Parks  
Cooper Buildings  
Arundel Street  
Sheffield S1 2NS  
Regno Unito

+46 8 663 69 90

TingDao Electronics Science & Technology (Suzhou) Co., LTD  
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP, Suzhou  
P.R.Cina 215021

+86 512 69362880



# Indice

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Benvenuto</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Requisiti di sistema   | 4         |
| 1.2      | Lingue supportate  | 4         |
| 1.3      | Come ottenere TD Progressive Suite                               | 4         |
| <b>2</b> | <b>Risorse e supporto</b>  | <b>5</b>  |
| 2.1      | Risorse Web e supporto   | 5         |
| 2.2      | myTobiiDynavox   | 5         |
| 2.3      | Hub di apprendimento   | 5         |
| <b>3</b> | <b>Per iniziare</b>  | <b>6</b>  |
| 3.1      | Panoramica di TD Talk  | 7         |
| 3.2      | Menu fuori schermo   | 8         |
| 3.2.1    | Come si accede al Menu fuori schermo in TD Talk?                 | 8         |
| 3.3      | Dashboard  | 9         |
| 3.3.1    | Come si accede al Dashboard in TD Talk?                          | 9         |
| 3.3.2    | Come uscire e chiudere TD Talk?                                  | 9         |
| 3.4      | Configurazione di TD Talk  | 10        |
| <b>4</b> | <b>Utilizzo di TD Talk</b>                                       | <b>11</b> |
| 4.1      | Uso della tastiera   | 11        |
| 4.2      | Uso delle predizioni   | 11        |
| 4.2.1    | Predizione parole  | 11        |
| 4.2.2    | Predizione di frase  | 12        |
| 4.3      | Modifica di un messaggio   | 13        |
| 4.3.1    | Come modificare un messaggio                                     | 13        |
| 4.4      | Uso dei Messaggi rapidi  | 13        |
| 4.4.1    | Come posso utilizzare la funzione Messaggi rapidi in TD Talk?    | 13        |
| 4.4.2    | Come posso modificare i Messaggi rapidi in TD Talk?              | 14        |
| 4.4.3    | Come posso aggiungere un Messaggio rapido in TD Talk?            | 14        |
| 4.4.4    | Come posso eliminare un Messaggio rapido in TD Talk?             | 15        |
| 4.5      | Modifica della lingua  | 15        |
| 4.5.1    | Come posso cambiare rapidamente la lingua da usare in TD Talk?   | 15        |
| <b>5</b> | <b>Impostazioni di TD Talk</b>                                   | <b>16</b> |
| 5.1      | Attivazione  | 17        |
| 5.1.1    | Pulsanti   | 17        |
| 5.2      | Tastiera   | 19        |
| 5.2.1    | Pulsanti   | 19        |
| 5.2.2    | Predizione   | 20        |
| 5.2.3    | Generale   | 21        |
| 5.3      | Voce   | 23        |
| 5.3.1    | Come posso selezionare la mia voce in TD Talk?                   | 23        |
| 5.3.2    | Come posso scaricare una nuova voce in TD Talk?                  | 24        |
| 5.4      | Dispositivo  | 25        |
| 5.4.1    | Partner Window   | 25        |
| 5.5      | Generale   | 27        |
| 5.5.1    | Come posso impostare la mia lingua dell'applicazione in TD Talk? | 27        |

# 1 Benvenuto

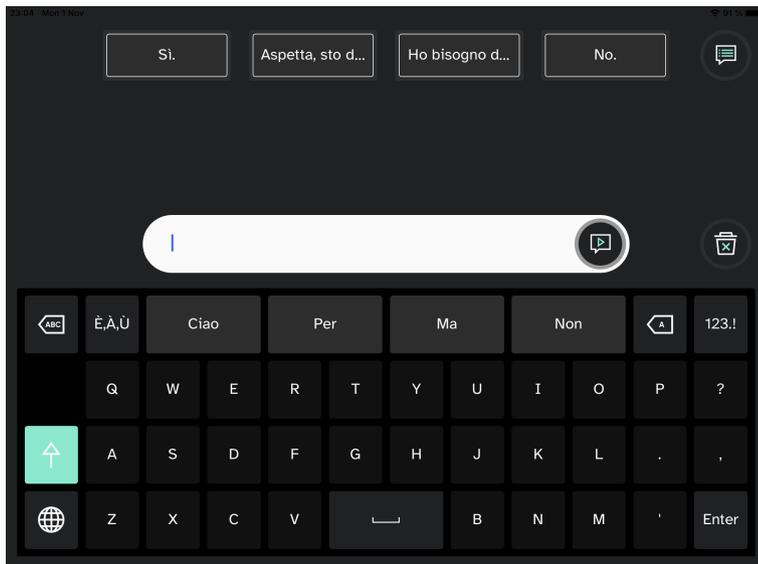


Figura 1.1 TD Talk

TD Talk consente alle persone di comunicare ciò che sono e ciò che vogliono dire, nel modo più fluido possibile. Studiata per rendere la costruzione delle frasi più semplice possibile, TD Talk consente agli utenti di rimanere la parte attiva della conversazione. TD Talk ha caratteristiche e funzionalità famigliari, in modo che gli utenti possano prendere dimestichezza nel minor tempo possibile. Imparando dal modo di comunicare delle persone, TD Talk si adatta continuamente per consentire a tali persone di comunicare esattamente ciò che vogliono dire.

## 1.1 Requisiti di sistema

Tabella 1.1 iOS

|                    | Sistema operativo | Dispositivo         | Memoria | Tocco           | Camera/Fotocamera    |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|
| <b>Minimo</b>      | iOS 15,1          | iPad 7a generazione | 4 GB    | Touch integrato | Telecamera integrata |
| <b>Consigliato</b> | iOS 15,1          | iPad 8a generazione | 4 GB    | Touch integrato | Telecamera integrata |

## 1.2 Lingue supportate

- Danese (DK)
- Olandese (NL)
- Inglese (US)
- Francese (FR)
- Tedesco (DE)
- Italiano (IT)
- Norvegese (NO)
- Spagnolo (America Latina)
- Svedese (SE)
- Altre lingue in arrivo!

## 1.3 Come ottenere TD Progressive Suite

TD Talk è disponibile tramite Apple App Store per iPadOS.

## 2 Risorse e supporto

Tobii Dynavox offre diverse risorse gratuite per il supporto e l'assistenza durante l'uso di TD Talk. Non perdetevi questi strumenti che vi aiuteranno a trarre il massimo dal vostro software Tobii Dynavox!

### 2.1 Risorse Web e supporto

Se avete bisogno di supporto, il primo passo deve essere la consultazione della sezione Formazione e supporto del sito Web Tobii Dynavox.

### 2.2 myTobiiDynavox

myTobiiDynavox è il vostro sito Web di archiviazione online personale nonché il vostro portale di condivisione. Caricate i vostri file di backup su myTobiiDynavox per conservarli e condividerli con l'intero team di assistenza alla comunicazione.

Andate su [myTobiiDynavox.com](https://myTobiiDynavox.com) per registrare un account gratuito.

The logo for myTobiiDynavox, featuring the text "mytobii dynavox" in white on a green rectangular background.

### 2.3 Hub di apprendimento



L'Hub di apprendimento è al momento solo lingua inglese.

Visitate [learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com) per la documentazione, la formazione e altre risorse, tra cui:

- risposte alle domande più frequenti
- video di formazione
- webinar registrati
- corsi online

# 3 Per iniziare

Se TD Talk verrà utilizzato con un eye tracker, assicuratevi di avere una calibrazione attiva per l'eye tracker.

- iOS — utilizzare l'app TD CoPilot per la configurazione dell'eye tracker.  
Per informazioni dettagliate, vedere il Manuale utente di TD Pilot.

## 3.1 Panoramica di TD Talk

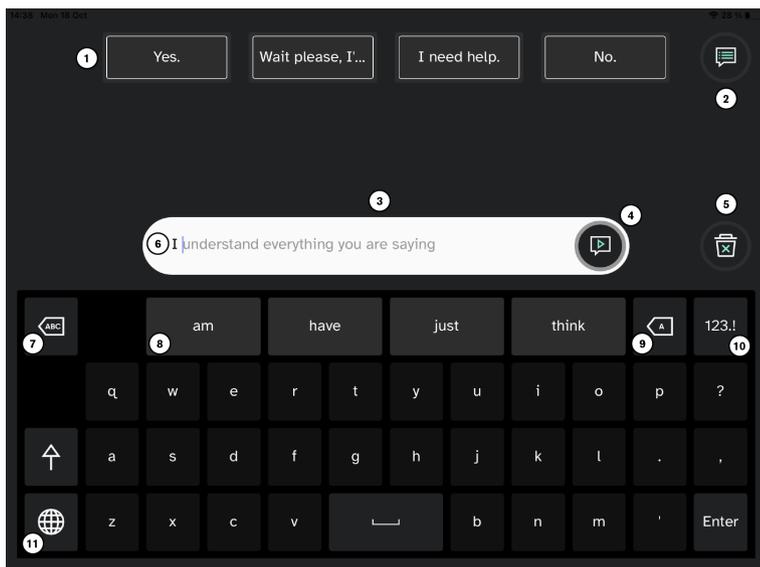


Figura 3.1 TD Talk

| Posizio-<br>ne | Descrizione   | Posizio-<br>ne | Descrizione   |
|----------------|---|----------------|---|
| 1              | <b>Messaggi rapidi</b><br>Messaggi pre-scritti che vengono pronunciati immediatamente quando selezionati  | 7              | <b>Elimina parola</b><br>Consente di eliminare la parola a sinistra del cursore.                        |
| 2              | <b>Altri messaggi rapidi</b><br>Aprire la pagina Messaggi rapidi per la pronuncia o la modifica dei propri Messaggi rapidi.   | 8              | <b>Predizione parole</b><br>Predice automaticamente le parole in base a quanto digitato fino ad allora. |
| 3              | <b>Finestra Messaggio</b><br>Visualizzare e modificare qui il testo che si desidera pronunciare.  | 9              | <b>Backspace</b><br>Consente di eliminare il carattere a sinistra del cursore.                          |
| 4              | <b>Parla</b><br>Consente di pronunciare il testo nella Finestra Messaggio. È anche possibile mettere in pausa e ripristinare la pronuncia.  | 10             | <b>Pagina dei numeri</b><br>Consente di accedere ai numeri e ai caratteri speciali.                     |
| 5              | <b>Cancella</b><br>Consente di cancellare tutto il testo nella Finestra Messaggio.  | 11             | <b>Cambio lingua</b><br>Consente di cambiare lingua.  |
| 6              | <b>Predizione di frase</b><br>TD Talk impara da quello che si digita e usa tali informazioni per la predizione delle frasi. La predizione è basata sulla frequenza e rende la comunicazione più veloce e personale. |                |   |

## 3.2 Menu fuori schermo

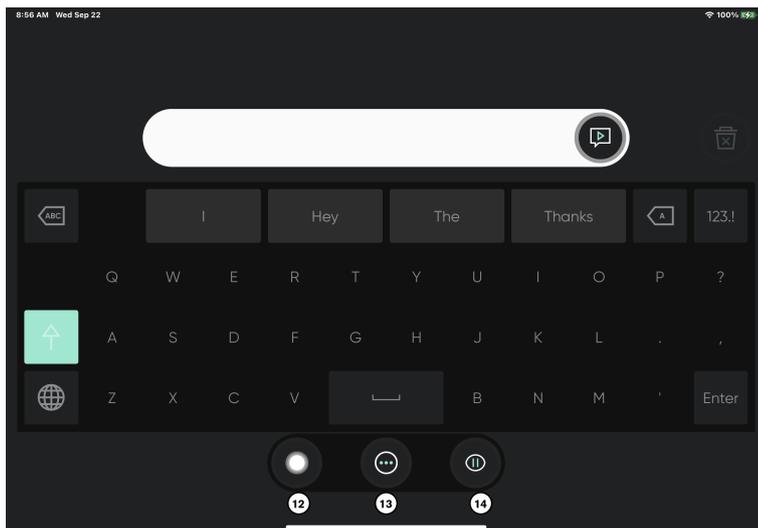


Figura 3.2 Menu fuori schermo di TD Talk

| Posizione | Descrizione   | Posizione | Descrizione   |
|-----------|---|-----------|---|
| 12        | <b>AssistiveTouch</b><br>Attivare AssistiveTouch. Usare AssistiveTouch per accedere alla schermata iniziale e a tutte le altre app. | 14        | <b>Sospendi/Riprendi interazione oculare</b><br>Azionare il pulsante per sospendere e ripristinare l'interazione oculare. |
| 13        | <b>Altro</b><br>Consente di accedere al Dashboard e alle Impostazioni.  |           |   |

### 3.2.1 Come si accede al Menu fuori schermo in TD Talk?

Ci sono due modi per accedere al Menu fuori schermo in TD Talk:

- **Come utente:** Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
- **Come assistente:** Scorrere il dito verso l'alto dalla lettera **T** sulla tastiera TD Talk.

## 3.3 Dashboard

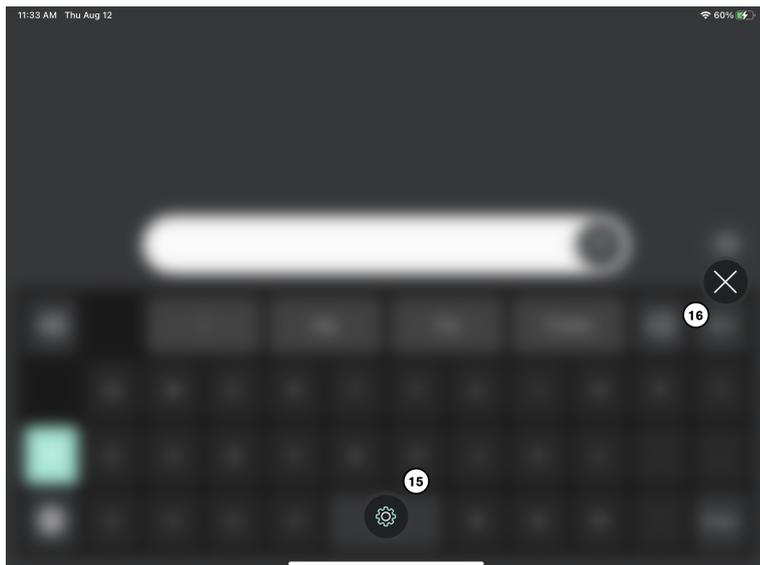


Figura 3.3 Dashboard di TD Talk

| Posizio-<br>ne | Descrizione  | Posizio-<br>ne | Descrizione   |
|----------------|--|----------------|---|
| 15             | <b>Impostazioni di TD Talk</b><br>Per ulteriori informazioni, vedere 5<br><i>Impostazioni di TD Talk</i> | 16             | <b>Esci dal dashboard</b><br>Selezionare il pulsante per uscire dal<br>Dashboard. |

### 3.3.1 Come si accede al Dashboard in TD Talk?

1. Accedere alle impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - **Come utente:** Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
  - **Come assistente:** Scorrere il dito verso l'alto dalla lettera **T** sulla tastiera TD Talk.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.

### 3.3.2 Come uscire e chiudere TD Talk?

1. Accedere alle impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - **Come utente:** Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
  - **Come assistente:** Scorrere il dito verso l'alto dalla lettera **T** sulla tastiera TD Talk.

Il pulsante  (AssistiveTouch) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (AssistiveTouch) per aprire il menu di AssistiveTouch.
3. Selezionare il pulsante  (Home) dal menu di AssistiveTouch.

## 3.4 Configurazione di TD Talk

1. Selezionare l'app  TD Talk sulla schermata iniziale del dispositivo iPadOS.
2. Accedere alle impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - **Come utente:** Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
  - **Come assistente:** Scorrere il dito verso l'alto dalla lettera T sulla tastiera TD Talk.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

3. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.
4. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
5. Impostare la lingua dell'applicazione TD Talk:
  - a. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
  - b. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
  - c. Selezionare il pulsante **Apri**.
  - d. Guardare nella sezione **Lingua applicazione**.
  - e. Selezionare il pulsante di opzione accanto alla lingua desiderata per l'applicazione.
  - f. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
6. Selezionare la voce o le voci da utilizzare:
  - a. Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.
  - b. Selezionare il pulsante **Apri**.
  - c. Guardare nella sezione **Le tue voci**.
  - d. Selezionare il pulsante di opzione sotto la lingua installata che si desidera usare.

 Se la lingua desiderata non è presente, vedere [5.2.3.1 In che modo posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?](#), pagina 21 e [5.2.3.2 Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?](#), pagina 22.

- e. Selezionare il pulsante radio accanto alla voce da usare nell'elenco delle voci disponibili per la lingua da utilizzare.  
Usare i pulsanti "Scorri su" e "Scorri giù" a destra per scorrere l'elenco delle voci disponibili per la lingua desiderata.

 Per provare una voce, selezionare  accanto alla voce, se disponibile.

 Se è presente  (scarica) al posto di un pulsante di opzione, selezionare il pulsante per scaricare la voce.

- f. Ripetere i passaggi **d** ed **e** se si desidera poter parlare in più di una lingua.

7. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.



In TD Talk è possibile selezionare rapidamente la lingua fra quelle scelte, selezionando il pulsante  nell'angolo inferiore sinistro della tastiera.

## 4 Utilizzo di TD Talk

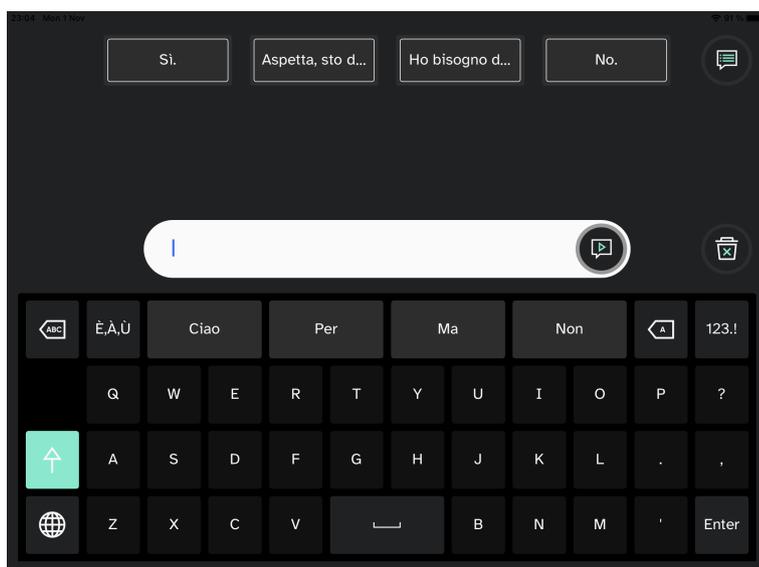


Figura 4.1 TD Talk

### 4.1 Uso della tastiera

Selezionare le lettere sulla tastiera; le parole e le frasi vengono formulate (o costruite) nella Finestra Messaggio. Quando si è pronti a parlare, selezionare il pulsante  (Parla).


### 4.2 Uso delle predizioni

TD Talk offre entrambe le funzioni Predizione parole e Predizione frasi che consentono di ridurre lo sforzo e/o di aumentare la velocità di produzione dei messaggi.

#### 4.2.1 Predizione parole

Il motore di predizione parole utilizzato in TD Talk è di SwiftKey™ e viene comunemente utilizzato in tablet e smartphone. SwiftKey™ utilizza diverse tecnologie di intelligenza artificiale per prevedere la parola successiva che l'utente intende digitare. SwiftKey™ apprende dal testo che l'utente ha scritto in precedenza e visualizza suggerimenti basati sul testo

immesso e sul testo appreso. La lingua della funzione Scrittura facilitata parole cambierà in base all'impostazione di Lingua tastiera.

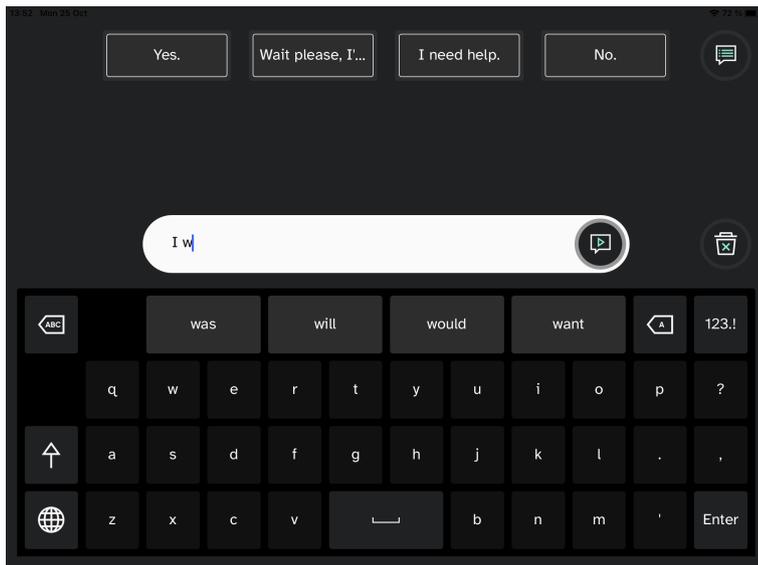


Quando Predizione parole è in uso, sulla tastiera vengono visualizzate quattro (4) caselle. Nella casella all'estrema sinistra è visualizzata la parola più probabile, mentre le tre (3) caselle rimanenti contengono ciascuna una parola prevista. Per selezionare una parola prevista, selezionare una casella contenente la parola corretta. Se la parola desiderata non è presente, continuare a digitare caratteri finché non viene visualizzata la parola desiderata.

Se si utilizza la funzione Predizione parole e si desidera digitare una parola che contiene un accento, come caffè, lasciare che sia la funzione a farlo, evitando sforzi e perdite di tempo. Digitando "caffè" si otterrà come suggerimento la parola "caffè".

## 4.2.2 Predizione di frase

TD Talk apprende e analizza il modo di parlare dell'utente nel tempo. La Predizione parole apprende le parole pronunciate dall'utente. La Predizione frasi apprende il modo in cui l'utente mette insieme tali parole per formare un gruppo di frasi personale. Quando si inizia a digitare, le frasi predette prese dal gruppo di frasi personale vengono offerte nella Finestra messaggio con il testo in grigio.

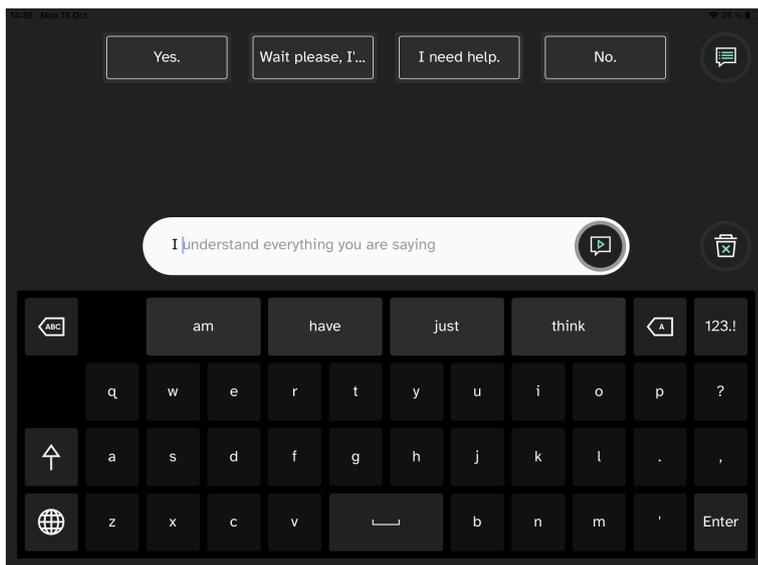


Selezionare la frase predetta fissando lo sguardo sulla frase. Il colore della frase passa da grigio a nero per indicare che è stata selezionata e ora è pronta per essere pronunciata o modificata.

## 4.3 Modifica di un messaggio

### 4.3.1 Come modificare un messaggio

1. Guardare il testo nella Finestra Messaggio. Si aprirà il menu Modifica.

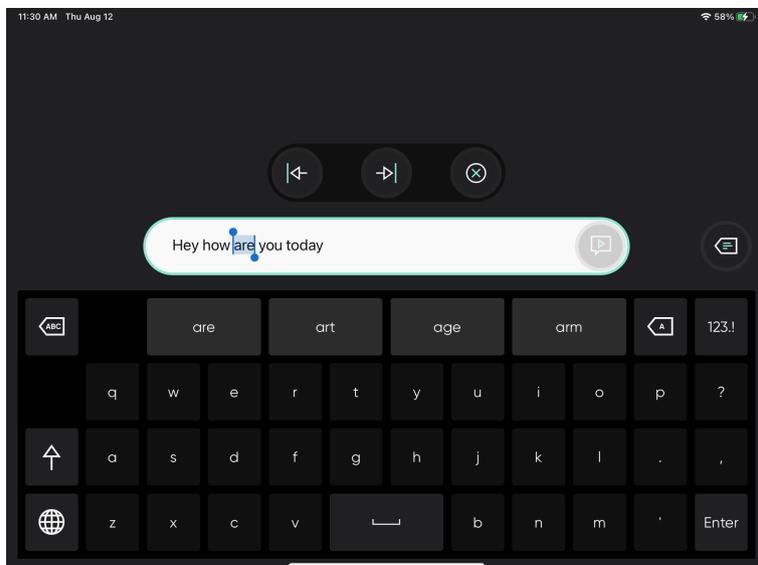

2. Usare le frecce  (Sposta a sinistra) e  (Sposta a destra) per spostarsi sul punto in cui si desidera apportare la modifica.
3. Utilizzare la tastiera o la Predizione parole per apportare la modifica.
4. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla modalità Modifica.

## 4.4 Uso dei Messaggi rapidi

### 4.4.1 Come posso utilizzare la funzione Messaggi rapidi in TD Talk?


Ci sono due (2) tipi di Messaggi rapidi: i primi sono sempre visibili sulla schermata iniziale. I secondi si trovano sotto il pulsante  (Altri messaggi rapidi).

#### Messaggi rapidi sulla schermata iniziale

1. Selezionare il **Messaggio rapido** da pronunciare. Il messaggio selezionato verrà pronunciato immediatamente senza essere aggiunto alla Finestra Messaggio e senza interferire con eventuali messaggi in fase di elaborazione.

## Altri messaggi rapidi

1. Selezionare il pulsante  (Altri messaggi rapidi).

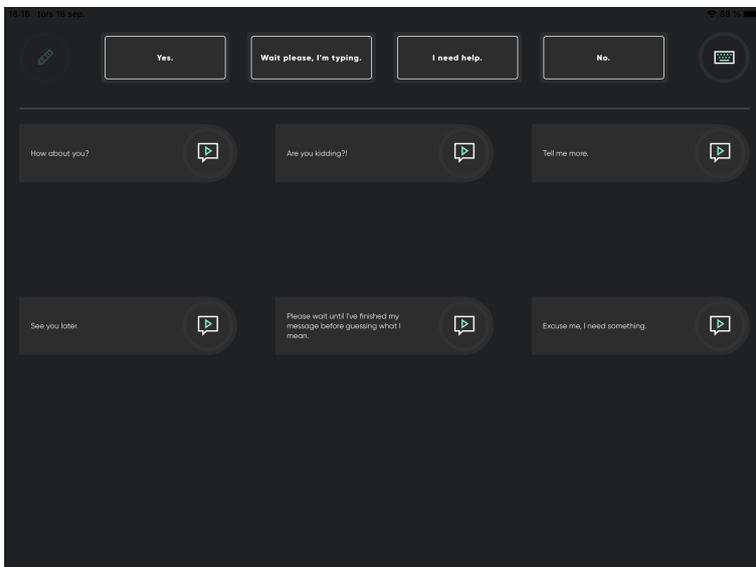

2. Selezionare il pulsante  (Parla) accanto al messaggio.
3. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

### 4.4.2 Come posso modificare i Messaggi rapidi in TD Talk?

1. Selezionare il pulsante  (Altri messaggi rapidi).
2. Selezionare il pulsante  (Modifica).
3. Selezionare il pulsante  (Modifica) accanto al messaggio da modificare.
4. Apportare le modifiche al messaggio con la tastiera.
5. Selezionare il pulsante  (Salva) per salvare le modifiche apportate al Messaggio rapido.
6. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla schermata di modifica.
7. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

### 4.4.3 Come posso aggiungere un Messaggio rapido in TD Talk?

1. Selezionare il pulsante  (Altri messaggi rapidi).
2. Selezionare il pulsante  (Modifica).
3. Selezionare il pulsante  (Aggiungi) accanto ad Aggiungi Nuovo.
4. Scrivere il nuovo messaggio con la tastiera.

5. Selezionare il pulsante  (Salva) per salvare le modifiche apportate al Messaggio rapido.
6. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla schermata di modifica.
7. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

#### 4.4.4 Come posso eliminare un Messaggio rapido in TD Talk?


1. Selezionare il pulsante  (Altri messaggi rapidi).
2. Selezionare il pulsante  (Modifica).
3. Selezionare il pulsante  (Modifica) accanto al messaggio da eliminare.
4. Selezionare il pulsante  (Elimina messaggio).
5. Selezionare il pulsante  (Salva) per salvare le modifiche apportate al Messaggio rapido.
6. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla schermata di modifica.
7. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

## 4.5 Modifica della lingua

### 4.5.1 Come posso cambiare rapidamente la lingua da usare in TD Talk?

1. Selezionare il pulsante  (Lingua) sulla tastiera.
2. Selezionare la lingua da usare  
Se la lingua desiderata non è presente, vedere [5.2.3.1 In che modo posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?, pagina 21](#)
3. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare indietro

# 5 Impostazioni di TD Talk

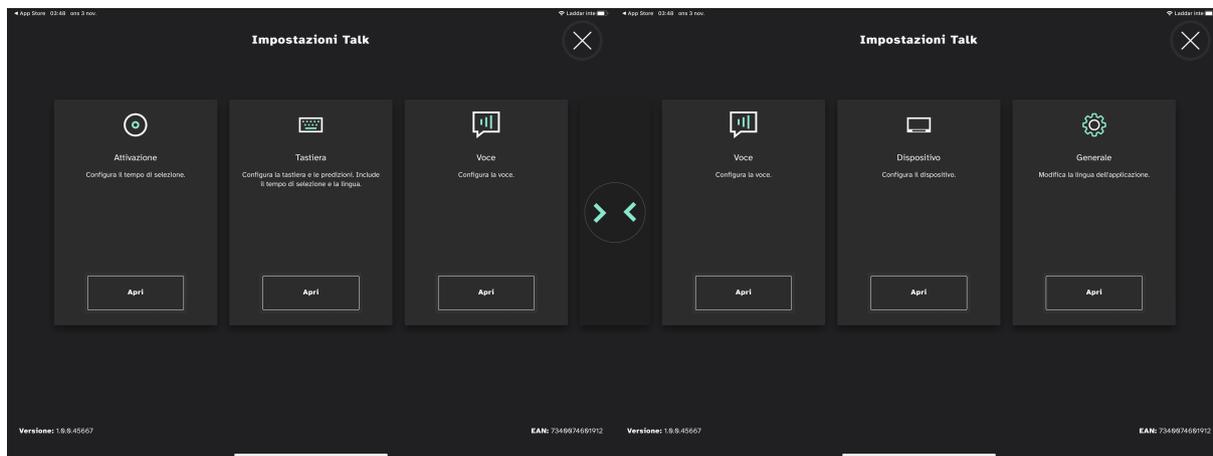


| Icone   | Azione      | Descrizione   |
|---|-------------|---|
|    | Attivazione | Disponibile solo se è installato e abilitato un Eye Tracker.<br>Apre le impostazioni <b>Attivazione</b> .<br>Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.1 Attivazione</i> , pagina 17. |
|   | Tastiera    | Apre le impostazioni <b>Barra delle applicazioni</b> .<br>Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.2 Tastiera</i> , pagina 19.   |
|  | Voce        | Apre le impostazioni <b>Voce</b> .<br>Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.3 Voce</i> , pagina 23.   |
|  | Dispositivo | Disponibile solo su TD Pilot.<br>Apre le impostazioni <b>Dispositivo</b> .<br>Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.4 Dispositivo</i> , pagina 25.                                |
|  | Generale    | Apre le impostazioni <b>Generali</b> .<br>Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.5 Generale</i> , pagina 27.   |

## 5.1 Attivazione



Disponibile solo se è installato e abilitato un Eye Tracker.

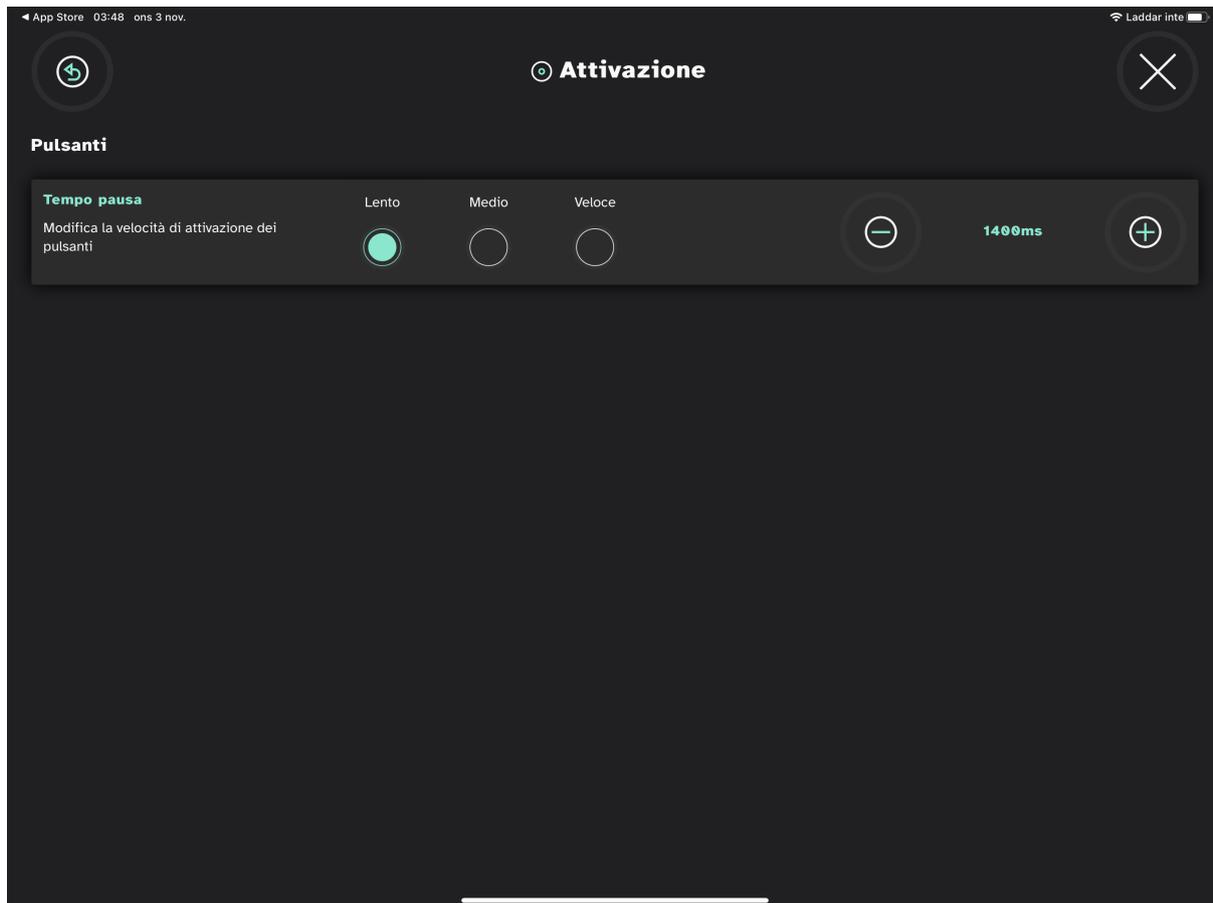

### 5.1.1 Pulsanti

#### 5.1.1.1 In che modo posso modificare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?



I pulsanti non sono collegati a quelli sulla tastiera ma a quelli che si trovano in altre posizioni in TD Talk.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.

7. Selezionare il pulsante di opzione **Tempo di selezione** scegliendo uno dei valori seguenti:
  - Lento
  - **Medio** (predefinito)
  - Veloce

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

### 5.1.1.2 In che modo posso regolare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.

7. Selezionare uno dei pulsanti seguenti per regolare il **Tempo di selezione**:

•  — per ridurre il Tempo di selezione


•  — per aumentare il Tempo di selezione

Il valore può essere modificato nell'intervallo 200 ms — infinito

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

## 5.2 Tastiera

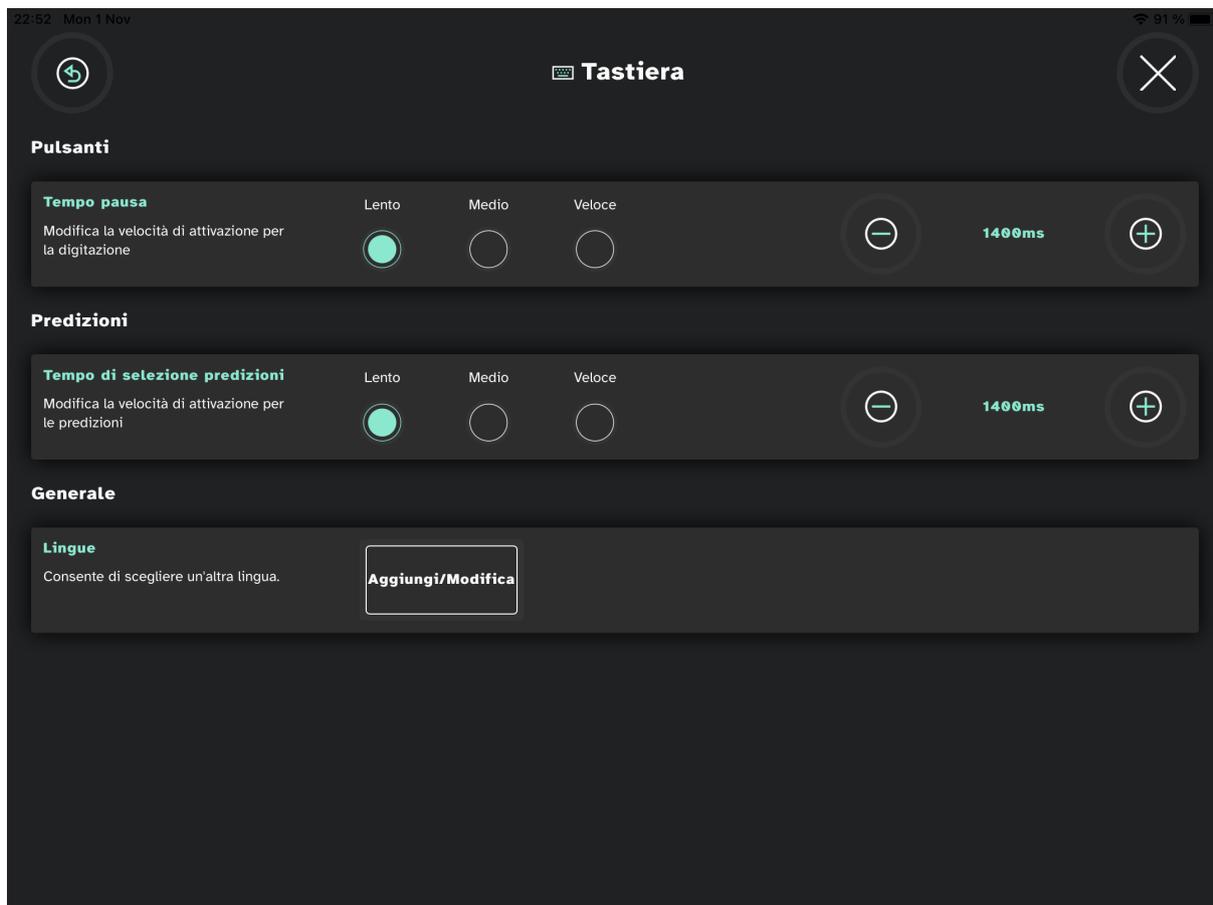

### 5.2.1 Pulsanti

#### 5.2.1.1 In che modo posso modificare il Tempo di selezione per i pulsanti della tastiera in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.
7. Selezionare il pulsante di opzione **Tempo di selezione** scegliendo uno dei valori seguenti:
  - Lento
  - **Medio** (predefinito)
  - Veloce

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

### 5.2.1.2 In che modo posso regolare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.
7. Selezionare uno dei pulsanti di opzione seguenti per regolare il **Tempo di selezione**:

-  — per ridurre il Tempo di selezione
-  — per aumentare il Tempo di selezione

Il valore può essere modificato nell'intervallo 200 ms — infinito

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

## 5.2.2 Predizione

### 5.2.2.1 In che modo posso modificare il Tempo di selezione per i pulsanti di predizione in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Predizione**.
7. Selezionare il pulsante di opzione **Tempo di selezione** scegliendo uno tra i seguenti valori:

- Lento
- **Medio** (predefinito)
- Veloce

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

### 5.2.2.2 In che modo posso regolare il Tempo di selezione per i pulsanti di predizione in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Predizione**.

7. Selezionare uno dei pulsanti di opzione seguenti per regolare il **Tempo di selezione**:

-  — per ridurre il Tempo di selezione

-  — per aumentare il Tempo di selezione

Il valore può essere modificato nell'intervallo 200 ms — infinito

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

## 5.2.3 Generale

### 5.2.3.1 In che modo posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Generali**.

7. Selezionare il pulsante **Aggiungi/Cambia** in "Scegli lingua tastiera".

8. Selezionare la scheda **Scarica**.

9. Selezionare il pulsante  (Scarica) accanto alla lingua per avviare il download della nuova tastiera.

10. Selezionare il pulsante **Scarica** per avviare il download o **Annulla** per annullarlo.

11. Selezionare la scheda **Installato**.

12. Selezionare il pulsante di opzione accanto alle lingue per attivare la lingua.

13. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

14. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

### 5.2.3.2 Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Selezionare il pulsante **Aggiungi/Cambia** in "Scegli lingua tastiera".

7. Selezionare la scheda **Installato**.

8. Selezionare il pulsante di opzione accanto alle lingue per attivare la lingua della tastiera per tali lingue.

 Assicurarsi di selezionare il pulsante di opzione per tutte le lingue per le quali si desidera avere una voce disponibile.


9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

## 5.3 Voce



Qui, viene impostata la voce della lingua da usare.

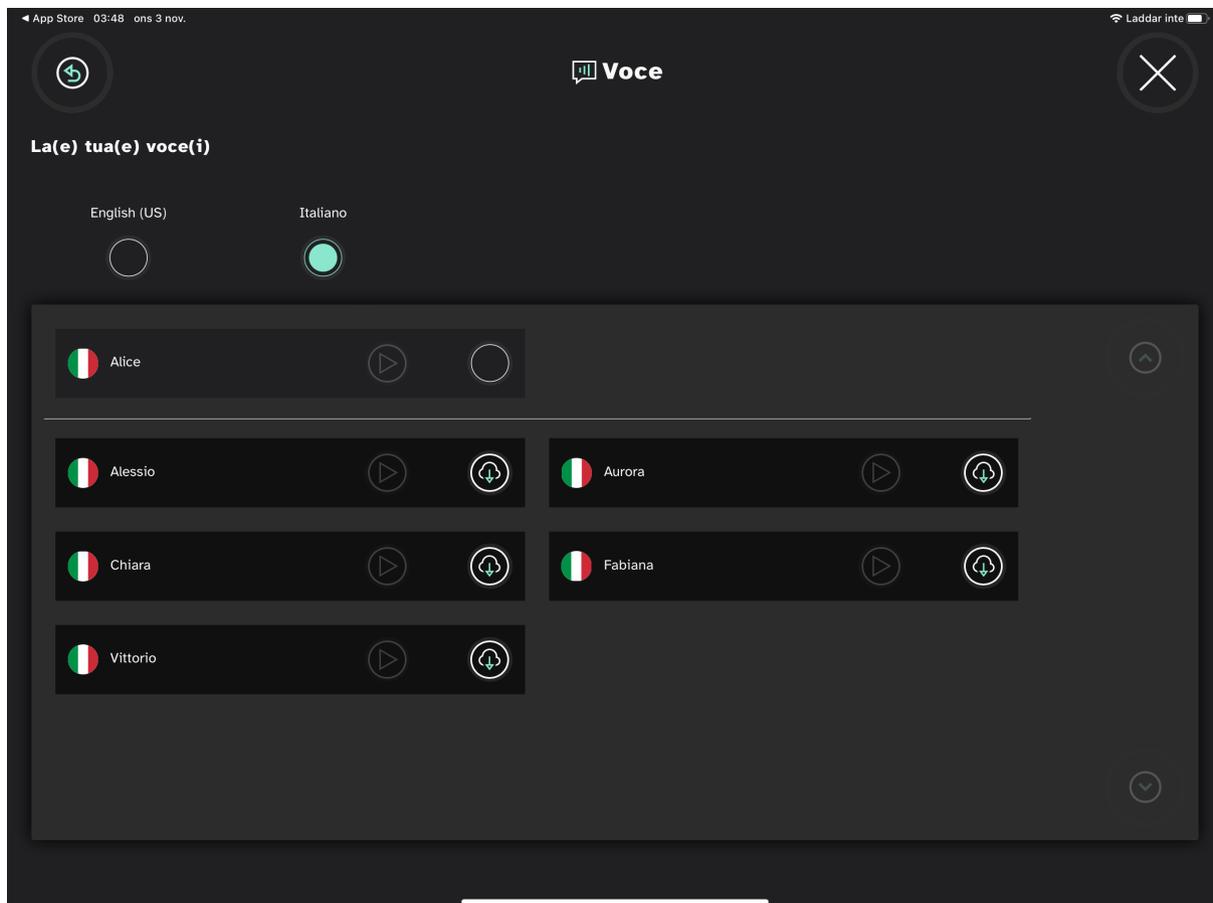

Tutte le lingue installate sono visualizzate nella parte superiore della schermata. Quando la lingua è stata selezionata, le voci disponibili per tale lingua vengono visualizzate nell'elenco sotto alle lingue. Per provare una voce, selezionare  accanto alla voce, se disponibile.

### 5.3.1 Come posso selezionare la mia voce in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Le tue voci**.
7. Selezionare il pulsante di opzione sotto la lingua installata che si desidera usare.



Se la lingua desiderata non è presente, vedere 5.2.3.1 *In che modo posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?*, pagina 21 e 5.2.3.2 *Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?*, pagina 22.

- Selezionare la voce da usare nell'elenco delle voci disponibili per la lingua da utilizzare. Usare i pulsanti "Scorri su" e "Scorri giù" a destra per scorrere l'elenco delle voci disponibili per la lingua desiderata.



Per provare una voce, selezionare  accanto alla voce,

- Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
- Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

### 5.3.2 Come posso scaricare una nuova voce in TD Talk?

- Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

- Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.
- Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
- Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.
- Selezionare il pulsante **Apri**.
- Guardare nella sezione **Le tue voci**.
- Selezionare il pulsante di opzione sotto la lingua installata che si desidera usare.



Se la lingua desiderata non è presente, vedere 5.2.3.1 *In che modo posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?*, pagina 21 e 5.2.3.2 *Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?*, pagina 22.

- Selezionare il pulsante  (Scarica) accanto alla lingua per avviare il download della nuova tastiera. Usare i pulsanti "Scorri su" e "Scorri giù" a destra per scorrere l'elenco delle voci disponibili per la lingua desiderata.




Per provare una voce, selezionare  accanto alla voce,

- Selezionare il pulsante **Scarica** per avviare il download o **Annulla** per annullarlo.
- Selezionare la voce da usare nell'elenco delle voci disponibili per la lingua da utilizzare.
- Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
- Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

## 5.4 Dispositivo



Disponibile solo su TD Pilot.

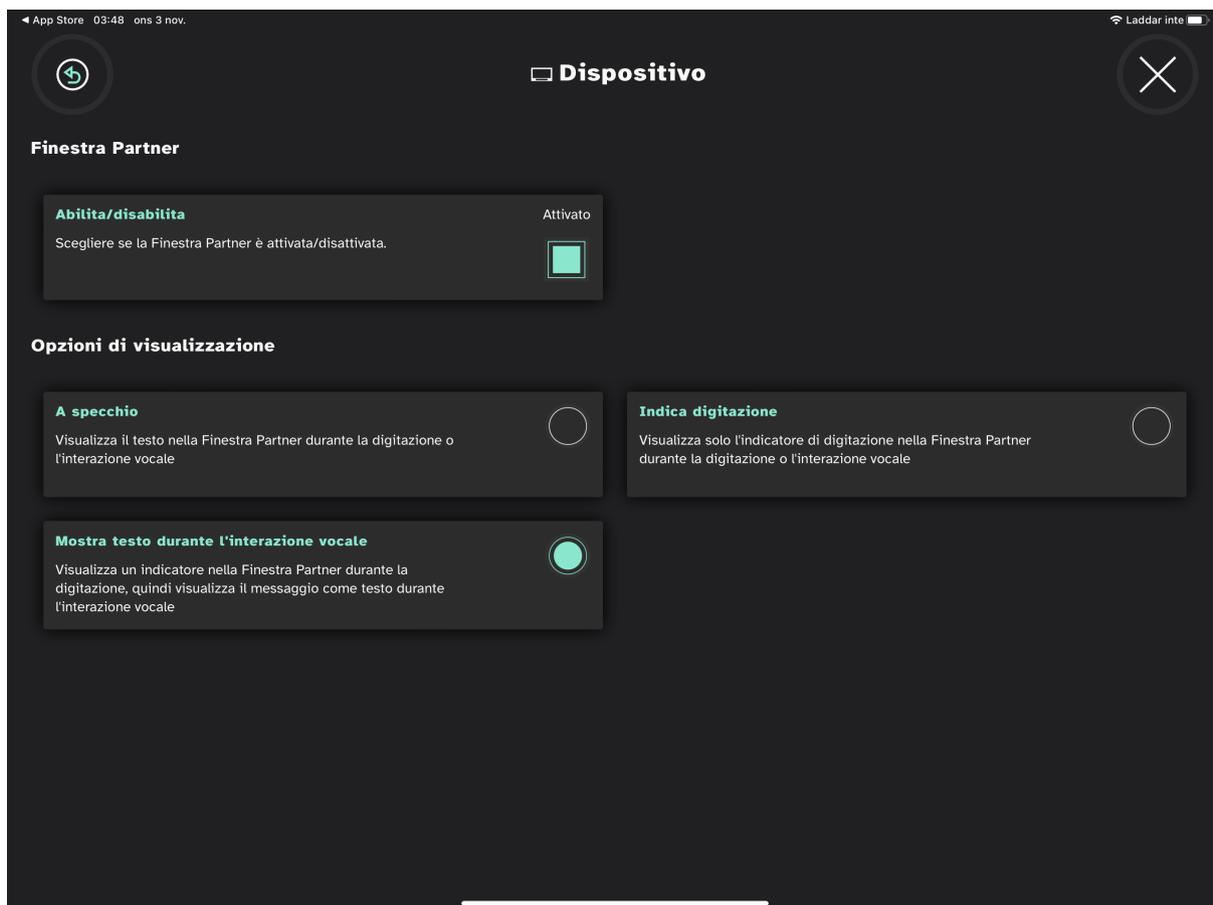

### 5.4.1 Partner Window

#### 5.4.1.1 Come posso abilitare/disabilitare la Partner Window in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Dispositivo) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Partner Window**.
7. Impostare il pulsante **Abilita/Disabilita** per "**Scegli se attivare/disattivare la Partner Window**" su:
  - Attivato
  - Disattivato

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

#### 5.4.1.2 Come posso impostare le opzioni di visualizzazione della Partner Window in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Dispositivo) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.


6. Guardare nella sezione **Opzioni di visualizzazione**.

7. Selezionare uno dei seguenti pulsanti di opzione per scegliere l'opzione di visualizzazione della Partner Window:
  - A specchio — Visualizza il testo nella Partner Window durante la digitazione o l'interazione vocale.
  - Mostra testo durante l'interazione vocale — Visualizza un indicatore nella Partner Window durante la digitazione, quindi visualizza il messaggio come testo durante l'interazione vocale.
  - Indica digitazione — Visualizza solo l'indicatore di digitazione nella Partner Window durante la digitazione o l'interazione vocale.

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

## 5.5 Generale

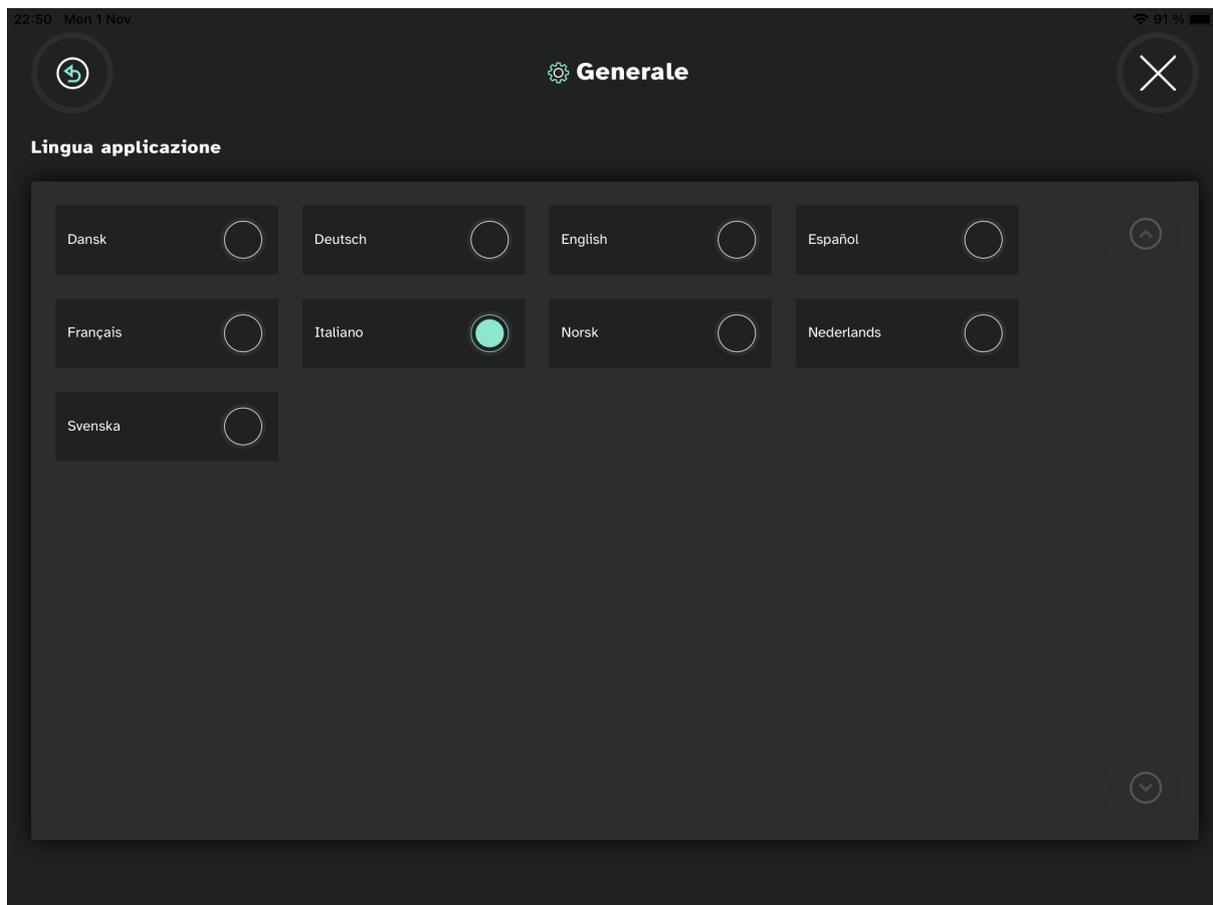

### 5.5.1 Come posso impostare la mia lingua dell'applicazione in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Altro) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Altro) per aprire Altro.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
6. Selezionare il pulsante **Apri**.
7. Guardare nella sezione **Lingua applicazione**.
8. Selezionare il pulsante di opzione accanto alla lingua desiderata per l'applicazione.
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

Copyright ©Tobii Dynavox AB. Non tutti i prodotti e i servizi sono offerti in tutti i mercati locali. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## Supporto per il dispositivo Tobii Dynavox

### Informazioni disponibili online

Visitare la pagina del supporto specifica del prodotto per il dispositivo Tobii Dynavox in uso. Tale pagina include informazioni aggiornate sui problemi riscontrati, oltre a suggerimenti utili correlati al prodotto. Le pagine del supporto sono disponibili all'indirizzo: [www.TobiiDynavox.com/support-training](http://www.TobiiDynavox.com/support-training)

### Contatta il Consulente per la tua soluzione o il Rivenditore

Per domande o problemi relativi al prodotto, rivolgersi al consulente per la soluzione o al rivenditore autorizzato Tobii Dynavox. Gli operatori conoscono la configurazione personale dei clienti e possono offrire suggerimenti e informazioni mirate. Per i recapiti, visitare la pagina all'indirizzo [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)