

Tobii Dynavox Windows Control

מדריך למשתמש



כולל Virtual Remote



מדריך למשתמש Tobii Dynavox Windows Control

גרסה 1.3

01/2019

כל הזכויות שמורות.

(Copyright © Tobii AB (publ

אין לשכפל, לאחסן במערכת אחזור או לשדר אף חלק ממסמך זה בכל צורה ובכל אמצעי (אלקטרוני, בצילום, הקלטה או אחרת) ללא אישור בכתב מראש של המוציא לאור.

זכויות הגנת זכויות יוצרים כוללות את כל הצורות והנושאים של חומר ומידע שאפשר להגן עליהם בזכויות יוצרים אשר מותרים בתקנות או בחוקים המעוגנים בחוק או שיוענקו בעתיד, כולל, בין היתר, חומר שהופק מהתוכנות אשר מוצג על המסך, כגון תצוגות מסך, תפריטים וכדומה.

המידע הכלול במסמך זה הוא קניינה של Tobii Dynavox. כל שכפול, מלא או חלקי, ללא אישור מוקדם בכתב מאת Tobii Dynavox, אסור.

מוצרים שזוכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים. למוציא לאור ולמחבר אין שום תביעות לגבי סימנים מסחריים אלה.

אף שנוקטו כל אמצעי הזהירות בעת הכנת המסמך, המוציא לאור והמחבר אינם אחראים לשגיאות או להשמטות, או לנזקים שייגרמו כתוצאה מהשימוש במידע הכלול במסמך זה או כתוצאה מהשימוש בתוכנות ובקוד המקור שעשוי להיות מצורף אליו. בשום מקרה המוציא לאור והמחבר לא יישאו באחריות להפסד של רווח או לנזק מסחרי אחר שייגרם או שייגרם לכאורה במישרין או בעקיפין כתוצאה ממסמך זה.

התוכן כפוף לשינויים ללא הודעה.

אנא בדוק את אתר Tobii Dynavox www.TobiiDynavox.com לגרסאות עדכניות של מסמך זה.

מידע ליצירת קשר:

Tobii Dynavox LLC
Wharton Street Suite 400 2100
Pittsburgh, PA 15203
USA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
Danderyd 53 182
Sweden
+46 8 663 69 90

תוכן עניינים

5.....	אודות Tobii Dynavox שלט ווינדוס.....	1
5.....	שימוש מיועד.....	1.1
5.....	דרישות מערכת.....	1.2
6.....	התקנה, הפעלה ושימוש ברישיון.....	2
6.....	מתקין... Tobii Dynavox שלט ווינדוס.....	2.1
6.....	שימוש ברישיון.....	2.2
6.....	הפעלת רישיון.....	2.2.1
6.....	הפעלה אוניליין.....	2.2.1.1
7.....	הפעלה לא מקוונת.....	2.2.1.2
8.....	ביטול הפעלת רישיון.....	2.2.2
9.....	הפעלה ראשונה.....	2.3
10.....	בשימוש Tobii Dynavox שלט ווינדוס.....	3
10.....	ה שלט ווינדוס הבקר.....	3.1
11.....	מצב עקיבה.....	3.2
11.....	ה שלט ווינדוס סרגל המשימות.....	3.3
12.....	מצבי הפעולה של שורת המשימות של שלט ווינדוס סרגל המשימות.....	3.3.1
13.....	משימות רגילות.....	3.4
14.....	התנהגות המשימות הרגילות במצבי פעולה שונים.....	3.4.1
14.....	מטלות דביקות.....	3.5
14.....	התנהגות המשימות הרגילות במצבי פעולה שונים.....	3.5.1
15.....	הקלקה כפולה בטוחה.....	3.6
16.....	קיצורי דרך.....	3.7
18.....	שיטות בחירה – מבט או מתג.....	3.8
18.....	פעיל בברירת מחדל עם מבט והחלפה.....	3.8.1
18.....	הפעלת משימה באמצעות לחצן מקלדת במקום מתג.....	3.8.2
18.....	מקלדת מבט.....	3.9
20.....	שורת משימות המקלדת.....	3.9.1
20.....	לחצני משימה עבור שורת משימות המקלדת.....	3.9.2
20.....	חיזוי מילים.....	3.9.3
21.....	שלט ווינדוס עם מקלדות מבוססות אזור.....	3.10
21.....	מחווני זיהוי עיני.....	3.11
22.....	שלט ווינדוס הגדרות.....	4
23.....	עוקב עין.....	4.1
23.....	לשונית הכיול.....	4.1.1
23.....	ניהול פרופילים.....	4.1.1.1
23.....	צור פרופיל חדש.....	4.1.1.2
24.....	תוצאות הכיול.....	4.1.1.3
25.....	בדיקת כיול.....	4.1.1.4
25.....	כיול מחדש.....	4.1.1.5
25.....	סוג כיול.....	4.1.1.6
28.....	לשונית 'מתקדם'.....	4.1.2
28.....	הגדרת תצוגה.....	4.1.2.1
29.....	הגדרות כלליות.....	4.2
29.....	לשונית 'כללי'.....	4.2.1
29.....	לשונית 'אודות'.....	4.2.2
29.....	מפתח רישיון.....	4.2.2.1
30.....	עזרה ושימוש.....	4.3

30.....	לשונית 'עזרה'.....	4.3.1	
30.....	לשונית 'שימוש'.....	4.3.2	
31.....	הפעלה ומשוב.....	4.4	
31.....	לשונית 'הפעלה'.....	4.4.1	
31.....	Gaze Selection Settings.....	4.4.1.1	
32.....	הגדרות מבט ומתג.....	4.4.1.2	
32.....	לשונית 'משוב'.....	4.4.2	
33.....	סרגל המשימות.....	4.5	
33.....	לשונית 'שורת המשימות'.....	4.5.1	
34.....	משימות.....	4.5.1.1	
34.....	הגדל לחיצה שמאלית.....	4.5.1.2	
34.....	הסתרה אוטומטית.....	4.5.1.3	
34.....	מצב העקיבה.....	4.5.1.4	
35.....	גודל שורת המשימות.....	4.5.1.5	
35.....	לשונית 'משוב'.....	4.5.2	
35.....	בחירה ראשונית.....	4.5.2.1	
35.....	בחירה משנית.....	4.5.2.2	
35.....	בחירה שלישית.....	4.5.2.3	
36.....	לשונית 'זום'.....	4.5.3	
36.....	מקלדת.....	4.6	
38.....	Virtual Remote.....	5	
38.....	סקירה Virtual Remote.....	5.1	
38.....	Virtual Remote תפריט.....	5.1.1	
39.....	השלט הפעיל.....	5.1.2	
39.....	הכפתורים.....	5.1.3	
40.....	Tobii Dynavox Virtual Remote שימוש.....	5.2	
41.....	הפעלה ראשונית.....	5.2.1	
41.....	שינוי השלט הפעיל.....	5.2.2	
41.....	שימוש בלחצני השלט.....	5.2.3	
41.....	הוסף שלט רחוק.....	5.2.4	
41.....	הוספת שלט מוגדר מראש.....	5.2.4.1	
46.....	הוספת שלט רחוק לא מוגדר.....	5.2.4.2	
48.....	מצב עריכה.....	5.2.5	
49.....	שינוי שם שלט.....	5.2.5.1	
50.....	מחיקת שלט.....	5.2.5.2	
51.....	עריכת שינויים בלחצן פעיל קיים.....	5.2.5.3	
54.....	עריכת שינויים בלחצן לא מוגדר קיים.....	5.2.5.4	
56.....	הוספת לחצן חדש לחלל ריק.....	5.2.5.5	
57.....	מידע.....	5.2.6	

1 אודות Tobii Dynavox שלט ווינדוס

1.1 שימוש מיועד

קבל שליטה מלאה על המחשב שלך באמצעות עיניך בלבד או על-ידי שימוש בעיניך ובמתג. חקה את כל סוגי פעולות העכבר, פעולות החלקה מהירה, וכתיבת טקסט באמצעות התוכנה זוכת הפרסים שלנו. הוספנו גם קיצורי דרך חכמים המאפשרים לך לגשת לכל החלקים השונים של Windows בצורה קלה אף יותר!

1.2 דרישות מערכת

רכיב	דרישות
מחשב ומעבד	מעבד אינטל Dual-Core במהירות 2.0 ג'יגה-הרץ (GHz) (מינימום מומלץ).
זיכרון (RAM)	4 גיגה-בייט (GB RAM) (מינימום מומלץ).
כונן קשיח	450 מגה-בייט (MB) זמינים.
USB	USB 2.0
מערכת הפעלה	גרסת 64-ביט של: • Windows 7 • Windows 8.1 • Windows 10
גרסת .NET	4.5
עוקב עין	כל עוקב עין מתוצרת Tobii Dynavox או Tobii Tech התומך בתוכנת עקיבת העיניים Tobii Eye Tracking Core.
דרישות ושיקולים נוספים	יש צורך בחיבור לאינטרנט להפעלת הרישיון.
תוכנת Tobii Eye Tracking Core	גרסה 2.8 ומעלה.
שלט אינפרה-אדום	כל התקן המצויד בשבב HBR IR, כדוגמת: Tobii Dynavox EyeR, EyeMobile Plus או, Indi, I-Series I-110.

2 התקנה, הפעלה ושימוש ברישיון

2.1 מתקין... Tobii Dynavox שלט ווינדוס

יש להסיר את תוכנת Tobii Gaze Interaction לפני התקנת 2. שלט ווינדוס.



שלט ווינדוס ניתן להוריד מ- www.TobiiDynavox.com.

אשף ההתקנה יתקין את היישומים הבאים:

- Tobii Dynavox שלט ווינדוס
- Tobii Dynavox Virtual Remote

לתקנה שלט ווינדוס פשוט בצע את ההוראות שעל המסך.

2.2 שימוש ברישיון


2.2.1 הפעלת רישיון

ה שלט ווינדוס תומך בהפעלה של עד שלושה (3) מחשבים/התקנים בו-זמנית באמצעות אותו רישיון. כדי שתוכל להשתמש שלט ווינדוס ביותר מאשר שלושה (3) מחשבים\מכשירים שלט ווינדוס תצטרך להשבית את אחד משלושת המחשבים\מכשירים האחרים.



בעת הרכישה שלט ווינדוס אתה תקבל מפתח להפעלת הרישיון לתכנה שתגיע באימייל האישור להזמנה.

כאשר שלט ווינדוס תריץ את התכנה בפעם הראשונה מנהל הרישיון יפתח

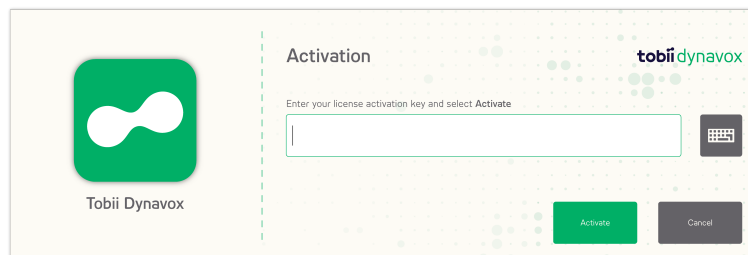

בתיבת הדו-שיח של הרישיון יוצג סמל התוכנה המתאים לרישיון בשימוש.




שלך\שלבם מפתח להפעלת הרישיון תוכל למצוא באימייל האישור להזמנה.

2.2.1.1 הפעלה אוטומטית

של מחשב\המכשיר מחובר לאינטרנט..

1. דא שהמחשב/התקן מחובר לאינטרנט.
2. הקלד את מפתח הפערת הרישיון.
3. בחר את הפעל כפתור.

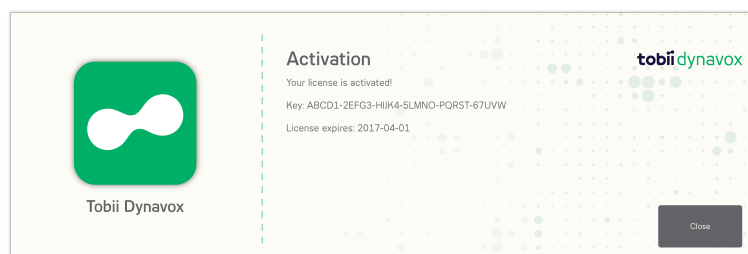

בתיבת הדו-שיח של הרישיון יוצג סמל התוכנה המתאים לרישיון בשימוש.




4. בחר את סגור כפתור.


2.2.1.2 הפעלה לא מקוונת

של מחשב\המכשיר שאינו מחובר לאינטרנט..


1. הקלד את מפתח הפערת הרישיון.
2. בחר את הפעל כפתור.

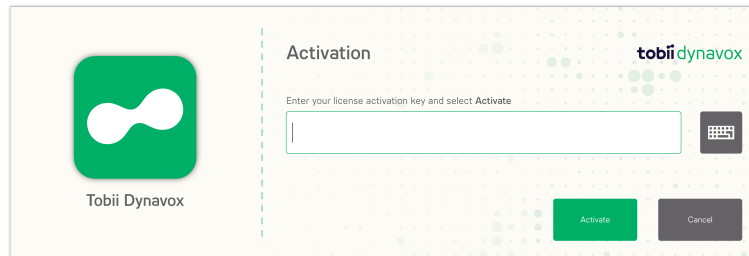

3. בחר את (המידע) סמלון.

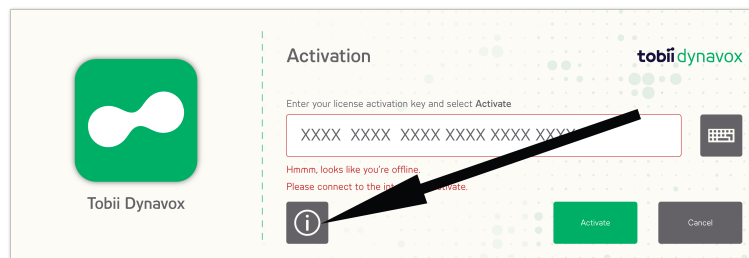


4. בחר (הפעלה לא מקוונת) כפתור.

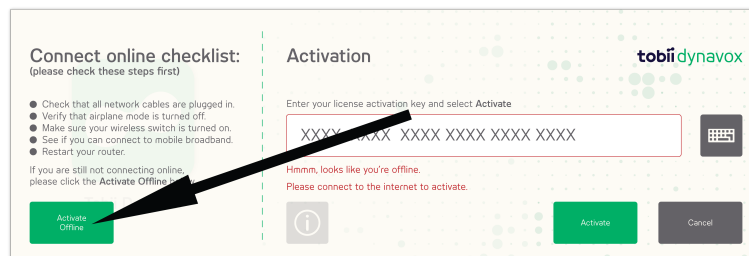


5. בצע את אחד הדברים הבאים:

- במכשיר במחבר לאינטרנט עבור אל: <https://www.tobiidynavox.com/activation-key> ובצע את ההוראות הניתנות אונליין.
- צור קשר עם תמיכה או המוכר המקומי שלך.


תזדקק לשם המחשב המופיע בדיאלוג:

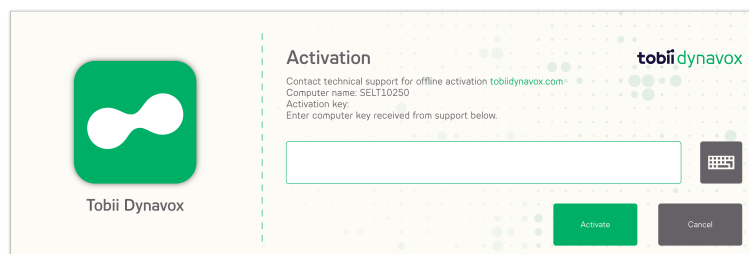

6. הקלד את מפתח ההפעלה המסופק מאחת האפשרויות דלעיל.

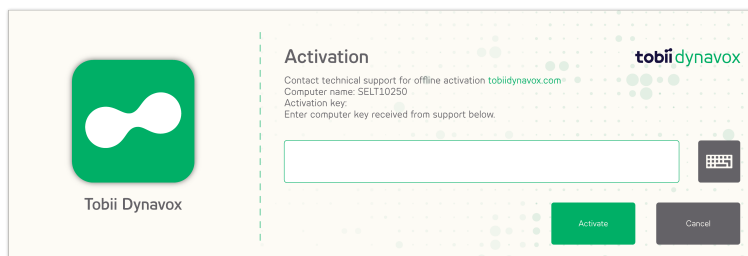

7. בחר את הפעל כפתור.

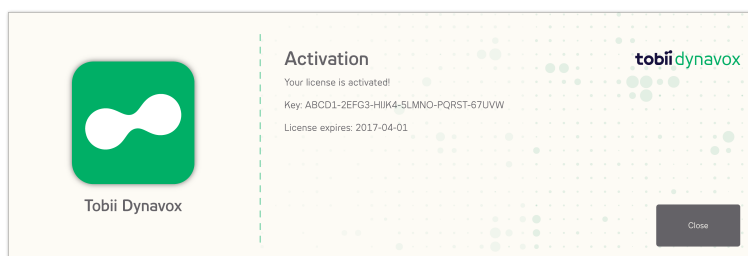

8. בחר את סגור כפתור.

2.2.2 ביטול הפעלת רישיון

לצורך ביטול ההפעלה שלט ווינדוס בצע את הצעדים הבאים.

1. ודא שהמחשב/התקן מחובר לאינטרנט.
2. התחל שלט ווינדוס.
3. בחר בלחצן (הגדרות).
4. בחר בלחצן (הגדרות כלליות).
5. בחר את אודות תג.
6. בחר את מפתח רישיון כפתור.
7. בחר את השבת כפתור.



בתיבת הדו-שיח של הרישיון יוצג סמל התוכנה המתאים לרישיון בשימוש.



8. בחר:

- כן כן – לביטול הפעלת הרישיון בהתקן זה.
- לא לבטל

2.3 הפעלה ראשונה

כאשר שלט ווינדוס מתבצעת הפעלה בפעם הראשונה, מדריך התצורה מסייע למשתמש בקונפיגורציה של שלט ווינדוסאלה השלבים בתפריט הם:

- הגדר תצוגה. לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.2.1 הגדרת תצוגה, עמוד 28.
- צור פרופיל חדש. לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.2 צור פרופיל חדש.
- בדיקת כיוול, למידע נוסף, ראה 4.1.1.4 בדיקת כיוול

3 בשימוש Tobii Dynavox שלט ווינדוס


Tobii Dynavox שלט ווינדוס אפשר למשתמש לשלוט במערכת הפעלה סטנדרטית למחשב שולחני של Windows בשיטת בחירה דו-שלבית המפחיתה את הסיכון ללחיצות שגויות בעכבר. בנוסף, היא מונעת מסמן העכבר לעקוב אחרי המבט של המשתמש בניגוד לשליטה בו (לא קיים סמן עכבר צף). שלט ווינדוס.

1. בשלב הראשון יש לבחור את המשימה הרצויה מתוך שורת המשימות על ידי התבוננות בו.
2. בשלב השני יש להבית בחלק הרצוי של המסך (או בסמל המוצג במסך) במקום שבו תרצה לבצע את המשימה. מופעלת פונקציית זום אוטומטית שמסתיימת בבחירת הסמל או בביצוע המשימה.

כל הפונקציות ב- שלט ווינדוס ניתן להפעיל את כל הפונקציות ב- באמצעות מגע ועכבר גם יחד, כך שהמטפל או העוזר של המשתמש יכולים לסייע במקרה הצורך. הדבר מאפשר למטפל או לעוזר לבחור בקלות רבה פונקציה או משימה או לשנות את ההגדרות עבור המשתמש.




3.1 ה שלט ווינדוס הבקר

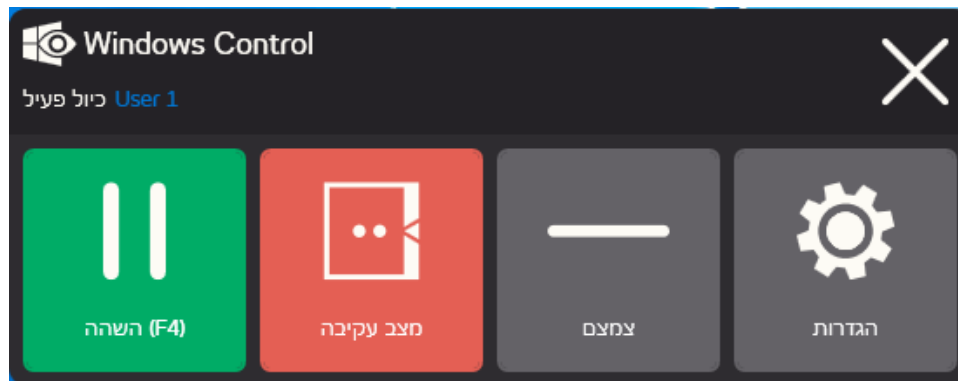

איור 3.1 ה שלט ווינדוס הבקר

כפתור	פעולה	תיאור
	השהה (F4)	פעולה המשהה את . שלט ווינדוס. הפעלת פונקציית ההשהיה תביא להצגת לחצן ההפעלה במקום. ניתן להשתמש בלחצן F4 במקלדת להפעלת המשימה.
▶	הפעל (F4)	פעולה המאתחלת את . שלט ווינדוס. בחירה בפונקציית ההפעלה תביא להצגת לחצן ההשהיה במקום. ניתן להשתמש בלחצן F4 במקלדת להפעלת המשימה.
□	מצב עקיבה	פעולה זו תציג את חלון מצב העקיבה. תוכל להיעזר בה כדי לבדוק אם המשתמש ממוקם בצורה נכונה מול המסך. לקבלת מידע נוסף, ראה . 3.2 מצב עקיבה, עמוד 11
—	צמצם בקר	פעולה זו תמזער את חלון הבקר.
⚙	הגדרות	פעולה זו תביא לפתיחת לשונית הגדרות . שלט ווינדוס הגדרות לקבלת מידע נוסף, ראה 4 שלט ווינדוס הגדרות, עמוד 22.
✕	סגור	פעולה זו תביא לסגירת . שלט ווינדוס.

3.2 מצב עקיבה

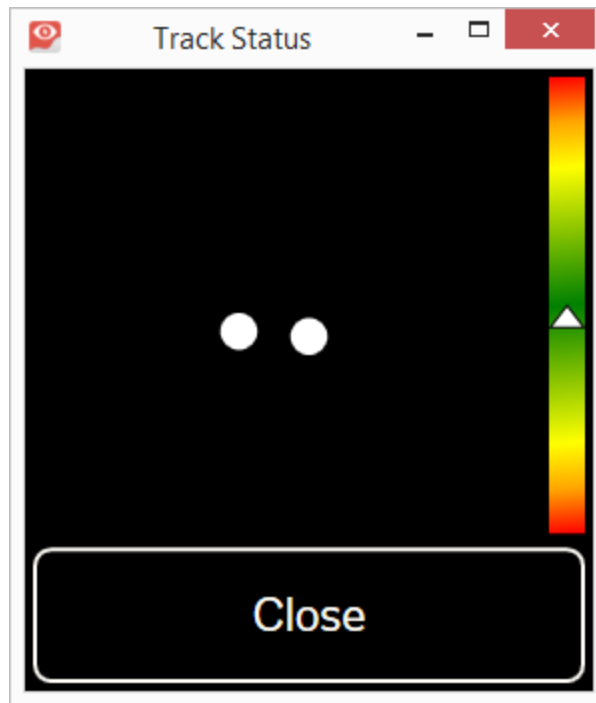

ה מצב עקיבה פונקציית מצב עקיבה מאפשרת לבדוק אם המשתמש ממוקם בצורה נכונה לפני עוקב העין.

- שתי (2) נקודות לבנות - עיני המשתמש ומיקומן ביחס למסך. להגדרת מיקום מדויק, על הנקודות הלבנות להימצא במרכז האזור השחור.
- פס צבעוני עם חץ לבן משמאל - עד כמה המשתמש רחוק או קרוב מהמסך.
- כאשר החץ הלבן ממוקם במרכז האזור הירוק בפס, המשתמש מצוי במרחק מיטבי מהמסך.
- אם החץ ממוקם בחלקו התחתון של הפס - קרב את המשתמש.
- אם החץ ממוקם בחלקו העליון של הפס - הרחק את המשתמש.

1. פתח את שלט ווינדוס הבקר

2. בחר בלחצן  (מצב עקיבה).

3. מקם את המשתמש.

4. בחר את סגור את הכפתור בעת הסיום

לחצן זה מבוסס אזור מבט, כך שעליך רק להסתכל עליו כדי להפעילו.



3.3 ה שלט ווינדוס סרגל המשימות

בראש ה שלט ווינדוס סרגל המשימות יש עינית למצב העקיבה. הוא מאפשר לוודא אם עוקב העין מזהה את עיניך ואת מיקומך האופטימלי מול ההתקן.

כפתור המשימה ב שלט ווינדוס סרגל המשימות עשוי להיות בשלושה מצבי פעולה כפי שמוצג באיור 3.2 מצבי הפעולה של שורת המשימות של שלט ווינדוס סרגל המשימות, עמוד 12.



סרגל המשימות ניתן להסתרה/הצגה באמצעות הקלדה על "F2" (לא באמצעות המקלדת של שלט ווינדוס)



3.3.1 מצבי הפעולה של שורת המשימות שלט ווינדוס סרגל המשימות

שלושת מצבי הפעולה תקפים למשימות הרגילות, ראה 3.4 משימות רגילות, וכן למשימות הדבקות, ראה 3.5 מטלות דבקות.



ל-Safe Click Tasks אין מצב בחירה משני.



- רגיל (לא נבחר) אין כפתור משימה שלט ווינדוס אשר נבחר.
- בחירה ראשונית (לבן) – כפתור המשימה המסומן נבחר. המשימה תתבצע לאחר הזום האוטומטי כשהמשתמש יביט למיקום הרצוי במסך או בסמל המוצג בו. אם שיטת הבחירה נקבעה על מתג שלט ווינדוס בדיאלוג ההגדרות, כפתור המשימה שנבחר עדיין יישאר פעיל לאחר שהמשימה בוצעה.
- בחירה משנית (כחול/לבן) – בדיוק כמו בחירה ראשונית אבל עם דיוק רב יותר. בחירה משנית משמעותה שהזום יעמיק לפני הביצוע הסופי של המשימה, כך שחלק המסך הרצוי יהיה גדול יותר ויאפשר בחירה קלה יותר ממנו. הפעל מצב זה על ידי הנחת המבט על לחצן המשימה עד לשינוי צבעו, לפי התמונה למטה.

לא תקין עבורי קיצורי הדרך ומטלות ההגדרות.




- בחירה שלישית (תפריט קופץ) – לגבי חלק מן המשימות יש תפריט קופץ זמין יחד עם המשימה הדבקה, ראה 3.6 הקלקה כפולה בטוחה, עמוד 15. ו-Safe Click Tasks, ראה 3.6 הקלקה כפולה בטוחה, עמוד 15. התחבר למשימה הדבקה על ידי השהיית המבט על כפתור המשימה עד אשר יופעל התפריט הקופץ בהתאם לאיור 3.2 מצבי הפעולה של שורת המשימות שלט ווינדוס סרגל המשימות, עמוד 12 ובחר את המשימה הדבקה לצורך החלפת המשימה הרגילה עם המשימה הדבקה בסרגל המשימות. המשימה הדבקה תישאר על סרגל המשימות והמשימה הרגילה תימצא בבחירה השלישית.

חזור על התהליך כדי להחליף את המשימה הדבקה במשימה הרגילה בסרגל המשימות.

לא תקין עבורי קיצורי הדרך ומטלות ההגדרות.



לצורך קונפיגורציה איזה מצבים ינוצלו על ידי המשתמש, עבור אל: 4.5.2 לשונית 'משוב', עמוד 35. רק המצב העיקרי מאופשר בברירת מחדל.

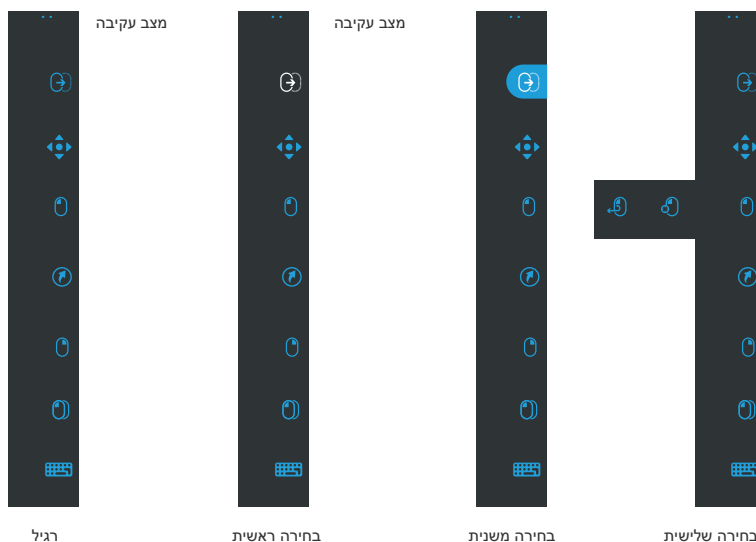

איור 3.2 מצבי הפעולה של שורת המשימות שלט ווינדוס סרגל המשימות

3.4 משימות רגילות

סמל	משימה\פעולה	תיאור
	הזז את הסמן	משימה המאפשרת למקם את הסמן בנקודה בה אתה מבט. בעת ההפעלה, תבוצע פעולת זום.
	גרירה ושחרור במבט	משימה שמבצעת שתי 'לחיצות', שהראשונה בהן מייצגת את מיקום ההתחלה של פעולת גרירה והשנייה את מיקום השחרור (משמשת להזזת אובייקטים או בחירת אזורים). - בחר במשימה. - הבט באובייקט שברצונך להזיז או בנקודת ההתחלה של בחירת אזור. - בצע את שלט ווינדוס הפעל את ("לחיצה" ראשונה) באמצעות פעולת מתג או מבט. - הבט מיד במיקום שבו תרצה לשחרר את האובייקט או בנקודת הסיום של בחירת האזור. - הפעל "לחיצה" שנייה באמצעות פעולת מתג או מבט. בעת ההפעלה, תבוצע פעולת זום.
	גלילה במבט	הפעלת משימה זו בחלון הניתן לגלילה מאפשרת לגלול את הדף בעזרת המבט. - בחר במשימה. - הבט באופן ממושך באזור כלשהו שניתן לגלול אותו. הסמל 'גלילה במבט' יופיע בנקודה שבה אתה מבט במסך. - כדי לגלול כלפי מעלה, הבט מעל הסמל. - כדי לגלול כלפי מטה, הבט מתחת לסמל. - כדי לגלול שמאלה, הבט משמאל לסמל. - כדי לגלול ימינה, הבט מימין לסמל. - במהלך הגלילה, הבט שוב בסמל (זה שבמסך, לא בסמל שבשורת המשימות) כדי להחליף את הכיוונים מעלה/מטה או שמאלה/ימינה. - הבט שוב אל שלט ווינדוס סרגל המשימות של (או מחוץ למסך) כדי לסיים את פעולת הגלילה.  השתמש במשימה 'גלילה במבט' כדי לגלול אנכית ואופקית ביישומים בעלי ממשק מהדור החדש ובמסך הפתיחה של מערכות Windows מהדור החדש.
	לחיצה שמאלית / הקשה	משימה שמבצעת לחיצה שמאלית יחידה. בהתקנים בעלי מסך מגע, פעולה הזוהי להקשה באצבע אחת. במצב הפעולה 'מתג', המשימה 'לחיצה שמאלית / הקשה' מופעלת כברירת מחדל ומתבצעת כמשימה 'דביקה' (ראה 3.8.1). פעיל כברירת מחדל עם מבט והחלפה, עמוד 18). בעת ההפעלה, תבוצע פעולת זום.
	קיצורי דרך	משימה זו פותחת: - שלוש עמודות של קיצורים מוגדרים מראש. - קיימים הבדלים קלים בקיצורים הזמינים עבור Windows 7, 8.1 ו-10. לקבלת מידע נוסף, ראה 3.7 קיצורי דרך, עמוד 16.
	לחיצה ימנית	משימה שמבצעת לחיצה ימנית יחידה. בעת ההפעלה, תבוצע פעולת זום.
	לחיצה כפולה	משימה שמבצעת לחיצה שמאלית כפולה. כאשר שיטת ההפעלה מוגדרת ל'מתג', המשימה 'לחיצה כפולה' היא 'משימה דביקה' (ראה 3.8.1). פעיל כברירת מחדל עם מבט והחלפה, עמוד 18). בעת ההפעלה, תבוצע פעולת זום.

סמל	משימה\פעולה	תיאור
	מקלדת מבט	משימה שפותחת מקלדת וירטואלית המופעלת באמצעות מבט לצורך הקלדה במבט. לקבלת מידע נוסף, ראה 3.9 מקלדת מבט, עמוד 18.
	הגדרות	משימה זו תביא לפתיחת לשונית הגדרות. שלט ווינדוס הגדרות לקבלת מידע נוסף, ראה 4 שלט ווינדוס הגדרות, עמוד 22.

3.4.1 התנהגות המשימות הרגילות במצבי פעולה שונים.

משימה	ראשוני	משני	שלישי
הזז את הסמן	זום רגיל	זום עמוק	עבור להזזת סמן דביקה
גרירה ושחרור	זום רגיל	זום עמוק	החלף ל- Sticky Drag & Drop או Safe Drag & Drop
גלילה במבט	זום רגיל	זום עמוק	לא ישים
לחיצה שמאלית / הקשה	זום רגיל	זום עמוק	החלף ל- Sticky Left Click / Tap או Safe Left Click / Tap
קיצורי דרך	זום	לא ישים	לא ישים
לחיצה ימנית	זום רגיל	זום עמוק	החלף ל- Sticky Right Click או Safe Right Click
לחיצה כפולה	זום רגיל	זום עמוק	החלף ל- Sticky Right Click או Safe Right Click
מקלדת מבט	לקבלת מידע נוסף, ראה 3.9 מקלדת מבט, עמוד 18.		
הגדרות	זום	לא ישים	לא ישים

a. למידע נוסף על המשימות, ראה 3.5 מטלות דביקות, עמוד 14.

3.5 מטלות דביקות

סמל	משימה\פעולה	תיאור
	הקלקה שמאלית / הקשה	מטלות דביקות מאפשרות הפעלות מתמשכות של מטלה בלא הצורך לחזור ולבחור את המטלה מתוך סרגל המשימות. בחר את המטלה הדביקה מסרגל המטלות פעם אחת והסמן יעקוב אחר מבטך קיבעת המבט על המסך יבצע את הפעולה המתאימה במקום הזה. המטלה תישאר פעילה לאחר שהפעולה בוצעה, כלומר אין צורך להפעילה מחדש בסרגל המטלות. כדי לעצור את המטלה הדביקה, פשוט הבט על המטלה בסרגל המטלות עד אשר היא לא תהיה יותר במצב מודגש.  עבור הסמן הדביק, מצב הבחירה המשנית אינו זמין, מאחר שמשימה זו רק תזיז את הסמן ברחבי המסך.
	הקלקה דביקה כפולה	
	גרירה ושחרור דביקים	
	הזזת סמן דביקה	
	הקלקה דביקה כפולה	

3.5.1 התנהגות המשימות הרגילות במצבי פעולה שונים.


משימה\פעולה	ראשוני	משני	שלישי
הקלקה שמאלית / הקשה	זום רגיל	זום עמוק	החלף ל- Left Click / Tap או Safe Left Click / Tap
הקלקה דביקה כפולה	זום רגיל	זום עמוק	החלף ל- Double Click או Sa- fe Double Click

משימה\פעולה	ראשוני	משני	שלישי
גרירה ושחרור דביקים	זום רגיל	זום עמוק	החלף ל- Safe Drag & Drop או Safe Drag & Drop
הזזת סמן דביקה	זום	לא ישים	עבור להזזת סמן דביקה
הקלקה דביקה כפולה	זום רגיל	זום עמוק	החלף ל- Safe Right Click או Safe Right Click

a. למידע נוסף על המשימות, ראה 3.4 משימות רגילות, עמוד 13.

3.6 הקלקה כפולה בטוחה

סמל	משימה\פעולה	תיאור
	הקלקה שמאלית\הקשה	מטלות Safe Click מאפשרות לך לבצע את הבנקאות שלך בבטחה וכדומה, הלא חשש מהקלקות מוטעות בגלל פעולה כפולה. תחילה עשה זום ואז בחר לביצוע. בחר את מטלת ה-Safe Click מסרגל המטלות השלישוני. קביעת המבט על המסך יבצע את הפעולה המתאימה במקום הזה. המטלה תבצע זום בחלון חדש, שבו קביעת המבט תיראה על ידי, סמלון בחלון, ראה איור 3.3 הקלקה כפולה בטוחה, עמוד 15. לביצוע הקלקה בטוחה במרכז,  , בחר סמלון ה-  . מטלות Safe Click זמינות עבור Left Click, Right Click, Double Click וכן Drag&Drop. 
	הקלקה כפולה בטוחה	
	הקלקה ימנית בטוחה	
	גרירה ושחרור בטוח	

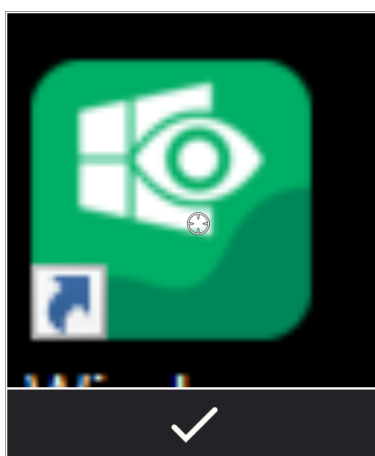

איור 3.3 הקלקה כפולה בטוחה

3.7 קיצורי דרך

The figure displays two versions of the Windows Control Center app interface, side-by-side, illustrating the changes between Windows 10 and Windows 8.1.

Windows 10 Interface (Left):

- Row 1:** מער חלון (Move Window), הגדל חלון (Maximize Window), סגור חלון (Close Window)
- Row 2:** הקוים (Wi-Fi), דפוס (Print), זיהוי דיבור (Voice Recognition)
- Row 3:** בטל (Undo), הגבר עוצמת קול (Increase Volume), Virtual Remote
- Row 4:** העתק (Copy), השק (Share), שולחן עבודה (Desktop)
- Row 5:** הדבק (Paste), החלש עוצמת קול (Decrease Volume), מרכז הפעולות (Action Center)
- Row 6:** התחל (Start), Cortana, תצוגת משניות (Task View)
- Row 7 (System Settings):** הסתר את סרגל המשימות (Hide Taskbar), התליף צד (Lock), סגור קיצורי דרך (Close Shortcuts)

Windows 8.1 Interface (Right):

- Row 1:** מער חלון (Move Window), הגדל חלון (Maximize Window), סגור חלון (Close Window)
- Row 2:** הקוים (Wi-Fi), דפוס (Print), זיהוי דיבור (Voice Recognition)
- Row 3:** בטל (Undo), הגבר עוצמת קול (Increase Volume), Virtual Remote
- Row 4:** העתק (Copy), השק (Share), שולחן עבודה (Desktop)
- Row 5:** הדבק (Paste), החלש עוצמת קול (Decrease Volume), צ'אט (Chat)
- Row 6:** התחל (Start), חיפוש (Search), בורר האפליקציות (App Launcher)
- Row 7 (System Settings):** הסתר את סרגל המשימות (Hide Taskbar), התליף צד (Lock), סגור קיצורי דרך (Close Shortcuts)

The Windows 8.1 interface shows a more streamlined design with a blue header and a blue footer, and the bottom row of system settings is highlighted in blue.

אם הסמל מופיע לצד פונקציית קיצור הדרך, חלון קיצורי הדרך יישאר פתוח לאחר הפעלת הפונקציה, מה שיאפשר ביצוע הפעולות מרובות.

קיצורי דרך	פעולה	Win 8.1	Win 10	תיאור
	הגדל חלון	x	x	קיצור דרך המגדיל את החלון/היישום/התוכנה הפעילה.
	חזור	x	x	קיצור דרך המחזיר את המשתמש לדף הקודם בדפדפן או בכל תוכנה עם אפשרות מובנית דומה.
	בטל	x	x	קיצור דרך המבטל את הפעולה הקודמת.
	העתק	x	x	קיצור דרך המבצע העתקה של הבחירה הפעילה.
	הדבק	x	x	קיצור דרך המבצע הדבקה של הבחירה שהועתקה קודם לכן.
	התחל	x	x	קיצור דרך המציג את תפריט 'התחל' של מערכת Windows.
	הסרת שורת המשימות	x	x	קיצור דרך המסתייר את שורת המשימות ומאפשרת תצוגת מסך מלא. כדי להציג שוב את שורת המשימות, בחר  או  , בהתאם למיקום של שורת המשימות.

קיצורי דרך	פעולה	Win 8.1	Win 10	תיאור
	מזער חלון	x	x	קיצור דרך הממזער את החלון/היישום/התוכנה הפעילה.
	עיון	x	x	קיצור דרך המביא להפעלת דפדפן ברירת המחדל.
	הגברת עוצמת הקול	x	x	קיצור דרך המגביר את עוצמת הקול.
	השתק	x	x	קיצור דרך המשתיק את הרמקולים.
	הפחתת עוצמת הקול	x	x	קיצור דרך המפחית את עוצמת הקול.
	חיפוש	x		קיצור דרך המביא לפתיחת פונקציית החיפוש ב-Windows.
	קורטנה		x	קיצור דרך שפותח את Cortana. באמצעות העוזרת האישית החכמה שלך, Cortana, תוכל לחפש באינטרנט, למצוא דברים במחשב שלך, לעקוב אחר לוח השנה שלך ועוד.
	החלף צד	x	x	קיצור דרך המזיז את שורת המשימות ימינה או שמאלה.
	סגור חלון	x	x	קיצור דרך הסוגר את החלון/היישום/התוכנה הפעילה.
	זיהוי דיבור	x	x	קיצור דרך זה מביא להפעלת זיהוי הדיבור של Windows, או Dragon Speech Recognition, אם מותקן.
	Virtual Remote	x	x	קיצור דרך זה פותח את יישום Virtual Remote. לקבלת מידע נוסף, ראה Virtual Remote 5, עמוד 38.
	שולחן עבודה	x	x	קיצור דרך המציג את שולחן העבודה.
	צ'ארמס	x		קיצור דרך הפותח את תפריט צ'ארמס.
	מרכז הפעולות		x	קיצור דרך הפותח את מרכז הפעולות.
	מחליף יישומים	x		קיצור דרך שעובר בין כל היישומים הפועלים בעלי ממשק משתמש חדשני ושולחן העבודה.
	תצוגת משימות		x	כל התוכנות שפועלות בשולחן העבודה לא ייראו כאן. הן נראות משולחן העבודה בלבד.
	תצוגת משימות		x	קיצור דרך שפותח את תצוגת המשימות, בה נראים כל היישומים בעלי ממשק המשתמש החדשני.
	תצוגת משימות		x	תצוגת המשימות לא תוצג אם רק יישום אחד פתוח או אם אף יישום לא פתוח.
	סגור קיצורי דרך	x	x	קיצור דרך הסוגר את תפריט קיצורי הדרך.

3.8 שיטות בחירה – מבט או מתג

ניתן לבצע את המשימות שנבחרו בשתי שיטות.

- מבט - שימוש בעיניים כדי לשלוט ולבצע את המשימה הנבחרת גם יחד.
 - מתג - שימוש בעיניים כדי לשלוט במערכת ושימוש בלחצן מכני המחובר להתקן לשם הפעלת המשימה הנבחרת.
- שיטת הבחירה נקבעת בתיבת הדו-שיח 'הגדרות', ראה . שלט ווינדוס הגדרות דיאלוג, ראה 4 שלט ווינדוס הגדרות, עמוד 22.
- לפני ביצוע של בחירה, יש לבחור במשימה לביצוע מתוך שורת המשימות. הבט במשימה הנבחרת עד שתהיה מסומנת כ"בחירה ראשית" או כ"בחירה משנית".

- מבט מבט – כדי לבצע את המשימה שנבחרה, הנח את המבט על חלק הרצוי של המסך (או על הסמל המוצג על המסך) במקום שבו תרצה לבצע את המשימה. מופעלת פונקציית זום אוטומטית שמסתיימת בבחירת הסמל או בביצוע המשימה.
 - מבט והמרה מתג – שני מצבי ביצוע שונים:
- הפעלה בודדת של המתג – פונקציית הזום תתבצע באותו אופן של שיטת המבט ובהתאם להגדרות שנקבעו בתיבת הדו-שיח 'הגדרות', ראה . שלט ווינדוס הגדרות דיאלוג, ראה 4 שלט ווינדוס הגדרות, עמוד 22.
 - הפעלה ולחץ ממושכות על המתג – פונקציית הזום תתבצע באופן ממושך ותיסגר רק עם השחרור/ההשבתה של המתג.
- בעת השימוש בשיטת המבט וטרם הפעלת כל משימה, עליך לשוב ולהביט בשורת המשימות כדי לבחור משימה חדשה. לפני ביצוע של פעולה.

כאשר הדיוק מוגדר להתמקדות שלט ווינדוס הגדרות - לא מתבצע זום. לקבלת מידע נוסף, ראה 4 שלט ווינדוס הגדרות, עמוד 22.

3.8.1 פעיל בברירת מחדל עם מבט והחלפה

בעת שימוש בשיטת המבט והמתג, תכונה בשם 'פעילה בברירת מחדל' הופכת זמינה לשימוש.

כאשר משימה הופכת להיות 'פעילה בברירת מחדל', אין צורך לחזור ולהביט בסרגל המשימות כדי לחזור ולבצע את המשימה שנבחרה, אלא רק אם תרצה לעבור למשימה אחרת.

בעת שימוש בשיטת המבט והמתג, המשימה 'לחיצה שמאלית/הקשה' מוגדרת תמיד כברירת מחדל. פירוש הדבר שהמשימה 'לחיצה שמאלית / הקשה' מאפשרת תמיד ותופעל על ידי הפעלת המתג, כל עוד לא נבחרה פעולה אחרת. אם נבחרת משימה אחרת היא תהיה פעילה רק פעם אחת (לבחירה אחת) ולאחר מכן שלט ווינדוס תחזור אוטומטית לברירת המחדל של הקלקה שמאלית/הקשה לצורך הבחירות הנוספות.

החריג לזה הוא ה-Double Click Task, כאשר משימה זו נבחרת בעת השימוש במצב Gaze & Switch זה יהפוך פעיל בברירת מחדל.

הדבר מאפשר תרחישי שימוש נוחים ביותר, כגון גלישה מהירה וממושכת באינטרנט על ידי הפעלת המתג, ועל ידי כך הפעלת המשימה 'לחיצה שמאלית / הקשה' פעם אחת ובחירה חוזרת ונשנית של אובייקטים במסך, מבלי שיהיה על המשתמש לבחור את המשימה 'לחיצה שמאלית / הקשה' פעמים רבות.

3.8.2 הפעלת משימה באמצעות לחצן מקלדת במקום מתג.



בחירה בכפתור המקלדת F12, במקלדת מחוברת מפעילה בחירת משימה. ניתן להשתמש באפשרות זו בדיוק כמו במתג מחובר. למידע נוסף על מתגים, ראה 3.8 שיטות בחירה – מבט או מתג, עמוד 18.

3.9 מקלדת מבט

בחירה בלחצן 'מקלדת מבט' בשורת המשימות מפעילה מקלדת וירטואלית המוצגת על המסך. מקלדת המבט תהיה תמיד ממוקמת בתחתית

המסך, בעת הפתחה. אפשר להזיז אותה על ידי שימוש בכפתור  (Move Keyboard Up/Down) בסרגל המשימות של המקלדת.

שורת משימות המקלדת תופעל, יחד עם מקלדת המבט. לקבלת מידע נוסף, ראה 3.9.1 שורת משימות המקלדת, עמוד 20.

מקלדת המבט מורכבת מארבעה דפי מקלדת המוצגים בסבב מעגלי. המשתמש יכול לעבור בקלות בין דפי המקלדת השונים על ידי בחירה בלחצני הדף הבא הממוקמים בקצה הימני והשמאלי של כל דפי מקלדת המבט.



מקש המקלדת שבו מביט המשתמש מוצג עם מסגרת בהירה סביב התו או הפונקציה שעל גבי המקש.

ארבעת דפי המקלדת הם:

	⌫	,	'	ק	ר	א	ט	ו	ן	ם	פ	⌫
<	Ctrl	ש	ד	ג	כ	ע	י	ח	ל	ך	ף	⌵
	⬆	ז	ס	ב	ה	נ	מ	צ	ת	ץ	.	⌴

איור 3.4 דף הפתיחה, המוצג כברירת מחדל

	⌫	/	*	7	8	9	+	(	)	"	#	⌫
<	Ctrl	\	.	4	5	6	-	<	>	&	'	⌵
	⬆	%	0	1	2	3	=	;	:	_	@	⌴

איור 3.5 הדף הראשון מימין

	⌫	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	⌫
<	Ctrl	Esc	→I	Home	End	Web	Search	⬆	Prt Scr	Pg Up	F11	⌵
	⬆	⊞	Alt	Alt Gr	Del	Mail	⬅	⬇	➡	Pg Dn	F12	⌴

איור 3.6 הדף השני מימין או משמאל

	⌫	\$	€	£	¥	?		°	§	i	¿	⌫
<	Ctrl	:-)	;-)	:-)	:'(	:-D	:-/	:-S	:-P	<3	.COM	⌵
	⬆	[	]	{	}	^	`	'	~	~	?	⌴

איור 3.7 הדף הראשון משמאל

לשינוי שפת המקלדת והגדרות מקלדת נוספות, ראה 4 שלט ווינדוס הגדרות, עמוד 22.

המקשים Shift, Ctrl, Alt, Win ו-Alt Gr הופכים להיות 'דביקים' לאחר בחירתם. פירוש הדבר שהם נשארים לחוצים עד שהשתמש בוחר מקש אחר במקלדת. הם יישארו דביקים אם המקש הבא שנבחר גם הוא מקש מסוג דביק.



כדי לכתוב תו עם ההדגשה:




1. בחר במקש ההדגשה
2. בחר את התו
3. התו יופיע עם ההדגשה שנבחרה.

3.9.1 שורת משימות המקלדת

בראש שורת משימות המקלדת מופיע מציג מצב העקיבה, כמו שלט ווינדוס בסרגל המשימות הוא מאפשר לוודא אם עוקב העין מזהה את עיניך ואת מיקומך האופטימלי מול ההתקן.

לחצני המשימות שבשורת משימות המקלדת יכולים להיות בשלושה מצבים שונים, כמתואר באיור איור 3.8 מצבי הפעולה של סרגל המשימות במקלדת, עמוד 20.

למידע נוסף לגבי שלושת מצבי הפעולה, ראה 3.3.1 מצבי הפעולה של שורת המשימות של שלט ווינדוס סרגל המשימות, עמוד 12

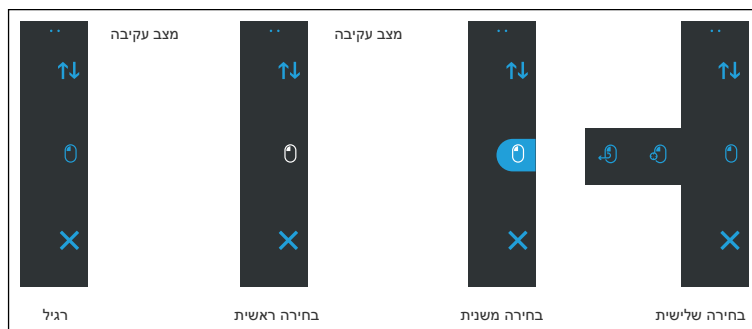

איור 3.8 מצבי הפעולה של סרגל המשימות במקלדת

הבחירה השלישית זמינה רק עבור משימת ההקלה השמאלית.



במערכת Windows 8.1 ו-Windows 10, צבעי שורת המשימות מותאמים להגדרות של Windows.



3.9.2 לחצני משימה עבור שורת משימות המקלדת

סמל	משימה/פעולה	תיאור
↑↓	הזז מקלדת מעלה/מטה	משימה המזיזה את המקלדת לראש המסך או לתחתית המסך. כדי להפעיל את הפונקציה, השהה על הכפתור. 
○	לחיצה שמאלית / הקשה	משימה שמבצעת לחיצה שמאלית יחידה. בהתקנים בעלי מסך מגע, פעולה הזוהה להקשה באצבע אחת.
✕	סגור	משימה שסוגרת את המקלדת.

3.9.3 חיזוי מילים


מנוע חיזוי המילים שבשימוש שלט ווינדוס הוא מסוג SwiftKey ונמצא בשימוש שכיח בטבלאות ובטלפונים חכמים. SwiftKey עושה שימוש בשילוב של טכנולוגיות בינה מלאכותית, המאפשרות לחזות את המילה הבאה שהשתמש מתכוון להקליד. SwiftKey לומד מהטקסט הקודם שהשתמש כתב, ומפיק חיזויים בהתאם לטקסט המוזן ומה שלמד. שפת חיזוי המילים תשתנה בהתאם להגדרת שפת המקלדת.

	he		her		hey		here		help		health	
		Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	
<	Ctrl	A	S	D	F	G	H	J	K	L	!	
		Z	X	C	V	B	N	M	,	.	?	

איור 3.9 מקלדת עם חיזוי מילים מופעל

כאשר חיזוי המילים נמצא בשימוש, ראה 4 שלט ווינדוס הגדרות, עמוד 22 למידע נוסף על הפעלה/השבתה של חיזוי המילים. שש (6) תיבות יופיעו מעל למקלדת. התיבה השמאלית ביותר תציג את המילה בסבירות הכי גבוהה לחיזוי, ושאר החמש (5) יכילו חיזוי של מילה אחת כל אחת. כדי לבחור בחיזוי מילה מסוים, בחר בתיבה עם המילה הנכונה. אם לא תמצא את המילה שאתה מחפש, המשיך להקליד, ואולי המילה שאתה מחפש תופיע לאחר התו הבא.

אם אתה משתמש בחיזוי מילים ורוצה להקליד מילה שמכילה תו עם הדגשה (accent), כגון café, לרוב כדאי שתיתן לחיזוי המילים לטפל בהדגשה זו. פשוט הקלד "cafe" ותקבל הצעה להזין "café".

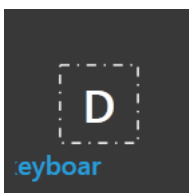

במהלך ההקלדה, 5 עד 10 התווים האחרונים שהוקלדו מוצגים בכחול במקשים המסומנים. לקבלת מידע נוסף, ראה 4 שלט ווינדוס הגדרות, עמוד 22. תכונה זו מסייעת למשתמש לאתר בקלות שגיאות כתיב ומפחיתה את הצורך להביט בנקודה שבה מתווסף הטקסט בפועל, דבר המאיץ את מהירות ההקלדה.

3.10 שלט ווינדוס עם מקלדות מבוססות אזור.

שלט ווינדוס ניתן להשתמש בצירוף יישומים נוספים המופעלים בשליטת העיניים. אזורים "מופעלי מבט" ביישומים אחרים נותרים פעילים כל עוד לא קיימת משימה פעילה בסרגל הכלים. שלט ווינדוס בסרגל המשימות אם אתה משתמש שלט ווינדוס במתג, לחצני המשימות הופכים להיות 'דביקים'. כדי לבטל בחירה של משימה, העף מבט מהיר במשימה שנבחרה.

3.11 מחוון זיהוי עיני

ה מחוון זיהוי עיני Eye Detection Indicator (מחוון זיהוי עיני), הנו מחוון נפרד בשדה 'פעילות' בווינדוס.




הראה אם שלט ווינדוס זיהה את עיני המשתמש.

ה מחוון זיהוי עיני הנו בעל כמה מצבים:

- עיניים זוהו () .
- משמש גם כמדריך מיקום עבור המשתמש.
- לא זוהו עיניים, () .
- לא חובר עוקב עין, או שעוקב העין מושבת () .


4 שלט ווינדוס הגדרות

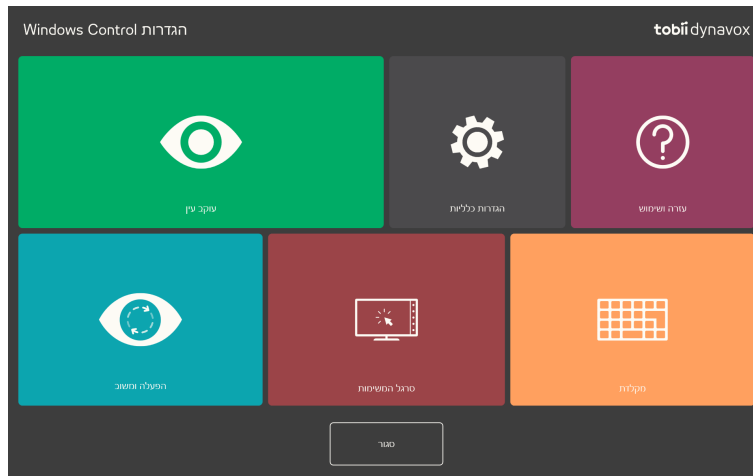

סמלים	פעולה	תיאור
	עוקב עין	פותח את עוקב עין הגדרות לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1 עוקב עין , עמוד 23.
	הגדרות כלליות	פותח את כללי הגדרות לקבלת מידע נוסף, ראה 4.2 הגדרות כלליות , עמוד 29.
	עזרה ושימוש	פותח את עזרה ושימוש הגדרות לקבלת מידע נוסף, ראה 4.3 עזרה ושימוש , עמוד 30.
	הפעלה ומשוב	פותח את הפעלה ומשוב הגדרות לקבלת מידע נוסף, ראה 4.4 הפעלה ומשוב , עמוד 31.
	סרגל המשימות	פותח את סרגל המשימות הגדרות לקבלת מידע נוסף, ראה 4.5 סרגל המשימות , עמוד 33.
	מקלדת	פותח את מקלדת הגדרות לקבלת מידע נוסף, ראה 4.6 מקלדת , עמוד 36.



4.1.1 לשונית הכיול

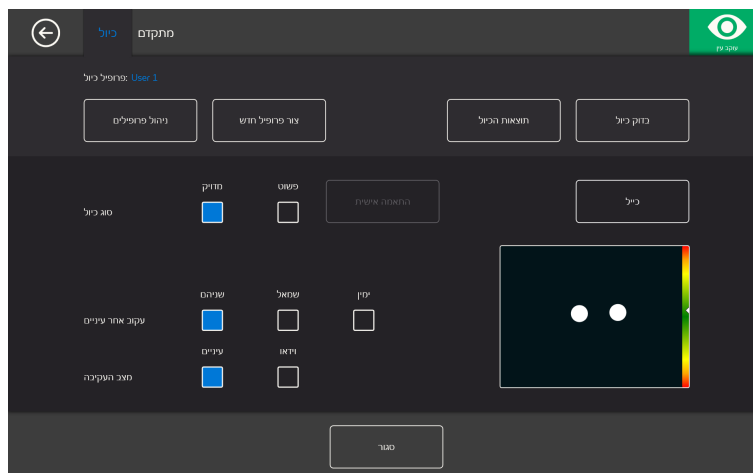

פרופיל כיול: הצגת שם הפרופיל הפעיל.

ניהול פרופילים: בחר בלחצן זה לשינוי פרופיל קיים. לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.1 ניהול פרופילים, עמוד 23.

צור פרופיל חדש: בחר בלחצן זה כדי ליצור פרופיל חדש. לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.2 צור פרופיל חדש, עמוד 23.

תוצאות הכיול: בחר כפתור זה כדי לראות את תוצאות הכיול. לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.3 תוצאות הכיול, עמוד 24.

בדוק כיול: בחר בלחצן זה לפתיחת עמוד בדיקת הכיול. לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.4 בדיקת כיול, עמוד 25.

סוג כיול: קיימים שני (2) סוגים של כיול: מדויק או פשוט. לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.6 סוג כיול, עמוד 25.

עקוב אחר עיניים: בחר כיצד על המכשיר לעקוב אחר עיני המשתמש: שניהם, שמאל או ימין.

4.1.1.1 ניהול פרופילים

באפשרותך להפעיל או למחוק פרופיל קיים בעמוד 'ניהול פרופילים'.
ניתן לראות את שם הפרופיל הפעיל במרכז המסך, תחת 'פרופיל פעיל'.

כל הפרופילים הזמינים מוצגים כלחצנים בעמוד. השתמש בלחצנים < ו- > כדי לעבור בין הפרופילים הזמינים.

4.1.1.1.1 הפעלת פרופיל

1. בחר בלחצן עם שם הפרופיל שברצונך להפעיל.
2. בחר את הפעל בחר בלחצן הפעל בפינה הימנית העליונה של המסך.
3. בחר כן כדי להפעיל את הפרופיל הנבחר לא לבטל
4. בחר סגור לעזוב את העמוד

4.1.1.1.2 מחיקת פרופיל

1. בחר בלחצן עם שם הפרופיל שברצונך למחוק.
2. בחר את מחק את הפתור הנמצא בפינה השמאלית העליונה של המסך.
3. בחר כן לצורך מחיקת הפרו]פיל הנבחר, או לא לבטל
4. בחר סגור לעזוב את העמוד

4.1.1.2 צור פרופיל חדש

1. בחר את סוג כיול להשתמש לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.6 סוג כיול, עמוד 25.
2. בחר את צור פרופיל חדש כפתור.


3. בחר כן להמשיך. לא לבטל
4. תן שם לפרופיל החדש.

 יש להשתמש במקלדת ועכבר.
יש להזין אותיות וספרות בלבד.

5. בחר את הבא כפתור.
6. מקם את המשתמש כך ששתי הנקודות, המייצגות את עיני המשתמש, יהיו במרכז הקופסה המוצגת על המסך. תהליך הכיול יופעל עבור המשתמש כאשר הנקודה הימנית תהבהב.
7. לביצוע כיול, פעל לפי ההוראות שעל המסך.
8. בדוק את תוצאות הכיול.
- לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.3 תוצאות הכיול, עמוד 24.
9. בחר סגור כדי לאשר את הכיול

4.1.1.3 תוצאות הכיול

זה יפעל רק בעוקבי העין IS-4 ולא על עוקבי העין IS-20 ו-IS-3. למידע נוסף על פלטפורמת עוקב העין שאתה משתמש בו, ראה את הספציפיקציות הטכניות לגבי עוקב העין שלך.

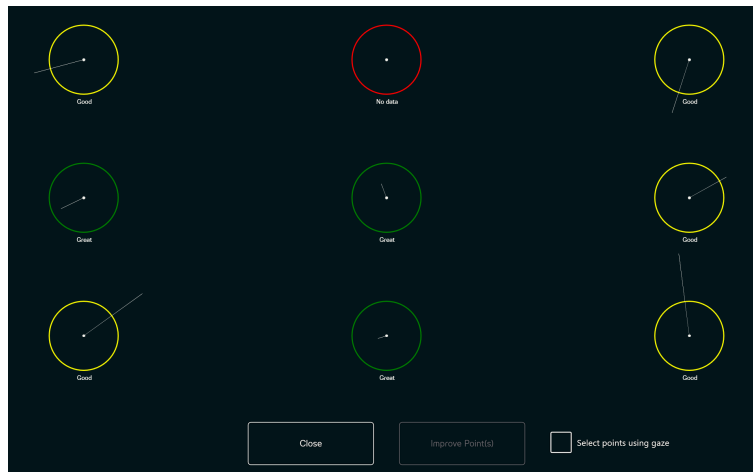

בעמוד תוצאות הכיול, אתה תראה את תוצאות הכיול של כל אחת מנקודות הכיול. מספר נקודות הכיול שיוצגו על העמוד ישתנה לגבי סוג הכיול שבו בחרת וכיצד התאמת אישית את הכיול.

נקודת כיול עשויה להכיל שלושה מצבים שונים:

- נהדר (ירוק)
- טוב (צהוב)
- אין נתונים (אדום)

בעת השימוש בסוג הכיול המדויק, הכיול יאותחל אוטומטית אם עוקב העין אינו יכול לקבל נתונים כלשהם מנקודת הכיול.




4.1.1.3.1 שיפור נקודות הכיול

אם נקודת הכיול זקוקה לשיפור, בצע את הצעדים הבאים:

1. השתמש בחר את הנקודות על ידי שימוש במבט השתמש בתיבת הפעל\כבה מופעל להפעיל את נקודות הכיול באמצעות מבט כדי לבחור אותם במבט (אופציונלי)


2. בחר את נקודות הכיול לצורך שיפור.

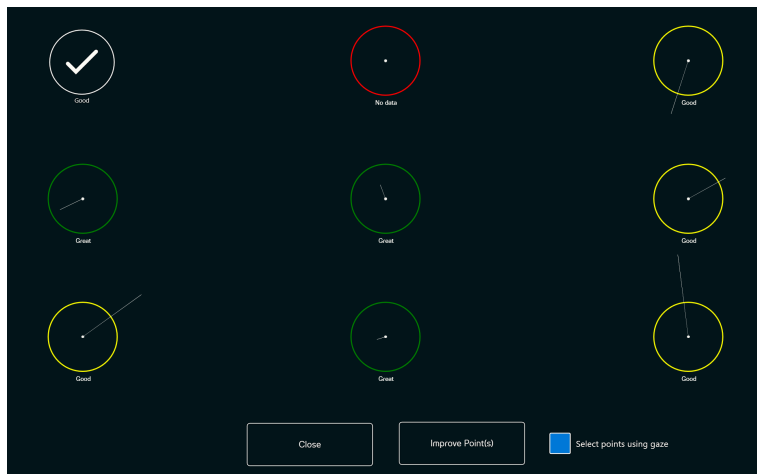

3. בחר את שיפור נקודות הכיול כפתור כדי להתחיל בכיול של נקודות הכיול שנבחרו.

4. חזור על צעדים 1-3 אם יש בכך צורך.

4.1.1.4 בדיקת כיול

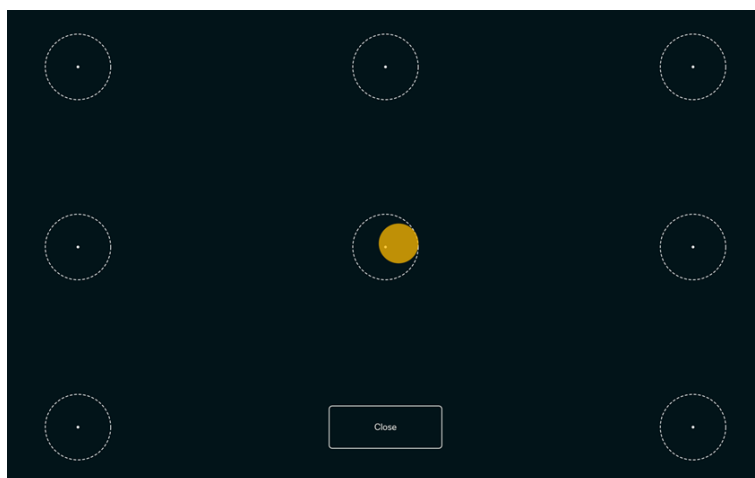

בעמוד בדיקת הכיול ניתן לערוך בדיקת כיול בשמונה (8) נקודות על המסך כדי לראות אם המשתמש זקוק לכיול מחדש של עוקב העין.

1. הבט בכל נקודה במרכזו של כל עיגול על המסך כדי לראות מה מידת הדיוק של עוקב העין עבור אותו אזור.

2. בחר סגור את הכפתור בעת הסיום

4.1.1.5 כיול מחדש

1. בחר את סוג כיול להשתמש

לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.6 סוג כיול, עמוד 25.

2. בחר את לבצע כיול מחדש בחר בלחצן כיול מחדש כדי להתחיל בתהליך כיול חדש עבור הפרופיל הפעיל.

3. לביצוע כיול, פעל לפי ההוראות שעל המסך.

4. בדוק את תוצאות הכיול.

לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.3 תוצאות הכיול, עמוד 24.

5. בחר סגור כדי לאשר את הכיול

4.1.1.6 סוג כיול

קיימים שני (2) סוגים של כיול: מדויק ו- פשוט.

4.1.1.6.1 מדויק

בחר את מדויק בחר בתיבה להפעלת סוג הכיול המדויק ביותר.
לאחר הפעלת הכיול המדויק, תהליך הכיול יכלול שבע (7) נקודות, בסגנון "קלע לנקודה". סוג ברירת המחדל הנו הכיול המדויק.

4.1.1.6.2 פשוט

בחר את פשוט אם ברצונך להתאים אישית את תהליך הכיול.
בחר את התאמה אישית בחר בלחצן התאים כדי להתאים את תהליך הכיול.



נקודות כיול: בחר 1, 2, 5 או 9 יש להשתמש בנקודות הכיול.

כיול בעזרת נקודה אחת אינו זמין ב-PC Eye Go.



מעבר בין שלבים: העבר את תיבת הסימון למעבר בין שלבים למצב 'מופעל' להפעלת פונקציה המאפשרת לך להקיש על לחצן "S" במקלדת או על המסך כדי לעבור בין שלבי הכיול.

אזור כיול: לקבלת מידע נוסף, ראה 4.1.1.6.2.1 אזור כיול, עמוד 27.

אמצעי עידוד

בחר את דפדף עם הכפתור כדי לשנות אמצעי עידוד מברירת המחדל נקודה לבנה לתוך:

- אחד מאמצעי העידוד הכלולים, תמונה או וידאו
- תמונה של הצעצוע החביב על המשתמש
- וידאו מועדף
- או משהו אחר.

רקע: בחר את רקע כפתור לשינוי הצבע של רק הליך הכיול.

מהירות עידוד בחר את מהירות העידוד כדי לנוע מסביב למסך בין שלוש רמות שונות:

- איטי
- בינוני
- מהיר


מידת עידוד בחר את גודל העידוד כאשר העידוד מוצג על המסך בין שלוש רמות שונות:

- קטן
- בינוני
- גדול

סגור בחר את סגור את הכפתור כדי לעזוב את העמוד.

4.1.1.6.2.1 אזור כיול

בחר את אזור כיול בחר בלחצן להתאמה אישית של תהליך הכיול.

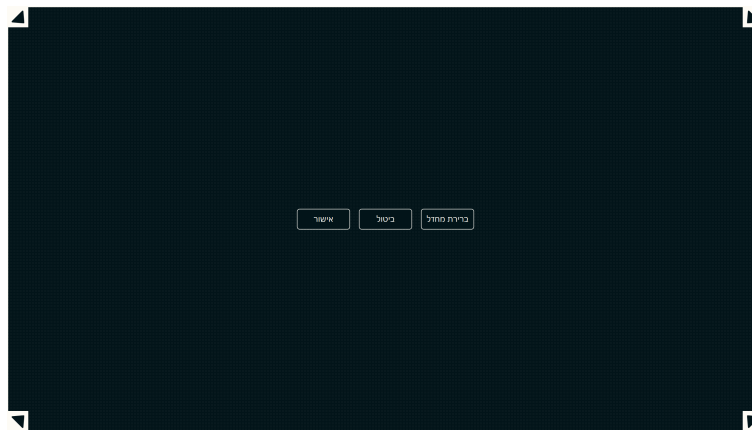

ההתאמה האישית של אזור הכיול עשויה להועיל במקרה שהתברר שלמשתמש אין גישה לאזורים שונים במסך באמצעות . שלט ווינדוס. ניתן לשפר את הכיול הכללי על ידי התאמת גודל אזור הכיול באופן שלא יכלול אזורים שהמשתמש אינו יכול לגשת אליהם.


ניתן להזיז את האזור הכחול ולשנות את גודלו כדי להתאימו לאזור הכיול המועדף שלך.



בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- אישור - כדי להגדיר את אזור הכיול שייצג את הגודל שהתאמת לו ולצאת מהגדרת אזור הכיול.
- ביטול - להיפטר מן השינויים ולצאת מאזור הכיול.
- ברירת מחדל - כדי להגדיר את אזור הכיול לברירת המחדל של היצרן.

4.1.2 לשונית 'מתקדם'

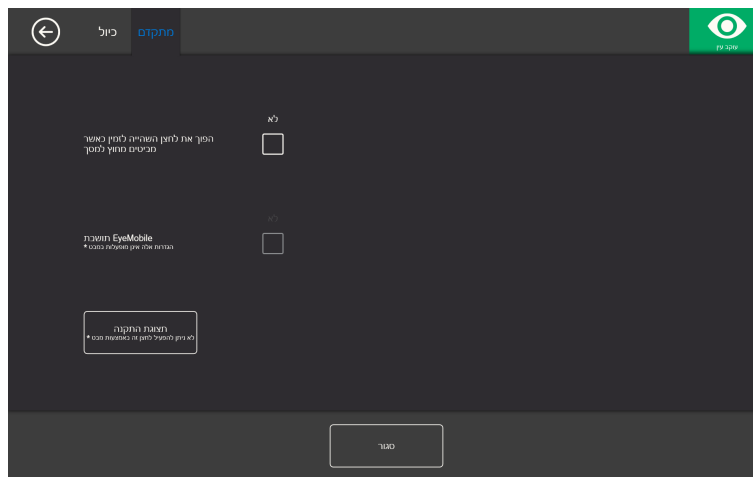


הפוך את לחצן ההשהיה לזמין כאשר מביטים מחוץ למסך: השתמש בתיבת בהפעל/לכבה מופעל העבר את תיבת הסימון למצב מופעל אם לחצן ההשהיה יופיע על המסך כאשר המשתמש יביט מחוץ לתחומי המסך, כך שהמשתמש יוכל להשהות ולהפעיל שוב את עקיבת העיניים. תושבת EyeMobile: השתמש בתושבת EyeMobile ותיבת הסימון של הפעל/לכבה מופעל אם אתה משתמש ב-Eyemobile או ב-EyeMobile מיני. הגדרות תושבת EyeMobile אינן רלוונטיות ל-EyeMobile Plus ולכן מושבתות.


4.1.2.1 הגדרת תצוגה

אם נעשה שימוש ביותר מהתקן תצוגה אחד (1), עליך להגדיר לאיזה התקן תצוגה מחובר עוקב העין. בנוסף, יש להגדיר במערכת את גודל התקן התצוגה בו אתה משתמש.

יעבוד רק על Extended Desktop ולא על Duplicated Desktop.

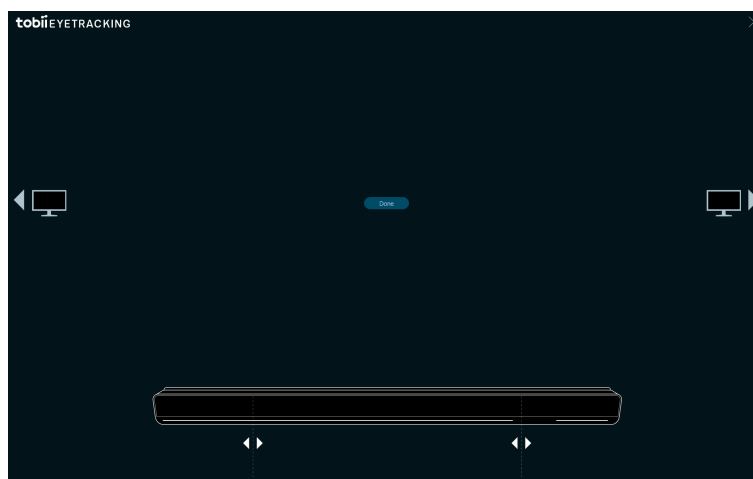

1. השתמש ב- או לבחירת התקן התצוגה אליו מחובר עוקב העין.
2. התאם בין הקווים האנכיים מימין ומשמאל, המצויים מתחת לתמונת עוקב העין על המסך, ובין הסימונים בחלקו העליון של עוקב העין שבו אתה משתמש.

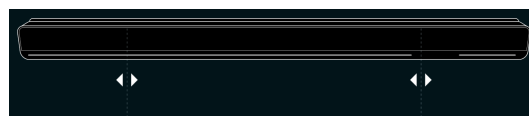


פעולה זו תגדיר את גודל המסך בשימוש. שלט ווינדוס.

3. בחר בוצע לסיום.



4.2 הגדרות כלליות


4.2.1 לשונית 'כללי'

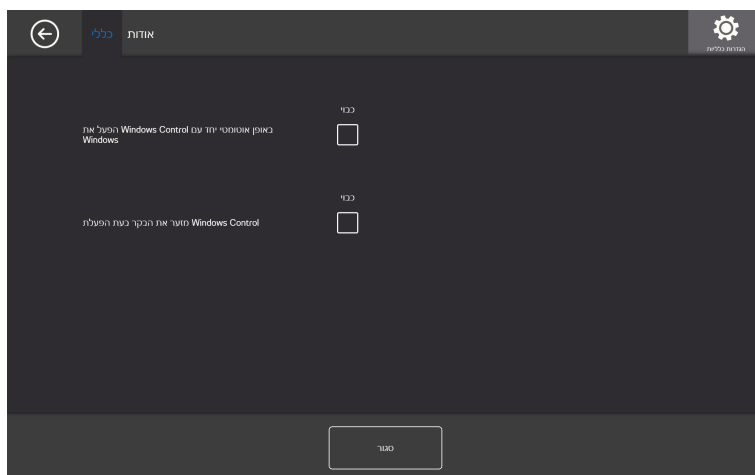

הפעל את שלט הווידאוס באופן אוטומטי יחד עם ווינדוס: השתמש בתיבת בהפעל\כבה מופעל כאשר שלט הווידאוס מופעל אוטומטית בעת האתחול של הווידאוס.

מזער את הבקך בעת הפעלת ה**Windows**: השתמש בתיבת בהפעל\כבה מופעל אם שלט ווינדוס השלשט יצומצם כאשר ווינדוס מאתחל.

4.2.2 לשונית 'אודות'

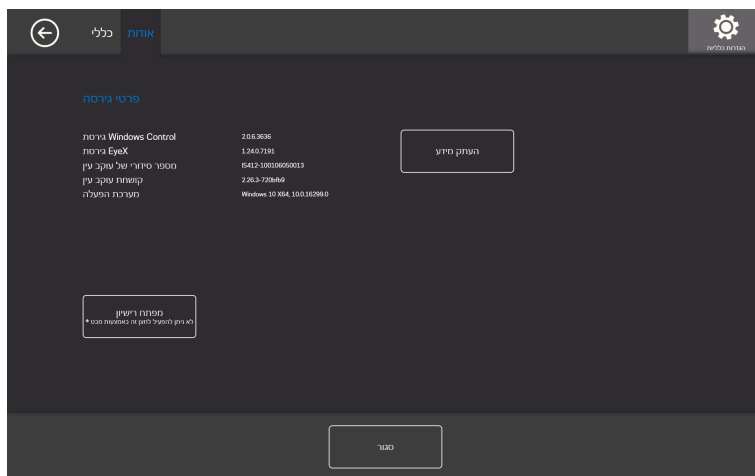

בעמוד 'אודות', תוכל למצוא את כלל נתוני הגרסה עבור התוכנה וצידוד עוקב העין. מידע זה ניתן בקלות להעתקה על ידי בחירת העתק מידע מהכפתור ואז ניתן להדביקו בדוא"ל או כל תוכנה אחרת אם יש בכך צורך.

4.2.2.1 מפתח רישיון

לחצן הרישיון אינו מופעל באמצעות מבט. בקש ממישהו אחר לסייע לך אם יש צורך בשינוי הרישיון.




להפעלת הרישיון, ראה 2.2.1 הפעלת רישיון, עמוד 6.

לביטול הפעלת הרישיון, ראה 2.2.2 ביטול הפעלת רישיון, עמוד 8.



4.3 עזרה ושימוש

4.3.1 לשונית 'עזרה'

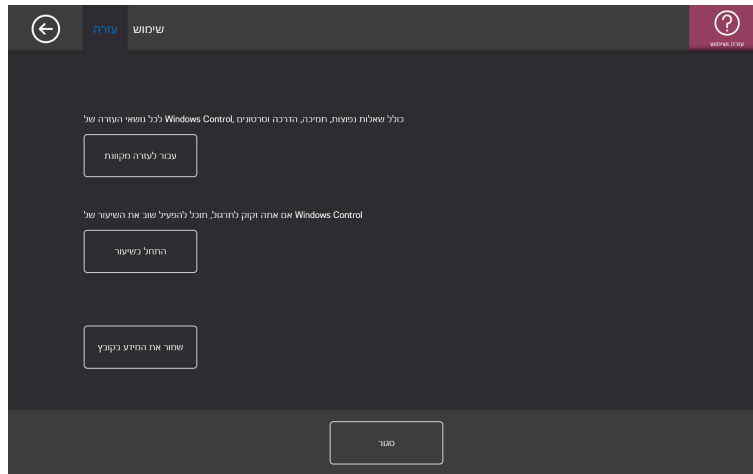

בחר את עבור לעזרה מקוונת עם הכפתור כדי לשנות Tobii Dynavox בחר בלחצן מעבר לעזרה מקוונת לפתיחת עמודי התמיכה למוצר בדפדפן ברירת המחדל. בעמודי התמיכה המקוונים ניתן למצוא שאלות נפוצות, אפשרויות תמיכה ולימוד, סרטונים ומסמכים אודות ואודות כל שאר מוצרי . שלט ווינדוס וכל המוצרים האחרים של Tobii Dynavox.


ודא שהמחשב/התקן מחובר לאינטרנט.



בחר את התחל בשיעור באם המשתמש זקוק ללימוד נוסף, בחר בלחצן התחל בשיעור להרצת השיעור הכלול. ניתן להריץ את השיעור שוב ושוב, בהתאם לרצון המשתמש.

בחר את שמור את המידע לכפתור הקובץ כדי להעתיק את כל היוםנים החשובים אם אתה זקוק לתמיכה. הקובץ ניתן להצמדה בקלות לדוא"ל למשלוח לצוות התמיכה

4.3.2 לשונית 'שימוש'

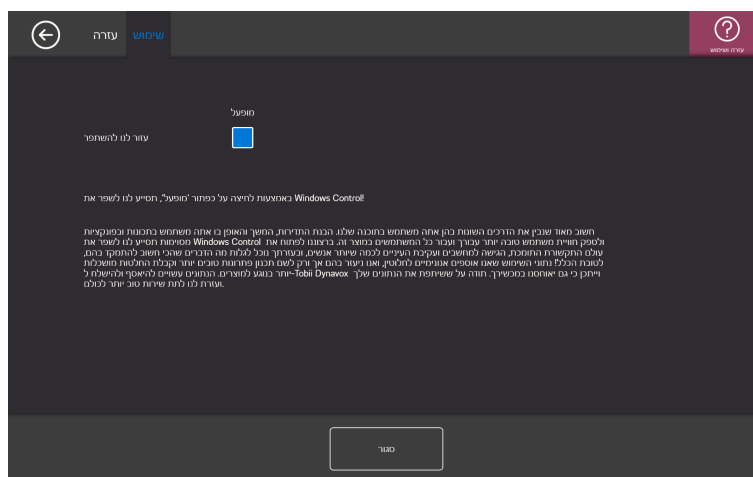


עזור לנו להשתפר: לעזרה Tobii Dynavox לצורך שיפור התוכנה, העבר את תיבת הסימון למצב מופעל . מופעל.



4.4 הפעלה ומשוב

4.4.1 לשונית 'הפעלה'

4.4.1.1 Gaze Selection Settings

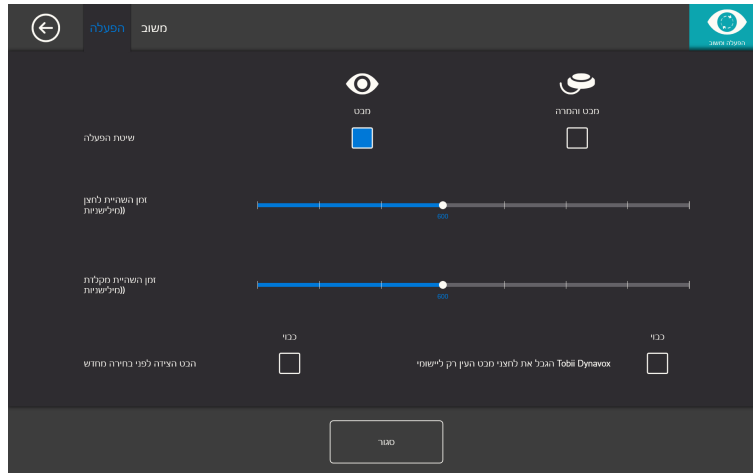

בלשונית ההפעלה, מופיעות כלל הגדרות האינטראקציה של המשתמש כאשר שלט ווינדוס נקבע ניתן להגדיר אם המשתמש ישתמש במבט או במתג להפעלת פקודות, ומה יהיו מאפייני האינטראקציה.

שיטת הפעלה:

- מבט מבט – בחר 'מבט' כדי להשתמש במיקום המבט לצורך הפעלת פונקציית הזום שמסתיימת בעת ביצוע המשימה הרצויה.
- מבט והמרה מתג – בחר 'מתג' כדי להשתמש במתג לצורך הפעלת פונקציית הזום שמסתיימת בעת ביצוע המשימה הרצויה.

זמן השהיית לחיצה (מילישניות)

ניתן להגדיר את זמן ההשהיה על הכפתור ב-8 רמות שונות. הבט במיקום הרצוי כדי לשנות את ההגדרה. זמן השהיית הלחיצה קובע את משך הזמן שהמשתמש צריך לרכז את מבטו בלחיצה עד לביצוע המשימה. זמן השהיית הלחיצה עולה ככל שמתקדמים ימינה בסרגל, ויורד ככל שמתקדמים שמאלה בסרגל.

זמן השהיית מקלדת (מילי-שניות)

ניתן להגדיר את זמן השהיית המקלדת ב-8 רמות שונות. הבט במיקום הרצוי כדי לשנות את ההגדרה. זמן השהיית המקלדת קובע את משך הזמן שהמשתמש צריך לרכז את מבטו בלחיצה עד להפעלת הלחיצה. זמן השהיית המקלדת עולה ככל שמתקדמים ימינה בסרגל, ויורד ככל שמתקדמים שמאלה בסרגל.


הבט הצידה לפני בחירה מחדש

- מופעל -בחר מופעל לצורך ההפעלה הבט הצידה לפני בחירה מחדש. כאשר מופעלבעת מצב מופעל, המשתמש חייב תחילה להביט הצידה מאזור המבט הפעיל כדי שיהיה מסוגל להפעיל מחדש את אזור המבט.
- כבוי -בחר כבוי לצורך ביטול ההפעלה הבט הצידה לפני בחירה מחדש. כאשר כבויבמצב כבוי אזור המבט הפעיל יופעל מחדש שוב ושוב כל עוד המשתמש ממשיך להביט באזור המבט. (ברירת מחדל)

הגבל את לחצני מבט העין רק ליישומי **Tobii Dynavox**

- מופעל -בחר מופעל לצורך ההפעלה הגבל את לחצני מבט העין רק ליישומי **Tobii Dynavox**. כאשר מופעלבמצב מופעל אזור המבט הפעיל יופעל, הפקודה הקשורה לאזור תתבצע וכן **Tobii Dynavox** אינטראקציית המשוב תוצג רק בתוך **Tobii Dynavox** אפליקציות תוכנה.
- כבוי -בחר כבוי לצורך ביטול ההפעלה הגבל את לחצני מבט העין רק ליישומי **Tobii Dynavox**. כאשר כבויבמצב מופעל אזור המבט הפעיל יופעל, הפקודה הקשורה לאזור תתבצע וכן **Tobii Dynavox** אינטראקציית המשוב תוצג בתוך **Tobii Dynavox** בכל התכנות של צד שלישי ובאפליקציות. (ברירת מחדל)

4.4.1.2 הגדרות מבט ומתג

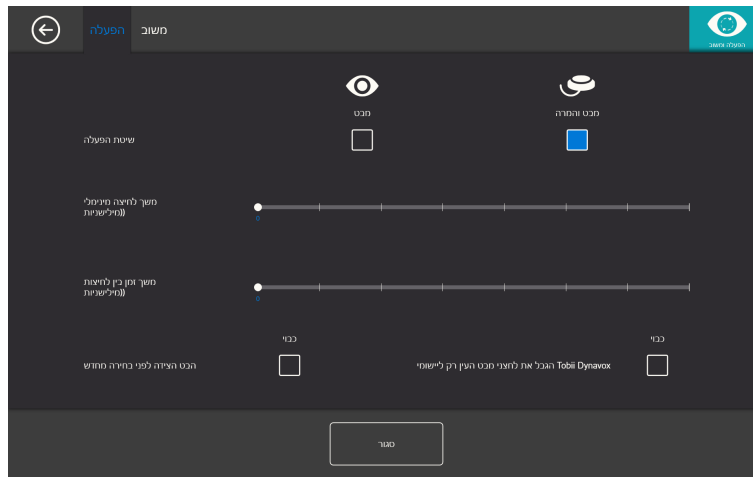


משך לחיצה מינימלי משך הזמן שהמשתמש צריך ללחוץ על המתג לפני שמתבצעת בחירה
משך זמן בין לחיצות משך "הזמן המת" ששלט הווידנס ימתין בטרם יאפשר הזנה נוספת של המתג.
הבט הצידה לפני בחירה מחדש

- מופעל -בחר מופעל לצורך ההפעלה הבט הצידה לפני בחירה מחדש. כאשר מופעלבעת מצב מופעל, המשתמש חייב תחילה להביט הצידה מאזור המבט הפעיל כדי שיהיה מסוגל להפעיל מחדש את אזור המבט.
- כבוי -בחר כבוי לצורך ביטול ההפעלה הבט הצידה לפני בחירה מחדש. כאשר כבויבמצב כבוי אזור המבט הפעיל יופעל מחדש שוב ושוב כל עוד המשתמש ממשיך להביט באזור המבט. (ברירת מחדל)

הגבל את לחצני מבט העין רק ליישומי **Tobii Dynavox**

- מופעל -בחר מופעל לצורך ההפעלה הגבל את לחצני מבט העין רק ליישומי **Tobii Dynavox**. כאשר מופעלבמצב מופעל אזור המבט הפעיל יופעל, הפקודה הקשורה לאזור תתבצע וכן **Tobii Dynavox** אינטראקציית המשוב תוצג רק בתוך **Tobii Dynavox** אפליקציות תוכנה.
- כבוי -בחר כבוי לצורך ביטול ההפעלה הגבל את לחצני מבט העין רק ליישומי **Tobii Dynavox**. כאשר כבויבמצב מופעל אזור המבט הפעיל יופעל, הפקודה הקשורה לאזור תתבצע וכן **Tobii Dynavox** אינטראקציית המשוב תוצג בתוך **Tobii Dynavox** בכל התכנות של צד שלישי ובאפליקציות. (ברירת מחדל)

4.4.2 לשונית 'משוב'

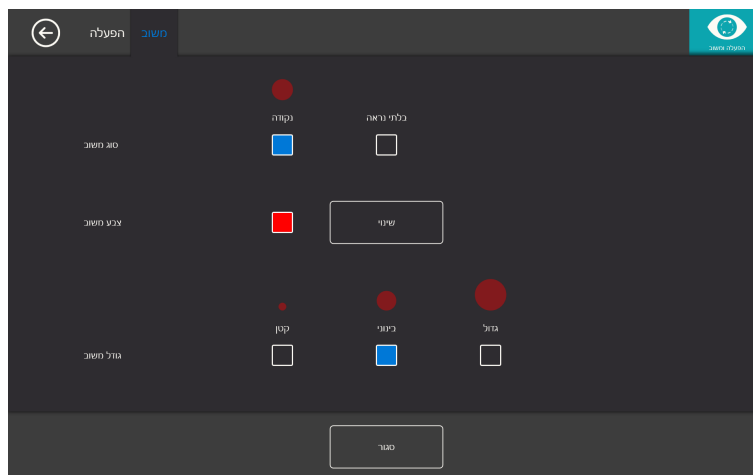

סוג משוב:

- שרון השעון - המשוב הווידואלי הנו מד זמן המתמלא במהלך פרק הזמן המוגדר להשהייה על הכפתור. לאחר שמד הזמן התמלא לחלוטין, המשימה תופעל.

- נקודה נקודה - בעת הפעלת משימה, המשוב הוויזואלי הנו נקודה מתכווצת למשתמשים באפשרות המבט, או נקודה קבועה למשתמשים באפשרות המתג.
- בלתי נראה בלתי נראה - לא יוצג משוב ויזואלי על המסך בעת הפעלת משימה.

צבע משוב: בחר את שינוי בחר בלחצן שינוי לבחירת צבע המשוב. לצבעים זמינים, ראה איור 4.1 צבעים זמינים, עמוד 33.



איור 4.1 צבעים זמינים


גודל משוב: ניתן להגדיר שלושה (3) ערכים אפשריים עבור גודל אמצעי המשוב של סוג המשוב הנבחר.

- קטן
- בינוני
- גדול




4.5 סרגל המשימות

4.5.1 לשונית 'שורת המשימות'

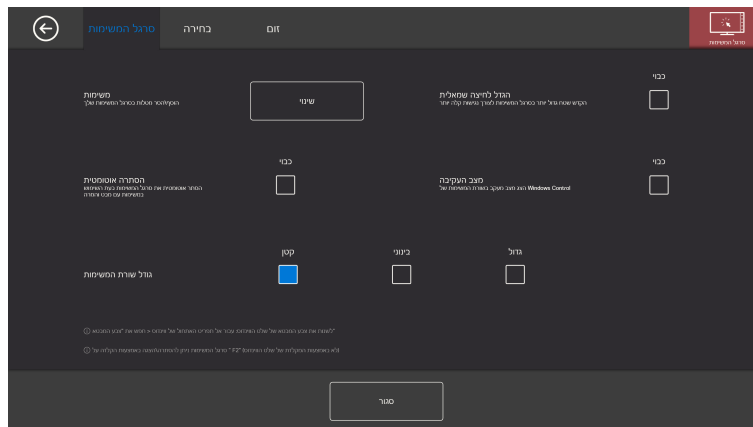

4.5.1.1 משימות

בחר את שינוי כפתור לצורך נגישות לחלון קופץ כאשר המטלות ניתנות להוספת או להסרה מסרגל המטלות.

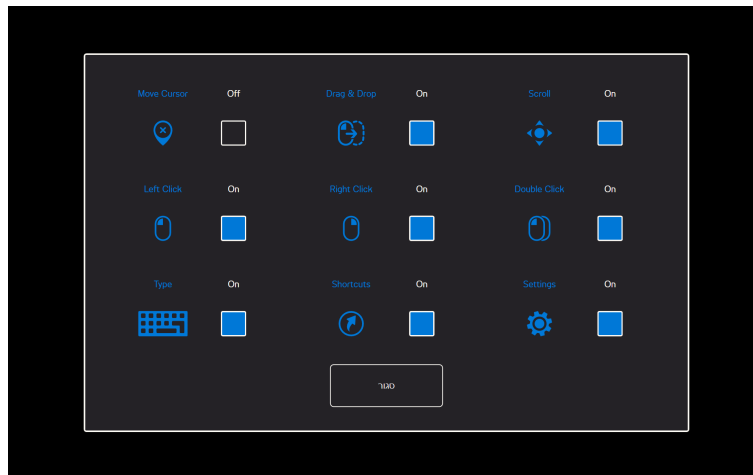

בחר במשימות לשימוש בשורת המשימות. למידע נוסף על המשימות, ראה 3.4 משימות רגילות, עמוד 13.

שים לב, מספר משימות רב בשורת המשימות מקשה על בחירתן במסכים קטנים.



השתמש בתיבת בהפעל/כבה מופעל בכל משימה כדי לאפשר אותה לשימוש בסרגל המשימות.

השתמש בתיבת בהפעל/כבה כבוי בכל משימה כדי לאפשר אותה לשימוש בסרגל המשימות.

4.5.1.2 הגדל לחיצה שמאלית

הפעלה של הגדלת לחיצה שמאלית עשויה להרחיב במידה ניכרת את האזור הפעיל במשימת הלחיצה השמאלית בסרגל המשימות, דבר שמקל מאוד לבחור את משימת הלחיצה השמאלית.

השתמש הגדל לחיצה שמאלית התכונה הגדל לחיצה שמאלית משמשת להגדלה והדגשה של המשימה 'לחיצה שמאלית' בשורת המשימות. אם זה ממותג אל כבוי, כל המטלות שנבחרות יוצבו במרווח שווה לאורך סרגל המטלות. אם זה ממותג אל מופעל/כבה תכונה זו מופעלת, כל המשימות חוץ מהמשימה 'לחיצה שמאלית' ממשיכות להופיע בגודל המקורי/המוקטן והמשימה 'לחיצה שמאלית' ממלאת את המקום הנותר בשורת המשימות.

4.5.1.3 הסתרה אוטומטית

מסתיר אוטומטית את סרגל המטלות. זמין לכל המטלות הדבקות ולכל המטלות במצב הפעלת מתג.

השתמש בתיבת בהפעל/כבה מופעל כדי להפעיל הסתרה אוטומטית.

השתמש בתיבת בהפעל/כבה כבוי כדי להשבית הסתרה אוטומטית.

- מופעל - בחר מופעל לצורך ההפעלה הסתרה אוטומטית. כאשר מופעלה
- כבוי - בחר כבוי לצורך ביטול ההפעלה הסתרה אוטומטית. כאשר כבוי/במצב כבוי אזור המבט הפעיל יופעל מחדש שוב ושוב כל עוד המשתמש ממשיך להביט באזור המבט. (ברירת מחדל)

סרגל המשימות ניתן להסתרה/הצגה באמצעות הקלדה על "F2" (לא באמצעות המקלדת של שלט הווידוס)



4.5.1.4 מצב העקיבה

הצג את מצב העקיבה בראש החלון של סרגל המטלות בשלט הווידוס. על פי ברירת המחדל הצגת מצב העקיבה הוא כבוי.

השתמש בתיבת בהפעל/כבה מופעל להציג את מצב העקיבה.

השתמש בתיבת הפעל/כבה כבוי כדי להסתיר את מצב העקיבה.


4.5.1.5 גודל שורת המשימות

בלשונית 'שורת המשימות' ניתן לבחור בשלושה (3) גדלים עבור סרגל המשימות:

קטן	בינוני	גדול
		

בחירת ערך גדול יותר עבור שורת המשימות תרחיב את האזור הפעיל מסביב למשימה, כך שלמשתמש יהיה קל יותר לבחור בה. האזור הפעיל עצמו יורחב אל מחוץ לגבולות המסך. סמלי המשימות יהיו תמיד במרכז האזור הפעיל.

4.5.2 לשונית 'משוב'

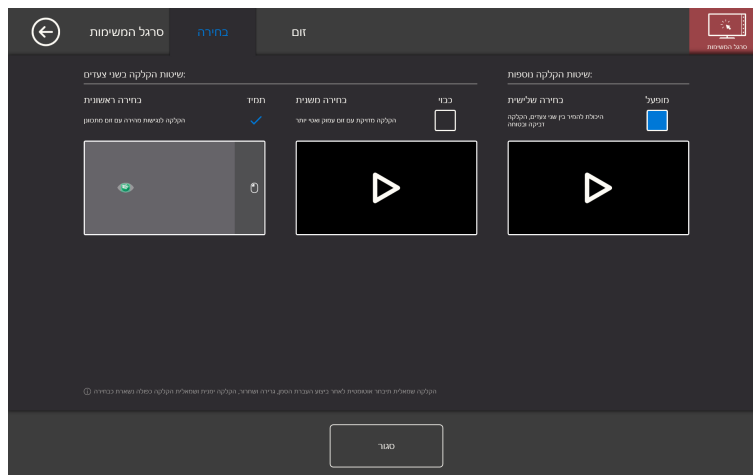

4.5.2.1 בחירה ראשונית

הבחירה הראשונית מופעלת תמיד ולא ניתן להשביתה.


4.5.2.2 בחירה משנית

בברירת מחדל הבחירה המשנית תהיה תמיד כבוי. אם ממותג למצב מופעלה הבחירה השלישונית תהיה זמינה.

4.5.2.3 בחירה שלישית

בברירת מחדל הבחירה המשנית תהיה תמיד כבוי. אם ממותג למצב מופעלה הבחירה השלישונית תהיה זמינה. עם הבחירה השלישונית ה-Sticky and Safe Click Tasks יהיו זמינים. לקבלת מידע נוסף, ראה 3.5 מטלות דביקות, עמוד 14 וכן 3.6 הקלקה כפולה בטוחה, עמוד 15.

4.5.3 לשונית 'זום'

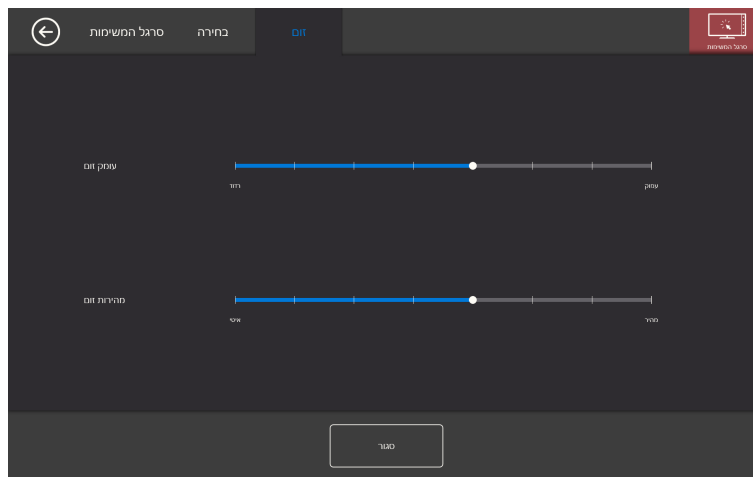

עומק זום


ניתן להגדיר את עומק הזום ב-8 רמות שונות. הבט במיקום הרצוי כדי לשנות את ההגדרה. רמת העומק קובעת את עומק התקדמות הזום לפני ביצוע המשימה. עומק הזום גדל ככל שמתקדמים ימינה בסרגל.

אם העומק מוגדר כ-0, לא יתבצע זום. תתבצע לחיצה מיידית בעת בחירה ראשית. בעת בחירה משנית, פעולת הזום תימשך.




מהירות זום

ניתן להגדיר את מהירות הזום ב-8 רמות שונות. הבט במיקום הרצוי כדי לשנות את ההגדרה. פרמטר המהירות משפיע על מהירות הזום לפני ביצוע המשימה. מהירות הזום גדלה ככל שמתקדמים ימינה בסרגל.

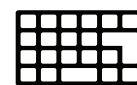

4.6 מקלדת

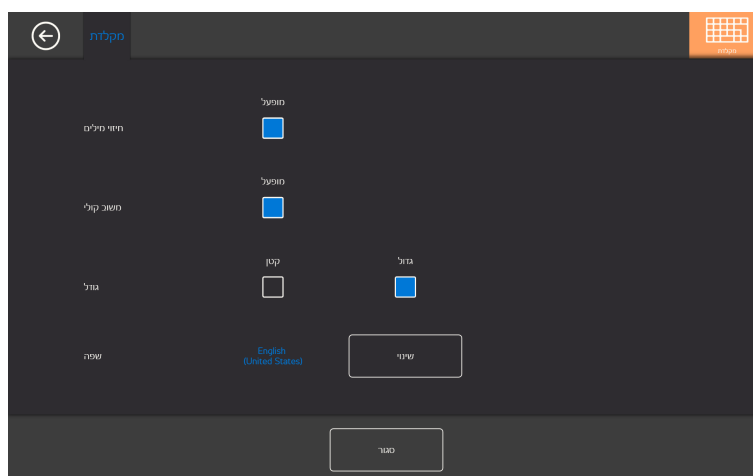

חיזוי מילים


- מופעל - בחר מופעל - בחר באפשרות 'מופעל' כדי להפעיל את חיזוי המילים במהלך השימוש במקלדת המבט. (ברירת מחדל)
- כבוי - בחר כבוי כדי להפעיל את חיזוי המילים במהלך השימוש במקלדת המבט.

משוב קולי

- מופעל - בחר מופעל כדי להפעיל את משוב הצליל בעת בחירת לחצן במקלדת המבט.
- כבוי - בחר כבוי - בחר באפשרות 'כבוי' כדי לנטרל את משוב הצליל בעת בחירת לחצן במקלדת מבט.

גודל

- קטן קטן - בחר באפשרות 'קטן' כדי להשתמש במקלדת המבט הקטנה, המכסה פחות ממחצית המסך. ראה איור 4.2 פריסת לוח מקשים קטנה (ברירת מחדל), עמוד 37.
- גדול גדול - בחר באפשרות 'גדול' כדי להשתמש במקלדת המבט הגדולה, המכסה מחצית מהמסך. ראה איור 4.3 פריסת לוח מקשים גדולה, עמוד 37.

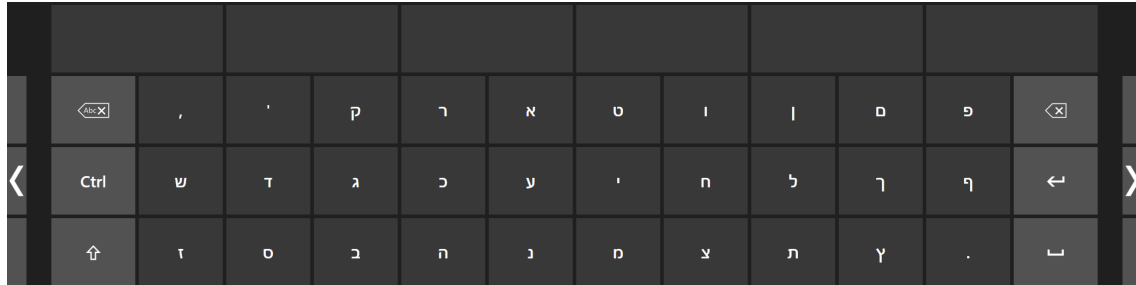

איור 4.2 פריסת לוח מקשים קטנה (ברירת מחדל)



איור 4.3 פריסת לוח מקשים גדולה

שפה

מוצגת פריסת המקלדת שנבחרה. בחר את שינוי בחר בלחצן שינוי כדי לשנות את פריסת המקלדת לשפה אחרת. זמינות מספר פריסות מקלדת בשפות שונות.

Virtual Remote 5

5.1 Virtual Remote סקירה



איור 5.1 סקירת Virtual Remote

ה Virtual Remote מחולק ל-2 אזורים עיקריים:

- ה Virtual Remote תפריט , למידע נוסף ראה 5.1.1 Virtual Remote תפריט, עמוד 38.
- השלט הפעיל, למידע נוסף ראה 5.1.2 השלט הפעיל, עמוד 39.

5.1.1 Virtual Remote תפריט




איור 5.2 ה Virtual Remote תפריט

הסמלים בתוך Virtual Remote התפריט הם:

לחצן משימה	פעולה	תיאור
+	הוסף שלט רחוק	בחר בפעולה זו להוספת שלט חדש, ראה 5.2.4 הוסף שלט רחוק. , עמוד 41.
i	מידע	בחר בפעולה זו לפתיחת עמוד המידע, ראה 5.2.6 מידע , עמוד 57.
<	שמאל	בחר בפעולה זו להפעלת השלט משמאלו של השלט הפעיל.
>	ימין	בחר בפעולה זו להפעלת השלט מימינו של השלט הפעיל.
edit icon	מצב עריכה	בחר בפעולה זו למעבר למצב העריכה של השלט הפעיל, ראה 5.2.5 מצב עריכה , עמוד 48.
X	סגור/מזער	בחר בפעולה זו כדי למזער את יישום Virtual Remote.

5.1.2 השלט הפעיל

השלט הפעיל יהיה תמיד השלט שבמרכז תפריט . Virtual Remote התפריט, ראה איור 5.3 שלט פעיל.

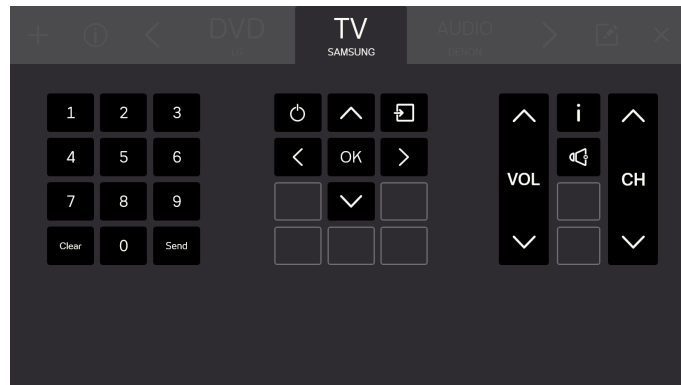


איור 5.3 שלט פעיל

כל הכפתורים הנראים על המסך משויכים לשלט הפעיל.



תוכל גם לראות את שמותיהם של עד שני (2) שלטים זמינים נוספים, אחד מכל צד של השלט הפעיל. עד שלא תהפוך את השלט לפעיל, לא תוכל לראות את הלחצנים של השלטים הזמינים, אלא רק את שמותיהם.

5.1.3 הכפתורים

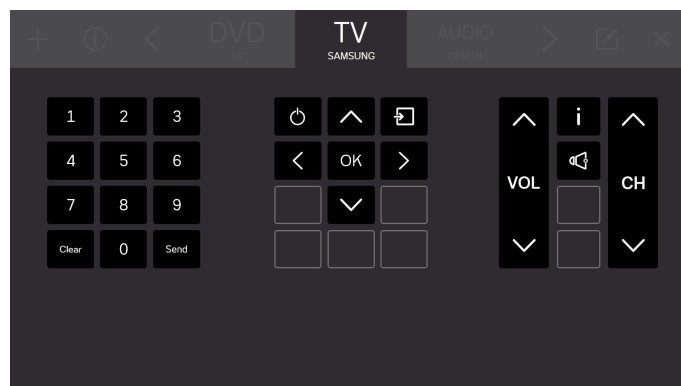


איור 5.4 הכפתורים


כל הכפתורים הנראים על המסך משויכים לשלט הפעיל. קיימים שני (2) סוגי לחצנים בשלט.

- כפתור פעיל , ראה איור 5.5 לחצנים פעילים, עמוד 40
- כפתורים בלתי פעילים , ראה איור 5.6 לחצנים בלתי פעילים, עמוד 40

כמות הלחצנים והפונקציות המשויות אליהם משתנים בהתאם לסוג המערכת שהמשתמש מעוניין לשלוט בה.

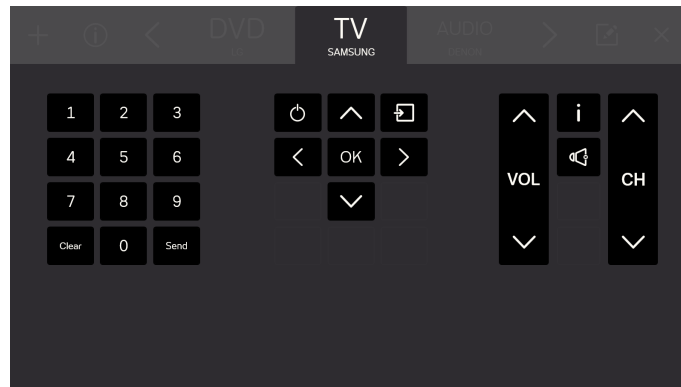

איור 5.5 לחצנים פעילים

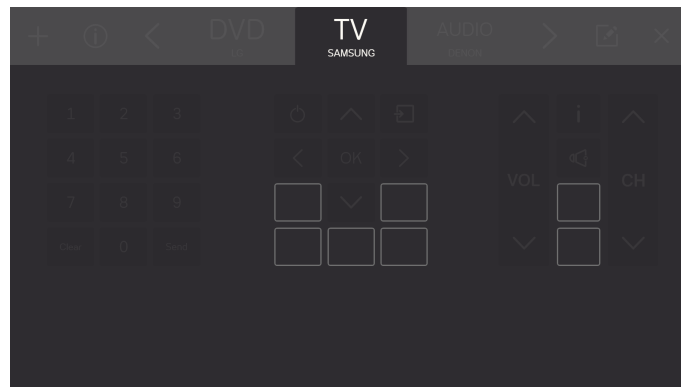

איור 5.6 לחצנים בלתי פעילים

5.2 בשימוש Tobii Dynavox Virtual Remote


Tobii Dynavox Virtual Remote מאפשר למשתמש לשלוט בטלוויזיה, DVD, מערכת שמע וכו', מתוך ההתקן.

כל הפונקציות ב- Virtual Remote ניתן להפעיל את כל הפונקציות ב- באמצעות מגע ועכבר גם יחד, כך שהמטפל או העוזר של המשתמש יכולים לסייע במקרה הצורך.



5.2.1 הפעלה ראשונית

מדריך קצר יציג את פריסת בפני המשתמש. Virtual Remote התוכנה פשוט בצע את ההוראות שעל המסך.

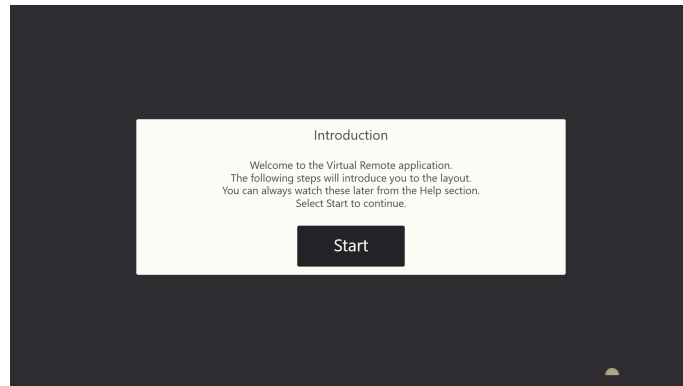

איור 5.7 ה Virtual Remote מסך ההקדמה

5.2.2 שינוי השלט הפעיל

לשינוי השלט הפעיל:

- בחר את אחד השמות בצדו השמאלי או הימני של השלט הפעיל.
 - או השתמש בכפתורים < ו- > למעבר בין השלטים הזמינים.
- השלט הפעיל יהיה תמיד השלט שבמרכז תפריט . Virtual Remote תפריט




5.2.3 שימוש בלחצני השלט

בחר בלחצן שבו תרצה להשתמש לשליחת האות להתקן. לחצני עוצמת שמע מוגדרים לרוב כך שישלחו אות מתמשך, כל עוד הכפתור נבחר. לקבלת מידע נוסף, ראה 5.2.5.3.1 אורך אות, עמוד 52. להזנת מספר גדול מ-9 (מספר ספרות), בצע את השלבים הבאים.

מספרים גדולים מ-9 - רשימת שלבים

1. בחר את המספרים לשליחה ברצף המתאים. כל המספרים שנבחרו יופיעו בתיבה לבנה מתחת לאזור המספרים בשלט.

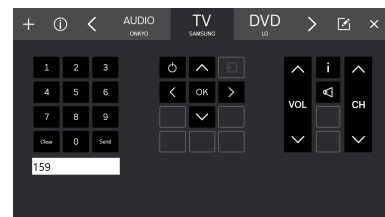

2. בחר את שלח כפתור למשלוח אותות למכשיר או נקה למחוק את כל המספרים שנבחרו

5.2.4 הוסף שלט רחוק.


ישנן שתי (2) דרכים להוספת שלט חדש

5.2.4.1 הוספת שלט מוגדר מראש

להוספת שלט מוגדר מראש חדש, בצע את השלבים הבאים:


הוספת שלט מוגדר מראש - רשימת שלבים

1. בחר ב-  מהתפריט.
2. בחר בלחצן 'מוגדר מראש'

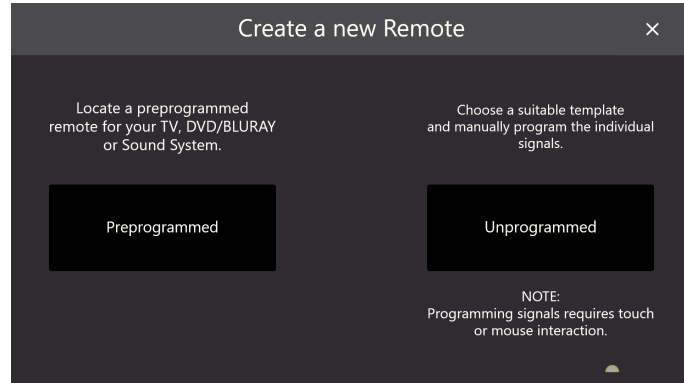


3. בחר את סוג השלט המוגדר מראש

- טלוויזיה
- DVD/בלו-ריי
- שמע

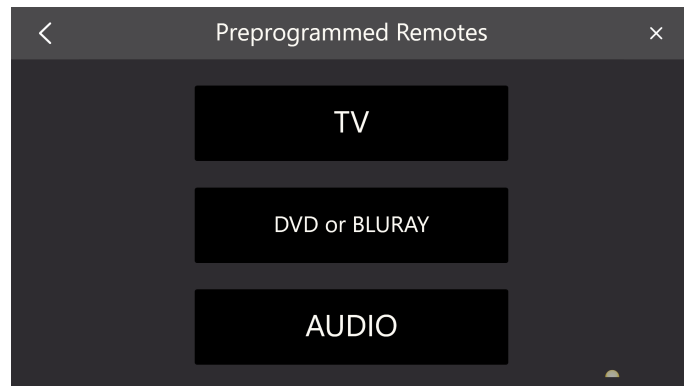


4. בחר מותג מהרשימה

אם אינך יכול למצוא את המותג, בחר אחרתפריט, למידע נוסף ראה . 5.2.4.1.1 שלטים אחרים, עמוד 44

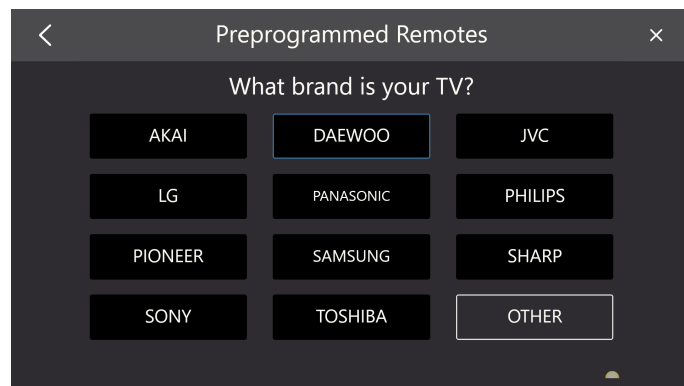


5. לאחר בחירת מותג, יוצג חלון מוקפץ עם מספר השלטים המוגדרים מראש שזמינים לשימוש.

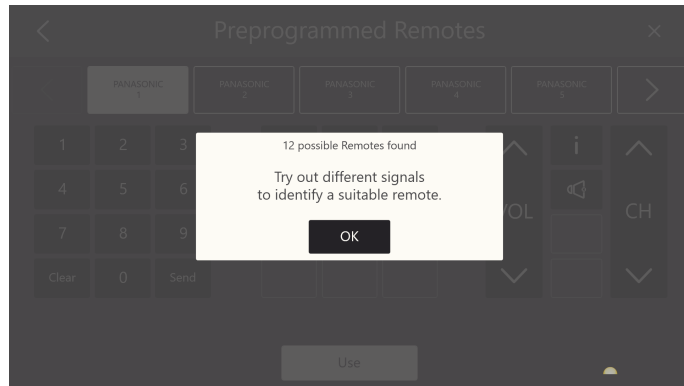

בחר את אישור כפתור.

6. בחר שלט.

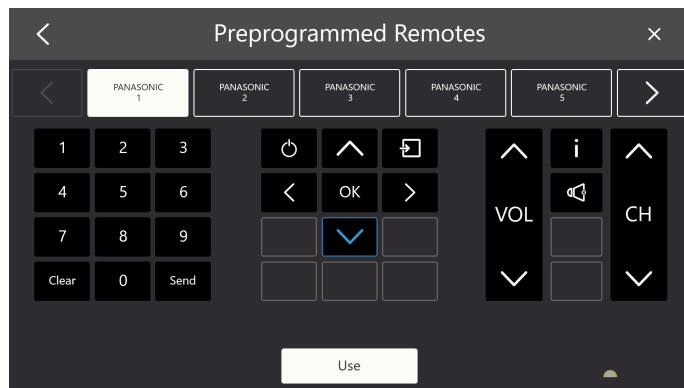


7. לאיתור שלט מתאים, נסה לשלוח אותות שונים באמצעות השלט הנבחר.

8. חזור על שלבים 6 ו-7 עד לאיתור השלט המתאים ביותר.


השתמש בלחצנים < ו- > למעבר בין השלטים הזמינים.

9. בחר בשלט המתאים ביותר.

10. בחר השתמש כפתור.

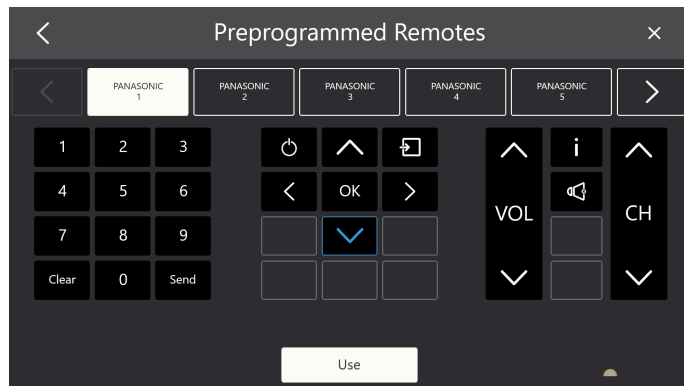

11. השלט שנבחר יועתק לרשימת השלטים הזמינים.

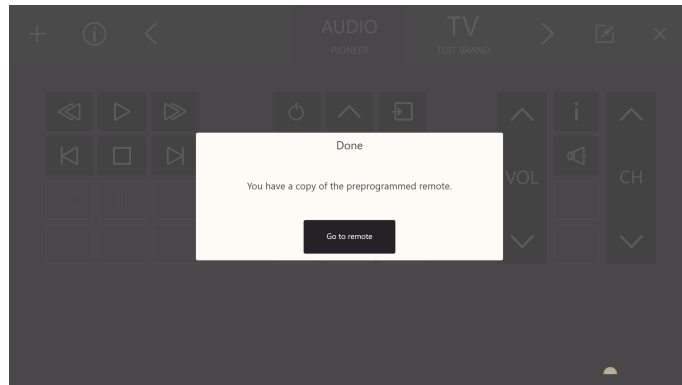


בחר את עבור לשלט רחוק כפתור להשלמה.

5.2.4.1.1 שלטים אחרים


להוספת שלטים אחרים, בצע את השלבים הבאים:

הוספת שלטים אחרים - רשימת שלבים


1. בצע את שלבים 1 - 3 מתוך הרשימה: הוספת שלט מוגדר מראש - רשימת שלבים, עמוד 42.
2. בחר את אחר כפתור.
3. הזן את שם המותג בתיבת הטקסט.

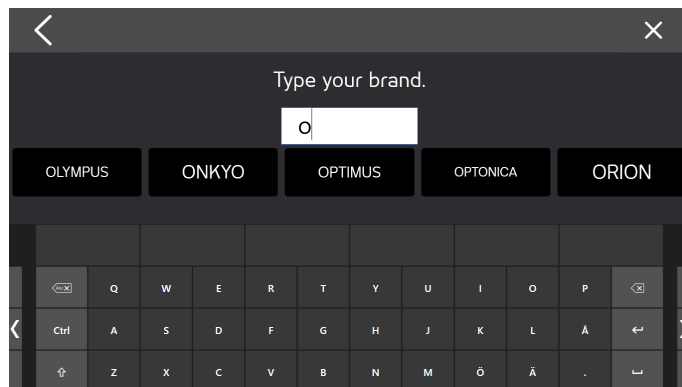


לצמצום תוצאות החיפוש, הקש תווים נוספים.

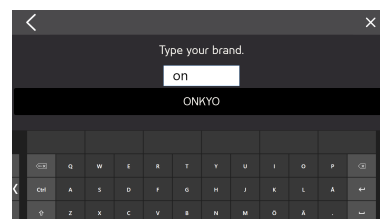

4. בחר מותג.

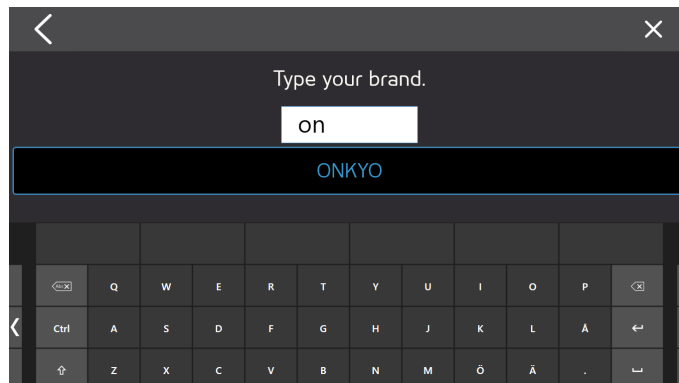


5. לאחר בחירת מותג, יוצג חלון מוקפץ עם מספר השלטים המוגדרים מראש שזמינים לשימוש.

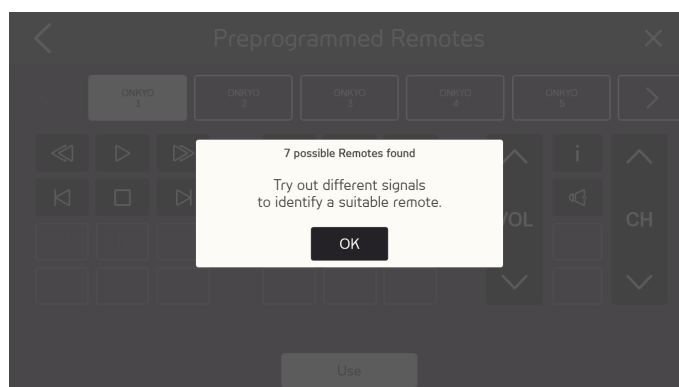

בחר את אישור כפתור.

6. בחר שלט.

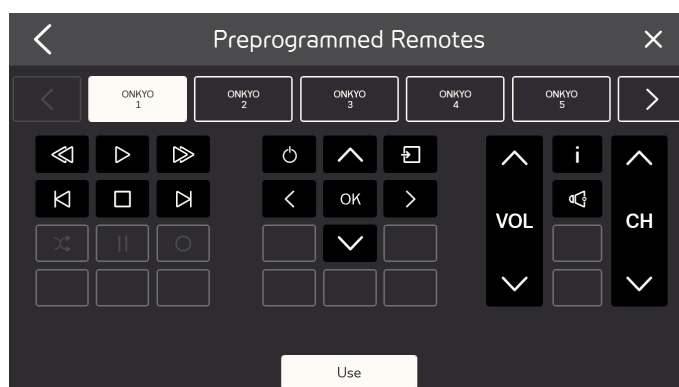


7. לאיתור שלט מתאים, נסה לשלוח אותות שונים באמצעות השלט הנבחר.

8. חזור על שלבים 6 ו-7 עד לאיתור השלט המתאים ביותר.


השתמש בלחצנים < ו- > למעבר בין השלטים הזמינים.

9. בחר בשלט המתאים ביותר.

10. בחר השתמש כפתור.

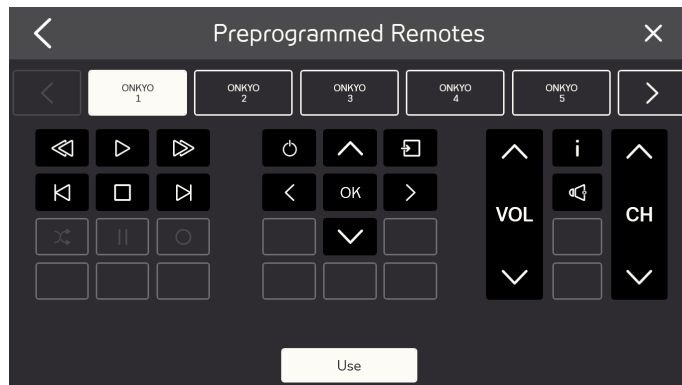

11. השלט שנבחר יועתק לרשימת השלטים הזמינים.

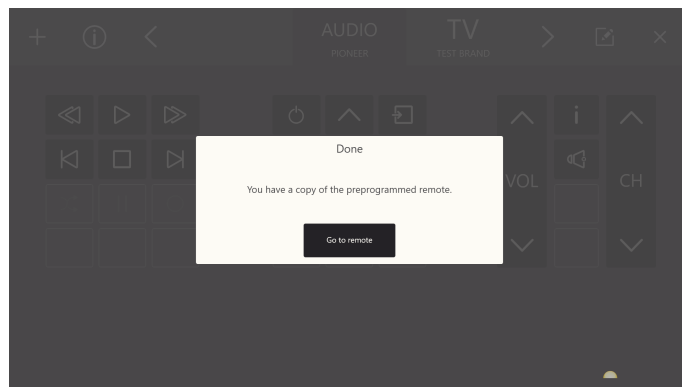


בחר את עבור לשלט רחוק כפתור להשלמה.

5.2.4.2 הוספת שלט רחוק לא מוגדר

להוספת שלט לא מוגדר חדש, בצע את השלבים הבאים:

הוספת שלט לא מוגדר - רשימת שלבים


1. בחר ב- מהתפריט.
2. בחר בלחצן 'לא מוגדר'

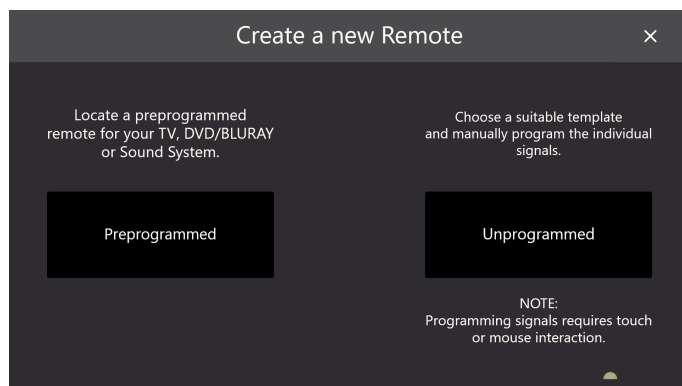


3. בחר בסוג שלט לא מוגדר

- טלויזיה
- שמע
- ממיר כבלים

- DVD/בלו-ריי
- תבנית ריקה

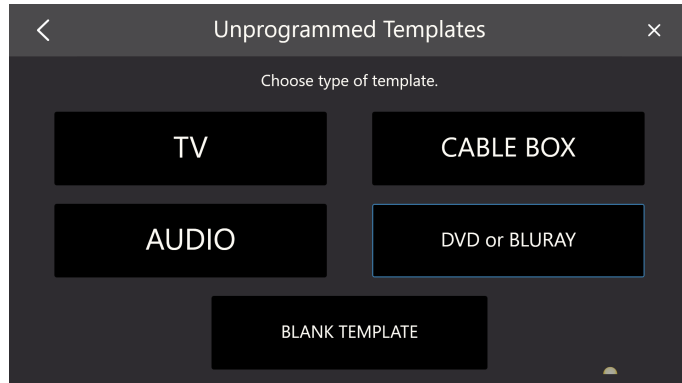

4. בחר לחצן שאותו תרצה להגדיר.

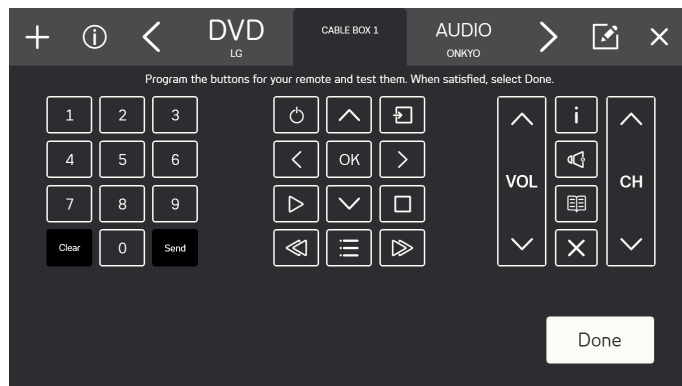


הסמלים הזמינים משתנים בהתאם לסוג השלט שנבחר בשלב 3.




5. בחר לחצן שאותו תרצה להגדיר.

6. כוון את השלט רחוק שלך Tobii Dynavox אל מקלט האינפירה-אדום שברשותך. לחץ על הכפתור בשלט אותו תרצה שהשלט רחוק הווירטואלי ילמד.

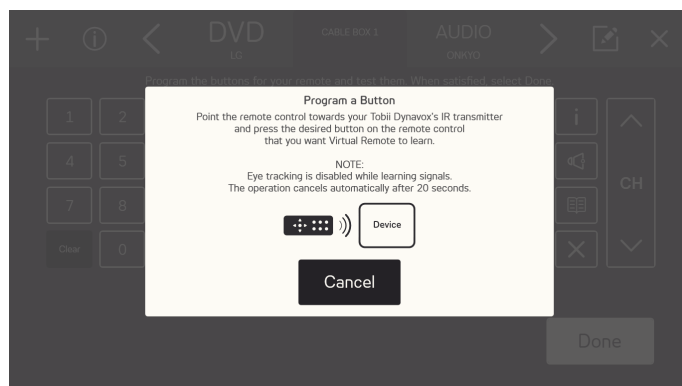

7. לאחר שמירת האות בשלט רחוק הווירטואלי, תופיע ההודעה המוקפצת סיום. בוצע החלוק הקופץ יוצג.

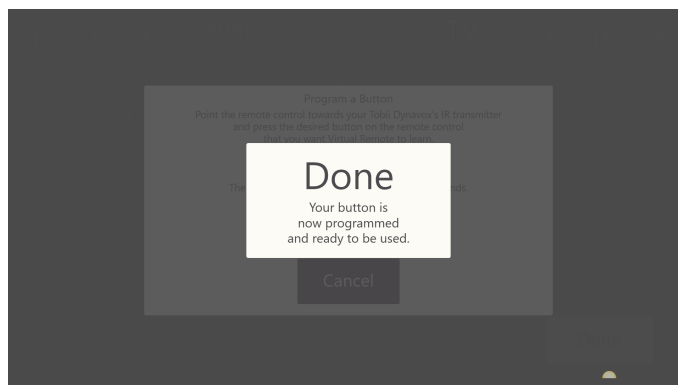


ההודעה המוקפצת תיסגר אוטומטית כעבור מספר שניות. 

8. חזור על שלבים 5-7 עד להגדרת כלל הלחצנים הרצויים בשלט.

לשינוי או מחיקת לחצנים בשלט, עליך לסיים את ההגדרה ולעבור למצב עריכה. למידע נוסף אודות מצב עריכה, ראה 5.2.5 מצב עריכה, עמוד 48. 

9. בחר בוצע לסיום.

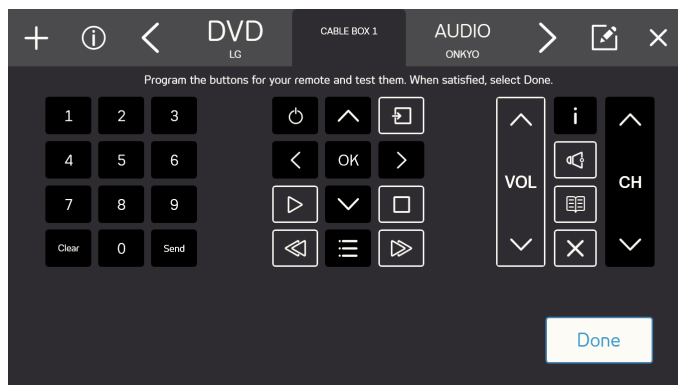


5.2.5 מצב עריכה

במצב עריכה באפשרותך לבצע שינויים בשלטים קיימים. ודא שהשלט שברצונך לערוך הוא השלט הפעיל. לכניסה למצב עריכה, בצע את השלבים הבאים:

מצב עריכה - רשימת שלבים

1. בחר בכפתור  (מצב עריכה).

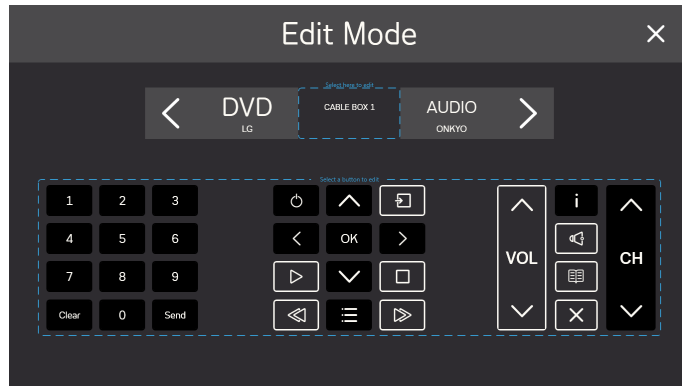

2. בחר בחלק שבו תרצה לערוך שינויים. ניתן לבצע את השינויים הבאים:
 - לשינוי שם השלט, ראה 5.2.5.1 שינוי שם שלט, עמוד 49
 - מחיקת שלט, ראה 5.2.5.2 מחיקת שלט, עמוד 50
 - שינוי לחצן פעיל קיים, ראה 5.2.5.3 עריכת שינויים בלחצן פעיל קיים.
 - שינוי לחצן לא מוגדר קיים, ראה 5.2.5.4 עריכת שינויים בלחצן לא מוגדר קיים, עמוד 54.
 - הוספת לחצן חדש לחלל ריק, ראה 5.2.5.5 הוספת לחצן חדש לחלל ריק, עמוד 56

5.2.5.1 שינוי שם שלט

לשינוי שם שלט, בצע את השלבים הבאים:


שינוי שם שלט

1. בחר בכפתור  (מצב עריכה).




2. לחץ על התיבה "בחר כאן כדי לערוך" מסביב לשם השלט.

3. בחר את תייג מחדש כפתור.

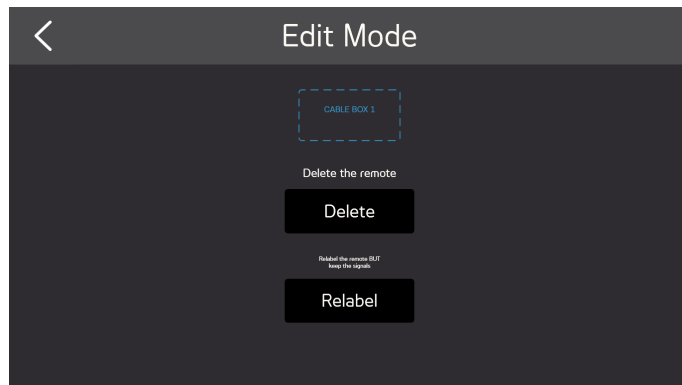

4. הוץ תווית חדש.

הקפד להשתמש בשם קצר.

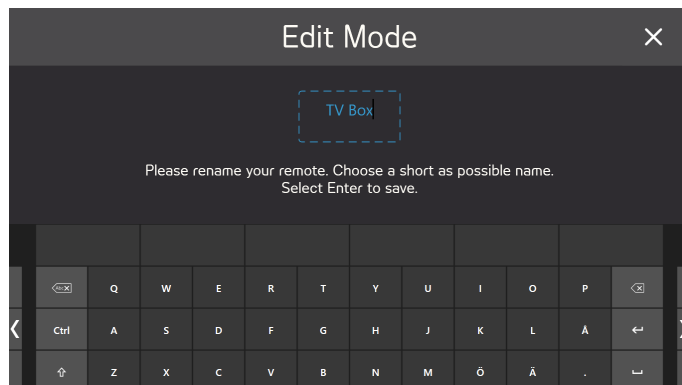

5. בחר את קלט לסיום תהליך שינוי התווית, לחץ על הכפתור אישור במקלדת.



6. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל .

5.2.5.2 מחיקת שלט


למחיקת שלט, בצע את השלבים הבאים:

מחיקת שלט - רשימת שלבים

1. בחר בכפתור (מצב עריכה).




2. לחץ על התיבה "בחר כאן כדי לערוך" מסביב לשם השלט.
3. בחר את מחק כפתור.

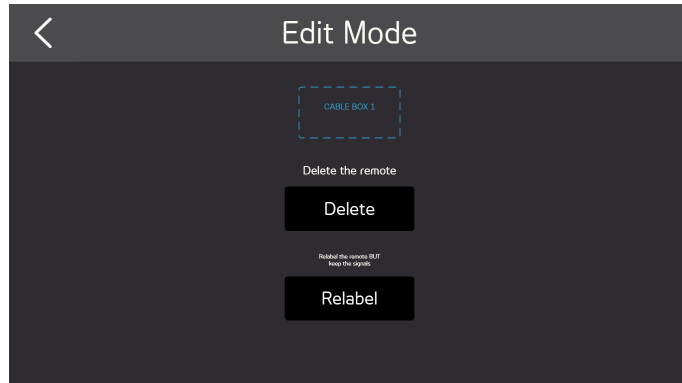

4. בחר:

- כן מחק
- לא ביטול

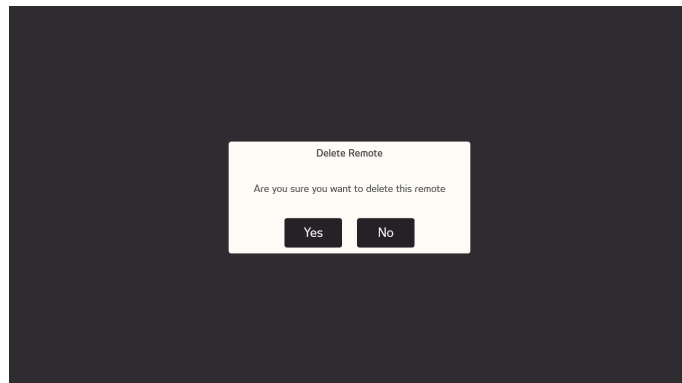

5. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל X.

5.2.5.3 עריכת שינויים בלחצן פעיל קיים

לעריכת שינויים בלחצן פעיל קיים, בצע את השלבים הבאים:

עריכת שינויים בלחצן פעיל קיים - רשימת שלבים


1. בחר בכפתור  (מצב עריכה).





2. בתיבה "בחר לחצן לעריכה" מסביב ללחצני השלט, בחר לחצן עם רקע שחור המכיל סמל או טקסט, כדוגמת:
3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- אורך אות, ראה 5.2.5.3.1 אורך אות.
- אות חדש, ראה 5.2.5.3.2 אות חדש, עמוד 52
- שינוי טקסט, ראה 5.2.5.3.3 שינוי טקסט, עמוד 53
- שינוי סמל, ראה 5.2.5.3.4 שינוי סמל, עמוד 54
- בחירה בלחצן 'ניקוי' תביא למחיקת כל הנתונים השמורים אודות הלחצן.

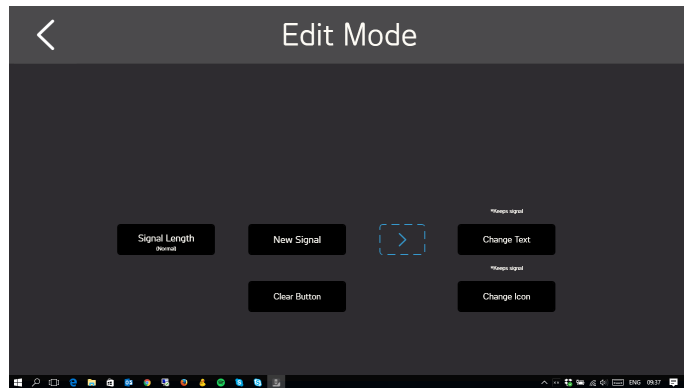

4. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל .


5.2.5.3.1 אורך אות

לשם קבלת היחידה להבנת האות מן Virtual Remote תזדקק לשנות את אורך האות. יש להגדיר את אורך האות גם במקרים בהם אתה מעוניין שהלחצן ישלח את האות ברציפות, כל עוד הלחצן נבחר.

בחר אחת (1) מהאפשרויות הבאות:

- רגיל - שליחת פרץ קצר של אותות אינפרה-אדומים.
- ארוך - שליחת אות אינפרה-אדום במשך שנייה אחת (1).
- ארוך במיוחד - שליחת אות אינפרה-אדום במשך שתי (2) שניות.
- רציף - שליחה של אות כל עוד הלחצן נבחר.

למשל, זוהי הגדרה נפוצה עבור לחצני עוצמת שמע

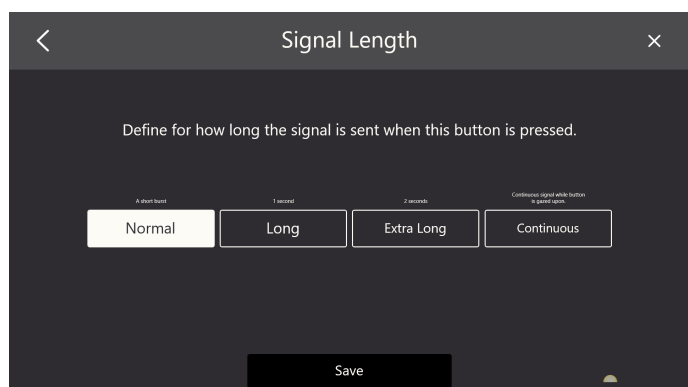


5.2.5.3.2 אות חדש


להגדרת אות חדש ללחצן, בצע את השלבים הבאים:

אות חדש - רשימת צעדים

1. כוון את השלט רחוק שלך Tobii Dynavox אל מקלט האינפירה-אדום שברשותך. לחץ על הכפתור בשלט אותו תרצה שהשלט רחוק הווירטואלי ילמד.

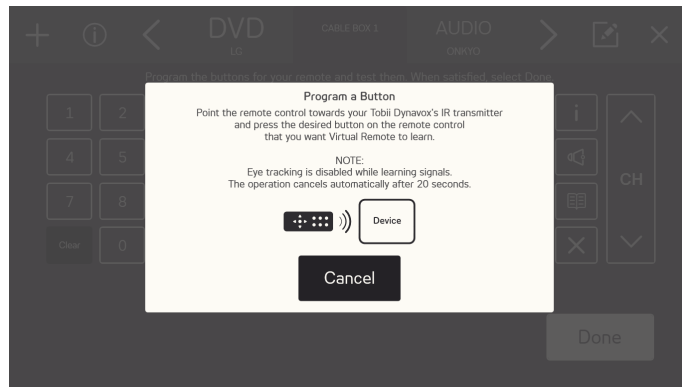

2. לאחר שמירת האות בשלט רחוק הווירטואלי, תופיע ההודעה המוקפצת סיום. בוצע החלוק הקופץ יוצג.

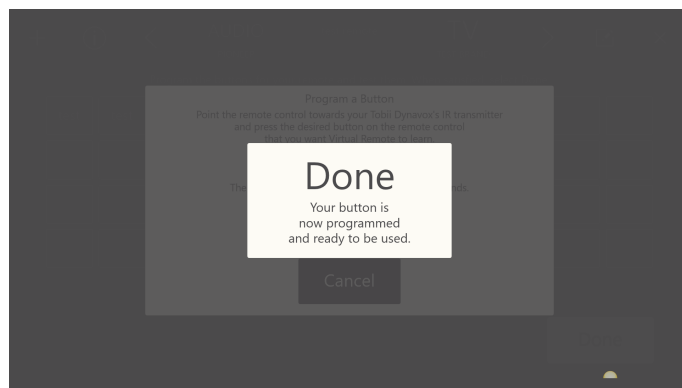

ההודעה המוקפצת תיסגר אוטומטית כעבור מספר שניות.




5.2.5.3.3 שינוי טקסט

לשינוי טקסט, בצע את השלבים הבאים:

שינוי טקסט - רשימת שלבים

1. הזן את הטקסט שיופיע על הלחצן.

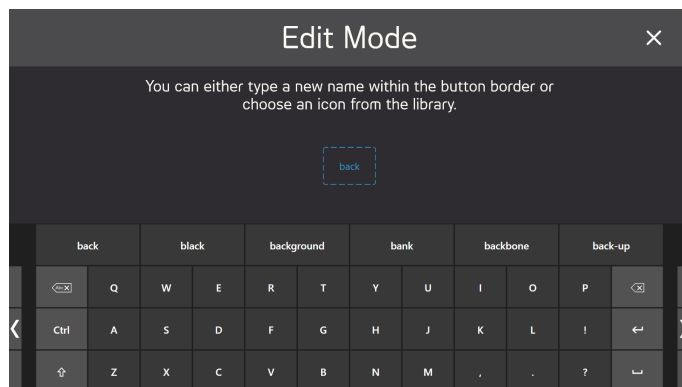


2. לאישור הטקסט, לחץ על הלחצן אישור/חזרה במקלדת.

5.2.5.3.4 שינוי סמל

לשינוי סמל, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר סמל זמין.

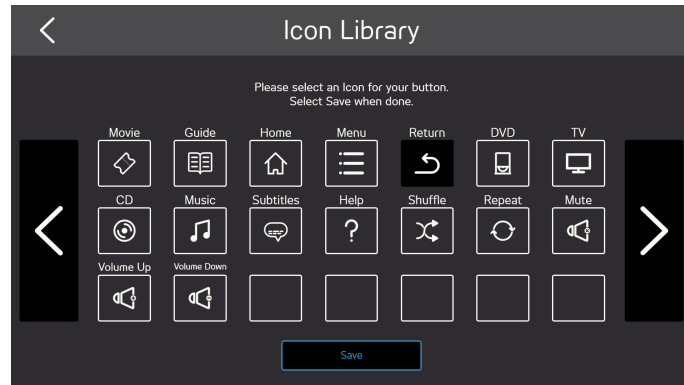

2. בחר את שמור כפתור לקבלת הסמל.

5.2.5.4 עריכת שינויים בלחצן לא מוגדר קיים

לעריכת שינויים בכפתור לא מוגדר קיים, בצע את השלבים הבאים:

עריכת שינויים בכפתור לא מוגדר קיים - רשימת שלבים

1. בחר בכפתור  (מצב עריכה).




2. בתיבה "בחר כפתור לעריכה" מסביב ללחצני השלט, בחר לחצן עם רקע אפור המכיל סמל או טקסט, כדוגמת:

3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- הגדרה, ראה 5.2.5.4.1 הגדרה, עמוד 55
- שינוי טקסט, ראה 5.2.5.3.3 שינוי טקסט, עמוד 53
- שינוי סמל, ראה 5.2.5.3.4 שינוי סמל, עמוד 54

- בחירה בלחצן 'ניקוי' תביא למחיקת כל הנתונים השמורים אודות הלחצן.

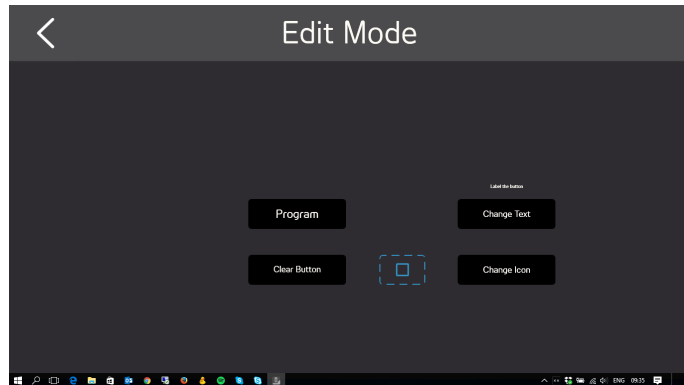


4. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל X.

5.2.5.4.1 הגדרה


להגדרת אות ללחצן, בצע את השלבים הבאים:

הגדרה - רשימת שלבים

1. כוון את השלט רחוק שלך Tobii Dynavox אל מקלט האינפרה-אדום שברשותך. לחץ על הכפתור בשלט אותו תרצה שהשלט רחוק הווירטואלי ילמד.

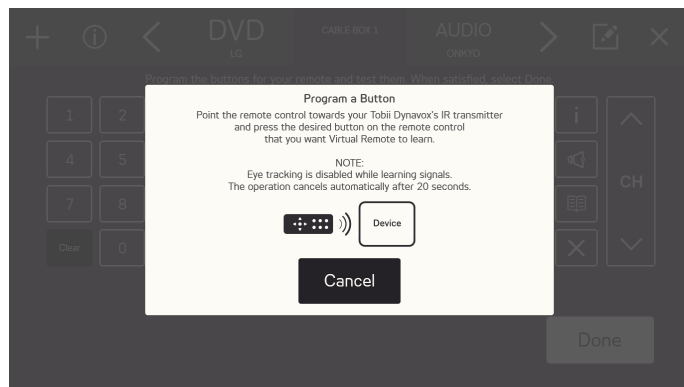

2. לאחר שמירת האות בשלט רחוק הווירטואלי, תופיע ההודעה המוקפצת סיום. בוצע החלוק הקופץ יוצג.

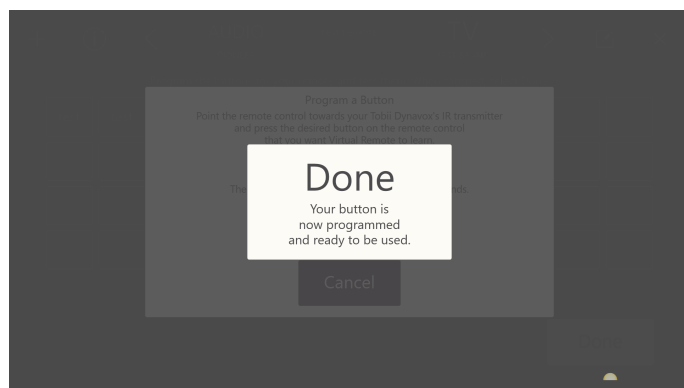

ההודעה המוקפצת תיסגר אוטומטית כעבור מספר שניות.



5.2.5.5 הוספת לחצן חדש לחלל ריק

להוספת לחצן חדש לחלל ריק, בצע את השלבים הבאים:


הוספת לחצן חדש לחלל ריק - רשימת שלבים

1. בחר בכפתור  (מצב עריכה).



2. בתיבה "בחר כפתור לעריכה" מסביב לכפתורי השלט, בחר לחצן ריק עם רקע אפור, כדוגמת .
3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- שינוי טקסט, ראה 5.2.5.3.3 שינוי טקסט, עמוד 53
- שינוי סמל, ראה 5.2.5.3.4 שינוי סמל, עמוד 54

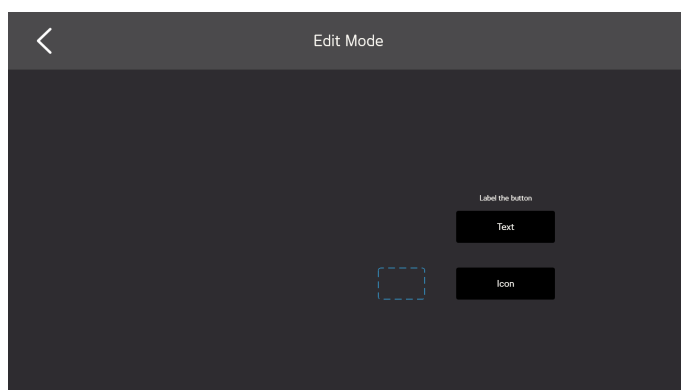


4. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל .




מידע

5.2.6

בעמוד המידע תוכל למצוא את כל נתוני הגרסה הן עבור החומרה והן עבור מוצרי התוכנה השונים.

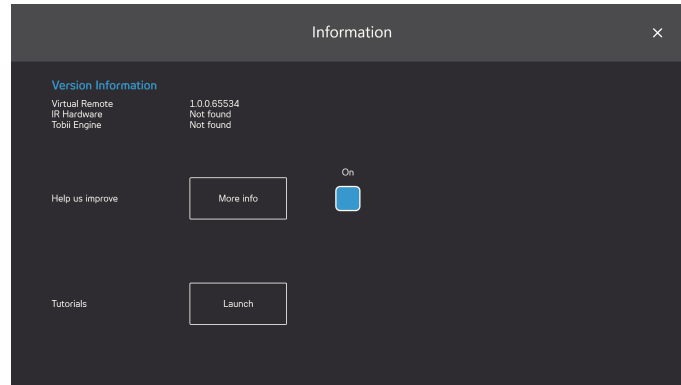

עזור לנו להשתפר: לעזרה Tobii Dynavox לצורך שיפור התוכנה, העבר את תיבת הסימון למצב מופעל. מופעל. בחר בכפתור 'מידע נוסף' לפתיחת עמוד עם הסברים מתאימים. לקבלת מידע נוסף, ראה איור 5.8 איסוף נתונים, עמוד 57.

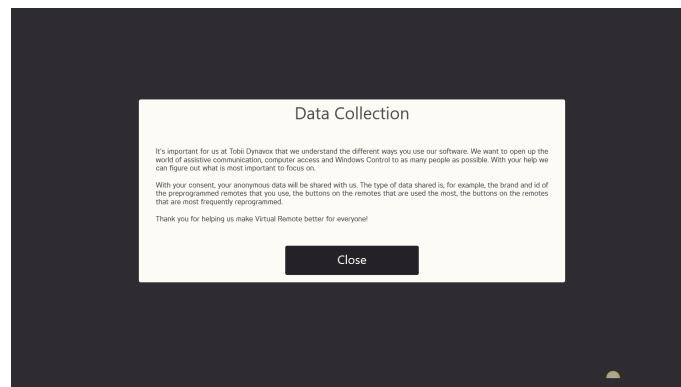

איור 5.8 איסוף נתונים

שיעורים: תוכל גם להשיק את Virtual Remote השיעורים על ידי בחירת השק כפתור.

זכויות יוצרים © Tobii AB (publ). לא כל המוצרים והשירותים מוצעים בכל שוק מקומי. המפרטים הטכניים כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. כל הסימנים המסחריים האחרים שייכים לבעליהם המתאימים.

תמיכה בהתקן Tobii Dynavox שברשותך

קבל עזרה מקוונת

ע"י בדף התמיכה הספציפי למוצר הנוגע להתקן Tobii Dynavox שברשותך. הדף כולל מידע עדכני על בעיות ועל טיפים וטריקים בנוגע למוצר. מצא את דפי התמיכה שלנו www.TobiiDynavox.com/ אונייך. support-training

צור קשר עם נציג המכירות או המפיץ שלך

לשאלות או בעיות בקשר למוצר, צור קשר עם נציג המכירות או המפיץ המורשה של Tobii Dynavox לשם קבלת סיוע. מחלקת התמיכה מכירה היטב את ההגדרות האישיות שלך ומסוגלת לעזור לך בצורה הטובה ביותר עם טיפים והדרכה על המוצר. לפרטי הקשר אנא בקר www.TobiiDynavox.com/contact