

Erste Schritte mit Message Banking™



Dieser Service ist ein gemeinsames Projekt von der [Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde des Bostoner Kinderkrankenhauses](#) und [Tobii Dynavox](#). Es stellt Menschen, die in Gefahr sind, ihre Stimme zu verlieren, eine kostenlose und offene Datenbank mit Sprachnachrichten zur Verfügung. Das System der Datenbank leitet Sie beim Erstellen der Sprachnachrichten an, hilft, sie zu ordnen, speichert sie, bis sie gebraucht werden, und bietet sie auf allen zur Wiedergabe geeigneten Systemen zum Download an. Die Nutzung des Systems ist für den Benutzer kostenfrei. Die Speicherung der Nachrichten ist kostenfrei. Das Herunterladen der gespeicherten Nachrichten zur persönlichen Nutzung ist kostenfrei.



Wenn Sie das Aufnahmegerät immer dabei haben, können Sie viele verschiedene Nachrichten in unterschiedlichen Situationen aufnehmen. Weitere Beispiele und Tipps finden Sie unter [Message Banking, Voice Banking, and Legacy Messages](#) von John M. Costello, Kinderkrankenhaus Boston.

1. Schritt: Aufgenommene Nachrichten hochladen

1. Verbinden Sie ein WAV-Aufnahmegerät mit guter Qualität (z. B. einen Zoom H1) mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser und navigieren Sie zu [myMessageBanking.com](#) oder [myTobiiDynavox.com/messagebank](#).




Beide Webseiten stehen in vielen verschiedenen Sprachen zur Verfügung.


Sprachauswahl auf [myMessageBanking.com](#)




Sprachauswahl auf [myTobiiDynavox.com/messagebank](#)

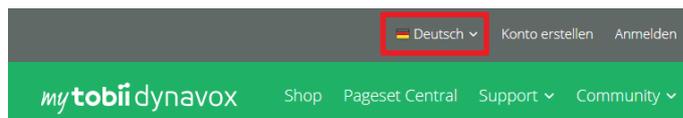

3. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten für myTobiiDynavox an oder erstellen Sie ein neues Konto (es ist kostenlos).
4. Wählen Sie die Schaltfläche **Hochladen** aus.

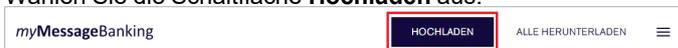


5. Suchen Sie nach dem Aufnahmegerät (Wechseldatenträger) bzw. dem Speicherort der Dateien mit Ihren WAV-Audioaufnahmen.

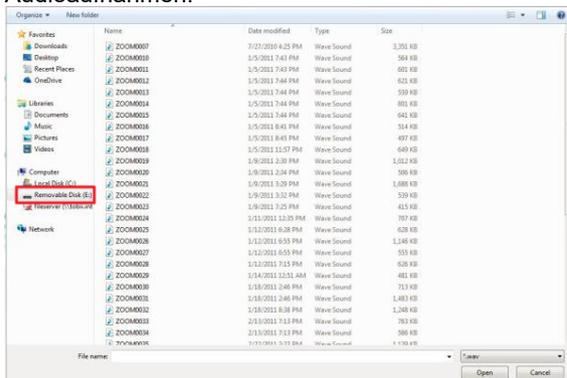

6. Wählen Sie die Datei(en), die Sie hochladen möchten, und anschließend **Öffnen** aus. Sie können Zeit sparen, indem Sie mehrere Dateien auswählen und auf einmal hochladen.

- Überprüfen Sie, ob im Menü **Transkribieren in** die richtige Sprache ausgewählt ist, und wählen Sie **Starten** aus.

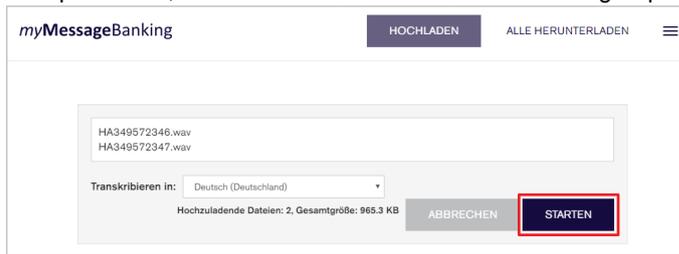

Die Transkription der Sprachnachrichten wird für mehr als 20 Sprachen unterstützt. Wählen Sie einfach im Transkriptionsmenü die Sprache des Sprechers aus. Wenn Ihre Sprache noch nicht zur Verfügung steht, wählen Sie „Nicht transkribieren“ aus und transkribieren die Nachricht nach dem Hochladen eigenhändig.

- Ein Benachrichtigungsfenster zeigt Ihnen den Status des Uploads. Nach Abschluss des Uploads wählen Sie **Meine Nachrichten anzeigen** aus.

2. Schritt: Nachrichtendateien verwalten und ordnen

Die hochgeladenen Audiodateien werden transkribiert, automatisch gekennzeichnet und in der Nachrichtendatenbank angezeigt. Nach dem Hochladen können sie Aufnahmen abspielen, den Text bearbeiten und Kennzeichnungen hinzufügen.

Das Hinzufügen von Kennzeichnungen ist eine sehr gute Methode, die Nachrichten zu ordnen. Wenn Sie beginnen, mit einem UK-Gerät zu arbeiten, finden Sie die Nachrichten nach Kategorien (z. B. Telefongespräch, Begrüßungen, Mahlzeiten usw.) geordnet vor. Überlegen Sie, in welchem Kontext eine Nachricht benutzt werden könnte, und fügen Sie die entsprechenden Kennzeichnungen hinzu (eine Nachricht kann mehrere Kennzeichnungen haben). Achten Sie darauf, dass es nicht zu viele Kennzeichnung werden, damit Sie insgesamt den Überblick behalten und sich gut zurechtfinden.

Titel	Text	Vertrauen	Aufnahme	Kennzeichnungen
HA349572346 Deutsch - Deutschland	Teneriffa ready.	😊	0:02 100%	+

Einzelne Dateien bearbeiten

- Wählen Sie die Schaltfläche **Wiedergabe**  aus, um sich die Aufnahme anzuhören.
- Wenn Sie den Text ändern müssen, klicken Sie den Text in der Textspalte an.
- Wählen Sie die Schaltfläche **Kennzeichnung hinzufügen**  aus, wenn Sie eine neue Kennzeichnung hinzufügen möchten.
- Der Zuverlässigkeitswert steht für die Verlässlichkeit der Transkription. Vor allem bei Nachrichten mit niedrigem Zuverlässigkeitswert sollten Sie sich die Aufnahme anhören und die Transkription bei Bedarf korrigieren. Wenn die Transkription richtig ist und keiner Korrektur bedarf, wählen Sie das Symbol mit dem Gesicht und anschließend **Bestätigen** aus.

Titel	Text	Vertrauen	Aufnahme	Kennzeichnungen
HA349572346 Deutsch - Deutschland	Teneriffa ready.	😊	0:02 100%	+
HA349572347 Deutsch - Deutschland	Teneriffa ready.	😊	0:02 100%	+

Mehrere Dateien bearbeiten (Sammelbearbeitung)

- Sie können mehrere Dateien gleichzeitig bearbeiten, wenn Sie die Kästchen neben den Nachrichten markieren. Wenn Sie alle Nachrichten bearbeiten möchten, markieren Sie das Kästchen neben der Spaltenüberschrift „Titel“.
- Wählen Sie **Ausgewählte Titel ersetzen**    aus, wenn Sie für alle ausgewählten Nachrichten den Titel durch ihren transkribierten Text ersetzen möchten.



„Ausgewählte Titel ersetzen“ ist ein sehr nützlicher Befehl, wenn die Titel Ihrer Nachrichtendateien aus Zahlen- und Buchstabenkombinationen bestehen, die Ihr Aufnahmegerät nach dem Zufallsprinzip ausgewählt hat.

- Mit **Kennzeichnung hinzufügen**  können Sie allen ausgewählten Nachrichten eine Kennzeichnung hinzufügen.
- Mit **Herunterladen**  laden Sie nur die ausgewählten Nachrichten herunter.
- Mit **Löschen**  löschen Sie die ausgewählten Nachrichten.

3. Schritt: Nachrichtendateien herunterladen

Die heruntergeladenen Dateien werden in einer gemeinsamen ZIP-Datei gespeichert, um den Import in Ihre Sprachsoftware zu erleichtern.

1. *So laden Sie alle Nachrichten herunter:* Wählen Sie oben auf der Seite **Alle herunterladen** aus.
So laden Sie ausgewählte Nachrichten herunter: Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie herunterladen möchten, und wählen Sie anschließend **Herunterladen** aus. 
2. Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Popup-Fenster **Herunterladen** aus.
3. Wählen Sie **OK** aus, um die ZIP-Datei zu speichern.

4. Schritt: Nachrichten in Communicator 5 importieren

WAV-Dateien lassen sich zwar in viele UK-Geräte importieren, die Software Communicator 5 wurde jedoch mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die den Vorgang vereinfachen. Wenn Sie Communicator 5 auf einem Sprachausgabegerät, Surface Pro oder Laptop von Tobii Dynavox verwenden, können Sie Ihre Nachrichten aus der Datenbank ganz einfach folgendermaßen importieren und nutzen:




Vergewissern Sie sich, dass Sie Communicator 5 auf die neueste Version aktualisiert haben.

Nachrichten importieren


1. Starten Sie Communicator 5 und öffnen Sie das **Schnellmenü**.
2. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**.



3. Wechseln Sie zur Registerkarte **Audio**.
4. Wählen Sie **Aufnahmebibliotheken** aus.

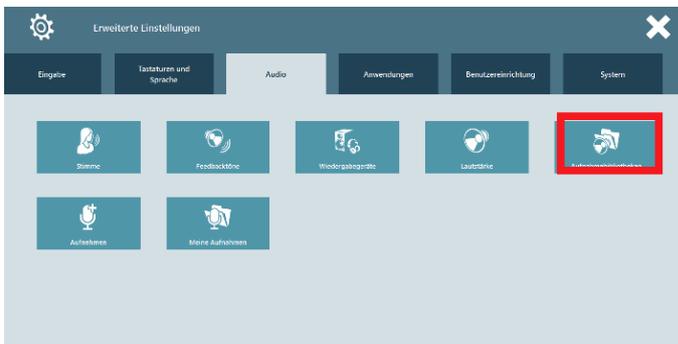

5. Wählen Sie **Neu** aus.

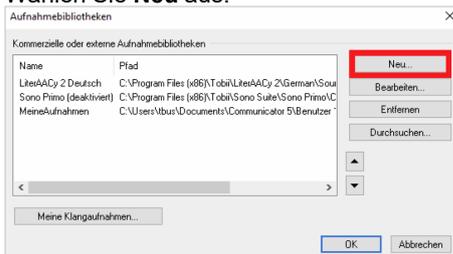

6. Vergewissern Sie sich, dass **ZIP-Datei mit gespeicherten Aufnahmen importieren** aktiviert ist, und wählen Sie **Weiter** aus.

7. Geben Sie eine Bezeichnung für die importierte Audiodatei ein.



Vergewissern Sie sich, dass **Nachrichten zu „Meine Sätze“ hinzufügen** aktiviert ist. Dadurch werden in „Meine Sätze“ automatisch Kategorien erstellt, die Ihren Kennzeichnungen entsprechen.

8. Wählen Sie **Durchsuchen** aus, navigieren Sie zu der ZIP-Datei, die Sie importieren möchten, und wählen Sie sie aus.

9. Wählen Sie **Weiter** aus, um die Nachrichten in der ZIP-Datei zu importieren.


10. Sobald die Dateien extrahiert wurden, wählen Sie **Fertig stellen** aus.

Die Nachrichten verwenden


1. Öffnen Sie das Schnellmenü und wählen Sie **Alle Seitensets** aus.



2. Wählen Sie **Textkommunikation** aus.

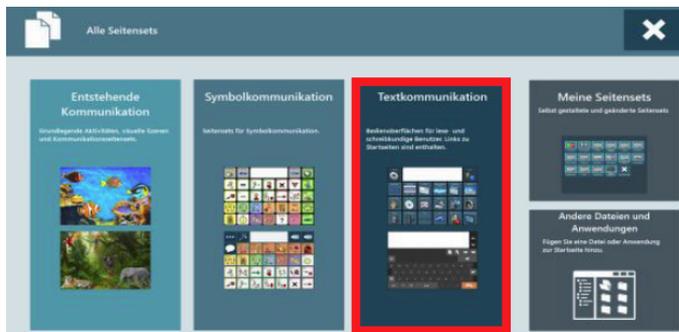

3. Wählen Sie auf der Registerkarte „Direkte Kommunikation“ **Sprechen mit Sätzen 7 x 5** aus.

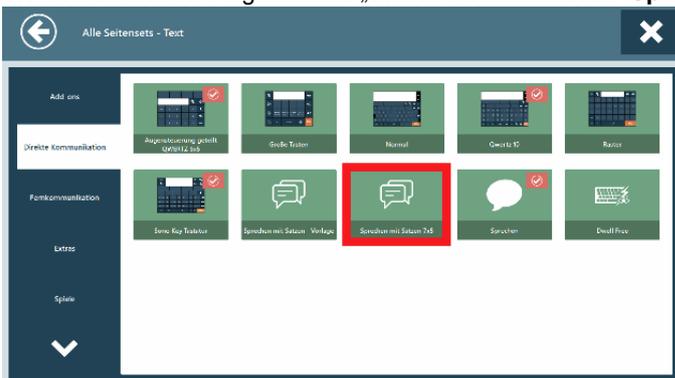

4. Wählen Sie **Zur Startseite hinzufügen** aus.
 5. Wählen Sie **X** aus, um das Menü zu schließen.
 6. Ihre aufgenommenen Nachrichten stehen Ihnen jetzt über die Startseite zur Verfügung. Die Sortierung entspricht den Kennzeichnungen, die Sie auf myMessageBanking.com festgelegt haben.